



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ»
Ростиашвили Г.Г.
30 января 2014г.

Инструкция по применению

Ложки стоматологические для снятия слепка зубов по ТУ 9391-013-49908538-2014

Ложки стоматологические применяется в ортопедической стоматологии для снятия слепка зубов антагонистов верхней и нижней челюстей в условиях лечебных учреждений.

Основные технические характеристики:

Материал: Ложки изготавливается из следующих материалов:

- полистирол
- суперконцентрат пигмента на основе полистирола

Размеры: ложки выпускаются трех размеров и для быстрой индентификации имеют разные цвета:

Размер	Обозначение	Ширина основания	Цвет
№1 малый размер	В-1 (верхняя)	59,5±0,1 мм	зеленый
	Н-1 (нижняя)	61,7±0,1 мм	
№2 средний размер	В-2 (верхняя)	61,5±0,1 мм	красный
	Н-2 (нижняя)	65,5±0,1 мм	
№3 большой размер	В-3 (верхняя)	68,6±0,1 мм	синий
	Н-3 (нижняя)	75,3±0,1 мм	

Каждая ложка имеет ложе для оттискового материала, ограниченное бортами, и ручку для удержания и ориентировки ее в полости рта.

Вид климатического исполнения - УЗ по ГОСТ 15150-69.

Способ применения

Перед применением ложки должны быть подвергнуты дезинфекции холодным методом.

Между бортиками ложки равномерно нанести оттискную слепочную массу. Далее действовать в соответствии с рекомендациями по применению используемой слепочной массы.

Ложка является изделием **однократного применения**.

Противопоказания

При применении по прямому назначению никаких противопоказаний не имеет.

Побочные эффекты

При применении по прямому назначению никаких побочных эффектов не имеет.

Упаковка

Ложка упакована в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Ложки упаковываются:

- по 100 шт. (100 ложек для снятия слепка с верхней или с нижней челюсти одного размера) в мягкую упаковку из полиэтиленового пакета;
- по 10 шт. (5 ложек для снятия слепка с верхней челюсти, 5 ложек для снятия слепка с нижней челюсти одного размера) в картонную коробку
- эксплуатационная документация – 1 шт.

Хранение и транспортирование

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (от -50°C до +40°C, относительная влажность не более 98% при 25°C).

Условия транспортирования по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Гарантийный срок годности – 2 года со дня выпуска ложек.

Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные).

Разработано и производится:
 ООО “НКФ ОМЕГА-ДЕНТ”
 Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д.31
www.omegadent.ru

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листа(ов)

Генеральный директор

ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ»

Г.Ростопкин Ростопкины Г.Г.

