

**Интродьюсер разрывной «Apollo»
по КИТА.942273.001ТУ модель «Apollo 6F-13»**

КИТА.942273.001ТУ

предназначен для введения имплантируемого или временного электрода для электрокардиостимулятора в вену пациента

СОДЕРЖИМОЕ:

- оболочка интродьюсера:
внутренний диаметр 2,0 мм (6 F),
эффективная длина 13 см;
- расширитель:
внешний диаметр 2,0 мм (6 F),
внутренний диаметр 0,9 мм,
эффективная длина 16 см,
- проводник: диаметр 0,97 мм (0,038"),
длина 50 см, j-образный с радиусом
кривой 4 мм, подвижным ядром;
- игла Merit Advance 18Gx70 мм,
- шприц Люэр 12 мл

**6F
13 см**

НЕТОКСИЧНО

ВНУТРИ



STERILE EO

1. В нестерильной зоне вскрыть пакет упаковочный (вторую упаковку).
2. Извлечь контейнер (первую упаковку) и переместить его в стерильную зону.
3. Руками в стерильных перчатках с соблюдением всех правил асептики и антисептики вскрыть первую упаковку и извлечь из неё содержимое упаковки.

Внимание!

Извлечение проводника через иглу может привести к его повреждению. Сначала удалите иглу, затем проводник.

LOT

ПАРТИЯ

21-02



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

23.07.2024



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

23.07.2021

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ


30



ООО «Кардиоэлектроника»



Россия, 142181, Московская область, г. Подольск,
ул. Заводская (мкр. Климовск), дом 2М, офис 340
+7(495)221-25-51, +7(496)761-68-53
info@cardioelektronica.com

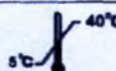


ХРАНЕНИЕ



Регистрационное удостоверение

№

Сделано в России

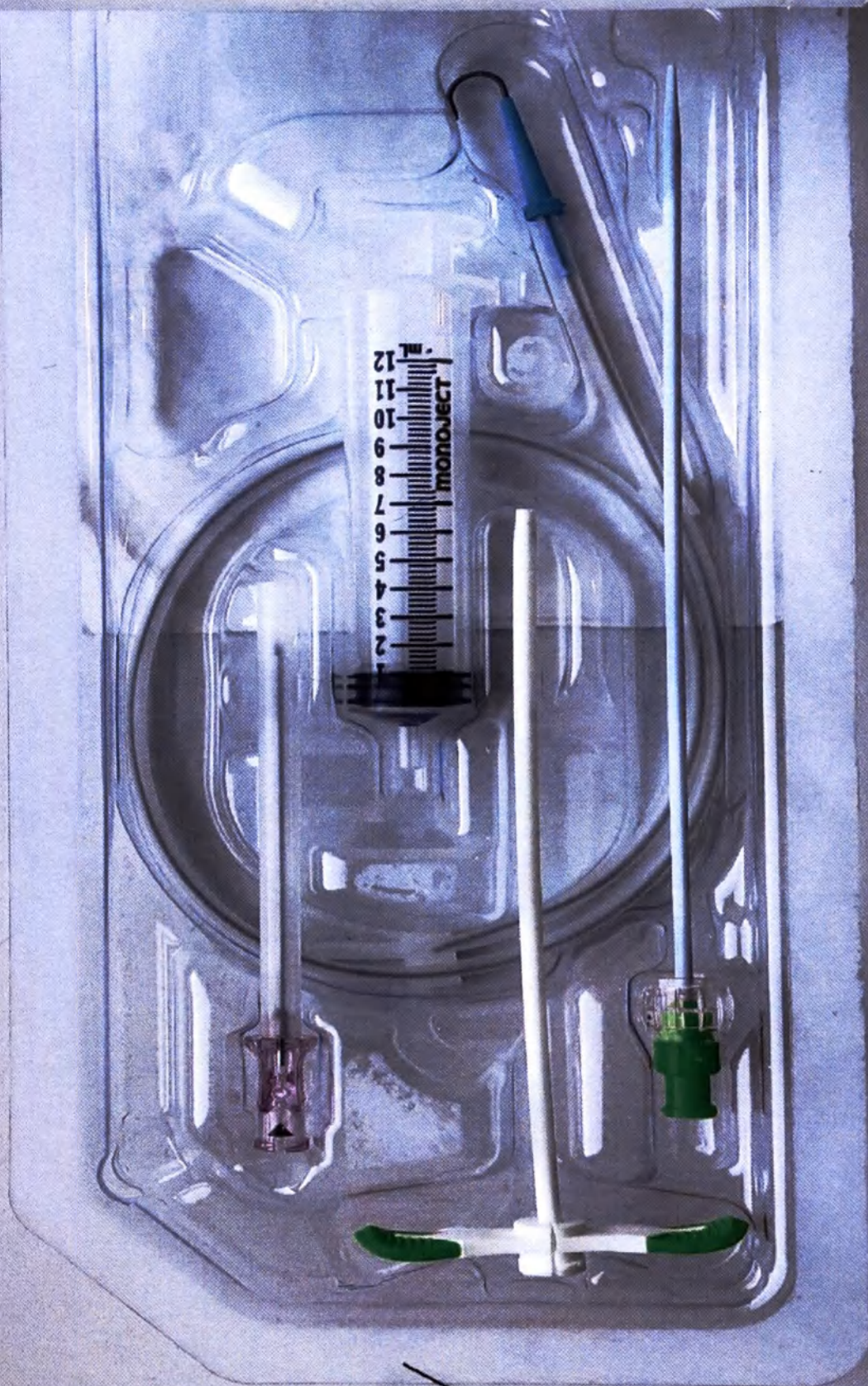

Контейнер

Расширитель:
внешний диаметр 2,0 мм (6F),
внутренний диаметр 0,9 мм,
эффективная длина 16 см

Оболочка интродьюсера:
внутренний диаметр 3,3 мм (10F),
эффективная длина 13 см

Шприц Люэр 12 мл

Проводник:
диаметр 0,97 мм (0,038"),
длина 50 см, j-образный
с радиусом кривой 4 мм,
подвижным ядром

Игла Merit Advance 18Gx70мм

Чехол для проводника

Чехол для иглы

[illegible]

Интродуктор реверсивный «Аролю»
по ИТА 94273.001ТУ модель «Аролю 79-13»
ИТА 94273.001ТУ

предназначен для введения интродуцируемого или промывного
катетера для интродукторно-интубатора в вену пациента

ОСОБЕННОСТИ:
• оболочка интродулятора
внутренний диаметр 2,3 мм (7 F),
наружный диаметр - 3 мм,
продолжитель
внешний диаметр 2,3 мм (7 F),
внутренний диаметр 0,9 мм (3 F),
общая длина 16 см,
продольный диаметр 0,97 мм (0,33"),
длина 50 см - укороченный - радиус кривизны 15 см, рабочий диаметр - 3 мм,
по Монт Авиано 15х70 мм,
циркуль 16х2 1/2 мм

**7F
13 cm**

НЕТОКСИЧНО

СТЕРИЛЬНО

1. Не вставляя кончик в вену, всасать (пипет) уколочный
уколочный уколочный
2. Мягко кончиком (первую укладку) в перемещение
от стертую кончик
3. Углубить в стертую кончик с соблюдением всех
правил асептики и антисептики всасать первую укладку
и вложить в нее следующую укладку

Внимание!
Исключительная продукция - через вену можно привести к его
повреждению. Снизить давление, чтобы избежать повреждения.

LUT 21-02
23.07.2024
23.07.2021

ООО «Кардиоэлектроника»

Россия 142181 Московская область г. Подольск
ул. Заводская, дом 2М, офис 340
т+7(495) 212-26-51, т+7(495) 781-48-83
e-mail: info@cardioelektronika.ru

Регистрация удостоверения Сертификат

Интерьер-интер раздвижной «Аполло»
по КИТА.942373.001TU модель «Apollo 7F-3»
КИТА 942373.001TU

Предназначен для монтажа на вертикальную или горизонтальную балку из алюминия или нержавеющей стали в полу, потолке, стене.

Содержимое:

- обочина интерьер-интер
- внутренний диаметр 2,3 см (7 f),
- эффективный диаметр 13 мм,
- толщина 12 мм,
- внешний диаметр 2,3 см (7 f),
- внутренний диаметр 2,3 см,
- эффективный диаметр 13 мм,
- толщина 12 мм,
- толщина: диаметр 0,97 мм (0,038),
- длина 50 см - обрешетка с радиусом обрешетки 15 мм,
- материал обрешетки: алюминий
- материал Метал Advance 180x70 мм,
- ширина 12 мм

7F

13 CM

1. В нижней части зоны покрытия имеет установленный интерьер-интер.

2. Металлический корпус (каркас) и перфорированный лист в стандартной форме.

3. Рамка в стандартной форме и обрешетка. Если требуется, можно использовать стандартную обрешетку и листы Метал Advance.

НЕ ТРОГАТЬ

STAYED

Внимание!

Использование продукции карниз-интер может привести к его повреждению. Следует избегать его использования.

АКТИ гарантия **21-02**

23.07.2024

23.07.2021

30

ООО «Кардэлектроника»

Россия, 141281, Московская область г. Подольск
ул. Заводская (по Косыгина), д. 256, офис 340
т/ф: 8(495)211-25-51, ф: 7(495)701-68-83
info@cardselectronica.com

30

Регистрация в Едином государственном реестре недвижимости

Сделано в России

[illegible][illegible]

Информационный центр «Росмед»
по ИТУА №3273-001ТУ модель «Ардио ТF-13»

ИТУА №622-3.001ТУ
подразделяется на следующие информационные или идентификационные
этикетки для электрокардиостимулятора в вену пациента.

СОДЕРЖИМОЕ:

- обложка из непрозрачного
внутренний диаметр 2,3 см (7 P),
эффективная длина 113 см;
- расщепитель:
внешний диаметр 2,3 см (7 P),
внутренний диаметр 0 мм,
эффективная длина 16 см,
- проводник: диаметр 9,85 м (0,038"),
длина 90 см; оборудован с радиусом
сгиба 10 см поперечного канала;
тип Melt Advance 18Gx70 mm,
чашечка Lead 12 mm

7F
13 CM

НЕ ПОСЛЕДИТЬ


STERILE IO

1. В нестерильной зоне вскрыть пакет упаковочный
(вторую упаковку).

2. Извлечь катетеризатор (первую упаковку) и перевести его
на стерильную зону.

3. Руками в стерильных перчатках с соблюдением всех
правил гигиены и антисептики вскрыть первую упаковку
и установить на ней соединяющую упаковку.

Внимание!
Избегайте проведения через эту область грудины и его
перегородки. Сначала удалите иглу, затем проводник.

MET 21-02 КАРДИОЭЛЕКТРОНИКА

аккумуляторная батарея 23.07.2024

серия 23.07.2024

ООО «Кардиоэлектроника»

Россия, 142181, Московская область, г. Подольск,
ул. Заводская (Инд. Кливленд), дома 284, офис 340
т/ф +7(495)221-25-51 т/ф +7(495)761 68 53
info@cardioelectronic.com

Медицинский
Генеральный представитель

[illegible][illegible]

Инструкция по разрывному «Априор»
по КИТА 84227.001ТУ модель «Априор 7F-15»
КИТА 84227.001ТУ

предназначен для проведения расследований (испытаний) при возникновении
сбои/аварии для электроавтоматического вводу питания

СОДЕРЖАНИЕ:
-оболочка из нейлона-номера
внутренний диаметр 2,3 мм (7 F),
-эффективная длина 13 см,
-разрыватель
-внешний диаметр 2,3 мм (7 F);
внутренний диаметр 0,8 мм,
-эффективная длина 16 см
-проводник: диаметр 0,97 мм (0,038");
длина 80 см - образцовый с радиусом
кривой 4 мм - подвешиваемый
через Metal Anchors (ISO4701)
-ширина 102 мм

1 В испытательной зоне вскрыть пакет упаковочный
(первую упаковку)
2 Вскрыть контурную (первую упаковку) и переместить
его в стерильную зону
3 Разрушить в стерильных пакетах с соблюдением всех
правил асептики и аэротехники вскрыть первую упаковку
и вывести из нее содержимое из пакета

Выводы:
Извлечение проводника через иглу можно привести к его
повреждению. Сначала удалите иглу, затем проводник

ISO 9001 21-02
с сертификатом
сертификат
сертификат

ООО «Кардиосентрум»
Россия, 142181, Московская область, с/поселение
г. Звездослав, район Крюково, дом 2М, офис 340
т./ф. +7(495)221-425-51, ф. +7(495)781 68-53
e-mail: info@cardioelectromedia.com

www.       

**Интродьюсер разрывной «Apollo»
по КИТА.942273.001ТУ модель «Apollo 7F-13»
КИТА.942273.001ТУ**

предназначен для введения имплантируемого или временного электрода для электрокардиостимулятора в вену пациента

СОДЕРЖИМОЕ:

- оболочка интродьюсера:
внутренний диаметр 2,3 мм (7 F),
эффективная длина 13 см;
- расширитель:
внешний диаметр 2,3 мм (7 F),
внутренний диаметр 0,9 мм,
эффективная длина 16 см;
- проводник: диаметр 0,97 мм (0,038"),
длина 50 см, j-образный с радиусом
кривой 4 мм, подвижным ядром;
- игла Merit Advance 18Gx70 мм,
- шприц Люэр 12 мл

**7F
13 см**

НЕТОКСИЧНО

ВНУТРИ

STERILE EO

1. В нестерильной зоне вскрыть пакет упаковочный (вторую упаковку).
2. Извлечь контейнер (первую упаковку) и переместить его в стерильную зону.
3. Руками в стерильных перчатках с соблюдением всех правил асептики и антисептики вскрыть первую упаковку и извлечь из неё содержимое упаковки.

Внимание!

Извлечение проводника через иглу может привести к его повреждению. Сначала удалите иглу, затем проводник.

LOT ПАРТИЯ **21-02**
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО **23.07.2024**
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ **23.07.2021**

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ

30



ООО «Кардиоэлектроника»




Россия, 142181, Московская область, г. Подольск,
ул. Заводская (мкр. Климовск), дом 2М, офис 340
+7(495)221-25-51, +7(496)761-68-53
info@cardioelektronica.com



Регистрационное удостоверение
№

Сделано в России

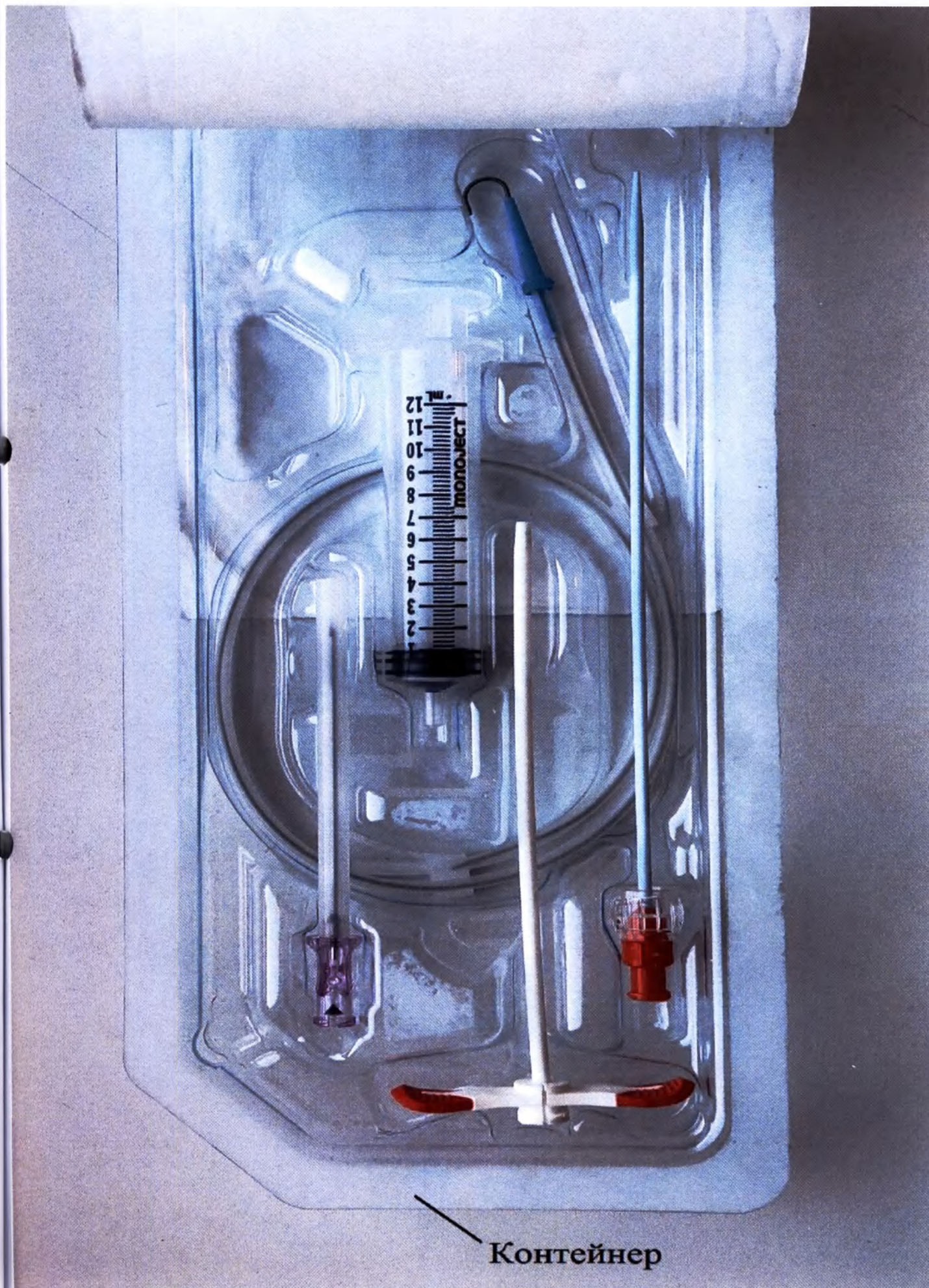

Расширитель:
внешний диаметр 2,3 мм (7F),
внутренний диаметр 0,9 мм,
эффективная длина 16 см

Оболочка интродьюсера:
внутренний диаметр 2,3 мм (7F),
эффективная длина 13 см

Шприц Люэр 12 мл

Проводник:
диаметр 0,97 мм (0,038"),
длина 50 см, j-образный
с радиусом кривой 4 мм,
подвижным ядром

Игла Merit Advance 18Gx70 мм

Чехол для проводника

Чехол для иглы

**Интродьюсер разрывной «Apollo»
по КИТА.942273.001ТУ модель «Apollo 8F-13»
КИТА.942273.001ТУ**

предназначен для введения имплантируемого или временного электрода для электрокардиостимулятора в вену пациента

СОДЕРЖИМОЕ:

- оболочка интродьюсера:
внутренний диаметр 2,6 мм (8 F),
эффективная длина 13 см;
- расширитель:
внешний диаметр 2,6 мм (8 F),
внутренний диаметр 0,9 мм,
эффективная длина 16 см,
- проводник: диаметр 0,97 мм (0,038"),
длина 50 см, J-образный с радиусом
кривой 4 мм, подвижным ядром;
- игла Merit Advance 18Gx70 мм,
- шприц Люэр 12 мл

**8F
13 см**

НЕТОКСИЧНО

ВНУТРИ



STERILE EO

1. В нестерильной зоне вскрыть пакет упаковочный (вторую упаковку).
2. Извлечь контейнер (первую упаковку) и переместить его в стерильную зону.
3. Руками в стерильных перчатках с соблюдением всех правил асептики и антисептики вскрыть первую упаковку и извлечь из неё содержимое упаковки.

Внимание!

Извлечение проводника через иглу может привести к его повреждению. Сначала удалите иглу, затем проводник.

LOT

ПАРТИЯ

21-02



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

23.07.2024



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

23.07.2021

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ


30



ООО «Кардиоэлектроника»



Россия, 142181, Московская область, г. Подольск,
ул. Заводская (мкр. Климовск), дом 2М, офис 340
+7(495)221-25-51, +7(496)761-68-53
info@cardioelektronika.com

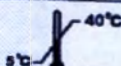


ХРАНЕНИЕ



Регистрационное удостоверение

Сделано в России

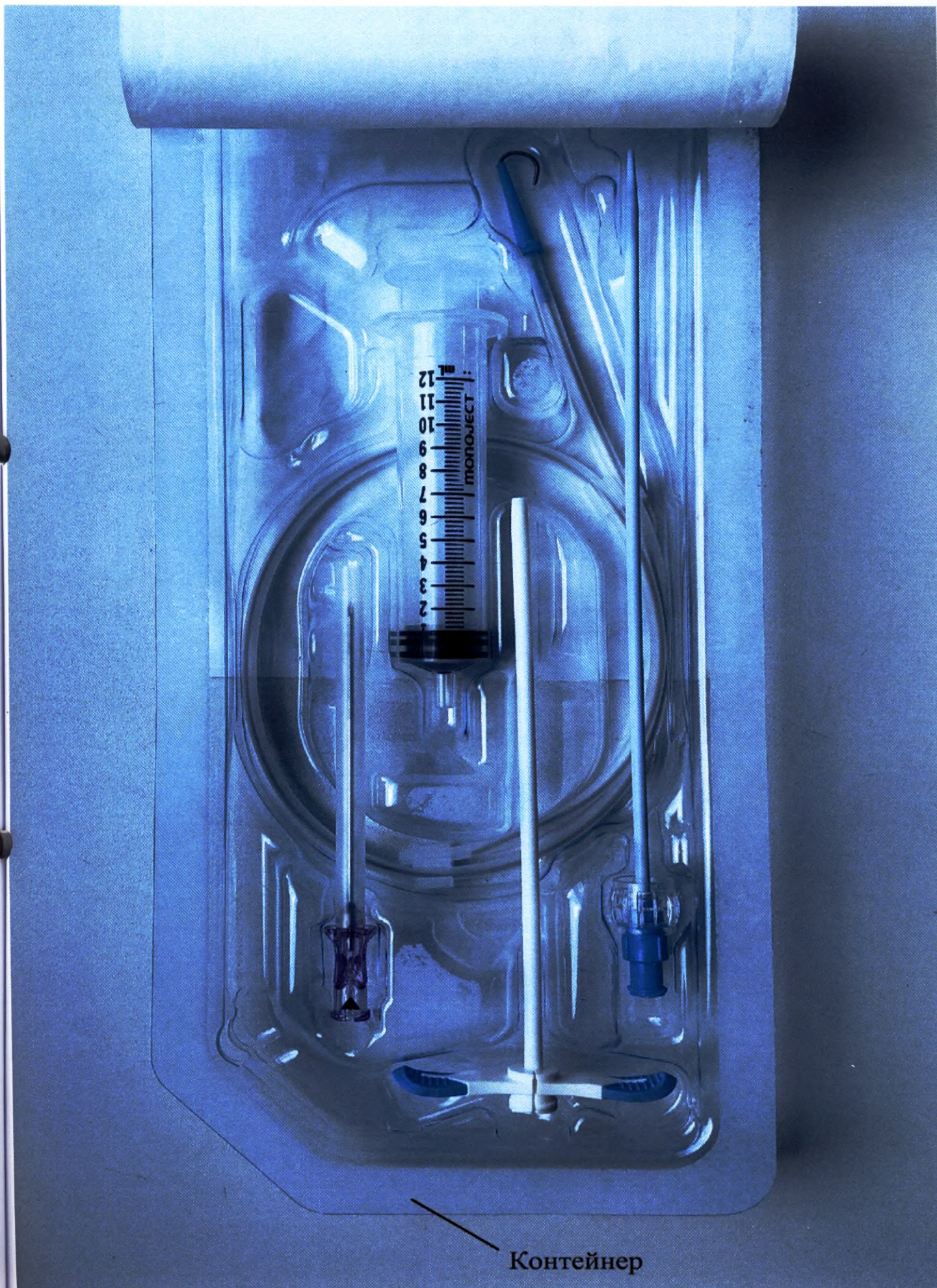

Расширитель:
внешний диаметр 2,6 мм (8F),
внутренний диаметр 0,9 мм,
эффективная длина 16 см

Оболочка интродьюсера:
внутренний диаметр 2,6 мм (8F),
эффективная длина 13 см

Шприц Люэр 12 мл

Проводник:
диаметр 0,97 мм (0,038"),
длина 50 см, j-образный
с радиусом кривой 4 мм,
подвижным ядром

Игла Merit Advance 18Gx70 мм

Чехол для проводника

Чехол для иглы

[illegible]

Интеграторы развития «Аройо»
по КАТАЛОГУ 9227 0017 Укажите: «Аройо WF-13»
КАТАЛОГ 9227 0017

Продукция предназначена для измерения параметров ионизирующего излучения в лабораторных условиях для радиационной диагностики в атомной энергетике.

Основные характеристики:
электронный диаметр: 3,0 мм (0,12")
фотодиодная длина: 13 мм
соединительная длина: 10 мм
электронная длина: 16 мм
информационный диаметр: 0,97 мм (0,038")
вспомогательная длина: 10 мм
длина кабеля: 1,0 м
масса: 1,0 кг
масса брутто: 1,8 кг

9F
13 CM

НЕ ПОСЛАТЬ
В НАПРАВЛЕНИИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

STERILE 60

1. Встраиваемый датчик излучения в стандартный корпус (защитный кожух).

2. Излучение контролирует (измеряет) датчик и преобразует его в электрический сигнал.

3. Ручка и стандартный переключатель с соединительным кабелем позволяют дистанционно и автоматически измерять уровень излучения и включать/выключать датчик соответственно.

Внимание!
Излучение проникает через эту ручку. Проведите к ней дополнительную защиту. Сначала удалите эту ручку, затем проводите.

100%
100%
100%
100%

21-02
23.07.2024
23.07.2021

ООО «Кардионэлектроника»

Россия, 142418, Московская область, г. Подольск
ул. Мухоморова, д. 10, стр. 2/4, этаж: 540
т/ф: +7(495)221-29-51, ф: +7(495)701-08-93
info@cardioelectronic.com

ВНИМАНИЕ! НЕ ПОСЛАТЬ В НАПРАВЛЕНИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Интродуктор резиновой «Арой»
по КИТА 942373.001ТУ модель: «Арой 9F-13»
КИТА 942373.001ТУ

предназначен для введения интродукторного и конического электрода для электрокардиостимулятора в вену на плече

СОДЕРЖИМОЕ:
оболочка интродуктора
внутренний диаметр 3,0 мм (9F),
эффективная длина 12 см,
трещина,
внешний диаметр 3,0 мм (9F),
внутренний диаметр 0,5 мм,
эффективная длина 10 см,
проводник: диаметр 0,97 мм (0,038"),
длина 60 см, утолщенный с радиусом
кривизны 4 мм, покрытие полиуретаном,
тип No Myle Advantus 1452302, тип
«Чайка» Лотус 12 мм.

**9F
13 cm**

МЕТРОСКОП
ВНУТРИ
STERILE EO

1 Неправильная форма «крышки» имеет условный
знак «крышка»

2 Резиновый контейнер (первую упаковку) и первую часть
иголки в стерильной упаковке

3 Упаковка (первую упаковку) и первую упаковку
и «крышку» из нержавеющей стали

Важно!
Исключите продолжение «крышки» иголки при введении в его
посредством. Сначала удалите иголку, затем проводник.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ИЗД. № 10/2004

№ 21-02
23.07.2024
23.07.2024

ООО «Кардиоэлектроника»

Россия, 141281. Московская область, г. Подольск,
ул. Заводская (вп. Кривцова), д. 23А, этаж 340
т/ф: +7(495) 225-55-51 • +7(495) 791-68-53
info@cardioelectronics.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Сделано в России

[illegible]

...торговая сеть...
по КИ: 42273.00117 или ст. 42273.00117
КИТА 942273.00117
Габаритные размеры изделия: 180х170х115 мм
Содержимое:
коробочка из поликарбоната
внутренний диаметр 3,0 мм (9 F)
внешний диаметр 3,0 мм
внутренний диаметр 3,0 мм (9 F)
внешний диаметр 3,0 мм (9 F)
внутренний диаметр 0,8 мм
внутренний диаметр 1,6 мм
продольный диаметр 1,6 мм (0,038")
длина 50 см, рабочая часть 10 см
коробочка из поликарбоната
чехол для зарядки 180х170 мм
кабель USB 1,5 м

9F
13 CM

ИСТОРИЯ
X
STAYPUL E

1. Внутренний диаметр 3,0 мм (9 F)
2. Внутренний диаметр 0,8 мм
3. Внутренний диаметр 1,6 мм
4. Продольный диаметр 1,6 мм (0,038")
5. Длина 50 см, рабочая часть 10 см
6. Коробочка из поликарбоната
7. Чехол для зарядки 180х170 мм
8. Кабель USB 1,5 м

1. Внутренний диаметр 3,0 мм (9 F)
2. Внутренний диаметр 0,8 мм
3. Внутренний диаметр 1,6 мм
4. Продольный диаметр 1,6 мм (0,038")
5. Длина 50 см, рабочая часть 10 см
6. Коробочка из поликарбоната
7. Чехол для зарядки 180х170 мм
8. Кабель USB 1,5 м

Внимание!
Использование зарядки через USB может привести к его повреждению. Сид-алл укажите, какие проводки

167 21-02
23.07.2024
23.07.2021

ООО «Кардиоэлектроника»
Россия, 124181, Московская область, г. Подольск,
ул. Заводская (ул. Космодемьянская) д. 78, офис 340
т: +7(495)721-25-51, +7(495)781 68 63
info@cardioelectronics.com

Результаты измерения параметров

Сделано в России

критериями оценки равняемой ед. 1-го
по ЮНТА.94273.9011 (далее «А»)-85-3»
ЮНТА.94273.0017У

назначения для введения информации в логическую систему

Содержание:
чехол для интродьюсера
внутренний диаметр 30 мм (9 F),
внешний диаметр 13 см,
высота 17 см,
внешний диаметр 3,6 мм (9 F),
внутренний диаметр 3,5 мм,
длина 90 см, диаметр 0,97 мм (с 0,38"),
длина 90 см, -обработанный с резьбой
присоединения, внутренний диаметр
чехла Mini Advance 160X70 мм,
чехол Power 120 мм

9F
13 CM

интродьюсер

STERILE

1. В нестерильной зоне всегда пакет упаковочный
(детскую упаковку);
2. Изменить кончик (детскую упаковку) и герметичность
или с стерильной зоны;
3. Рукавице в стерильной перчатке с общими руками, в
перчатке левая и стерильная вставить первую упаковку
и вставить из нее стерильную упаковку;

Внимание!
Использование проводника через иглу можно привести к
повреждению. Сначала удалите иглу, затем проводник.

дет. 21-02
21-07 2024
23.07 2021

ООО «Кардиоэлектроника»

Россия, 142181, Московская область, П. Подольск
ул. Заречная (пер. Климовский), дом 28, офис 34
т: +7(495)221-25-51, т: +7(495)781-68-83
info@cardio-electronica.com

Рисунки, иллюстрации, фотографии

Сделано в РФ

[illegible][illegible][illegible]

**Интродьюсер разрывной «Apollo»
по КИТА.942273.001ТУ модель «Apollo 9F-13»
КИТА.942273.001ТУ**

предназначен для введения имплантируемого или временного электрода для электрокардиостимулятора в вену пациента

СОДЕРЖИМОЕ:

- оболочка интродьюсера:
внутренний диаметр 3,0 мм (9 F),
эффективная длина 13 см;
- расширитель:
внешний диаметр 3,0 мм (9 F),
внутренний диаметр 0,9 мм,
эффективная длина 16 см;
- проводник: диаметр 0,97 мм (0,038"),
длина 50 см, j-образный с радиусом
кривой 4 мм, подвижным ядром;
- игла Merit Advance 18Gx70 мм,
- шприц Люэр 12 мл

**9F
13 см**

НЕТОКСИЧНО

ВНУТРИ

STERILE EO

1. В нестерильной зоне вскрыть пакет упаковочный (вторую упаковку).
2. Извлечь контейнер (первую упаковку) и переместить его в стерильную зону.
3. Руками в стерильных перчатках с соблюдением всех правил асептики и антисептики вскрыть первую упаковку и извлечь из неё содержимое упаковки.

Внимание!

Извлечение проводника через иглу может привести к его повреждению. Сначала удалите иглу, затем проводник.

LOT ПАРТИЯ

21-02

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

23.07.2024

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

23.07.2021


30



ООО «Кардиоэлектроника»




Россия, 142181, Московская область, г. Подольск,
ул. Заводская (мкр. Климовск), дом 2М, офис 340
+7(495)221-25-51, +7(496)761-68-53
info@cardioelektronica.com

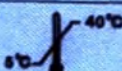

ХРАНЕНИЕ

Регистрационное удостоверение

Сделано в России

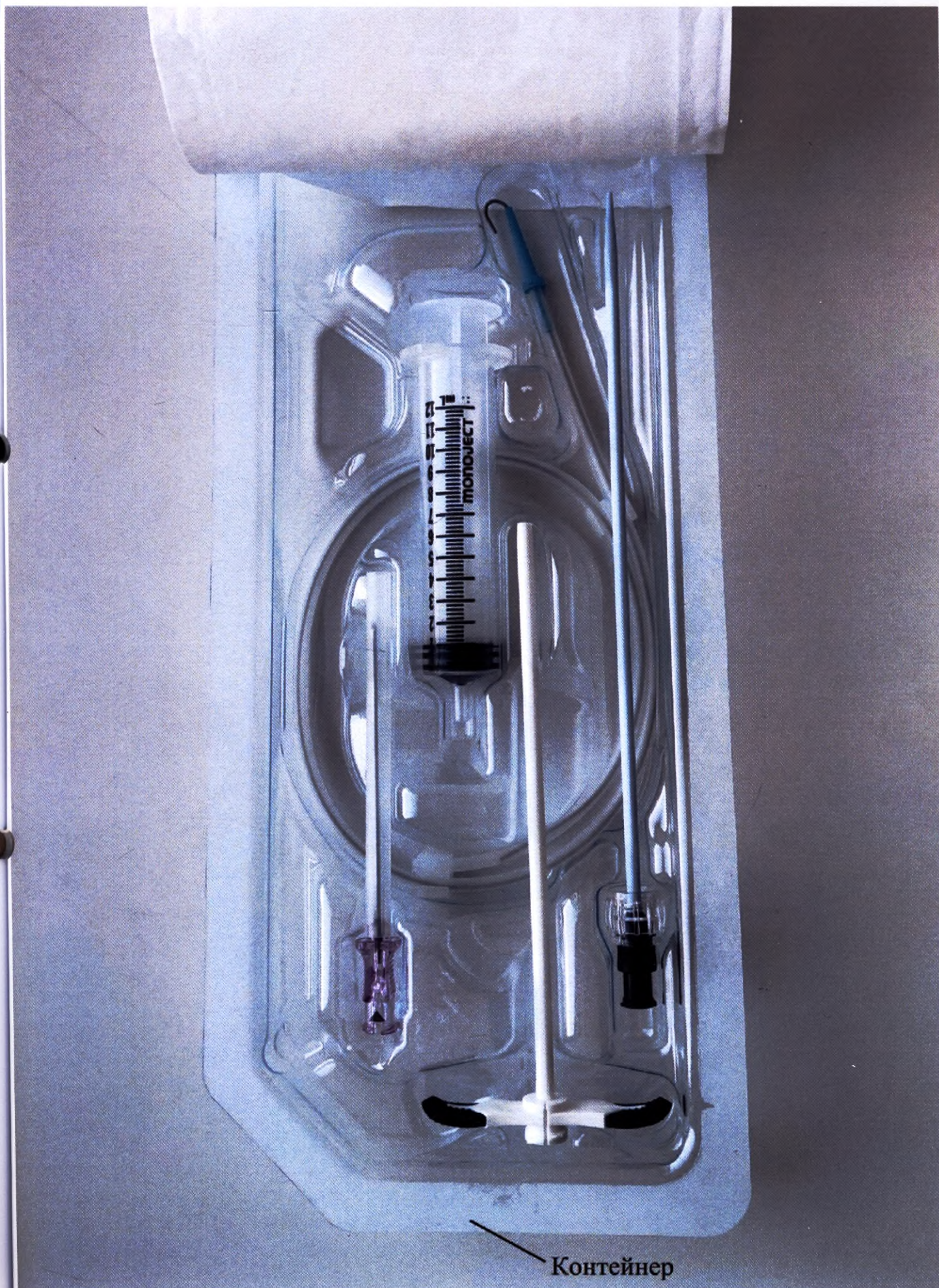

Расширитель:
внешний диаметр 3,0 мм (9F),
внутренний диаметр 0,9 мм,
эффективная длина 16 см

Оболочка интродьюсера:
внутренний диаметр 3,0 мм (9F),
эффективная длина 13 см

Шприц Люэр 12 мл

Проводник:
диаметр 0,97 мм (0,038"),
длина 50 см, j-образный
с радиусом кривой 4 мм,
подвижным ядром

Игла Merit Advance 18Gx70 мм

Чехол для проводника

Чехол для иглы

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

The technical drawing shows a rectangular metal plate with the following specifications:

- Material:** Сталь 10F (Steel 10F)
- Dimensions:**
 - Overall length: 13 cm
 - Overall width: 10 cm
 - Inner length: 11 cm
 - Inner width: 8 cm
- Surface Treatment:** Цинкованная (Zinc-plated)
- Weight:** 0.011 kg
- Part Number:** КИТА.942373.0011
- Manufacturer:** ООО «Киевское электронное» (Kyiv Electronics LLC)
- Address:** Россия 142181, Московская область, г. Подольск, ул. Заводская (Moscow Region, Podolsk City, Zavodskaya St.)
- Contact Info:** Тел: +7(495)221-295-51, Факс: +7(495)751-66-63, info@kievelectronica.com

**Интродьюсер разрывной «Apollo»
по КИТА.942273.001ТУ модель «Apollo 10F-13»**

КИТА.942273.001ТУ

предназначен для введения имплантируемого или временного электрода для электрокардиостимулятора в вену пациента

СОДЕРЖИМОЕ:

- оболочка интродьюсера:
внутренний диаметр 3,3 мм (10 F),
эффективная длина 13 см;
- расширитель:
внешний диаметр 3,3 мм (10 F),
внутренний диаметр 0,9 мм,
эффективная длина 16 см;
- проводник: диаметр 0,97 мм (0,038"),
длина 50 см, j-образный с радиусом
кривой 4 мм, подвижным ядром;
- игла Merit Advance 18Gx70 мм,
- шприц Люэр 12 мл

**10F
13 см**

НЕТОКСИЧНО

ВНУТРИ



STERILE EO

1. В нестерильной зоне вскрыть пакет упаковочный (вторую упаковку).
2. Извлечь контейнер (первую упаковку) и переместить его в стерильную зону.
3. Руками в стерильных перчатках с соблюдением всех правил асептики и антисептики вскрыть первую упаковку и извлечь из неё содержимое упаковки.

Внимание!

Извлечение проводника через иглу может привести к его повреждению. Сначала удалите иглу, затем проводник.

LOT

ПАРТИЯ

21-02



использовать до

23.07.2024



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

23.07.2021

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ


30



ООО «Кардиоэлектроника»



Россия, 142181, Московская область, г. Подольск,
ул. Заводская (мкр. Климовск), дом 2М, офис 340
+7(495)221-25-51, +7(496)761-68-53
info@cardioelektronika.com

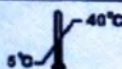


ХРАНЕНИЕ



Регистрационное удостоверение

Сделано в России

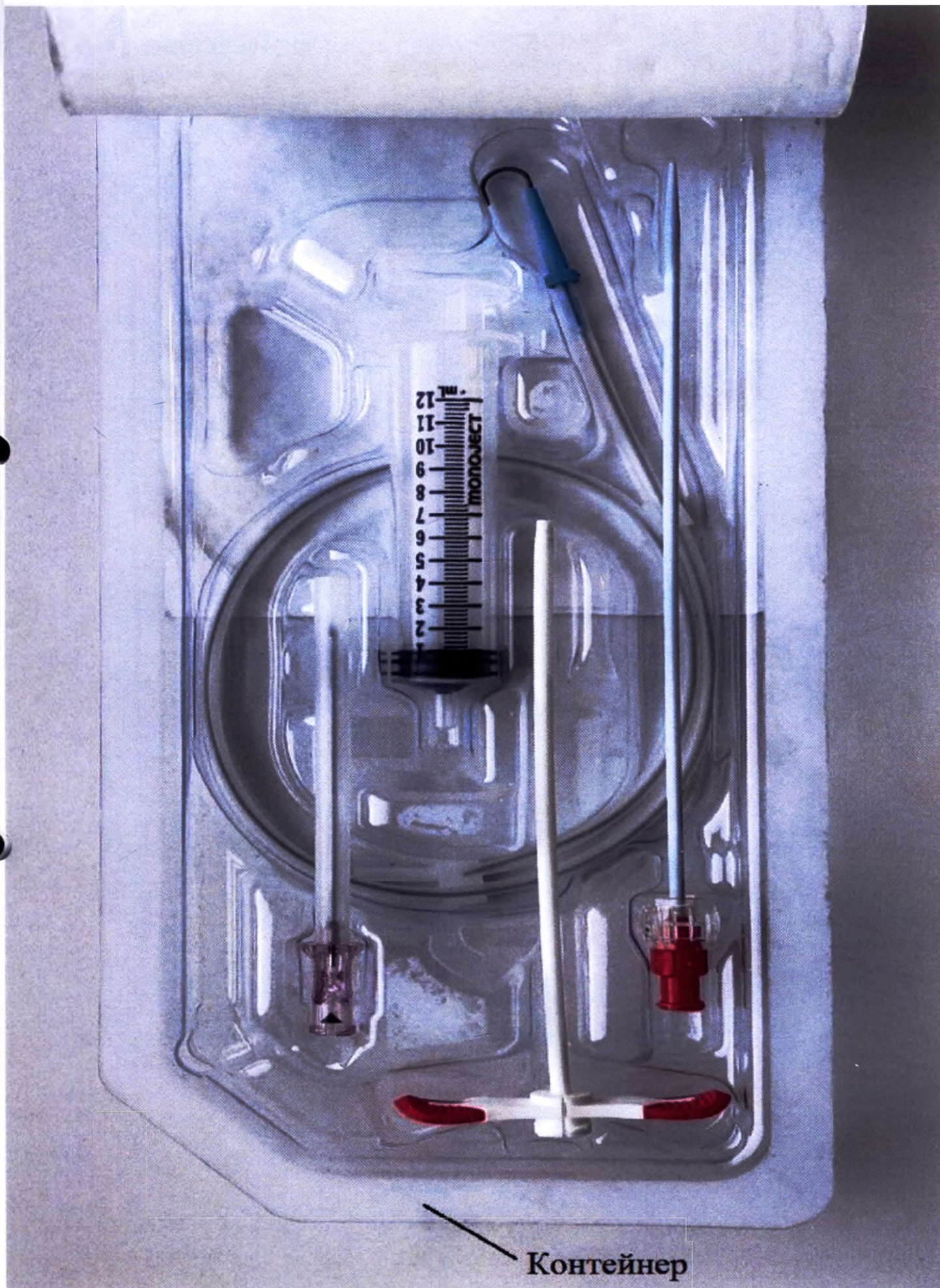

Расширитель:
внешний диаметр 3,3 мм (10F),
внутренний диаметр 0,9 мм,
эффективная длина 16 см

Оболочка интродьюсера:
внутренний диаметр 3,3 мм (10F),
эффективная длина 13 см

Шприц Люэр 12 мл

Проводник:
диаметр 0,97 мм (0,038"),
длина 50 см, j-образный
с радиусом кривой 4 мм,
подвижным ядром

Игла Merit Advance 18Gx70мм

Чехол для проводника

Чехол для иглы

ИНТРОДЬЮСЕР РАЗРЫВНОЙ «Apollo» ПО КИТА.942273.001ТУ

МОДЕЛЬ «Apollo 6F-13»	Партия <u>21-02</u>	Количество <u>9</u> шт.
МОДЕЛЬ «Apollo 7F-13»	Партия <u>21-02</u>	Количество <u>9</u> шт.
МОДЕЛЬ «Apollo 8F-13»	Партия <u>21-02</u>	Количество <u>9</u> шт.
МОДЕЛЬ «Apollo 9F-13»	Партия <u>21-02</u>	Количество <u>9</u> шт.
МОДЕЛЬ «Apollo 10F-13»	Партия <u>21-02</u>	Количество <u>9</u> шт.



Изготовитель: ООО «Кардиоэлектроника»


Россия, 142181, Московская область, г. Подольск,
ул. Заводская (мкр. Климовск), дом 2М, офис 340
+7(495)221-25-51, +7(4967)61-68-53
E-mail: info@cardioelectronica.com
www.cardioelectronica.ru



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

21 (*Двадцать один*) лист

Генеральный директор
ООО «Кардиоэлектроника»

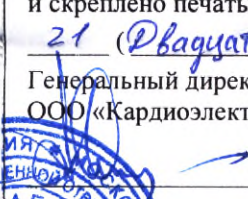 А.Л. Старостин

