


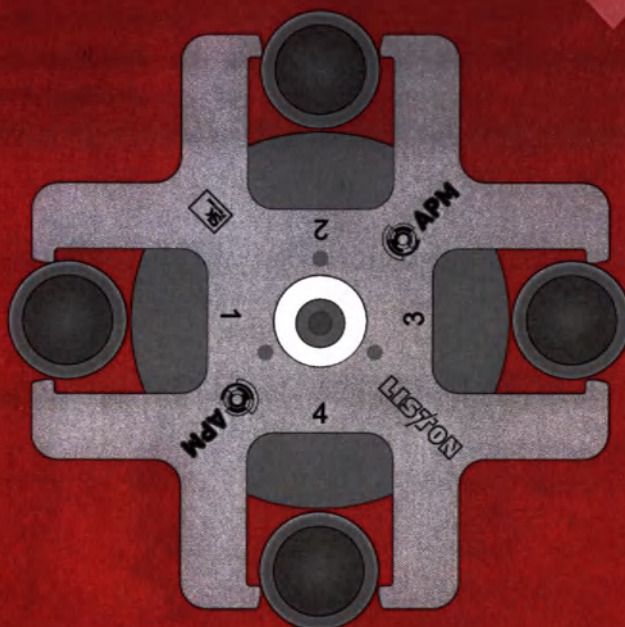

**ИНСТРУКЦИЯ-
ВКЛАДЫШ**
ПРОБИРКА АРМ
СТЕРИЛЬНАЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБОГАЩЕННОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ
ПЛАЗМЫ

ТУ 32.50.50-002-11701993-2021



ООО «АРМ»
г. Москва, Московская область
Средства индивидуальной защиты
для защиты лица и тела от биологических
и химических агентов
40-напольный-50мм
www.apm.ru





Этапы подготовки к работе с пробиркой:


Примечание: этапы 1 и 2 производятся вне пробирки, а используемые при этом медицинские изделия и вспомогательные вещества не являются ее составными частями и не входят в комплектацию.

1. ЗАБОР ГЕМОКОНСЕРВАНТА

Произведите забор 1.5 мл гемоконсерванта в шприц объемом 20 мл.

2. ЗАБОР КРОВИ

Используя тот же шприц произведите забор венозной крови пациента до отметки 15 мл, после чего перемешайте кровь и гемоконсервант, производя «покачивающие» движения используемым шприцем в течение 15-20 сек.

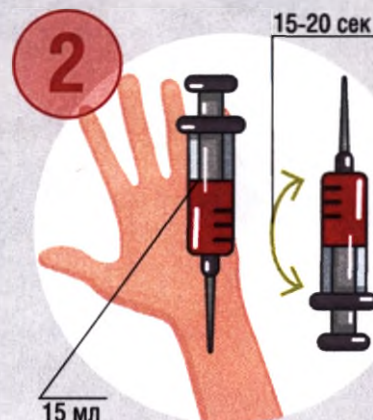

Этапы работы с пробиркой:

3. НАПОЛНЕНИЕ ПРОБИРКИ

Убедившись в целостности защитной упаковки извлеките пробирку. Держа пробирку под наклоном введите заготовленную в шприце кровь до риски с отметкой «MAX», после чего закройте отверстие крышки заглушкой.

Примечание: рабочий объем пробирки составляет 15.0 мл, ограничен Рисками 1 (начальное положение поршня) и Риской 2 (отметка «MAX»).





4. ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

Вынув ключ-подставку расположите пробирку (1) с кровью в специализированном бакет-роторе центрифуги напротив пробирки-противовеса (2). Проведите центрифугирование используя указанные параметры: об./мин. – 3500, время ~ 4-6 мин.

Примечание: учитывая биологическую вариабельность возможно проведение повторного центрифугирования с добавлением достаточного времени, необходимого для достижения сепарирования крови (3), выделения лейкотромбоцитарного слоя клеток (4).

5. ПОДГОТОВКА К ЗАБОРУ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ

Установите пробирку на ключ-подставку, вращением которого по или против часовой стрелки выровняйте нижнюю границу лейкотромбоцитарного слоя клеток (4) по Риске 3.

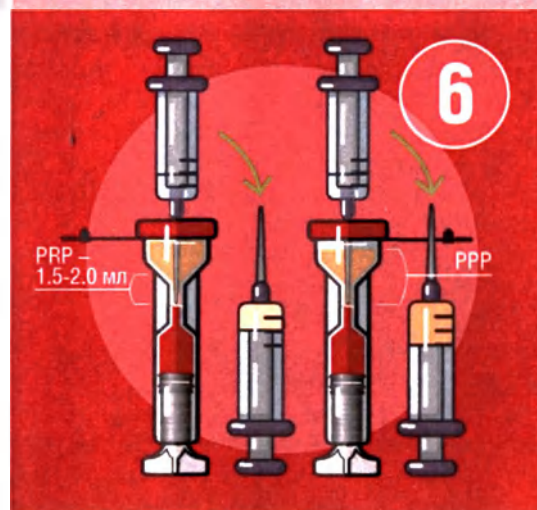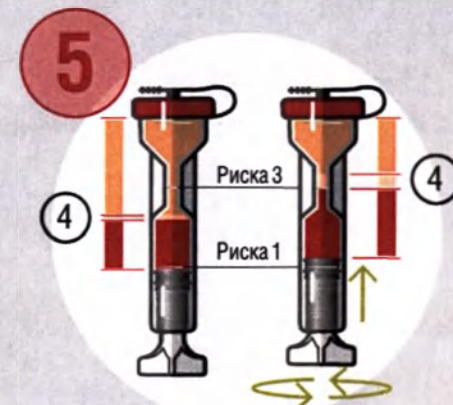

6. ЗАБОР ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ

Потяните за язычок заглушки для открытия центрального отверстия крышки. Произведите забор обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) объемом 1.5-2.0 мл так, как показано на рисунке. Если необходимо, используя дополнительный шприц заберите оставшуюся часть плазмы с меньшим содержанием тромбоцитов (PPP).

Примечание: для забора PRP можно использовать любой удобный оператору шприц с иглой, длина которой равна 40 мм.

прошито и пронумеровано
скреплено печатью 2 ли
Генеральный директор
ООО «СТЕРИН»


Желонки



«21»

2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «АРМ»

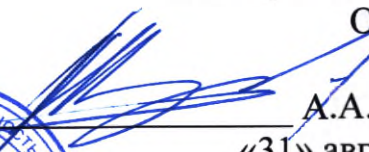
А.А. Шаршуков
«31» августа 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Пробирка АРМ стерильная для получения обогащенной тромбоцитами плазмы
по ТУ 32.50.50-002-11701993-2021»



Рис. 1. На фотографии приведен общий вид картонных упаковок медицинского изделия «Пробирка АРМ стерильная для получения обогащенной тромбоцитами плазмы» (индивидуальной упаковки (индивидуальной коробки), групповой упаковки (коробки), транспортной тары (короба)).

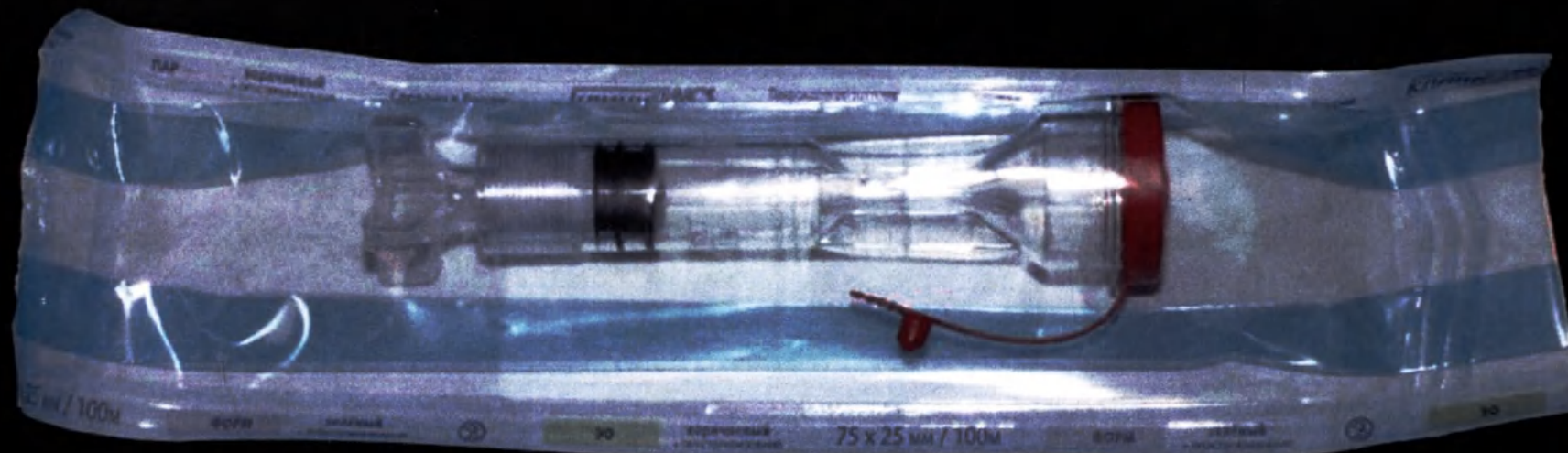


Рис. 2. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны первичной упаковки (индивидуального пакета) с медицинским изделием «Пробирка АРМ



Рис. 3. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны первичной упаковки (индивидуального пакета) медицинского изделия «Пробирка АРМ

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 4 лис

Генеральный директор

ООО «АРМ»

А.А. Шарш



МП «31» 08 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «АРМ»

А.А. Шаршуков
«02» июля 2021 г.



МАКЕТЫ ЭТИКЕТКИ И УПАКОВОК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Пробирка АРМ стерильная для получения обогащенной тромбоцитами плазмы
по ТУ 32.50.50-002-11701993-2021»



РУ № _____ ОТ _____

15.0 мл

LOT 000000000001  01.02.2021  01.02.2024

REF ПРОБИРКА АРМ СТЕРИЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ

STERILE EO РАЗРАБОТЧИК: ООО «АРМ», 121205, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛИЦА НОБЕЛЯ, ДОМ 7, ЭТ 2, ПОМ 39, РАБ 6
тел.: 8 (800) 550-67-57 e-mail: info@arm-sk.ru www.arm-sk.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «СТЕРИН», 140500, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛУХОВИЦЫ, УЛИЦА ПУШКИНА, 8 КМ
Изготовлено по ТУ 32.50.50-002-11701993-2021



Рис. 1. Макет этикетки первичной упаковки (индивидуального пакета)

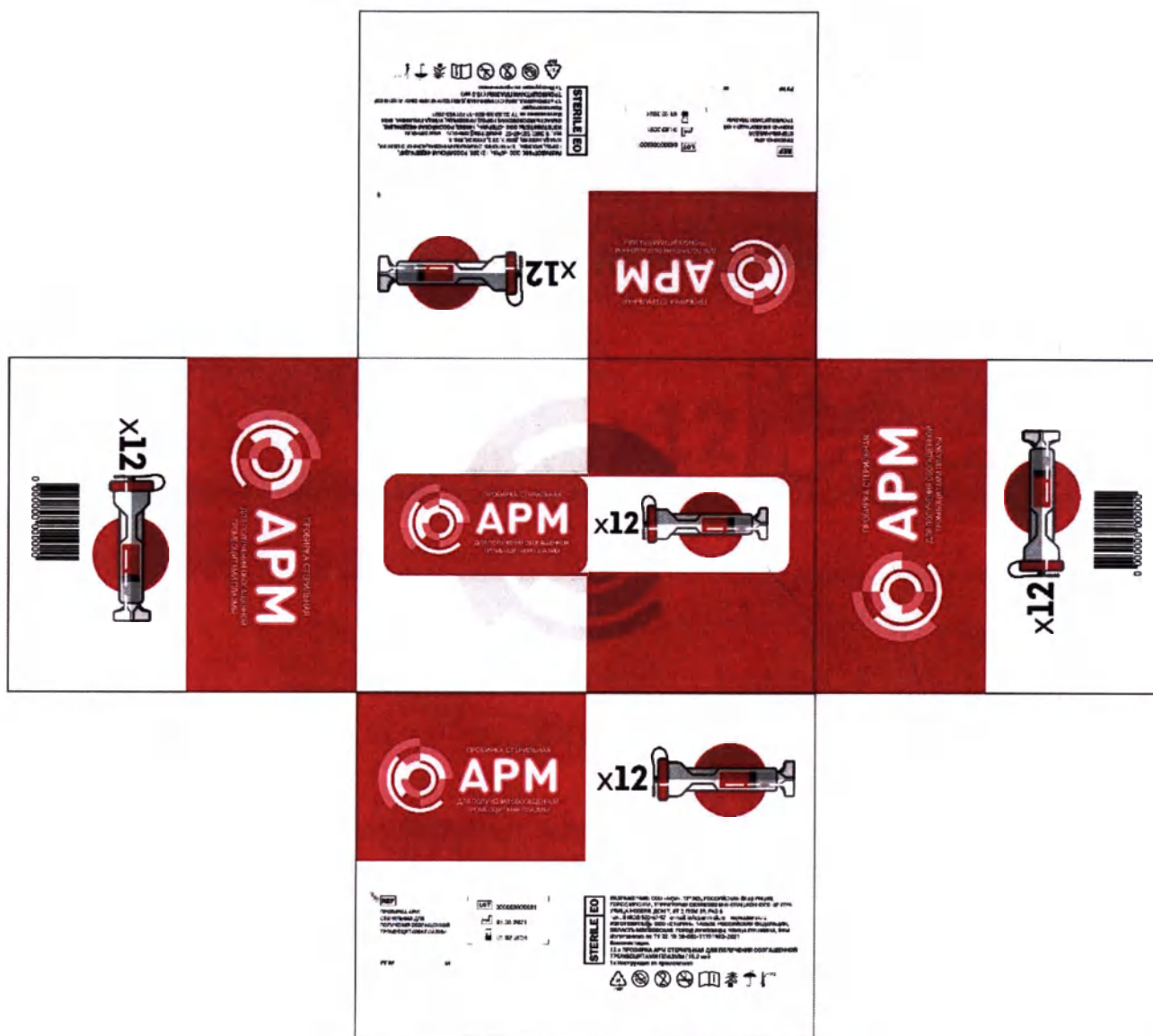


Рис.3. Макет групповой упаковки (коробки)



Рис. 4. Макет лицевой стороны групповой упаковки (коробки)



REF

ПРОБИРКА АРМ
СТЕРИЛЬНАЯ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБОГАЩЕННОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ

LOT

000000000001



01.02.2021



01.02.2024

РУ № _____ ОТ _____

STERILE EO

РАЗРАБОТЧИК: ООО «АРМ», 121205, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА,
УЛИЦА НОБЕЛЯ, ДОМ 7, ЭТ 2, ПОМ 39, РАБ 6

тел.: 8 (800) 550-67-57 e-mail: info@arm-sk.ru www.arm-sk.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «СТЕРИН», 140500, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛУХОВИЦЫ, УЛИЦА ПУШКИНА, 8КМ
Изготовлено по ТУ 32.50.50-002-11701993-2021

Комплектация:

12 x ПРОБИРКА АРМ СТЕРИЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБОГАЩЕННОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ (15.0 мл)

1x Инструкция по применению



Рис. 5. Макет боковой стороны групповой упаковки (коробки)



Рис. 6. Макет боковой стороны групповой упаковки (коробки)

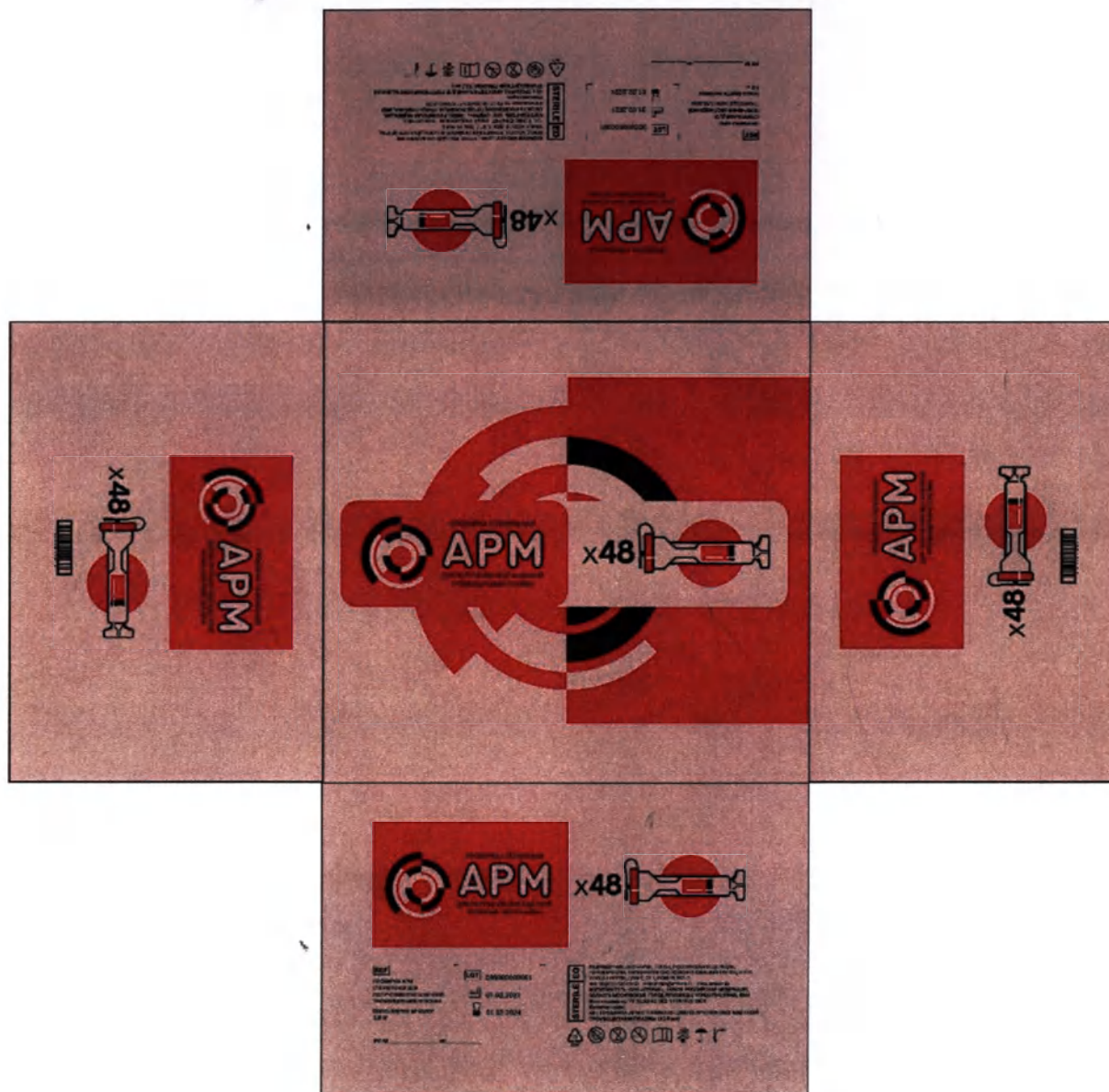


Рис.7. Макет транспортной тары (короба)


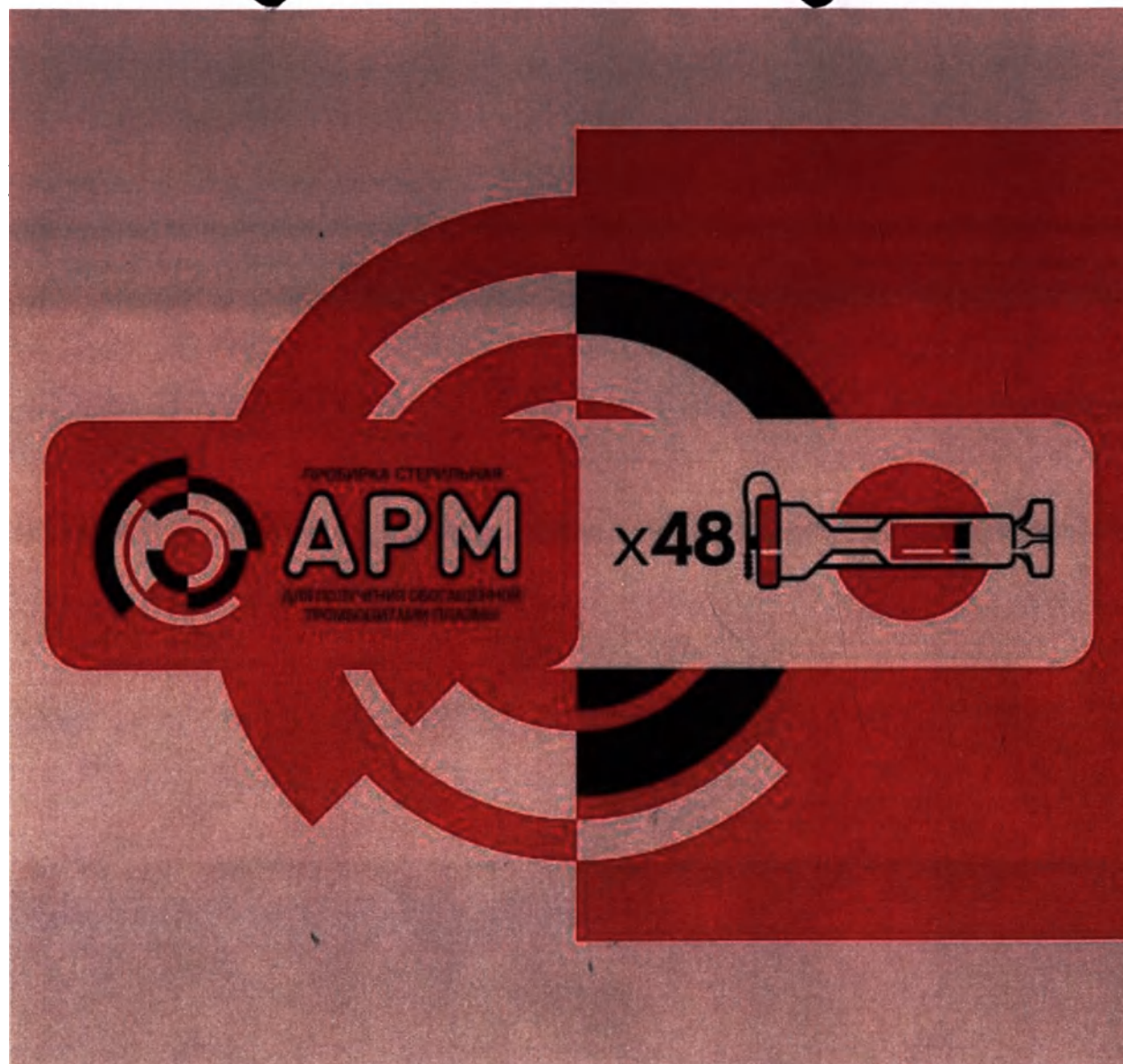


Рис. 8. Макет лицевой стороны транспортной тары (короба)

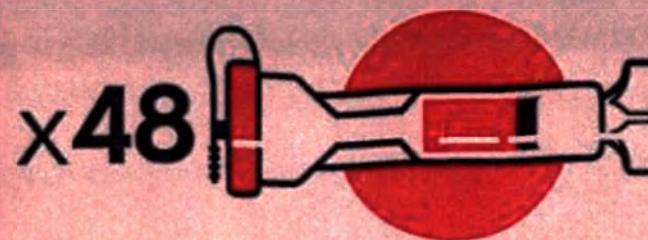

REF

ПРОБИРКА АРМ
СТЕРИЛЬНАЯ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБОГАЩЕННОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ

Масса брутто: не более
5.0 кг

LOT

000000000001



01.02.2021



01.02.2024

STERILE EO

РАЗРАБОТЧИК: ООО «АРМ», 121205, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА,
УЛИЦА НОБЕЛЯ, ДОМ 7, ЭТ 2, ПОМ 39, РАБ 6
тел.: 8 (800) 550-67-57 e-mail: info@arm-sk.ru www.arm-sk.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «СТЕРИМ», 140500, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛУХОВИЦЫ, УЛИЦА ПУШКИНА, 8КМ
Изготовлено по ТУ 32.50.50-002-11701993-2021

Комплектация:
48 x ПРОБИРКА АРМ СТЕРИЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБОГАЩЕННОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ (15.0 мл)

РУ № _____ ОТ _____



Рис. 9. Макет боковой стороны транспортной тары (короба)

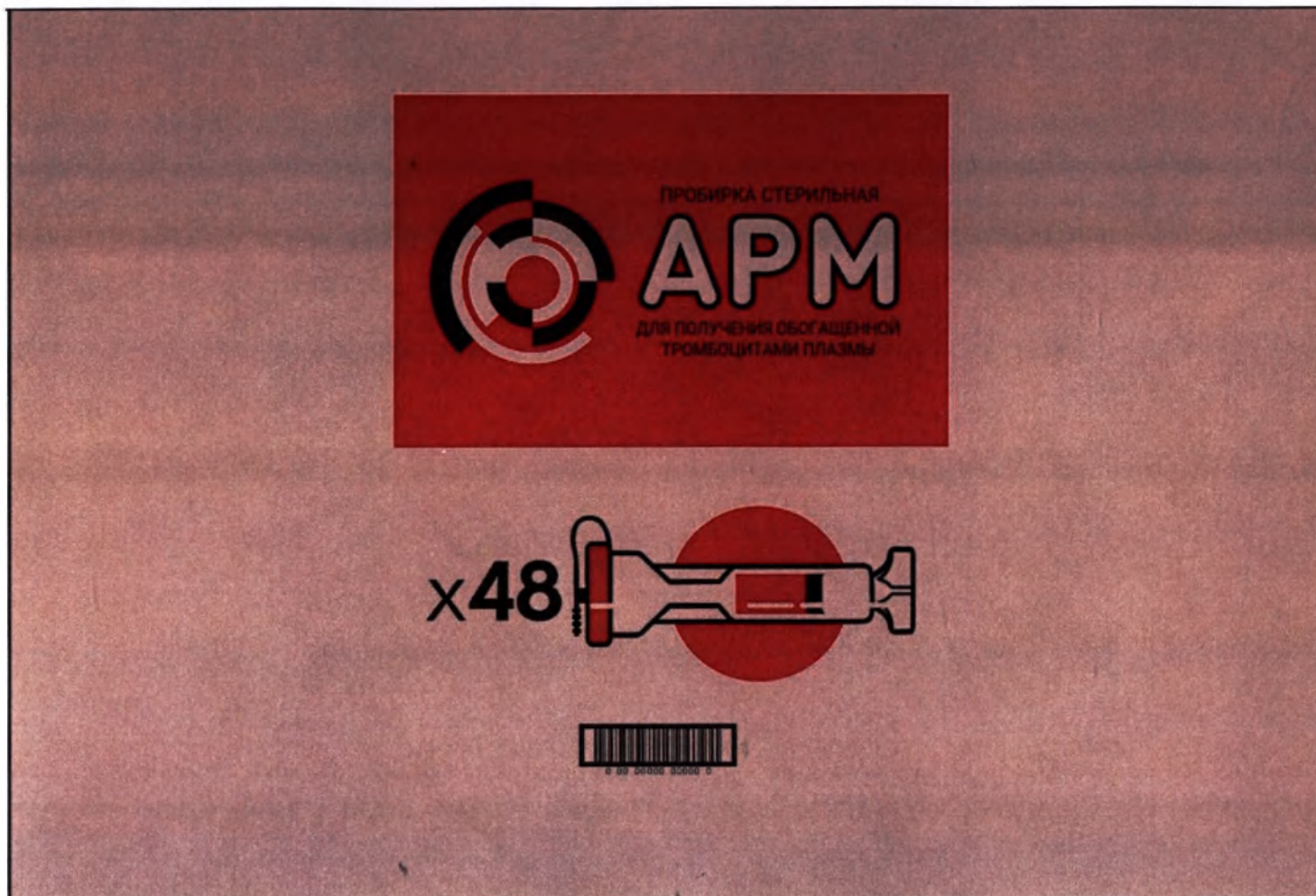


Рис. 10. Макет боковой стороны транспортной тары (короба)

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 11 лис
Генеральный директор
ООО «АРМ»

А.А. Шарипов

МП

«02»

2021 г.

