

Гарантия качества SURGICON

Отличительной особенностью инструментов SURGICON является высокое качество материала и изготовления. На все инструменты SURGICON распространяется гарантия качества и защиты от коррозии. В случае необходимости сервисного обслуживания инструмента обращайтесь к официальным дилерам компании SURGICON.

Инструкция по уходу

1. Точно следуйте инструкциям для увеличения срока службы и лучшего использования инструмента.
2. Стерилизуйте перед использованием.
3. После использования чистите, смазывайте и стерилизуйте инструменты.
4. Тонкие инструменты могут быть очищены ультразвуком.
5. Тщательно и осторожно полощите инструменты после чистки. По возможности используйте деминерализованную воду.
6. Хорошо просушите после полоскания.
7. Инструменты с сочленениями, кремальерами или резьбовыми соединениями смазывайте составами на основе парафинового масла.
8. Перед стерилизацией закрывайте кремальеру только на одно деление.
9. Обработка в автоклаве производится насыщенным паром при $t +134^{\circ}\text{C}$.
10. При стерилизации инструментов горячим воздухом температура должна соответствовать $180 - 200^{\circ}\text{C}$.
11. Инструменты, подвергшиеся коррозии, должны быть немедленно изъяты из использования.

Официальный представитель на территории РФ
ООО «НПКЦ МИЗ».

603059, Россия, Нижний Новгород, а/я 13

Тел.: (8312) 49-42-68, 49-42-69

e-mail: npkc@npkc-miz.nnov.ru