

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Пуль-Сар»



Менглет К.А.

2012 г.

Инструкция по применению

**«Средство гемостатическое "Гемоблок" по ТУ 9398-002-68087337-2012 в
двух исполнениях».**

Производства: ООО «Пуль-Сар», 115088 г. Москва, ул. 2-я Машиностроения,
д.17, стр.1, ИНН 7717682825

2012

Назначение

Гемостатической (кровоостанавливающей) средство. Поверхностные раны, в т.ч. порезы, ссадины, царапины и др. повреждения кожи; оперативные вмешательства с разрезами кожи небольшой длины или множественными разрезами небольших размеров. В том числе остановка кровотечений у лиц с нарушением свертываемости крови.

Состав и основные свойства

Основной компонент материала «Гемоблок» – неполная серебряная соль полиакриловой кислоты - обладает выраженными гемостатическими и бактерицидными свойствами. Гемостатическое действие материала обусловлено образованием на поверхности раны нерастворимого полимерного комплекса.

«Гемоблок» нетоксичен, не проявляет раздражающего, токсического, резорбтивного действия, не оказывает побочного влияния на соприкасающиеся с ним ткани. *Раствор не требует смывания.* Гемостатический эффект достигается быстро, повторные кровотечения отсутствуют.

Результатом использования «Гемоблок» на кровоточащей ране является остановка капиллярного кровотечения и образование гладкой блестящей эластичной поверхности – удобного поля для проведения дальнейшего лечения.

Способ применения

Наружно. Марлевый тампон пропитывают раствором и прикладывают к предварительно осушенной поверхности на 1-2 мин. При необходимости обработку раны повторяют до полной остановки кровотечения.

Форма выпуска

Средство гемостатическое "Гемоблок" в наборе:

- марлевые салфетки - 1 упаковка;
- раствор во флаконе.

Средство гемостатическое "Гемоблок" в наборе с насадкой-распылителем:

- раствор во флаконе.
- насадка-распылитель, 1 шт.

Средство гемостатическое "Гемоблок" в отдельных упаковках:

- раствор во флаконе.

Условия хранения

Хранить в сухом темном месте при температуре от +5°C до +25°C

Срок годности - 2 года.

Прошито и
пронумеровано 3 листов

