

**Проект маркировки
вторичной/потребительской упаковки медицинского изделия**

**Презервативы из натурального латекса
Contex® Romantic Love**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Соединенное Королевство

Проект дизайна фронтальной стороны вторичной/потребительской
упаковки



Проект маркировки задней стороны вторичной/потребительской упаковки (обязательная информация)

Наименование МИ:

Презервативы из натурального латекса Contex® Romantic Love

Производитель (наименование и адрес):

“Рекитт Бенкизер Хелскэр (ЮК) Лтд.”, 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство

Страна происхождения медицинского изделия:

Таиланд

Импортёр/Уполномоченная организация:

ООО “Рекитт Бенкизер Хэлскэр”, Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3.

Информация о том, что медицинское изделие для одноразового использования:

Презервативы предназначены только для одноразового использования.

Информация об условиях хранения:

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре 0 - 25°C. Избегать прямых солнечных лучей.

Информация о регистрационном удостоверении:

Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу).

Описание медицинского изделия:

Гладкие, прямой формы, ароматизированные, цветные, с накопителем, в силиконовой смазке

Информация о размерах медицинского изделия:

Номинальная длина – 180 мм. Номинальная ширина – 52 мм.

Информация о смазке:

С силиконовой смазкой. Смазка не разрушает сперматозоиды.

Символы:



« - содержит натуральный латекс»



« - запрет на повторное применение»



« - Осторожно!»

Проект маркировки нижней части вторичной/потребительской упаковки (обязательная информация)

Информация о сроке годности:



« Годен до (гггг-мм): xxxx-xx»

Информация о номере серии:



« Номер серии: xxxxxxxxxxxx»

Данные о регистрационном удостоверении:

«Рег. уд. № xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx»

‘Дополнительная информация может быть напечатана на внешнюю сторону вторичной/потребительской упаковки, включая ссылки на международные стандарты, символы согласно требованиям национального законодательства, информацию рекламного характера.

Проект маркировки на внутренней стороне вторичной/потребительской упаковки (обязательная информация).

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, особенно если презервативы используются для орального или анального секса.

Надевать презерватив до того, как пенис коснется тела партнера. Это может помочь в предотвращении наступления беременности и возможности передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ВНИМАНИЕ: Проверить срок годности презерватива перед использованием. Если индивидуальная упаковка повреждена, выбросить презерватив и использовать новый из неповрежденной упаковки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Презервативы применяются в качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и аккуратно обращаться с презервативом, т.к. его можно повредить ногтями и острыми предметами.
2. Проверить, чтобы презерватив был свернут наружу. Сдавлив накопитель, надеть презерватив на головку эрегированного пениса.
3. Развернуть презерватив по направлению к основанию пениса. Если презерватив не разворачивается, значит он свернут в обратную сторону. Выбросить данный презерватив и использовать новый. Остановиться и проверить при ощущении соскальзывания презерватива или его чрезмерного сжатия пениса, поскольку это может привести к нарушению целостности презерватива.

Сразу после эякуляции извлечь пенис, плотно придерживая презерватив у его основания, и аккуратно снять презерватив.

4. Выбросить в мусорное ведро. Не спускать презерватив в унитаз.

Использовать только такую смазку, которая рекомендована для использования с презервативами.

Для анального секса или при необходимости использовать дополнительную смазку на внешней стороне презерватива. Перед использованием такой смазки необходимо ознакомиться с указаниями по применению на упаковке смазки

Презервативы могут предоставлять опасность удушья. Хранить в недоступном для детей месте.

Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.

Презервативы предназначены только для одноразового использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность или аллергия к любому из компонентов, входящих в состав презерватива.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Презервативы изготовлены из натурального латекса, который может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, если у потребителя аллергия на латекс.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать смазку, которая рекомендована для использования с презервативами. Смазки нефтяного происхождения и на масляной основе (например, вазелин, детское масло), некоторые pessaries, а также некоторые лекарственные средства местного применения, которые наносятся на пенис или вводятся во влагалище, могут повредить презерватив.

Прекратить использование презерватива, если чувствуется дискомфорт или раздражение во время использования презерватива.

Проконсультироваться со специалистом:

- о совместимости презервативов с другими контрацептивами;
- при использовании лекарственного средства местного применения, которое наносится на пенис или вводится во влагалище;
- если раздражение/ дискомфорт сохраняются после использования презерватива;
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на латекс;
- если презерватив протекает или порвался во время его использования (сделать это как можно скорее в течение 72 часов).

Ни один из методов контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ или других заболеваний, передающихся половым путем.



всего прочито и скреплено
печатью 5 лист 06

Удостоверено
Лица тов
Юлия Верна



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

Презервативы из натурального латекса Contex®Romantic Love

1. В первичной упаковке.



*** белым полем обозначена область нанесения маркировки**

2. В свёрнутом виде.



3. В развёрнутом виде.



всего прошито и скреплено
печатью 4 лист а

