

ОКП 93 9890

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

№ _____ от
« _____ » _____ 2008 г



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Петрофарм»

М.Ю. Чинарин

12 2008 г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Бинты эластичные»

№ 9398-007-15062589-2007

Состав:

- Хлопок (хлопчатобумажная пряжа) - 38%;
- Полушерсть или лен - 40%;
- Полиэфир - 10%;
- Латекс - 12%;

Показания к применению.

Применение бинтов эластичных обусловлено физиологическим массажем подкожно жировой клетчатки во время сокращения мышц в результате внешнего эластичного давления на ткани и поддерживающим, уравнивающим давлением в покое, снижает фильтрацию и повышает реабсорбцию жидкости в тканях, усиливает отток лимфы по лимфатическим сосудам, межтканевым щелям, фасциальным пространствам, что приводит к снижению отеков конечностей. Компрессия бинтов уравнивает давление в венозной системе при флебогипертензии, устраняет обратный ток крови по венам, восстанавливает запирательную функцию венозных клапанов, ликвидирует микротромбоз, восстанавливает микроциркуляцию, что приводит к устранению застойных явлений в тканях, стимулирует заживление и эпителизацию трофических венозных язв. Могут использоваться в клинических и бытовых условиях.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к компонентам изделия.

Способ применения.

Накладывание бинтов должно быть равномерным без перетягивания, турами с перекрестком или по спирали. Накладывают минимум два слоя, для оказания давления по всей поверхности конечности. Для профилактики при занятиях спортом и физических нагрузках. Удобны для ношения под одеждой.

Условия хранения.

 В сухом месте.

Срок годности. Гарантийный срок годности не более 5 лет.

Произведено. ООО «Петрофарм», 152130, Ярославская обл., Ростовский р-он,
р.п. Петровское, ул. Подгорная, 40А-12

Руководитель производства ООО «Петрофарм» _____ Н.Ю. Чинарин

" 29 " 12 2007 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач

Мытищинской городской клинической больницы



Проскурников Г.Н