


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**«Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями»,
производства компании ASTEC Co., Ltd., Япония**

1) Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD. Основной корпус



2) Нижняя пластина – 6 шт.

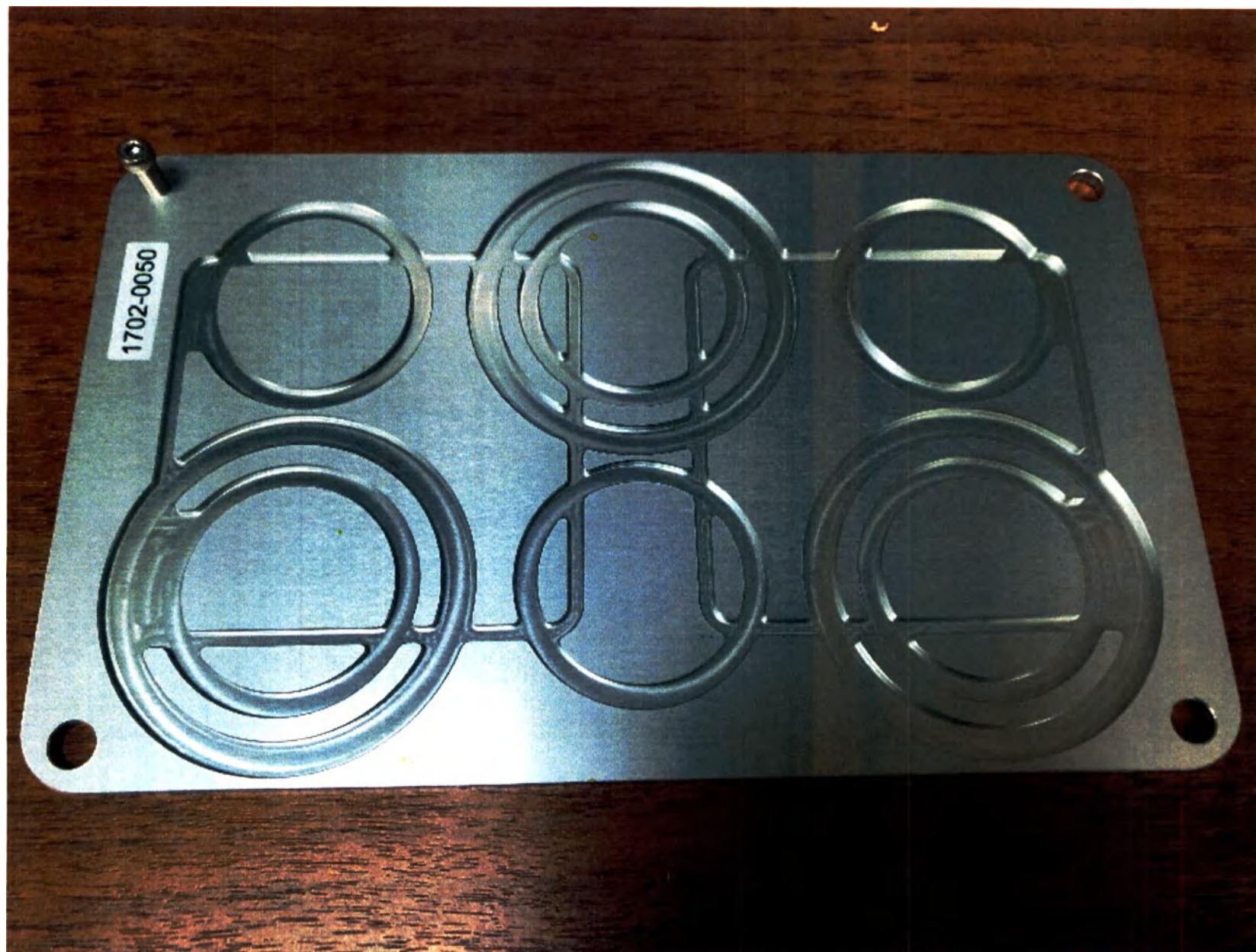

3) Кабель питания (длина 3 м, неэкранированный)



4) Держатель кабеля питания



5) Уплотнение в виде заклёпки – 12 шт.



6) Комплект из фильтра и трубки подачи газа – 2 шт.



7) Зажим – 2 шт.



8) Выходной кабель для внешнего подключения (длина 2,7 м, экранированный)



- 9) Кабель внешнего аналогового выхода (напряжение) (длина 2,7 м, экранированный)



10) Кабель внешнего аналогового выхода (ток) (длина 2,7 м, экранированный)



TD170207R2.0

Оборудование для ЭКО:
Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель
EC6S-230MD с принадлежностями

Руководство по эксплуатации



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием этого изделия обязательно внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

После прочтения данного руководства храните его в легкодоступном месте.

Пожалуйста, примите во внимание, что мы не в состоянии компенсировать любой вид ущерба, нанесенный содержимому изделия в результате его поломки.



CE
0197

 **astec**

Ограниченная гарантия


Компания «Астек» (Astec) обязуется обеспечивать гарантию новым пользователям изделий, произведенных компанией «Астек», путем предоставления услуг по ремонту или замене в случае какого-либо дефекта материала или производства, обнаруженного в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента приобретения изделия конечным пользователем.

Если приобретенное вами изделие требует обслуживания, обратитесь к местному торговому представителю, агенту или в компанию «Астек» за инструкциями. Если требуется возврат изделия, изделие должно быть отправлено в указанный сервисный центр, при этом стоимость перевозки оплачивается до отправки. К изделию должно быть приложено подробное описание дефекта.

Настоящая гарантия не применяется, если дефект или неисправность возникли в результате несчастного случая, небрежного обращения, необоснованного использования, ненадлежащего обслуживания или по другим причинам, не связанным с дефектами материалов или производства. Подробные сведения приведены ниже.

- ◆ Любые дефекты, возникающие в результате пожара, землетрясения, грозы и других катастрофических событий, а также загрязнения и неправильного электроснабжения.
- ◆ Любые дефекты, возникающие в результате ненадлежащего ремонта, наладки, калибровки или модификации.
- ◆ Любые дефекты, возникающие в результате ненадлежащего использования или неправильного обращения.
- ◆ Любые дефекты, вызванные перемещением, падением, транспортировкой инструмента.
- ◆ Замена и ремонт предметов снабжения и расходных материалов.

ЕДИНОЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ «АСТЕК» ПО НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧЕНО РЕМОНТОМ ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТИВНОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ «АСТЕК» НЕ ДОЛЖНА НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-ЛИБО НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ВЛАДЕНИЯ ИМ.

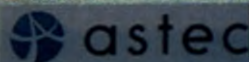

ПОЧТОВЫЕ
РАСХОДЫ

КОМПАНИЯ «АСТЕК КО., ЛТД.» (ASTEC CO., LTD.)

4-6-15, Минамизато, Симе,
Касуя, Фукуока, Япония,
811-2207
(4-6-15, Minamizato, Shime
Kasuya, Fukuoka, Japan
811-2207)

РЕД. 2010/02/10

Гарантийный талон

13) Протокол проверки установки изделия

TD17024/R2.0

Протокол проверки установки изделия

Наименование изделия Инулятор без указателя	Модель ECOS-220MD	Серийный номер	Дата выполнения работ //
Пользователь	Дистрибьютор		Сотрудник

- Проверка установки изделия

Проверяемые показатели	Критерии оценки	Проверено
Условия окружающей среды	Изделие располагается в сухом месте	
Прямые солнечные лучи	Изделие располагается в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей	
Поверхность, на которой располагается изделие (проверка устойчивости)	Изделие располагается на устойчивой поверхности	
Горизонтальность	С помощью регулятора изделие установлено горизонтально	
Нижняя пластина	Нижняя пластина установлена в классую камеру	
Подача CO ₂	Трубка для подачи газа присоединена к порту для CO ₂	
Подача N ₂	Трубка для подачи газа присоединена к порту для N ₂	
Очистка (внутренние поверхности)	Внутренние поверхности камеры очищены и вымыты	
Очистка (внутренние поверхности камеры)	Внутренние поверхности камеры очищены и вымыты	
Кабель питания (со стороны внешнего блока)	Кабель питания подключен в водонепроницаемую розетку	
Держатель для кабеля питания	Держатель присоединен к кабелю питания	
Кабель питания (со стороны шкафа)	Кабель питания подключен в стандартную розетку источника питания 3P	
Удобство по эксплуатации	Пользователю предоставляется инструкция по эксплуатации на местном языке	

- Проверка температуры

Критерии оценки: При установленной температуре 37,0 °C температура составляет 37,19 ± 0,10 °C (37,09-37,29 °C)

Камера 1	Камера 2	Камера 3	Камера 4	Камера 5	Камера 6	Проверено
°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C


- Проверка концентрации газов

Проверяемые показатели	Критерии оценки	Проверено
Концентрация CO ₂	Концентрация в пределах ±0,2% от установленной концентрации	Проверено
Концентрация O ₂	Концентрация в пределах ±0,2% от установленной концентрации	Проверено


14) Фильтр подачи газа – 2 шт./уп.



15) Фильтр циркулирующего газа – 2 шт./уп.

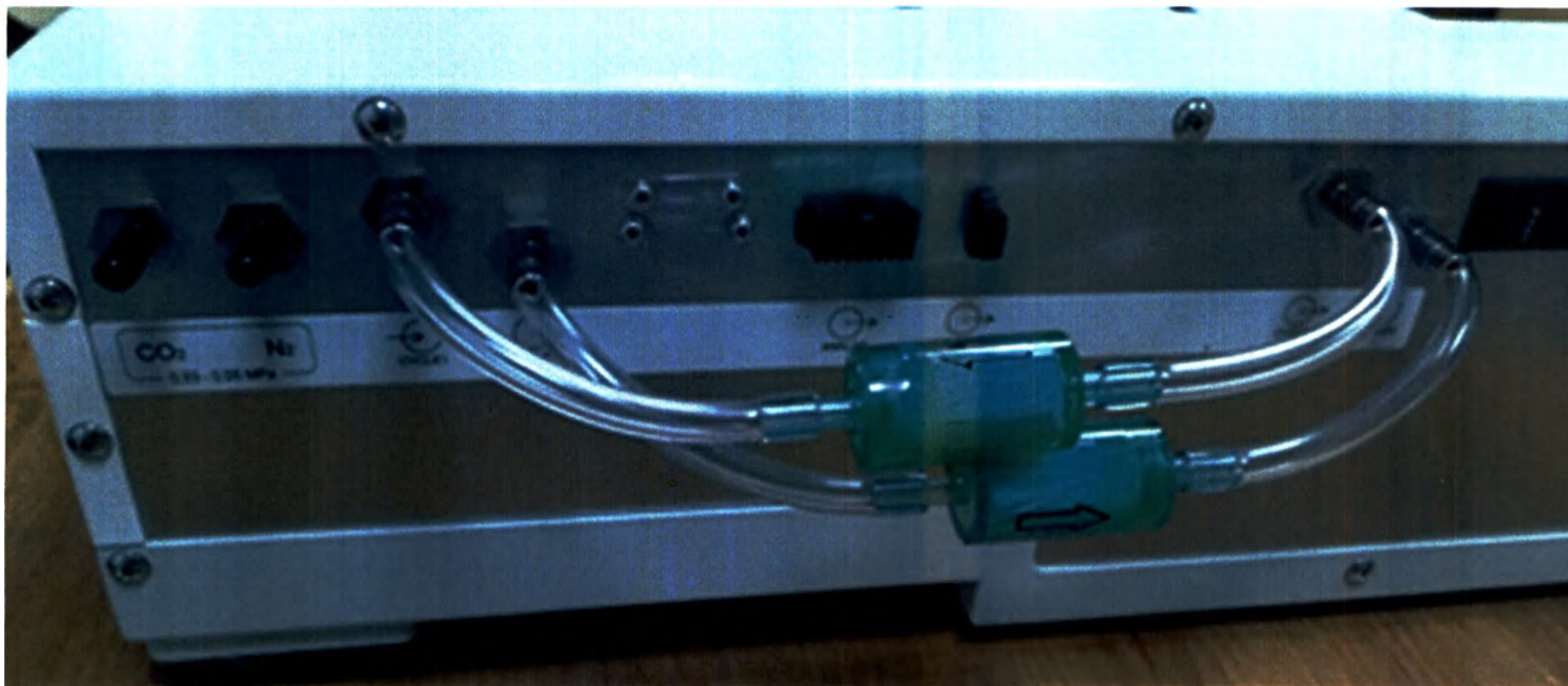

16) Маркировка

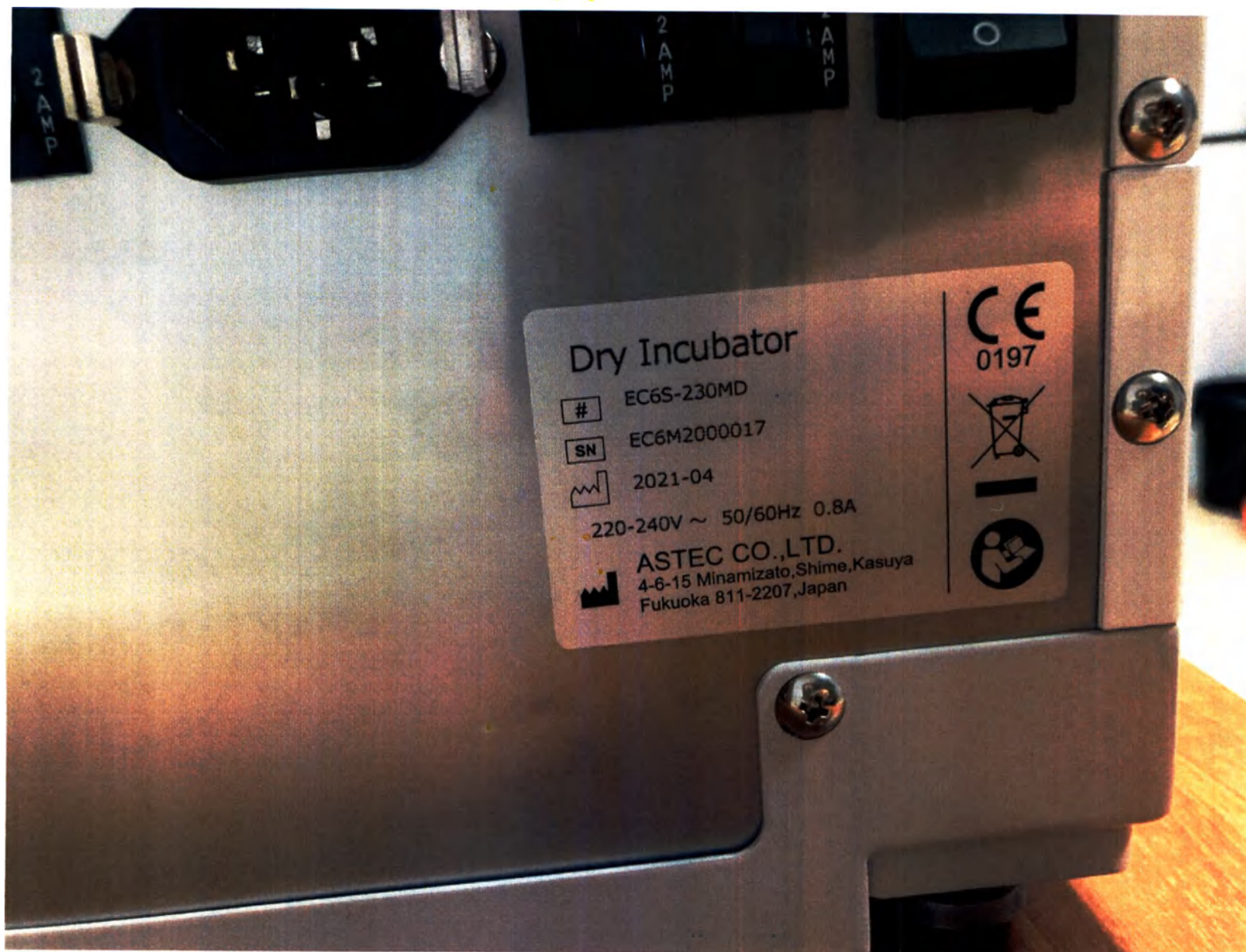

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 7 листов
Подпись А.И. Прохоренко



**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**«Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями»,
производства компании ASTEC Co., Ltd., Япония**

- 1) Транспортная и потребительская упаковка медицинского изделия «Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями», вид сверху



- 2) Транспортная и потребительская упаковка медицинского изделия «Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями», вид сбоку, сторона 1



- 3) Транспортная и потребительская упаковка медицинского изделия «Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями», вид сбоку, сторона 2



- 4) Транспортная и потребительская упаковка медицинского изделия «Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями», вид сбоку, сторона 3




- 5) Транспортная и потребительская упаковка медицинского изделия «Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями», вид сбоку, сторона 4



- 6) Транспортная и потребительская упаковка медицинского изделия «Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями», упаковка комплектующих, не содержит дополнительной маркировки




- 7) Маркировка медицинского изделия «Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями». Шильд

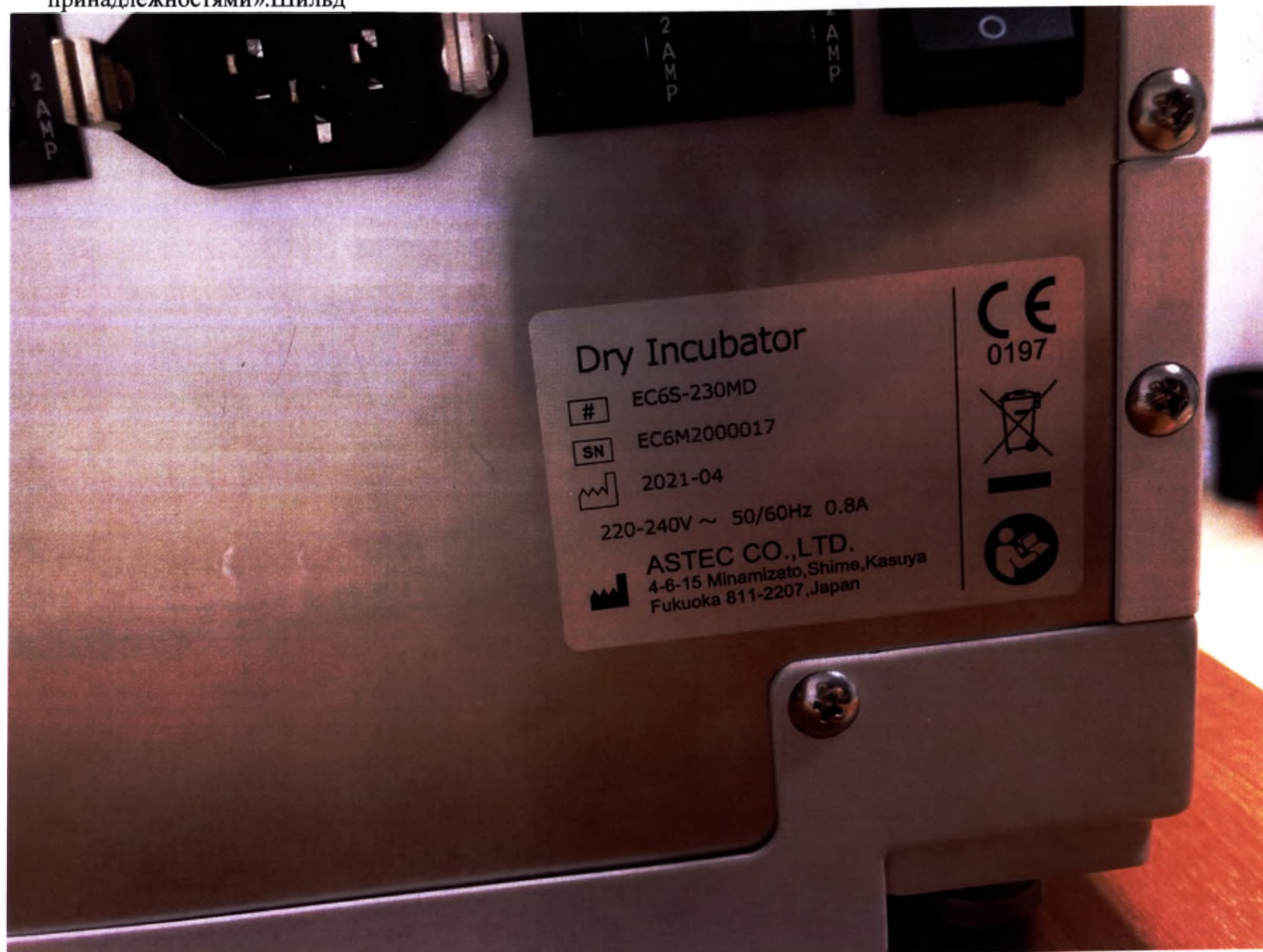


- 8) Медицинское изделие «Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями». Основной корпус, вид спереди



- 9) Медицинское изделие «Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями». Основной корпус, вид сверху

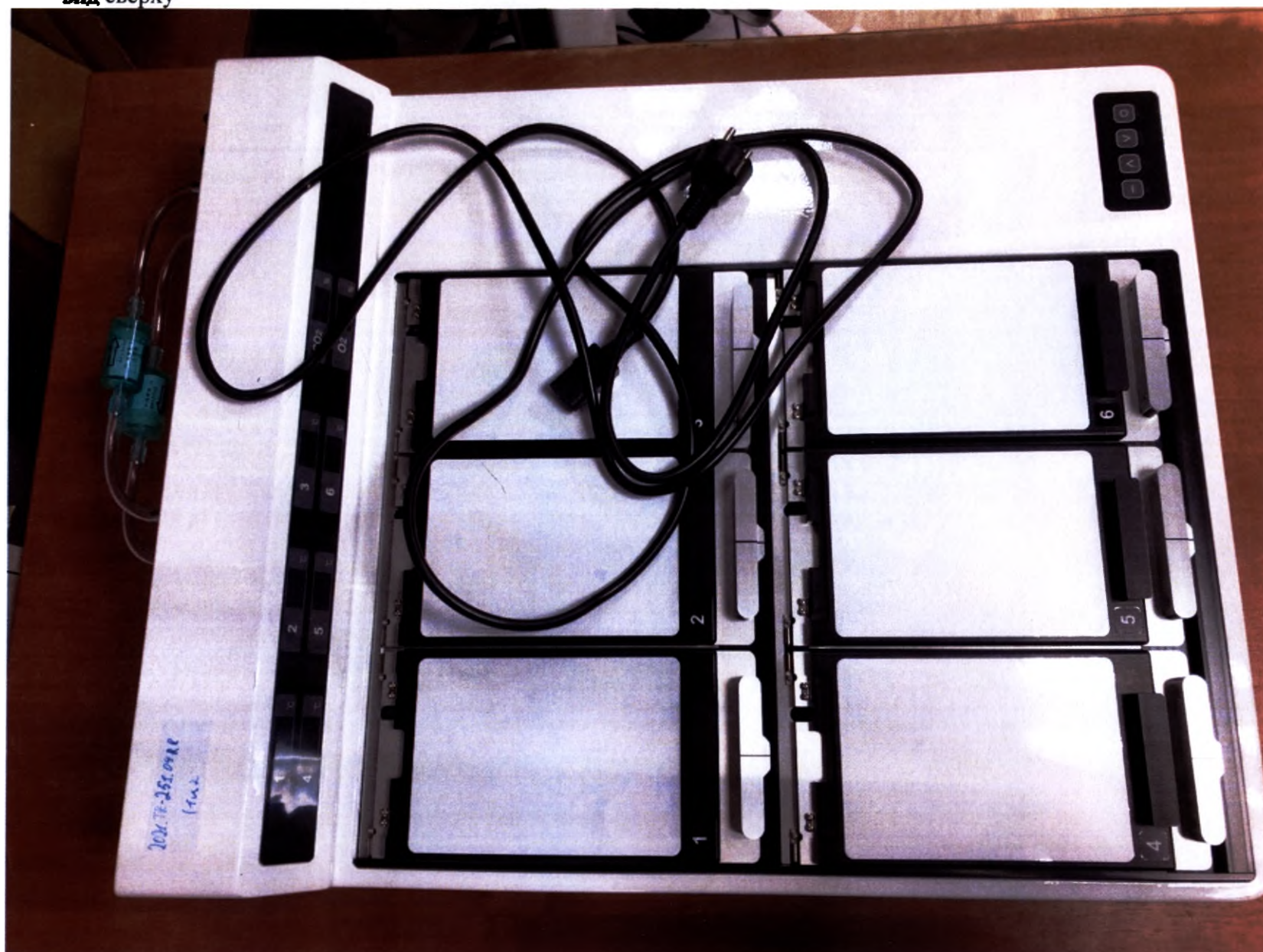

10) Медицинское изделие «Инкубатор без увлажнения для ЭКО, модель EC6S-230MD с принадлежностями». Основной корпус, вид сзади

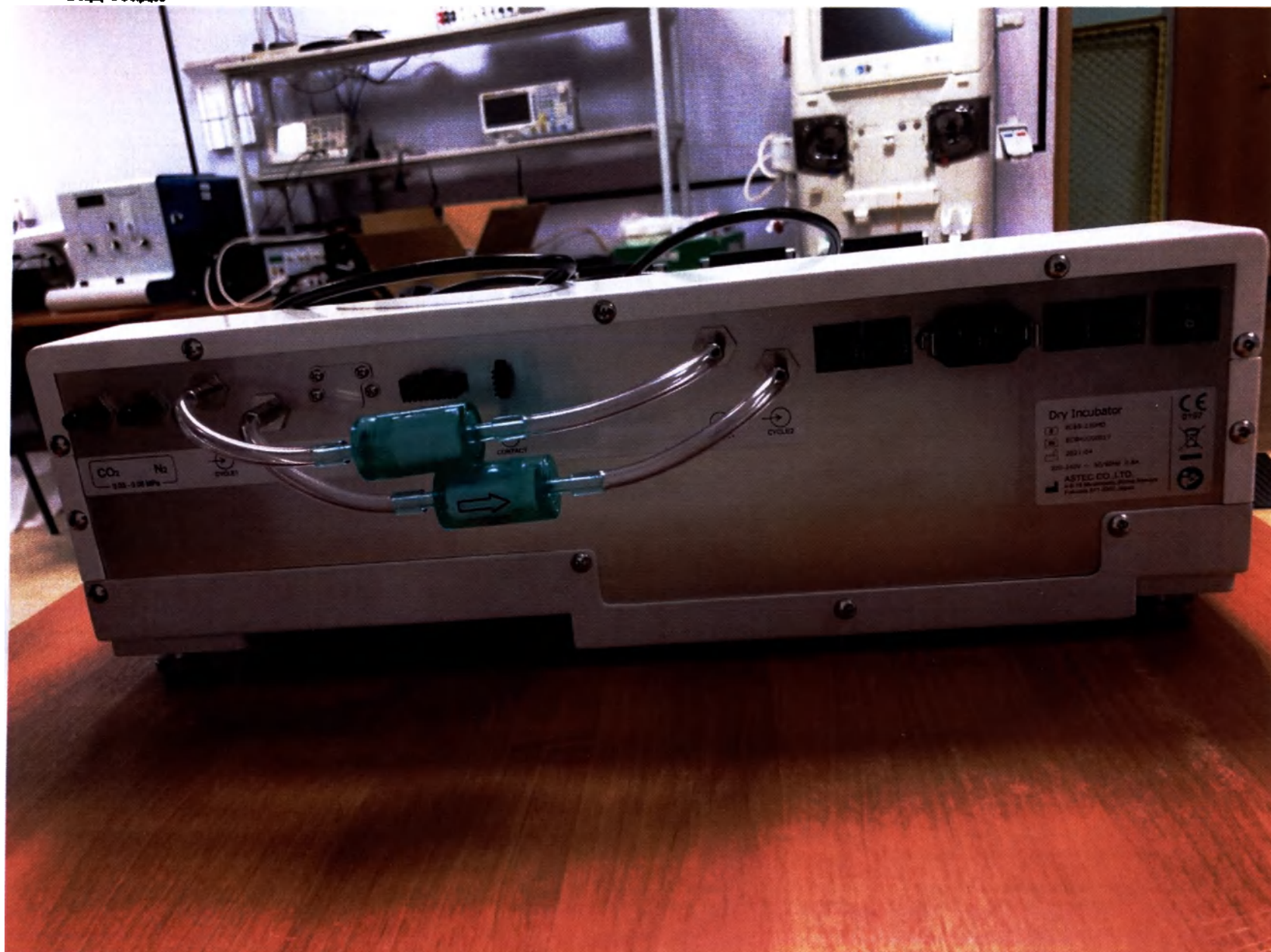

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 11 листов
Подпись *И.И. Иванова*

