

Для обеспечения высокого качества эндодонтического лечения, надежной адгезии композитных материалов при постановке пломб или фиксации керамических реставраций, удалении амальгамовых пломб использование коффердама является обязательным! Коффердам - единственное средство, обеспечивающее абсолютную сухость операционного поля, надежную защиту пациента от аспирации и проглатывания инструментов, агрессивных растворов и материалов. Неоспоримым преимуществом коффердама является улучшение доступа к операционному полю и, тем самым, экономия времени и сил во время проведения лечения.

Методика наложения коффердама:

Техника «крыльев»


(коффердам на рамку потом зажим, затем на зуб)

Удобна для наложения коффердама на моляры и премоляры.

Выбирайте зажим с крыльями.



Резиновый платок натягивается на рамку, в отверстие в фиксируется зажим

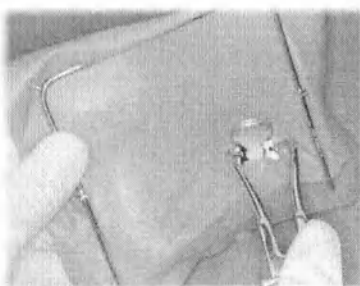


В специально предусмотренные отверстия зажима фиксируются щипцы




На лицо пациента накладывается специальная салфетка



Зажим фиксируется на зубе, ниже его экватора

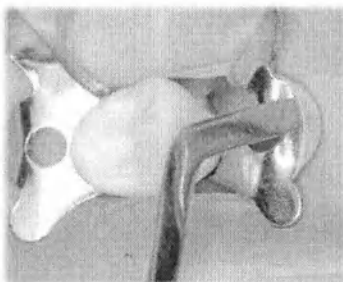

После фиксации зажима на зубе коффердам снимают с крыльев зажима гладилкой

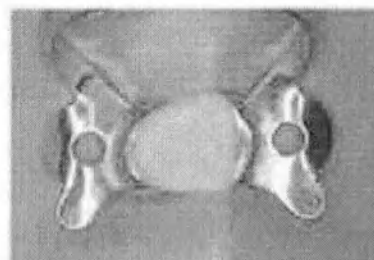

Коффердам зафиксирован на зубе. Операционное поле полностью изолированно от полости рта

При фиксации зажима на витальный зуб необходима анестезия!