


РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Изделия стоматологические вспомогательные «DuraDam»,
производства
DuraMedical Sdn Bhd, Малайзия.**

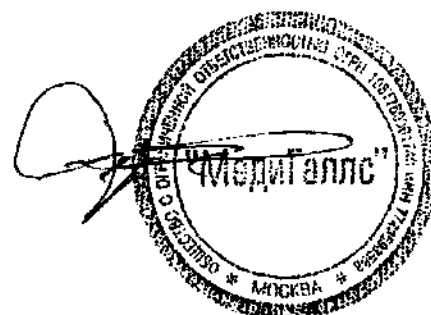

Для обеспечения высокого качества эндодонтического лечения, надежной адгезии композитных материалов при постановке пломб или фиксации керамических реставраций, удалении амальгамовых пломб использование коффердама является обязательным! Коффердам - единственное средство, обеспечивающее абсолютную сухость операционного поля, надежную защиту пациента от аспирации и проглатывания инструментов, агрессивных растворов и материалов. Неоспоримым преимуществом коффердама является улучшение доступа к операционному полю и, тем самым, экономия времени и сил во время проведения лечения.

Методика наложения коффердама:

Техника «крыльев»


(коффердам на рамку потом зажим, затем на зуб)

Удобна для наложения коффердама на моляры и премоляры.

Выбирайте зажим с крыльями.



Резиновый платок натягивается на рамку, в отверстие в фиксируется зажим

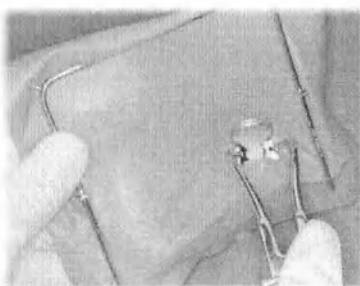


В специально предусмотренные отверстия зажима фиксируются щипцы




На лицо пациента накладывается специальная салфетка



Зажим фиксируется на зубе, ниже его экватора

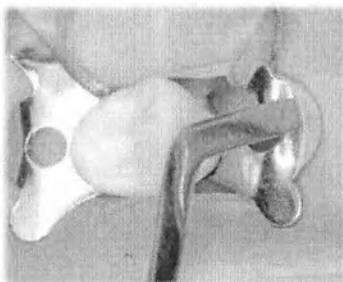

После фиксации зажима на зубе коффердам снимают с крыльев зажима гладилкой

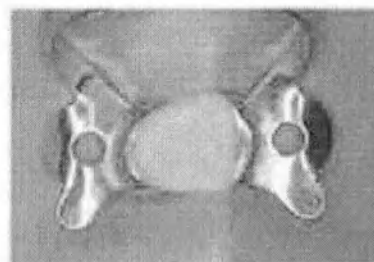

Коффердам зафиксирован на зубе. Операционное поле полностью изолировано от полости рта


При фиксации зажима на витальный зуб необходима анестезия!

Техника «сначала коффердам»


(коффердам вместе с рамкой на зуб, затем зажим)

Удобна при наложении коффердама все группы зубов верхней и нижней челюстей.


Требуется обученный этой технике ассистент.

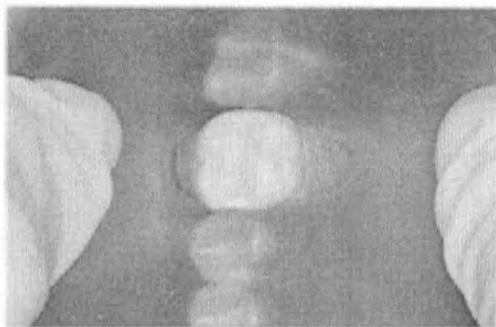


Ассистент берет заранее натянутый на рамку коффердам двумя руками между большим и указательными пальцами. Указательные пальцы находятся около отверстия и натягивают его на зуб.

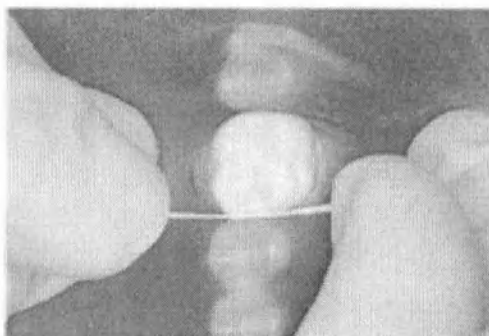

Врач продевает резиновый платок через апроксимальные контакты с помощью вощеной зубной нити.

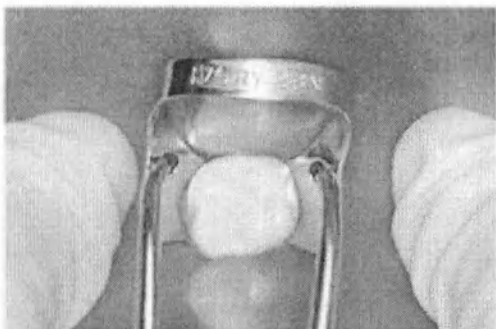

Ассистент удерживает коффердам в этом положении, врач в это время фиксирует на зубе зажим

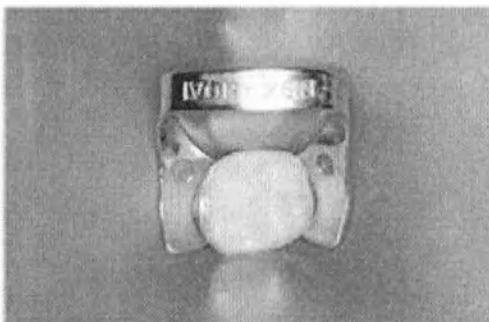

Коффердам адаптирован на зубе


При фиксации зажима на витальный зуб необходима анестезия!

Техника «сначала зажим»

(зажим на зуб, потом коффердам, затем рамка)

Для фиксации коффердама на премоляры и на первый моляр.

Выбирайте зажим без крыльев.

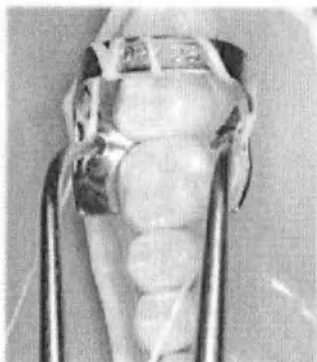

Зажим фиксируется на зубе.

!



Коффердам натягивается на установленный зажим, адаптируется на зубе и фиксируется на рамке

Перед фиксацией зажима на нем крепится длинный кусок зубной нити. В случае неожиданного соскока и аспирации зажима пациентом врач может извлечь его, потянув за нить!

Техника «сначала зажим»


(коффердам с зажимом с зажимом на зуб, затем рамка)

Для наложения коффердама на нижние моляры.


Выбирайте зажим без крыльев




В отверстие резинового платка продевается дуга зажима

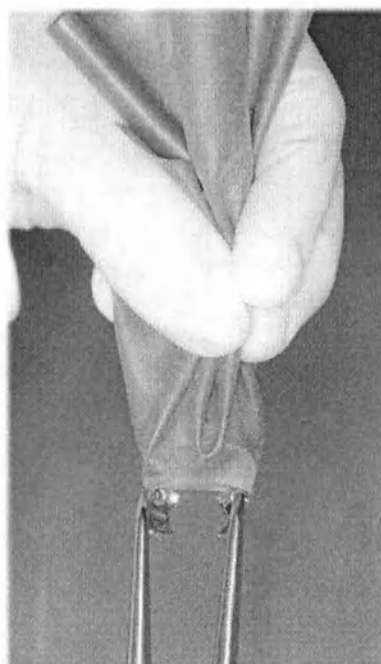

Щипцы фиксируются в отверстиях зажима, резиновый платок собирается в "пучок"

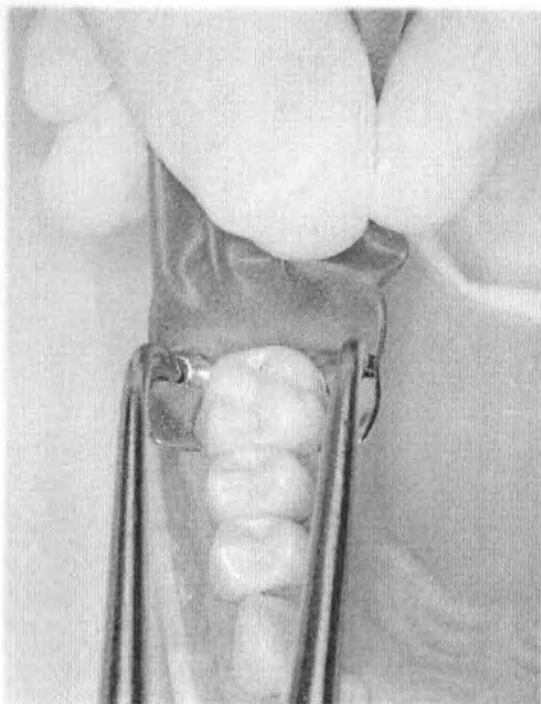

Зажим фиксируется на зубе, резиновый платок при этом удерживается в руке для обеспечения визуального контроля посадки зажима

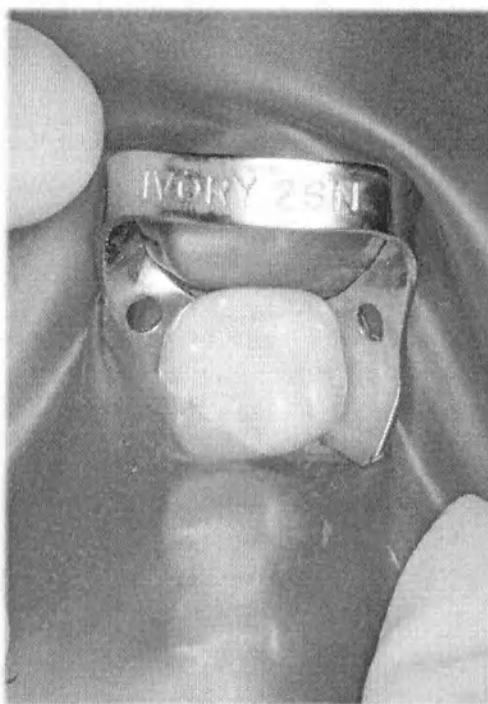

Резиновый платок полностью продевается через зажим, адаптируется вокруг зуба и фиксируется на рамке

Для более легкого проскальзывания коффердама через апроксимальные контакты смажьте его нижнюю часть тонким слоем lubricанта на водорастворимой основе (специальный lubricант Dentaglide, гель для УЗИ или для кардиоэлектродов). После наложения коффердама lubricант необходимо смыть струей воды с воздухом.

Для адаптации коффердама в апроксимальных контактах используйте вощеную зубную нить; после проскальзывания нитью через апроксимальный контакт вынимайте ее в щечном или оральном направлении, а не через апроксимальный контакт.

Для эндодонтического лечения достаточно одеть коффердам только на подлежащий лечению зуб.



Для реставрации или фиксации керамических конструкций необходимо одеть коффердам также и на соседние зубы, чтобы полностью освободить апроксимальное пространство. В этом случае коффердам фиксируется зажимом на дистально стоящем зубе и специальной резинкой WedJets на мезиально стоящем зубе. Вместо WedJets можно использовать деревянные или прозрачные клинья.



При фиксации зажима на витальный зуб необходима анестезия!