


ООО «НПФ «Медтехника»

ИНН/КПП 7819315479/781901001, 198516 Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Фабричная, 1
телефон\ факс (812) 612-06-71

Утверждаю

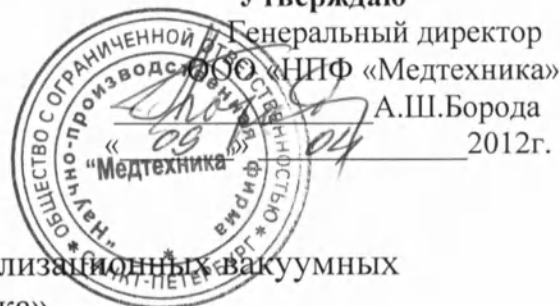

Генеральный директор
ООО «НПФ «Медтехника»
А.Ш.Борода
2012г.

Этикетка

«Комплекты шин полимерных иммобилизационных вакуумных
«НПФ-Медтехника»

ТУ 9438-005-38140643 – 2012

1. Назначение:

Шины иммобилизационные вакуумные (в дальнейшем шины) применяются при подозрении на переломы костей голени, стопы, предплечья, повреждение локтевого и коленного суставов, при повреждении мягких тканей конечностей с наружным кровотечением для создания неподвижности (иммобилизации) поврежденных конечностей на время транспортирования с места получения травмы до лечебного учреждения.

Шины предназначены для оказания само- и взаимопомощи, первой медицинской помощи.

2. Области применения:

В машинах скорой и неотложной помощи.

В службах медицины катастроф.

В формированиях МЧС и гражданской обороны.

В подразделениях МВД и МО.

На крупных производственных и добывающих предприятиях.

В спортивных обществах и спортивных комплексах.

В различных транспортных предприятиях

В автомобилях ДПС.

3. Технические данные и характеристика изделия:

Основные размеры: Шины НВ (нижние конеч.) : 670х965 мм; УВНс (верх.конеч.-для взрос.; нижние конеч –детс.): 710х520 мм; ВДс (верх.детс.средняя) : 710х315 мм;НДм (ниж.детс.малая) : 517х415 мм; ВДм (верх.детс.малая) : 412х265 мм

Шины могут эксплуатироваться и храниться при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 50 °С.

Масса шины – от 450г до 1150г в зависимости от назначения.

Максимальное рабочее разряжение в шинах –20 мм рт. ст.

Рентгенография возможна без снятия шин.

Специальных действий по утилизации не требуется.

4. Комплектность:

4.1 Комплекты вакуумных шин формируются по заказу покупателя из следующих шин:

- «НПФ-Медтехника» НВ - предназначена для иммобилизации нижних конечностей, для взрослых.
- «НПФ-Медтехника» УВНс - предназначена для иммобилизации верхних конечностей для взрослых или нижних конечностей для детей (детская средняя).
- «НПФ-Медтехника» ВДс - предназначена для иммобилизации верхних конечностей для детей (средняя).
- «НПФ-Медтехника» НДм - предназначена для иммобилизации нижних конечностей для детей (малая)..
- «НПФ-Медтехника» ВДм предназначена для иммобилизации верхних конечностей для детей (малая)..

Комплект	Наименование	
ВДм-2	Комплект шин иммобилизационных вакуумных для детей (детские малые)	НДм, ВДм
ВДс-2	Комплект шин иммобилизационных вакуумных для детей (детские средние)	УВНс, ВДс
Вв-2	Комплект шин иммобилизационных вакуумных для взрослых	НВ, УВНс

4.2 Насос вакуумный ручной – 1 шт.

4.3 Этикетка – 1 шт.

4.4 Сумка транспортная – 1 шт.

5. Указания мер безопасности:

При укладке шин в упаковку не допускайте резких изломов трубок.

Не подвергайте шины воздействию острых режущих и колющих предметов.

Не подвергайте шины воздействию горячих предметов и агрессивных жидкостей.

6. Возможные неисправности.

Характер неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Нет разряжения в шине при откачке воздуха	Закрыт впускной - выпускной кран	Открыть впускной - выпускной кран
Быстрое падение разряжения в шине	Не закрыт впускной - выпускной кран	Закрыть впускной - выпускной кран
Быстрое падение разряжения в шине	Течь в сварных швах	Ремонт в условиях предприятия изготовителя

7. Порядок применения шин.

Наложение шин не предусматривает снятия одежды и обуви.

При открытых переломах или порезах необходимо вначале наложить на рану стерильную повязку, а затем шину.

Шина накладывается на конечность и стягивается ремнями с фиксацией текстильной застёжкой (липучкой).

Присоединяется вакуумный насос, проверяется закрытие впускного - выпускного крана и производится откачка воздуха до получения фиксации конечности, после чего пострадавший может быть эвакуирован.

Для снятия шин открывается кран для впуска воздуха.

После стравливания давления в шине расстегиваются застёжки (липучки) и изделие снимается с конечности.

8. Рекомендации по дезинфекции шин.

После каждого применения наружные поверхности чехлов шин должны подвергаться соответствующей санитарной обработке.

При видимых обильных загрязнениях шин необходимо смыть загрязнения под струей проточной воды.

Шины дезинфицируются 4% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос».

После экспозиционной выдержки дезинфицирующий раствор удаляется с поверхности шин салфеткой, смоченной водой. После чего шины протираются сухой салфеткой.

9. Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие параметров и характеристик шин требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации шин 12 месяцев от даты получения.

10. Изготовитель.

ООО «НПФ «Медтехника», 198516, г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Фабричная, д.1
телефон\ факс (812) 612-06-71

11. Срок эксплуатации.

Средний срок службы шин не менее 18 месяцев от даты изготовления.

Количество циклов наложения - снятия шины не менее 1000 раз.

Прошито и пронумеровано

два

лист

Генеральный директор
ООО «ЦРМИ» «Медтехника»

А.П.Шевелев
«Медтехника»
года

