

Фотографические изображения общего вида


«Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией «SARS-CoV-2 RNA-DETECTION-1F» ФОРМА 1 и ФОРМА 2, по ТУ 21.10.60-002-83076696-2020, серии ЗР.2.0.pph и ЗР.2.0.lph»

ФОРМА 1, серия ЗР.2.0.pph

Вид сверху закрытой коробки набора реагентов:




Вид сбоку закрытой коробки набора реагентов:

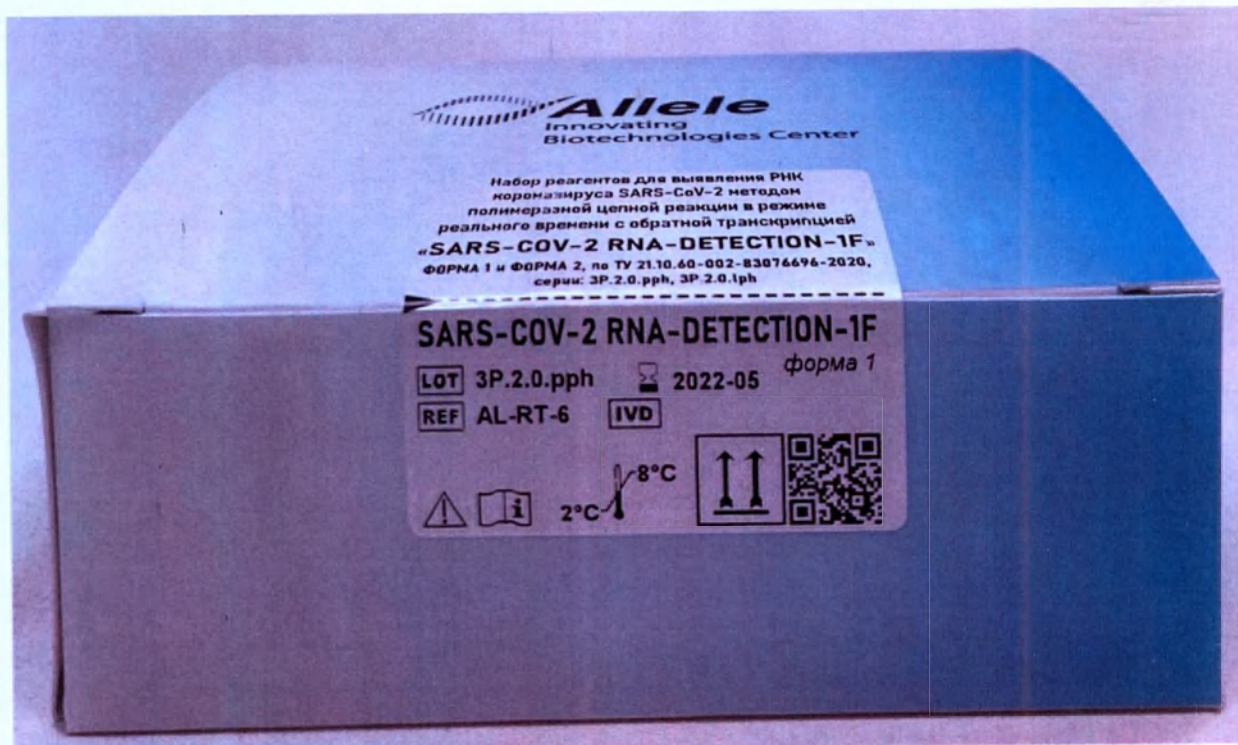



Вид сверху открытой коробки набора реагентов:

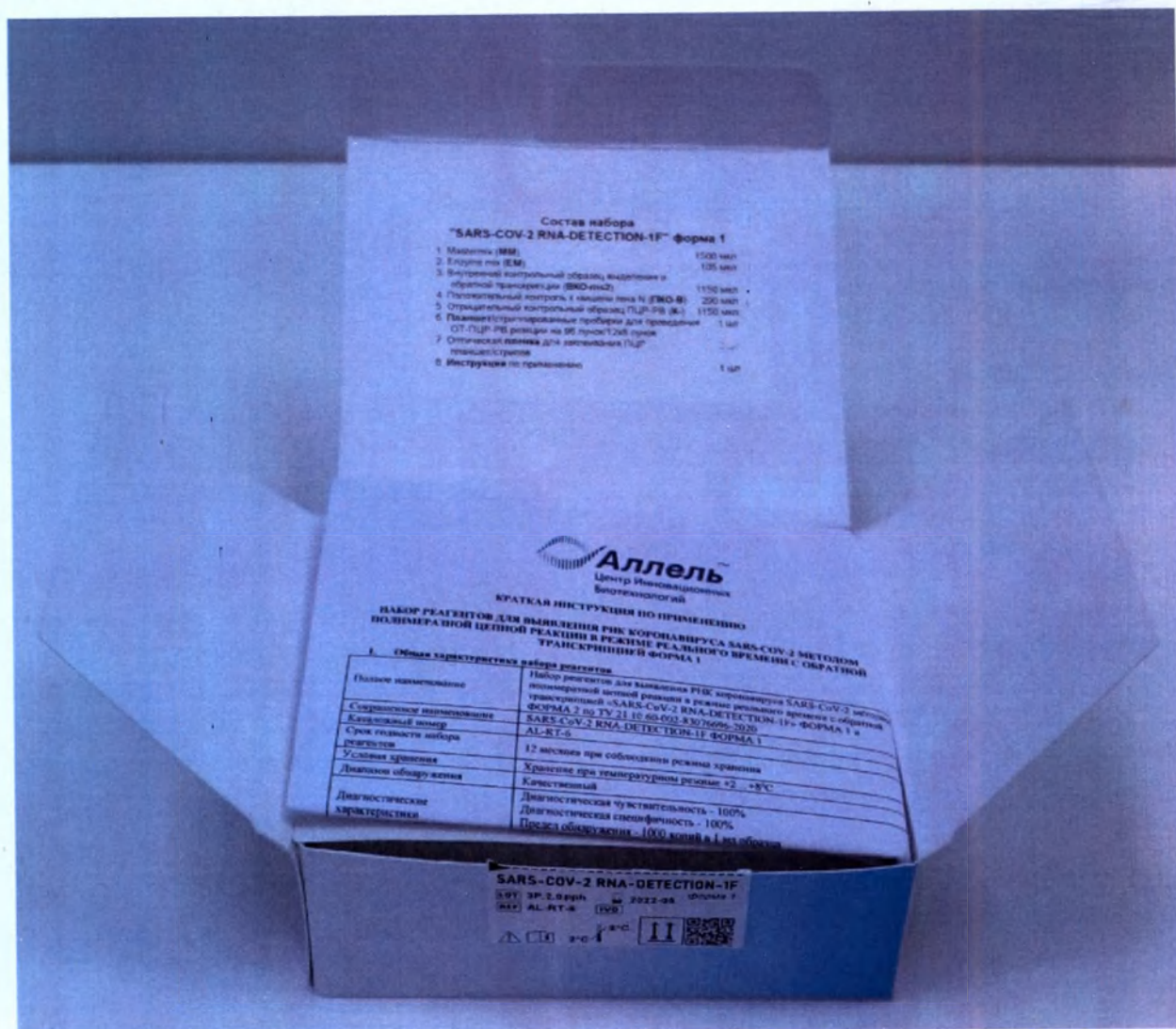



Состав набора "SARS-CoV-2 RNA-DETECTION-1F" форма 1

- | | |
|---|----------|
| 1. Mastermix (MM) | 1500 мкл |
| 2. Enzyme mix (EM) | 105 мкл |
| 3. Внутренний контрольный образец выделения и обратной транскрипции (ВКО-rtss2) | 1150 мкл |
| 4. Положительный контроль к матрице гена N (ПКО-В) | 290 мкл |
| 5. Отрицательный контрольный образец ПЦР-РВ (К-) | 1150 мкл |
| 6. Планшет/стрипы для проведения ОТ-ПЦР-РВ реакции на 96 лунок/12х8 лунок | 1 шт |
| 7. Оптическая пленка для заклеивания ПЦР планшет/стрипов | 1 шт |
| 8. Инструкция по применению | 1 шт |



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ С ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИЕЙ ФОРМА 1

1. Общая характеристика набора реагентов

Полное наименование	Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией «SARS-CoV-2 RNA-DETECTION-1F» ФОРМА 1 и ФОРМА 2 по ТУ 21.10.60-002-83076696-2020
Сокращенное наименование	SARS-CoV-2 RNA-DETECTION-1F ФОРМА 1
Каталожный номер	AL-RT-6
Срок годности набора реагентов	12 месяцев при соблюдении режима хранения
Условия хранения	Хранение при температурном режиме +2...+8°C
Диапазон обнаружения	Качественный
Диагностические характеристики	Диагностическая чувствительность - 100% Диагностическая специфичность - 100% Предел обнаружения - 1000 копий в 1 мл образца



Фото пробирок с реагентами набора реагентов:

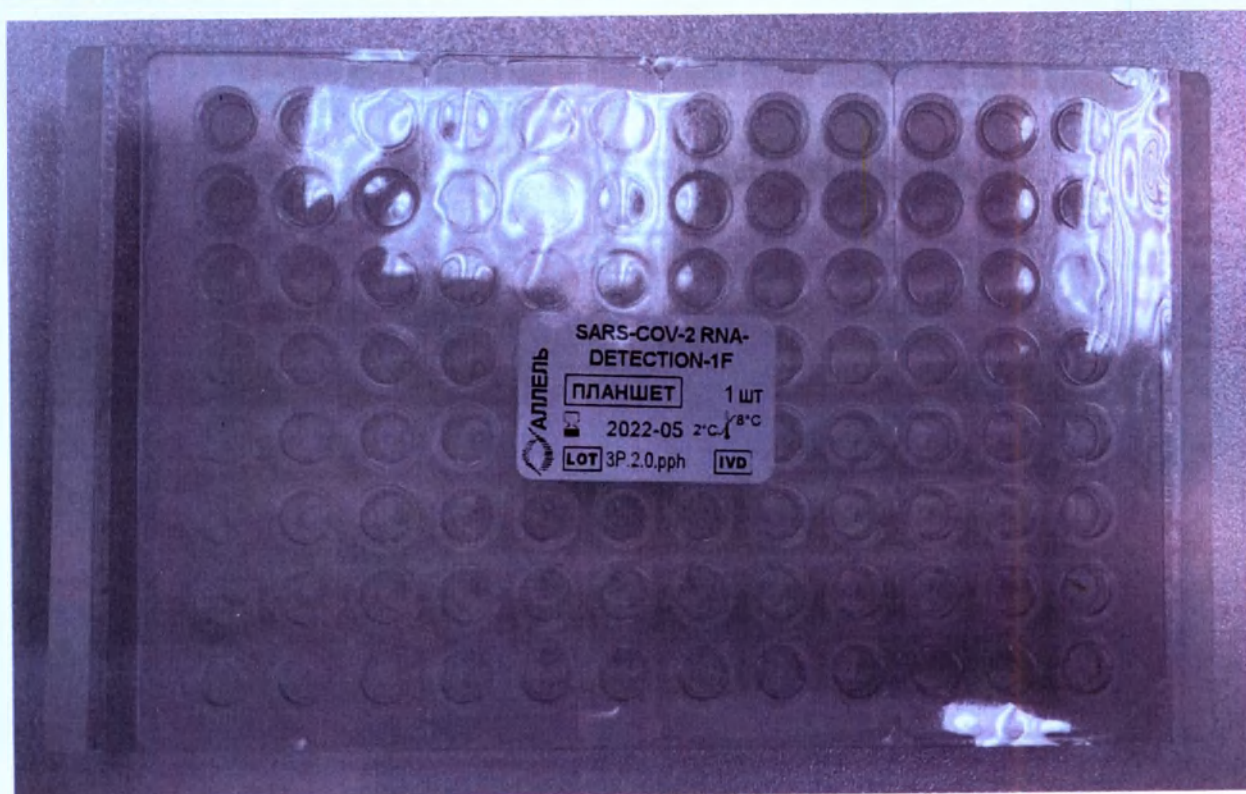

ФОРМА 2, серия ЗР.2.0.1ph

Вид сверху закрытой коробки набора реагентов:




Вид сбоку закрытой коробки набора реагентов:






Вид сверху открытой коробки набора реагентов:

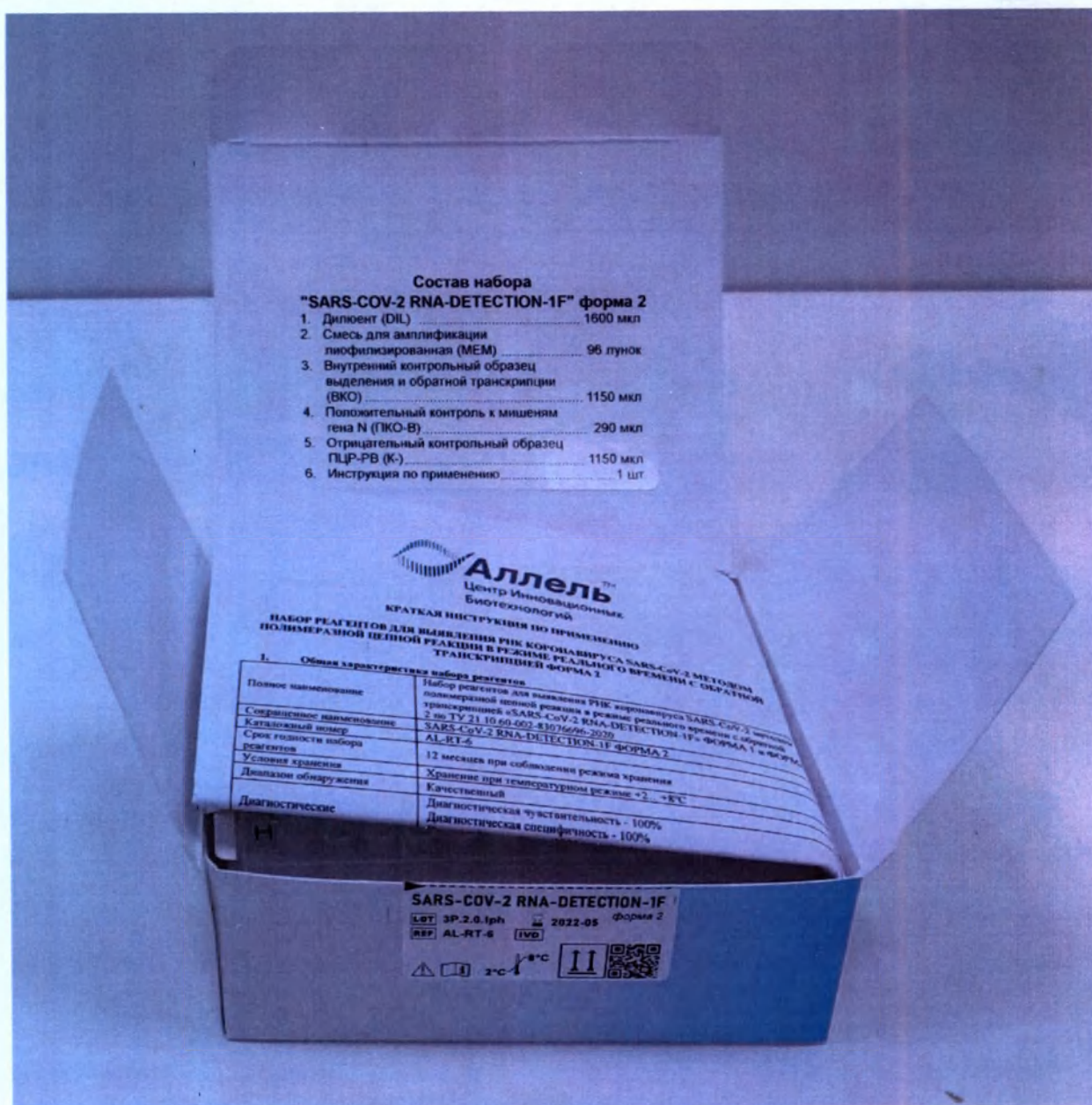

- Состав набора**
"SARS-COV-2 RNA-DETECTION-1F" форма 2
1. Дилуент (DIL) 1600 мкл
 2. Смесь для амплификации
лиофилизированная (MEM) 96 лунок
 3. Внутренний контрольный образец
выделения и обратной транскрипции
(ВКО) 1150 мкл
 4. Положительный контроль к мишеням
гена N (ПКО-В) 290 мкл
 5. Отрицательный контрольный образец
ПЦР-РВ (К-) 1150 мкл
 6. Инструкция по применению 1 шт

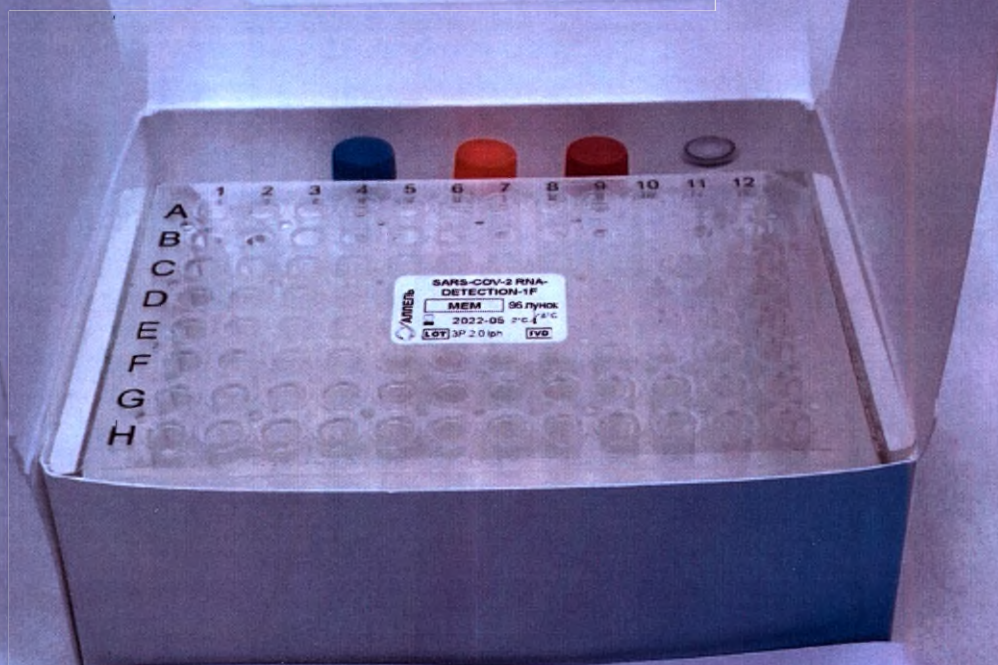


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ С ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИЕЙ ФОРМА 2

1. Общая характеристика набора реагентов


Полное наименование	Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией «SARS-CoV-2 RNA-DETECTION-1F» ФОРМА 1 и ФОРМА 2 по ТУ 21.10.60-002-83076696-2020
Сокращенное наименование	SARS-CoV-2 RNA-DETECTION-1F ФОРМА 2
Каталожный номер	AL-RT-6
Срок годности набора реагентов	12 месяцев при соблюдении режима хранения
Условия хранения	Хранение при температурном режиме +2...+8°C
Диапазон обнаружения	Качественный
Диагностические	Диагностическая чувствительность - 100% Диагностическая специфичность - 100%

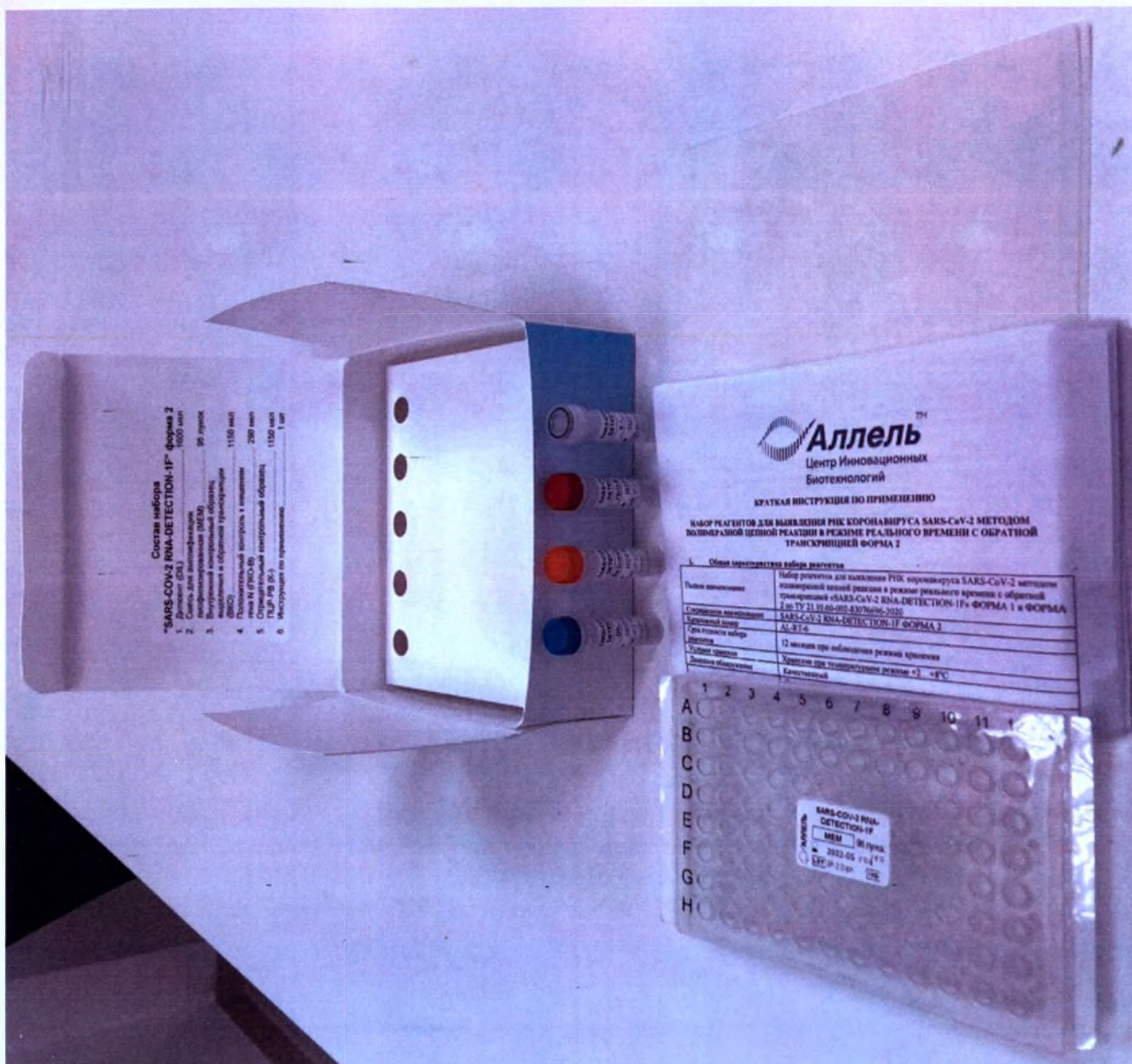

Вид пробирок с реагентами набора реагентов:

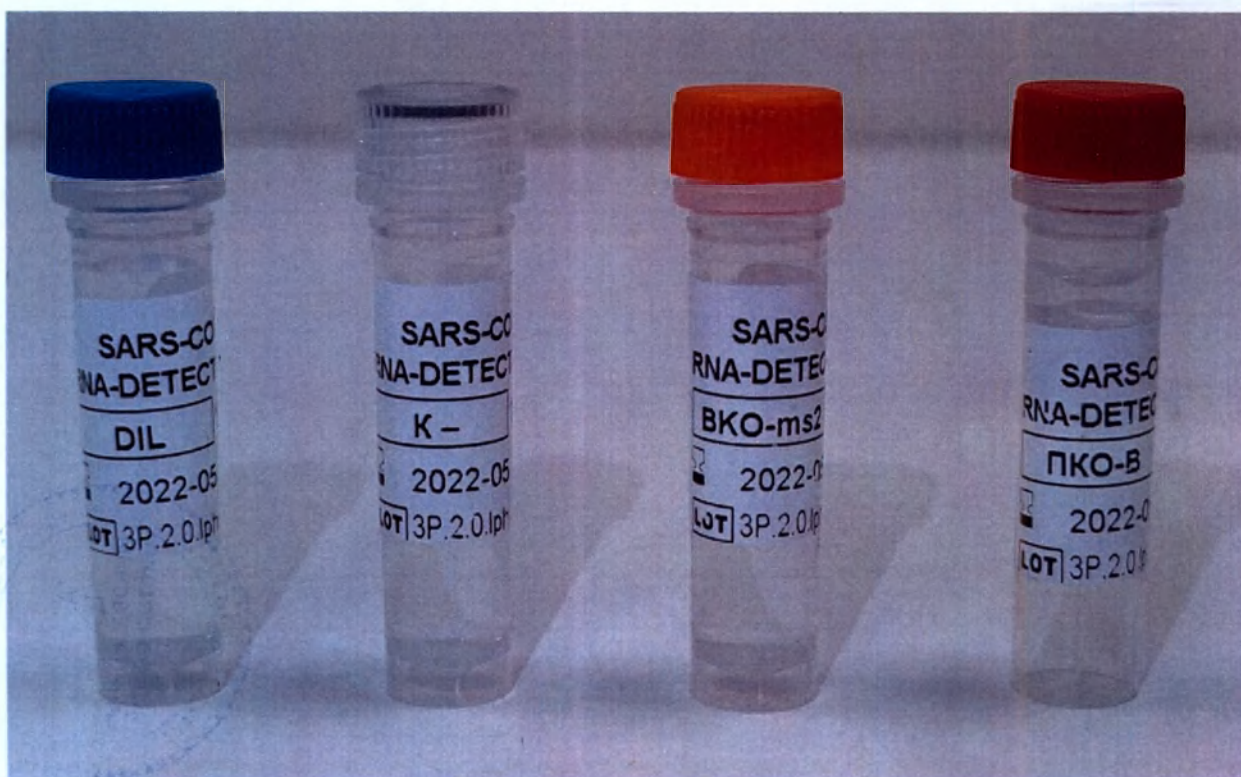

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
146 Журнал) лист 8

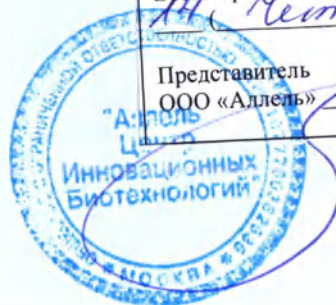

Представитель
ООО «Аллея»

В. Л. Гамольский