

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Изделия медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro



2011 г.

Изделия медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro:

1. Винтовые крышки с петлей и кольцевой прокладкой для пробирок объемом от 0,5 мл до 2,0 мл.
2. Винтовые крышки с кольцевой прокладкой для пробирок объемом от 0,5 мл до 2,0 мл.
3. Пробирки с винтовой горловиной объемом от 0,5 мл до 2,0 мл.
4. Пробирки объемом от 0,65 мл до 1,1 мл без штатива.
5. Пробирки объемом от 0,65 мл до 1,1 мл в штативе.
6. Крышки для пробирок объемом от 0,65 мл до 1,1 мл в стрипах.
7. Тонкостенные пробирки для ПЦР с плоской крышкой объемом от 0,2 мл до 0,5 мл.
8. Тонкостенные пробирки для ПЦР с выпуклой крышкой объемом 0,2 мл.
9. Пробирки объемом 0,1 мл в стрипах по 4 штуки.
10. Пробирки объемом 0,2 мл в стрипах по 8 штук.
11. Крышки к пробиркам в стрипах по 8 штук, плоская крышка.
12. Крышки к пробиркам в стрипах по 8 штук, выпуклая крышка.
13. Микроцентрифужные пробирки градуированные объемом от 0,6 мл до 2,0 мл.
14. Плашки для ПЦР на 24 лунки.
15. Плашки для ПЦР на 32 лунки.
16. Плашки для ПЦР на 48 лунок.
17. Плашки для ПЦР на 96 лунок.
18. Плашки для ПЦР на 384 лунки.
19. Штатив для пробирок, 50 ячеек.
20. Штатив для пробирок, 80 ячеек.
21. Штатив для пробирок, 81 ячейка.
22. Штатив для пробирок, 96 ячеек.
23. Пробирки без пробки объемом от 5 мл до 7 мл.
24. Пробки для пробирок.
25. Пробирки с винтовой горловиной крышкой объемом от 5 мл до 50 мл.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделия медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro производятся в соответствии с международными ISO 9001:2008 и ISO 13485:2007 компанией Axygen, Inc, США.

Изделия медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro являются необходимой составляющей в любых лабораторных исследованиях; широко применяются в медицинских, биологических, прикладных и научных лабораториях на преаналитических, аналитических этапах и пробоподготовке.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крышки к пробиркам с винтовой горловиной



Поверхность крышек ровная, гладкая, чистая, однородная по цвету; трещины, раковины, посторонние вкрапления, зазубрины, царапины, расслоения и другие механические дефекты отсутствуют; нарушения резьбовых соединений не обнаружены; резьба крышек ровная, без видимых нарушений.

Разноцветные крышки выполнены из полипропилена с петлей для фиксации крышки на пробирке.

Имеется петля для фиксации крышки на пробирке.

Обеспечивается надежная фиксация без применения дополнительных инструментов и приспособлений; течь жидкости при переворачивании и наклоне пробирок отсутствует; имеется резиновая кольцевая прокладка.

Наличие на боковой поверхности вертикальных граней.

Пробирки конические.




Пробирки выполнены из прозрачного полипропилена.
Номинальная вместимость – 14 мл.
Имеются отметки о максимальном и минимальном уровнях:
Нижняя отметка – 2 мл;
Верхняя отметка – 14 мл.

Цена деления – 0,5 мл.
Погрешность номинальной вместимости – $\pm 0,2$ мл.
Высота пробирок – 118 мм.
Диаметр пробирок:
Верхний – 16 мм;
нижний – 6 мм.

Отметка на шкале – отметки, цифры, надписи четкие; оцифровка на шкалах нанесена против отметок с правой стороны снизу вверх.

Пробирки мерные

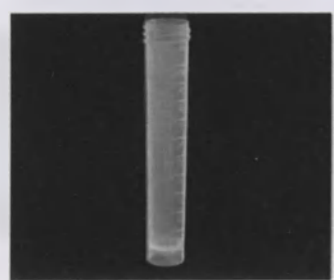

Пробирки выполнены из прозрачного полипропилена.
Номинальная вместимость – 10 мл.
Имеются отметки о максимальном и минимальном уровнях:
Нижняя отметка – 1 мл;
Верхняя отметка – 10 мл.

Цена деления – 1,0 мл.
Погрешность номинальной вместимости – $\pm 0,2$ мл.
Высота пробирок – 93 мм.
Требования к шкале – отметки, цифры, надписи четкие; оцифровка на шкалах нанесена над соответствующими отметками.
Диаметр пробирок – 15 мм.

Полипропиленовые пробирки



Пробирки выполнены из полипропилена тонкостенного.

Номинальная вместимость – 0,1 мл.

Внешний вид – конической формы, соединенные перетяжками (стрипы по 8 пробирок) со стрипованными выпуклыми крышками; обеспечена надежная фиксация крышек.

Пробирки оптически прозрачны; анализ результатов происходит непосредственно через стенку пробирки.

Микроцентрифужные пробирки



Внешний вид – конической формы с защелкивающейся матовой крышкой; на стенке пробирки имеется участок для надписи с матовой поверхностью; на крышке имеется участок для прокалывания иглой толщиной 0,28 мм.

Вместимость – 1,5 мл.

Высота – 40 мм.

Диаметр:

Верхний – 0,10 мм;

нижний – 0,6 мм.

Цена деления – 0,25 мм.

Требования к шкале – отметки, цифры, надписи четкие; оцифровка на шкалах нанесена над соответствующими отметками.

Плашка для ПЦР



Материал – полипропилен.

Внешний вид – прямоугольной формы (120×80×21)мм; по длине пронумерован от 1 до 12, по ширине – латинскими буквами от А до Н.

Количество лунок – 24, 32, 48, 96, 384 лунок прямоугольной формы.

Плашка на горизонтальной поверхности стола стоит ровно, без раскачивания; протекание жидкости между соседними лунками отсутствует.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Пробирки предназначены для забора, центрифугирования, хранения, транспортировки, выделения, амплификации, детекции проб.

Штативы для пробирок предназначены для хранения, транспортировки, заморозки пробирок.



Плашки используются на стадии пробоподготовки и амплификации в лабораторных методах исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ

Следуйте следующим правилам хранения:

Особых условий к температурному режиму не требуется.

Избегайте воздействия прямого солнечного света, особенно при высоких температурах (около +50С).

Избегайте складирования вблизи отопительных приборов.

Избегайте относительной влажности более 80%.

Правила утилизации вакуумных систем

Изделия медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro утилизируются автоклавированием в полиамидных пакетах при 121°С в течение 30 минут.

Упаковка

Крышки для пробирок 0,5 мл – 10 мл

500 крышек в упаковке, 8 упаковок в транспортной коробке.

50 крышек в коробке, 10 коробок в упаковке, 8 упаковок в транспортной коробке.

960 крышек в упаковке, 5 упаковок в коробке.

1000 крышек в упаковке, 10 упаковок в транспортной коробке.

Пробирки с винтовой горловиной

25 пробирок в упаковке, 20 упаковок в транспортной коробке.

50 пробирок в упаковке, 10 упаковок в транспортной коробке.

500 пробирок в упаковке, 8 упаковок в транспортной коробке.

50 пробирок в коробке, 10 коробок в упаковке, 8 упаковок в транспортной коробке.

Пробирки 0,1 мл до 7,0 мл с крышками и без

1000 пробирок в упаковке, 25 упаковок в транспортной коробке.

1000 пробирок в упаковке, 10 упаковок в транспортной коробке.

1000 пробирок в упаковке, 1 упаковка в коробке.

500 пробирок в упаковке, 2 упаковки в транспортной коробке.

500 пробирок в упаковке, 5 упаковок в транспортной коробке.

500 пробирок в упаковке, 10 упаковок в транспортной коробке.

96 пробирок в штативе, 50 штативов в коробке.

960 пробирок в упаковке, 5 упаковок в транспортной коробке.

Крышки для пробирок от 0,1 мл до 7,0 мл

50 крышек в коробке, 10 коробок в упаковке, 8 упаковок в транспортной коробке.

960 крышек в упаковке, 5 упаковок в коробке.

1000 крышек в упаковке, 10 упаковок в транспортной коробке.

Плашки для ПЦР от 24 до 384 лунок

10 плашек в упаковке, 5 упаковок в коробке.

10 плашек в упаковке, 10 упаковок в коробке.

25 плашек в упаковке, 4 упаковки в коробке.

Штатив для пробирок от 48 до 96 ячеек с крышками и без

5 штативов в упаковке, 5 упаковок в транспортной коробке.

5 штативов в упаковке, 4 упаковки в транспортной коробке.

25 штативов в транспортной коробке.

10 штативов в упаковке, 10 упаковок в транспортной коробке.

10 штативов в транспортной коробке.

4 штатива в упаковке, 4 упаковки в транспортной коробке.

Информация об упаковке

LOT: Номер лота или партии
STERILE : Знак стерильности

Производитель

Axugen, Inc, США

«Эксиджен, Инк.» (США)

Юр. адрес: 33210, Central Avenue, Union City, California - 94587, USA

Tel: (510)4948900 Fax: (510)4940700

Manufactura Integrada del Pacifico («Мануфактура Интеграда дель Пасифико»), 1089-3 Avenida Prolongacion M Juarez, Tijuana, Baja Calif, Mexico CP22129

Импортер и официальный дистрибьютор: ООО «ИнтерЛабСервис», Россия

Юридический адрес: Россия, 111123, г. Москва, 3-й проезд Перова поля, д.8, стр.1

Фактический адрес: Россия, 119021, г. Москва, Олсуфьевский пер., д.8, стр.1

Тел./факс: (495) 664-28-84, (495) 664-28-89

E-mail: info@interlabservice.ru

Генеральный директор
ООО «ИнтерЛабСервис»

подпись

Гущина И.А.
ФИО

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ 6 _____ листов
Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
"ИнтерЛабСервис"



И.А. Гущина

И.А. Гущина