

ООО «БИОФАРМРУС»,
адрес: РФ, 142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49, пом. 1, ком. 65
Тел. +7 (495) 580-30-69
Электронная почта: info@biofarmrus.com

**Фотографические изображения,
макеты маркировки медицинского изделия**

**«Набор «Экзол» для удаления грибкового поражения
с ногтевой пластины по ТУ 9398-013-61533319-2016»**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР «ЭКЗОЛ» ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
С НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ**

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор «Экзол» для удаления грибкового поражения с ногтевой пластины по ТУ 9398-013-61533319-2016, в составе:

1. Сыворотка для ногтей в тубе с кисточкой-аппликатором – 1 шт.
2. Одноразовые пилочки – 10 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «БИОФАРМЛАБ» (ООО «БИОФАРМЛАБ»), Россия, 141983, Московская область, город Дубна, проспект Науки, дом 25.

3. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор «Экзол» предназначен для удаления грибкового поражения с ногтевой пластины. Если Вы не

Набор «Экзол» для удаления грибкового поражения с ногтевой пластины
по ТУ 9398-013-61533319-2016.

Общий вид изделия.



Набор «Экзол» для удаления грибкового поражения с ногтевой пластины
по ТУ 9398-013-61533319-2016.

Туба с кисточкой-аппликатором и защитным колпачком.

ЭКЗОЛ EXOL

НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ С НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ

ПОКАЗАНИЯ

- грибковое поражение ногтевой пластины
- профилактика грибкового поражения ногтевой пластины, особенно при посещении общественных бассейнов, душевых, саун
- укрепление и питание ногтевой пластины при ее повышенной ломкости и расслаивании

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- дети младше 4-х лет
- индивидуальная непереносимость отдельных компонентов сыворотки для ногтей
- беременность и период лактации
- кожные заболевания, поврежденная кожа и повышенная чувствительность к компонентам сыворотки для ногтей

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед началом использования внимательно изучите инструкцию по применению внутри упаковки!

СОСТАВ НАБОРА

сыворотка для ногтей 5 мл в тубе с кисточкой-аппликатором - 1 шт., одноразовые пилочки - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт. Сыворотка для ногтей изготавливается из следующих компонентов: вода очищенная, пентиленгликоль, дрожжевой бета-глюкан в водном растворе сорбита, диметилизосорбид, карбоксиметилцеллюлоза.

Гарантийный срок годности набора - 3 года.


Номер партии/LOT:
Дата изготовления/MFG:

0920
09.2020



4 620 002 187 477

Набор «Экзол» для удаления грибкового поражения с ногтевой пластины по ТУ 9398-013-61533319-2016.
Маркировка потребительской упаковки.

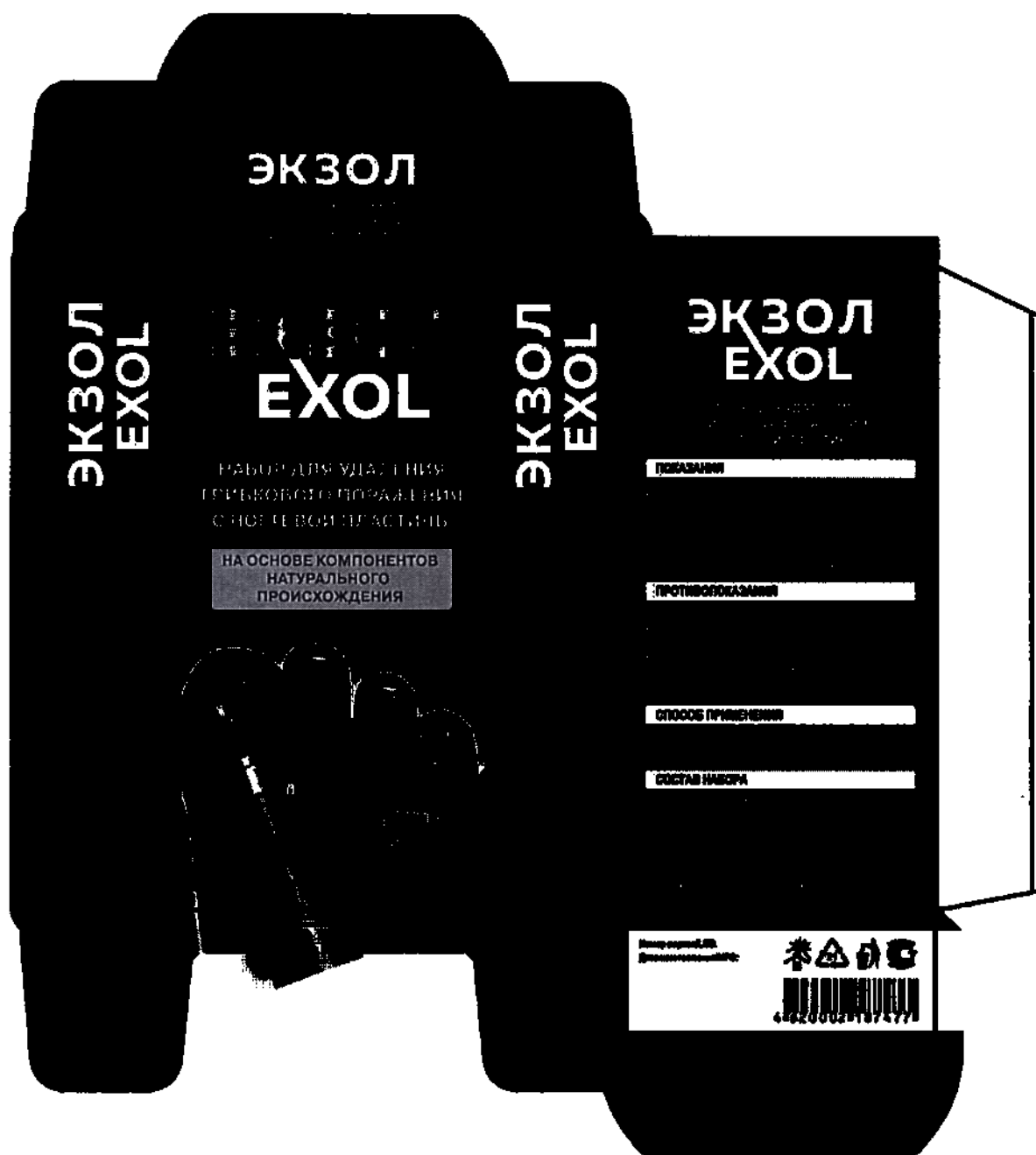

**Набор «Экзол» для удаления грибкового поражения с ногтевой пластины
по ТУ 9398-013-61533319-2016.**

Макет маркировки потребительской упаковки.

осно преемственности
скреплено печатью
5 листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «БИОФАРМУС»
ХАУСТОВ Е. И.

