

Утверждаю

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Г.А. Носова
«21» октября 2021 г.
М.П.
МИТРОХИНА



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№77АГ5987517

Фотографические изображения №4

Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000

«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»
(«Шэньчжэнь Лифотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Потребительская упаковка МИ, Партия SAR2101000 «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000»

Lifotronic

Информацию на стикере считать приоритетной

Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000,

в составе:

- Тест-картридж – 25 шт.
- Буфер для экстрагирования – 25 шт.
- Зонд стерильный длинный – 25 шт.
- Пробирка с маслдой-капельницей – 25 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»

(«Шэньчжэнь Лифотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай

Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518055, P.R.China (Китай, 518055, Провинция Гуан-дун, г. Шэньчжэнь, Наньшаньский район, Улица Сонбай №1008, Усадьба Ичжи, Корпус 15, 4-й этаж, Блок А)

Уполномоченный представитель производителя в России:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»;

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр. 1, пом. 17;

Телефон: +7(499)2816768

Стикер на русском языке, Партия SAR2101000 «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000»



Потребительская упаковка МИ, Партия SAR2100200 «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000»

Lifotronic

Информацию на стикере считать приоритетной

Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000,

в составе:

- Тест-картридж – 25 шт.
- Буфер для экстрагирования – 25 шт.
- Зонд стерильный длинный – 25 шт.
- Пробирка с насадкой-капельницей – 25 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»

(«Шэньчжэнь Лифотроник Текнолоджи Ко., Лтд.»), Китай

Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518055, P.R.China (Китай, 518055, Провинция Гуан-дунг, г. Шэньчжэнь, Наньшаньский район, Улица Сонбай №1008, Усадьба Ипинг, Корпус 15, 4-й этаж, Блок А)

Уполномоченный представитель производителя в России:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВю»;

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр. 1, пом. 17;

Телефон: +7(499)2816768

Стикер на русском языке, Партия SAR2100200 «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000»



Потребительская упаковка МИ, Партия SAR2100700 «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000»

Lifotronic

Информацию на стикере считать приоритетной

Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000,

в составе:

- Тест-картридж – 25 шт.
- Буфер для экстрагирования – 25 шт.
- Зонд стерильный длинный – 25 шт.
- Пробирка с насадкой-капельницей – 25 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»

(«Шэньчжэнь Лифотроник Текнолоджи Ко., Лтд.»), Китай

Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518055, P.R.China (Китай, 518055, Провинция Гуан-донг, г. Шэньчжэнь, Наньшаньский район, Улица Сонбай №1008, Усадьба Ицзин, Корпус 15, 4-й этаж, Блок А)

Уполномоченный представитель производителя в России:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»;

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр. 1, пом. 17;

Телефон: +7(499)2816768

Стикер на русском языке, Партия SAR2100700 «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000»



Состав МИ, Партия SAR2100700 «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000»



SARS-CoV-2 Antigen (GICA) User Manual

【Product】

Name: SARS-CoV-2 Antigen (GICA)

【Intended Use】

determination of SARS-CoV-2 antigens in human throat swab and nose swab

is a positive-sense single-stranded RNA virus, belonging to betacoronaviruses. It is 30 kb in length. [1]The genome of SARS-CoV-2 encodes four structural proteins M (membrane), and N (nucleocapsid) proteins; the N protein holds the RNA genome inside the viral envelope.




The binding and membrane fusion of virus and host cell membrane receptor, mediate respiratory epithelial cells.[2] Nucleocapsid protein is the most abundant protein in assembly, N protein binds to viral RNA and leads to the formation of spiral nucleocapsid. Immunogenic phosphoprotein, which is related to viral genome replication and cell adhesion sequence and strong immunogenicity of N protein, N protein is often used as

as a tool to confirm novel coronavirus pneumonia COVID-19.[4]


Detection method. The antigens in the sample, bind to detector antibodies conjugated with gold particles, and migrates onto nitrocellulose membrane to be captured by the other line (T-Line). The red band on T-Line indicating positive SARS-CoV-2 antigens. Under control area (C-Line) should be colored to indicate that the test is effective.

【Packing Specification and Components】

Состав МИ, Партия SAR2100700 «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000»

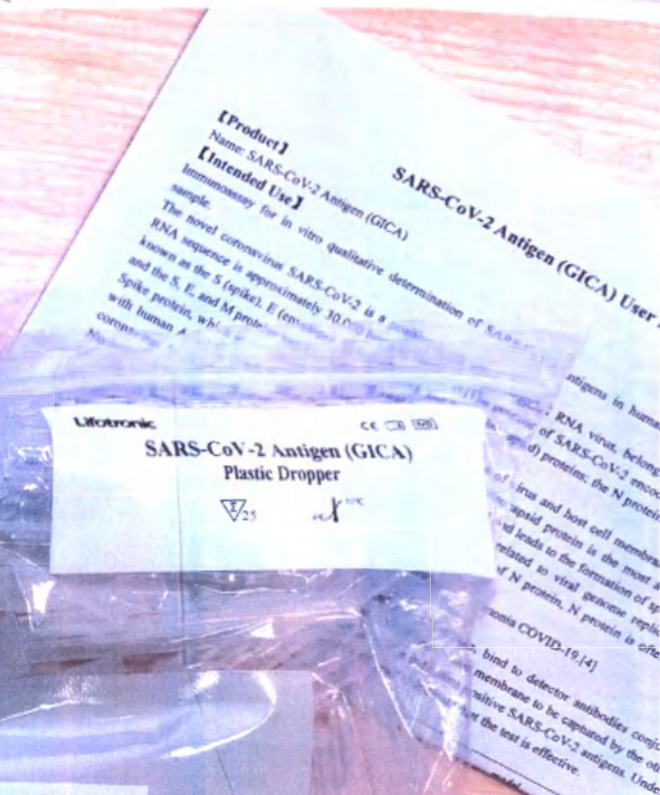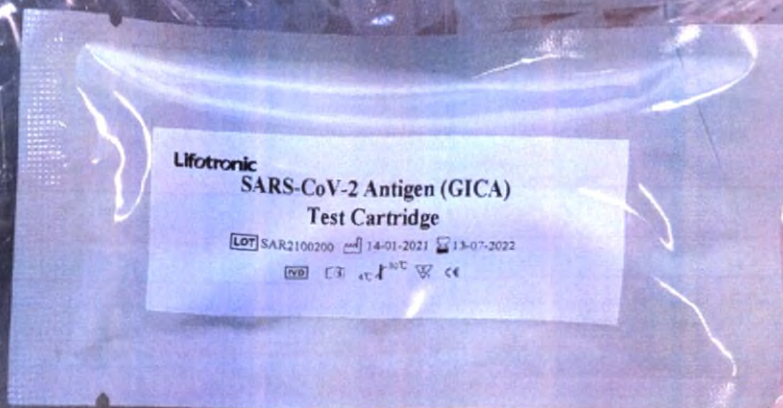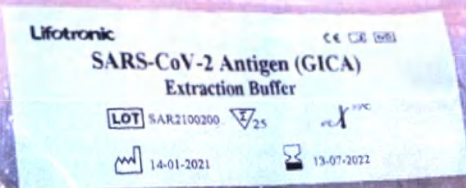

Состав МИ, Партия SAR2100200 «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000»

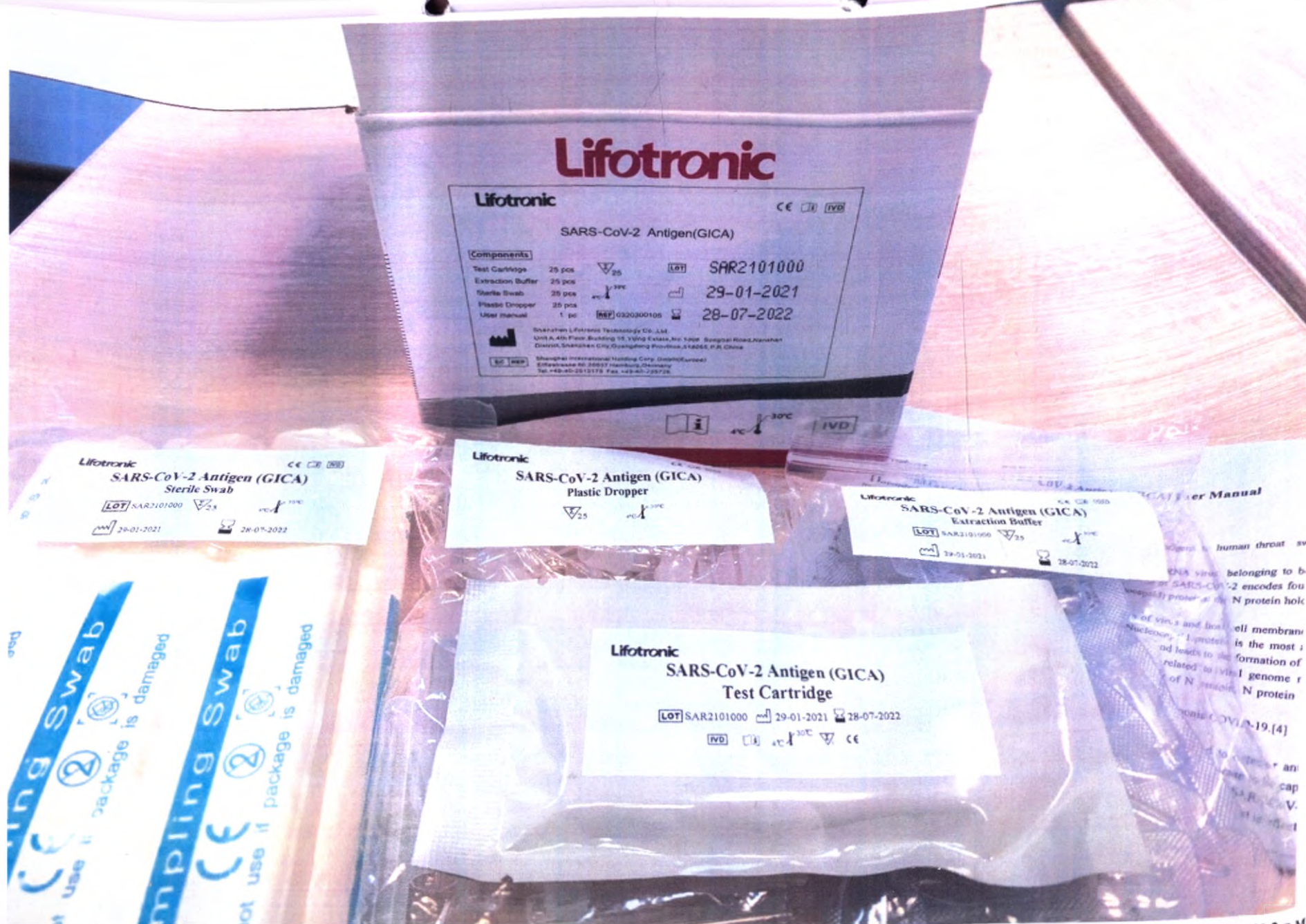

Состав МИ, Партия SAR2101000 «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический с коллоидным золотом для качественного обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и ротоглотки для диагностики in vitro (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2100200, SAR2100700, SAR2101000»



ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 13 листа (-ов)

Генеральный директор _____ Носова Т.А.
М.П.



Митрохина Ю.Ю.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№77АГ5987517