

Общество с ограниченной ответственностью «РусСпецЗащита»

Юридический адрес: Российская Федерация,
394033, Воронежская область, Г.О. ГОРОД ВОРОНЕЖ, Г ВОРОНЕЖ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ,
Д. 172, ОФИС 9А, ПОМЕЩ. I
ИНН: 3662285716 КПП: 366101001 ОГРН: 1203600020282 ОКПО: 44685238
Р/с: 40702810302940011027 К/с: 30101810200000000593
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва БИК: 044525593

.....

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «РусСпецЗащита»



Н.И. Щербакова

«30» сентября 2021 г.

Инструкция по применению медицинского изделия

**Халат защитный медицинский нестерильный
по ТУ 32.50.50-004-44685238-2021**

г. Воронеж

Оглавление

1. Описание изделия	3
2. Комплект поставки	4
3. Технические требования и характеристики	5
4. Порядок применения	9
5. Маркировка	10
6. Транспортировка, хранение и эксплуатация	11
7. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия.....	11
8. Утилизация	11
9. Гарантия.....	112
10. Сведения об изготовителе.....	12

1. Описание изделия

Настоящая инструкция по применению распространяется на Халат защитный медицинский нестерильный по ТУ 32.50.50-004-44685238-2021 (далее – халат, одежда, изделие), предназначенный для защиты медицинских работников или посетителей и пациента от перекрестной инфекции (взаимного заражения).

Халат выпускается в следующих вариантах исполнений:

1. Халат защитный медицинский нестерильный модель 1.1 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).
2. Халат защитный медицинский нестерильный модель 1.2 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).
3. Халат защитный медицинский нестерильный модель 1.3 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).
4. Халат защитный медицинский нестерильный модель 2.1 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).
5. Халат защитный медицинский нестерильный модель 2.2 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).
6. Халат защитный медицинский нестерильный модель 3.1 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).
7. Халат защитный медицинский нестерильный модель 3.2 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).
8. Халат защитный медицинский нестерильный модель 4.1 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).
9. Халат защитный медицинский нестерильный модель 4.2 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).

Защитные функции халата обусловлены: барьерными свойствами материала, из которого изготовлена одежда и её конструктивными особенностями.

Область применения: применяются в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях.

Показания к применению: обеспечение защиты медицинских работников или посетителей и пациента от перекрестной инфекции (взаимного заражения).

Противопоказания к применению: при индивидуальной непереносимости компонентов материала, возможно развитие аллергической реакции.

Информация о пользователях: медицинский персонал, посетители, пациенты стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических учреждений.

Халат одноразовый.

Халат выпускают нестерильным. Изделие перед применением не требует стерилизации.

Изделие соответствует виду климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150, но при температуре от -5°C до +35°C.

Согласно общероссийскому классификатору продукции код ОКПД 2 - 32.50.50.190.

По потенциальному риску применения изделия относятся к классу 1 по ГОСТ 31508.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 129880 (согласно приказа министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Показание к применению

Обеспечение защиты медицинских работников или посетителей и пациента от перекрестной инфекции (взаимного заражения).

Противопоказания к применению

При индивидуальной непереносимости компонентов материала, возможно развитие аллергической реакции.

2. Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Халат защитный медицинский нестерильный по ТУ 32.50.50-004-44685238-2021*	N**
2	Инструкция по применению	1

*- исполнение выбирается Заказчиком из числа представленных:

1. Халат защитный медицинский нестерильный модель 1.1 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).

2. Халат защитный медицинский нестерильный модель 1.2 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).

3. Халат защитный медицинский нестерильный модель 1.3 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).

4. Халат защитный медицинский нестерильный модель 2.1 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).

5. Халат защитный медицинский нестерильный модель 2.2 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).

6. Халат защитный медицинский нестерильный модель 3.1 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).

7. Халат защитный медицинский нестерильный модель 3.2 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).

8. Халат защитный медицинский нестерильный модель 4.1 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).

9. Халат защитный медицинский нестерильный модель 4.2 (варианты размеров: 40-42 (S), 44-46 (M), 48-50 (L), 52-54 (XL), 56-58 (2XL), 60-62 (3XL), 64-66 (4XL), 68-70 (5XL); цвета: белый, голубой, желтый).

** - количество выбирается Заказчиком: 1 или 5 или 10 шт.

3. Технические требования и характеристики

3.1. Халат защитный медицинский нестерильный должен соответствовать требованиям технических условий и комплекту конструкторской документации.

3.2. Основные параметры

3.2.1 Требования к моделям 1.1, 1.2, 1.3.

3.2.1.1 Халат прямого силуэта, с длинными рукавами, с запахом по спинке, длиной 110см или 120см или 140см или 160см в готовом виде. Перед халата – цельнокроеный со спинками, без боковых швов. Длинный рукав собран на резинке (модель 1.1) или манжете (модель 1.2) или на завязках (модель 1.3). По среднему срезу спинок на линии талии закреплены отлетные завязки пояса: завязка продергивается в петлю на спинке. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана окантовкой с завязками.

3.2.1.2 Общий вид и размеры моделей 1.1, 1.2, 1.3 должны соответствовать рисунку 1 и таблице 1.

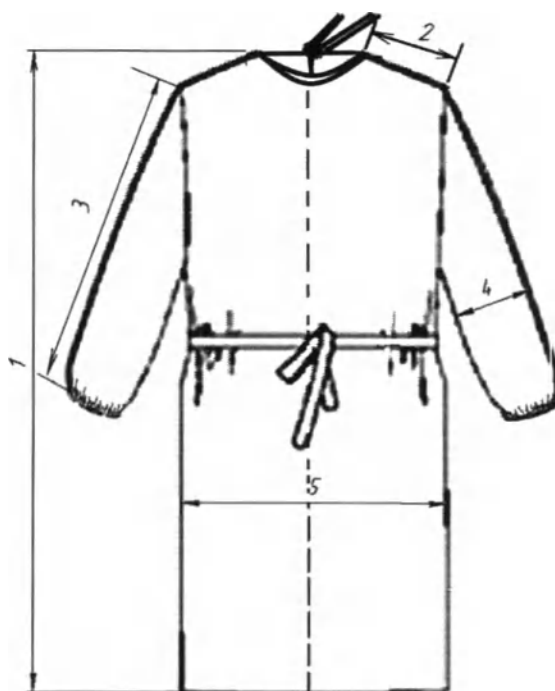


Рисунок 1.

Таблица 1.

Интервал обхвата груди человека, см	Интервал обхвата груди в готовом изделии, см	Размер	
		Российский стандарт	Международный стандарт
142±2см	158±2см	68-70	5XL
134±2см	150±2см	64-66	4XL
126±2см	142±2см	60-62	3XL
118±2см	134±2см	56-58	2XL
110±2см	126±2см	52-54	XL
102±2см	118±2см	48-50	L
94±2см	110±2см	44-46	M
86±2см	102±2см	40-42	S

3.2.1.3 Длина завязок должна быть:

- для горловины: 30 ± 1 см;
- для пояса: $140 - 200 \pm 2$ см;
- для рукава: 20 ± 1 см;

3.2.2 Требования к моделям 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2

3.2.2.1 Халат прямого силуэта, с длинными рукавами, длиной 110см или 120см или 140см или 160см в готовом виде.

3.2.2.2 Расположение застежки - спереди. Тип застежки:

- кнопка: модели 2.1, 2.2.
- молния: модели 3.1, 3.2.
- липучка: модели 4.1, 4.2.

3.2.2.3 Длинный рукав собран на резинке (модели 2.1, 3.1, 4.1) или манжете (2.2, 3.2, 4.2).

3.2.2.2 Параметры готового изделия должны соответствовать размерным характеристикам, приведенным на рисунке 2 и таблице 2.

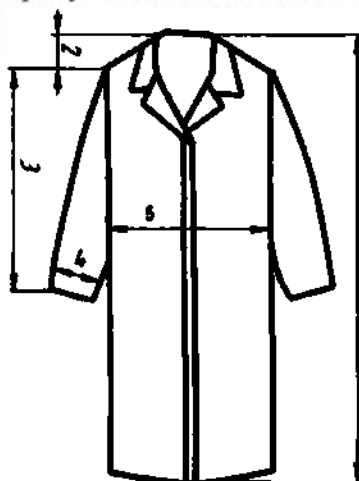


Рисунок 2

Таблица 2.

Интервал обхвата груди человека, см	Интервал обхвата груди в готовом изделии, см	Размер	
		Российский стандарт	Международный стандарт
142±2см	158±2см	68-70	5XL
134±2см	150±2см	64-66	4XL
126±2см	142±2см	60-62	3XL
118±2см	134±2см	56-58	2XL
110±2см	126±2см	52-54	XL
102±2см	118±2см	48-50	L
94±2см	110±2см	44-46	M
86±2см	102±2см	40-42	S

3.2.3 Размеры халатов должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Интервал роста человека, см	Интервал обхвата груди человека, см	Интервал обхвата груди в готовом изделии, см	Размер	
			Российский стандарт	Международный стандарт
182,0÷188,0	142±2см	158±2см	68-70	5XL
182,0÷188,0	134±2см	150±2см	64-66	4XL
173,0÷185,0	126±2см	142±2см	60-62	3XL
173,0÷185,0	118±2см	134±2см	56-58	2XL
173,0÷185,0	110±2см	126±2см	52-54	XL
173,0÷185,0	102±2см	118±2см	48-50	L
161,0÷173,0	94±2см	110±2см	44-46	M
161,0÷173,0	86±2см	102±2см	40-42	S

3.2.4 Масса халатов должна соответствовать, указанным в таблице 4.

Таблица 4

Материал ткани	Размер		
	40-50	52-58	60-70
Спанбонд 20-25 г/м ²	240±50г	250±50г	270±50г
Спанбонд 30-35г/м ²	260±50г	280±50г	300±50г
Спанбонд 40-45г/м ²	280±50г	310±50г	330±50г
Спанбонд 50-55г/м ²	300±50г	340±50г	360±50г
Спанбонд 60-65г/м ²	350±50г	370±50г	390±50г
СМС 20-25г/м ²	240±50г	250±50г	270±50г
СМС 30-35г/м ²	260±50г	280±50г	300±50г
СМС 40-45г/м ²	280±50г	310±50г	330±50г
СМС 50-55г/м ²	300±50г	340±50г	360±50г
СМС 60-65г/м ²	350±50г	370±50г	390±50г

3.2.5 Поверхность изделия не должна иметь механических повреждений и разрывов.

3.2.6 Халат при эксплуатации должен быть устойчив к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150, но при температуре от -5°C до +35°C.

3.2.7 Халат в транспортной упаковке должен быть устойчив к климатическим воздействиям при транспортировании для условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

3.3 Основные требования к изготовлению

3.3.1 Виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления изделий, - по ГОСТ 12807.

3.3.2 Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток. Концы всех строчек должны быть закреплены.

3.3.3 Все срезы изделия соединяют стачным швом шириной 0,7 – 1,0 см по ГОСТ 12807. Частота строчки должна быть не менее трех стежков в одном сантиметре.

3.3.4 Готовая одежда должна соответствовать эстетическим требованиям человека к внешнему виду и цвету, быть комфортной при носке.

3.3.5 Фурнитура должна быть качественной, функционально устойчивой в процессе ее эксплуатации. Недопустимыми дефектами фурнитуры являются механические разрушения конструкций и поверхностей: дефекты поверхности застежек-молний, кнопок, липучек.

3.4 Требования к материалам

3.4.1 Информация об используемых материалах

Ткань: Нетканый материал 100% полипропилен «спанбонд» плотность: 20 или 30 или 40 или 50 или 60г/м² или полимерное нетканое полотно СМС (100% полипропилен) плотность: 20 или 30 или 40 или 50 или 60г/м².

Нитки полиэфирные.

Застежка-молния: (Молния рулонная спираль, бегунок галант. №3 спираль)

Кнопка: ABS пластик

Липучка: нейлон 40% полиэстер 60%.

Эластичная тесьма: (ПЭ201/2 (80% полиэфир, 20% латексная резиновая смесь)) или резинка вязаная трикотажная диаметр 2,5 – 3 мм 100% ПЭ.

Завязка: Нетканый материал 100% полипропилен «спанбонд» плотность: 20 или 30 или 40 или 50 или 60г/м² или полимерное нетканое полотно СМС (100% полипропилен) плотностью: 20 или 30 или 40 или 50 или 60г/м².

3.4.2 Параметры ткани должны соответствовать таблице 5.

Таблица 5.

Наименование эксплуатационных характеристик (показателей)	Значение
Допустимое отклонение поверхностной плотности	$\pm 7 \text{ г/м}^2$
Микробная проницаемость в сухом состоянии	$\leq 2 \text{ Lg (КОе)}$
Микробная чистота	$< 2 \text{ Lg (CFU/дм}^2\text{)}$
Чистота в части инородных частиц	$< 3.5 \text{ IPM}$
Водоупорность	$\geq 800 \text{ мм.вод.ст.}$
Паропроницаемость	$\geq 4 \text{ мг/см}^2\text{/час}$
Пылевороотделение	$< 4.0 \text{ Lg (от подсчитанных частиц корпии)}$
Стойкость к проникновению жидкостей	$\geq 20 \text{ см (H}_2\text{O)}$
Прочность на разрыв в сухом состоянии	$\geq 40 \text{ кПа}$
Прочность на растяжение в сухом состоянии	$\geq 20 \text{ Н}$

3.4.3 По санитарно-химическим и токсикологическим показателям изделие должно соответствовать требованиям таблицы 6.

Таблица 6.

Наименование показателя	Значение показателя
Запах, баллы, не более	1
Цветность, град. по шкале, не более	20
Мутность, баллы, не более	2
Значение показателя pH, ед. pH	$(6,00 - 9,00) \pm 1,00$

3.3.4 Готовая одежда должна соответствовать эстетическим требованиям человека к внешнему виду и цвету, быть комфортной при носке.

3.3.5 Фурнитура должна быть качественной, функционально устойчивой в процессе ее эксплуатации. Недопустимыми дефектами фурнитуры являются механические разрушения конструкций и поверхностей: дефекты поверхности застежек-молний, кнопок, липучек.

3.4 Требования к материалам

3.4.1 Информация об используемых материалах

Ткань: Нетканый материал 100% полипропилен «спанбонд» плотность: 20 или 30 или 40 или 50 или 60г/м² или полимерное нетканое полотно СМС (100% полипропилен) плотность: 20 или 30 или 40 или 50 или 60г/м².

Нитки полиэфирные.

Застежка-молния: (Молния рулонная спираль, бегунок галант. №3 спираль)

Кнопка: ABS пластик

Липучка: нейлон 40% полиэстер 60%.

Эластичная тесьма: (ПЭ201/2 (80% полиэфир, 20% латексная резиновая смесь)) или резинка вязаная трикотажная диаметр 2,5 – 3 мм 100% ПЭ.

Завязка: Нетканый материал 100% полипропилен «спанбонд» плотность: 20 или 30 или 40 или 50 или 60г/м² или полимерное нетканое полотно СМС (100% полипропилен) плотностью: 20 или 30 или 40 или 50 или 60г/м².

3.4.2 Параметры ткани должны соответствовать таблице 5.

Таблица 5.

Наименование эксплуатационных характеристик (показателей)	Значение
Допустимое отклонение поверхностной плотности	$\pm 7 \text{ г/м}^2$
Микробная проницаемость в сухом состоянии	$\leq 2 \text{ Lg (КОе)}$
Микробная чистота	$< 2 \text{ Lg (CFU/дм}^2\text{)}$
Чистота в части инородных частиц	$< 3.5 \text{ IPM}$
Водоупорность	$\geq 800 \text{ мм.вод.ст.}$
Паропроницаемость	$\geq 4 \text{ мг/см}^2\text{/час}$
Пылевосотделение	$< 4.0 \text{ Lg (от подсчитанных частиц корпии)}$
Стойкость к проникновению жидкостей	$\geq 20 \text{ см (H}_2\text{O)}$
Прочность на разрыв в сухом состоянии	$\geq 40 \text{ кПа}$
Прочность на растяжение в сухом состоянии	$\geq 20 \text{ Н}$

3.4.3 По санитарно-химическим и токсикологическим показателям изделие должно соответствовать требованиям таблицы 6.

Таблица 6.

Наименование показателя	Значение показателя
Запах, баллы, не более	1
Цветность, град. по шкале, не более	20
Мутность, баллы, не более	2
Значение показателя pH, ед. pH	$(6,00 - 9,00) \pm 1,00$

Окисляемость, мг $O_2/дм^3$, не более	5
Бромируемость, мг $Br_2/дм^3$, не более	0,3
Ультрафиолетовое поглощение в диапазоне длин волн 220 – 360 нм, ед. ОП, не более	0,300
Восстановительные примеси, $см^3$ раствора 0,02н раствора $Na_2S_2O_3$, не более	1,00
Содержание формальдегида, мг/ $дм^3$, не более	0,100
Содержание ацетальдегида, мг/ $дм^3$, не более	0,200
Раздражающее действие, баллы	0
Сенсибилизирующее действие	0

4. Порядок применения

Важно:

- Проверьте срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности халат непригоден к применению.
- Не допускается использование халата при наличии механических повреждений.
- Халат используют однократно.

4.1 Порядок надевания

4.1.1 Для моделей 1.1, 1.2, 1.3.

- Просуньте руки в рукава так, чтобы фиксирующие элементы – завязки, оказались на спине. Полы халата должны заходить одна за другую, чтобы избежать открытых участков одежды.

Тесьму горловины халата оборачивают и фиксируют на шее.

По среднему срезу спинки на линии талии закреплены отлетные завязки пояса: завязка продергивается в петлю на спинке. Две завязки пояса оберните вокруг талии. Пояс фиксируется спереди халата.

На рукавах халата завязываем завязки (модель 1.3) вокруг кисти два раза так, чтобы конец завязки оказался наверху.

4.1.2. Для моделей 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.

- Надеть рукава халата по очереди. Одновременно натягивать оба рукава нельзя: халат может порваться;
- Застегнуть застежки халата.

4.2 Порядок снятия

В помещении должны быть предусмотрены маркированные емкости для отходов класса В.

Одежду снимают медленно, не торопясь.

4.2.1 Для моделей 1.1, 1.2, 1.3.

- Развяжите завязки на рукавах (модель 1.3).
- Развяжите пояс халата.
- Развяжите завязки на горловине халата.
- Следите за тем, чтобы рукава не касались вашего тела при расстегивании завязок.
- Снимите халат с шеи и плеч, касаясь только внутренней части халата.
- Выверните халат наизнанку.
- Положить халат в емкость для отходов класса Б.

4.2.2 Для моделей 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.

- Расстегнуть застёжки халата.
- Снимите халат вначале с одной руки.
- Снять халат со второй руки, прикасаясь к нему изнутри и выворачивая наизнанку, свернуть.
- Положить халат в ёмкость для отходов класса В.

Важно: Если ваши руки загрязнились во время удаления халата, немедленно вымойте руки или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

4.3 Обеззараживание

Снятие и замена халатов должны производиться не реже 1 раза в смену, а при наличии видимых загрязнений биологическими жидкостями или выделениями пациентов - незамедлительно.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять в влагонепроницаемых перчатках одноразовых (при медицинских манипуляциях) или многократного применения. Дезинфицирующие средства хранят закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкции по его применению.

5. Маркировка

5.1. Маркировка одежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 10581, ГОСТ 12.4.115 и данного документа. Информация наносится на изделие на русском языке.

Маркировка изделия должна включать:

- Полное наименование медицинского изделия.
- Вариант исполнения.
- Наименование производителя.
- Адрес и местонахождение производителя.
- Количество халатов.
- Описание внешнего вида халата.
- Длина халата
- Наименование материала, из которого изготовлено изделие.
- Символ «Нестерильно».
- Символ «Запрет на повторное применение».
- Номер партии.
- Слова «Дата изготовления», а также указание на год и месяц изготовления.
- Срок годности.
- Символ «Беречь от влаги».
- Символ «Не допускать воздействия солнечного света».
- Номер и дата регистрационного удостоверения.

5.2 Символы используемые при маркировке

- Символ «Запрет на повторное применение»
- Символ «Нестерильно»
- Символ «Не допускать воздействия солнечного света»
- Символ «Беречь от влаги»



6. Транспортировка, хранение и эксплуатация

6.1 Изделия могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

6.2 Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.3. Изделия должны храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 ГОСТ 15150, но при температуре от 0 °С до +35°С. Изделие должно храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

6.4 Изделие должно использоваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -5°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги, атмосферном давлении 84÷106,7 кПа (650÷800 мм. рт.ст.).

7. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия.

Изделие имеет полностью законченную конструкцию. Техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

8. Утилизация

8.1 Изделие должно быть собрано и передано специальным лицензированным организациям, занимающимися утилизацией медицинских отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ.

8.2 Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном: СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б и в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)" (приложение 1).

8.3 Не использованные по назначению изделия с истекшим сроком годности, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

9. Гарантия

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

9.2 Срок годности – 5 лет с даты производства.

10. Сведения об изготовителе

ООО «РусСпецЗащита»

Адрес изготовителя: 394033, Воронежская область, Г.О. ГОРОД ВОРОНЕЖ,
Г ВОРОНЕЖ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 172, ОФИС 9А, ПОМЕЩ. I

Претензии направлять по адресу:

ООО «РусСпецЗащита»

Адрес изготовителя: 394033, Воронежская область, Г.О. ГОРОД ВОРОНЕЖ,
Г ВОРОНЕЖ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 172, ОФИС 9А, ПОМЕЩ. I

Тел.: +7 (473) 222-69-18

E-mail: profitdoc@yandex.ru

Итого в настоящем документе

12 листа (ов)

Директор Щербакова Н.И.

Щербакова Н.И.

