

КОПИЯ

Перевод с английского языка

Печать: Тайзу Кангжиан Медикал Эквипмент Ко. ЛТД.

ПЕРЕВОДЧИК Гришина Елена Константиновна

Город Брянск, Брянская область, Российская Федерация.

Четырнадцатого мая две тысячи четырнадцатого года.

Я, Гришина Елена Викторовна, нотариус Брянского нотариального округа Брянской области, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Прокопчик Еленой Константиновной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № П - 728

Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.
птр: 400 руб. 00 коп.



Нотариус

Город Брянск, Брянская область, Российская Федерация
Четырнадцатого мая две тысячи четырнадцатого года.

Я, Гришина Елена Викторовна, нотариус Брянского нотариального округа Брянской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем нет исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре за № К - 2236
Взыскано по тарифу: 100 р.



Инструкция по применению зеркала гинекологического стерильного одноразового

1. Назначение изделия

Зеркало предназначено для расширения влагалища и обнажения шейки матки при осмотре слизистой и проведении гинекологических лечебно-диагностических манипуляций и операций в гинекологических отделениях лечебных учреждений, женских консультациях и кожно-венерологических диспансерах.

2. Сведения о продукции

Зеркало гинекологическое стерильное одноразовое

- с боковым винтовым фиксатором, размеры: S, M, L
- с центральным винтовым фиксатором, размеры: S, M, L
- с центральным поворотным фиксатором, размеры: S, M, L
- с центральным блокировочным поворотным фиксатором, размеры: S, M, L

Зеркало гинекологическое по Куско изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного полистирола; по специальной технологии производства с дополнительной обработкой контуров поверхности – препятствует травмированию особо чувствительных зон, раздражению слизистой оболочки влагалища и развитию аллергических проявлений при контакте с инструментом.

3. Эксплуатация

1. Осмотр осуществляется с соблюдением общепринятых правил антисептики.
2. По насечке в верхней части пакета вскрыть индивидуальную полиэтиленовую упаковку.
3. Расположите зеркало с сомкнутыми створками у входа во влагалище.
4. В сомкнутом положении створок введите зеркало во влагалище.
5. Разведите створки на необходимое расстояние.
6. Зафиксируйте замок зеркала.
7. При извлечении зеркала последовательность манипуляций обратная последовательности манипуляций при введении зеркала.

4. Упаковка

Упаковка не должна иметь проколов и разрывов. При нарушении целостности упаковки изделие непригодно к использованию.

5. Транспортировка и хранение

Транспортирование производится в картонных коробках всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида исключая механическое повреждение зеркала.

Хранение должно обеспечиваться в упаковке предприятия изготовителя в закрытых помещениях, исключая попадание прямых солнечных лучей и на расстоянии 1 метра от нагревательных приборов.

Условия хранения обеспечивающие гарантийный срок хранения: температура не ниже минус 10°C и не выше 25 °C, относительная влажность воздуха до 80 %

Срок хранения не более 3 лет

6. Утилизация продукции.

Утилизацию зеркал проводить согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, как отходы класса Б или как твердые бытовые отходы.


7. Гарантийные обязательства

Срок годности – 3 года с даты стерилизации, при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

Директор Лин Хепинг

林和平

Печать

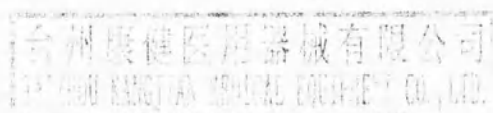

Тайзу Кангжиян Медикал Эквипмент Ко. ЛДТ.



Процедура заверена и скреплена
листом

нотариус