

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделий (без учёта принадлежностей):

вар. пост.1: 31,5±3,2 кг.

вар. пост.2: 26,0±2,6 кг.

1.2 Габаритные размеры без принадлежностей (длина х ширина х высота) мм: (2064х907х844)±5.

1.3 Минимальные габаритные размеры со штативом для вливаний (длина х ширина х высота) мм: (2150х1053х1425)±5.

1.4 Максимальные габаритные размеры со штативом для вливаний (длина х ширина х высота) мм: (2202х1105х2000)±5.

1.5 Размеры рабочей поверхности ложа (длина х ширина) мм: (2000х900)±5.

1.6 Размеры рабочей поверхности для установки матраса (длина х ширина) мм: (1952х852)±5.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики кровати при равномерном распределении нагрузки:

- на матрасное ложе – 200 кг;

- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 250 кг.

2.3 Кровать варианта поставки 1 поставляется с односекционным мягким матрасом размером (длина х ширина х высота) мм: 1942(±10)х842(±10)х100(±15), массой кг: 5,5±0,55.

Изделие может поставляться с принадлежностью в виде штатива для вливаний размером (длина х ширина х высота) мм: min (282х257х838)±5, max (282х257х1413)±5, массой кг: 1,08±0,11.

2.4 Нагрузочные характеристики штатива для вливаний при равномерном распределении нагрузки:

- на держатель флакона – 1 кг;

- суммарная нагрузка на держатели флаконов – 3 кг.

2.5 Внутренний диаметр держателя флакона на штативе для вливаний:

- верхнего: 80±1 мм;

- нижнего: 40±1 мм.

2.6 Кровать установлена на 4 опоры в виде труб диаметром 32 мм, не регулируемые по высоте.

2.7 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием кровати должно быть 150 мм.

2.8 Зазор между одной из опор в виде трубы и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.9 При эксплуатации кровать устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.10 Каркас изделия изготовлен из стального П-образного профиля с полимерно-порошковым покрытием. Спинки-опоры выполнены из стальной трубы диаметром 32 мм с полимерно-порошковым покрытием, не регулируемые по высоте. Изделие может поставляться с принадлежностью в виде штатива для вливаний. Вариант поставки 1 комплектуется мягким двухсекционным матрасом из поролона толщиной 100 мм, обтянутого винилискожей. В комплект варианта поставки 2 матрас не входит. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
- Кровать медицинская функциональная с принадлежностями	1*

Руководство по эксплуатации	1
Инструкция по сборке	1
Принадлежность:	
- штатив для вливаний	не более 1**

* вариант поставки определяет заказчик;

** поставляется по требованию заказчика.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Кровать транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Кровать транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения кровати в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности кровати устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации**ВНИМАНИЕ!!!** В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения кровати или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки кровати проверьте следующее:

- крепёжные элементы кровати выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации кровати

Во избежание преждевременного выхода из строя кровати не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях кровати, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности кровати воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.3 Прочностные показатели кровати соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание кровати включает в себя:

- поддержание технического состояния кровати в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;

- в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт кровати включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность кровати.

10. Утилизация

Кровать, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась кровать по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) в вариантах поставки 1, 2 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.108 ТУ и признана годной для эксплуатации.

- ☐ Код 0000000 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) вар. пост. 1 - с матрасом
- ☐ Код 0000000 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) вар. пост. 2 - без матраса
- ☐ Код 0000000 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) вар. пост. 1 - с матрасом и принадлежностью: штатив для вливаний
- ☐ Код 0000000 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) вар. пост. 2 - без матраса и принадлежностью: штатив для вливаний

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»


Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

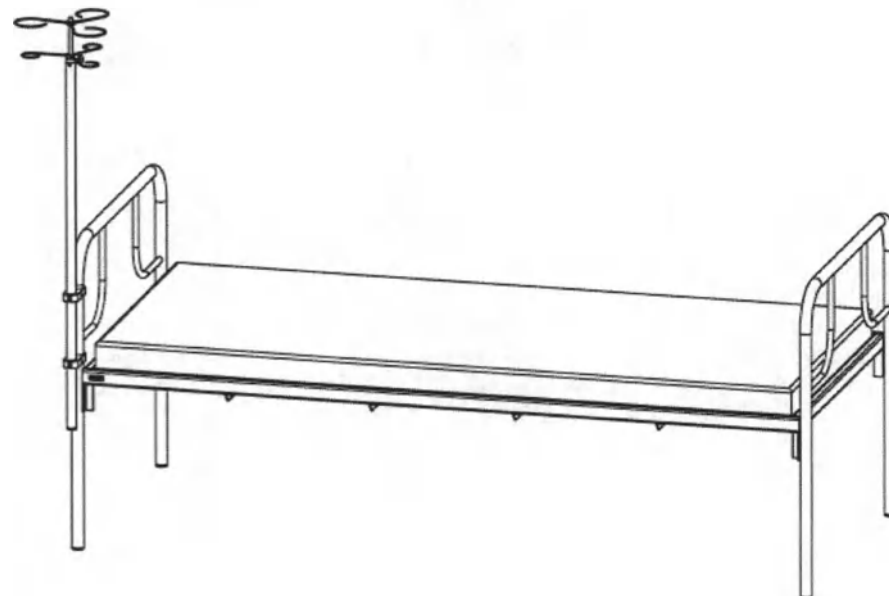

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПО ГИКС.942810.108 ТУ

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ с принадлежностями (мод.1) в вариантах поставки 1, 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942855.101, -01 РЭ

Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) в вариантах поставки 1, 2 (в дальнейшем - кровать), предназначена для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Показания к применению: для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование кровати может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать кровать без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать кровать без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры**1.1 Масса изделий:**

вар. пост.1: 44,9±4,5 кг.

вар. пост.2: 39,0±3,9 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (2064х915х844)±5.

1.3 Размеры рабочей поверхности лежа (длина х ширина) мм: (2000х900)±5.

1.4 Размеры рабочей поверхности для установки матраса (длина х ширина) мм: (1990х830)±5.

1.5 Угол между горизонтальной и спинной секцией регулируется в пределах (°): (от 0 до 60)±5.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики кровати при равномерном распределении нагрузки:

- на матрасное ложе – 200 кг;

- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 250 кг.

2.3 Кровать варианта поставки 1 поставляется с двухсекционным мягким матрасом размером (длина х ширина х высота) мм: 1980(±10)х820(±10)х100(±15), массой кг: 5,9±0,59.

2.4 Кровать установлена на 4 опоры в виде труб диаметром 32 мм, не регулируемые по высоте.

2.5 Усилие, прилагаемое к ручкам спинной секции для изменения угла положения между горизонтальной не должно превышать 150 Н.

2.6 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием кровати должно быть 150 мм.

2.7 Зазор между одной из опор в виде трубы и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.8 При эксплуатации кровать устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.9 Каркас изделия изготовлен из стального П-образного профиля с полимерно-порошковым покрытием. Спинки-опоры выполнены из стальной трубы диаметром 32мм с полимерно-порошковым покрытием, не регулируемые по высоте. Ложе разделено на 2 секции. Регулировка подъема спинной секции от 0° до 60° - при помощи бесступенчатого самозаклинивающегося механизма, тазобедренная секция возможности регулировки не имеет. Вариант поставки 1 комплектуется мягким двухсекционным матрасом из поролона толщиной 100мм, обтянутого винилискожей. В комплект варианта поставки 2 матрас не входит. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
- Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.1) в вариантах поставки 1, 2	1*
Руководство по эксплуатации	1
Инструкция по сборке	1

* вариант поставки определяет заказчик.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Кровать транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Кровать транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения кровати в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности кровати устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения кровати или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки кровати проверьте следующее:

- крепёжные элементы кровати выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации кровати

Во избежание преждевременного выхода из строя кровати не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях кровати, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности кровати воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.3 Прочностные показатели кровати соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание кровати включает в себя:

- поддержание технического состояния кровати в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт кровати включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность кровати.

10. Утилизация

Кровать, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась кровать по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.1) в вариантах поставки 1, 2 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.108 ТУ и признана годной для эксплуатации.

- ☐ Код 0000000 Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.1) вар. пост. 1 - с матрасом
- ☐ Код 0000000 Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.1) вар. пост. 2 - без матраса

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: lrp@elamed.com

Сайт компании: lrp.elamed.com

Регистрационное удостоверение



КОПИЯ
ВЕРНА

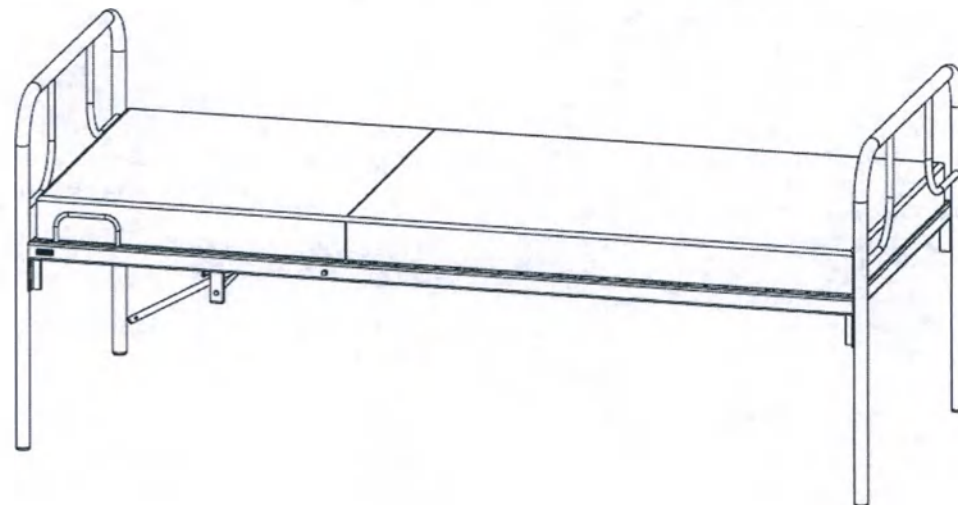

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПО ГИКС.942810.108 ТУ

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ двухсекционная (мод.1) в вариантах поставки 1, 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942855.102, -01 РЭ

Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.1) в вариантах поставки 1, 2 (в дальнейшем - кровать), предназначена для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Показания к применению: для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование кровати может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! При подъёме и опускании секции необходимо пользоваться специальными ручками, установленными с двух сторон на спинной секции. Следите за тем, чтобы пальцы рук не попали между основанием кровати и подъёмной секцией. Рекомендуем производить подъём и опускание секции кровати двум медработникам, по одному с каждой стороны !

! РАЗРЕШАЕТСЯ:

Производить передвижение кровати с пациентом в пределах помещения её установки.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвижение кровати с включенным тормозом колёс, что может привести к их самопроизвольному отворачиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать кровать без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры**1.1 Масса изделий:**

вар. пост.1: 51,9±5,2 кг.

вар. пост.2: 46,0±4,6 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (2082х930х841)±5.

1.3 Размеры рабочей поверхности лежа (длина х ширина) мм: (2000х900)±5.

1.4 Размеры рабочей поверхности для установки матраса (длина х ширина) мм: (1990х830)±5.

1.5 Угол между горизонталью и спинной секцией регулируется в пределах (°): (от 0 до 60)±5.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики кровати при равномерном распределении нагрузки:

- на матрасное ложе – 200 кг;

- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 250 кг.

2.3 Кровать варианта поставки 1 поставляется с двухсекционным мягким матрасом размером (длина х ширина х высота) мм: 1980(±10)х820(±10)х100(±15), массой кг: 5,9±0,59.

2.4 Кровать установлена на 4 колёсные опоры диаметром 122 мм, не регулируемые по высоте, вращающиеся вокруг вертикальной оси. 2 колеса снабжены стопором.

2.5 Усилие, необходимое для передвижения кровати на колёсных опорах не должно превышать 100 Н.

2.6 Усилие, необходимое для включения стопора колёс не более 150 Н.

2.7 Усилие, прилагаемое к ручкам спинной секции для изменения угла положения между горизонталью не должно превышать 150 Н.

2.8 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием кровати должно быть 150 мм.

2.9 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.10 Минимальный радиус разворота – 1132 мм.

2.11 При эксплуатации кровать устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.12 Каркас изделия изготовлен из стального П-образного профиля с полимерно-порошковым покрытием. Спинки выполнены из стальной трубы диаметром 32мм с полимерно-порошковым покрытием. Изделие устанавливается на 4 колёсные опоры, 2 из которых снабжены стопором. Ложе разделено на 2 секции. Регулировка подъёма спинной секции от 0° до 60° - при помощи бесступенчатого самозаклинивающегося механизма, тазобедренная секция возможности регулировки не имеет. Вариант поставки 1 комплектуется мягким двухсекционным матрасом из поролона толщиной 100мм, обтянутого винилискожей. В комплект варианта поставки 2 матрас не входит. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
- Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2	1*
Руководство по эксплуатации	1
Инструкция по сборке	1

* вариант поставки определяет заказчик.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Кровать транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Кровать транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения кровати в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности кровати устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.**6.1 Подготовка к работе:**

6.1.1 После хранения кровати или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки кровати проверьте следующее:

- крепёжные элементы кровати выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации кровати

Во избежание преждевременного выхода из строя кровати не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях кровати, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности кровати воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.3 Прочностные показатели кровати соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание кровати включает в себя:

- поддержание технического состояния кровати в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт кровати включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность кровати.

10. Утилизация

Кровать, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась кровать по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.108 ТУ и признана годной для эксплуатации.

- ☐ Код 00000000 Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) вар. пост. 1 - с матрасом
- ☐ Код 00000000 Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) вар. пост. 2 - без матраса

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____



Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»


Адрес: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

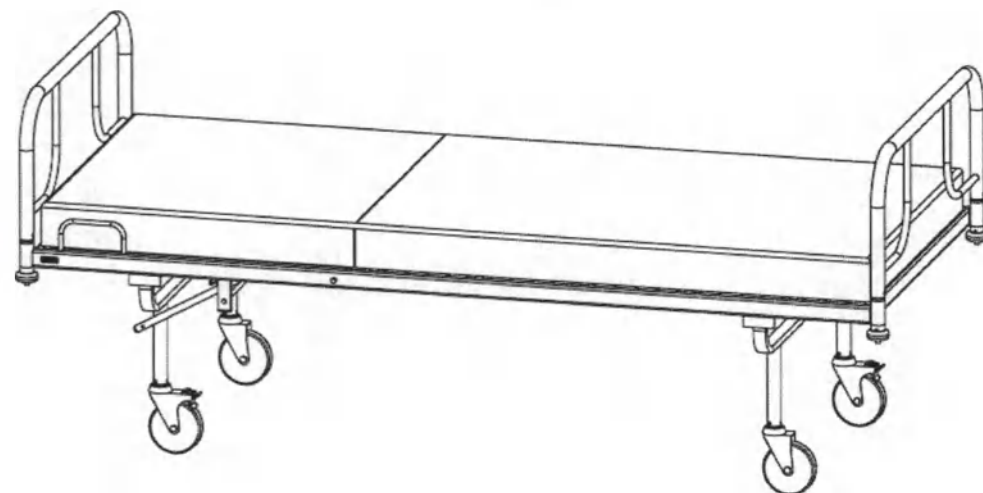

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПО ГИКС.942810.108 ТУ

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942855.103, -01 РЭ

Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2 (в дальнейшем - кровать), предназначена для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Показания к применению: для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование кровати может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! При подъёме и опускании секции необходимо пользоваться специальными ручками, установленными с двух сторон на спинной секции. Следите за тем, чтобы пальцы рук не попали между основанием кровати и подъёмной секцией. Рекомендуем производить подъём и опускание секции кровати двум медработникам, по одному с каждой стороны !

1.11 Угол между горизонталью и тазобедренной секцией регулируется в пределах (°): (от 0 до 15)±5.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики кровати при равномерном распределении нагрузки:

- на матрасное ложе – 200 кг;
- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 250 кг.

2.3 Кровать поставляется с трёхсекционным мягким матрасом размером (длина х ширина х высота) мм: 1930(±10)х700(±10)х100(±15), массой кг: 4,78±0,48.

Изделие может поставляться с принадлежностями в виде:

2.3.1 Боковых ограждений размером (длина х ширина х высота) мм: (1052х70х349)±5, массой кг: 3,1±0,31;

Нагрузочные характеристики бокового ограждения при равномерном распределении нагрузки – 50 кг.

2.3.2 Штатива для вливаний размером (длина х ширина х высота) мм: min (282х257х838)±5, max (282х257х1413)±5, массой кг: 1,08±0,11;

Нагрузочные характеристики штатива для вливаний при равномерном распределении нагрузки:

- на держатель флакона – 1 кг;
- суммарная нагрузка на держатели флаконов – 3 кг.

Внутренний диаметр держателя флакона на штативе для вливаний:

- верхнего: 80±1 мм;
- нижнего: 40±1 мм.

2.3.3 Штанги для подтягивания размером (длина х ширина х высота) мм: (900х762х1326)±5, массой кг: 4,56±0,46;

Нагрузочные характеристики штанги для подтягивания:

- на штангу для подтягивания – 50 кг;
- на ручную опору штанги для подтягивания – 50 кг.

2.3.4 Рамы Балканского размером (длина х ширина х высота) мм: (2122х762х998)±5, массой кг: 9,22±0,92;

Нагрузочные характеристики рамы Балканского:

- на раму Балканского – 150 кг;
- на ручную опору рамы Балканского – 50 кг.

Внешние габаритные размеры ручной опоры в принадлежностях штанга для подтягивания и рама Балканского (длина х ширина х высота) мм: (228х25х168)±5.

2.3.5 Подставки для судна размером (длина х ширина х высота) мм: (600х336х133)±5, массой кг: 1,82±0,18.

Нагрузочные характеристики подставки для судна при равномерном распределении нагрузки:

- на основание для судна – 5 кг.

2.4 Кровать установлена на 4 колёсные опоры диаметром 122 мм, не регулируемые по высоте, вращающиеся вокруг вертикальной оси. 2 колеса снабжены стопором.

2.5 Усилие, необходимое для передвижения кровати на колёсных опорах не должно превышать 100 Н.

2.6 Усилие, необходимое для включения стопора колёс не более 150 Н.

2.7 Усилие, прилагаемое к ручке для вращения винтового механизма для изменения угла положения между горизонталью, не должно превышать 150 Н.

2.8 Усилие, прилагаемое к ручке тазобедренной секции для изменения угла положения между горизонталью не должно превышать 150 Н.

2.9 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием кровати должно быть 150 мм.

2.10 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.11 Минимальный радиус разворота – 1103 мм.

2.12 При эксплуатации кровать устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.13 Каркас изделия изготовлен из стального прямоугольного профиля с полимерно-порошковым покрытием. Спинки выполнены из стальной трубы диаметром 32 мм с полимерно-порошковым покрытием и накладок из пластика. Изделие устанавливается на 4 колёсные опоры, 2 из которых снабжены стопором. Ложе разделено на 3 секции, установлены 9 пластиковых накладок. Изделие комплектуется мягким трёхсекционным матрасом из поролона толщиной 100 мм, обтянутого винилискожей. Регулировка подъёма спинной секции от 0° до 38° - при помощи винтового механизма, регулировка подъёма тазобедренной секции от 0° до 15° - при помощи бесступенчатого самозаклинивающегося механизма. Изделие может поставляться с принадлежностями в виде: боковых ограждений; штативом для вливаний; штангой для подтягивания; рамой Балканского; подставкой для судна. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
- Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)	1
	1

Инструкция по сборке	1
Принадлежности:	
- боковое ограждение	не более 2*
- штатив для вливаний	не более 1*
- штанга для подтягивания	не более 1*
- рама Балканского	не более 1*
- подставка для судна	не более 1*

* поставляется по требованию заказчика.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Кровать транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Кровать транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения кровати в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности кровати устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии:

8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения кровати или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки кровати проверьте следующее:

- крепёжные элементы кровати выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации кровати

Во избежание преждевременного выхода из строя кровати не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скопление жидкости на поверхностях кровати, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности кровати воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.3 Прочностные показатели кровати соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014.

6.4 Для регулировки подъёма спинной секции при помощи винтового механизма необходимо обеспечить свободное расстояние от спинки на 100 мм и предварительно выдвинув ручку за пределы габаритов ложа. Для подъёма спинной секции, ручку механизма необходимо вращать по часовой стрелке, для опускания против часовой стрелки.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание кровати включает в себя:

- поддержание технического состояния кровати в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт кровати включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность кровати.

10. Утилизация

Кровать, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась кровать по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.108 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код товара	Вар. поставки	Кровать с матрасом	Боковое ограждение (2шт.)	Штатив для вливания	Штанга для подтягивания	Рама Балканского	Подставка для судна
0000000		+					
0000000		+	+				
0000000		+		+			
0000000		+			+		
0000000		+				+	
0000000		+					+
0000000		+	+	+			
0000000		+	+	+	+		
0000000		+	+	+		+	
0000000		+	+	+	+		+
0000000		+	+	+		+	+
0000000		+		+	+		
0000000		+				+	+
0000000		+	+		+		
0000000		+		+	+		
0000000		+		+	+		+
0000000							
0000000							
0000000							
0000000							
0000000							

№ партии

Штамп ОТК

Дата упаковки

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»



Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: [lru.elamed.com](http://ru.elamed.com)

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

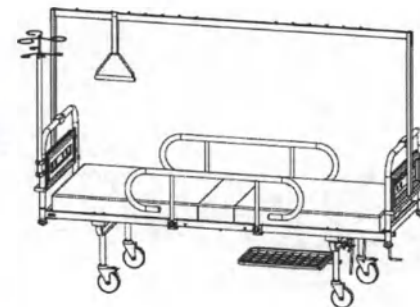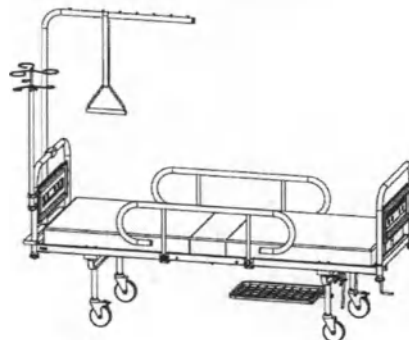

**КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПО ГИКС.942810.108 ТУ**

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942855.104 РЭ

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1) (в дальнейшем - кровать), предназначена для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Показания к применению: для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Неадекватное использование кровати может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Подъем и опускание тазобедренной секции производится с помощью специальной ручки. Подъем и опускание спинной секции производится с помощью ручки винтового механизма, установленной под ложем для вращения винтового механизма. Следите за тем, чтобы пальцы рук не попали между основанием кровати и подъёмной секцией. Рекомендуем производить подъём и опускание секций кровати только медработникам !

! РАЗРЕШАЕТСЯ:

Производить передвижение кровати с пациентом в пределах помещения её установки.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвижение кровати с включенным тормозом колёс, что может привести к их самопроизвольному отворачиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать кровать без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия (без учёта принадлежностей): $57,8 \pm 5,8$ кг.

1.2 Габаритные размеры без принадлежностей (длина x ширина x высота) мм:
(2082x770x929)±5.

1.3 Габаритные размеры с боковыми ограждениями (длина x ширина x высота) мм: (2082x804x929)±5.

1.4 Минимальные габаритные размеры со штативом для вливаний (длина x ширина x высота) мм:
(2159x907x1525)±5.

1.5 Максимальные габаритные размеры со штативом для вливаний (длина x ширина x высота) мм:
(2211x959x2100)±5

1.6 Габаритные размеры со штангой для подтягивания (длина x ширина x высота) мм: (2114x770x1776)±5.

1.7 Габаритные размеры с рамой Балканского (длина x ширина x высота) мм

1.8 Размеры рабочей поверхности ложа (длина x ширина) мм: (2000x740)±5.

1.9 Размеры рабочей поверхности для установки матраса (длина x ширина) мм: (1936x700)±5.

1.10 Угол между горизонталью и спинной секцией регулируется в пределах ($^{\circ}$): (от 0 до 38) ± 5 .

КОПИЯ
ВЕРНА

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать кровать без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры**1.1 Масса изделий:**

вар. пост.1: 52,8±5,3 кг.

вар. пост.2: 47,0±4,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (2064х915х844)±5.**1.3 Размеры рабочей поверхности ложа (длина х ширина) мм: (2000х900)±5.****1.4 Размеры рабочей поверхности для установки матраса (длина х ширина) мм: (1990х830)±5.**

1.5 Угол между горизонталью и спинной, тазобедренной секциями регулируется в пределах (°): (от 0 до 60)±5.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики кровати при равномерном распределении нагрузки:

- на матрасное ложе – 200 кг;

- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 250 кг.

2.3 Кровать варианта поставки 1 поставляется с трёхсекционным мягким матрасом размером (длина х ширина х высота) мм: 1980(±10)х820(±10)х100(±15), массой кг: 5,78±0,58.**2.4 Кровать установлена на 4 опоры в виде труб диаметром 32 мм, не регулируемые по высоте.**

2.5 Усилие, прилагаемое к ручкам спинной и тазобедренной секциям для изменения угла положения между горизонталью не должно превышать 150 Н.

2.6 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием кровати должно быть 150 мм.**2.7 Зазор между одной из опор в виде трубы и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.**

2.8 При эксплуатации кровать устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.9 Каркас изделия изготовлен из стального П-образного профиля с полимерно-порошковым покрытием. Спинки-опоры выполнены из стальной трубы диаметром 32мм с полимерно-порошковым покрытием, не регулируемые по высоте. Ложе разделено на 3 секции. Регулировка подъёма спинной и тазобедренной секций от 0° до 60° - при помощи бесступенчатого самозаклинивающегося механизма. Вариант поставки 1 комплектуется мягким трёхсекционным матрасом из поролона толщиной 100мм, обтянутого винилискожей. В комплект варианта поставки 2 матрас не входит. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
- Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2	1*
Руководство по эксплуатации	1
Инструкция по сборке	1

* вариант поставки определяет заказчик.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Кровать транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Кровать транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения кровати в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности кровати устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.**6.1 Подготовка к работе:**

6.1.1 После хранения кровати или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки кровати проверьте следующее:

- крепёжные элементы кровати выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации кровати

Во избежание преждевременного выхода из строя кровати не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях кровати, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности кровати воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.3 Прочностные показатели кровати соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014.**7. Гарантия изготовителя**

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание кровати включает в себя:

- поддержание технического состояния кровати в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт кровати включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность кровати.

10. Утилизация

Кровать, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась кровать по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.108 ТУ и признана годной для эксплуатации.

- ☐ Код 0000000 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.2) вар. пост. 1 - с матрасом
- ☐ Код 0000000 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.2) вар. пост. 2 - без матраса

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: ipu@elamed.com

Сайт компании: ipu.elamed.com

Регистрационное удостоверение



КОПИЯ
ВЕРНА

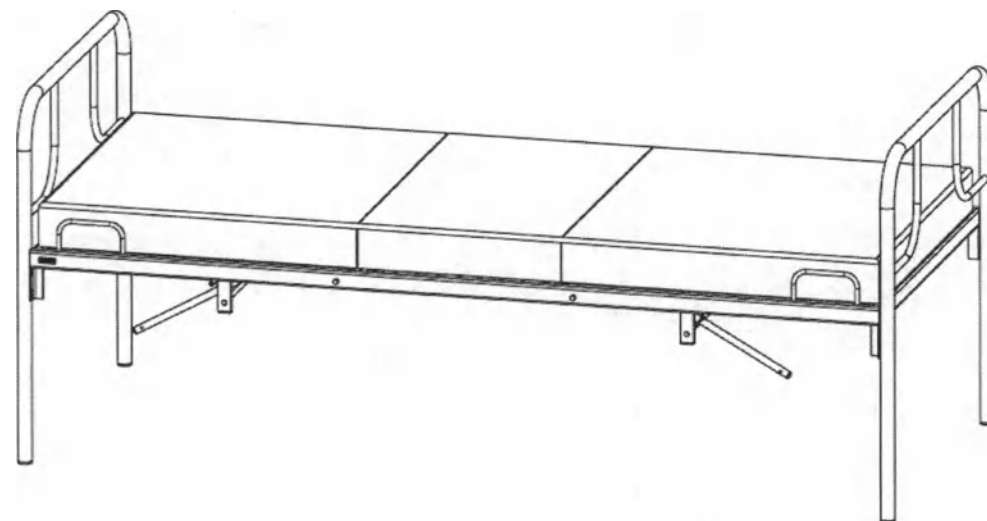

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПО ГИКС.942810.108 ТУ

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ трёхсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942855.105, -01 РЭ

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2 (в дальнейшем - кровать), предназначена для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Показания к применению: для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование кровати может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! При подъёме и опускании секций необходимо пользоваться специальными ручками, установленными с двух сторон на спинной и тазобедренной секциях. Следите за тем, чтобы пальцы рук не попали между основанием кровати и подъёмными секциями. Рекомендуем производить подъём и опускание секций кровати двум медработникам, по одному с каждой стороны !

! РАЗРЕШАЕТСЯ:

Производить передвижение кровати с пациентом в пределах помещения её установки.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвижение кровати с включенным тормозом колёс, что может привести к их самопроизвольному отворачиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать кровать без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры**1.1 Масса изделий:**

вар. пост.1: 58,8±5,8 кг.

вар. пост.2: 53,0±5,3 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (2082х930х841)±5.

1.3 Размеры рабочей поверхности лежа (длина х ширина) мм: (2000х900)±5.

1.4 Размеры рабочей поверхности для установки матраса (длина х ширина) мм: (1990х830)±5.

1.5 Угол между горизонталью и спинной, тазобедренной секциями регулируется в пределах (°): (от 0 до 60)±5.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики кровати при равномерном распределении нагрузки:

- на матрасное ложе – 200 кг;

- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 250 кг.

2.3 Кровать варианта поставки 1 поставляется с трёхсекционным мягким матрасом размером (длина х ширина х высота) мм: 1980(±10)х820(±10)х100(±15), массой кг: 5,78±0,58.

2.4 Кровать установлена на 4 колёсные опоры диаметром 122 мм, не регулируемые по высоте, вращающиеся вокруг вертикальной оси. 2 колеса снабжены стопором.

2.5 Усилие, необходимое для передвижения кровати на колёсных опорах не должно превышать 100 Н.

2.6 Усилие, необходимое для включения стопора колёс не более 150 Н.

2.7 Усилие, прилагаемое к ручкам спинной и тазобедренной секциям для изменения угла положения между горизонталью не должно превышать 150 Н.

2.8 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием кровати должно быть 150 мм.

2.9 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.10 Минимальный радиус разворота – 1132 мм.

2.11 При эксплуатации кровать устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.12 Каркас изделия изготовлен из стального П-образного профиля с полимерно-порошковым покрытием. Спинки выполнены из стальной трубы диаметром 32мм с полимерно-порошковым покрытием. Изделие устанавливается на 4 колёсные опоры, 2 из которых снабжены стопором. Ложе разделено на 3 секции. Регулировка подъёма спинной и тазобедренной секций от 0° до 60° - при помощи бесступенчатого самозаклинивающегося механизма. Вариант поставки 1 комплектуется мягким трёхсекционным матрасом из поролона толщиной 100мм, обтянутого винилискожей. В комплект варианта поставки 2 матрас не входит. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
- Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2	1*
Руководство по эксплуатации	1
Инструкция по сборке	1

* вариант поставки определяет заказчик.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Кровать транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Кровать транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения кровати в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности кровати устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения кровати или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки кровати проверьте следующее:

- крепёжные элементы кровати выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации кровати

Во избежание преждевременного выхода из строя кровати не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях кровати, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности кровати воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.3 Прочностные показатели кровати соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание кровати включает в себя:

- поддержание технического состояния кровати в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей кровати путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт кровати включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность кровати.

10. Утилизация

Кровать, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась кровать по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.108 ТУ и признана годной для эксплуатации.

- ☐ Код 0000000 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) вар. пост. 1 - с матрасом
- ☐ Код 0000000 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) вар. пост. 2 - без матраса

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»


Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

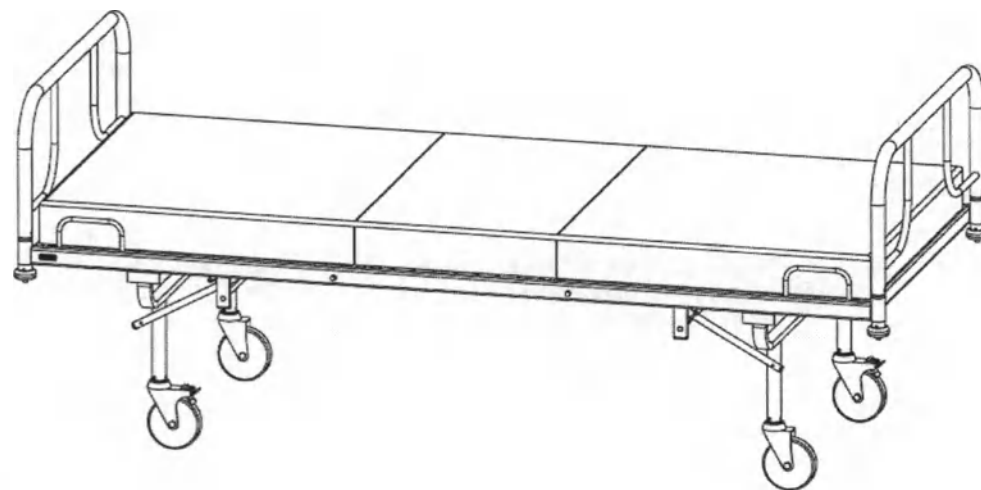

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПО ГИКС.942810.108 ТУ

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942855.106, -01 РЭ

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2 (в дальнейшем - кровать), предназначена для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Показания к применению: для размещения пациентов в палатах коечных и реанимационных отделений, смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.


Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование кровати может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! При подъёме и опускании секций необходимо пользоваться специальными ручками, установленными с двух сторон на спинной и тазобедренной секциях. Следите за тем, чтобы пальцы рук не попали между основанием кровати и подъёмными секциями. Рекомендуем производить подъём и опускание секций кровати двум медработникам, по одному с каждой стороны !

ОМ 29.810.00 Инструкция по сборке изделия
Кровати медицинские функциональные по ГИКС.942810.108 ТУ

Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) в вариантах поставки 1, 2

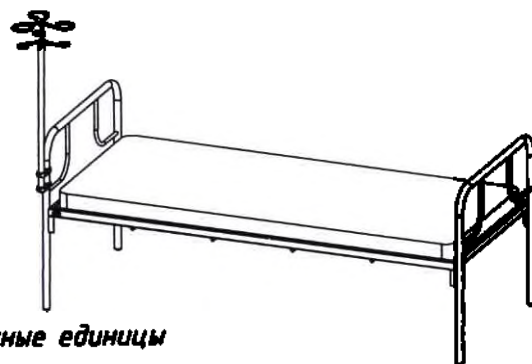

Условные обозначения:

1. А-Ж : детали и сборочные единицы
2. [1] - [2] : крепёж и фурнитура
3. ① - ④ : этапы сборки

- ☐ Код товара 0000000 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) вар. пост. 1 - с матрасом
- ☐ Код товара 0000000 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) вар. пост. 2 - без матраса
- ☐ Код товара 0000000 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) вар. пост. 1 - с матрасом и принадлежностями: штатив для вливаний
- ☐ Код товара 0000000 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) вар. пост. 1 - без матраса и принадлежностей: штатив для вливаний

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Ложе	1
Б	Спинка/опора	2
В*	Матрас	1

*Деталь входит в комплект поставки только для кодов товара:
0000000
0000000

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1]	4	Заглушки пластиковые	
[2]	1	Логотип компании	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности


Схема сборки изделия

1 этап

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия.

Ах1 шт.
Бх2 шт.
1х4 шт.

Произведите сборку 2-х спинок и фиксацию ложа кровати

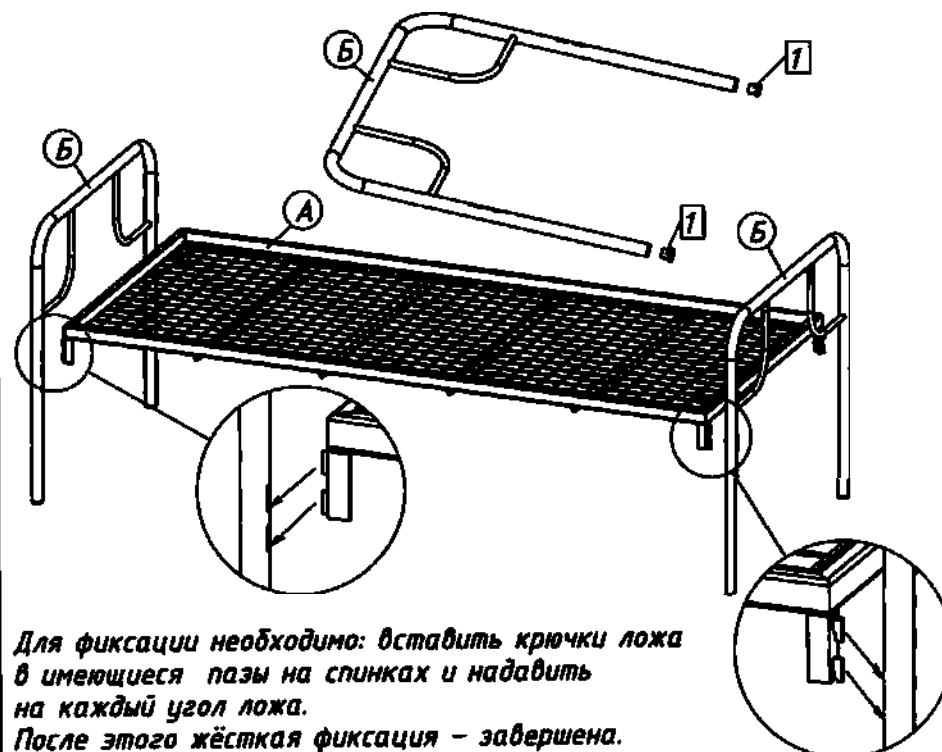


Для фиксации необходимо: вставить крючки ложа в имеющиеся пазы на спинках и надавить на каждый угол ложа.
После этого жёсткая фиксация - завершена.

Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) в вариантах поставки 1, 2

1 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) в вариантах поставки 1, 2 2

ОМ 29.810.00 После сборки изделия произведите установку логотипа компании 2

2 этап

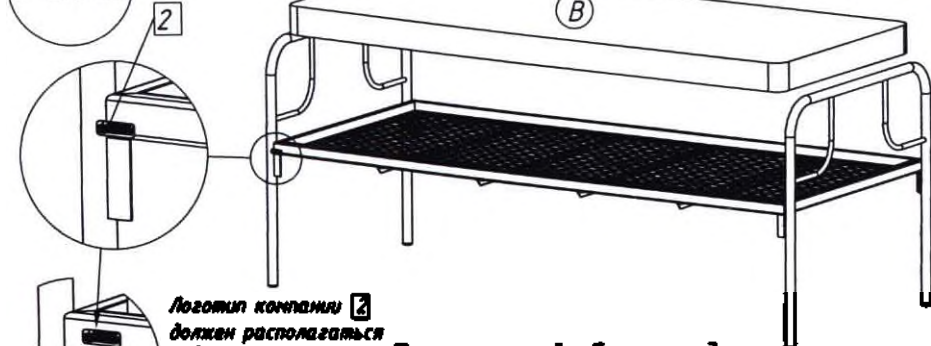

Логотип компании 2 должен располагаться рядом с этикеткой о наименовании изделия. Схема расположения указана на рисунке

После полной сборки изделия положите на ложе матрас (Е), если он предусмотрен вариантом поставки.



Этикетка наименование изделия

Схема сборки и установки принадлежности: штатив для вливаний
Детали

№	Наименование	Кол-во
Т	Стойка штатива	1
У	Держатель нижний	3
Ф	Держатель верхний	3
Х	Втулка держателя	2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
46	1	Фиксатор выдвижной части штатива	
47	1	Прокладка фиксатора	
48	2	Винт М5х35	
49	10	Шайба 5	
50	8	Шайба-гровер 5	
51	8	Гайка М5	

Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) в вариантах поставки 1, 2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
52	4	Крепление штатива	


Произведите сборку штатива для вливаний

3 этап

Тх1 шт.

46х1 шт.

47х1 шт.

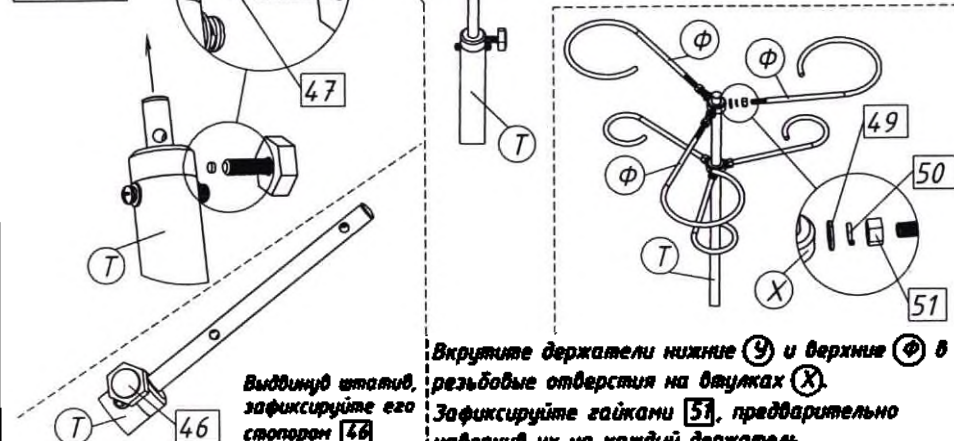

Тх1 шт.
Ух3 шт.
Фх3 шт.
Хх2 шт.

49х6 шт.
50х6 шт.
51х6 шт.

Вкрутите держатели нижние (У) и верхние (Ф) в резьбовые отверстия на втулках (Х). Зафиксируйте гайками (51), предварительно накрутив их на каждый держатель.

4 этап


48х2 шт.

49х4 шт.

50х2 шт.

51х2 шт.

52х4 шт.

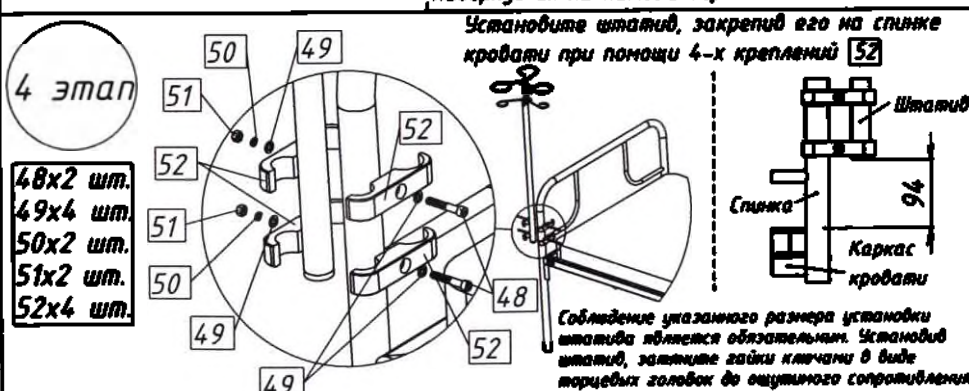

Установите штатив, закрепив его на спинке кровати при помощи 4-х креплений (52)

Соблюдение указанного размера установки штатива является обязательным. Установив штатив, затяните гайки ключами в виде торцевых головок до ощутимого сопротивления

3 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (мод.1) в вариантах поставки 1, 2 4

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 2 листа(ов).

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.

20 2





ОМ 29.812.00

Инструкция по сборке изделия

Кровати медицинские функциональные по ГИКС.942810.108 ТУ

Кровать медицинская функциональная
двухсекционная (мод.1) в вариантах поставки 1, 2

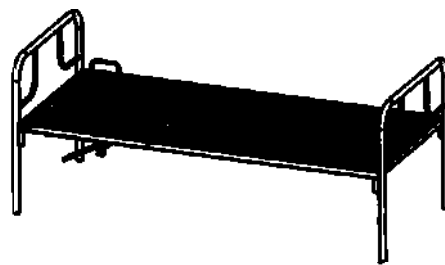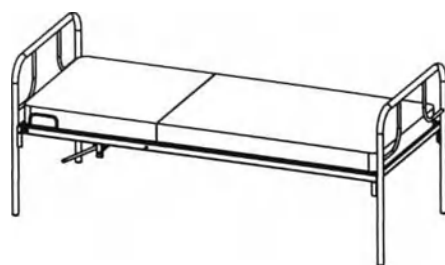

□ Код товара 0000000

□ Код товара 0000000

Условные обозначения:

1. А-Е : детали и сборочные единицы

2. 1 - 14 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 9 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Ложё	1
Б	Спинка/опора	2
В	Стопор механизма фиксации	2
Г	Механизм фиксации	1
Д	Ручка спинной секции	2
Е*	Матрас	1

*Деталь входит в комплект поставки только для кода товара:
0000000

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться
от поставляемых в действительности

Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.1) в вариантах поставки 1, 2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	2	Болт М6х35	
2	4	Болт М6х25	
3	8	Шайба 6	
4	6	Шайба-гровер 6	
5	2	Гайка М6	
6	2	Винт М4х25	
7	4	Шайба 4	
8	2	Шайба-гровер 4	
9	2	Гайка М4	
10	2	Винт М3х16	
11	4	Шайба 3	
12	2	Шайба-гровер 3	
13	2	Гайка М3	
14	12	Заглушки пластиковые	
15	1	Логотип компании	

1 Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.1) в вариантах поставки 1, 2


2

Схема сборки изделия

1 этап

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия


Ах1 шт.

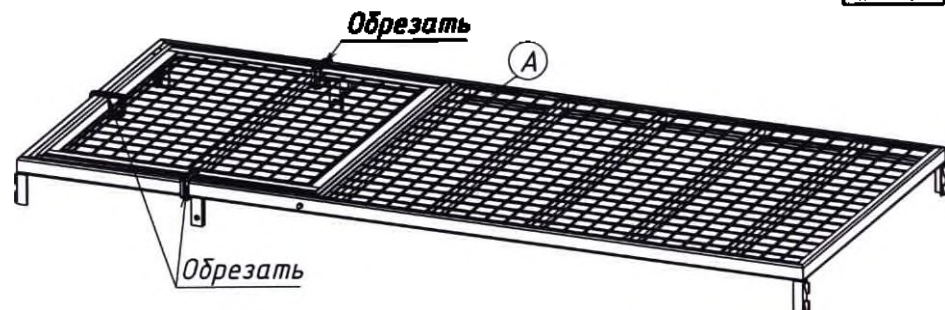

Распаковав ложе кровати (А), поставьте его на горизонтальную поверхность (как показано на рисунке) и обрежьте стяжки, освободив спинную секцию для дальнейшей сборки

2 этап

Дх2 шт.
2х4 шт.
3х4 шт.
4х4 шт.
14х6 шт.

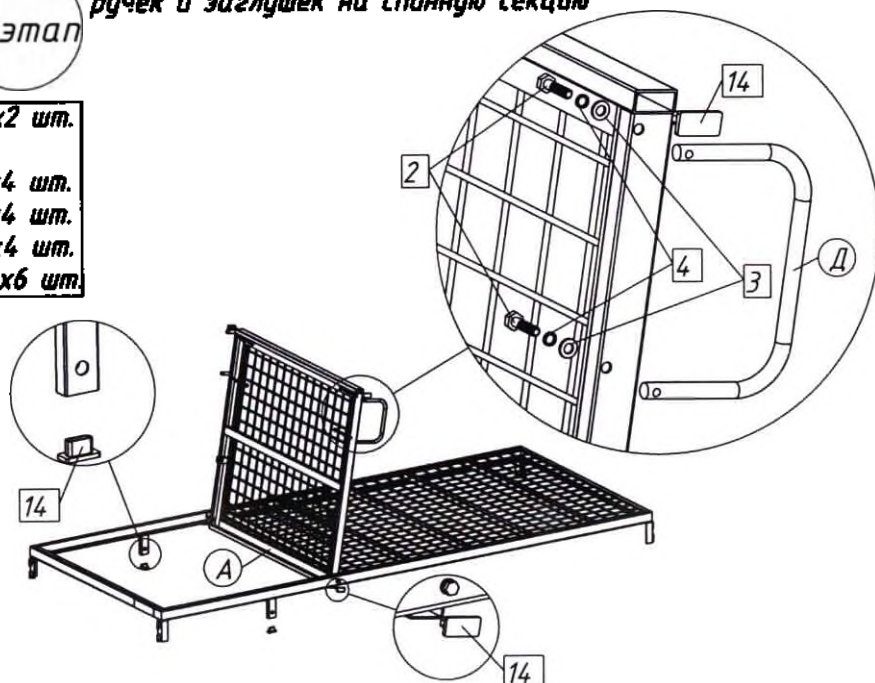

Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.1) в вариантах поставки 1, 2

3 этап

Произведите установку механизма фиксации в отверстия на ложе кровати


Гх1 шт.



4 этап

Зафиксируйте механизм фиксации


10х2 шт.
11х4 шт.
12х2 шт.
13х2 шт.

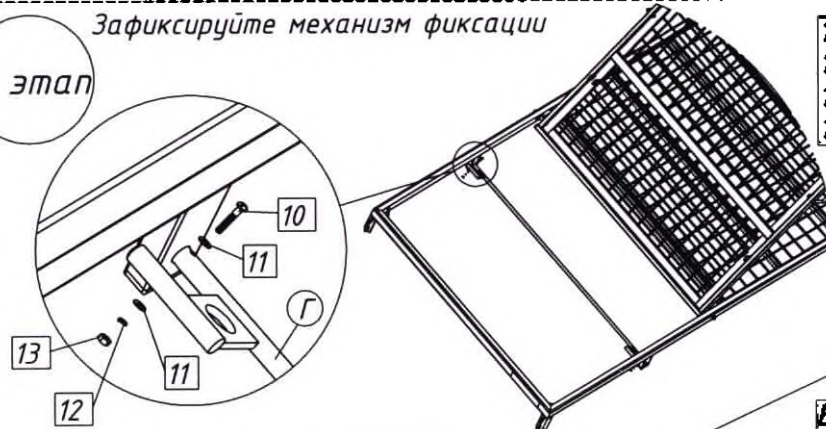

5 этап

Установите 2 стопора механизма фиксации


Вх2 шт.
1х2 шт.
3х4 шт.
4х2 шт.
5х2 шт.
14х2 шт.

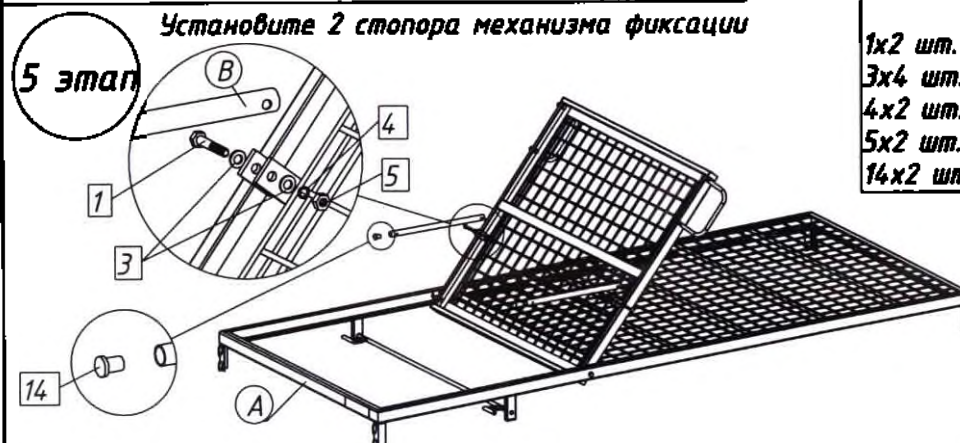

3 Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.1) в вариантах поставки 1, 2

ОМ 29.812.00 Опуская спинную секцию, вставьте стопоры в отверстия установленного механизма фиксации


6 этап

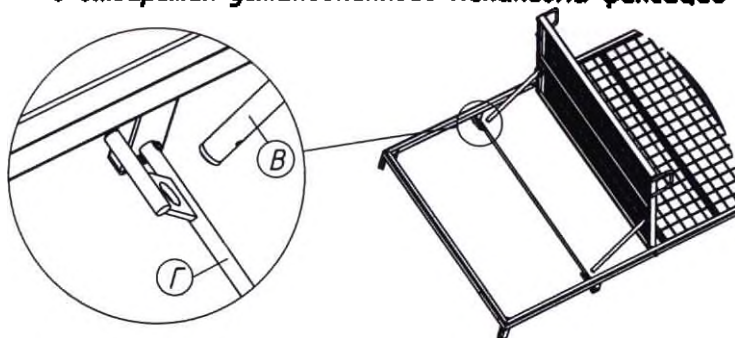

7 этап

Произведите установку фиксирующих винтов на 2 стопора механизма фиксации

6x2 шт.
7x4 шт.
8x2 шт.
9x2 шт.

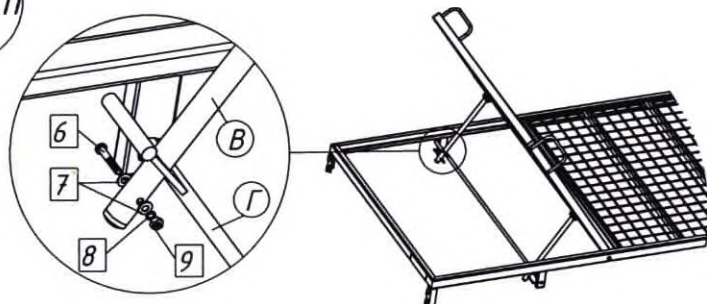

8 этап

Произведите сборку 2-х спинок и фиксацию ложа кровати

Бx2 шт.
14x4 шт.



Для фиксации необходимо: вставить крючки ложа в имеющиеся пазы на спинках и надавить на каждый угол ложа.



После этого жёсткая фиксация завершена.

Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.1) в вариантах поставки 1, 2


9 этап

После сборки изделия произведите установку логотипа компании 15

Ех1 шт.
15х1 шт.

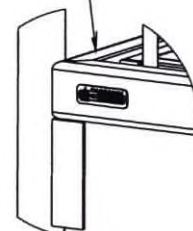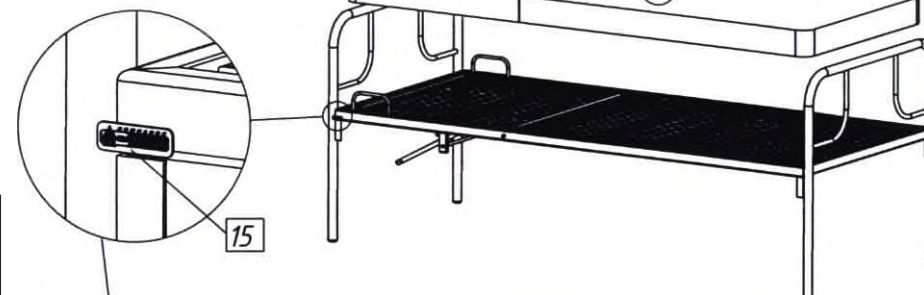

Собранное изделие

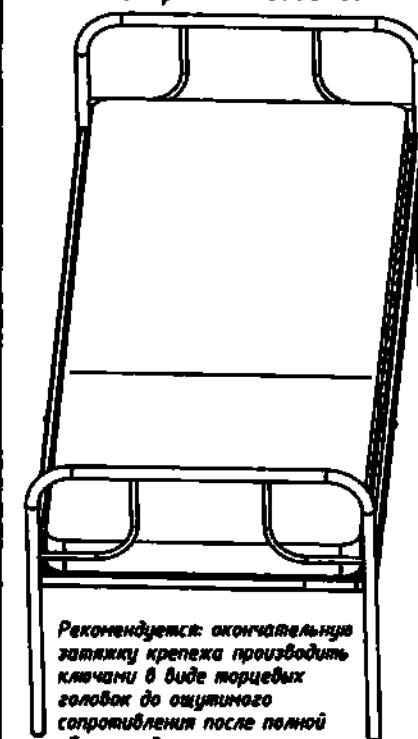

Логотип компании 15 должен располагаться рядом с этикеткой о наименовании изделия. Схема расположения указана на рисунке



Этикетка наименование изделия

Рекомендуется: окончательную затяжку крепежа производить ключами в виде торцевых головок до ощутимого сопротивления после полной сборки изделия

После полной сборки изделия положите на ложе матрас (Е), если он предусмотрен вариантом поставки.

5 Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.1) в вариантах поставки 1, 2

6

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 3 листа(ов).


Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.

10 20 21



ОМ 29.814.00 Инструкция по сборке изделия
Кровати медицинские функциональные по ГИКС.942810.108 ТУ
Кровать медицинская функциональная
двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

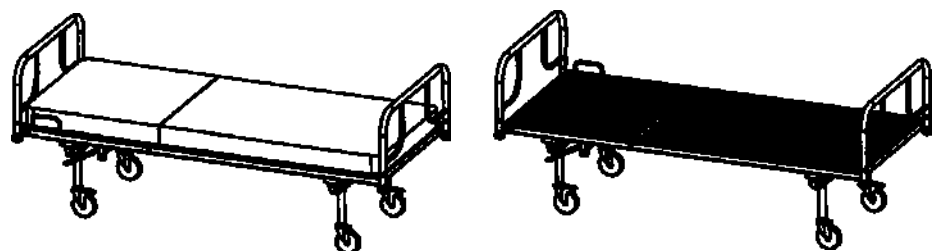

☐ Код товара 0000000

☐ Код товара 0000000

Условные обозначения:

1. А-Ж : детали и сборочные единицы
2. 1 - 21 : крепёж и фурнитура
3. 1 - 11 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Ложе	1
Б	Спинка	2
В	Стопор механизма фиксации	2
Г	Механизм фиксации	1
Д	Ручка спинной секции	2
Е	Труба колёсной опоры	2
Ж*	Матрас	1

*Деталь входит в комплект поставки только для кода товара: 0000000

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Болт М12х30	
2	2	Болт М6х35	
3	4	Винт М6х30	
4	4	Болт М6х25	
5	8	Болт М6х14	
6	28	Шайба 6	
7	18	Шайба-гровер 6	
8	4	Шайба-гровер 12	
9	10	Гайка М6	
10	2	Винт М4х25	
11	4	Шайба 4	
12	2	Шайба-гровер 4	
13	2	Гайка М4	
14	2	Винт М3х16	
15	4	Шайба 3	
16	2	Шайба-гровер 3	
17	2	Гайка М3	
18	4	Отбойник	
19	4	Гайка спинки	
20	4	Колёсная опора	
21	8	Заглушки пластиковые	
22	1	Логотип компании	

1 Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

2



ОМ 29.814.00

Схема сборки изделия

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия

Произведите сборку 2-х труб с колёсными опорами

1 этап

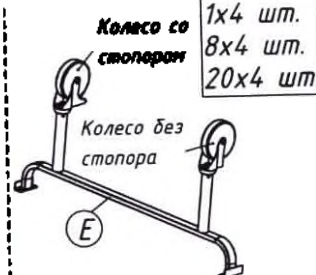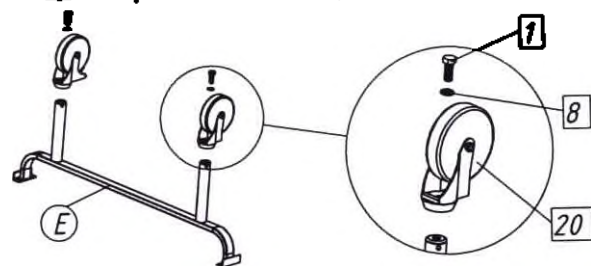


Ex2 шт.

1x4 шт.
8x4 шт.
20x4 шт.

Колесо со стопором

Колесо без стопора

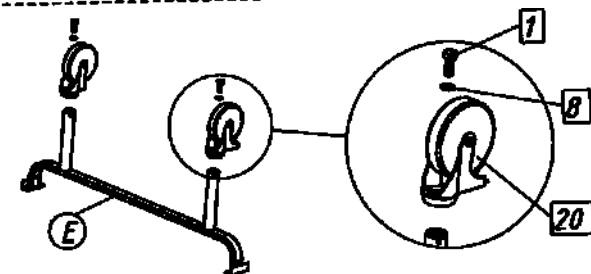


Колесо без стопора

Колесо со стопором

Произведите соединение колёсных опор с ложем кровати

2 этап

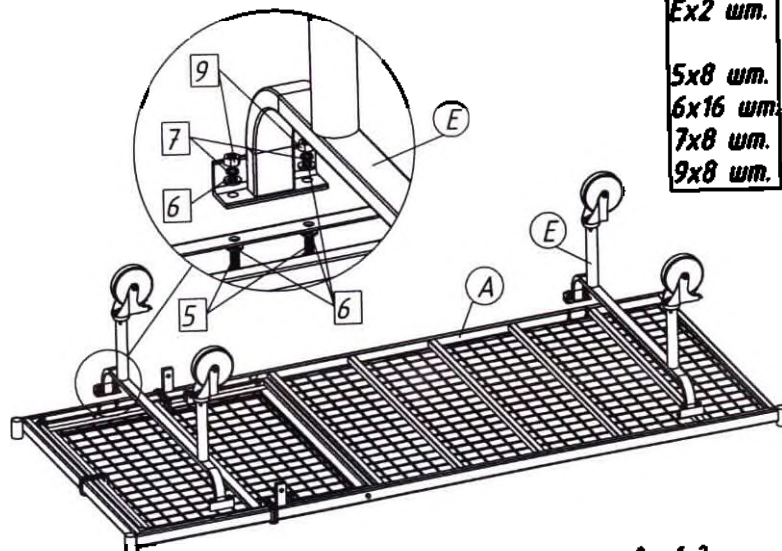


Ex2 шт.

5x8 шт.
6x16 шт.
7x8 шт.
9x8 шт.

3 этап

После фиксации колёсных опор с ложем кровати (А), поставьте изделие на горизонтальную поверхность (как показано на рисунке) и обрежьте стяжки, освободив спинную секцию для дальнейшей сборки

Ax1 шт.

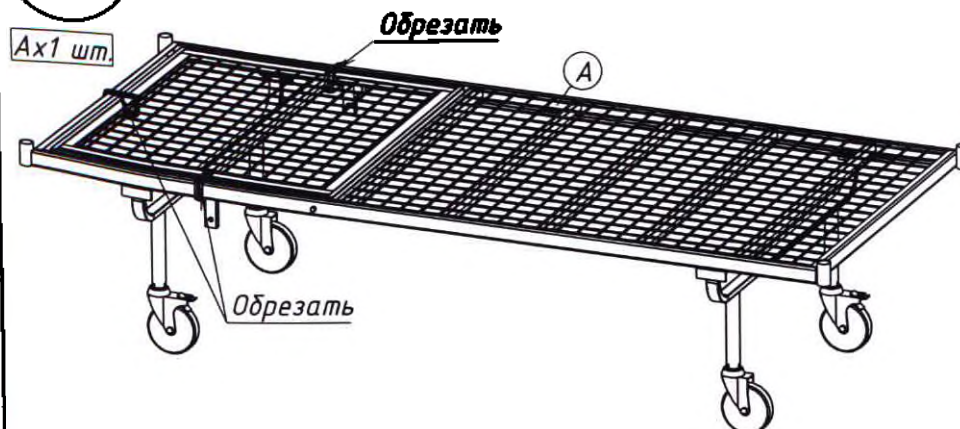

Обрезать


Обрезать

4 этап

Произведите установку заглушек на каркас кровати, ручек и заглушек на спинную секцию

Дx2 шт.

4x4 шт.
6x4 шт.
7x4 шт.
21x6 шт.

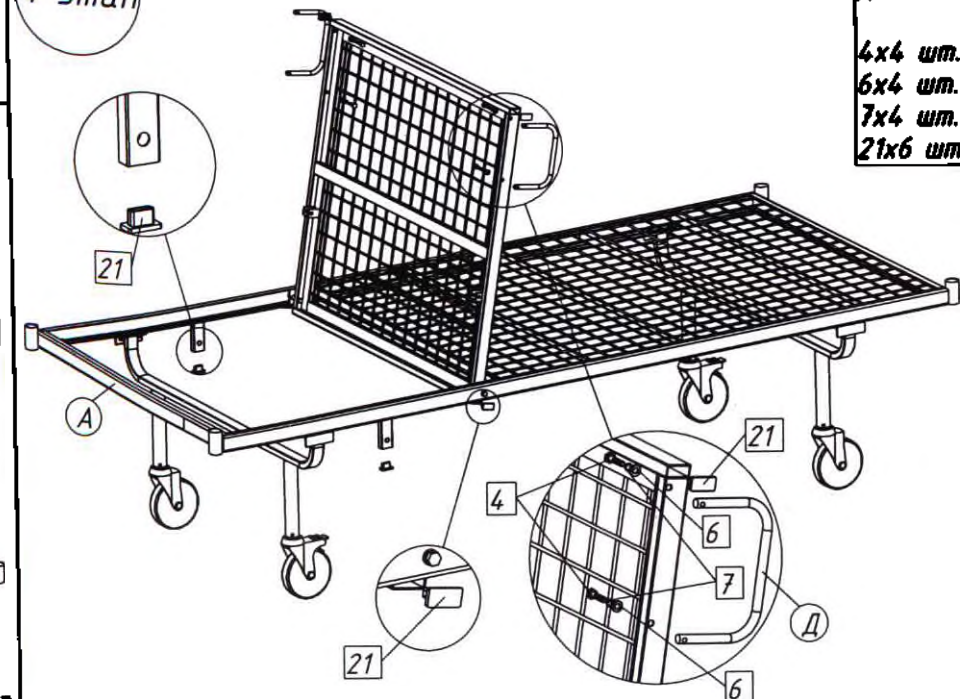

Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2


3 Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

4

ОМ 29.814.00 Произведите установку механизма фиксации
в отверстия на ложе кровати

5 этап


Гх1 шт.

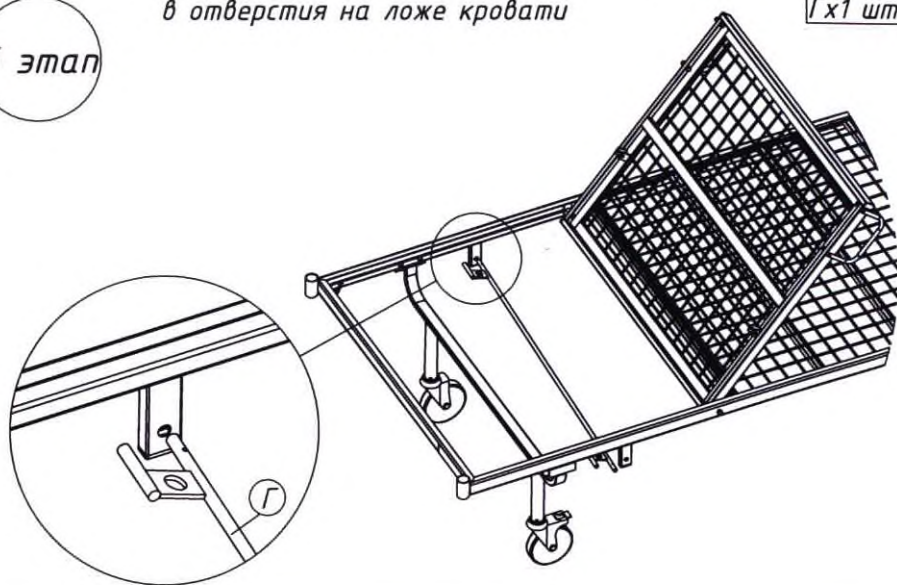

Зафиксируйте механизм фиксации

6 этап

14x2 шт.
15x4 шт.
16x2 шт.
17x2 шт.

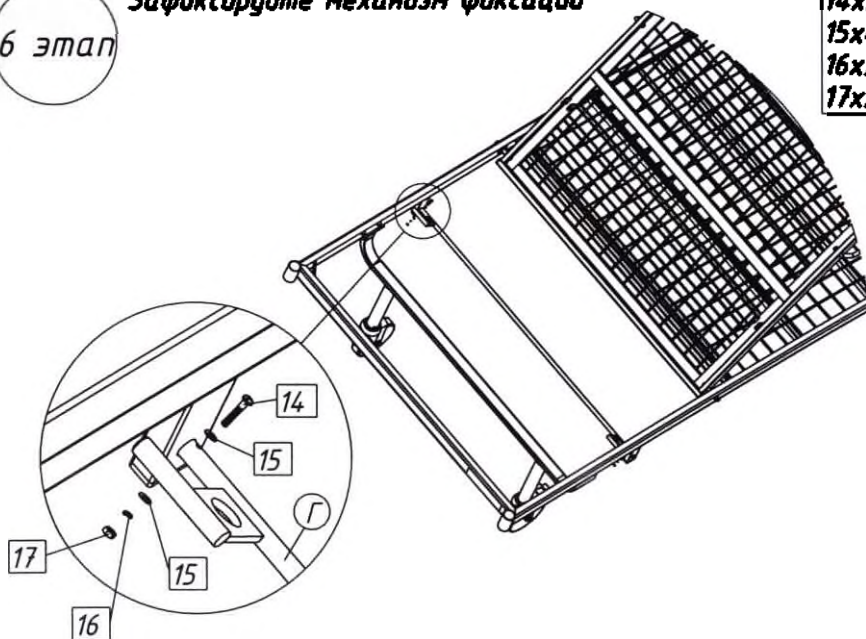



Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

Установите 2 стопора механизма фиксации

7 этап

Вх2 шт.

2x2 шт.
6x4 шт.
7x2 шт.
9x2 шт.
21x2 шт.

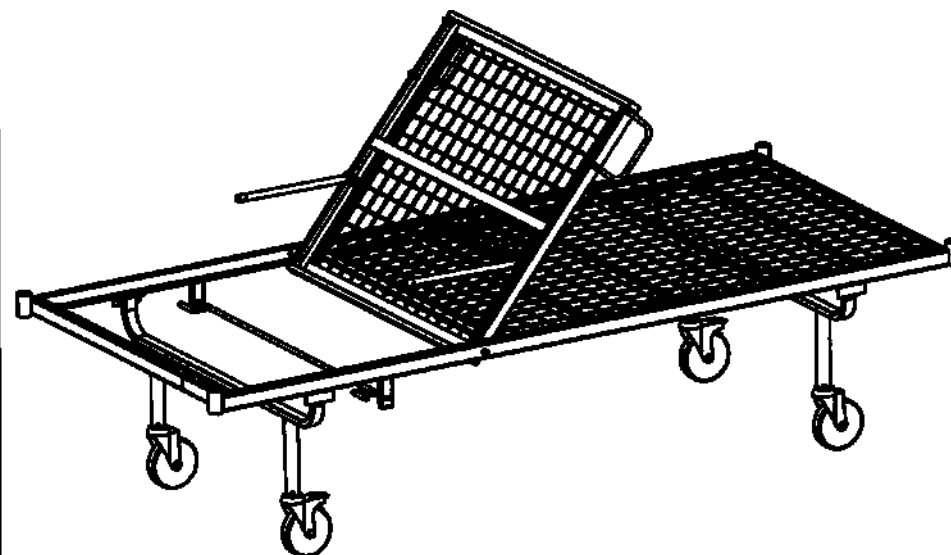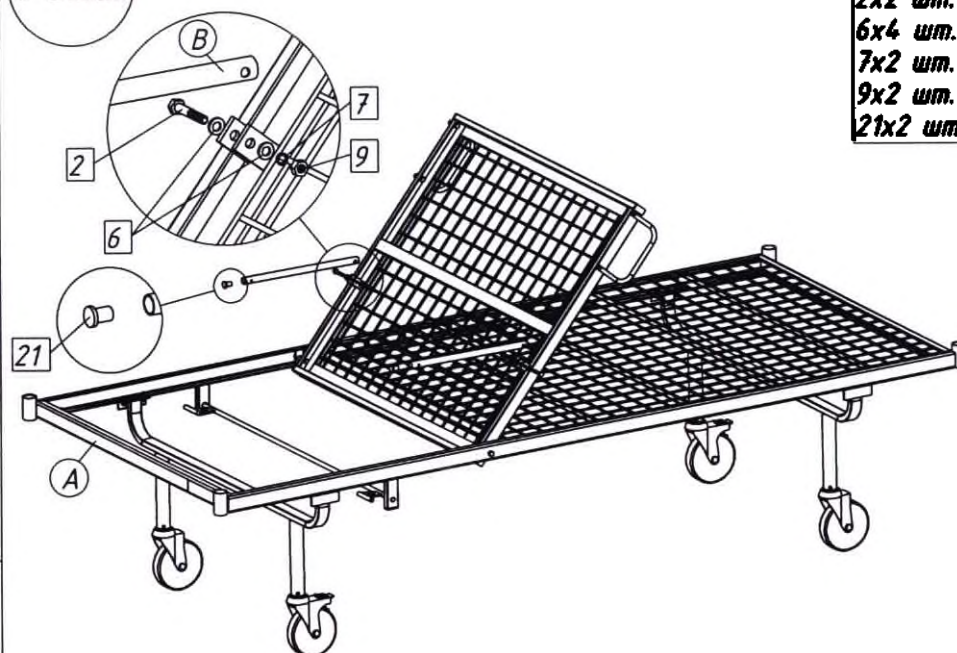


5 Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

6


ОМ 29.814.00 Опуская спинную секцию, вставьте стопоры в отверстия установленного механизма фиксации

8 этап

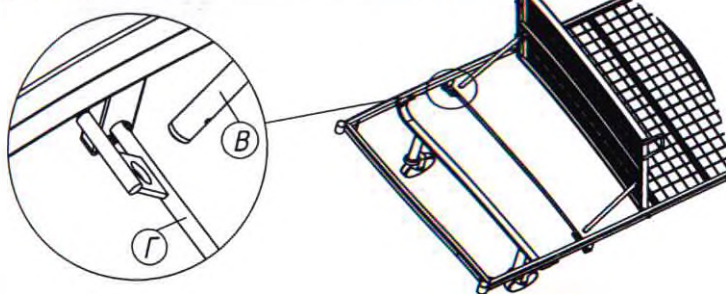

Произведите установку фиксирующих винтов на 2 стопора механизма фиксации


9 этап

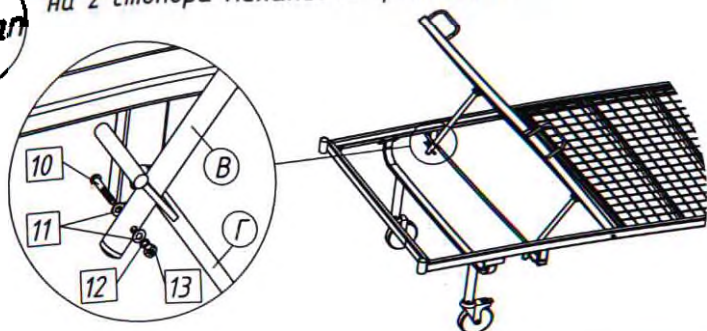

10x2 шт.
11x2 шт.
12x2 шт.
13x2 шт.

Произведите установку 2-х спинок

10 этап

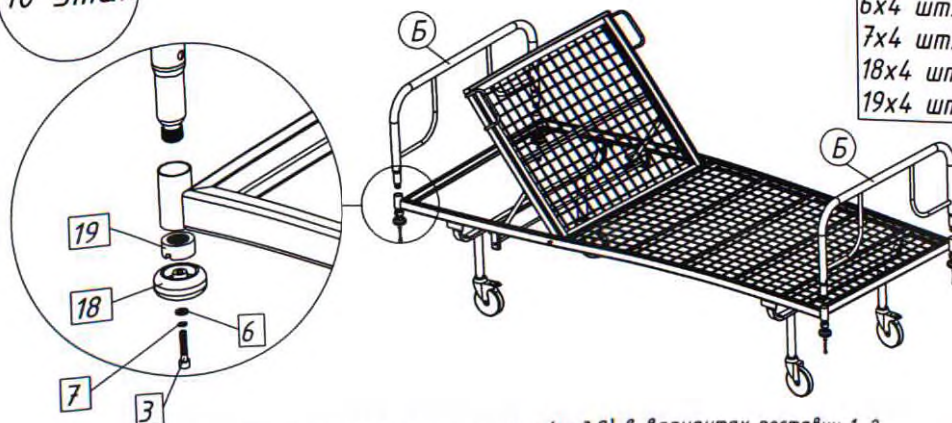


Бx2 шт.
3x4 шт.
6x4 шт.
7x4 шт.
18x4 шт.
19x4 шт.


Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

После сборки изделия произведите установку логотипа компании 22


11 этап

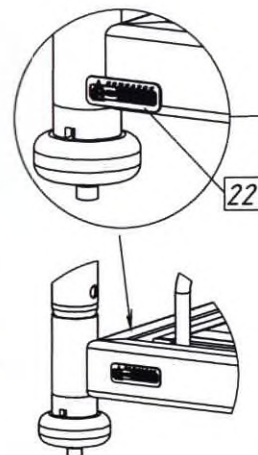

Жx1 шт.
22x1 шт.

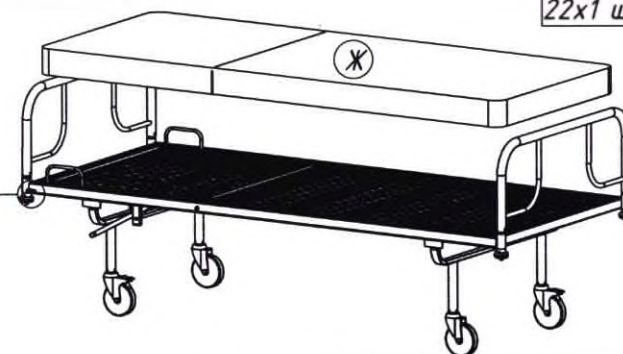


Собранное изделие

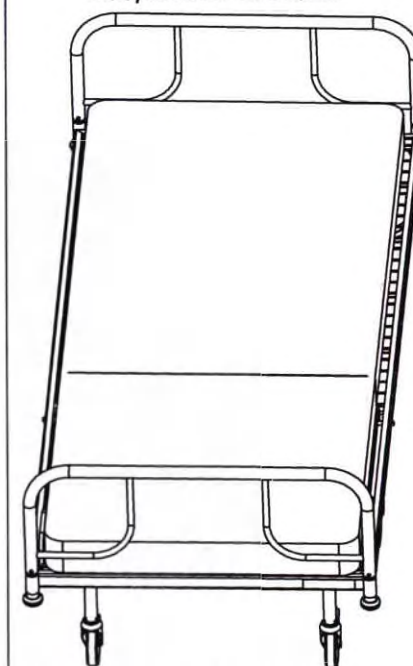

Рекомендуется: окончательную затяжку крепежа производить ключами в виде торцевых головок до ощутимого сопротивления после полной сборки изделия

Логотип компании 22 должен располагаться рядом с этикеткой о наименовании изделия. Схема расположения указана на рисунке

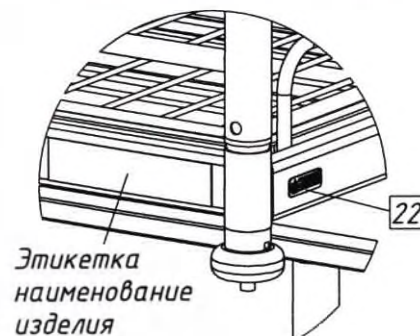

Этикетка наименование изделия

После полной сборки изделия положите на ложе матрас (Ж), если он предусмотрен вариантом поставки.

7 Кровать медицинская функциональная двухсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

8

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 4 листа(ов)

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.

20 21




ОМ 29.816.00

Инструкция по сборке изделия

Кровати медицинские функциональные по ГИКС.942810.108 ТУ

Кровать медицинская функциональная
трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

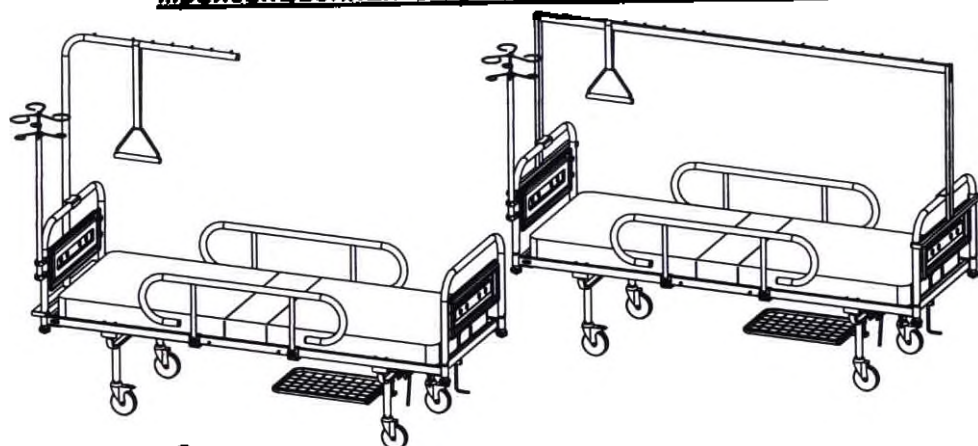

Условные обозначения:

1. А-Ж : детали и сборочные единицы
2. [1] - [21] : крепёж и фурнитура
3. (1) - (16) : этапы сборки

Код товара	Вар. поставки	Кровать с матрасом	Боковое ограждение (2шт.)	Штатив для вливания	Штанга для подтягивания	Рама Балканского	Подставка для судна
0000000		+					
0000000		+	+				
0000000		+		+			
0000000		+			+		
0000000		+				+	
0000000		+					+
0000000		+	+	+			
0000000		+	+	+	+		
0000000		+	+	+		+	
0000000		+	+	+			+





Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

Код товара	Вар. поставки	Кровать с матрасом	Боковое ограждение (2шт.)	Штатив для вливания	Штанга для подтягивания	Рама Балканского	Подставка для судна
0000000		+	+	+	+		+
0000000		+	+	+		+	+
0000000		+		+	+		
0000000		+				+	+
0000000		+	+		+		
0000000		+		+	+		
0000000		+		+	+		+

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Ложё	1
Б	Спинка	2
В	Стопор механизма фиксации	2
Г	Механизм фиксации	1
Д	Ручка тазобедренной секции	1
Е	Труба передняя колёсной опоры	1
Ж	Труба задняя колёсной опоры	1
З	Механизм подъёма спинной секции	1
И	Тяга механизма подъёма	2
К	Труба механизма подъёма	1
Л	Выдвижная труба механизма подъёма	1
М	Ручка механизма подъёма	1
Н	Платиковая накладка спинки	2
О	Платиковая накладка ложа	9
П	Матрас	1

1 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

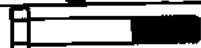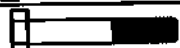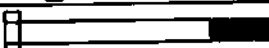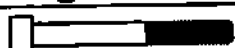Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Болт М12х30	
2	4	Болт М10х65	
3	2	Болт М8х50	
4	2	Болт М6х70	
5	3	Болт М6х30	
6	8	Винт М6х55	
7	4	Винт М6х30	
8	2	Винт М6х20	
9	8	Винт М5х16	
10	2	Винт М5х12	
11	1	Винт М4х16	
12	2	Винт М4х10	
13	8	Шайба 10	
14	4	Шайба 8	
15	30	Шайба 6	
16	16	Шайба 5	
17	1	Шайба 4	
18	4	Шайба-гровер 12	
19	4	Шайба-гровер 10	
20	2	Шайба-гровер 8	
21	17	Шайба-гровер 6	
22	8	Шайба-гровер 5	

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

Арт.	Кол - во	Обозначение	
23	1	Шайба-гровер 4	
24	4	Гайка М10	
25	2	Гайка М8	
26	13	Гайка М6	
27	8	Гайка колпачковая М5	
28	4	Винт М3х16	
29	8	Шайба 3	
30	4	Шайба-гровер 3	
31	4	Гайка М3	
32	4	Отбойник	
33	4	Гайка спинки	
34	4	Колёсная опора	
35	16	Заглушки пластиковые	
36	1	Втулка трубы механизма подъёма	
37	1	Держатель трубы механизма подъёма	
38	1	Логотип компании	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

3 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

ОМ 29.816.00

Схема сборки изделия

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия

1 этап Произведите сборку 2-х труб с колёсными опорами

Ех1 шт.
Жх1 шт.

х4 шт.
х4 шт.
х4 шт.

Колесо со стопором

Колесо без стопора

Колесо без стопора

Колесо со стопором

2 этап Произведите сборку 2-х спинок

Бх2 шт.
Нх2 шт.

9х8 шт.
16х16 шт.
22х8 шт.
27х8 шт.

Внутренняя сторона

3 этап Произведите установку подъёмного механизма спинной/тазобедренной секции на каркас кровати




3х1 шт.

2х4 шт.
13х8 шт.
19х4 шт.
24х4 шт.

Рекомендуется: окончательную затяжку крепежа производить ключами в виде торцевых головок до ощутимого сопротивления

4 этап Произведите установку заглушек подъёмного механизма и спинной секции

35х7 шт.

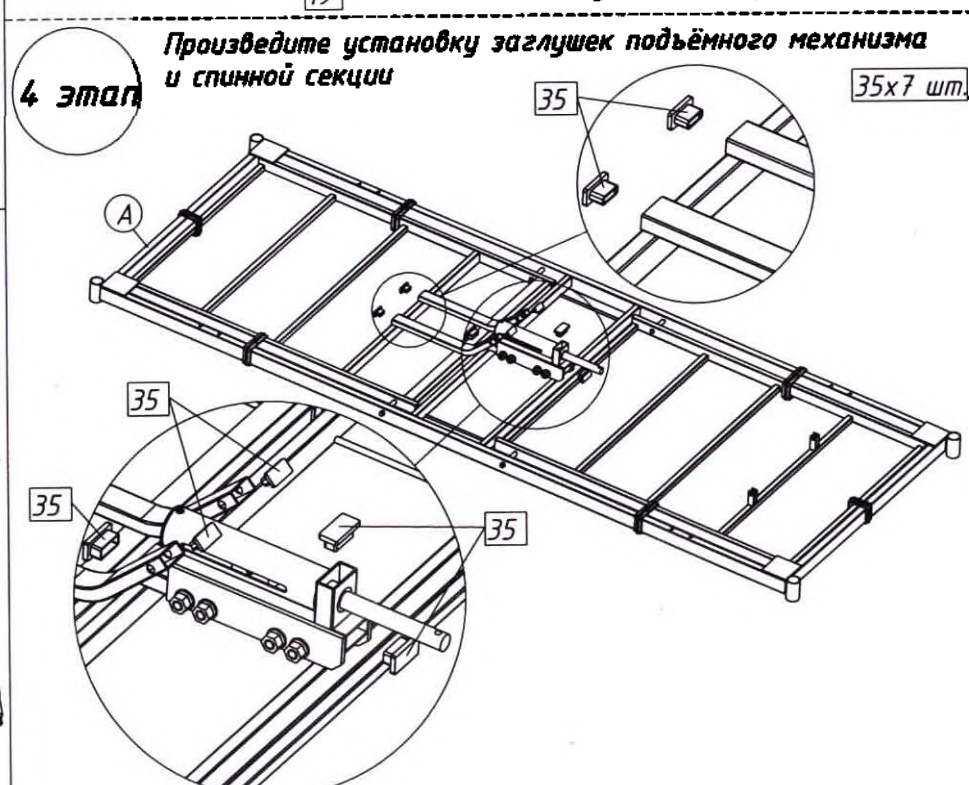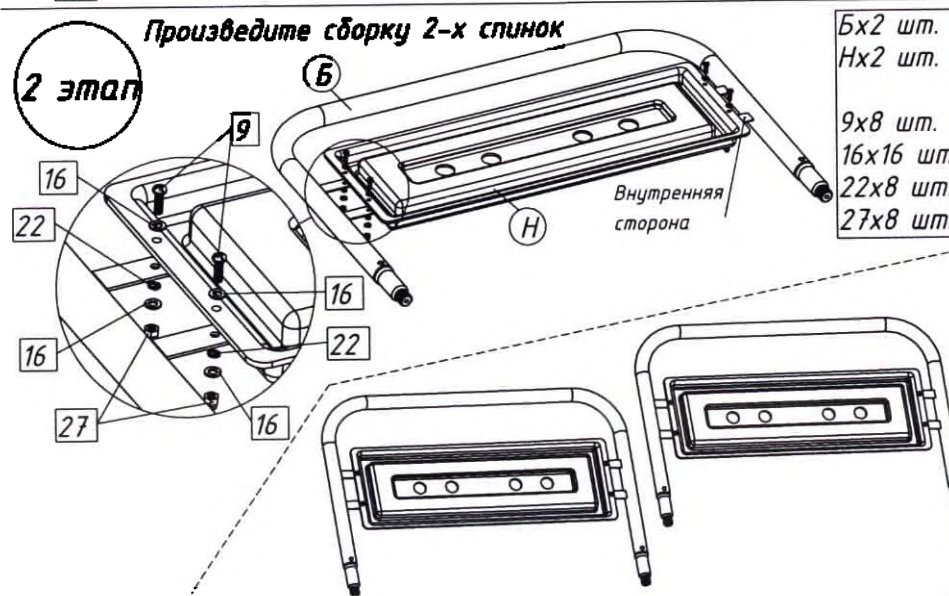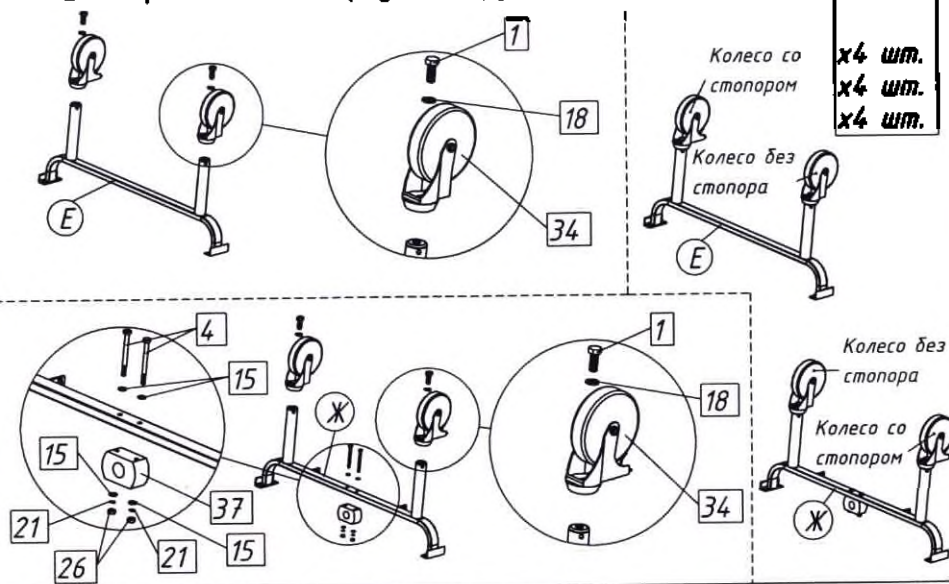

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)


5 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

6

ОМ 29.816.00 Произведите фиксацию подъёмного механизма со спинной секцией

5 этап


Их2 шт.
3х2 шт.
10х2 шт.
14х4 шт.
20х2 шт.
25х2 шт.

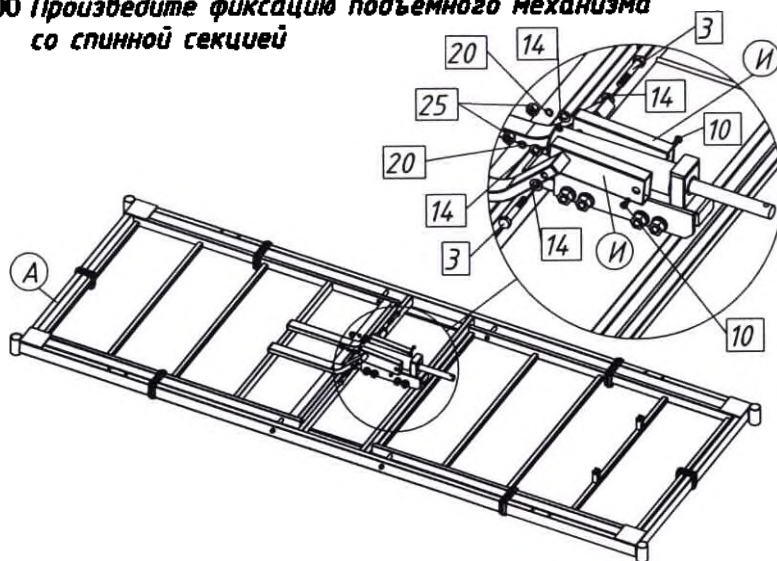

Произведите соединение колёсных опор с ложем кровати

6 этап


Ех1 шт.
Жх1 шт.
6х8 шт.
15х16 шт.
21х8 шт.
26х8 шт.

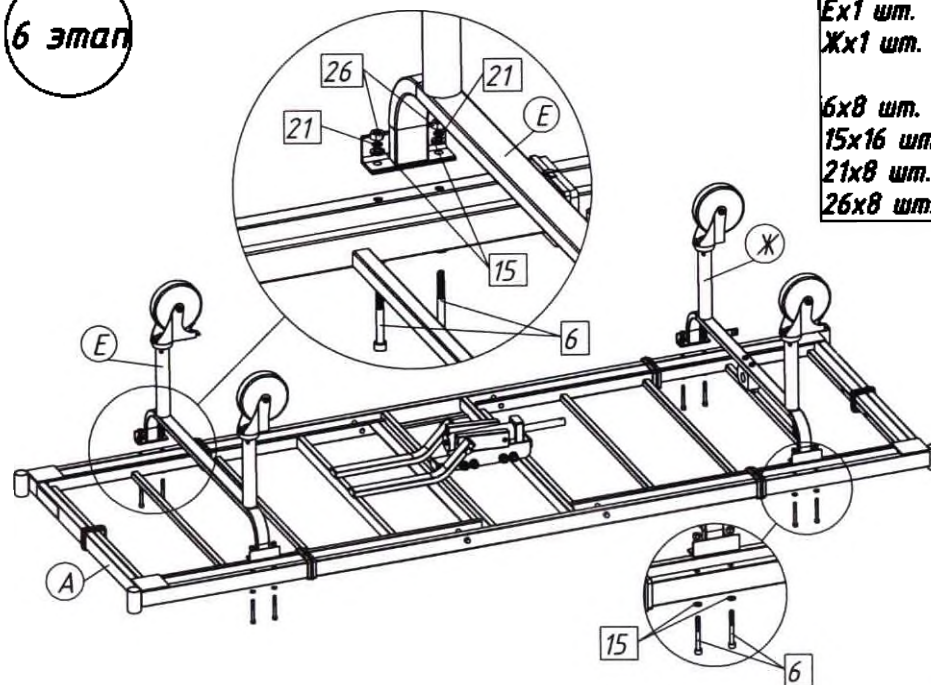

Установите 2 стопора механизма фиксации тазобедренной секции на каркас кровати

7 этап


Вх2 шт.
5х2 шт.
15х4 шт.
21х2 шт.
26х2 шт.

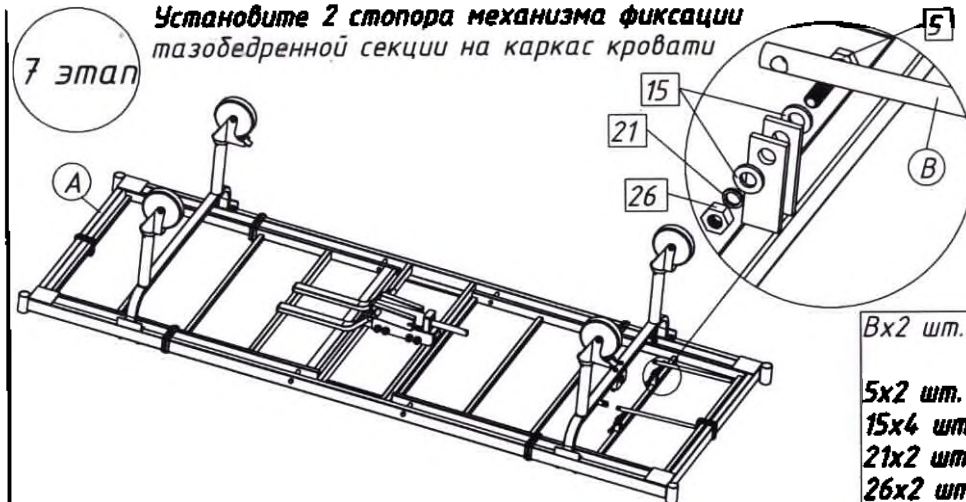

8 этап

Произведите сборку и установку механизма подъёма спинной секции на каркас кровати

Кх1 шт.
Лх1 шт.
Мх1 шт.
5х1 шт.
11х1 шт.
12х2 шт.
15х2 шт.
17х1 шт.
21х1 шт.
23х1 шт.
26х1 шт.
35х1 шт.
36х1 шт.

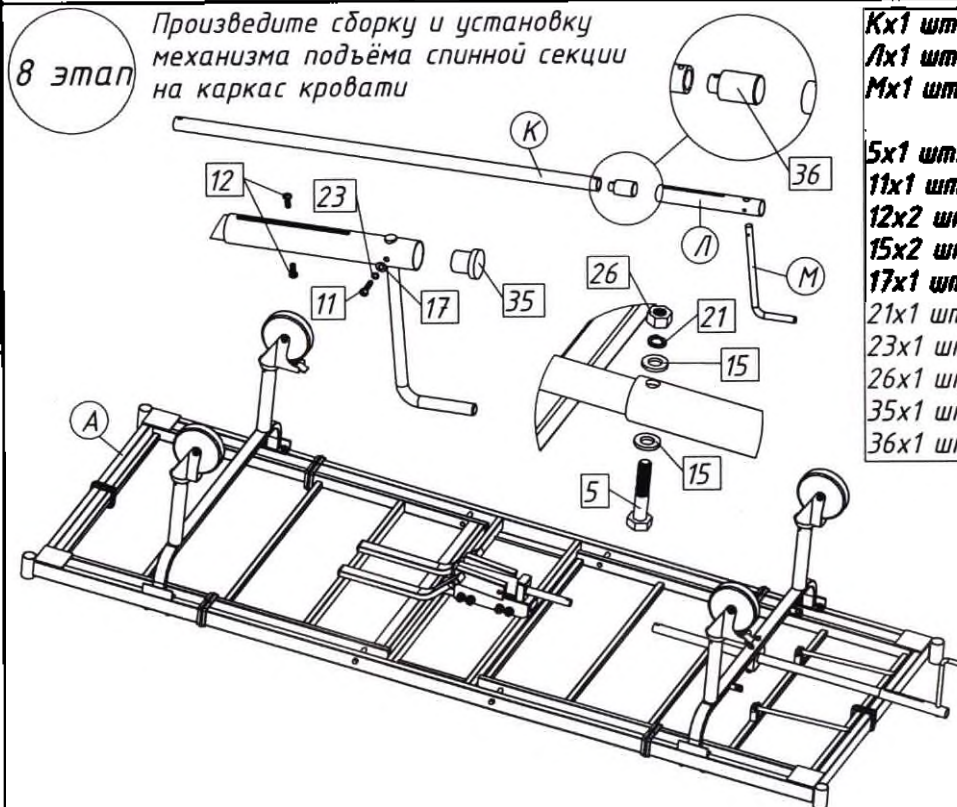


Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

7 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

8


ОМ 29.816.00 Произведите установку механизма фиксации тазобедренной секции в отверстия на задней опоре кровати

9 этап

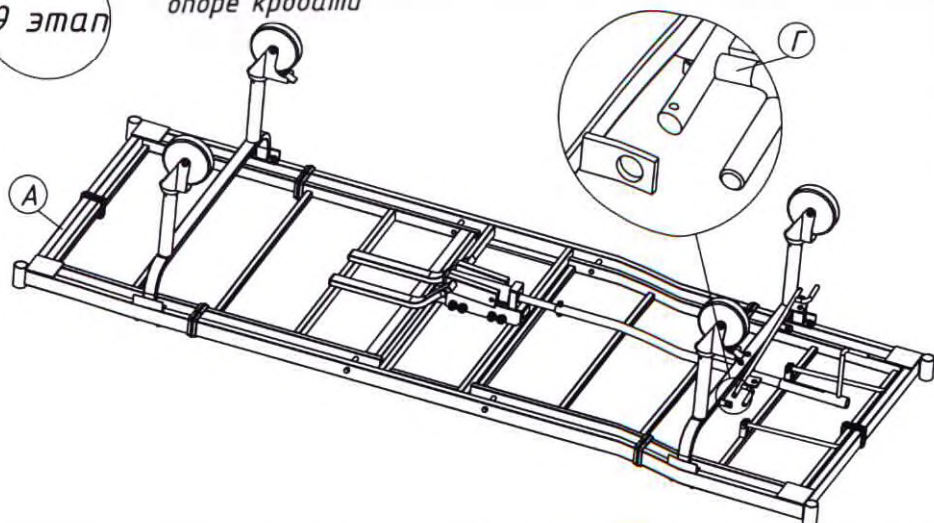

Гх1 шт.


10 этап Зафиксируйте механизм фиксации тазобедренной секции

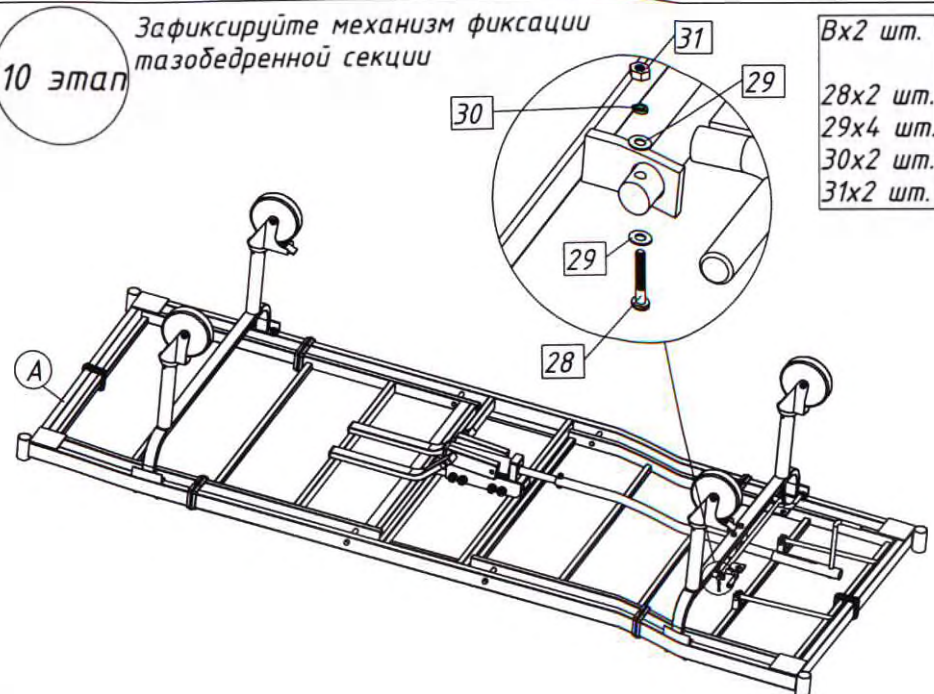

Вх2 шт.
28х2 шт.
29х4 шт.
30х2 шт.
31х2 шт.


После фиксации колёсных опор с ложем кровати (А), поставьте изделие на горизонтальную поверхность (как показано на рисунке) и обрежьте стяжки, освободив спинную/тазобедренную секции для дальнейшей сборки

11 этап

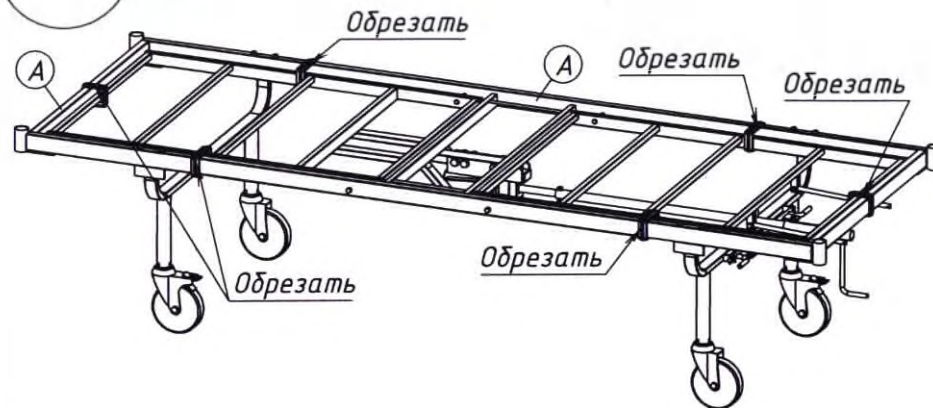

12 этап Произведите установку заглушек на каркас кровати, ручек и заглушек на спинную/тазобедренную секции

12 этап

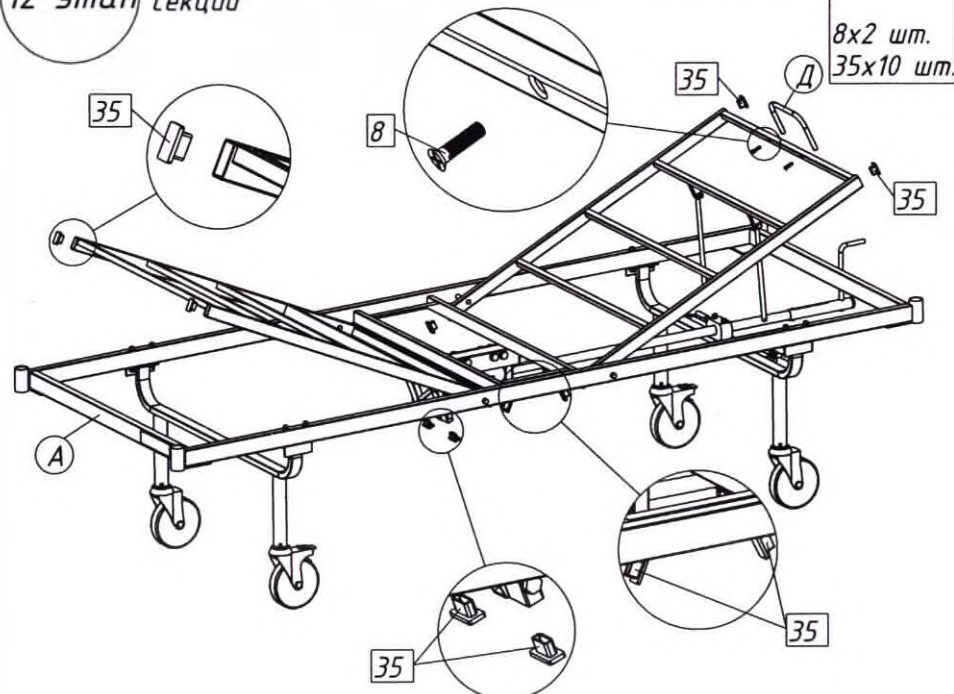

Дх1 шт.
8х2 шт.
35х10 шт.

ОМ 29.816.00 Опуская тазобедренную секцию, вставьте стопоры в отверстия установленного механизма фиксации

13 этап



Произведите установку фиксирующих винтов на 2 стопора механизма фиксации


14 этап



28x2 шт.
29x4 шт.
30x2 шт.
31x2 шт.

Произведите установку пластиковых накладок ложа и 2-х спинок

15 этап

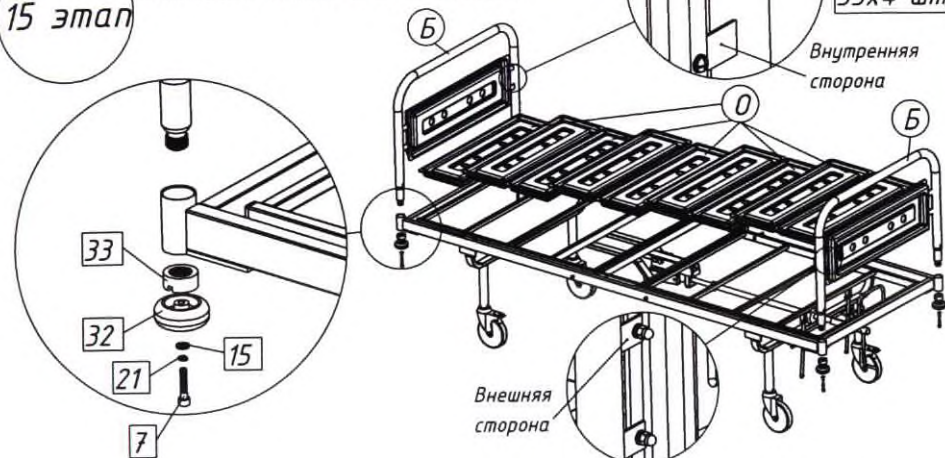

Бx2 шт.
Оx9 шт.

7x4 шт.
15x4 шт.
21x4 шт.
32x4 шт.
33x4 шт.

Внутренняя сторона

Внешняя сторона




Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

16 этап

После сборки изделия произведите установку логотипа компании 38

17x1 шт.


38x1 шт.

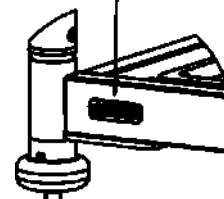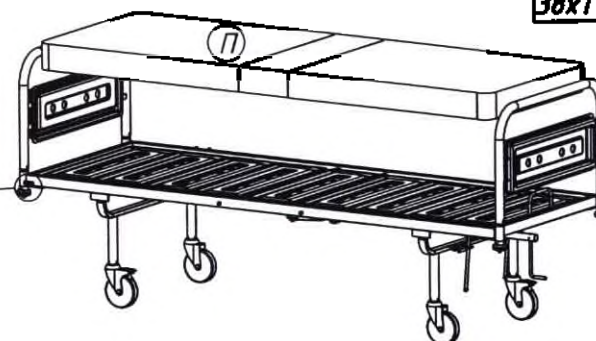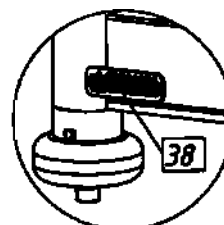

Логотип компании 38 должен располагаться рядом с этикеткой с наименованием изделия. Схема расположения указана на рисунке



Собранное изделие

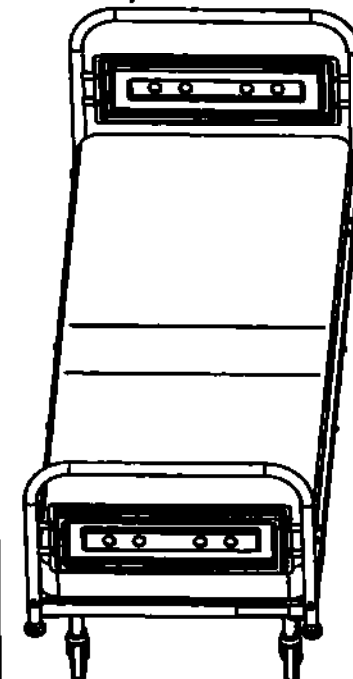

Рекомендуется: окончательную затяжку крепежа производить ключами в виде торцевых головок до ощутимого сопротивления после полной сборки изделия

После полной сборки изделия положите на ложе матрас (П), если он предусмотрен вариантом поставки.

11 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

12

ОМ 29.816.00 Схема сборки и установки принадлежностей:
боковое ограждение

Детали

№	Наименование	Кол-во
Р	Ограждение	1
С	Опора ограждения	2


Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
40	4	Болт М8х50	
41	2	Болт М8х35	
42	12	Шайба 8	
43	6	Шайба-гровер 8	
44	6	Гайка М8	
45	2	Заглушки пластиковые	

Количество деталей и фурнитуры указаны на 1 комплект ограждения

Произведите сборку 2-х ограждений

17 этап

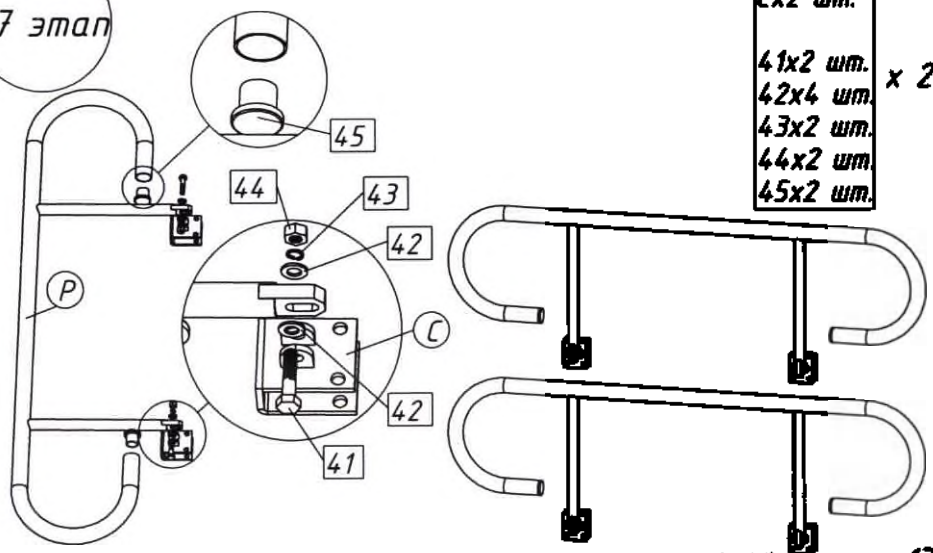

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

Рх1 шт.
Сх2 шт.

41х2 шт.
42х4 шт.
43х2 шт.
44х2 шт.
45х2 шт.

13

18 этап

Произведите установку 2-х ограждений

Перед установкой ограждений рекомендуется снять матрас (П)


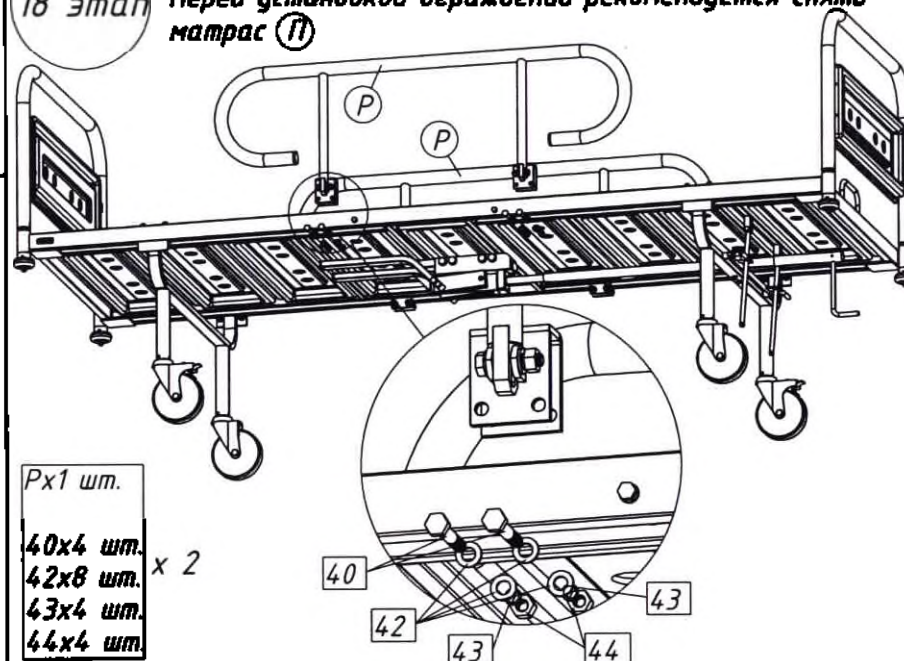


Схема установки бокового ограждения

Рх2 шт.

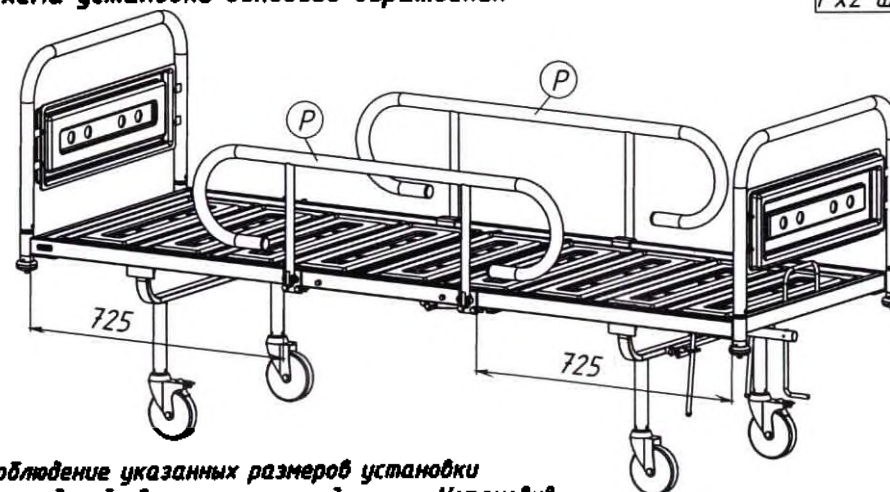

Соблюдение указанных размеров установки ограждений являются рекомендуемыми. Установив ограждения на изделие, затяните гайки ключами в виде торцевых головок до ощутимого сопротивления

14

ОМ 29.816.00 Схема сборки и установки принадлежности:
штатив для вливаний

Детали

№	Наименование	Кол-во
Т	Стойка штатива	1
У	Держатель нижний	3
Ф	Держатель верхний	3
Х	Втулка держателя	2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
46	1	Фиксатор выдвижной части штатива	
47	1	Прокладка фиксатора	
48	2	Винт М5х35	
49	10	Шайба 5	
50	8	Шайба-гровер 5	
51	8	Гайка М5	
52	4	Крепление штатива	



Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

15

Произведите сборку штатива для вливаний

19 этап

Тх1 шт.
46х1 шт.
47х1 шт.

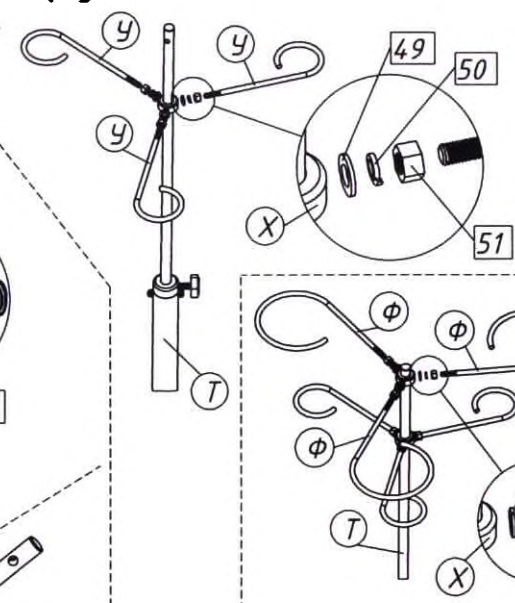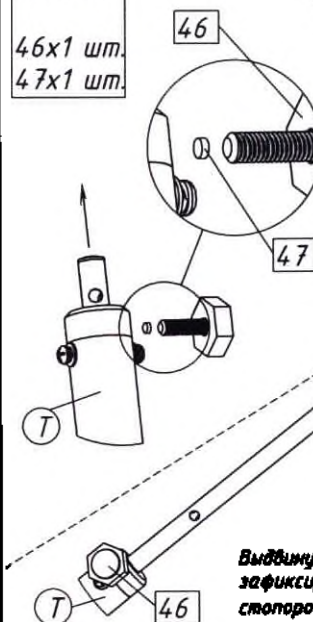

Тх1 шт.
Ух3 шт.
Фх3 шт.
Хх2 шт.

49х6 шт.
50х6 шт.
51х6 шт.


Вкрутите держатели нижние (У) и верхние (Ф) в резьбовые отверстия на втулках (Х). Зафиксируйте гайками (51), предварительно накрутив их на каждый держатель.

Выдвинув штатив, зафиксируйте его стопором (46)

20 этап


Установите штатив, закрепив его на спинке кровати при помощи 4-х креплений (52)

48х2 шт.
49х4 шт.
50х2 шт.
51х2 шт.
52х4 шт.

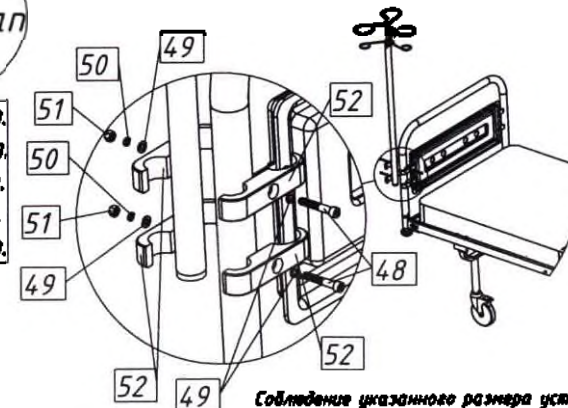

Соблюдение указанного размера установки штатива является обязательным. Установив штатив, затяните гайки ключами в виде торцевых головок до ощутимого сопротивления

Схема установки штатива для вливаний

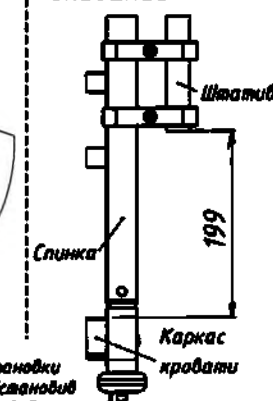

16


ОМ 29.816.00 *Схема сборки и установки принадлежности:
штанга для подтягивания*

Детали

№	Наименование	Кол-во
Ц	Основание штанги	1
Ч	Стойка штанги	1
Ш	Скоба ручной опоры	1
Щ	Ручка	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
55	2	Винт М6х12	
56	1	Ремень с фиксатором	

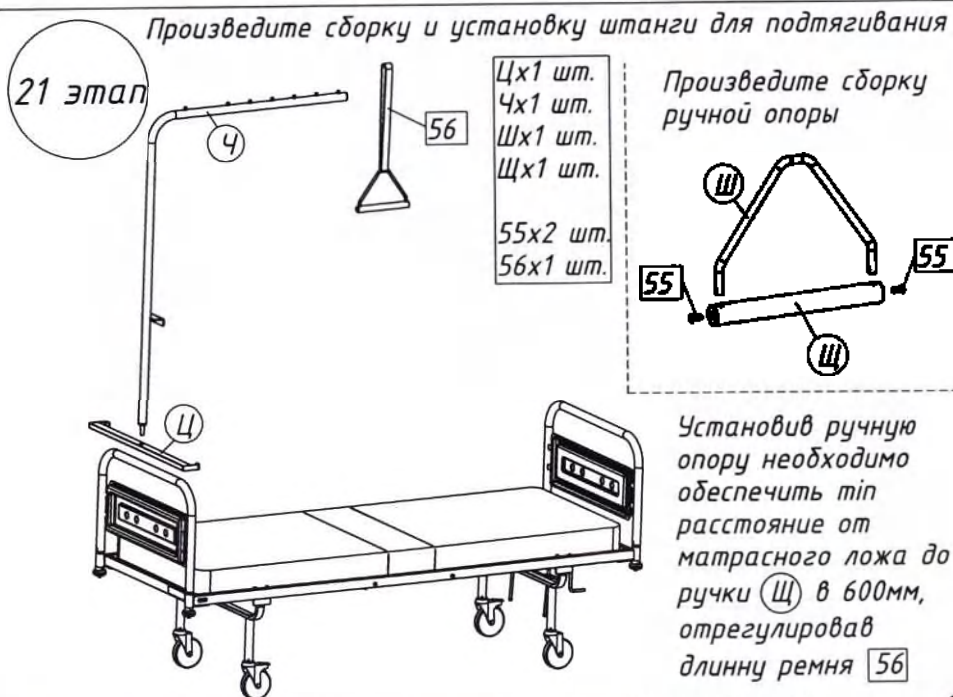

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)


*Схема сборки и установки принадлежности:
рама Балканского*

Детали

№	Наименование	Кол-во
Ш	Скоба ручной опоры	1
Щ	Ручка	1
Ы	Основание рамы Балканского	2
Э	Стойка рамы Балканского	2
Ю	Переключатель рамы Балканского	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
55	2	Винт М6х12	
56	1	Ремень с фиксатором	
57	4	Болт М6х40	
58	4	Шайба 6	
59	4	Шайба-гровер 6	
60	4	Гайка-бочонок	

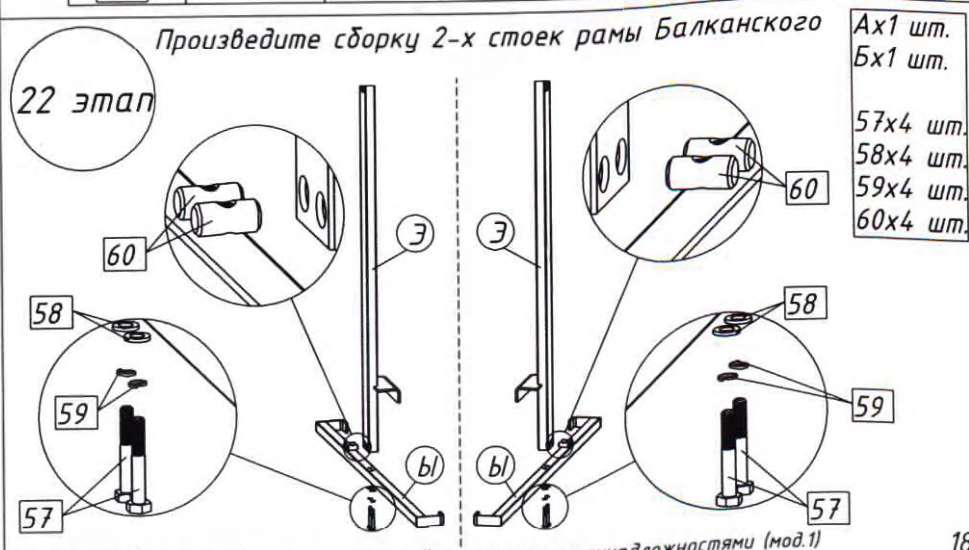

17 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

18


ОМ 29.816.00 Произведите установку рамы Балканского

23 этап

Произведите сборку
ручной опоры,
согласно инструкции
по сборке (2) этап

3x2 шт.
10x1 шт.

Установив ручную
опору необходимо
обеспечить тп
расстояние от
матрасного ложа до
ручки (Ш) в 600мм,
отрегулировав
длину ремня [56]

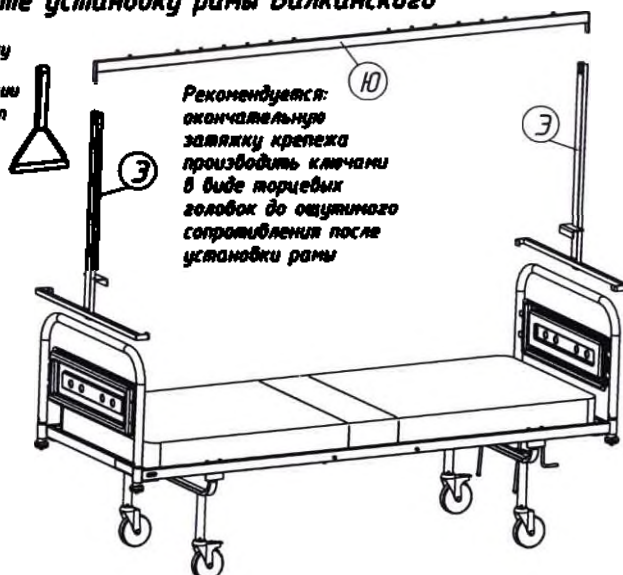

Рекомендуется:
окончательная
затяжку крепежа
производить ключами
в виде торцевых
головок до ощутимого
сопротивления после
установки рамы

24 этап

Схема сборки и установки принадлежности:
подставка для судна

Детали

№	Наименование	Кол-во
AA	Основание подставки судна	1
BB	Держатель подставки судна	1
BB	Втулка держателя подставки судна	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
61	1	Болт М8х65	
62	1	Болт М8х25	
63	3	Шайба 8	
64	2	Шайба-гровер 8	
65	1	Гайка М8	
66	3	Заглушки пластиковые	


Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

Произведите сборку подставки для судна

25 этап

AAx1 шт.
BBx1 шт.
BBx1 шт.

1x1 шт.
2x1 шт.
3x2 шт.
4x1 шт.

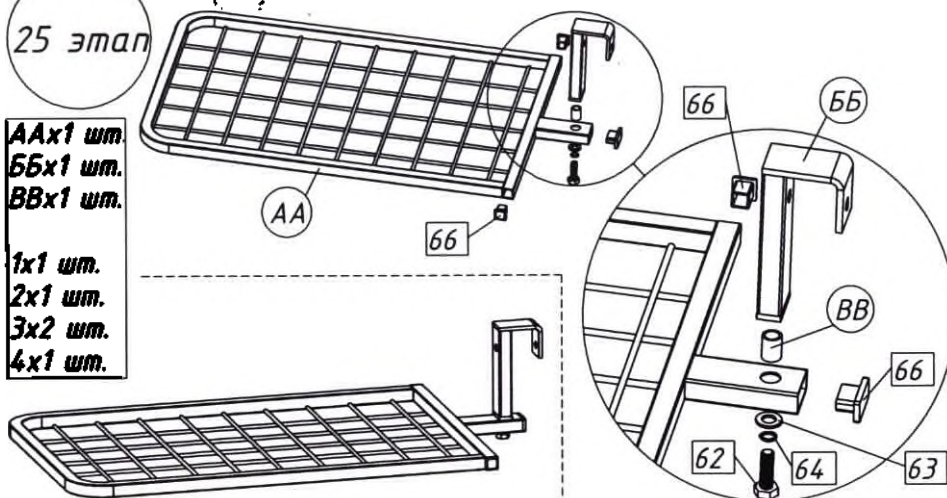

26 этап

Произведите установку подставки для судна



Место установки подставки для
судна обозначенное на схеме
является рекомендуемым. Установив
подставку для судна на изделие,
затяните гайку ключами в виде
торцевых головок до ощутимого
сопротивления

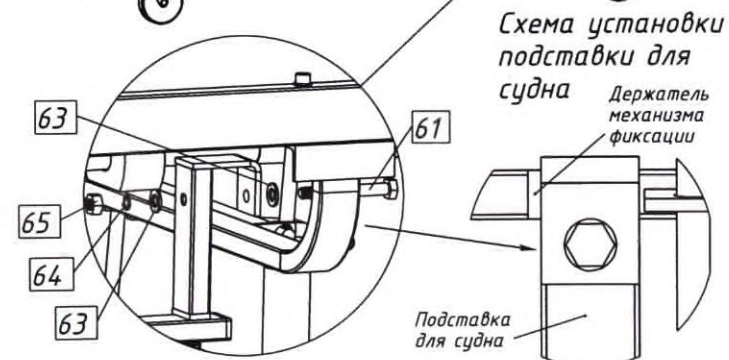


Схема установки
подставки для
судна

Держатель
механизма
фиксации

Подставка
для судна

19 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная с принадлежностями (мод.1)

20

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 10 листа(ов).

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.

2021




ОМ 29.818.00

Инструкция по сборке изделия

Кровати медицинские функциональные по ГИКС.942810.108ТУ

Кровать медицинская функциональная
трёхсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

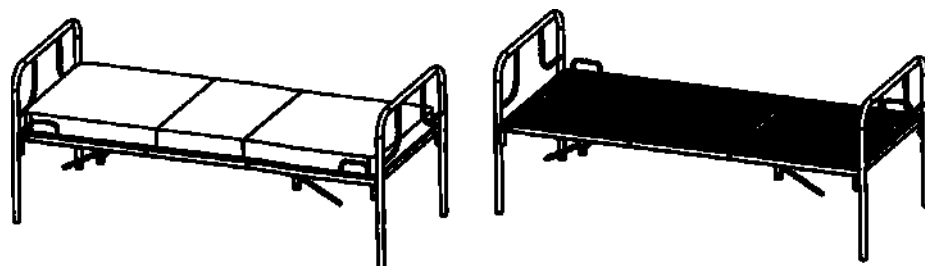

☐ Код товара 00000000

☐ Код товара 00000000

Условные обозначения:

1. А-Е : детали и сборочные единицы

2. [1] - [14] : крепёж и фурнитура

3. (1) - (9) : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Ложё	1
Б	Спинка/опора	2
В	Стопор механизма фиксации	4
Г	Механизм фиксации	2
Д	Ручка спинной/тазобедренной секций	4
Е*	Матрас	1

*Деталь входит в комплект поставки только для кода товара:
00000000

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться
от поставляемых в действительности

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1]	4	Болт М6х35	
[2]	8	Болт М6х25	
[3]	16	Шайба 6	
[4]	12	Шайба-гровер 6	
[5]	4	Гайка М6	
[6]	4	Винт М4х25	
[7]	8	Шайба 4	
[8]	4	Шайба-гровер 4	
[9]	4	Гайка М4	
[10]	4	Винт М3х16	
[11]	8	Шайба 3	
[12]	4	Шайба-гровер 3	
[13]	4	Гайка М3	
[14]	16	Заглушки пластиковые	
[15]	1	Логотип компании	

1 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2


2

ОМ 29.818.00

Схема сборки изделия

1 этап

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия

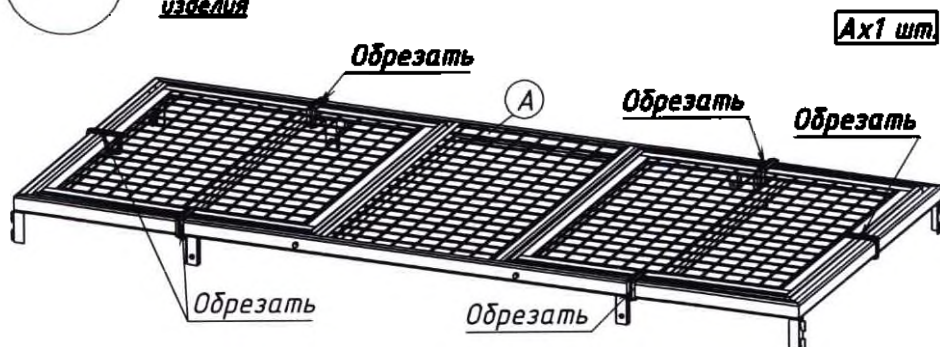


Распаковав ложе кровати (А), поставьте его на горизонтальную поверхность (как показано на рисунке) и обрежьте стяжки, освободив спинную секцию для дальнейшей сборки

2 этап

Произведите установку заглушек на каркас кровати, ручек и заглушек на спинную/тазобедренную секции

Дх2 шт.
2х4 шт.
3х4 шт. x 2
4х4 шт.
14х6 шт.

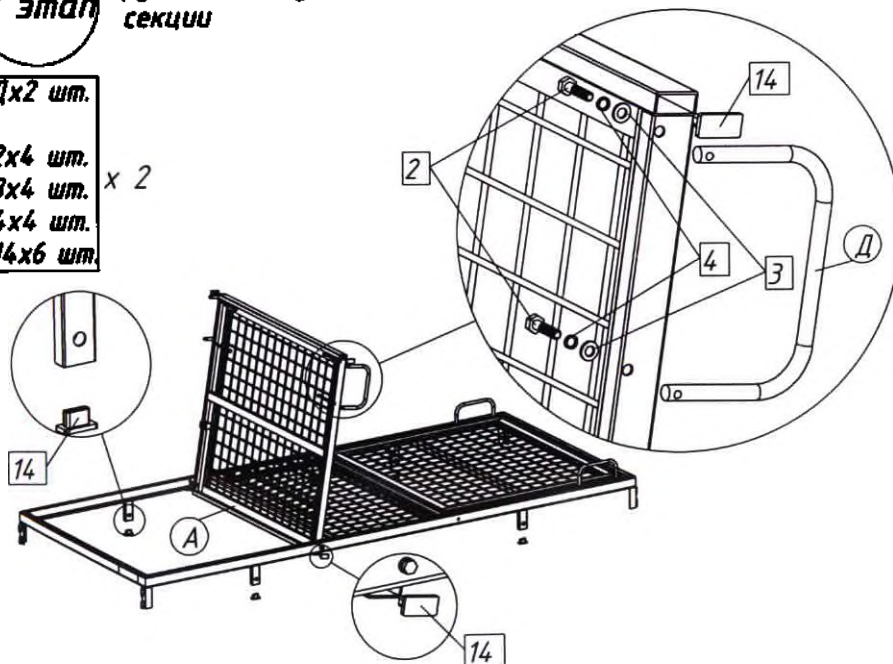

3 этап

Произведите установку механизмов фиксации в отверстия на ложе кровати


Гх1 шт.



4 этап

Зафиксируйте механизмы фиксации


10х2 шт.
11х4 шт.
12х2 шт. x 2
13х2 шт.

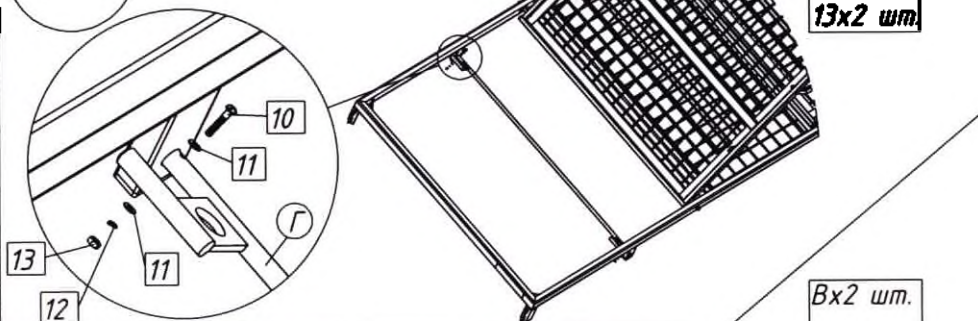

5 этап

Установите 4 стопора механизма фиксации

Вх2 шт.
1х2 шт.
3х4 шт. x 2
4х2 шт.
5х2 шт.
14х2 шт.

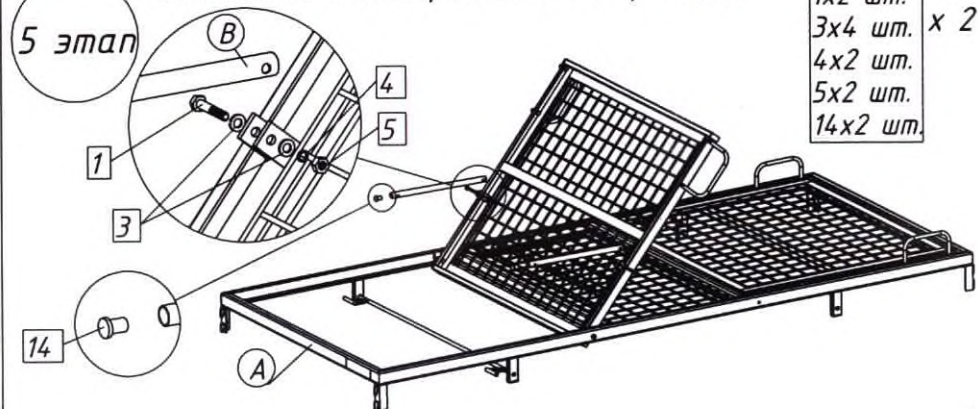


Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

3 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

4


ОМ 29.818.00 Опуская спинную/тазобедренную секции, вставьте стопоры в отверстия каждого установленного механизма фиксации

6 этап

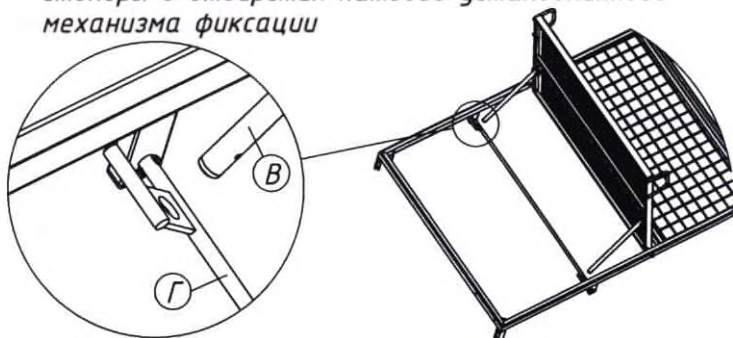

7 этап

Произведите установку фиксирующих винтов на 4 стопора механизма фиксации

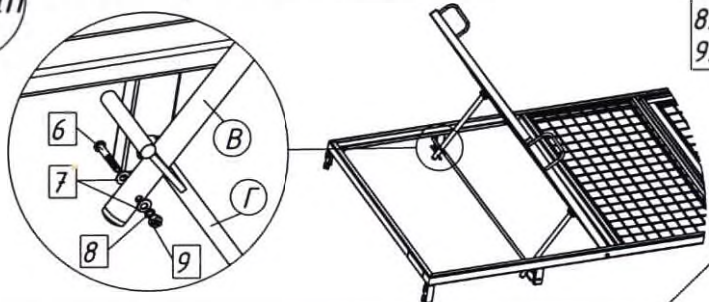

6x2 шт.
7x4 шт.
8x2 шт.
9x2 шт.

x 2

8 этап

Произведите сборку 2-х спинок и фиксацию ложа кровати



6x2 шт.
14x4 шт.

Для фиксации необходимо: вставить крючки ложа в имеющиеся пазы на спинках и надавить на каждый угол ложа.

После этого жёсткая фиксация завершена.



Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

9 этап

После сборки изделия произведите установку логотипа компании 15

Ex1 шт.

15x1 шт.

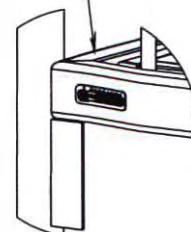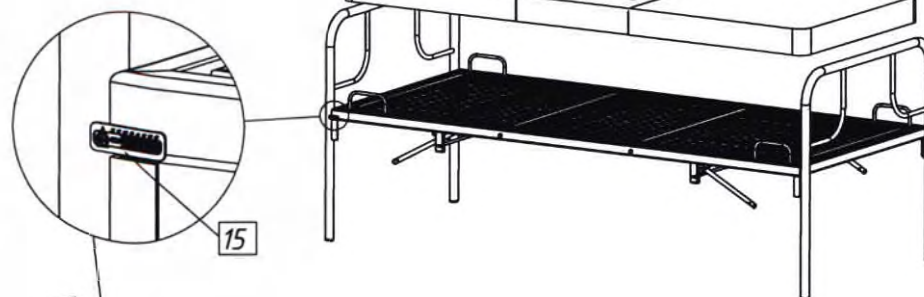


Логотип компании 15 должен располагаться рядом с этикеткой о наименовании изделия. Схема расположения указана на рисунке



Этикетка наименование изделия

Собранное изделие

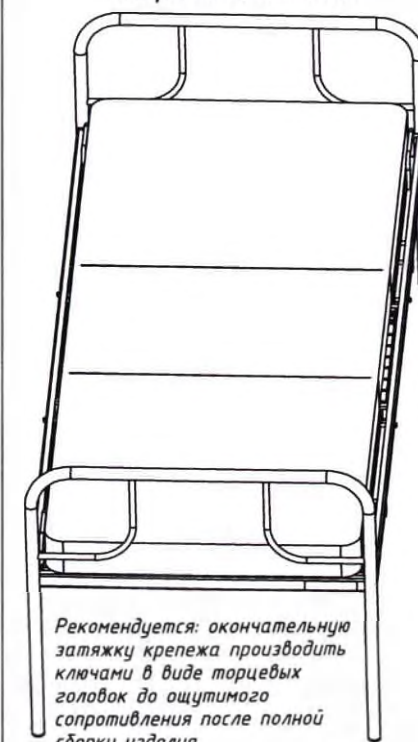

Рекомендуется: окончательную затяжку крепежа производить ключами в виде торцевых головок до ощутимого сопротивления после полной сборки изделия

После полной сборки изделия положите на ложе матрас (E), если он предусмотрен вариантом поставки.

5 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

6

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 5 листа(ов).

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.

10 20 21





ОМ 29.820.00

Инструкция по сборке изделия

Кровати медицинские функциональные по ГИКС.942810.108 ТУ

Кровать медицинская функциональная
трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2

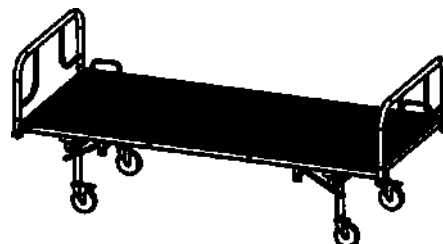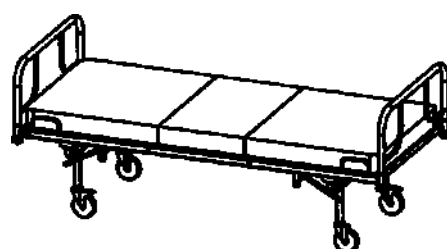

☐ Код товара 00000000

☐ Код товара 00000000

Условные обозначения:

1. А-Ж : детали и сборочные единицы

2. [1] - [21] : крепёж и фурнитура

3. (1) - (11) : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Ложе	1
Б	Спинка	2
В	Стопор механизма фиксации	4
Г	Механизм фиксации	2
Д	Ручка спинной/тазобедренной секций	4
Е	Труба колёсной опоры	2
Ж*	Матрас	1

*Деталь входит в комплект поставки только для кода товара: 00000000

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Болт М12х30	
2	4	Болт М6х35	
3	4	Винт М6х30	
4	8	Болт М6х25	
5	8	Болт М6х14	
6	36	Шайба 6	
7	24	Шайба-гровер 6	
8	4	Шайба-гровер 12	
9	12	Гайка М6	
10	4	Винт М4х25	
11	8	Шайба 4	
12	4	Шайба-гровер 4	
13	4	Гайка М4	
14	4	Винт М3х16	
15	8	Шайба 3	
16	4	Шайба-гровер 3	
17	4	Гайка М3	
18	4	Отбойник	
19	4	Гайка спинки	
20	4	Колёсная опора	
21	12	Заглушки пластиковые	
22	1	Логотип компании	

1 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2

2

ОМ 29.820.00





Схема сборки изделия

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия

1 этап

Произведите сборку 2-х труб с колёсными опорами

Ex2 шт.

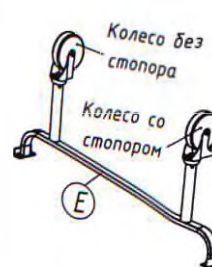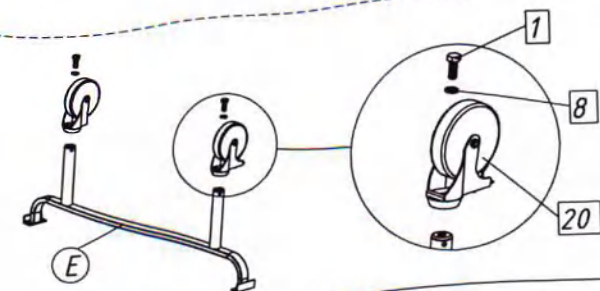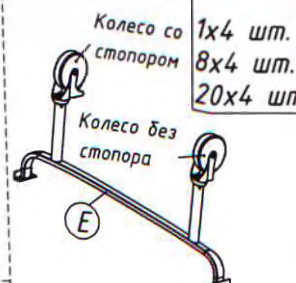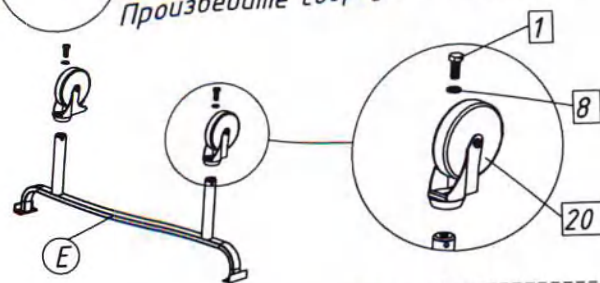


Произведите соединение колёсных опор с ложем кровати

2 этап

Ex2 шт.


5x8 шт.
6x16 шт.
7x8 шт.
9x8 шт.

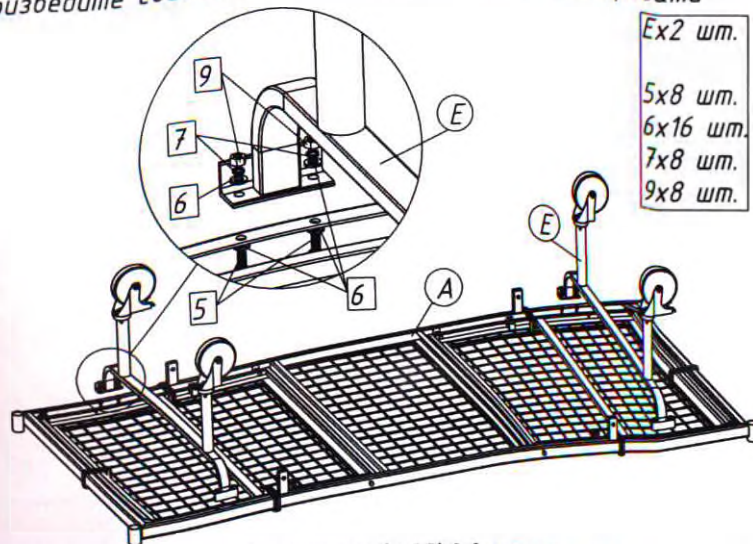

3 этап

Ax1 шт.

После фиксации колёсных опор с ложем кровати (А), поставьте изделие на горизонтальную поверхность (как показано на рисунке) и обрежьте стяжки, освободив спинную/тазобедренную секции для дальнейшей сборки

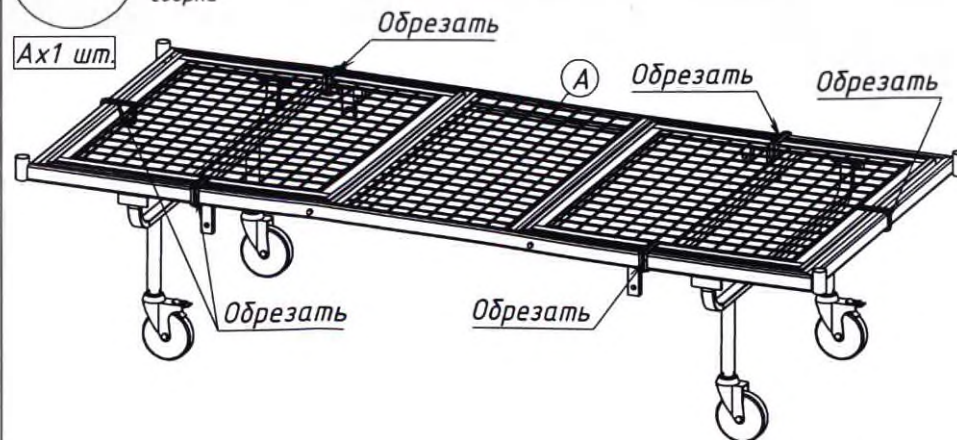


4 этап

Произведите установку заглушек на каркас кровати, ручек и заглушек на спинную/тазобедренную секции

Дx2 шт.

4x4 шт.
6x4 шт.
7x4 шт.
21x6 шт.

x 2

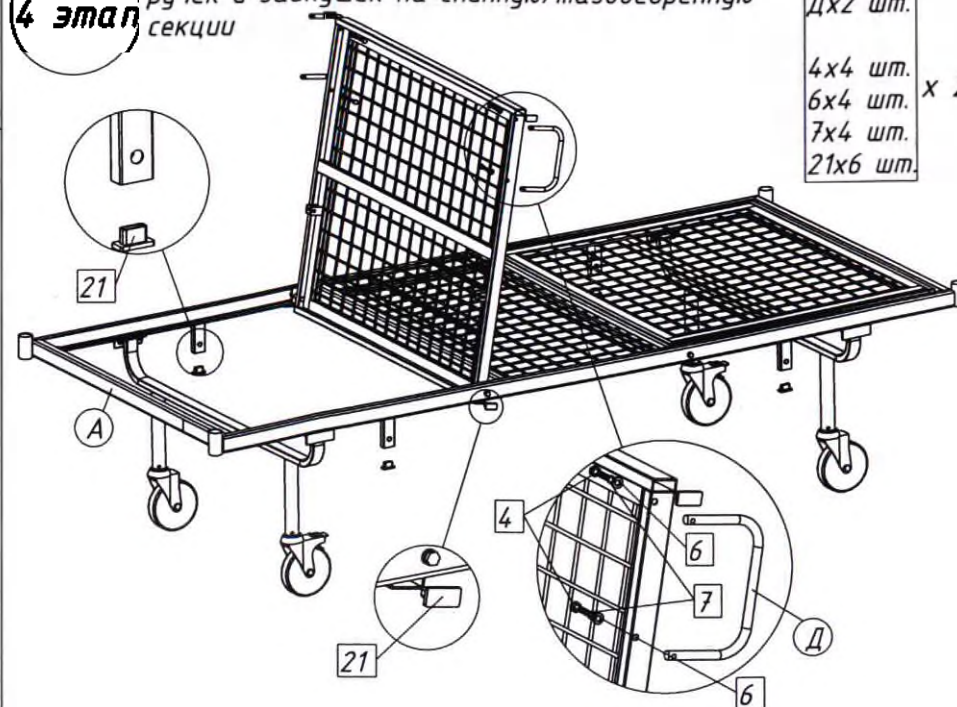

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2

3 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2

4

ОМ 29.820.00

Схема сборки изделия

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия

1 этап

Произведите сборку 2-х труб с колёсными опорами




Ех2 шт.

1х4 шт.
8х4 шт.
20х4 шт.

Колесо со стопором



Колесо без стопора

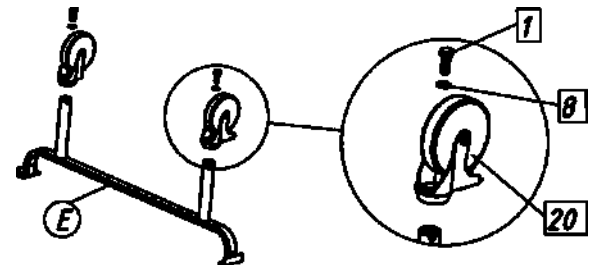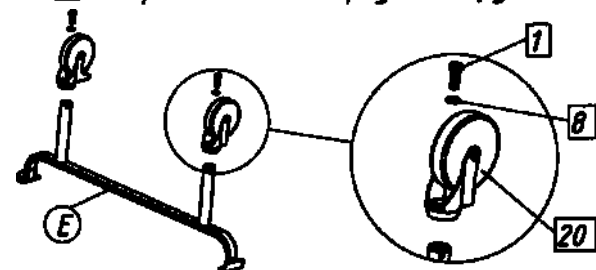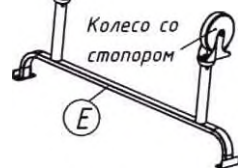


2 этап

Произведите соединение колёсных опор с ложем кровати

Ех2 шт.

5х8 шт.
6х16 шт.
7х8 шт.
9х8 шт.

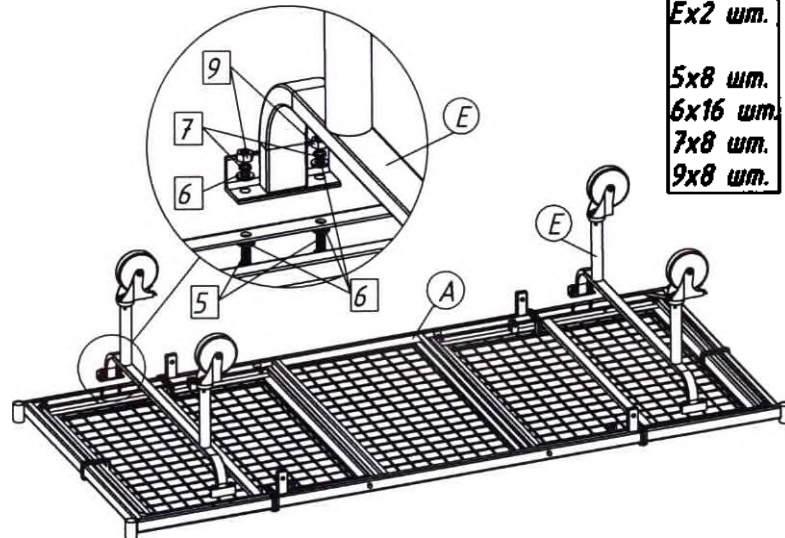

3 этап


После фиксации колёсных опор с ложем кровати (А), поставьте изделие на горизонтальную поверхность (как показано на рисунке) и обрежьте стяжки, освободив спинную/тазобедренную секции для дальнейшей сборки

Ах1 шт.

Обрезать

Обрезать

Обрезать

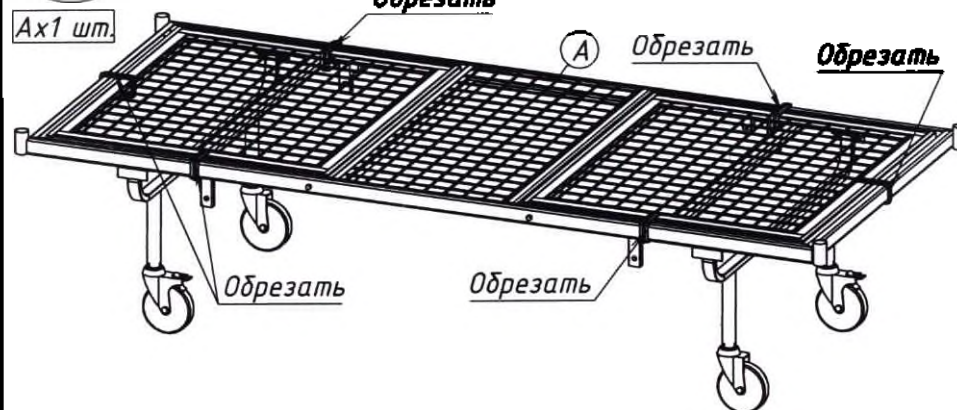


4 этап

Произведите установку заглушек на каркас кровати, ручек и заглушек на спинную/тазобедренную секции

Дх2 шт.

4х4 шт.
6х4 шт.
7х4 шт.
21х6 шт.

х 2

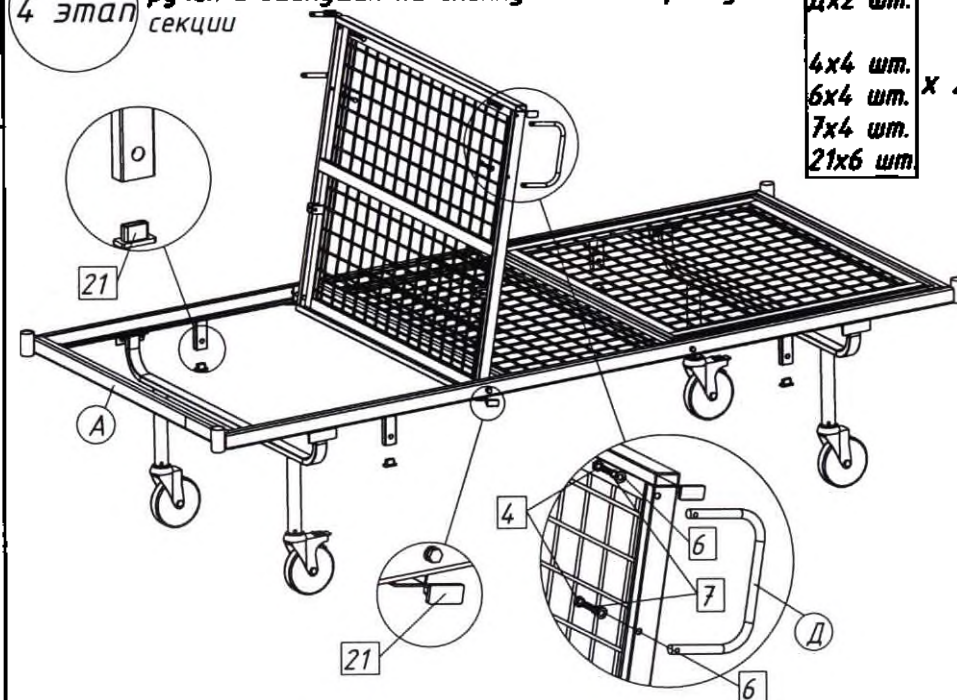

Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2


3 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2

4

ОМ 29.820.00 Произведите установку механизмов фиксации
в отверстия на ложе кровати

5 этап

Гх1 шт.

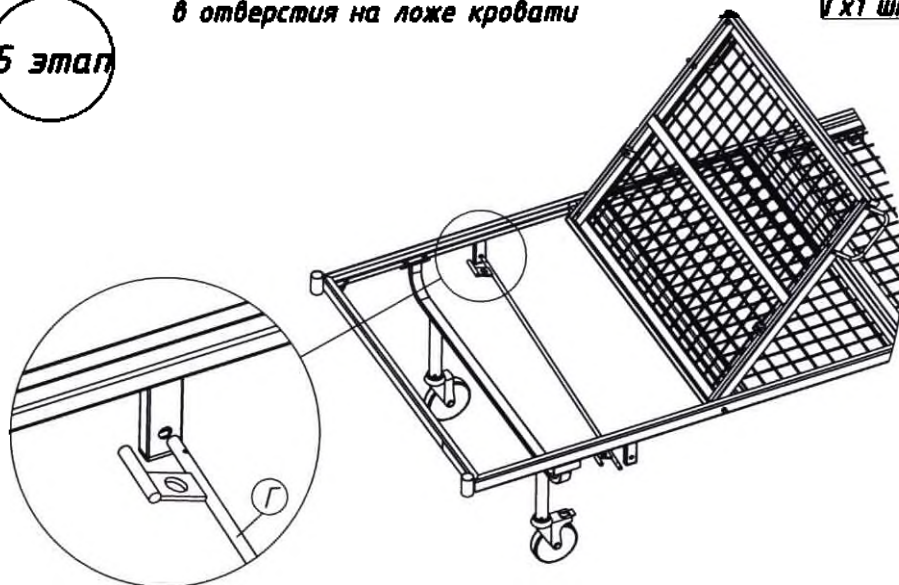

Установите 4 стопора механизма фиксации

7 этап

Вх2 шт.


2х2 шт.

6х4 шт. x 2

7х2 шт.

9х2 шт.

21х2 шт.

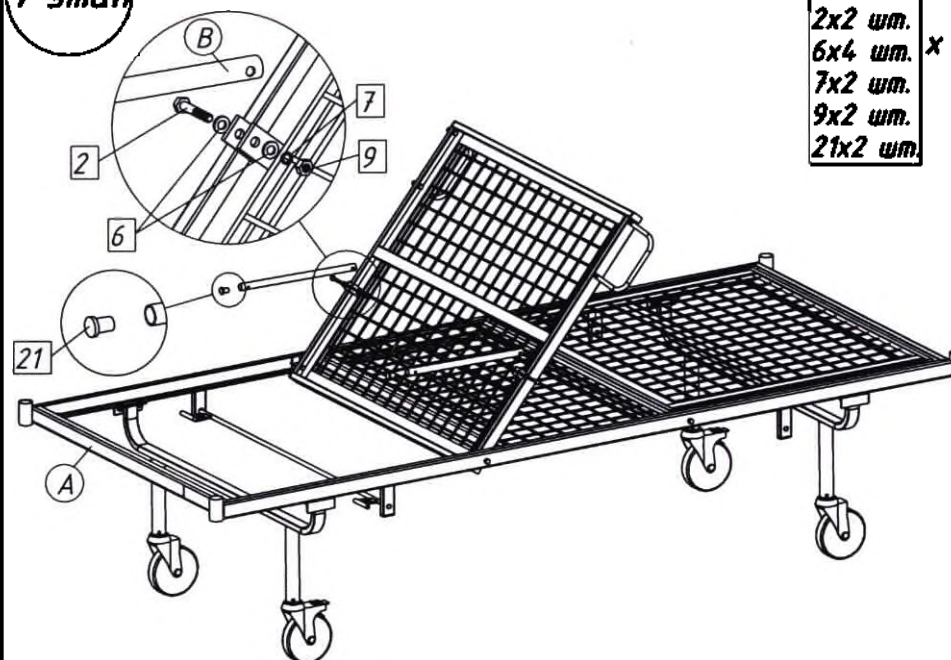

Зафиксируйте механизмы фиксации

6 этап



14х2 шт.

15х4 шт.

16х2 шт.

17х2 шт.

x 2

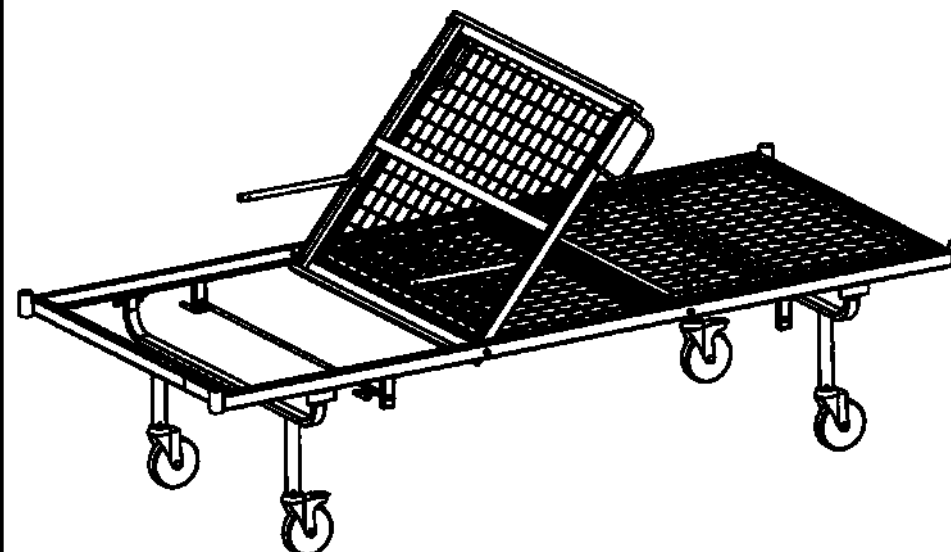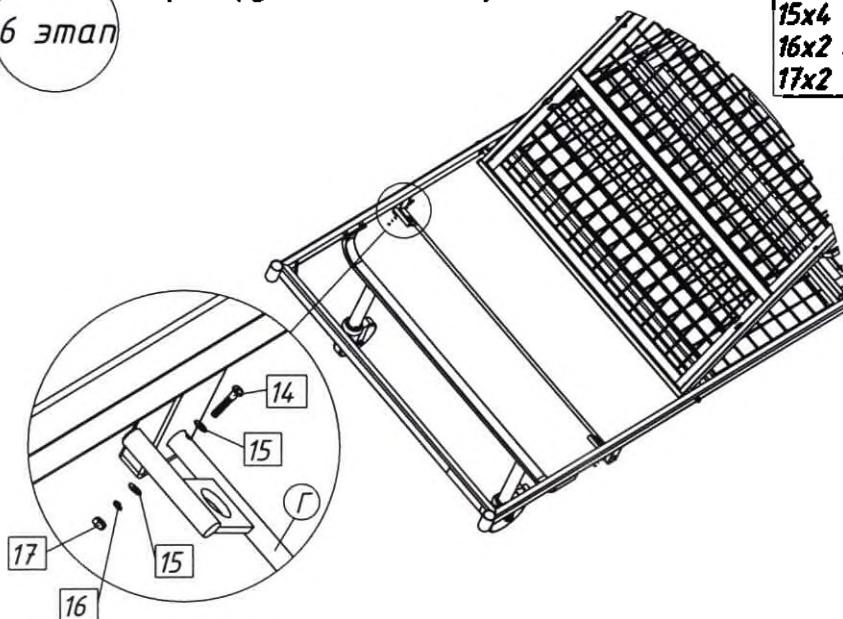


Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2

5 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2

6


ОМ 29.820.00 Опуская спинную/тазобедренную секции, вставьте стопоры в отверстия каждого установленного механизма фиксации

8 этап

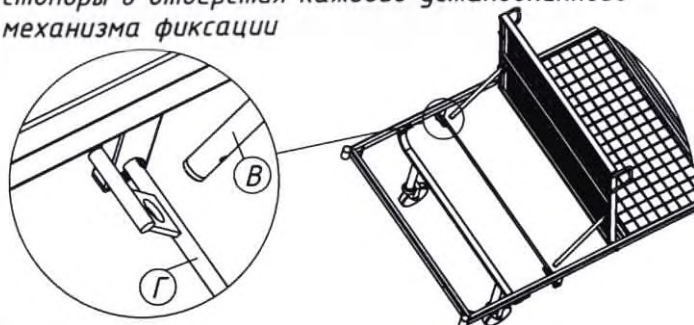


Произведите установку фиксирующих винтов на 4 стопора механизма фиксации

9 этап

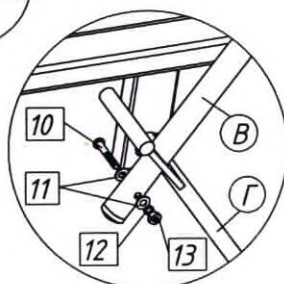


10x2 шт.
11x2 шт.
12x2 шт.
13x2 шт. x 2

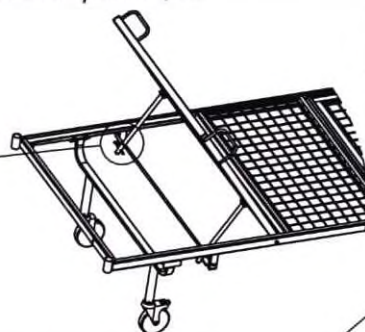

Произведите установку 2-х спинок

10 этап

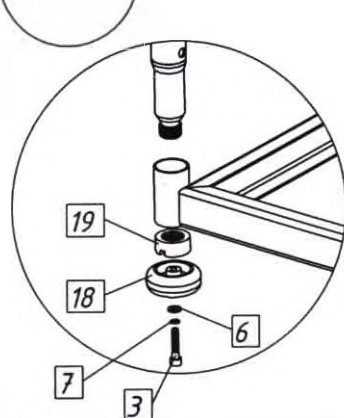

Бx2 шт.
3x4 шт.
6x4 шт.
7x4 шт.
18x4 шт.
19x4 шт.





Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2


После сборки изделия произведите установку логотипа компании 22

11 этап

Жx1 шт.
22x1 шт.

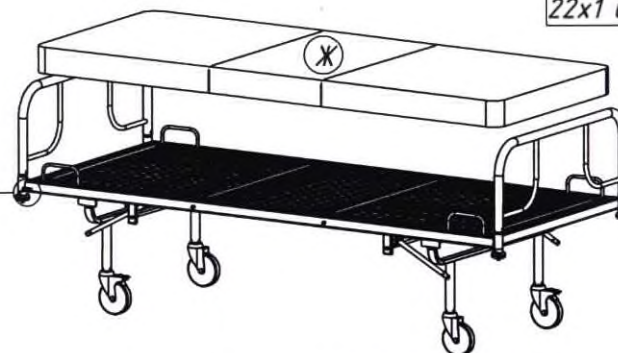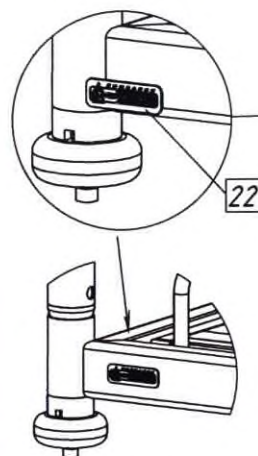

Собранное изделие

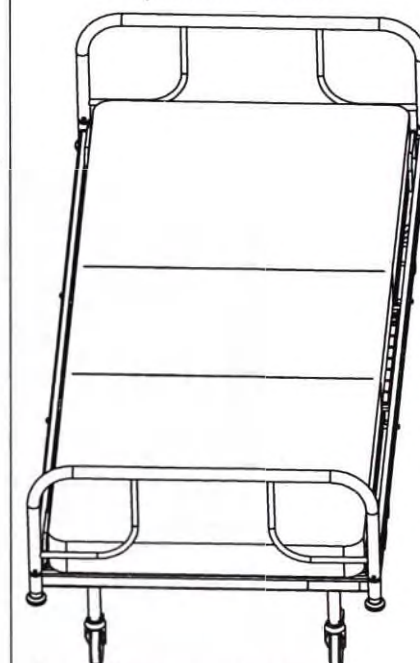

Рекомендуется: окончательную затяжку крепежа производить ключами в виде торцевых головок до ощутимого сопротивления после полной сборки изделия

После полной сборки изделия положите на ложе матрас (Ж), если он предусмотрен вариантом поставки.

7 Кровать медицинская функциональная трёхсекционная (мод.3) в вариантах поставки 1, 2

8

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 4 листа(ов).

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.

10 2021

