

Инструкция по применению

1. Наименование медицинского изделия:

КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ ОДНОРАЗОВОЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ по ТУ 32.50.50 – 002 – 48673352–2020 (далее – комплект)

2. **Производитель:** АО «Азнакай киёмнэре», 423332, Россия, Республика Татарстан, район Азнакаевский, г. Азнакаево, ул. Г. Хасаншиной, д.16, тел./факс 8(85592) 7-74-84, 7-79-79, e-mail: fabrica22@mail.ru


3. **Потенциальный потребитель:** медицинский персонал при выполнении противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ.

4. **Назначение:** Комплект предназначен для использования в качестве защитной одежды медицинского персонала при выполнении противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ.

5. **Показания к применению:** Комплект используют для обеспечения охраны здоровья медицинского персонала путем создания барьера, препятствующего распространению и передачи инфекции.

6. **Противопоказания и/или возможные побочные воздействия**
Аллергическая реакция на материалы.

7. **Технические характеристики медицинского изделия**

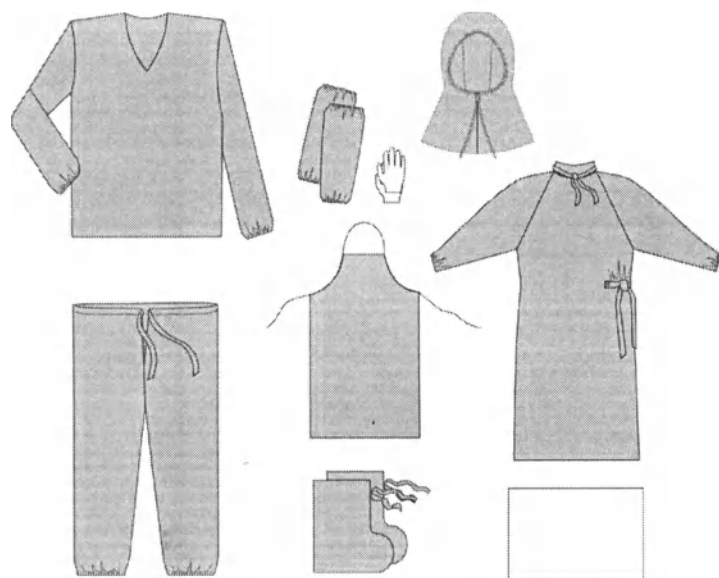

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АО «АЗНАКАЙ КИЕМНЭРЕ»

Б. АЗГЕТДИНОВ

ЗАВЕЩЕНИЕ

Состав комплекта:

- брюки – 1 шт.;
 - куртка – 1 шт.;
 - бахилы хирургические высокие – 1 пара;
 - нарукавники – 1 пара;
 - шлем с пелериной – 1 шт.;
 - халат – 1 шт.;
 - фартук – 1 шт.;
 - перчатки латексные – 2 пары;
 - салфетка одноразовая – 1 шт.;
 - инструкция по применению – вкладыш – 1 шт.
- Цвет комплекта: голубой.



Рисунок 1 – Комплект одежды одноразовой нестерильный по ТУ 32.50.50 – 002 – 48673352–2020

Брюки прямые длинные, в области талии собраны на тесьму, продетую в кулиску на поясе; низ брюк стянут резинкой. Размер брюк 50 – 52. Длина брюк по боковой линии – $113,0 \pm 2,0$ см. Для изготовления брюк используют нетканый трехслойный материал СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд) поверхностной плотностью 35 г/м^2 , резинку вязаную, нитки по ГОСТ 6309.

Куртка прямого силуэта с длинными втачными рукавами, с V-образным вырезом горловины. Низ рукавов стянут эластичной тесьмой. Размер куртки 50 – 52. Длина куртки по спинке (от края середины горловины спинки до низа) – $77,0 \pm 2,0$ см. Для изготовления куртки используют нетканый трехслойный материал СМС поверхностной плотностью 35 г/м^2 , резинку вязаную, нитки по ГОСТ 6309.

Халат прямого силуэта, с длинными рукавами, с запахом по спинке, длиной $140,0 \pm 2,0$ см в готовом виде. Перед халата цельнокроеный со спинками, без боковых швов. Низ рукавов стянут эластичной тесьмой. По среднему срезу спинок на линии талии закреплены отлетные завязки пояса. Пояс фиксируется сбоку халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками (длиной 40 см), левая завязка продергивается через петлю на правой стороне стойки, и завязываются спереди по стойке. Размер халата 50 – 52. Для изготовления халата используют нетканый трехслойный материал СМС поверхностной плотностью 50 г/м^2 , нетканый трехслойный материал СМС поверхностной плотностью 35 г/м^2 (для завязок), резинку вязаную, нитки по ГОСТ 6309.

Шлем с пелериной на завязках, с кулиской по лицевому срезу. Для изготовления шлема используют нетканый трехслойный материал СМС поверхностной плотностью 50 г/м^2 , нетканый трехслойный материал СМС поверхностной плотностью 35 г/м^2 (для завязок), нитки по ГОСТ 6309.

Бахилы хирургические высокие на завязках. Высота бахил $37,0 \pm 1,0$ см. Для изготовления бахил используют нетканый ламинированный материал поверхностной плотностью 50 г/м^2 , нетканый трехслойный материал СМС поверхностной плотностью 35 г/м^2 (для завязок), нитки по ГОСТ 6309.

Нарукавники стянутые резинкой вязаной по верхнему и нижнему срезам. Длина нарукавников $48,0 \pm 2$ см. Для изготовления нарукавников используют нетканый трехслойный материал СМС поверхностной плотностью 50 г/м^2 , резинку вязаную, нитки по ГОСТ 6309.

Фартук с цельнокроеным нагрудником, завязками. Длина фартука $120,0 \pm 2,0$ см. Для изготовления фартука используют нетканый ламинированный материал поверхностной плотностью 50 г/м^2 , нетканый трехслойный материал СМС поверхностной плотностью 35 г/м^2 (для завязок), нитки по ГОСТ 6309.

Перчатки латексные медицинские одноразовые.

Салфетка одноразовая из спанлейса (вискоза+полиэфир). Размер салфетки $45,0 \times 90,0$ см.

8. Указания по применению

1) Проверьте срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности комплект не пригоден к применению.

2) Не допускается использование комплекта при наличии механических повреждений.

3) Комплект нестерильный одноразового применения.

9. Условия эксплуатации

Температура: от 1°C до 40°C.

Влажность: 80% при 25°C.

10. Порядок использования медицинского изделия

Необходимо вскрыть упаковку и надеть комплект.

1. Порядок надевания комплекта.

Все составляющие надеваются тщательно, не спеша, чтобы во время работы не поправлять части комплекта, соблюдая последовательность: брюки, куртка, бахилы, шлем, халат. Шлем должен плотно прилегать к лицу и шее. Перчатки проверяются на целостность и надеваются поверх рукавов халата. В последнюю очередь надеваются нарукавники и фартук. За пояс фартука с правой стороны закладывают салфетку.

2. Порядок снятия комплекта.

Комплект после работы снимают в специально выделенном для этого помещении. Перед снятием комплекта руки в перчатках погружают в дезинфицирующий раствор на 1-2 минуты. Все части комплекта снимаются медленно, без рывков, в строгом порядке, выворачивая инфицированную поверхность внутрь. После снятия каждой части руки в перчатках погружаются в раствор. Вынимают салфетку, снимают фартук, нарукавники и вторую пару перчаток, развязывают пояс халата, и, опустив верхний край перчаток, скрещенными руками за плечи снимают халат, одновременно выворачивая его, заворачивая наружную его часть внутрь, развязывают завязки шлема и снимают его двумя руками, выворачивая наружной поверхностью внутрь. Снимают бахилы, снимают перчатки, выворачивая и проверяя их на целостность, затем обеззараживают руки дез. раствором. Остальные предметы снимают в сан. пропускнике, где принимают душ и надевают свою одежду.

ВАЖНО! Не используйте вторично одноразовый комплект.

11. Условия стерилизации

Комплект поставляется в нестерильном виде.

12. Техническое обслуживание и текущий ремонт

Комплект является одноразовым медицинским изделием, ремонту и техническому обслуживанию не подлежит.

13. Упаковка

Комплекты в герметично заклеенных пакетах упаковывают в транспортную упаковку (коробку из гофрированного картона).

14. Транспортирование и хранение

Упакованные комплекты транспортируют в транспортной упаковке транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Хранение комплекта должно осуществляться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

15. Сведения об утилизации

Использованный по назначению комплект утилизируется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Комплект, не использованный по назначению, а также с истекшим сроком годности и/или с поврежденной упаковкой, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

16. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 32.50.50-002-48673352-2020 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок годности – 3 года с даты производства.

17. Контактная информация

По вопросам качества медицинского изделия «Комплект одежды одноразовой нестерильный по ТУ 32.50.50-002-48673352-2020», производства АО «Азнакай киёмнэре», обращаться по адресу:

423332, Россия, Республика Татарстан, район Азнакаевский, г. Азнакаево, ул. Г. Хасаншиной, д.16

Тел./факс: 8(85592) 7-74-84, 7-79-79, e-mail: fabrica22@mail.ru

18. Знаки



Держать вдали от источников тепла



Запрет на повторное применение



Беречь от влаги



Не стерильно

19. Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АЗНАКАЙ КИЕМНЭРЕ»
Б. АЗГЕТДИНОВ Р. Ф.

ЗАВЕЩЕНО
22 11 2021
АЗНАКАЙ КИЕМНЭРЕ