



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО Лаборатория «Биоритм»

Пашкевич К.И.

2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия

Лубрикант О'кей® плюс по ТУ 21.20.23-001-25074123-2020

Регистрационное удостоверение: № РЗН /4131 от _____ года

Назначение изделия:

Лубрикант предназначен для предупреждения повреждений слизистой оболочки влагалища в ходе полового акта путем создания на поверхности слизистой оболочки влагалища, смазывающего слоя, обеспечивающего увлажнение и скольжение.

Описание и принцип действия

Изделие представляет собой лубрикант (гелеобразная масса без цвета и запаха) упакованный в тубу, укупоренную резьбовым бушоном с крышкой. Лубрикант нейтрален и безопасен, хорошо переносится слизистой, не содержит жиров, легко смывается водой, совместим с презервативами из натурального латекса и синтетических материалов.

Эффективность изделия обусловлена его характеристиками и свойствами материалов, входящих в состав изделия.

Состав лубриканта: вода очищенная, гидроксипропилцеллюлоза, глицерин, полиэтиленгликоль, аллантоин, консервант (хлоргексидина биглюконат).

Входящий в состав лубриканта загуститель (гидроксипропилцеллюлоза) образует пространственную сетку, которая связывает воду с растворенными в ней водоудерживающими ингредиентами (полиэтиленгликоль, глицерин), аллантоин оказывает смягчающее и увлажняющее действие.

Консервант подавляет рост и развитие микроорганизмов в лубриканте на протяжении всего срока годности изделия.

Туба эффективно защищает лубрикант от внешней среды при транспортировке и хранении.

Лубрикант создает на поверхности половых органов и слизистой влагалища равномерный слой, который смазывает и увлажняет половые органы и слизистую влагалища при половом акте, предотвращает микроповреждения половых органов при недостаточной естественной влажности слизистой влагалища. Вязкоупругие свойства лубриканта снижают трение, облегчают введение полового члена во влагалище.

Показания к применению:

Дискомфорт или болезненные ощущения в ходе полового акта связанные с сухостью влагалища или со сниженным образованием количества влагалищного секрета, что может быть связано с целым рядом причин:

- наступление менопаузы, изменение гормонального фона;
- приём оральных контрацептивов;
- стрессовые состояния;
- хронические заболевания (сахарный диабет, анемия);
- частые спринцевания;
- восстановление после терапии антибиотиками и противогрибковыми препаратами;
- после оперативных вмешательств (удаление яичников, матки);
- физиологические состояния, которые требуют дополнительного увлажнения.

Целесообразно применять лубрикант при проведении процедуры установки/введения терапевтических изделий (пессариев, вагинальных тренажеров и др.) во влагалище.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость ингредиентов лубриканта.

Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции, зуд влагалища, проходящие после прекращения использования лубриканта.

Предупреждения

В случае попадания лубриканта на слизистые оболочки глаза их следует быстро и тщательно промыть водой.

Не наносите лубрикант на поврежденную кожу.

Прекратите использование лубриканта при появлении раздражения.

Обратитесь к врачу, если раздражение продолжается.

Лубрикант не является контрацептивом и лекарственным средством.

Запрещается использовать лубрикант:

- хранящийся в тубе без колпачка;
- хранящийся в поврежденной тубе;
- через 6 месяцев после первого вскрытия тубы;


Храните изделие в местах недоступных для детей.

Способ применения

Лубрикант рекомендуется наносить после проведения водных гигиенических процедур.

Перед первым применением изделия в тубе открутите колпачок тубы (1), снимите защитную мембрану с горла тубы (2). Закрутите колпачок (3).

Откройте крышку колпачка и выдавите необходимое количество лубриканта. (4).

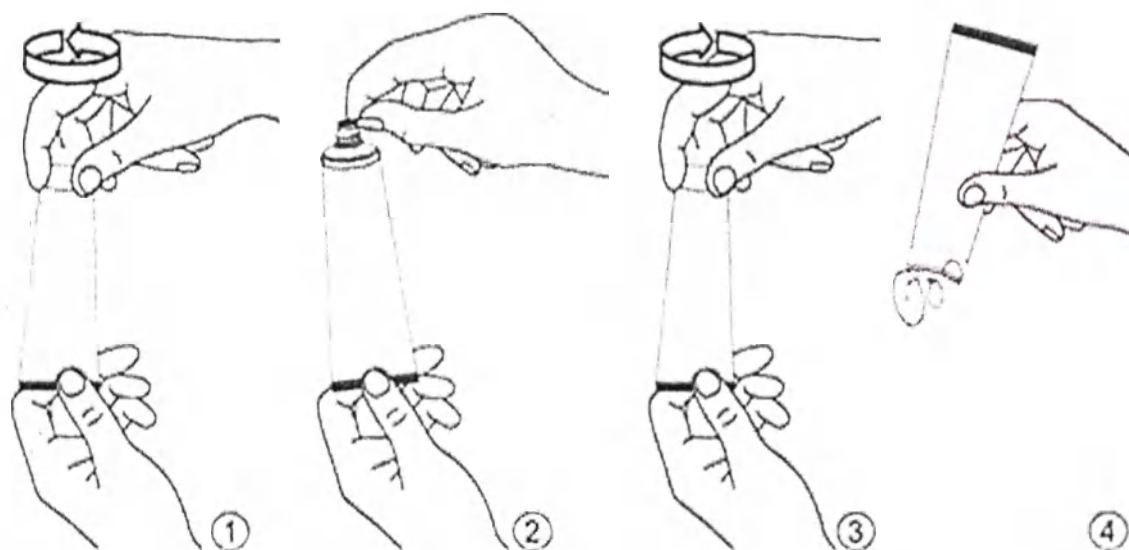

Нанесите лубрикант перед половым актом на преддверие влагалища, и/или на половой член партнера, и/или на используемый презерватив с внешней стороны.

Перед установкой/введением терапевтических изделий во влагалище нанесите необходимое количество лубриканта на наружные половые органы (половые губы, преддверие влагалища) и поверхность терапевтических изделий (пессариев, тренажеров вагинальных).

Извлеченный из тубы лубрикант применяется однократно.

Условия и особенности применения

Изделие отпускается без рецепта врача, применяется в домашних условиях и условиях лечебно-профилактических учреждений, согласно инструкции по применению.

Комплектность поставки изделия:

Туба, содержащая 50 г лубриканта, инструкция по применению, картонная пачка.

Срок годности - 24 месяца со дня изготовления (номер партии и годен до см. на шве тубы). После снятия защитной мембраны с колпачка тубы лубрикант можно использовать в течение 6 месяцев.

Условия транспортирования

Всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 25 °С до плюс 25 °С.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.


Инструкция по утилизации

В ЛПУ отходы изделия подлежат сбору, хранению и утилизации согласно действующего законодательства.

В домашних условиях отходы изделия подлежат утилизации в составе бытового мусора.

Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Символы на упаковке:

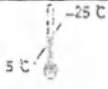Символ	Описание символа
	Символ указывает температурный диапазон, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	Символ указывает, что перед применением изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по применению
	Символы, содержат информацию для идентификации материалов тубы с бушоном, картонной пачки с целью их дальнейшей утилизации.
	Символ указывает срок хранения лубриканта в тубе после ее вскрытия – 6 месяцев

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью Лаборатория «Биоритм»
(ООО Лаборатория «Биоритм»)

Россия, 620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, соор. 19, офис 235

Тел. (343) 214-80-50

E-mail: info@bior.ru

печатью 4 листа(ов).

Директор

ООО Лаборатория «Биоритм»

Пашкевич Казимир Иосифович

2021 года

