

Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 19, оф. 235,
тел. +7 343 214-80-50, эл. почта: info@bior.ru

ИНН/КПП 6660067933/668601001 ОГРН 1026604952241

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО Лаборатория «Биоритм»
Пашкевич К.И.
«26» 07 2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия

Лубрикант увлажняющий Intim in the city classic
по ТУ 21.20.23-007-25074123-2020

Регистрационное удостоверение: № от

Назначение изделия

Лубрикант предназначен для нанесения на половые органы с целью их смазывания, увлажнения и устранения болезненных ощущений во время полового акта при недостаточной влажности слизистой влагалища или сухости влагалища.

Описание и принцип действия

Лубрикант представляет собой нестерильную водорастворимую прозрачную гелеобразную массу без цвета и запаха, которая упакована в тубу.

Эффективность изделия обусловлена его характеристиками и свойствами материалов, входящих в состав изделия.

Состав лубриканта: вода очищенная, глицерин, полиэтиленгликоль, гидроксипропилцеллюлоза, каррагинан, консервант.

Лубрикант состоит из увлажняющих и водоудерживающих ингредиентов (вода, глицерин, полиэтиленгликоль) и загустителей (гидроксипропилцеллюлоза, каррагинан), консервант (1,2-гександиол).

Загустители образуют пространственную сетку, которая связывает воду с растворенными в ней ингредиентами.

Консервант подавляет рост и развитие микроорганизмов в лубриканте на протяжении всего срока годности изделия.

Туба эффективно защищает лубрикант от внешней среды при транспортировке и хранении.

Лубрикант создает тонкий смазывающий слой между половыми органами во время полового акта, увлажняет и предотвращает микроразрывы половых органов при недостаточной естественной влажности влагалища. Вязко-упругие свойства лубриканта снижают трение, способствуют скольжению при половом акте.

В результате применения лубриканта улучшается качество интимной жизни женщины.

Показания к применению

Для увлажнения и смазывания слизистых оболочек влагалища в ходе полового акта.

Для устранения болезненных ощущений и дискомфорта во время полового акта у женщин со сниженным образованием количества влагалищного секрета, что может быть связано с целым рядом причин:

- наступление менопаузы, изменение гормонального фона;
- приём оральных контрацептивов;
- стрессовые состояния;
- хронические заболевания (сахарный диабет, анемия);
- частые спринцевания;
- восстановление после терапии антибиотиками и противогрибковыми препаратами;
- после оперативных вмешательств (удаление яичников, матки);
- физиологические состояния, которые требуют дополнительного увлажнения.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Побочные эффекты

При индивидуальной непереносимости материалов изделия возможны местные аллергические реакции.

Предупреждения

Прекратите использование лубриканта при появлении раздражения.

Обратитесь к врачу, если раздражение продолжается.

Лубрикант не является контрацептивом и лекарственным средством.

Запрещается использовать лубрикант:


- хранящийся в тубе без колпачка;
- хранящийся в поврежденной тубе;
- через 6 месяцев после первого вскрытия тубы.

Храните изделие в местах недоступных для детей.

Способ применения

Лубрикант рекомендуется наносить после проведения водных гигиенических процедур.

Перед первым применением изделия открутите колпачок (1), снимите защитную мембрану с горла тубы (2). Выдавите необходимое количество лубриканта (3). Накрутите колпачок на горло тубы (4).

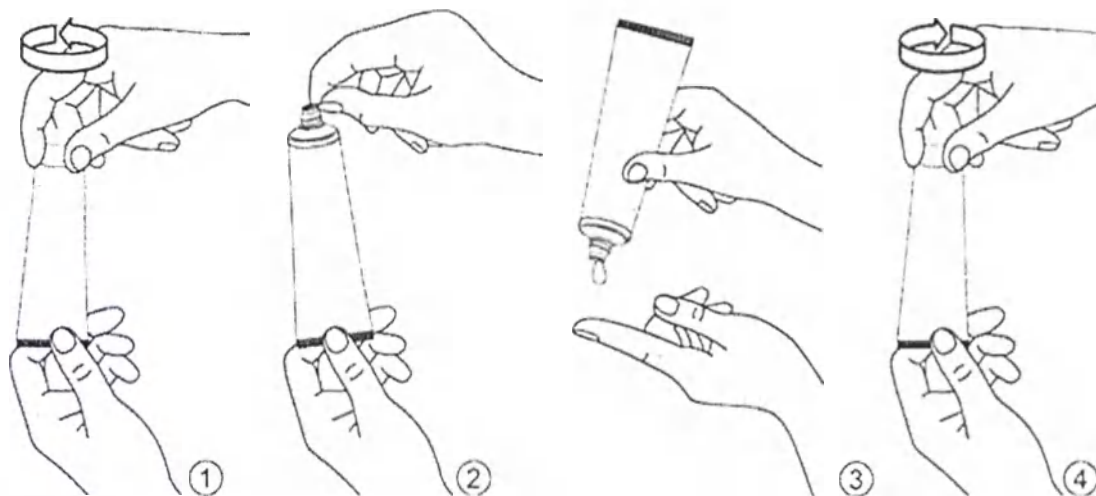

Нанесите лубрикант перед половым актом на преддверие влагалища, и/или на половой член партнера, и/или на используемый презерватив с внешней стороны.

Условия и особенности применения

Изделие применяется в домашних условиях. Извлеченный из тубы лубрикант применяется однократно.

Лубрикант не содержит жиров, легко смывается, совместим с презервативами из натурального латекса и синтетических материалов

Комплектность поставки изделия:

Туба, содержащая 60 г лубриканта, инструкция по применению, картонная пачка.

Срок годности - 24 месяца со дня изготовления (номер партии и годен до см. на шве тубы). Лубрикант можно использовать в течение 6 месяцев после снятия защитной мембраны с горла тубы.

Условия транспортировки

Всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 25 °C до плюс 25 °C.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C.

Инструкция по утилизации

После использования лубриканта тубу, пачку выбросить в мусорное ведро. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Применению не подлежат и считаются пришедшими в негодность:

- изделия, которые хранились с нарушением условий хранения;
- изделия после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Вышеперечисленные изделия подлежат утилизации в составе бытового мусора.

Символы на упаковке:

Символ	Описание символа
	Символ указывает температурный диапазон, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется

	Символ указывает, что перед применением изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по применению
	Символы, содержат информацию для идентификации материалов тубы с бушоном и картонной пачки с целью их дальнейшей утилизации.
	Символ указывает срок годности лубриканта в тубе после ее вскрытия – 6 месяцев

Производитель:

Российская Федерация,

Общество с ограниченной ответственностью Лаборатория «Биоритм»

ООО Лаборатория «Биоритм»

620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 19, оф. 235

Тел. (343) 214-80-50

e-mail: info@bior.ru

прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 4 листа(ов).

Директор

ООО Лаборатория «Биоритм»

Пашкевич Казимир Мосифович

«19» 2021 года

