

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «АВАНГАРД»

Магомедов М.К.

« ____ » _____ 2021 г.



Инструкция по применению

Подгузники для взрослых одноразовые по ТУ 17.22.12-001-35544771-2021 в вариантах исполнения

Дата введения: 30 сентября 2021 г.

Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
ООО «АВАНГАРД»
Магомедов М.К.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to M.K. Magomedov, the General Director of OOO 'AVANGARD'.

30 сентября 2021 г.

г. Новосибирск

2021 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая инструкция по применению распространяется на: Подгузники для взрослых одноразовые по ТУ 17.22.12-001-35544771-2021 в вариантах исполнения (далее по тексту – подгузники):

Назначение: Подгузники предназначены для впитывания и удерживания мочи при уходе за больными, страдающими недержанием мочи, средней и тяжелой степени, лежачими больными.

Подгузники выпускаются в следующих вариантах исполнения:

- в зависимости от обхвата талии/бедер человека подгузники должны быть подразделены на группы и изготовлены в соответствии с размерами:

- 1) Группа S - размерный ряд по обхвату талии/бедер не более 90 см;
- 2) Группа M - размерный ряд по обхвату талии/бедер, не более 120 см;
- 3) Группа L - размерный ряд по обхвату талии/бедер, не более 150 см;
- 4) Группа XL - размерный ряд по обхвату талии/бедер, не более 175 см.

- подгузники выпускаются в двух исполнениях в зависимости от количества впитываемой жидкости:

- 1) для людей со средней степенью недержания (далее - подгузник для средней степени недержания);
- 2) для людей с тяжелой степенью недержания (далее - подгузник для тяжелой степени недержания).

Все возможные варианты исполнения:

1. Подгузники для взрослых одноразовые со средней степенью недержания, размер S;
2. Подгузники для взрослых одноразовые с тяжелой степенью недержания, размер S;
3. Подгузники для взрослых одноразовые со средней степенью недержания, размер M;
4. Подгузники для взрослых одноразовые с тяжелой степенью недержания, размер M;
5. Подгузники для взрослых одноразовые со средней степенью недержания, размер L;
6. Подгузники для взрослых одноразовые с тяжелой степенью недержания, размер L;
7. Подгузники для взрослых одноразовые со средней степенью недержания, размер XL;
8. Подгузники для взрослых одноразовые с тяжелой степенью недержания, размер XL.

Функциональное назначение и область применения Применение подгузников является профилактикой развития пролежней у лежачих больных и защитой от загрязнений постельного белья для мужчин и женщин в домашних условиях, а также в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Потенциальные потребители: лежачие больные, страдающие недержанием мочи.

Показания к применению:

- недержание мочи и кала;
- тяжелобольные пациенты, находящиеся в лежачем положении;
- пожилой возраст.

Противопоказания к применению: общая непереносимость материала, из которого изготовлен подгузник.

Возможные побочные явления: возможно возникновение контактного дерматита на участках тела, закрытых подгузником. При длительном применении возможно развитие инфекции мочевых путей.

Предосторожности: храните изделие в недоступном для детей месте.

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения – I в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н)

Вид климатического исполнения подгузников – УХЛ 4.2. по ГОСТ 20790.

По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 52770 и серии ГОСТ ISO 10993.

Изделие одноразового использования, не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Подгузники являются нестерильной одноразовой продукцией.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подгузники соответствуют требованиям ТУ 17.22.12-001-35544771-2021, ГОСТ 20790, ГОСТ Р 55082 и изготавливаться в соответствии с рабочей документацией, утвержденной в установленном порядке, с соблюдением действующих санитарных норм и правил.

Форма, размеры подгузников и их допустимые отклонения соответствуют рабочим чертежам. Габаритные размеры подгузников приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики подгузников

Наименование измерения	Ширина, мм	Длина, мм	Допускаемое отклонение, мм
Размер S			
Подгузники в развёрнутом состоянии	550,0 (в наиболее широкой части)	750,0	±60
	300,0 (наиболее узкой (прямоугольной) части)		±60
Верхний покровный слой	550	750,0	±60
Верхний впитывающий слой	260,0 (в наиболее широкой части)	600,0	±60
	190,0 (в наиболее узкой (прямоугольной) части)		
Нижний впитывающий слой	160,0	400,0	±60
Защитный слой	550,0 (в наиболее широкой части)	750,0	±60
	300,0 (в наиболее узкой части)		
Липучки	25,0	62,0	±10
Расстояние между липучками	100,0	-	±60
Нижний покровный слой	550,0	750,0	±60
Размер M			
Подгузники в развёрнутом состоянии	670,0 (в наиболее широкой части)	800,0	±60
	300,0 (наиболее узкой (прямоугольной) части)		
Верхний покровный слой	670,0	800,0	±60
Верхний впитывающий слой	260,0 (в наиболее широкой части)	690,0	±60
	190,0 (в наиболее узкой (прямоугольной) части)		
Нижний впитывающий слой	160,0	400,0	±60
Защитный слой	670,0 (в наиболее широкой части)	800,0	±60
	300,0 (в наиболее узкой части)		±60
Липучки	25,0	62	±10
Расстояние между липучками	100,0	-	±60
Нижний покровный слой	670,0	800,0	±5
Размер L			
Подгузники в развёрнутом состоянии	770,0 (в наиболее широкой части)	950,0	±60
	300,0 (наиболее узкой (прямоугольной) части)		
Верхний покровный слой	770	950,0	±60
Верхний впитывающий слой	320,0 (в наиболее широкой части)	790,0	±60
	190,0 (в наиболее узкой (прямоугольной) части)		
Нижний впитывающий слой	170,0	440,0	±60
Защитный слой	770,0	950,0	±60
	300,0 (в наиболее узкой части)		±60
Липучки	25,0	62	±10
Расстояние между липучками	100,0	-	±60
Нижний покровный слой	770,0	950,0	±60
Размер XL			
Подгузники в развёрнутом состоянии	830,0 (в наиболее широкой части)	1020,0	±60
	300,0 (наиболее узкой (прямоугольной) части)		
Верхний покровный слой	830,0	1020,0	±60
Верхний впитывающий слой	320,0 (в наиболее широкой части)	760,0	±60
	190,0 (в наиболее узкой (прямоугольной) части)		
Нижний впитывающий слой	170,0	440,0	±60
Защитный слой	830,0	1020,0	±60
	300,0 (в наиболее узкой части)		±60
Липучки	25,0	62	±10
Расстояние между липучками	100,0	-	±60
Нижний покровный слой	830,0	1020,0	±60

Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, соответствуют нормативам, установленным в единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников и их масса, соответствуют требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Функциональные показатели подгузников

Наименование показателя	Значение показателя для подгузников видов и групп							
	Подгузники со средней степени недержания				Подгузники с тяжёлой степенью недержания			
	S	M	L	XL	S	M	L	XL
Масса сухого подгузника, г., не менее	60,7	61,9	66,0	73,9	76,9	84,1	96,1	115,7
Полное влагопоглощение, г, не менее	1000	1300	1450	1450	1400	1800	2000	2800
Сорбционная способность после центрифугирования, г, не менее	120	220	330	330	300	440	500	560
Обратная сорбция, г, не более	4,4							
Скорость впитывания, см ³ /с, не менее	2,3							

Требования к внешнему виду.

Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой,
- распределительный слой,
- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоёв (верхний и нижний),
- эластичные манжеты,
- эластичный пояс,
- защитный слой,
- нижний покровный слой,
- застёжка липучка,
- фронтальная лента.

Допускается изготавливать подгузники без эластичного пояса, распределительного и нижнего покровного слоев, фронтальной ленты. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Декоративное исполнение подгузников

Нижний покровный слой или фиксирующие элементы подгузников изготавливают без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесённого различными способами (печатью, тиснением и др.). Печатное изображение на подгузниках должно быть чётким, без искажений и пробелов.

Внешний вид изделия должен соответствовать изображению на рисунках А, Б, В.

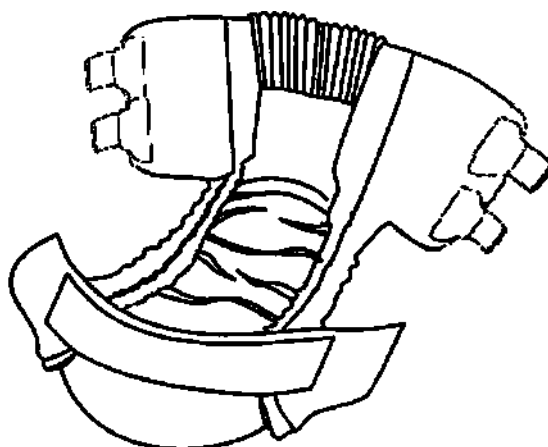


Рис. А. ВНЕШНИЙ ВИД ПОДГУЗНИКА

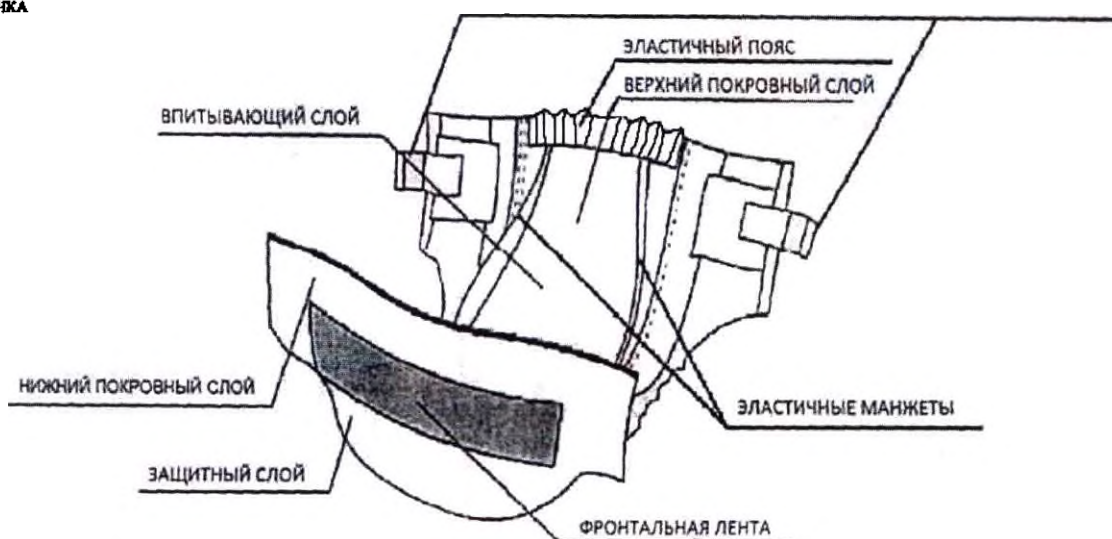


Рис. Б. ВНЕШНИЙ ВИД СОСТАВА ПОДГУЗНИКА

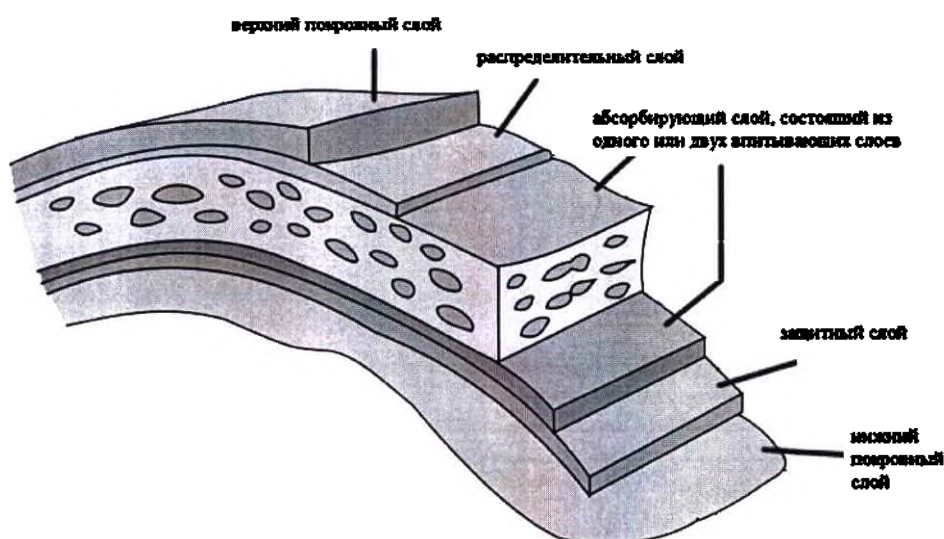


Рис. В. КОНСТРУКЦИЯ СЛОЁВ ПОДГУЗНИКА

В зависимости от обхвата талии/бедер человека подгузники распределены по группам и изготовлены в соответствии с размерами, указанными в таблице 3.

Таблица 3 – Размерный ряд подгузников

Группа подгузников	Размерный ряд по обхвату талии/бедер, см
S	до 90,0
M	до 120,0
L	до 150,0
XL	до 175,0

В подгузниках не допускаются внешние дефекты:

- механические повреждения (разрыв краёв, разрезы, повреждения фиксирующих элементов);
- пятна различного происхождения;
- посторонние включения, видимые невооружённым глазом;
- следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Применяемый при маркировке способ нанесения информации обеспечивает достаточную чёткость изображения, контрастность текстового и графического материалов. Маркировка выполнена печатным способом или светокопированием. Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости, ГОСТ Р 51088.

Подгузники имеют показатель надёжности: - средний срок хранения должен быть 5 лет с даты изготовления.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И СЫРЬЮ

Материалы, применяемые при изготовлении подгузников соответствуют требованиям действующих стандартов. При производстве подгузников применяются материалы, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Материалы, используемые при производстве подгузников

Назначение в составе изделия	Название материала	Производитель
Верхний покровный слой	Полимерное нетканое полотно (полипропилен) однослойный или многослойный типа Спанбонд и Спан-мелт-спан окрашенный и неокрашенный, с добавками и без добавок Поверхностная плотность 12-15 г/м2	ООО «НЕТКАНИКА», РФ г. Москва
		«Завод Эластик», РФ, г. Нижнекамск
		QUANZHOU GOOING CORPORATION, Китай
Распределительный слой	Полимерное нетканое полотно (полипропилен) однослойный или многослойный типа Спанбонд и Спан-мелт-спан окрашенный и неокрашенный, с добавками и без добавок; айрлайд нетканое полотно на основе целлюлозы с добавлением бикомпонента. Поверхностная плотность 20-40 г/м2	ООО «НЕТКАНИКА», РФ г. Москва
		«Завод Эластик», РФ, г. Нижнекамск
		QUANZHOU GOOING CORPORATION, Китай
Абсорбирующий слой	Целлюлоза (обработанная, необработанная) Biobright, GI Fluff	RaumaCell/Финляндия GP Cellulose / США
	Суперабсорбент - Полиакрилат натрия	QINGDAO ST-ARN IMP & EXP CO. LTD, Китай
		SUMITOMO SEIKA EUROPE S.A./N.V.
		QUANZHOU GOOING CORPORATION, Китай
Защитный слой	Пеленка полиэтиленовая непористая, Пленка соэкструзионная многослойная на основе полиолефинов Поверхностная плотность 14-20 г/м2	ООО «Рани Пласт Калуга» г. Калуга Россия
		Изготовитель: ООО «СТЭП-1», Россия
Нижний покровный слой	Полимерное нетканое полотно (полипропилен) однослойный или многослойный типа Спанбонд и Спан-мелт-спан окрашенный и неокрашенный, с добавками и без добавок Поверхностная плотность 15 г/м2	ООО «НЕТКАНИКА», РФ г. Москва
		«Завод Эластик», РФ, г. Нижнекамск
Скрепление слоев	Термоплавкий клей (клей-расплав) (конструкционный и эластичный)	COLQUIMICAPOLSKASP. ZO.O., SZKOLNA 30; 62-064 PLEWISKA, Польша.
		QUANZHOU GOOING CORPORATION, Китай
Эластичные манжеты	Полиуретановое волокно	Zfiejang Huaфон Spandex Co. Ltd, Китай
	Синтетический полиизопрен	Fullflex, United States
	спандекс / эластановое волокно	INVISTA Textiles (UK) Ltd
	Полимерное нетканое полотно (полипропилен) однослойный или многослойный типа Спанбонд и Спан-мелт-спан окрашенный и неокрашенный, с добавками и без добавок Поверхностная плотность 12-15 г/м2	ООО «НЕТКАНИКА», РФ г. Москва
		«Завод Эластик», РФ, г. Нижнекамск
Застёжки - липучки	Полиэтилен, полипропилен	QUANZHOU GOOING CORPORATION, Китай
		Jiangmen New Era External Use Drug Co., Ltd, Китай
		Компания Magis SpA, Италия
Эластичный пояс	Эластичное полимерное нетканое полотно (полипропилен, полиуретановое волокно); вискоза/полиэстер. Поверхностная плотность 20-30 г/м2	Zfiejang Huaфон Spandex Co. Ltd, Китай
		QUANZHOU GOOING CORPORATION, Китай
Фронтальная лента	Полипропиленовая пленка однослойная или многослойная Поверхностная плотность 30 -50 г/м2, Нетканое полотно (полипропилен)	Jiangmen New Era External Use Drug Co., Ltd, Китай
		Компания Magis SpA, Италия
		Lohmann-koester GmbH & Co. KG
		QUANZHOU GOOING CORPORATION, Китай

Перед использованием сырьё проходит входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии, исходя из указаний ГОСТ 24297.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Подгузники поставляются скомплектованными в соответствии с технологической документацией и условиями заказа от 1 до 30 штук в упаковке.

В состав партии, которая отправляется заказчику входит инструкция по эксплуатации, соответствующая ГОСТ 2.601.

Номенклатурный перечень вариантов исполнения подгузников:

1. Подгузники для взрослых одноразовые со средней степенью недержания, размер S;
2. Подгузники для взрослых одноразовые с тяжёлой степенью недержания, размер S;
3. Подгузники для взрослых одноразовые со средней степенью недержания, размер M;
4. Подгузники для взрослых одноразовые с тяжёлой степенью недержания, размер M;
5. Подгузники для взрослых одноразовые со средней степенью недержания, размер L;
6. Подгузники для взрослых одноразовые с тяжёлой степенью недержания, размер L;
7. Подгузники для взрослых одноразовые со средней степенью недержания, размер XL;
8. Подгузники для взрослых одноразовые с тяжёлой степенью недержания, размер XL.

5. МАРКИРОВКА

Маркировка готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями ТУ 17.22.12-001-35544771-2021, ГОСТ 20790 и ГОСТ Р 55082, наносимые символы соответствуют ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Маркировка является достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, чёткость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

На каждую потребительскую упаковку подгузников должна быть нанесена маркировка с указанием:

Информация

Символ

- наименование страны изготовителя
- наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение
- наименование изделия, обозначение варианта исполнения
- размер S/M/L/XL
- обозначение технических условий
- дата изготовления медицинского изделия (месяц, год)
- срок годности, устанавливаемый изготовителем медицинского изделия
- символ «запрет на повторное использование»
- номер артикула (при наличии)
- номер и дата регистрационного удостоверения
- условия хранения
- количество подгузников в упаковке
- номер партии
- обозначение «соответствие ГОСТ Р 55082»



Допускается дополнять маркировку другими сведениями:

Информация

Символ

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или теста)
- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста)
- указания по утилизации подгузника, надпись: «Не бросать в канализацию» / «В унитаз не бросать!» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания
- информацию о наличии специальных ингредиентов
- штриховой код (при наличии)



Маркировка грузовых мест (транспортной тары) - по ГОСТ 14192. Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, производится по ГОСТ 6658 с указанием номера партии, наименования варианта исполнения подгузников.

Маркировка групповой упаковки (транспортной тары) должна содержать:

- | Информация | Символ |
|--|---|
| - полное наименование изделия с обозначением варианта исполнения | -  |
| - наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение, товарный знак (при наличии) | -  |
| - срок годности, устанавливаемый изготовителем медицинского изделия | -  |
| - дата изготовления медицинского изделия (месяц, год) | -  |
| - условия хранения | -  |
| - условия транспортирования | -  |
| - номер партии | -  |
| - номер артикула (при наличии) | -  |
| - число единиц потребительской упаковки изделий в групповой упаковке; | -  |
| - масса нетто | -  |
| - масса брутто | -  |
| - масса нетто потребительской упаковки | -  |
| - знак обращения на рынке | -  |
| - «Беречь от влаги» | -  |
| - «Беречь от солнечных лучей» | -  |

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например: сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии - на защитный слой подгузника.

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузника, например: "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п., без соответствующего документального подтверждения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца).

6. УПАКОВКА

Упаковка изделий соответствует ГОСТ 20790.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной плёнки или пачки, упаковку потребительскую из картона, бумаги и комбинированных материалов по ГОСТ 33781, ГОСТ 12302, ТУ 22.22.11-001-23125856-2018, ГОСТ 34033, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной плёнки заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Транспортная упаковка производится в соответствии с ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474. Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658. Масса брутто кипы, ящика при ручной погрузке и разгрузке должна быть в соответствии с руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса Р2.2.2006.

В один ящик/кипу упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год).

Допускается применять другие упаковочные средства, обеспечивающие сохранность подгузников при перевозке и хранении.

Поставка подгузников должна сопровождаться товаросопроводительными документами, уложенными в пакет из полиэтиленовой плёнки.

При отгрузке изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности маркировка и упаковка должны производиться с учётом указаний ГОСТ 15846.

Каждая упаковка идентифицируется при помощи нанесения этикетки.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Подгузники в условиях эксплуатации не оказывают вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.

По безопасности подгузники соответствуют ГОСТ 20790 и ГОСТ Р 55082.

Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к медицинскому применению по параметру токсикологической безопасности и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Части изделия, контактирующие с телом человека, отвечают требованиям токсикологической и санитарно-химической безопасности согласно ГОСТ Р 52770 и серии стандартов ГОСТ Р ISO 10993.

При возгорании наиболее эффективными средствами для тушения тлеющих пожаров является использование воды, водных растворов солей, водных растворов поверхностно активных веществ, водных растворов, образующих твердеющую полимерную пену. Предпочтение должно отдаваться применению огнетушащих газов и газовых составов. Можно

использовать следующие средства пожаротушения: воду, песок, воздушно-механическую смесь, огнетушители пенные ОП-10, ОВЛ-100, ОВПУ-250, пенные установки и т. д.

8. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21, изделия, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО, далее - класс А), в том числе: использованные средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями, упаковка потерявшая потребительские свойства. Изделия, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности (эпидемиологически опасные отходы, далее - класс Б), в том числе: предметы, загрязненные кровью и (или) другими биологическими жидкостями; материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Изделия запрещается бросать в канализацию/унитаз.

Утилизация подгузников

Утилизация и уничтожение использованных подгузников осуществляется, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21 (раздел «Х. Требования к обращению с отходами»), неиспользованные подгузники относятся к классу А (эпидемиологически безопасные отходы), использованные по назначению подгузники относятся к отходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы).

Утилизации должна подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса, вся упаковка, в том числе и транспортная, относится к мусору возвратному или перерабатываемому. По классификации ТКО 4 (пластмасса, полиэтилен) и 5 (гофрокороба, полиэтилен) класс опасности.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование - по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по группе 5 ГОСТ 15150.

Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя - по группе 1 ГОСТ 15150.

10. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 Порядок одевания подгузника в вертикальном положении (самостоятельное применение).

- 10.1.1 Откройте упаковку, достаньте подгузник. Разверните и расправьте сложенные элементы.
- 10.1.2. Пропустите заднюю часть подгузника между ног впитывающим слоем к телу в направлении спереди назад.
- 10.1.3. Расправьте переднюю часть подгузника на животе.
- 10.1.4. Расправьте заднюю часть и боковые стороны подгузника.
- 10.1.5. Задней частью подгузника оберните переднюю часть и зафиксируйте застёжки, начиная с нижней.
- 10.1.6. Проконтролируйте, чтобы подгузник плотно прилегал к телу, но не сдавливал его

10.2 Порядок надевания подгузника на пациента в положении лёжа.

- 10.2.1 Откройте упаковку, достаньте подгузник. Разверните и расправьте сложенные элементы.
- 10.2.2 Поверните пациента на бок.
- 10.2.3 Подгузник подложить под спину таким образом, чтобы липучки-застёжки находились со стороны головы, впитывающим слоем к телу пациента
- 10.2.4 Повернуть пациента на спину на подгузник, что бы задняя часть подгузника осталась под ягодицами.
- 10.2.5 Переднюю часть подгузника пропустите между ног пациента.
- 10.2.6 Расправьте переднюю часть подгузника на животе пациента свободные боковые края подверните под ягодицы.
- 10.2.7 Расправленные боковые стороны задней части подгузника наложите сверху и закрепите застёжки на передней части подгузника, избегая чрезмерного затягивания.
- 10.2.8 Схема надевания подгузника представлена на рисунке 2.

10.3 Порядок снятия подгузника с пациента.

- 10.3.1 У лежащего на спине пациента расстегните застёжки подгузника, подверните их липкой стороной внутрь, чтобы избежать травмирования кожи, продвиньте ладонью нижний край под бедра.
- 10.3.2 Отверните переднюю часть подгузника, положите пациента набок и аккуратно сверните нижнюю часть подгузника.
- 10.3.3 При снятии подгузника у обычного пациента попросите его встать ровно и сделайте те же манипуляции.
- 10.3.4 Помните, что надевать и снимать подгузник необходимо только сзади, так как это предотвращает случайный перенос бактерий со стороны кишечника.
- 10.3.5 Чтобы избежать протекания подгузника, следует чётко придерживаться всех рекомендаций производителя.

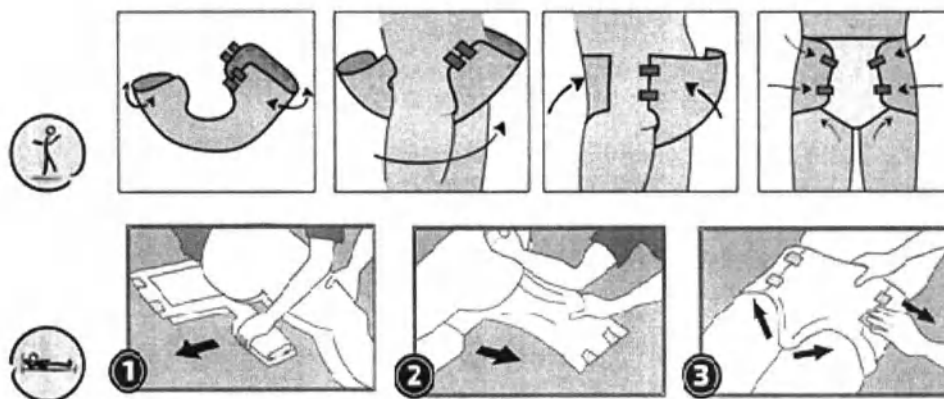


Рисунок 2 – Схема надевания подгузника

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие подгузников требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок годности 5 лет, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Подгузники должны храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 75 %.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Подгузники соответствуют техническим условиям ТУ 17.22.12-001-35544771-2021 и признаны годными для эксплуатации.

Генеральный директор

М.П. _____

подпись, дата

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Подгузники

упакованы в соответствии с ТУ 17.22.12-001-35544771-2021 и Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД»

Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планетная, Дом 30, Этаж 1

Тел.: +7 911 920 3317

E-mail: avangard_nsk54@mail.ru

15. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РАССМОТРЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД»

Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планетная, Дом 30, Этаж 1

Тел.: +7 911 920 3317

E-mail: avangard_nsk54@mail.ru

Прошито, скреплено и пронумеровано 11 листа(ов)

Генеральный директор ООО «АВАНГАРД»

Магомедов М.К.

