



SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
CH-9014 St. Gallen

Tel. +41 71 272 40 00
Fax +41 71 272 40 01
www.sigvaris.com

КОПИЯ

SIGVARIS
GROUP

УТВЕРЖДАЮ
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
9014 Санкт-Галлен
Швейцария


Juergen Sigg
CEO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
в соответствии с приказом МЗ РФ 11н
РЕД.3

Бандаж медицинский компрессионный нерастяжимый регулируемый SIGVARIS
WRAP, в вариантах исполнений

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

- **SIGVARIS AG**
Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen,
Switzerland
«СИГВАРИС АГ»
Греблиштрассе 8, 9014 Санкт-Галлен
Швейцария

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:

- **SIGVARIS AG**
Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen,
Switzerland
«СИГВАРИС АГ»
Греблиштрассе 8, 9014 Санкт-Галлен,
Швейцария
- **SIGVARIS INC.**
13055 Riler Street, Suite 30, Holland,
Michigan 49424, USA
«СИГВАРИС ИНК.»
13055 Райли Стрит, Апарт. 30, г. Холланд,
штат Мичиган 49424, США

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандаж медицинский компрессионный нерастяжимый регулируемый SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнения

1. Бандаж для голени (Coolflex Standard Calf) в составе:

- Бандаж для голени Coolflex Standard Calf – 1 шт.
- Подкладочные гольфы Basic Liner – 2 шт.,
- Изделия подкладочные для голени Transition Liner 2 шт. (при необходимости)
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

2. Бандаж для голени (Compreflex Standard Calf) в составе:

- Бандаж для голени Compreflex Standard Calf – 1 шт.,
- Подкладочные гольфы Basic Liner – 2 шт.,
- Набор регулирующих язычков Accutab - 1 шт.,
- Изделия подкладочные для голени Transition Liner 2 шт. (при необходимости)
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

3. Бандаж для голени и стопы (Compreflex Standard Calf and Foot) в составе:

- Бандаж для голени и стопы Compreflex Standard Calf and Foot – 1 шт.,
- Подкладочные гольфы Basic Liner – 2 шт.,
- Набор регулирующих язычков Accutab - 1 шт.,
- Изделия подкладочные для голени Transition Liner 2 шт. (при необходимости)
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Бандаж для голени (Compreflex Transition) в составе:

- Бандаж для голени Compreflex Transition – 1 шт.,
- Подкладочные гольфы Transition Liner – 2 шт.,
- Набор регулирующих язычков Accutab - 1 шт.,
- Изделия подкладочные для голени Transition Liner 2 шт. (при необходимости)
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

5. Бандаж для голени (Compreflex Complete) в составе:

- Бандаж для голени Compreflex Complete – 1 шт.,
- Подкладочные гольфы Complete Liner – 2 шт.,
- Набор регулирующих язычков Accutab - 1 шт.,
- Изделия подкладочные для голени Transition Liner 2 шт. (при необходимости)
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

6. Бандаж для бедра (Compreflex Standard Thigh) в составе:

- Бандаж для бедра Compreflex Standard Thigh – 1 шт.
- Некомпрессионные хлопковые подкладки (цвет: телесный) – 2 шт.,
- Набор регулирующих язычков Accutab - 1 шт.,
- Приспособление для крепления на поясе и бедре (цвет: черный) - 1 шт.,
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

7. Бандаж для колена (Compreflex Standard Knee) в составе:

- Бандаж для колена Compreflex Standard Knee – 1 шт.,
- Набор регулирующих язычков Accutab - 1 шт.,

- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

8. Бандаж для руки (Compreflex Standard Arm) в составе:

- Бандаж для руки Compreflex Standard Arm – 1 шт.,
- Некомпрессионные хлопковые подкладочные рукава (цвет: телесный) – 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

9. Бандаж для стопы и лодыжки (Compreboot Standard) в составе:

- Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Standard – 1 шт.,
- Инструкция по применению – 1 шт.

10. Бандаж для стопы и лодыжки (Compreboot Plus) в составе:

- Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Plus – 1 шт.,
- Инструкция по применению – 1 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

SIGVARIS AG Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland

«СИГВАРИС АГ» Греблиштрассе 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:

SIGVARIS AG Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland

«СИГВАРИС АГ» Греблиштрассе 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

SIGVARIS INC. 13055 Riler Street, Suite 30, Holland, Michigan 49424, USA

«СИГВАРИС ИНК.» 13055 Райли Стрит, Апарт. 30, г. Холланд, штат Мичиган 49424, США

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

«Бандажи медицинские компрессионные нерастяжимые регулируемые SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнения» предназначены для использования пациентами в возрасте от 16 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандажи для стопы и лодыжки Compreboot Plus, Compreboot Standart предназначены для со-здания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках стопы, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде, для реализации эффективной поддержки мягких тканей.

Бандаж для руки Compreflex Standard Arm предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках руки, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде.

Бандажи для голени и стопы Compreflex Standard Calf and Foot, Compreflex Complete предназначены для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках голени и стопы, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде.

Бандажи для голени Compreflex Standard Calf, Compreflex Transition, Coolflex Standard Calf предназначены для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках голени, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде.

Бандаж для колена Compreflex Standard Knee предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках колена, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде.

Бандаж для бедра Compreflex Standard Thigh предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках колена, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хирургия, терапия, ортопедия, флебология

Применение медицинского изделия возможно только после консультации с лечащим врачом до применения изделия, чтобы обеспечить оптимальные результаты лечения.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Бандаж медицинский компрессионный нерастяжимый регулируемый SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями (см. Приложение) производитель: SIGVARIS AG., Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland, «СИГВАРИС АГ.», Греблиштрассе 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария, применяется при ряде заболеваний, таких как варикозное расширение вен, лимфовенозной недостаточности разных видов, тромбофлебита, тромбоза, послеоперационный период.

Причинами таких заболеваний могут быть: патология венозных клапанов, закупорка вены тромбом, паразитарная инвазия, удаление лимфатических узлов. Патогенез этих заболеваний сводится к нарушению оттока венозной крови/лимфы от тканей. Особенно часто при этом страдают конечности. Нарушение оттока жидкости ведет к развитию отека и нарушению трофических процессов в тканях, что, в свою очередь приводит к развитию язв (трофические венозные язвы) и лимфедемы (в тяжелых случаях элевантизма).

Основные механизмы действия компрессии:

- Компрессия межмышечных венозных сплетений и перфорантных вен приводит к значительному увеличению пропульсивной способности мышечно-венозной помпы голени и снижению патологической венозной емкости нижних конечностей.
- Уменьшение калибра подкожных и глубоких вен приводит к улучшению функционирования относительно недостаточного клапанного аппарата и возрастанию скорости венозного кровотока.
- Повышение тканевого давления увеличивает резорбцию внеклеточной жидкости в венозном колоне капилляра и уменьшает ее фильтрацию в артериальном, что приводит к регрессу отека.
- Увеличение фибринолитической активности крови за счет более интенсивной выработки тканевого активатора плазминогена улучшает реологические свойства крови (феномен, связанный с сокращением мышц в ограниченном объеме).
- Увеличение скорости лимфотока.

Эти механизмы предотвращают прогрессирование данных заболеваний и развитие осложнений.

Наложение избыточной компрессии, так и ее снижение по каким-либо причинам, приводят к неэффективности лечения. Также, для качественной компрессионной терапии крайне важно наличие разницы между рабочим (при нагрузке) и давлением покоя

(соответственно, в покое). Наличие этой разницы создает эффект «помпы», эффективно отводящий жидкость от мягких тканей, но, в то же время, позволяющий, хорошо переносить компрессию в состоянии покоя.


Бандаж медицинский компрессионный нерастяжимый регулируемый SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями (см. Приложение) производитель: SIGVARIS AG., Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland, «СИГВАРИС АГ.», Греблиштрассе 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария обеспечивают точный и неизменный на протяжении времени уровень компрессии. Также они обеспечивают требуемую разницу между рабочим давлением и давлением покоя, и позволяют при необходимости быстро перенастраивать бандаж. Кроме того, Бандаж медицинский компрессионный нерастяжимый регулируемый SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями (см. Приложение) производитель: SIGVARIS AG., Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland, «СИГВАРИС АГ.», Греблиштрассе 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария позволяет самостоятельное использование пациентом, после прохождения короткого обучения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Бандаж медицинский компрессионный нерастяжимый регулируемый SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями производства SIGVARIS AG, Швейцария, являются лечебными и в зависимости от варианта исполнения предназначены для:

Бандаж медицинский компрессионный нерастяжимый регулируемый SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями производства SIGVARIS AG, Швейцария, являются лечебными и в зависимости от варианта исполнения предназначены для:

Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Plus

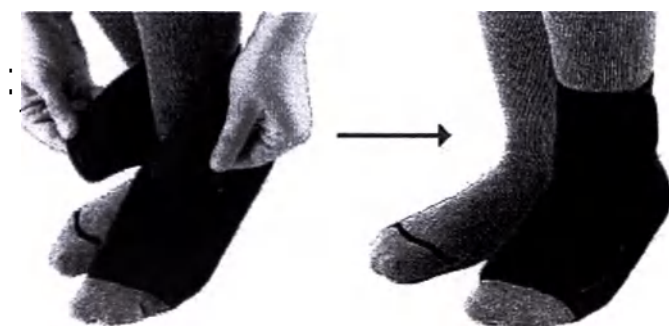


Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Plus предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках стопы, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде, для реализации эффективной поддержки мягких тканей. Бандаж

Compreboot Plus оснащен многоразовыми текстильными фиксаторами-застежками типа «велкро» (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт, репейник), удерживающими изделие на стопе и задающими должный уровень компрессионного воздействия.

Компрессионная терапия направлена на нормализацию работы венозной и лимфатической системы, снижение венозного и лимфатического отека. Изделие пригодно для многоразового использования, бандаж оснащен многоразовыми ярлычками-застежками. Бандаж Compreboot Plus применяется для усиленной фиксации стопы.

Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Standard

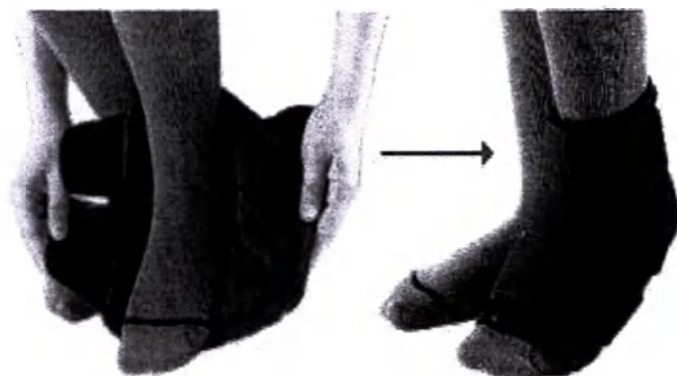

Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Standard предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках стопы, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде, для реализации эффективной поддержки мягких тканей. Бандаж Compreboot Standard оснащен

многоцветными текстильными фиксаторами-застежками типа «велкро» (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт, репейник), удерживающими изделие на стопе и задающими должный уровень компрессионного воздействия. Компрессионная терапия направлена на нормализацию работы венозной и лимфатической системы, снижение венозного и лимфатического отека. Изделие пригодно для многоцветного использования, бандаж оснащен многоцветными фиксаторами-язычками. Бандаж Compreboot Standard применяется для умеренной фиксации стопы.

Бандаж для руки Compreflex Standard Arm



Бандаж для руки Compreflex Standard Arm предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках руки, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде, для реализации эффективной поддержки мягких тканей. Бандаж Compreflex Standard Arm - нестяжимое компрессионное изделие, обеспечивает регулируемую по интенсивности компрессию за счет встроенных ремешков. Бандаж оснащен многоцветными текстильными фиксаторами-застежками типа «велкро» (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт, репейник), позволяющими комфортно

закреплять изделие на конечности.

Бандаж для голени и стопы Compreflex Standard Calf and Foot

Бандаж для голени и стопы Compreflex Standard Calf and Foot предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках голени и стопы, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде, для реализации эффективной поддержки мягких тканей. Бандаж Compreflex Standard Calf and Foot включает в себя бандаж для голени Compreflex Standard и бандаж для стопы Compreboot Standard. Вместе они образуют комплексную компрессионную систему для фиксации стоп и голеней. Бандаж для голени Compreflex Standard Calf and Foot - это



нерастяжимое компрессионное изделие, которое обеспечивает равномерную компрессию голени с помощью регулирующего язычка Accutab. Бандаж Compreflex Standard Calf and Foot применяется в компрессионной терапии для фиксации верхних и нижних конечностей. Компрессионная терапия направлена на нормализацию работы венозной и лимфатической системы, снижение венозного и лимфатического отека. Изделие пригодно для многократного использования, бандаж оснащен многократными текстильными фиксаторами-застежками типа «велкро» (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт, репейник).

Бандаж для голени Compreflex Complete



Бандаж для голени Compreflex Complete предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках голени, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде, для реализации эффективной поддержки мягких тканей. Бандаж Compreflex Complete - это нерастяжимое компрессионное изделие, которое обеспечивает равномерную компрессию голени с помощью регулирующего язычка Accutab. Бандаж Compreflex Complete применяется в компрессионной терапии для фиксации нижних конечностей. Компрессионная терапия направлена на нормализацию работы венозной и лимфатической системы, снижение венозного и лимфатического отека. Изделие пригодно для многократного использования, бандаж оснащен многократными текстильными фиксаторами-застежками типа «велкро» (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт, репейник) для удобной фиксации.

3.2. Бандаж для голени Compreflex Standard Calf

Бандаж для голени Compreflex Standard Calf – предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках голени, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде, для реализации эффективной поддержки мягких тканей. Бандаж Compreflex Standard Calf - это нерастяжимое компрессионное изделие, которое обеспечивает равномерную компрессию голени с помощью регулирующего язычка Accutab. Бандажи Compreflex Standard Calf, применяемые в компрессионной терапии для фиксации нижних конечностей. Компрессионная терапия направлена на нормализацию работы венозной и лимфатической

системы, снижение венозного и лимфатического отека. Изделие пригодно для многоразового использования, бандаж оснащен многоразовыми текстильными фиксаторами-застежками типа «велкро» (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт, репейник) для удобства закрепления.



Бандаж для колена Compreflex Standard Knee



Бандаж для колена Compreflex Standard Knee—предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках колена, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде, для реализации эффективной поддержки мягких тканей. Бандаж Compreflex Standard Knee - это нерастяжимое компрессионное изделие, которое обеспечивает равномерную компрессию колена с помощью регулирующего язычка Accutab. Бандаж Compreflex Standard Knee применяется в компрессионной терапии для фиксации области коленного

сустава. Компрессионная терапия направлена на нормализацию работы венозной и лимфатической системы, снижение венозного и лимфатического отека. Изделие пригодно для многоразового использования, бандаж оснащен многоразовыми текстильными фиксаторами-застежками типа «велкро» (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт, репейник).

3.3.Бандаж для бедра Compreflex Standard Thigh

Бандаж для бедра Compreflex Standard Thigh предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках колена, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде, для реализации эффективной поддержки мягких тканей. Бандаж Compreflex Standard Thigh - это нерастяжимое компрессионное изделие, которое обеспечивает равномерную компрессию колена с помощью регулирующего язычка Accutab. Бандажи Compreflex Standard Thigh, применяемые в компрессионной терапии для фиксации бедра. Компрессионная терапия направлена на нормализацию работы венозной и лимфатической системы,



снижение венозного и лимфатического отека. Изделие пригодно для многоразового использования, бандаж оснащен многоразовыми текстильными фиксаторами-застежками типа «велкро» (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт, репейник).

3.4.Бандаж для голени Compreflex Transition



Бандаж для голени Compreflex Transition предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках голени, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде, для реализации эффективной поддержки мягких тканей. Бандаж Compreflex Transition это нерастяжимое компрессионное изделие, которое обеспечивает равномерную компрессию колена с помощью регулирующего язычка Accutab. Бандажи Compreflex Transition применяются в компрессионной терапии для фиксации голени. Компрессионная терапия направлена на нормализацию работы венозной и лимфатической системы, снижение венозного и лимфатического отека. Изделие пригодно для многоразового использования, бандаж оснащен многоразовыми текстильными фиксаторами-застежками типа «велкро» (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт, репейник) для удобства фиксации.

3.5.Бандаж для голени Coolflex Standard Calf



Бандаж для голени Coolflex Standard Calf предназначен для создания ограничения нефизиологических движений в пораженных участках голени, при хроническом или обостренном их поражении, или в послеоперационном периоде, для реализации эффективной поддержки мягких тканей. Бандаж Coolflex Standard Calf - это нерастяжимое компрессионное изделие, которое обеспечивает равномерную компрессию колена с помощью регулирующего язычка Accutab. Бандаж Coolflex Standard Calf применяется в компрессионной терапии для фиксации голени. Компрессионная терапия направлена на нормализацию работы венозной и лимфатической системы, снижение венозного и лимфатического отека. Изделие пригодно для многоразового использования, бандаж оснащен многоразовыми текстильными фиксаторами-застежками типа «велкро» (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт, репейник) для удобства фиксации.

ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Plus

Показания к применению:

1. Лимфедема

- 
2. Отеки: венозные, посттравматические,- послеоперационные
 3. Хроническое заболевание вен (ХЗВ)
 4. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), включая венозные язвы, возникающие на фоне застоя венозной крови, венозный стаз
 5. Жировой отек
 6. Липедема
 7. Несостоятельность венозных лапанов
 8. Посттромботический синдром
 9. Трофические венозные язвы
 10. Состояния после склеротерапии
 11. Венозная экзема
 12. Липодерматосклероз

Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Standard

Показания к применению:

1. Лимфедема
2. Отеки: венозные, посттравматические,- послеоперационные
3. Хроническое заболевание вен (ХЗВ)
4. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), включая венозные язвы, возникающие на фоне застоя венозной крови, венозный стаз
5. Жировой отек
6. Липедема
7. Несостоятельность венозных лапанов
8. Посттромботический синдром
9. Трофические венозные язвы
10. Состояния после склеротерапии
11. Венозная экзема
12. Липодерматосклероз

Бандаж для руки Compreflex Standard Arm

Показания к применению:

1. Лимфедема
2. Отеки: венозные, посттравматические,- послеоперационные
3. Хроническое заболевание вен (ХЗВ)
4. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), включая венозные язвы, возникающие на фоне застоя венозной крови, венозный стаз
5. Жировой отек
6. Липедема
7. Несостоятельность венозных лапанов
8. Посттромботический синдром
9. Трофические венозные язвы
10. Состояния после склеротерапии
11. Венозная экзема

12. Липодерматосклероз

Бандаж для голени и стопы Compreflex Standard Calf and Foot

Показания к применению:

1. Лимфедема
2. Отеки: венозные, посттравматические,- послеоперационные
3. Хроническое заболевание вен (ХЗВ)
4. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), включая венозные язвы, возникающие на фоне застоя венозной крови, венозный стаз
5. Жировой отек
6. Липедема
7. Несостоятельность венозных лапанов
8. Посттромботический синдром
9. Трофические венозные язвы
10. Состояния после склеротерапии
11. Венозная экзема
12. Липодерматосклероз

Бандаж для голени Compreflex Complete

Показания к применению:

1. Лимфедема
2. Отеки: венозные, посттравматические,- послеоперационные
3. Хроническое заболевание вен (ХЗВ)
4. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), включая венозные язвы, возникающие на фоне застоя венозной крови, венозный стаз
5. Жировой отек
6. Липедема
7. Несостоятельность венозных лапанов
8. Посттромботический синдром
9. Трофические венозные язвы
10. Состояния после склеротерапии
11. Венозная экзема
12. Липодерматосклероз

Бандаж для голени Compreflex Standard Calf

Показания к применению:

1. Лимфедема
2. Отеки: венозные, посттравматические,- послеоперационные
3. Хроническое заболевание вен (ХЗВ)
4. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), включая венозные язвы, возникающие на фоне застоя венозной крови, венозный стаз
5. Жировой отек
6. Липедема
7. Несостоятельность венозных лапанов

8. Посттромботический синдром
9. Трофические венозные язвы
10. Состояния после склеротерапии
11. Венозная экзема
12. Липодерматосклероз

Бандаж для колена Compreflex Standard Knee

Показания к применению:

1. Лимфедема
2. Отеки: венозные, посттравматические,- послеоперационные
3. Хроническое заболевание вен (ХЗВ)
4. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), включая венозные язвы, возникающие на фоне застоя венозной крови, венозный стаз
5. Жировой отек
6. Липедема
7. Несостоятельность венозных лапанов
8. Посттромботический синдром
9. Трофические венозные язвы
10. Состояния после склеротерапии
11. Венозная экзема
12. Липодерматосклероз

Бандаж для бедра Compreflex Standard Thigh

Показания к применению:

1. Лимфедема
2. Отеки: венозные, посттравматические,- послеоперационные
3. Хроническое заболевание вен (ХЗВ)
4. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), включая венозные язвы, возникающие на фоне застоя венозной крови, венозный стаз
5. Жировой отек
6. Липедема
7. Несостоятельность венозных лапанов
8. Посттромботический синдром
9. Трофические венозные язвы
10. Состояния после склеротерапии
11. Венозная экзема
12. Липодерматосклероз

Бандаж для голени Compreflex Transition

Показания к применению:

1. Лимфедема
2. Отеки: венозные, посттравматические,- послеоперационные
3. Хроническое заболевание вен (ХЗВ)
4. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), включая венозные язвы, возникающие на фоне застоя венозной крови, венозный стаз
5. Жировой отек

6. Липедема
7. Несостоятельность венозных лапанов
8. Посттромботический синдром
9. Трофические венозные язвы
10. Состояния после склеротерапии
11. Венозная экзема
12. Липодерматосклероз

Бандаж для голени Coolflex Standard Calf

Показания к применению:

1. Лимфедема
2. Отеки: венозные, посттравматические,- послеоперационные
3. Хроническое заболевание вен (ХЗВ)
4. Хроническая венозная недостаточность (ХВН), включая венозные язвы, возникающие на фоне застоя венозной крови, венозный стаз
5. Жировой отек
6. Липедема
7. Несостоятельность венозных лапанов
8. Посттромботический синдром
9. Трофические венозные язвы
10. Состояния после склеротерапии
11. Венозная экзема
12. Липодерматосклероз

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Plus

Абсолютные противопоказания:

- Тяжелая сердечная недостаточность (стадия III-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации)
- Флебит синий болевой
- Тяжелая форма периферической артериальной окклюзионной болезни (ПАОБ) при каком-либо из следующих показателей: лодыжечно-плечевой индекс давления (ЛПИД) <0,6; давление в области лодыжки <60 мм рт.ст., давление в области большого пальца стопы <30 мм рт.ст.
- Тяжелая диабетическая невропатия с потерей чувствительности или микроангиопатия с риском развития некроза кожи
- Компрессия имеющегося артериального шунта
- Аллергическая реакция на компрессионный материал

Меры предосторожности:

Особые меры предосторожности должны быть приняты в том случае, когда компрессионные изделия используются пациентами с пограничными признаками, такими как:

- Периферическая артериальная окклюзионная болезнь (ПАОБ) при лодыжечно-плечевом индексе давления (ЛПИД) $> 0,6$ - $< 0,9$ и/или давлении в области лодыжки от 60 до 90 мм рт.
- Пациенты с компенсированной хронической сердечной недостаточностью (стадия I-II по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) и венозным или лимфатическим отеком
- Сахарный диабет
- Кожные заболевания с обильным экссудатом или язвами смешанной артериовенозной этиологии
- Принятие решений о назначении лечения должно выполняться для конкретного случая с учетом тщательной оценки соотношения «риск-польза»
- Компрессионные изделия для уменьшения воспаления, боли или отека ног, рожистых воспалений или целлюлита следует использовать только в сочетании с антибактериальным лечением
- Появление кожного раздражения у пациентов с повышенной чувствительностью можно предотвратить путем нанесения специальных средств по уходу за кожей под компрессионное изделие
- Подкладочные материалы и бандажи не должны применяться непосредственно для открытых ран.

Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Standard

Абсолютные противопоказания:

- Тяжелая сердечная недостаточность (стадия III-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации)
- Флебит синий болевой
- Тяжелая форма периферической артериальной окклюзионной болезни (ПАОБ) при каком-либо из следующих показателей: лодыжечно-плечевой индекс давления (ЛПИД) $< 0,6$; давление в области лодыжки < 60 мм рт.ст., давление в области большого пальца стопы < 30 мм рт.ст.
- Тяжелая диабетическая невропатия с потерей чувствительности или микроангиопатия с риском развития некроза кожи
- Компрессия имеющегося артериального шунта
- Аллергическая реакция на компрессионный материал

Меры предосторожности:

Особые меры предосторожности должны быть приняты в том случае, когда компрессионные изделия используются пациентами с пограничными признаками, такими как:

- Периферическая артериальная окклюзионная болезнь (ПАОБ) при лодыжечно-плечевом индексе давления (ЛПИД) $> 0,6$ - $< 0,9$ и/или давлении в области лодыжки от 60 до 90 мм рт.
- Пациенты с компенсированной хронической сердечной недостаточностью (стадия I-II по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) и венозным или лимфатическим отеком
- Сахарный диабет

- Кожные заболевания с обильным экссудатом или язвами смешанной артериовенозной этиологии
- Принятие решений о назначении лечения должно выполняться для конкретного случая с учетом тщательной оценки соотношения «риск-польза»
- Компрессионные изделия для уменьшения воспаления, боли или отека ног, рожистых воспалений или целлюлита следует использовать только в сочетании с антибактериальным лечением
- Появление кожного раздражения у пациентов с повышенной чувствительностью можно предотвратить путем нанесения специальных средств по уходу за кожей под компрессионное изделие
- Подкладочные материалы и бандажи не должны применяться непосредственно для открытых ран.

Бандаж для руки Compreflex Standard Arm

Абсолютные противопоказания:

- Тяжелая сердечная недостаточность (стадия III-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации)
- Флебит синий болевой
- Тяжелая форма периферической артериальной окклюзионной болезни (ПАОБ) руки, подтвержденная двухсторонним измерением давления крови
- Тяжелая диабетическая невропатия с потерей чувствительности или микроангиопатия с риском развития некроза кожи
- Компрессия имеющегося артериального шунта
- Аллергическая реакция на компрессионный материал

Меры предосторожности:

Особые меры предосторожности должны быть приняты в том случае, когда компрессионные изделия используются пациентами с пограничными признаками, такими как:

- Средняя форма периферической артериальной окклюзионной болезни (ПАОБ) руки, подтвержденная двухсторонним измерением давления крови
- Пациенты с компенсированной хронической сердечной недостаточностью (стадия I-II по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) и венозным или лимфатическим отеком
- Сахарный диабет
- Кожные заболевания с обильным экссудатом или язвами смешанной артериовенозной этиологии
- Принятие решений о назначении лечения должно выполняться в зависимости от конкретного случая с учетом тщательной оценки соотношения «риск-польза»
- Компрессионные изделия для уменьшения воспаления, боли или отека ног, рожистых воспалений или целлюлита следует использовать только в сочетании с антибактериальным лечением
- Появление кожного раздражения у чувствительных пациентов можно предотвратить путем нанесения специальных средств по уходу за кожей под компрессионное изделие

- Подкладочные материалы и бандажи не должны применяться непосредственно для открытых ран.

Бандаж для голени и стопы Compreflex Standard Calf and Foot

Абсолютные противопоказания:

- Тяжелая сердечная недостаточность (стадия III-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации)
- Флебит синий болевой
- Тяжелая форма периферической артериальной окклюзионной болезни (ПАОБ) при каком-либо из следующих показателей: лодыжечно-плечевой индекс давления (ЛПИД) $<0,6$; давление в области лодыжки <60 мм рт.ст., давление в области большого пальца стопы <30 мм рт.ст.
- Тяжелая диабетическая невропатия с потерей чувствительности или микроангиопатия с риском развития некроза кожи
- Компрессия имеющегося артериального шунта
- Аллергическая реакция на компрессионный материал

Меры предосторожности:

Особые меры предосторожности должны быть приняты в том случае, когда компрессионные изделия используются пациентами с пограничными признаками, такими как:

- Периферическая артериальная окклюзионная болезнь (ПАОБ) при лодыжечно-плечевом индексе давления (ЛПИД) $> 0,6$ - $<0,9$ и/или давлении в области лодыжки от 60 до 90 мм рт.
- Пациенты с компенсированной хронической сердечной недостаточностью (стадия I-II по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) и венозным или лимфатическим отеком
- Сахарный диабет
- Кожные заболевания с обильным экссудатом или язвами смешанной артериовенозной этиологии
- Компрессионные изделия для уменьшения воспаления, боли или отека ног, рожистых воспалений или целлюлита следует использовать только в сочетании с антибактериальным лечением
- Появление кожного раздражения у чувствительных пациентов можно предотвратить путем нанесения специальных средств по уходу за кожей под компрессионное изделие
- Подкладочные материалы и бандажи не должны применяться непосредственно для открытых ран.

Принятие решений о назначении лечения должно выполняться в зависимости от конкретного случая с учетом тщательной оценки соотношения «риск-польза»

Бандаж для голени Compreflex Complete

Абсолютные противопоказания:

- Тяжелая сердечная недостаточность (стадия III-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации)
- Флебит синий болевой

- Тяжелая форма периферической артериальной окклюзионной болезни (ПАОБ) при каком-либо из следующих показателей: лодыжечно-плечевой индекс давления (ЛПИД) $<0,6$; давление в области лодыжки <60 мм рт.ст., давление в области большого пальца стопы <30 мм рт.ст.
- Тяжелая диабетическая невропатия с потерей чувствительности или микроангиопатия с риском развития некроза кожи
- Компрессия имеющегося артериального шунта
- Аллергическая реакция на компрессионный материал

Меры предосторожности:

Особые меры предосторожности должны быть приняты в том случае, когда компрессионные изделия используются пациентами с пограничными признаками, такими как:

- Периферическая артериальная окклюзионная болезнь (ПАОБ) при лодыжечно-плечевом индексе давления (ЛПИД) $> 0,6$ - $<0,9$ и/или давлении в области лодыжки от 60 до 90 мм рт.
- Пациенты с компенсированной хронической сердечной недостаточностью (стадия I-II по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) и венозным или лимфатическим отеком
- Сахарный диабет
- Кожные заболевания с обильным экссудатом или язвами смешанной артериовенозной этиологии
- Принятие решений о назначении лечения должно выполняться в зависимости от конкретного случая с учетом тщательной оценки соотношения «риск-польза»
- Компрессионные изделия для уменьшения воспаления, боли или отека ног, рожистых воспалений или целлюлита следует использовать только в сочетании с антибактериальным лечением
- Появление кожного раздражения у чувствительных пациентов можно предотвратить путем нанесения специальных средств по уходу за кожей под компрессионное изделие
- Подкладочные материалы и бандажи не должны применяться непосредственно для открытых ран.

Бандаж для голени Compreflex Standard Calf

Абсолютные противопоказания:

- Тяжелая сердечная недостаточность (стадия III-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации)
- Флебит синий болевой
- Тяжелая форма периферической артериальной окклюзионной болезни (ПАОБ) при каком-либо из следующих показателей: лодыжечно-плечевой индекс давления (ЛПИД) $<0,6$; давление в области лодыжки <60 мм рт.ст., давление в области большого пальца стопы <30 мм рт.ст.
- Тяжелая диабетическая невропатия с потерей чувствительности или микроангиопатия с риском развития некроза кожи
- Компрессия имеющегося артериального шунта
- Аллергическая реакция на компрессионный материал

- Меры предосторожности:

Особые меры предосторожности должны быть приняты в том случае, когда компрессионные изделия используются пациентами с пограничными признаками, такими как:

- Периферическая артериальная окклюзионная болезнь (ПАОБ) при лодыжечно-плечевом индексе давления (ЛПИД) $> 0,6$ - $< 0,9$ и/или давлении в области лодыжки от 60 до 90 мм рт.
- Пациенты с компенсированной хронической сердечной недостаточностью (стадия I-II по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) и венозным или лимфатическим отеком
- Сахарный диабет
- Кожные заболевания с обильным экссудатом или язвами смешанной артериовенозной этиологии
- Компрессионные изделия для уменьшения воспаления, боли или отека ног, рожистых воспалений или целлюлита следует использовать только в сочетании с антибактериальным лечением
- Появление кожного раздражения у чувствительных пациентов можно предотвратить путем нанесения специальных средств по уходу за кожей под компрессионное изделие
- Подкладочные материалы и бандажи не должны применяться непосредственно для открытых ран.
- Принятие решений о назначении лечения должно выполняться в зависимости от конкретного случая с учетом тщательной оценки соотношения «риск-польза»

Бандаж для колена Compreflex Standard Knee

Абсолютные противопоказания:

- Тяжелая сердечная недостаточность (стадия III-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации)
- Флебит синий болевой
- Тяжелая форма периферической артериальной окклюзионной болезни (ПАОБ) при каком-либо из следующих показателей: лодыжечно-плечевой индекс давления (ЛПИД) $< 0,6$; давление в области лодыжки < 60 мм рт.ст., давление в области большого пальца стопы < 30 мм рт.ст.
- Тяжелая диабетическая невропатия с потерей чувствительности или микроангиопатия с риском развития некроза кожи
- Компрессия имеющегося артериального шунта
- Аллергическая реакция на компрессионный материал

Меры предосторожности:

Особые меры предосторожности должны быть приняты в том случае, когда компрессионные изделия используются пациентами с пограничными признаками, такими как:

- Периферическая артериальная окклюзионная болезнь (ПАОБ) при лодыжечно-плечевом индексе давления (ЛПИД) $> 0,6$ - $< 0,9$ и/или давлении в области лодыжки от 60 до 90 мм рт.

- Пациенты с компенсированной хронической сердечной недостаточностью (стадия I-II по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) и венозным или лимфатическим отеком
- Сахарный диабет
- Кожные заболевания с обильным экссудатом или язвами смешанной артериовенозной этиологии
- Принятие решений о назначении лечения должно выполняться в зависимости от конкретного случая с учетом тщательной оценки соотношения «риск-польза»
- Компрессионные изделия для уменьшения воспаления, боли или отека ног, рожистых воспалений или целлюлита следует использовать только в сочетании с антибактериальным лечением
- Появление кожного раздражения у чувствительных пациентов можно предотвратить путем нанесения специальных средств по уходу за кожей под компрессионное изделие
- Подкладочные материалы и бандажи не должны применяться непосредственно для открытых ран.

Бандаж для бедра Compreflex Standard Thigh

Абсолютные противопоказания:

- Тяжелая сердечная недостаточность (стадия III-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации)
- Флебит синий болевой
- Тяжелая форма периферической артериальной окклюзионной болезни (ПАОБ) при каком-либо из следующих показателей: лодыжечно-плечевой индекс давления (ЛПИД) $< 0,6$; давление в области лодыжки < 60 мм рт.ст., давление в области большого пальца стопы < 30 мм рт.ст.
- Тяжелая диабетическая невропатия с потерей чувствительности или микроангиопатия с риском развития некроза кожи
- Компрессия имеющегося артериального шунта
- Аллергическая реакция на компрессионный материал

Меры предосторожности:

Особые меры предосторожности должны быть приняты в том случае, когда компрессионные изделия используются пациентами с пограничными признаками, такими как:

- Периферическая артериальная окклюзионная болезнь (ПАОБ) при лодыжечно-плечевом индексе давления (ЛПИД) $> 0,6 - < 0,9$ и/или давлении в области лодыжки от 60 до 90 мм рт.ст.
- Пациенты с компенсированной хронической сердечной недостаточностью (стадия I-II по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) и венозным или лимфатическим отеком
- Сахарный диабет
- Кожные заболевания с обильным экссудатом или язвами смешанной артериовенозной этиологии
- Принятие решений о назначении лечения должно выполняться в зависимости от конкретного случая с учетом тщательной оценки соотношения «риск-польза»

- Компрессионные изделия для уменьшения воспаления, боли или отека ног, рожистых воспалений или целлюлита следует использовать только в сочетании с антибактериальным лечением
- Появление кожного раздражения у чувствительных пациентов можно предотвратить путем нанесения специальных средств по уходу за кожей под компрессионное изделие
- Подкладочные материалы и бандажи не должны применяться непосредственно для открытых ран.

Бандаж для голени Compreflex Transition

Абсолютные противопоказания:

- Тяжелая сердечная недостаточность (стадия III-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации)
- Флебит синий болевой
- Тяжелая форма периферической артериальной окклюзионной болезни (ПАОБ) при каком-либо из следующих показателей: лодыжечно-плечевой индекс давления (ЛПИД) $< 0,6$; давление в области лодыжки < 60 мм рт.ст., давление в области большого пальца стопы < 30 мм рт.ст.
- Тяжелая диабетическая невропатия с потерей чувствительности или микроангиопатия с риском развития некроза кожи
- Компрессия имеющегося артериального шунта
- Аллергическая реакция на компрессионный материал

Меры предосторожности:

Особые меры предосторожности должны быть приняты в том случае, когда компрессионные изделия используются пациентами с пограничными признаками, такими как:

- Периферическая артериальная окклюзионная болезнь (ПАОБ) при лодыжечно-плечевом индексе давления (ЛПИД) $> 0,6 - < 0,9$ и/или давлении в области лодыжки от 60 до 90 мм рт.
- Пациенты с компенсированной хронической сердечной недостаточностью (стадия I-II по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) и венозным или лимфатическим отеком
- Сахарный диабет
- Кожные заболевания с обильным экссудатом или язвами смешанной артериовенозной этиологии
- Принятие решений о назначении лечения должно выполняться в зависимости от конкретного случая с учетом тщательной оценки соотношения «риск-польза»
- Компрессионные изделия для уменьшения воспаления, боли или отека ног, рожистых воспалений или целлюлита следует использовать только в сочетании с антибактериальным лечением
- Появление кожного раздражения у чувствительных пациентов можно предотвратить путем нанесения специальных средств по уходу за кожей под компрессионное изделие
- Подкладочные материалы и бандажи не должны применяться непосредственно для открытых ран.

Бандаж для голени Coolflex Standard Calf

Абсолютные противопоказания:

- Тяжелая сердечная недостаточность (стадия III-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации)
- Флебит синий болевой
- Тяжелая форма периферической артериальной окклюзионной болезни (ПАОБ) при каком-либо из следующих показателей: лодыжечно-плечевой индекс давления (ЛПИД) $< 0,6$; давление в области лодыжки < 60 мм рт.ст., давление в области большого пальца стопы < 30 мм рт.ст.
- Тяжелая диабетическая невропатия с потерей чувствительности или микроангиопатия с риском развития некроза кожи
- Компрессия имеющегося артериального шунта
- Аллергическая реакция на компрессионный материал

Меры предосторожности:

Особые меры предосторожности должны быть приняты в том случае, когда компрессионные изделия используются пациентами с пограничными признаками, такими как:

- Периферическая артериальная окклюзионная болезнь (ПАОБ) при лодыжечно-плечевом индексе давления (ЛПИД) $> 0,6 - < 0,9$ и/или давлении в области лодыжки от 60 до 90 мм рт.
- Пациенты с компенсированной хронической сердечной недостаточностью (стадия I-II по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) и венозным или лимфатическим отеком
- Сахарный диабет
- Кожные заболевания с обильным экссудатом или язвами смешанной артериовенозной этиологии
- Принятие решений о назначении лечения должно выполняться в зависимости от конкретного случая с учетом тщательной оценки соотношения «риск-польза»
- Компрессионные изделия для уменьшения воспаления, боли или отека ног, рожистых воспалений или целлюлита следует использовать только в сочетании с антибактериальным лечением
- Появление кожного раздражения у чувствительных пациентов можно предотвратить путем нанесения специальных средств по уходу за кожей под компрессионное изделие
- Подкладочные материалы и бандажи не должны применяться непосредственно для открытых ран.

Изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения противопоказаний!

Способ применения:

Рекомендации по надеваю медицинского изделия:

Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Plus

1. Убедитесь, что все фиксирующие язычки расстегнуты

2. Расположив ярлык бандажа на задней части лодыжки лицевой стороной наружу, вставьте пятку в отверстие
3. Зафиксируйте бандаж с помощью язычков вокруг стопы
4. Проденьте ремни через D-образное кольцо и затяните их для обеспечения плотной и удобной посадки.
5. Для обеспечения плотной посадки необходимо регулировать затяжку ремней.

Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Standard

1. Убедитесь, что все фиксирующие язычки расстегнуты
2. Расположив ярлык бандажа на задней части лодыжки лицевой стороной наружу, вставьте пятку в отверстие
3. Зафиксируйте бандаж с помощью язычков вокруг стопы
4. Проденьте ремни через D-образное кольцо и затяните их для обеспечения плотной и удобной посадки.
5. Для обеспечения плотной посадки необходимо регулировать затяжку ремней.

Бандаж для руки Compreflex Standard Arm

1. Снимите все украшения с руки и запястья. Проденьте руку в подкладочный рукав ладонью вверх
2. Осторожно натяните бандаж Compreflex Standard на руку, выравнивая сгиб локтя по локтевым швам
3. Начиная с запястья, затяните все ремни с незначительным натяжением. Повторно отрегулируйте все ремни до комфортного уровня компрессии
4. Зафиксируйте ремень-бабочку на сгибе локтя
5. Для снятия изделия расстегните и сверните все ремни, начиная с ремней на запястье. После закрепления всех ремней стяните изделие с запястья и снимите подкладочный рукав.

Бандаж для голени и стопы Compreflex Standard Calf and Foot

1. Наденьте имеющиеся в комплекте подкладочные гольфы. Наденьте бандаж для стопы Compreboot Standard, поместив пятку в специальное отверстие и обмотав ремни вокруг стопы для достижения необходимого уровня компрессии
2. Перед тем как надеть бандаж для голени Compreflex Standard, расстегните все ремни и сверните их в форме петли, а затем зафиксируйте застежками для предотвращения запутывания. После этого разместите эластичную форму спереди, натяните бандаж на ногу и подтяните его вверх, разместив чуть ниже колена (ярлык изделия должен находиться сзади лицевой стороной)
3. Начиная с двух ремней, расположенные ближе к лодыжке, не прилагая усилий, оберните их вокруг ноги и следите за тем, чтобы ремни не шли внахлест и между ними не было зазоров. Плотно прижмите застежки ремней по бокам изделия. Зафиксируйте все остальные ремни указанным выше способом
4. Используйте регулирующие ярлыки Accutab в соответствии с инструкциями, предоставленными в комплекте с изделием. Приведенные инструкции также позволят достичь оптимального уровня компрессии

5. При снятии изделия сначала снимите бандаж для стопы Compreboot Standard. Затем расстегните все ремни и сверните их концы, как это описано в пункте 2. Стяните бандаж с ноги и снимите подкладочные гольфы.

Бандаж для голени Compreflex Complete

1. Наденьте имеющиеся в комплекте подкладочные гольфы Complete Liners. Перед тем как надеть бандаж необходимо расстегнуть каждый ремень и свернуть их для предотвращения запутывания. После этого разместите эластичную форму спереди, натяните бандаж на ногу и подтяните вверх, разместив его чуть ниже колена (ярлык изделия будет располагаться сзади лицевой стороной)
2. Начиная с двух ремней, расположенные ближе к лодыжке, не прилагая усилий, оберните их вокруг ноги и следите за тем, чтобы ремни не шли внахлест и между ними не было зазоров. Плотнo прижмите застежки ремней по бокам изделия. Зафиксируйте все остальные ремни указанным выше способом
3. Используйте регулирующие ярлыки Accutab в соответствии с инструкциями, предоставленными в комплекте с изделием. Приведенные инструкции также позволят достичь оптимального уровня компрессии
4. При стягивании или снятии изделия отогните концы ремня до образования петли, затем зафиксируйте его с помощью застежки, чтобы предотвратить спутывание ремней. Стяните изделие с ноги, а затем снимите подкладочные гольфы.

Бандаж для голени Compreflex Standard Calf

1. Наденьте имеющиеся в комплекте подкладочные гольфы Basic Liner. Перед тем как надеть бандаж необходимо расстегнуть все ремни и свернуть их для предотвращения запутывания. После этого разместите эластичную форму спереди, натяните бандаж на ногу и подтяните вверх, разместив его чуть ниже колена (ярлык изделия будет располагаться сзади лицевой стороной)
2. Начиная с двух ремней, расположенные ближе к лодыжке, не прилагая усилий, оберните их вокруг ноги и следите за тем, чтобы ремни не шли внахлест и между ними не было зазоров. Плотнo прижмите застежки ремней по бокам изделия. Зафиксируйте все остальные ремни указанным выше способом
3. Используйте регулирующие ярлыки Accutab в соответствии с инструкциями, предоставленными в комплекте с изделием. Приведенные инструкции также позволят достичь оптимального уровня компрессии
4. При стягивании или снятии изделия отогните концы ремня до образования петли, затем зафиксируйте его с помощью застежки, чтобы предотвратить спутывание ремней. Стяните изделие с ноги, а затем снимите подкладочные гольфы.

Бандаж для колена Compreflex Standard Knee

1. Расстегните и раскрутите все ремни для того, чтобы зафиксировать их на изделии
2. Затем натяните изделие и расположите его в области колена. Эластичная форма обеспечивает надежную фиксацию изделия в требуемом месте
3. Начиная с нижнего ремня, осторожно оберните каждый ремень вокруг колена, не прилагая усилий и следя за тем, чтобы ремни не шли внахлест и между ними не было зазоров.

4. Плотно прижмите все застежки по бокам изделия. Зафиксируйте все ремни указанным выше способом
5. Затяните ремни при помощи регулирующих ярлыков Accutab согласно инструкции, приведенной во вкладыше к ярлыкам Accutab
6. При необходимости расположите ремень-бабочку (входит в комплект) поверх коленной чашечки и зафиксируйте на изделии для перекрытия каких-либо зазоров между ремнями
7. Для снятия изделия открепите ремень-бабочку. Затем расстегните и отогните все ремни и осторожно стяните изделие с ноги.

Бандаж для бедра Compreflex Standard Thigh

1. Наденьте имеющиеся в комплекте подкладки. При использовании бандажа для колена Compreflex Standard сначала наденьте его согласно предоставленной инструкции. При использовании бандажа для колена и голени Compreflex Standard и бандажа для бедра Compreflex Standard, сначала наденьте бандаж для голени, затем бандаж для колена, а после этого — бандаж для бедра.
2. До того как надеть бандаж для бедра Compreflex Standard, расстегните все ремни и сверните их для предотвращения запутывания. Затем разместите эластичную форму спереди, натяните бандаж на ногу и подтяните его вверх
3. Начиная с двух ремней, расположенные ближе к лодыжке, не прилагая усилий, оберните их вокруг ноги и следите за тем, чтобы ремни не шли внахлест и между ними не было зазоров. Плотно прижмите застежки ремней по бокам изделия. Зафиксируйте все остальные ремни указанным выше способом
4. Используйте регулирующие ярлыки Accutab в соответствии с инструкциями, предоставленными в комплекте с изделием. Приведенные инструкции также позволят достичь оптимального уровня компрессии
5. После этого наденьте ремешок и оберните его вокруг талии. Ремешок может быть укорочен до необходимой длины. Прикрепите широкий конец системы фиксации на бедре к ремешку и потяните узкий конец вниз к колену, закрепив его на бандаже для бедра Compreflex Standard
6. При снятии изделия сначала отстегните ремешок и систему фиксации на бедре. Затем расстегните все ремни изделия (изделий) и сверните их концы так, как это описано в пункте 2. Стяните изделие (изделия) с ноги, начиная с дистальной стороны и продвигаясь к проксимальной. В конце снимите подкладки.

Бандаж для голени Compreflex Transition

1. Наденьте имеющиеся в комплекте подкладочные гольфы. Перед тем как надеть бандаж необходимо расстегнуть каждый ремень и свернуть их для предотвращения запутывания. После этого разместите эластичную форму спереди, натяните бандаж на ногу и подтяните вверх, разместив его чуть ниже колена (ярлык изделия будет располагаться сзади лицевой стороной)
2. Начиная с двух ремней, расположенные ближе к лодыжке, не прилагая усилий, оберните их вокруг ноги и следите за тем, чтобы ремни не шли внахлест и между ними не было зазоров. Плотно прижмите застежки ремней по бокам изделия. Зафиксируйте все остальные ремни указанным выше способом

3. Используйте регулирующие ярлыки Accutab в соответствии с инструкциями, предоставленными в комплекте с изделием. Приведенные инструкции также позволят достичь оптимального уровня компрессии
4. При стягивании или снятии изделия отогните концы ремня до образования петли, затем зафиксируйте его с помощью застежки, чтобы предотвратить спутывание ремней. Стяните изделие с ноги, а затем снимите подкладочные гольфы.

Бандаж для голени Coolflex Standard Calf

1. Наденьте имеющиеся в комплекте подкладочные гольфы Basic Liners
2. Установив ярлык изделия лицевой стороной вверх и выровняв его по большой берцовой кости, поместите ногу в отверстие между жесткой вставкой и разделителем Spacer Fabric TR, после этого натяните бандаж до колена.
3. Убедитесь в том, что верхний ярлык и белый указатель внизу выровнены по большой берцовой кости.
4. Потяните язычки системы EZ-Close и прижмите их к разделителю Spacer Fabric TR, начиная снизу и постепенно поднимаясь к колену.
5. Установите язычки системы EZ-Close на 1-й (с давлением 20–30 мм рт.ст.) или 2-й (с давлением 30–40 мм рт.ст.) или 3-й (с давлением 40–50 мм рт.ст.) уровень, согласно назначению. Необходимо выполнить регулировку язычков в положении сидя или стоя. Уровни давления устанавливают давление, которое может изменяться в зависимости от положения тела
6. Проверьте язычки системы EZ-Close и повторно отрегулируйте их при необходимости. Так как изделие оказывает сдавливающее действие и изменяет объем конечности, рекомендуется ослабить язычки для достижения оптимальных уровней компрессии.
7. Для снятия изделия расстегните все язычки системы EZ-Close и стяните изделие с ноги.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ (ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ ВАРИАНТАМ ИСПОЛНЕНИЯ):

Несмотря на то, что «Бандажи медицинские компрессионные нерастяжимые регулируемые SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнения с принадлежностями» можно носить постоянно, рекомендуется все же снимать их один раз в день для очистки кожи и ухода за местом компрессии. После этого изделие следует надеть повторно в соответствии с указанными инструкциями. Частота снятия компрессионного изделия для обследования, очистки кожи и/или ухода за местом компрессии может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей каждого человека и медицинских рекомендаций.

Компания-производитель «Сигварис» рекомендует использовать подкладку для каждого компрессионного изделия.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

«Бандажи медицинские компрессионные нерастяжимые регулируемые SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнения с принадлежностями» следует использовать при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха 0~50%, давлении от 850 до 1060 Гпа и на высоте <3000м над уровнем моря.

Можно использовать на борту самолета, но не во время взлета и посадки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Применять только после консультации со специалистом!

При строгом соблюдении инструкций изготовителя побочные эффекты при компрессионной терапии отсутствуют!

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

При строгом соблюдении инструкций изготовителя побочные эффекты при компрессионной терапии отсутствуют!

ГАРАНТИЯ НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СОСТАВЛЯЕТ 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

Компания производитель гарантирует при соблюдении рекомендаций, трикотажа сохраняет лечебный эффект в течение 6 месяцев (при ежедневной носке и стирке), далее его нужно заменить на новый, поэтому и гарантия дается на 6 месяцев.

СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ:

- не оказывает влияния

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Бандаж для голени (Coolflex Standard Calf)
Бандаж для голени (Compreflex Standard Calf)
Бандаж для голени и стопы (Compreflex Standard Calf and Foot)
Бандаж для голени (Compreflex Transition)
Бандаж для голени (Compreflex Complete)
Бандаж для бедра (Compreflex Standard Thigh)
Бандаж для колена (Compreflex Standard Knee)
Бандаж для руки (Compreflex Standard Arm)
Бандаж для стопы и лодыжки (Compreboot Standard)
Бандаж для стопы и лодыжки (Compreboot Plus)

ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

- Некомпрессионные хлопковые (100% хлопок) подкладочные рукава (цвет: телесный).
- Некомпрессионные подкладочные гольфы Basic Liner/ Complete Liner (эластан – 8%, хлопок – 82%).
- Набор регулирующих язычков. Состав: нейлон 100%, цвет телесный, краситель
- Цельные подкладочные гольфы, оказывающие компрессию на стопу, лодыжку и голень (эластан – 30% хлопок – 70%).
- Подкладочные гольфы Transition Liner (эластан – 30% хлопок – 70%).

**ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ,
ВСТУПАЮЩИХ В НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ
КОНТАКТ С ТЕЛОМ ЧЕЛОВЕКА.**

Не содержит натуральный каучуковый латекс.

	Материал	Описание материала	Контакт с телом человека
Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Plus	• 44% полиуретановая пена • 30% нейлон • 22% неопрен • 3% полиэстер • 1% эластан (спандекс) • Застежка-липучка – 100% полиамид	Производитель материала: Guangdong Haibei Purification Technology Co., Ltd. (КНР) Производитель застежки: BASF (Германия)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Standard	• 44% полиуретановая пена • 30% нейлон • 22% неопрен • 3% полиэстер • 1% эластан (спандекс) • Застежка-липучка – 100% полиамид	Производитель материала: Guangdong Haibei Purification Technology Co., Ltd. (КНР) Производитель застежки: BASF (Германия)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Бандаж для руки Compreflex Standard Arm	• 39% полиуретановая пена • 32% нейлон • 20% хлопок • 5% неопрен • 4% эластан (спандекс) • Подкладочный материал: хлопок – 100% • Застежка-липучка – 100% полиамид	Производитель материала: Guangdong Haibei Purification Technology Co., Ltd. (КНР) Производитель застежки: BASF (Германия) Подкладочный рукав, цвет телесный (краситель марки CI 45380, Nan Ya Plastic Corporation, Тайвань)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

Бандаж для голени и стопы Compreflex Standard Calf and Foot	• 33% полиуретановая пена • 25% нейлон • 21% полиэстер • 15% неопрен • 4% хлопок • 2% эластан (спандекс) • Застежка-липучка – 100% полиамид	Производитель материала: Guangdong Haibei Purification Technology Co., Ltd. (КНР) Производитель застежки: BASF (Германия)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Бандаж для голени Compreflex Complete	• 39% полиуретановая пена • 28% нейлон • 24% неопрен • 5% хлопок • 4% эластан (спандекс) - Застежка-липучка – 100% полиамид	Производитель материала: Guangdong Haibei Purification Technology Co., Ltd. (КНР) Производитель застежки: BASF (Германия)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Бандаж для голени Compreflex Standard Calf	• 39% полиуретановая пена • 28% нейлон • 24% неопрен • 5% хлопок • 4% эластан (спандекс) - Застежка-липучка – 100% полиамид	Производитель материала: Guangdong Haibei Purification Technology Co., Ltd. (КНР) Производитель застежки: BASF (Германия)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Бандаж для колена Compreflex Standard Knee	• 45% хлопок • 23% полиуретановая пена • 21% нейлон • 9% неопрен • 2% эластан (спандекс) - Резинка широкая	Производитель материала: Guangdong Haibei Purification Technology Co., Ltd. (КНР) Производитель застежки: BASF (Германия)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

	– состав: 60% полиамид, 40% эластичный хлопок (растяжимый по длине). Без латекса. Степень растяжения 105% . Застежка-липучка – 100% полиамид		
Бандаж для бедра Compreflex Standard Thigh	• 45% хлопок • 23% полиуретановая пена • 21% нейлон • 9% неопрен • 2% эластан (спандекс) Пояс: неопреновый материал Breath-O-Prene (89% хлопок, 9% неопрен, 2% эластан (спандекс)) Застежка-липучка – 100% полиамид	Производитель материала (включая Breath-O-Prene): Guangdong Haibei Purification Technology Co., Ltd. (КНР) Производитель застежки: BASF (Германия)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Бандаж для голени Compreflex Transition	• 39% полиуретановая пена • 28% нейлон • 24% неопрен • 5% хлопок • 4% эластан (спандекс) Застежка-липучка – 100% полиамид	Производитель материала: Guangdong Haibei Purification Technology Co., Ltd. (КНР) Производитель застежки: BASF (Германия) Цвет серый (краситель серый, марки CI 76645, Nan Ya Plastic Corporation, Тайвань)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

Бандаж для голени Coolflex Standard Calf	• 61% полиэстер • 30% нейлон • 8% эластан (спандекс) 1% нержавеющая сталь Застежка-липучка – 100% полиамид	Производитель материала: Guangdong Haibei Purification Technology Co., Ltd. (КНР) Производитель застежки: BASF (Германия) Нержавеющая сталь марки 08X18H10, производитель Steel Industry, Ltd. (Германия)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Подкладочные гольфы Basic Liner/ Complete Liner	Эластан (спандекс) – 8% Хлопок – 82%	Цвет серый (краситель серый, марки CI 76645, Nan Ya Plastic Corporation, Тайвань)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Подкладочные гольфы Transition Liner	Состав: эластан – 30% хлопок – 70%). Растяжимость – 105%. Цвет черный.	Цвет черный (краситель черный, марки CI 28440, Nan Ya Plastic Corporation, Тайвань)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Некомпрессионные хлопковые подкладочные рукава	Состав: 100% хлопок	цвет: телесный краситель CI 45380/7, Nan Ya Plastic Corporation, Тайвань	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Регулирующие язычки	Состав: нейлон 100%	Цвет телесный, краситель марки CI 45380, Nan Ya Plastic Corporation, Тайвань	Продолжительного контакта нет, контакт с кожей пальцев рук при фиксировании бандажа

Характеристики застежки-липучки:

Материал основы	Полиамид
Адгезия на отслаивание	23 Н/см
Усилие на сдвиг	100 Н/см
Крепость застегивания	2,3 Н/см ²

Огнестойкость	Низкогорючая
Влагоустойчивость	Высокоустойчива
Стирка	Только в застегнутом состоянии
Краситель	черный, марки CI 28440


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Plus

Замеры изделия и размерная сетка:

Определение наиболее подходящего размера изделия обеспечивает правильную посадку и надлежащее распределение компрессии. Замеры должны выполняться медицинским работником.

Ø Точка замера

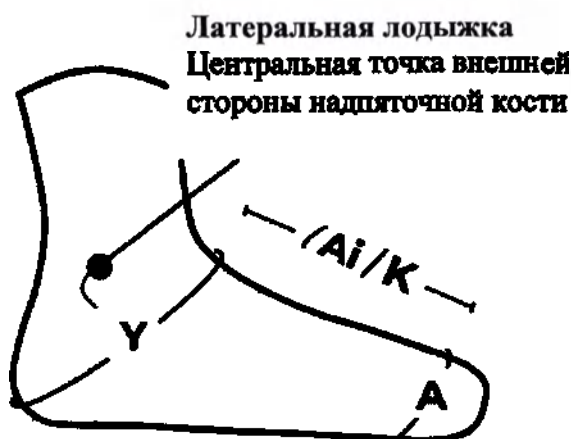

Ai: Длина, измеренная на медиальной стороне стопы от пятки до головки первой плюсневой кости

	S	M / L	XL / XXL
Y	28–36 см	≤ 39 см	≤ 44 см
A	22–26 см	≤ 30 см	≤ 33 см
Ai / K	14–18 см	18–20 см	20–22 см

Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Standard

Замеры изделия и размерная сетка:

Определение наиболее подходящего размера изделия обеспечивает правильную посадку и надлежащее распределение компрессии. Замеры должны выполняться медицинским работником.

Ø Точка замера




Ai: Длина, измеренная на медиальной стороне стопы от пятки до головки первой плюсневой кости

	S	M / L	XL / XXL
Y	28–36 см	≤ 39 см	≤ 44 см
A	22–26 см	≤ 30 см	≤ 33 см
Ai / K	14–18 см	18–20 см	20–22 см

Бандаж для руки Comreflex Standard Arm

Замеры изделия и размерная сетка:

Определение наиболее подходящего размера изделия обеспечивает правильную посадку и надлежащее распределение компрессии. Замеры должны выполняться медицинским работником.

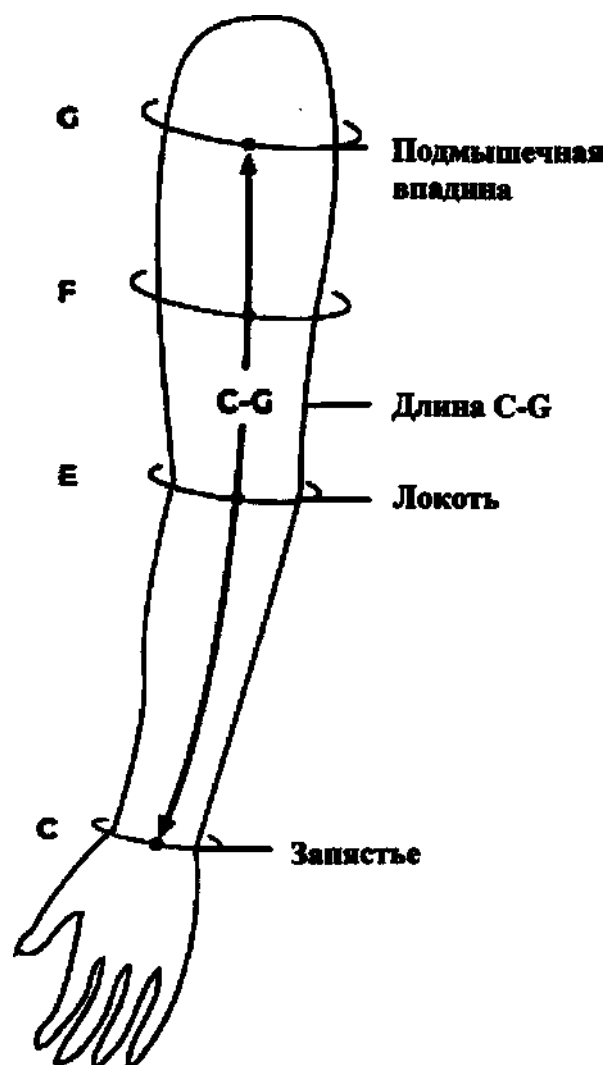

Длина C-G
Короткая:
38-42,9 см
Средняя:
43-47,9 см
Большая:
48-53 см

C-G: Длина, измеренная по тыльной стороне руки

	S	M	L	XL
G	23-32 см	28-37 см	33-43 см	39-49 см
F	22-30 см	26-34 см	30-39 см	35-44 см
E	20-27 см	24-31 см	24-31 см	32-39 см
C	14-19 см	15-20 см	16-21 см	18-23 см

Бандаж для голени и стопы Compreflex Standard Calf and Foot

Замеры изделия и размерная сетка:

Определение наиболее подходящего размера изделия обеспечивает правильную посадку и надлежащее распределение компрессии. Замеры должны выполняться медицинским работником.



Длина L1
Средняя: 30–33,9 см
Большая: 34–42 см

Ai: Длина, измеренная на медиальной стороне стопы от пятки до головки первой плюсневой кости

Таблица размеров биндажа для голени Compreflex Standard Calf and Foot, см (B-D)					
	S	M	L	XL	XXL
D	26–36 см	34–44 см	40–50 см	46–56 см	54–64 см
C	26–36 см	34–44 см	40–50 см	46–56 см	54–64 см
B1	24–34 см	29–39 см	34–44 см	39–49 см	44–55 см
B	18–25 см	21–30 см	26–36 см	31–41 см	36–46 см

Таблица размеров биндажа для стопы Compreboot Standard, см (A-Y)			
	S	M / L	XL / XXL
Y	28–36 см	≤ 39 см	≤ 44 см
A	22–26 см	≤ 30 см	≤ 33 см
Ai / K	14–18 см	18–20 см	20–22 см

Биндаж для голени Compreflex Complete

Замеры изделия и размерная сетка:

Определение наиболее подходящего размера изделия обеспечивает правильную посадку и надлежащее распределение компрессии. Замеры должны выполняться медицинским работником.



Длина L1
Средняя: 30-33,9 см
Большая: 34-42 см

Таблица размеров биндажа для голени Compreflex Complete, см
(B-D)

	S	M	L	XL	XXL
D	29-39 см	34-44 см	40-50 см	46-56 см	54-64 см
C	29-39 см	34-44 см	40-50 см	46-56 см	54-64 см
B1	24-34 см	29-39 см	33-43 см	39-49 см	44-55 см
B	19-26 см	21-30 см	24-34 см	31-41 см	36-46 см

Биндаж для голени Compreflex Standard Calf

Замеры изделия и размерная сетка:

Определение наиболее подходящего размера изделия обеспечивает правильную посадку и надлежащее распределение компрессии. Замеры должны выполняться медицинским работником.



Длина L1
Средняя: 30-33,9 см
Большая: 34-42 см

Таблица размеров бандажа для голени Compreflex Standard Calf, см (B-D)

	S	M	L	XL	XXL
D	29-39 см	34-44 см	40-50 см	46-56 см	46-56 см
C	29-39 см	34-44 см	40-50 см	46-56 см	46-56 см
B1	24-34 см	29-39 см	34-44 см	39-49 см	41-51 см
B	19-26 см	21-30 см	26-36 см	31-41 см	36-46 см

Бандаж для колена Compreflex Standard Knee

Замеры изделия и размерная сетка:

Определение наиболее подходящего размера изделия обеспечивает правильную посадку и надлежащее распределение компрессии. Замеры должны выполняться медицинским работником.

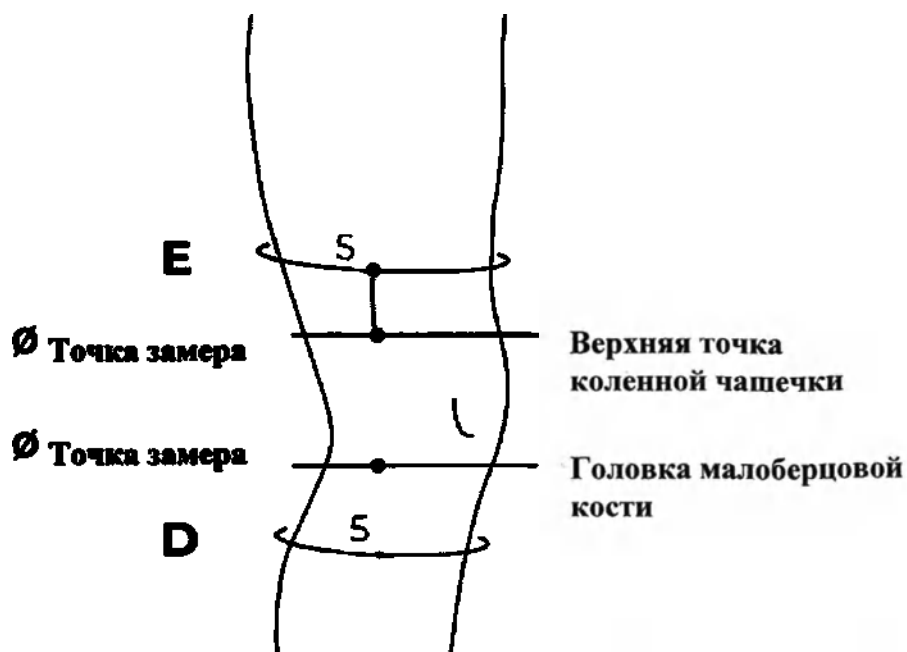



Таблица размеров бандажа для колена Compreflex Standard Knee, см (D-E)

	S	M	L	XL
E	32–42 см	46–56 см	53–63 см	58–73 см
D	26–36 см	34–44 см	39–49 см	44–65 см

Бандаж для бедра Compreflex Standard Thigh

Замеры изделия и размерная сетка:

Определение наиболее подходящего размера изделия обеспечивает правильную посадку и надлежащее распределение компрессии. Замеры должны выполняться медицинским работником.

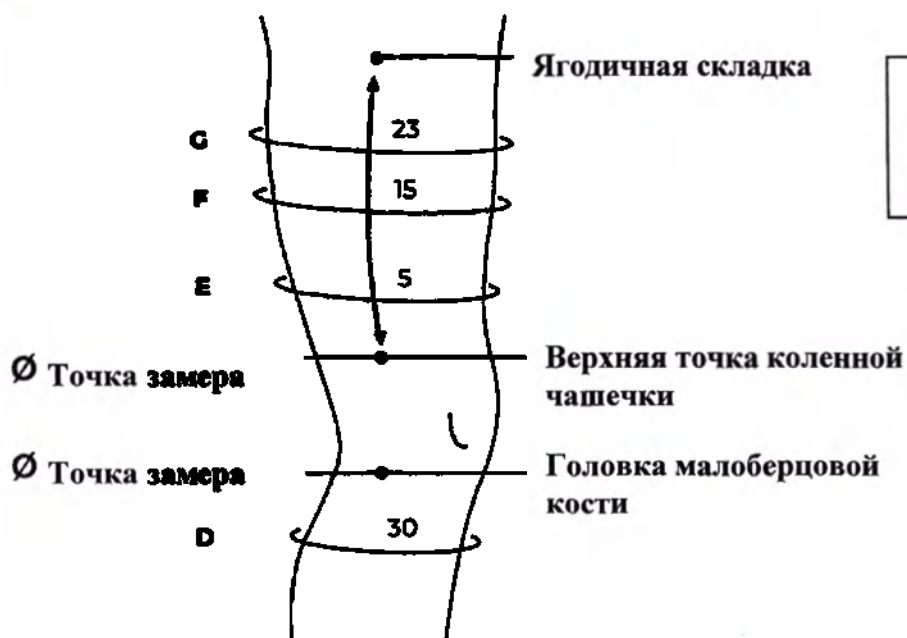


Длина L2
 Средняя: 20-24,9 см
 Большая: 25-30 см

Таблица размеров бандажа для бедра Compreflex Standard Thigh, см (E-G)				
	S	M	L	XL
G	46-56 см	56-66 см	64-74 см	74-84 см
F	40-50 см	51-61 см	58-68 см	68-78 см
E	34-44 см	46-56 см	53-63 см	63-73 см

Бандаж для голени Compreflex Transition

Замеры изделия и размерная сетка:

Определение наиболее подходящего размера изделия обеспечивает правильную посадку и надлежащее распределение компрессии. Замеры должны выполняться медицинским работником.

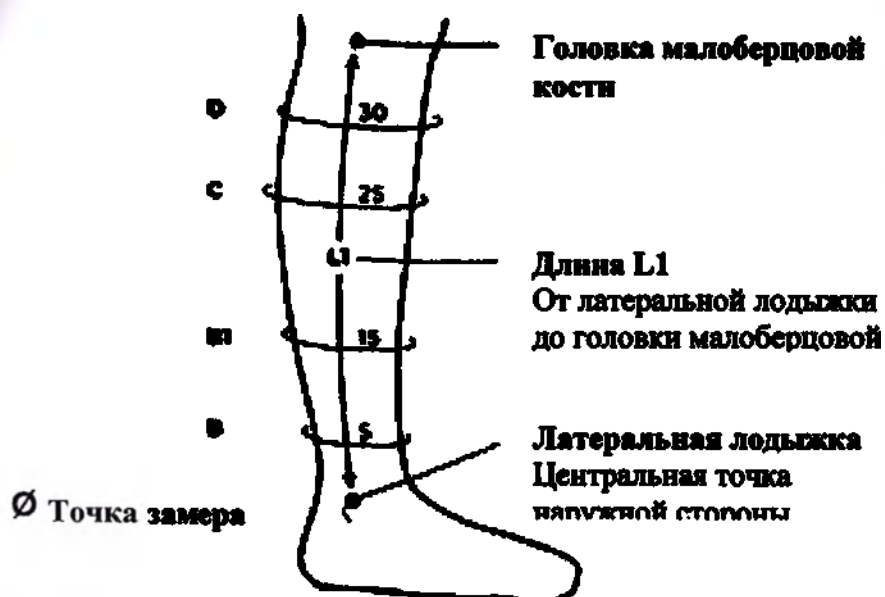


Длина L1
Средняя: 30-33,9 см
Большая: 34-42 см

Таблица размеров бандажа для голени Compreflex Transition, см (B-D)					
	S	M	L	XL	XXL
D	29-39 см	31-41 см	40-50 см	46-56 см	54-64 см
C	29-39 см	30-40 см	40-50 см	46-56 см	54-64 см
B1	24-34 см	28-38 см	34-44 см	39-49 см	44-55 см
B	19-26 см	19,5-29 см	26-36 см	31-41 см	36-46 см

Бандаж для голени Coolflex Standard Calf

Замеры изделия и размерная сетка:

Определение наиболее подходящего размера изделия обеспечивает правильную посадку и надлежащее распределение компрессии. Замеры должны выполняться медицинским работником.

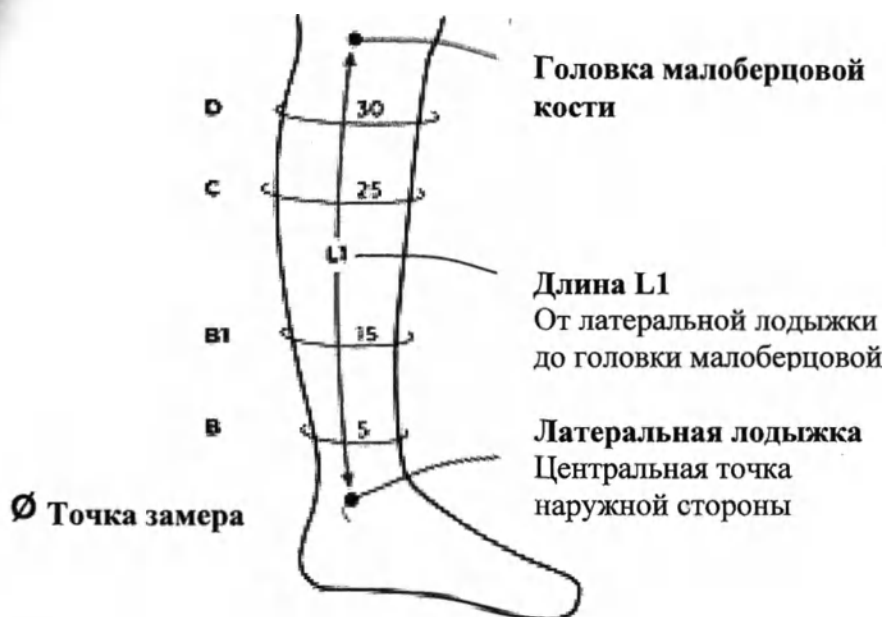

Длина L1
Средняя: 30-33,9 см
Большая: 34-42 см


Таблица размеров биндажа для голени Coolflex Standard Calf, см (B-D)

	S	M	L	XL	XXL
D	28-39 см	35-50 см	34-50 см	45-64 см	45-64 см
C	28-39 см	35-50 см	34-50 см	45-64 см	45-64 см
B1	23-33 см	27-38 см	29-43 см	35-49 см	37-54 см
B	16-26 см	16-26 см	23-33 см	23-33 см	30-42 см

Изделия подкладочные Transition Liner

Замеры изделия и размерная сетка:

Определение наиболее подходящего размера изделия обеспечивает правильную посадку и надлежащее распределение компрессии. Замеры должны выполняться медицинским работником.

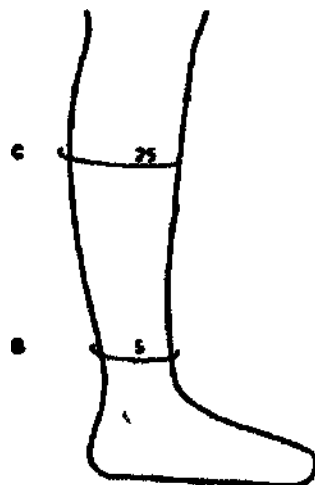

	S	M	L	XL	XXL
С (окр. в области икроножной мышцы)	29-39 см	34-44 см	40-50 см	46-56 см	54-64 см
В (окр. в области лодыжки)	19-26 см	21-30 см	26-36 см	31-41 см	36-46 см

Существуют компрессионные изделия с разной степенью сжатия, в зависимости от тяжести подлежащего лечению заболевания. Давление, оказываемое компрессионными чулками на уровне лодыжки, измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.).

По степени компрессии ортопедические биндажи на суставы верхних и нижних конечностей подразделяют на пять классов:

- нулевого класса компрессии;
- биндаж I класса компрессии;
- биндаж II класса компрессии;
- биндаж III класса компрессии;
- биндаж IV класса компрессии.

0 класс компрессии: Класс компрессии, характеризующийся давлением, значение которого ниже 18 мм рт.ст.

I класс компрессии: Класс компрессии, характеризующийся давлением, значение которого составляет от 18 до 21 мм рт.ст.

II класс компрессии: Класс компрессии, характеризующийся давлением, значение которого составляет от 22 до 32 мм рт.ст.

III класс компрессии: Класс компрессии, характеризующийся давлением, значение которого составляет от 33 до 46 мм рт.ст.

IV класс компрессии: Класс компрессии, характеризующийся давлением, значение которого превышает 47 мм рт.ст.

БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ НЕРАСТЯЖИМЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ SIGVARIS WRAP, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЙ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ:

1. **Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Plus** - Уровень компрессии: ≤ 40 мм рт.ст. (III класс компрессии)
2. **Бандаж для стопы и лодыжки Compreboot Standard** - Уровень компрессии: ≤ 40 мм рт.ст. (III класс компрессии)
3. **Бандаж для руки Compreflex Standard Arm** - Уровень компрессии: 20-30 мм рт.ст. (II класс компрессии).
4. **Бандаж для голени и стопы Compreflex Standard Calf and Foot** - Уровень компрессии: 21-46 мм рт.ст. (III класс компрессии)
5. **Бандаж для голени Compreflex Complete** - Уровень компрессии: 21-46 мм рт.ст. (III класс компрессии)

Данное компрессионное изделие используется в комплекте с подкладочными гольфами **Complete Liner**, которые защищают кожу и оказывают давление на голеностоп, лодыжку и голень на уровне 10–15 мм.рт.ст. (0 класс компрессии)

6. **Бандаж для голени Compreflex Standard Calf** - Уровень компрессии: 20-50 мм рт.ст. (IV класс компрессии)
7. **Бандаж для колена Compreflex Standard Knee** - 20-50 мм рт.ст. (IV класс компрессии)
8. **Бандаж для бедра Compreflex Standard Thigh** - 20-50 мм рт.ст. (IV класс компрессии)
9. **Бандаж для голени Compreflex Transition** - 20-50 мм рт.ст. (IV класс компрессии)

Данное компрессионное изделие используется в комплекте с подкладочными гольфами **Transition Liner**, которые защищают кожу и оказывают давление на стопу, лодыжку и голень на уровне 10–15 мм рт.ст. (0 класс компрессии)

10. **Бандаж для голени Coolflex Standard Calf** - 20-50 мм рт.ст. (IV класс компрессии)

Технические характеристики для всех вариантов исполнения

Поверхностная плотность, г/м ²	Не менее 200
Растяжимость до/после стирки, %	Не менее 50
Рабочая растяжимость, %	От 2 до 70 включительно
Класс компрессии, Па	Добавить отдельно
Изменение линейных размеров после первой	не более 20% их линейных размеров до

стирки, %	стирки.
Разрывное удлинение до стирки, %	Не менее значения растяжимости
Разрывное удлинение после стирки, %	не более 20% от разрывного удлинения до стирки
Остаточная деформация изделий до и после стирки, %	не более 10
Прочность при разрыве до/после стирки, кгс	Не менее 20
Разрывная нагрузка до/после, Н	Не менее 196

МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Маркировка на потребительской упаковке производителя содержит:

- Логотип, название и адрес компании-изготовителя.
- Название изделия.
- Номер партии и размер изделия.
- Артикул.
- Изображение изделия.
- Знак «Обратитесь к инструкции по применению».
- Символ «Изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и стандартам Европейского союза».
- Знак, показывающий, что компания-производитель выплачивает определенную компенсацию на восстановление окружающей среды. (при необходимости)
- Знак или надпись о наличии/отсутствии латекса в материале изделия.
- Номер и дата Регистрационного удостоверения
- Сведения об уполномоченном представителе на территории РФ

Макет маркировки индивидуальной (потребительской) упаковки:

 SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland	
Бандаж для руки Compreflex Standard Arm, размер: S	
Артикул: XXXXXX РУ № _____ от _____	
 XX.XX.XXXX	 XX.XX.XXXX
 XXXXXX	     
Уполномоченный на территории РФ: ООО «Вено+» 115114, Москва г, Кожевническая ул, дом 7, строение 1, этаж 1, помещение X, комната 1ч,2,3, помещение VI, комната 87ч, 88, 101ч	

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Производитель
Компания «СИГВАРИС, ИНК.»
13055, Райли Стрит, Апарт. 30
г. Холланд, штат Мичиган 49424, США




ЕВРОПА, Азиатско-Тихоокеанский
регион и остальные страны мира
Компания «СИГВАРИС АГ»
Греблиштрассе, 8
9014 Санкт-Галлен / Швейцария



Маркировка на ярлыке-этикетке, нанесенном с изнаночной стороны, на шве изделия содержит:

- Наименование компании медицинского изделия;
- Артикул
- Размер медицинского изделия
- Номер лота/партии
- Сведения по уходу за медицинским изделием.
- Место производства

Макет маркировки на ярлыке этикетке:

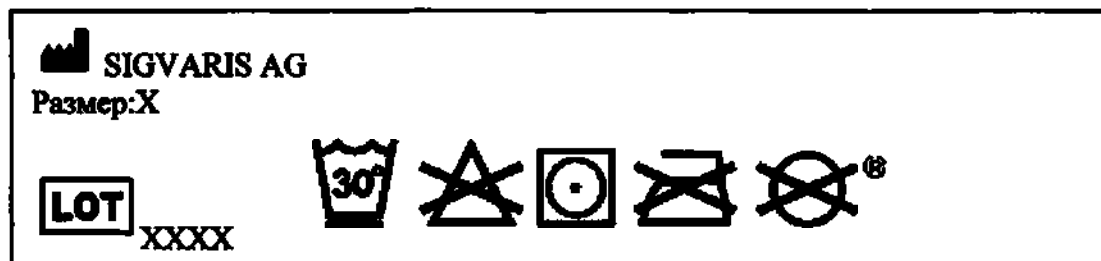

Транспортная маркировка содержит следующую информацию:

- Логотип, название и адрес компании-изготовителя.
- Название изделия.
- Номер партии
- Номер и дата регистрационного удостоверения
- Количество упаковок в коробке
- Сведения об уполномоченном представителе на территории РФ
- Символ «беречь от солнечных лучей»
- Символ «беречь от воздействия влаги»
- Символ «Изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и стандартам Европейского союза».

- Знак, показывающий, что компания-производитель выплачивает определенную компенсацию на восстановление окружающей среды. (при необходимости)

Макет маркировки транспортной упаковки:

	SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland		
Бандаж для руки Compreflex Standard Arm, размер: S			
РУ № _____ от _____			
Кол-во уп.:XX			
	XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX
	XXXXXX		
			
Уполномоченный на территории РФ: ООО «Вено+» 115114, Москва г, Кожевническая ул, дом 7, строение 1, этаж 1, помещение X, комната 1ч,2,3, помещение VI, комната 87ч, 88, 101ч			

Упаковка

Каждое готовое изделие должно вкладываться в потребительскую упаковку из картона.

В упаковку вкладывается каждое готовое изделие и инструкция по эксплуатации.

Изделия в портебительской упаковке должны быть упакованы в транспортную упаковку из гофрированного картона.

Символы и обозначения

	Производитель
	Подлежащий утилизации
	Использовать до
	Код партии
	Не содержит натуральный каучуковый латекс
	деликатный режим / Синтетика

	Не отбеливать
	Сушить вдали от источников тепла
	Не гладить
	Не подвергать химической чистке

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА РИСКОВ

На основании результатов проведенного анализа рисков установлено, что предпринимаемые меры по минимизации рисков являются эффективными и остаточный риск является приемлемым. Производителем представлен АНАЛИЗ РИСКОВ

ПОСТМАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Данные о продажах и претензиях

На момент подготовки настоящего документа информация о поступивших рекламациях нет.

СВЕДЕНИЯ О ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандажи медицинские компрессионные нерастяжимые регулируемые SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями поставляются не стерильными.

МАТЕРИАЛЫ ЖИВОТНОГО ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ СВЕДЕНИЙ ОБ ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ.

Компания производитель SIGVARIS AG, Швейцария с полной ответственностью заявляет, что при производстве медицинского изделия «Бандажи медицинские компрессионные нерастяжимые регулируемые SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями» материалы животного и человеческого применения не используются.

ПРЕДЫДУЩИЕ МОДИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ПОДОБНЫЕ МОДИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБРАЩЕНИИ.

На территории Российской Федерации не зарегистрированы в установленном порядке и не находятся в обращении предыдущие модификации медицинского изделия.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Компания производитель SIGVARIS AG, Швейцария с полной ответственностью заявляет, что при производстве медицинского изделия «Бандажи медицинские компрессионные нерастяжимые регулируемые SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями», лекарственные вещества не применяются.

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ.

Медицинское изделие поставляется не стерильным. Не подлежит стерилизации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ

Техническое обслуживание медицинского изделия «Изделие медицинское компрессионное SIGVARIS в вариантах исполнений» не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Бандажи медицинские компрессионные нерастяжимые регулируемые SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями» утилизируется в соответствии с Нормативы СанПиН 2.1.3684-21

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Медицинское изделие «Бандажи медицинские компрессионные нерастяжимые регулируемые SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями» поступает в готовом виде, упакованное в транспортную тару, транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.

Температурные условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C

Относительная влажность воздуха 0~50%,

Атмосферное давление от 850 до 1060 Гпа.

Транспортная тара должна быть устойчива к воздействию транспортной тряски с максимальным ускорением 30 м/с² и частотой от 2 до 3 Гц.

СВЕДЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ:

- Стирать только с застегнутыми фиксирующими язычками
- Для защиты компрессионного изделия при стирке необходимо использовать специальный мешок
- Стирка в стиральной машине только в деликатном режиме с использованием мягкого моющего средства
- НЕ использовать отбеливатели или кондиционеры для белья
- Сушить вдали от источников тепла. Для продления срока службы изделия рекомендуется сушка на открытом воздухе

- Бандаж рекомендуется стирать по мере загрязнения.



Рекомендации по уходу за подкладками:

- Стирка в стиральной машине только в деликатном режиме с использованием мягкого моющего средства
- НЕ использовать отбеливатели или кондиционеры для белья
- Сушить вдали от источников тепла. Для продления срока службы изделия рекомендуется сушка на открытом воздухе



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Условия хранения медицинского изделия «Бандажи медицинские компрессионные нерастяжимые регулируемые SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями» от +5 до +40 С и относительной влажности воздуха 0~50%, давлении от 850 до 1060 Гпа и на высоте <3000м над уровнем моря.

Не следует использовать рядом с другим оборудованием или складировать по вертикали.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СРОК СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

На Медицинское изделие «Бандажи медицинские компрессионные нерастяжимые регулируемые SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями» предоставляется 6-месячная гарантия (с даты продажи) на случай производственных дефектов. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением с медицинским изделием.

Срок службы медицинского изделия «Бандажи медицинские компрессионные нерастяжимые регулируемые SIGVARIS WRAP, в вариантах исполнений с принадлежностями» при надлежащем уходе – 1 год с момента начала использования.

Срок годности медицинского изделия – 5 лет (60 месяцев) с даты производства.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ООО «Вено+»

115114, Москва г, Кожевническая ул, дом 7, строение 1, этаж 1, помещение X, комната 1ч,2,3, помещение VI, комната 87ч, 88, 101ч

ИНН 7714804095.

Телефон: +7(495) 645-33-47 venoplus@venoplus.ru

Official certification no. cl/250

Inspected for legalisation of the signature of the firm SIGVARIS AG, St.Gallen, Switzerland, signed by Mr. Jürgen Sigg, CEO.

St.Gallen, Switzerland, 18/03/2022

Population Services City of St.Gall
Legalisations

Claudine Lüthi



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country, Swiss Confederation, Canton of St.Gallen Швейцария, Швейцарская Конфедерация, кантон Санкт-Галлен	
This public document / Данный официальный документ	
2. has been signed by подписан	Claudine Lüthi
3. acting in the capacity of в качестве	Legalisationsbeamtin
4. bears the seal / stamp of имеет печать / штамп	legalizing officer
Certified / Подтверждено	
5. at / в Санкт-Галлене	6. the 18.03.2022
7. by / Elena Mundwyler Legalizing officer of the Chancery of the Canton of St.Gallen Специалистом по легализации Канцелярии кантона Санкт-Галлена	
8. No. / под номером 3792	
9. Seal / stamp Печать / штамп	10. Unterschrift Подпись

/Перевод с английского языка на русский язык/

/печать: Специалист по легализации/

Компания «СИГВАРИС АГ»
(SIGVARIS AG)
Греблиштрассе 8
CH-9014 Санкт-Галлен
(Gröblistrasse 8 CH-9014 St.
Gallen)

Тел.: +41 71 272 40 00
Факс: +41 71 272 40 01
www.sigvaris.com

/Логотип/

«СИГВАРИС АГ» (SIGVARIS AG)
Санкт-Галлен (St. Gallen)

/подпись/
Юрген Сигг (Juergen Sigg)
Генеральный директор

представлено на предмет легализации подписи компании СИГВАРИС АГ, Санкт-Галлен, Швейцария (SIGVARIS AG, Switzerland, St. Gallen), за подписью г-на Юргена Сигта, главного исполнительного директора.

Санкт-Галлен, Швейцария, 18.03.2022г. Обслуживание населения законодательством города Санкт-Галлена

/Подпись/

Клодин Люти

/Печать: Специалист по легализации/

/Печать: Государственная канцелярия кантона Санкт-Галлена* Швейцария/

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: Швейцарская Конфедерация, кантон Санкт-Галлен

Данный официальный документ

2. подписан

Клодин Люти

3. в качестве

Специалиста по легализации

4. имеет печать/штамп

Специалиста по легализации

Подтверждено

5. в Санкт-Галлене

6. 18.03.2021 г.

7. Еленой Мундвайлер

Специалистом по легализации Канцелярии кантона Санкт-Галлена

8. под номером 3792

9. Печать/штамп

10. Подпись: /Подпись/

/Печать: Государственная канцелярия кантона

Санкт-Галлена* Швейцария/

/Печать: Государственная канцелярия кантона

Санкт-Галлена* Швейцария/

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Докучаевым Дмитрием Игоревичем.

Российская Федерация

Город Москва

Первого апреля две тысячи двадцать второго года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Докучаева Дмитрия Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2022-15-1992

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Квитко

Ф.А. Квитко

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 51 листов

Нотариус

Квитко

Российская Федерация

Город Москва

Первого апреля две тысячи двадцать второго года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2022-15-1984
Уплачено за совершение нотариального действия: 3120 руб.



Ф.А. Квитко



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 52 лист(а) (ов)

Нотариус Квитко

Ф.А. Квитко