

лей.

1.4.5 Комплекс позволяет узнать субъективную оценку испытуемого успешности выполнения им тестового задания и искренности его ответов на вопросы опросников.

1.4.6 Комплекс обеспечивает возможность архивации параметров и показателей проведённого обследования.

1.4.7 Комплекс обеспечивает просмотр параметров и показателей проведённых ранее обследований.

1.4.8 Комплекс предоставляет возможности поиска необходимых обследований по имени пациента, по названию макротеста, по названию ПО макротеста, по номеру обследования и комбинации указанных признаков.

1.4.9 Комплекс обеспечивает возможность создания отчёта в среде Microsoft Excel.

2. Описание принципа действия изделия

Общий вид комплекса приведен на рис. 1.



Рисунок 1. Общий вид комплекса КПК-99М "Психомат"

2.1. ПИ представляет собой настольную конструкцию и является рабочим местом испытуемого.

2.2. Представленное на компакт-диске программное обеспечение представляет собой компьютерную реализацию указанных в приложении Б методов обследования психофизического состояния человека; базу данных и программную оболочку для работы с ПО и доступа к информации в базе данных. База данных позволяет сохранить сведения об испытуемых и проведённых обследованиях. В ПО реализован расчёт общепринятых и некоторых дополнительных показателей обследования.

2.3. Программное обеспечение работает в следующих режимах:

- проведение обследования;
- составление макротестов из отдельных ПО и редактирование параметров ПО;
- просмотр в базе данных результатов проведённых обследований, информации об испытуемых;
- создание отчётов по проведённым обследованиям и макротесту.

2.4. При выполнении ПО на экране видеомонитора (ВМ) отображается подсказка по данному методу обследования.