

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель
Кустарев Герман Борисович



Г. Б. Кустарев
2010 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению

Пояс медицинский эластичный, моделей 70107 (одношовный) и 70307 (двухшовный).

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2010

1. Назначение.

Пояс медицинский эластичный, моделей 70107 (одношовный) и 70307 (двухшовный) предназначен для применения в лечебно-профилактических целях при остеохондрозе, профилактике обострения радикулита, в целях усиления эффекта после массажа, лечебной физкультуры, мануальной терапии, за счет мягкой фиксации, сохранения состояния покоя и согревающего действия.

2. Основные технические характеристики

Особая конструкция пояса помогает объединить стабильность и комфорт, используя пропускающие воздух и легкие материалы, которые обеспечивают нужный эффект и создают удобство при ношении.

3. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость материалов, используемых в процессе производства.


4. Показания к применению.

Для уменьшения болевых ощущений в области поясницы.

5. Порядок работы изделия.

Подбор размера осуществляется в соответствии с таблицей, нанесенной на упаковку изделия:

	a, см.	b, см.	c, см.
1(XS)	60-67	86-95	29
2(S)	68-75	96-101	29
3(M)	76-81	102-107	29
4(L)	82-87	108-113	29
5(XL)	88-98	114-119	29
6(XXL)	99-109	120-128	29
7(XXXL)	110-120	129-137	29

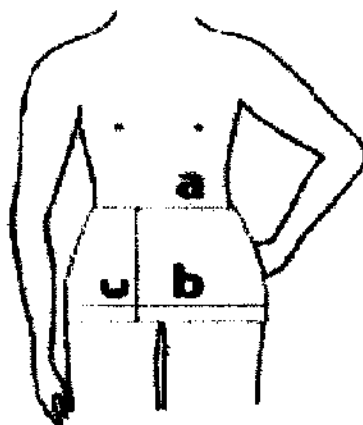

6. Правила хранения и использования.

Пояс необходимо мыть теплой водой с мылом. Температура воды не должна превышать +35°C. При стирке и ополаскивании пояс нельзя тереть и выкручивать. Пояс не рекомендуется гладить.

Рекомендуемый срок использования – 1 год.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в местах недоступных для детей. Не использовать после истечения срока годности.