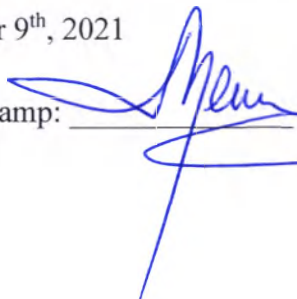


Name of company: SOADCO S.L.

General Manager: Mercedes (Mercè) Roldan Chesa

Date: September 9<sup>th</sup>, 2021

Signature and stamp: \_\_\_\_\_

  
**soadco**  
for KLOCKNER® implant system  
Av. Pessebre 76-82, Baixos  
AD700 Escaldes-Engordany  
[PRINCIPAT D'ANDORRA]  
Tel.: (+376) 800 590

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Имплантат для дентальной имплантации VEGA (ВЕГА), в вариантах исполнения

## INSTRUCTIONS FOR USE OF A MEDICAL DEVICE:

VEGA dental implant, in execution options

477/2021

I Isidre BARTUMEU MARTÍNEZ, Notary Public of the Principality of Andorra. -----

DO HEREBY CERTIFY that I consider authentic the signature figuring on the reverse side of this page of Ms. Mercedes ROLDAN CHESA- bearer of Andorran passport number O4024695 for being the same as the one she uses habitually in all her documents. -----

This Notarial attestation is solely for the purpose of signature authentication. -----

In testimony whereof I have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office this 9<sup>th</sup> of September 2021. -----



## **Имплантат для дентальной имплантации VEGA (ВЕГА), в вариантах исполнения**

### **НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Имплантат для дентальной имплантации VEGA (ВЕГА), в вариантах исполнения (далее: имплантат дентальный, имплантат, медицинское изделие):

1. Имплантаты дентальные MV VEGA, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Имплантат дентальный MV VEGA Ø 3 мм, высотой 8 мм, цвет желтый;
  - 1.2. Имплантат дентальный MV VEGA Ø 3 мм, высотой 10 мм, цвет желтый;
  - 1.3. Имплантат дентальный MV VEGA Ø 3 мм, высотой 12 мм, цвет желтый;
  - 1.4. Имплантат дентальный MV VEGA Ø 3 мм, высотой 14 мм, цвет желтый;
2. Имплантаты дентальные NV VEGA, в вариантах исполнения:
  - 2.1. Имплантат дентальный NV VEGA Ø 3,5мм, высотой 8 мм, цвет фиолетовый;
  - 2.2. Имплантат дентальный NV VEGA CONTACTI Ø 3,5мм, высотой 8 мм;
  - 2.3. Имплантат дентальный NV VEGA Ø 3,5мм, высотой 10 мм, цвет фиолетовый;
  - 2.4. Имплантат дентальный NV VEGA CONTACTI Ø 3,5мм, высотой 10мм;
  - 2.5. Имплантат дентальный NV VEGA Ø 3,5мм, высотой 12 мм, цвет фиолетовый;
  - 2.6. Имплантат дентальный NV VEGA CONTACTI Ø 3,5мм, высотой 12 мм;
  - 2.7. Имплантат дентальный NV VEGA Ø 3.5мм, высотой 14 мм, цвет фиолетовый;
  - 2.8. Имплантат дентальный NV VEGA CONTACTI Ø 3,5мм, высотой 14 мм;
3. Имплантаты дентальные RV VEGA, в вариантах исполнения:
  - 3.1. Имплантат дентальный RV VEGA Ø 4 мм, высотой 8 мм, цвет синий;
  - 3.2. Имплантат дентальный RV VEGA CONTACTI Ø 4 мм, высотой 8 мм;
  - 3.3. Имплантат дентальный RV VEGA Ø 4 мм, высотой 10 мм, цвет синий;
  - 3.4. Имплантат дентальный RV VEGA CONTACTI Ø 4 мм, высотой 10 мм;
  - 3.5. Имплантат дентальный RV VEGA Ø 4 мм, высотой 12 мм, цвет синий;
  - 3.6. Имплантат дентальный RV VEGA CONTACTI Ø 4 мм, высотой 12 мм;
  - 3.7. Имплантат дентальный RV VEGA Ø 4 мм, высотой 14 мм, цвет синий;
  - 3.8. Имплантат дентальный RV VEGA CONTACTI Ø 4 мм, высотой 14 мм;
  - 3.9. Имплантат дентальный RV VEGA Ø 4,5 мм, высотой 8 мм;
  - 3.10. Имплантат дентальный RV VEGA CONTACTI Ø 4,5 мм, высотой 8 мм;
  - 3.11. Имплантат дентальный RV VEGA Ø 4,5 мм, высотой 10 мм;
  - 3.12. Имплантат дентальный RV VEGA CONTACTI Ø 4,5 мм, высотой 10 мм;
  - 3.13. Имплантат дентальный RV VEGA Ø 4,5 мм, высотой 12 мм;
  - 3.14. Имплантат дентальный RV VEGA CONTACTI Ø 4,5 мм, высотой 12 мм;
  - 3.15. Имплантат дентальный RV VEGA Ø 4,5 мм, высотой 14 мм;
  - 3.16. Имплантат дентальный RV VEGA CONTACTI Ø 4,5 мм, высотой 14 мм;

4. Имплантаты дентальные MV VEGA+, в вариантах исполнения:
  - 4.1. Имплантат дентальный MV VEGA+ Ø 3.1 мм, высотой 8 мм, цвет желтый;
  - 4.2. Имплантат дентальный MV VEGA+ Ø 3.1 мм, высотой 10 мм, цвет желтый;
  - 4.3. Имплантат дентальный MV VEGA+ Ø 3.1 мм, высотой 12 мм, цвет желтый;
  - 4.4. Имплантат дентальный MV VEGA+ Ø 3.1 мм, высотой 14 мм, цвет желтый;
5. Имплантаты дентальные NV VEGA+, в вариантах исполнения:
  - 5.1. Имплантат дентальный NV VEGA+ Ø 3.6 мм, высотой 8 мм, цвет фиолетовый;
  - 5.2. Имплантат дентальный NV VEGA+ CONTACTI Ø 3.6 мм, высотой 8 мм, цвет фиолетовый;
  - 5.3. Имплантат дентальный NV VEGA+ Ø 3.6 мм, высотой 10 мм, цвет фиолетовый;
  - 5.4. Имплантат дентальный NV VEGA+ CONTACTI Ø 3.6 мм, высотой 10 мм, цвет фиолетовый;
  - 5.5. Имплантат дентальный NV VEGA+ Ø 3.6 мм, высотой 12 мм, цвет фиолетовый;
  - 5.6. Имплантат дентальный NV VEGA+ CONTACTI Ø 3.6 мм, высотой 12 мм, цвет фиолетовый;
  - 5.7. Имплантат дентальный NV VEGA+ Ø 3.6 мм, высотой 14 мм, цвет фиолетовый;
  - 5.8. Имплантат дентальный NV VEGA+ CONTACTI Ø 3.6 мм, высотой 14 мм, цвет фиолетовый;
6. Имплантаты дентальные RV VEGA+, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Имплантат дентальный RV VEGA+ Ø 4.1 мм, высотой 8 мм, цвет синий;
  - 6.2. Имплантат дентальный RV VEGA+ CONTACTI Ø 4.1 мм, высотой 8 мм, цвет синий;
  - 6.3. Имплантат дентальный RV VEGA+ Ø 4.1 мм, высотой 10 мм, цвет синий;
  - 6.4. Имплантат дентальный RV VEGA+ CONTACTI Ø 4.1 мм, высотой 10 мм, цвет синий;
  - 6.5. Имплантат дентальный RV VEGA+ Ø 4.1 мм, высотой 12 мм, цвет синий;
  - 6.6. Имплантат дентальный RV VEGA+ CONTACTI Ø 4.1 мм, высотой 12 мм, цвет синий;
  - 6.7. Имплантат дентальный RV VEGA+ Ø 4.1 мм, высотой 14 мм, цвет синий;
  - 6.8. Имплантат дентальный RV VEGA+ CONTACTI Ø 4.1 мм, высотой 14 мм, цвет синий;
  - 6.9. Имплантат дентальный RV VEGA+ Ø 4.6 мм, высотой 8 мм, цвет серый;
  - 6.10. Имплантат дентальный RV VEGA+ CONTACTI Ø 4.6 мм, высотой 8 мм, цвет серый;
  - 6.11. Имплантат дентальный RV VEGA+ Ø 4.6 мм, высотой 10 мм, цвет серый;
  - 6.12. Имплантат дентальный RV VEGA+ CONTACTI Ø 4.6 мм, высотой 10 мм, цвет серый;
  - 6.13. Имплантат дентальный RV VEGA+ Ø 4.6 мм, высотой 12 мм, цвет серый;
  - 6.14. Имплантат дентальный RV VEGA+ CONTACTI Ø 4.6 мм, высотой 12 мм, цвет серый;
  - 6.15. Имплантат дентальный RV VEGA+ Ø 4.6 мм, высотой 14 мм, цвет серый;

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И РАЗРАБОТЧИК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Разработчик и производитель медицинского изделия:**

SOADCO, S.L. (Соадко Эс.Эл.), Андорра

Avinguda del Pessebre, núm. 78-80, Baixos Escaldes-Engordany (Андорра)

Тел.: + (376) 800-590

E-mail: soadco@soadco.com

**Адреса мест производства медицинского изделия**

SOADCO, S.L., Av. del Pessebre, 76-82 Baixos, AD700 Escaldes-Engordany, Andorra.

Андорра

## СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

**Сведения об Уполномоченном представителе производителя**

Общество с ограниченной ответственностью «ДИПЛЮС» (ООО «ДИПЛЮС»).

Адрес: 105064, г. Москва, Сусальный Нижний пер., д.7, стр. 7

Телефон: 8 (495) 737-80-03

Адрес электронной почты: diplyus@bk.ru

## ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантаты дентальные поставляются стерильными и предназначены только для одноразового применения. Не подлежат очистке и стерилизации. Очистка, дезинфекция и стерилизация могут привести к ухудшению важных свойств материала и конструкции, спровоцировать отторжение изделия

Имплантаты для дентальной имплантации «VEGA», в вариантах исполнения: предназначены для реставрации зубного ряда в эстетических зонах. Их конструкция позволяет поддерживать гребневую кость и гарантирует правильную герметизацию мягких тканей вокруг имплантата.

Дентальные имплантаты «VEGA» – это внутрикостные зубные имплантаты корневой формы. Их поверхность обработана дробеструйным способом для достижения лучшего прилегания к кости и большей стабильности во время эксплуатации.

Имплантат «VEGA» имеют двойную спиральную резьбу, которая легко вставляется в заранее подготовленное костное ложе, также благодаря atraumaticной конструкции апикальной зоны и различной доступной длине - имплантировать эти изделия можно в области с нарушенной целостностью кости.

Пассивная обработка поверхности имплантата подкисленным раствором, обеспечивает образование на поверхности имплантата оксида титана (оксидной пленки), которая препятствует высвобождению ионов во внутреннюю среду организма.

Имплантаты для дентальной имплантации «VEGA CONTACTI» – подвергаются термохимической обработке, в результате обработки на его поверхности образуется титанат натрия. Поверхность имплантата для дентальной имплантации «VEGA CONTACTI» обладает гидрофильными свойствами. Гидрофильная поверхность имплантатов способствует ускоренной остеоинтеграции.

Дентальные имплантаты «VEGA» и «VEGA CONTACTI» имеют кодировку по размерам и цветовую идентификацию. (Имплантаты серии «VEGA CONTACTI» цветовую идентификацию имеют только на упаковке, в то время как имплантаты «VEGA» имеют цветовую кодировку непосредственно на теле имплантата, выполнена она при помощи анодирования).

Условное обозначение по размерам:

- Имплантаты «VEGA» с диаметром 3 мм, длиной 8-14 мм – MV.

Цветовой код – Желтый.

Пример «MV VEGA»

- Имплантаты «VEGA» и «VEGA CONTACTI» с диаметром 3,5 мм, длиной 8-14 мм – NV.

Цветовой код – Фиолетовый.

Пример «NV VEGA» и «NV VEGA CONTACTI»

- Имплантаты «VEGA» и «VEGA CONTACTI» с диаметром 4 мм и 4,5 мм, длиной 8-14 мм – RV.

Цветовой код для имплантатов RV, с диаметром 4 мм – Синий.

Цветовой код для имплантатов RV, с диаметром 4,5 мм – Белый (Серый?).

Пример «RV VEGA» и «RV VEGA CONTACTI».

Имплантаты дентальные «VEGA+» и «VEGA+ CONTACTI» – характеризуются максимально увеличенным конусом сердечника. Такая конструкция подходит для постэкстракционных случаев и мягких костей. Внутреннее соединение имплантата представляет собой внешний конус с шестигранником в сердцевине. Такая конструкция гарантирует стабильность конструкции имплантат-реставрация, а ортопедическая платформа обеспечивает хорошую посадку благодаря углу наклона в 10°.

Имплантаты для дентальной имплантации «VEGA+ CONTACTI» – подвергаются термохимической обработке, в результате обработки на его поверхности образуется титанат натрия. Поверхность имплантата для дентальной имплантации «VEGA CONTACTI» обладает гидрофильными свойствами. Гидрофильная поверхность имплантатов способствует ускорению остеоинтеграции.

Дентальные имплантаты «VEGA+» и «VEGA+ CONTACTI» имеют кодировку по размерам и цветовую идентификацию. Цветовая кодировка нанесена на тело имплантата при помощи анодирования.

Фиолетовый, желтый, серебряный и синий цвет медицинского изделия обеспечивается анодированием и не влияет на состав, физико-химические свойства и биологическую безопасность материала.

Условное обозначение по размерам:

- Имплантаты «VEGA+» с диаметром 3,1 мм, длиной 8-14 мм – MV.

Цветовой код – Желтый.

Пример «MV VEGA»

- Имплантаты «VEGA» и «VEGA CONTACTI» с диаметром 3,6 мм, длиной 8-14 мм – NV.

Цветовой код – Фиолетовый.

Пример «NV VEGA» и «NV VEGA CONTACTI»

- Имплантаты «VEGA» и «VEGA CONTACTI» с диаметром 4,1 мм и 4,6 мм, длиной 8-14 мм – RV.

Цветовой код для имплантатов RV, с диаметром 4,1 мм – Синий.

Цветовой код для имплантатов RV, с диаметром 4,6 мм – Белый (Серый?).

Пример «RV VEGA» и «RV VEGA CONTACTI».

## **НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Медицинское изделие предназначено для эндооссальной имплантации на верхней и нижней челюстях, а также функциональной и эстетической дентальной реабилитации пациентов с отсутствием зубов.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

- частичные дефекты зубных рядов во фронтальных или в концевых отделах;
- полное отсутствие зубов у пациента.

## **ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Предусмотренные пользователи медицинского изделия – пациенты, у которых отсутствует один и более зубов.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантат для дентальной имплантации VEGA (ВЕГА), в вариантах исполнения поставляется в потребительской упаковке: индивидуальный блистер. Один имплантат в одном блистере. Каждый имплантат дентальный упаковывается в барьерную систему для стерилизации (система Non-Touch). Имплантат дентальный комплектуется 4 стикерами для прослеживаемости.

Инструкция по применению по Приказу 11н на медицинское изделие представлена в электронном виде на сайте производителя [www.simkodent.ru](http://www.simkodent.ru).

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантаты дентальные VEGA и VEGA+ подходят для немедленного и раннего восстановления одиночных отсутствующих зубов или частично беззубых челюстей. Имплантаты дентальные VEGA и VEGA+ служат для замены корня утраченного зуба и присоединения супраструктуры для восстановления жевательной функции.

Перед установкой имплантата, формируют основное и тонкое имплантационное ложе в соответствии со стандартной хирургической процедурой, при помощи специального инструментария согласно протоколу сверления. После подготовки имплантационного ложа имплантат извлекают из упаковки. Стерильная упаковка, а также инструменты, необходимые для установки, обеспечивают простую и функциональную обработку без необходимости прикасаться к имплантату, что гарантирует асептику.

Имплантаты дентальные имеют шероховатую поверхность, которая помещается в кость и полностью интегрируется во время процесса заживления. «Компоненты ортопедические для системы дентальной имплантации одноразовые VEGA (Вега)», в вариантах исполнения, производства SOADCO S.L (Соадко Эс.Эл.), Андорра (далее – ортопедические компоненты), присоединяются к имплантату и служат основой для фиксации протеза (одиночных коронок, мостов или съемных протезов).

Имплантаты дентальные представляют собой прочный винт, изготовленный из коммерчески чистого титана. Имплантаты, имеющие поверхность типа ContacTI, подвергнутую грубозернистой пескоструйной обработке и протравленную кислотой, которая в последнем случае еще и обладает гидрофильными свойствами в результате химической обработки.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия производства SOADCO, S.L. (Соадко, Эс.Эл.), Андорра являются частью общей концепции и должны быть использованы только с оригинальными компонентами и инструментами того же производства.

Способ применения имплантатов подробно приведен в инструкции по применению.

Инструкция по применению по Приказу 11н на медицинское изделие представлена в электронном виде на сайте производителя [www.simkodent.ru](http://www.simkodent.ru).

Рабочий процесс хирургической процедуры имплантации изделий включает 3 этапа:

- Предоперационное планирование
- Подготовка ложа имплантата
- Введение имплантата

### ***Предоперационное планирование***

Рекомендуется осуществлять планирование, определяемое условиями протезирования, а тесное взаимодействие между пациентом, стоматологом, хирургом и зубным техником является обязательным условием для достижения желаемого эстетического результата.

Для определения топографической ситуации, осевой ориентации и соответствующих имплантатов рекомендуется изготовить восковую модель/выполнить настройку с использованием предварительно подготовленной диагностической гипсовой модели зубного ряда. Впоследствии может быть определен тип супраструктуры. Восковую модель/настройку можно затем использовать в качестве основы для изготавливаемого на заказ рентгенографического шаблона или шаблона сверла и для временной реставрации.

Минимальными рекомендациями, которые следует принимать во внимание, являются следующие правила:

1. Расстояние до соседнего зуба на уровне кости. Минимальное рекомендуемое расстояние 1,5 мм от соседнего к имплантату зуба (мезиальное и дистальное).
2. Расстояние до соседнего имплантата на уровне кости. Минимальное рекомендуемое расстояние 3 мм между двумя соседними плечами имплантатов (мезиодистальное).


### ***Подготовка ложа имплантата***

Для подготовки костного ложа используются специальные инструменты. В зависимости от диаметра выбранного имплантата используются различные протоколы сверления.

На «Наборах инструментов хирургических для системы дентальной имплантации VEGA (ВЕГА), в вариантах исполнения» нанесено краткое руководство протокола хирургической операции по подготовке костного ложа для имплантата линейки VEGA (ВЕГА) для каждого диаметра.

Также с протоколом для подготовки костного ложа можно ознакомиться в инструкции по применению к инструментам многоразовым.


**Последовательность подготовки костного ложа для имплантата MV VEGA, MV VEGA + Ø 3 мм и с Ø 3,1 мм.**

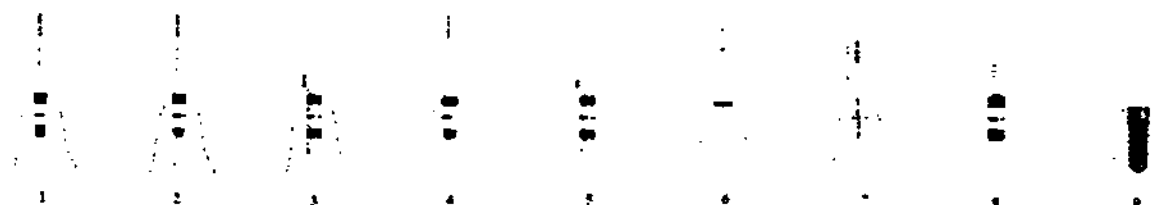

*Схема подготовки костного ложа для имплантата дентального MV VEGA, MV VEGA – Ø 3 мм и с Ø 3,1 мм.*

|                                                                 | 1                           | 2                    | 3                                           | 4                   | 5                                           | 6                                                                 | 7                                      | 8                                                                         | 9                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Названи<br>с<br>изделия                                         | Сверло<br>прецизион<br>ное* | Сверло<br>стартовое* | Штифт для<br>контроля<br>параллель<br>ности | Сверло<br>пилотное* | Штифт для<br>контроля<br>параллель<br>ности | Сверло для<br>альвеолярн<br>ого гребня,<br>с<br>диаметром<br>3 мм | Глубино<br>мер с<br>диаметр<br>ом 3 мм | Формиров<br>атель<br>резьбы в<br>костном<br>канале с<br>диаметром<br>3 мм | Имплан<br>тат Ø 3<br>мм и Ø<br>3,1 мм |
| Скорост<br>ь, с<br>которой<br>можно<br>примени<br>ть<br>изделие | 1500-2000<br>об/мин         | 300-600<br>об/мин    |                                             | 300-600<br>об/мин   |                                             | 1500-2000<br>об/мин                                               |                                        | 20-35<br>об/мин                                                           |                                       |

**Последовательность подготовки костного ложа для имплантата NV VEGA, NV VEGA CONTACTI, NV VEGA + и NV VEGA + CONTACTI, с Ø 3,5 мм и с Ø 3,6 мм.**

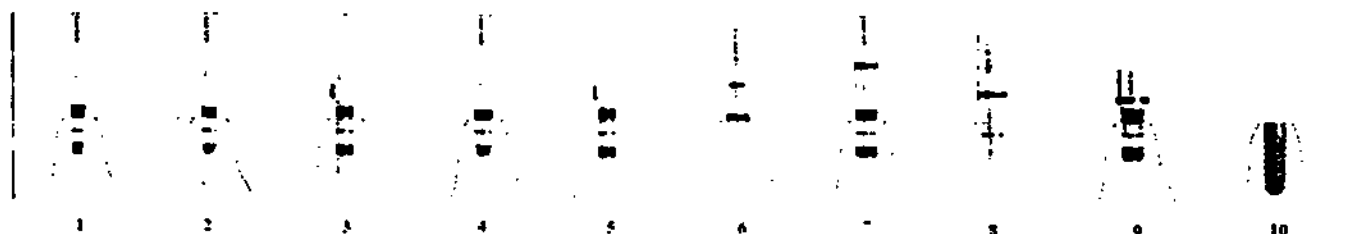


*Схема подготовки костного ложа для имплантата дентального NV VEGA, NV VEGA CONTACTI, NV VEGA + и NV VEGA + CONTACTI, с Ø 3,5 мм и с Ø 3,6 мм.*

|                                                                 | 1                           | 2                    | 3                                           | 4                   | 5                                           | 6                                                                   | 7                                                 | 8                                           | 9                                                                           | 10                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Названи<br>с<br>изделия                                         | Сверло<br>прецизион<br>ное* | Сверло<br>стартовое* | Штифт для<br>контроля<br>параллель<br>ности | Сверло<br>пилотное* | Штифт для<br>контроля<br>параллель<br>ности | Сверло для<br>альвеолярн<br>ого гребня,<br>с<br>диаметром<br>3,5 мм | Сверло<br>финишное<br>** с<br>диаметром<br>3,3 мм | Глубино<br>мер с<br>диаметр<br>ом 3,5<br>мм | Формиров<br>атель<br>резьбы в<br>костном<br>канале с<br>диаметром<br>3,5 мм | Имплан<br>тат Ø<br>3,5 мм и<br>Ø 3,6 мм |
| Скорост<br>ь, с<br>которой<br>можно<br>примени<br>ть<br>изделие | 1500-2000<br>об/мин         | 300-600<br>об/мин    |                                             | 300-600<br>об/мин   |                                             | 1500-2000<br>об/мин                                                 | 300-600<br>об/мин                                 |                                             | 20-35<br>об/мин                                                             |                                         |

\* с ограничителем глубины и PTM

\*\* с ограничителем глубины, внутренней ирригацией и PTM

**Последовательность подготовки костного ложа для имплантата RV VEGA, RV VEGA CONTACTI, RV VEGA+ и RV VEGA + CONTACTI, с Ø 4 мм и с Ø 4,1 мм**

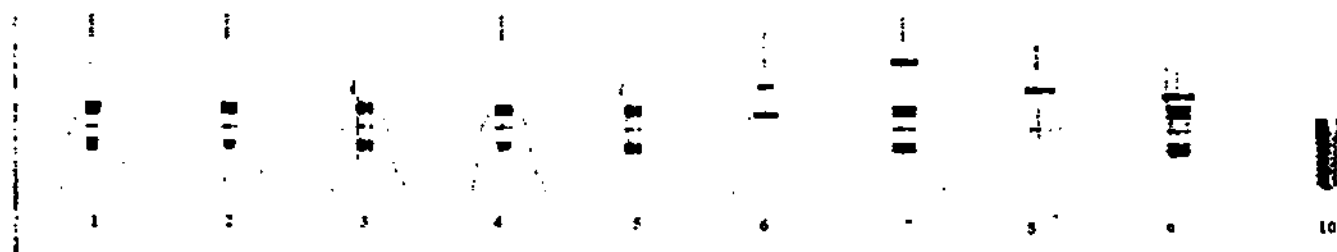

*Схема подготовки костного ложа для имплантата дентального RV VEGA, RV VEGA CONTACTI, RV VEGA+ и RV VEGA + CONTACTI, с Ø 4 мм и с Ø 4,1 мм.*

|                                             | 1                    | 2                 | 3                                 | 4                | 5                                 | 6                                       | 7                           | 8                 | 9                                            | 10                          |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Название изделия                            | Сверло прецизионное* | Сверло стартовое* | Штифт для контроля параллельности | Сверло пилотное* | Штифт для контроля параллельности | Сверло для альвеолярного гребня, Ø 4 мм | Сверло финишное ** Ø 3,6 мм | Глубиномер Ø 4 мм | Формирователь резьбы в костном канале Ø 4 мм | Имплантат Ø 4 мм и Ø 4,1 мм |
| Скорость, с которой можно применять изделие | 1500-2000 об/мин     | 300-600 об/мин    |                                   | 300-600 об/мин   |                                   | 1500-2000 об/мин                        | 300-600 об/мин              |                   | 20-35 об/мин                                 |                             |

\* с ограничителем глубины и РТМ

\*\* с ограничителем глубины, внутренней ирригацией и РТМ

## Последовательность подготовки костного ложа для имплантата RV VEGA, RV VEGA CONTACTI, RV VEGA+ и RV VEGA + CONTACTI, с Ø 4,5 мм и с Ø 4,6 мм

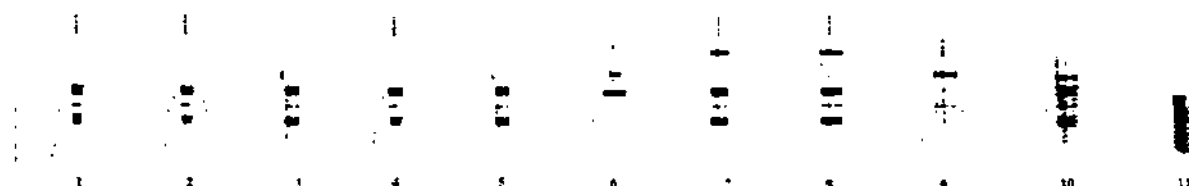


Схема подготовки костного ложа для имплантата дентального RV VEGA, RV VEGA CONTACTI, RV VEGA+ и RV VEGA + CONTACTI, с Ø 4,5 мм и с Ø 4,6 мм.


|                                             | 1                    | 2                 | 3                                 | 4                | 5                                 | 6                                         | 7                           | 8                           | 9                   | 10                                             | 11                            |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Название изделия                            | Сверло прецизионное* | Сверло стартовое* | Штифт для контроля параллельности | Сверло пилотное* | Штифт для контроля параллельности | Сверло для альвеолярного гребня, Ø 4,5 мм | Сверло финишное ** Ø 3,3 мм | Сверло финишное ** Ø 4,1 мм | Глубиномер Ø 4,5 мм | Формирователь резьбы в костном канале Ø 4,5 мм | Имплантат Ø 4,5 мм и Ø 4,6 мм |
| Скорость, с которой можно применять изделие | 1500-2000 об/мин     | 300-600 об/мин    |                                   | 300-600 об/мин   |                                   | 1500-2000 об/мин                          | 300-600 об/мин              | 300-600 об/мин              |                     | 20-35 об/мин                                   |                               |

\* с ограничителем глубины и РТМ

\*\* с ограничителем глубины, внутренней ирригацией и РТМ


## Захват и размещение имплантата

Имплантаты дентальные VEGA снабжены системой переноски, которая поддерживает захват имплантата напрямую с помощью соответствующего имплантоввода.

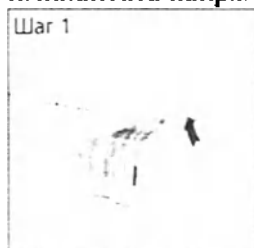


**Шаг 1** – Открыть потребительскую упаковку (индивидуальный блистер). Для этого необходимо удалить защитную крышку с блистерной упаковки, чтобы достать капсулу с имплантатом.

**Примечание:** В блистерной упаковке можно найти стикер для прослеживания медицинского изделия. Открыть блистер только перед непосредственным применением медицинского изделия.

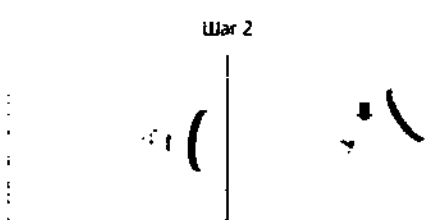


**Шаг 2** – Открыть капсулу, повернув по часовой стрелки. аккуратно вытащите систему «Non-Touch».

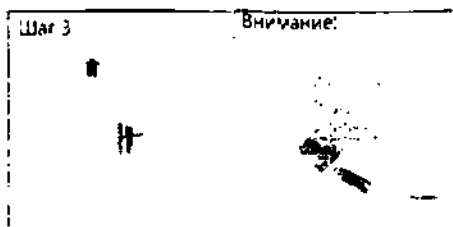


**Шаг 3** – Открывать систему «Non-Touch» необходимо только в вертикальном положении.

**Внимание!** Не открывайте крышку системы «Non-Touch» в любом другом положении, кроме вертикального, как показано на рисунке.

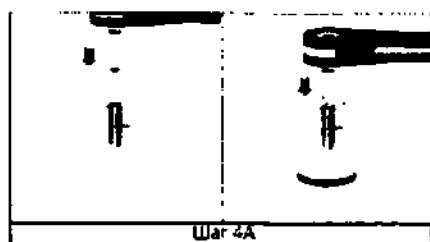


**Шаг 4А** – Извлеките имплантат из системы «Non-Touch» при помощи имплантовода<sup>1</sup> для ключа динамометрического. Для этого совместите шестигранник имплантоввода с шестигранником имплантата, слегка надавите для фиксации имплантата на адаптере (на адаптер нанесено маркировочное кольцо, при установке имплантата на адаптер, край имплантата должен совпасть с меткой – это индикатор для

правильного захвата). Убедитесь, что имплантат надежно прикреплен к адаптеру.

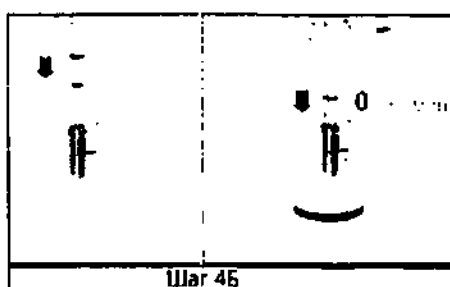

**Шаг 4Б** – Извлеките имплантат из системы «Non-Touch» при помощи имплантовода<sup>2</sup> для наконечника стоматологического. Для этого совместите шестигранник имплантоввода с шестигранником имплантата, слегка надавите для фиксации имплантата на адаптере (на адаптер нанесено маркировочное кольцо, при установке имплантата на адаптер, край имплантата должен совпасть с меткой – это индикатор для правильного захвата). Убедитесь, что имплантат надежно

прикреплен к адаптеру. **Важно!** Сделайте пробный запуск установки, для проверки надежности системы имплантоввод/имплантат вне полости рта пациента.

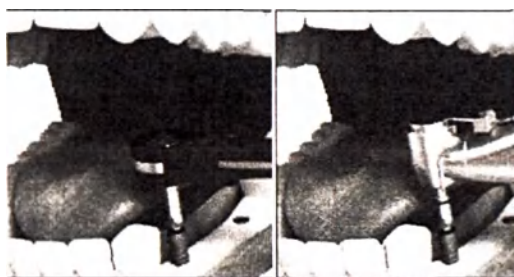

**Шаг 5А, Б** – Поместите имплантат в костное ложе, начните установку имплантата при помощи имплантовода для ключа динамометрического или для наконечника стоматологического. Для перемещения имплантата в конечное положение необходимо повернуть его по часовой стрелке с помощью ключа динамометрического или наконечника стоматологического. При наличии сильного сопротивления перед тем, как имплантат достигнет

своего конечного положения, необходимо повернуть имплантат против часовой стрелки на несколько оборотов и продолжить введение. При необходимости повторить этот шаг несколько раз. Если сопротивление все еще слишком велико, необходимо извлечь имплантат, поместить имплантат вместе с адаптером обратно во флакон (систему «Non-Touch») и расширить ложе имплантата в соответствии с протоколом сверления.

**Внимание!** Не используйте момент введения более 45 Н·см. Следует избегать чрезмерного момента введения, поскольку это может привести к резорбции кости.

<sup>1</sup> Имплантовод для ключа динамометрического (далее – имплантоввод, адаптер).

<sup>2</sup> Имплантовод для ключа динамометрического и имплантовод для наконечника стоматологического (далее – имплантовод, адаптер). Государственная регистрация указанного медицинского изделия в РФ осуществляется одновременно с государственной регистрацией данного медицинского изделия. Изделие входит в состав регистрационного удостоверения «Инструменты хирургические для системы дентальной имплантации VEGA (ВЕГА) многоразовые, в вариантах исполнения»

**Внимание!** Имплантат дентальный MV VEGA и MV VEGA+ следует использовать только в тех случаях, когда механическая нагрузка не велика. Данные имплантаты не рекомендуются устанавливать в зонах с высокой нагрузкой.

**Внимание!** Имплантаты с диаметром 3 мм следует использовать только для реставрации одиночных верхних боковых резцов и нижних резцов.

**Внимание!** Не используйте имплантаты с длиной 8 мм и диаметрами 3 мм и 3.5 мм для одинарных реставраций в зонах с высокой нагрузкой.

**Важно!** Не используйте имплантаты MV VEGA и MV VEGA+ для создания съемных протезов.

### ***Послеоперационный период***

Необходимо следить за правильным заживлением и остеоинтеграцией имплантатов, проверяя, чтобы имплантаты не подвергались нагрузке в течение выбранного периода времени [минимум 8 недель для имплантатов MV VEGA, MV VEGA+, NV VEGA, NV VEGA+, RV VEGA и RV VEGA+]. В случае имплантатов VEGA CONTACTI и VEGA+ CONTACTI рекомендуется провести рентгенографическую проверку поверхности после фазы заживления перед началом восстановления протеза.

Рекомендуется избегать нагрузок и сдавливания слизистой оболочки перимплантата.

По истечении 8 недель завершается начальное костное приживание и можно делать оттиски и приступать к дентальной реставрации при помощи ортопедических компонентов. На этом этапе устанавливается формирователь десны.

При установке имплантатов длиной 10 мм или менее, или у пациентов, у которых подозревается задержка заживления из-за системных или местных факторов, получение оттисков следует отложить до 12 недель.

После получения оттиска необходимо использовать винт-заглушку и защитный колпачок или абатмент временный, чтобы обеспечить свободный доступ к имплантату. Кроме того, это может помочь поддержанию мягких тканей перимплантата в течение времени, необходимого для изготовления протеза.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Изделия должны использовать только квалифицированные стоматологи-ортопеды и врачи зуботехнической лаборатории.
- При работе врач работает в очках и перчатках
- Медицинское изделие следует хранить в оригинальной упаковке, в сухом месте, при комнатной температуре, беречь от прямых солнечных лучей.
- Не используйте медицинское изделие, если упаковка повреждена или медицинское изделие просрочено.
- Ни при каких обстоятельствах одноразовое медицинское изделие не должно применяться повторно, поскольку будут утрачены оптимальные условия качества и стерильности.
- Ввиду разной длины и диаметра имплантатов и в силу того, что способность поддержания жевания очень изменчива, рекомендуется оценить биомеханические условия планируемого протеза и размещать количество имплантатов, достаточное для поддержки предполагаемых нагрузочных усилий, соблюдая минимальное расстояние 3 мм между имплантатами. Обычно считается, что общая высота протеза не должна превышать длину имплантата.
- **Важно!** Строго следуйте способу применению и процедуре подготовки костного ложа под выбранный имплантат.
- Имплантаты с поверхностью VEGA CONTACT I имеют цветовую идентификацию в упаковке, но не имеют цвета на самом имплантате из-за обработки поверхности.
- Протезные реставрации могут быть единичными или множественными, в зависимости от выбранного диаметра имплантата.
- Имплантат дентальный MV VEGA Ø 3 мм следует использовать только в тех случаях, когда механическая нагрузка невелика. Они не рекомендуются в задних секторах или в местах, где может возникнуть чрезмерная нагрузка на имплантат.
- Имплантаты диаметром 3 мм следует использовать только для реставрации отдельных верхних боковых резцов и нижних резцов.
- **Предупреждение!** Не рекомендуется использовать имплантаты длиной 8 мм в качестве единичных реставраций в случае имплантатов диаметром 3 мм и 3,5 мм.
- Использование имплантатов малого диаметра для замены задних зубов не рекомендуется, когда ожидаются высокие механические нагрузки или в целях замены больших зубов.
- **Важно!** Использование с другими инструментами и принадлежностями может ухудшить функциональных свойств медицинского изделия.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ

### *Противопоказания*

Любое общее или местное заболевание, противопоказанное для любого типа операций.

Любое хроническое системное расстройство, не контролируемое или без медицинского наблюдения, способное осложнить процесс имплантации.

- Нарушения иммунной системы
- Нарушения коагуляции.
- Нарушения герметизации.
- Неконтролируемый диабет.
- Активные заболевания пародонта.
- Бруксизм.

### *Побочные эффекты и осложнения*

- Инфекционные заболевания;
- Случайное размещение имплантата в верхнечелюстной пазухе или носовых ходах;
- Деформация или разрыв имплантата из-за неправильного обращения;
- Размещение имплантата в канале зубного нерва или сдавливание нерва;
- Мукозит;
- Гингивит;
- Реабсорбция кости;
- Аллергия;
- Парестезия;
- Воспаление;
- Кровотечение, гематомы

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Медицинское изделие предназначено для использования совместно с медицинскими изделиями «Компоненты ортопедические для системы дентальной имплантации одноразовые VEGA (Bega)», в вариантах исполнения, производства SOADCO, S.L. (Соадко, Эс.Эл.), Андорра<sup>3</sup> (далее – ортопедические компоненты). А так же используется совместно с медицинскими изделиями «Компоненты ортопедические для системы дентальной имплантации многоразовые VEGA (Bega)», в вариантах исполнения, производства SOADCO, S.L. (Соадко, Эс.Эл.), Андорра<sup>4</sup> Данные медицинские изделия включают ортопедические компоненты и вспомогательные компоненты, специально предназначенные для соединения «имплантат–абатмент».

Пример крепления «имплантат–абатмент» представлены на рисунке ниже:

<sup>3</sup> - государственная регистрация указанного медицинского изделия в РФ осуществляется одновременно с государственной регистрацией данного медицинского изделия

<sup>4</sup> - государственная регистрация указанного медицинского изделия в РФ осуществляется одновременно с государственной регистрацией данного медицинского изделия



*Рисунок. Пример крепления имплантат – абатмент».*

Необходимо использовать ортопедические компоненты соответствующие выбранному имплантату. В таблице 7 можно ознакомиться с обозначение соответствующих компонентов и имплантатов.

Таблица 7. Совместимость компонентов с имплантатами.

| Аббревиатура в названии имплантата                      | Совместимые компоненты ортопедические |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| MV VEGA, MV VEGA +,                                     | Компоненты с маркировкой MV           |
| NV VEGA, NV VEGA CONTACTI, NV VEGA+, NV VEGA + CONTACTI | Компоненты с маркировкой NV           |
| RV VEGA, RV VEGA CONTACTI, RV VEGA+ и RV VEGA+ CONTACTI | Компоненты с маркировкой RV           |

Имплантат имеет шестигранное соединение «имплантат-абатмент», оно обеспечивает правильное позиционирование компонентов ортопедических за счет четкой обратной тактильной связи. Минимизирует вращательные движения между имплантатом и компонентами протеза, обеспечивает оптимальное уплотнение, что препятствует проникновению бактерий через соединительный зазор. Внутренний конус имплантата имеет наклон в 10°, это способствует оптимизации регулировки при установке различных компонентов ортопедических, обеспечивает высокую устойчивость соединения «имплантат-абатмент» к микродвижениям.

Для подготовки ложа имплантата используются специальные инструменты: «Инструменты хирургические для системы дентальной имплантации VEGA (ВЕГА) одноразовые, в вариантах исполнения»<sup>5</sup>, производства SOADCO, S.L. (Соадко, Эс.Эл.), Андорра, «Инструменты хирургические для системы дентальной имплантации VEGA (ВЕГА) многоразовые, в вариантах исполнения»<sup>6</sup>, производства SOADCO, S.L. (Соадко, Эс.Эл.), Андорра, «Наборы инструментов хирургических для системы дентальной имплантации VEGA (ВЕГА), в вариантах исполнения»<sup>7</sup>, производства SOADCO, S.L. (Соадко, Эс.Эл.), Андорра.

**Внимание!** Использование с другими инструментами и принадлежностями может ухудшить функциональных свойств медицинского изделия.

<sup>5</sup> государственная регистрация указанного медицинского изделия в РФ осуществляется одновременно с государственной регистрацией данного медицинского изделия

<sup>6</sup> государственная регистрация указанного медицинского изделия в РФ осуществляется одновременно с государственной регистрацией данного медицинского изделия

<sup>7</sup> государственная регистрация указанного медицинского изделия в РФ осуществляется одновременно с государственной регистрацией данного медицинского изделия

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Область применения – стоматология.**

Медицинское изделие может применяться в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях непосредственно стоматологами или специалистами по их распоряжению.

Специалисты должны обладать надлежащими знаниями в сфере дентальной имплантологии и должны ознакомиться с инструкциями по применению к имплантату и совместимым с ним медицинским изделиям, чтобы безопасно и надлежащим образом использовать данное медицинское изделие.

### Условия транспортировки

Транспортирование имплантатов осуществляют в упаковке предприятия-изготовителя крытым транспортом любого вида, где соблюдаются климатические условия хранения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Имплантаты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, где соблюдаются климатические условия хранения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается воздействие влаги и прямых солнечных лучей при транспортировании.

#### Климатические условия транспортирования.

| Характеристика | Значение          |
|----------------|-------------------|
| Температура    | От +17°C до +27°C |
| Влажность      | От 20% до 60%     |

### Условия хранения

Имплантаты должны храниться в оригинальной упаковке в сухом месте, защищенном от прямого солнечного света и соблюдать условия, установленные в таблице 9. Не хранить медицинское изделие в групповых упаковках.

#### Климатические условия хранения.

| Характеристика | Значение          |
|----------------|-------------------|
| Температура    | От +17°C до +27°C |
| Влажность      | От 20% до 60%     |

Ненадлежащее хранение может влиять на существенные конструктивные характеристики, что способно повлечь ненадлежащее функционирование изделий. Запрещается использовать дентальные имплантаты VEGA (ВЕГА) повторно. Повторное использование одноразовых изделий создает потенциальный риск инфицирования пациента или пользователя. Запрещается использовать дентальные имплантаты VEGA (ВЕГА) после истечения срока годности, указанного на упаковке. Использование имплантатов VEGA (ВЕГА) после истечения срока годности может привести к инфекциям.

### **Условия эксплуатации**

Медицинское изделие эксплуатируется в ротовой полости организма, при температуре от +32°C до +42°C.

Установка медицинского изделия в ротовую полость должна проводиться в стоматологических кабинетах лечебно-профилактических учреждений, в стандартных для таких кабинетов условиях:

| Характеристика          | Значение          |
|-------------------------|-------------------|
| Температура             | От +18°C до +25°C |
| Относительная влажность | От 40 % до 60 %   |

### **СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Срок годности имплантата для дентальной имплантации VEGA (ВЕГА), в вариантах исполнения составляет 5 лет.

### **ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Утилизация неиспользованного медицинского изделия с истекшим сроком хранения, а также упаковки медицинского изделия после его использования, осуществляется аналогично твердым бытовым отходам (для Российской Федерации – отходы класса опасности А).

Утилизация использованного медицинского изделия осуществляется аналогично эпидемиологически опасным отходам (для Российской Федерации – отходы класса опасности Б).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Все имплантаты дентальные изготовлены из коммерчески чистого титанового сплава Grade 4.

В процессе производства медицинское изделие (VEGA и VEGA +) подвергается анодированию. Цветовая кодировка облегчает идентификацию медицинского изделия. Цветовая идентификация медицинского изделия (фиолетовый, желтый, серебряный и синий цвет) выполнена методом анодирования титана. Анодирование не влияет на состав, физико-химические свойства и биологическую безопасность материала.

### Имплантаты дентальные MV VEGA

#### Схематическое изображение медицинских изделий

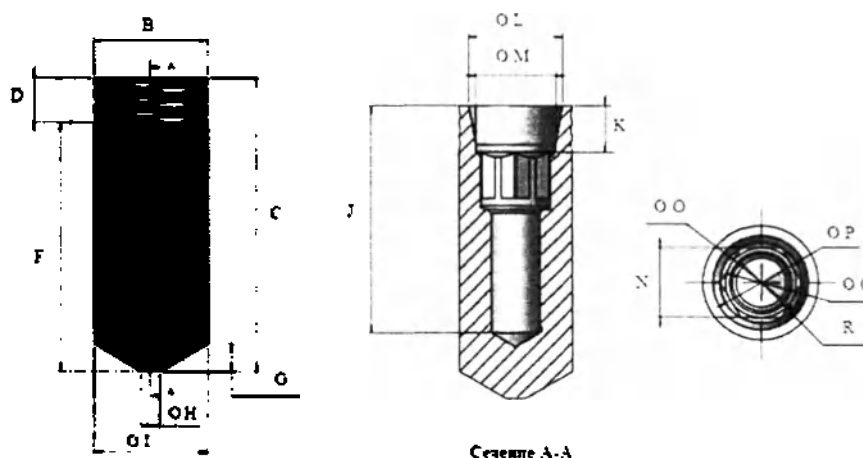


Рисунок 1. Схема имплантата дентального MV VEGA

Функциональные и технические характеристики имплантатов дентальных MV VEGA и фотографические изображения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Функциональные и технические характеристики и фотографические изображения

| Название                                                       | Фото                                                                                | Размеры                      |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Имплантат дентальный MV VEGA Ø 3 мм, высотой 8 мм, цвет желтый |  | Диаметр В (Ø В на рис.1), мм | $3 \pm 0,05$    |
|                                                                |                                                                                     | Длина С (С на рис.1), мм     | $8 \pm 0,05$    |
|                                                                |                                                                                     | Длина D (D на рис.1), мм     | $1,19 \pm 0,05$ |
|                                                                |                                                                                     | Длина F (F на рис.1), мм     | $6,6 \pm 0,05$  |
|                                                                |                                                                                     | Длина G (G на рис.1), мм     | $0,73 \pm 0,05$ |
|                                                                |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.1), мм | $0,5 \pm 0,05$  |
|                                                                |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.1), мм | $3 \pm 0,05$    |
|                                                                |                                                                                     | Длина J (J на рис.1), мм     | $6,1 \pm 0,05$  |

|                                                                                |                                                                                     |                                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                                                |    | Длина К (К на рис.1), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр L (O L на рис.1), мм            | 2,5 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр M (O M на рис.1), мм            | 2,1 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Длина N (N на рис.1), мм                | 1,85 +0/-0,014         |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр O (O O на рис.1), мм            | 1,86 +0/-0,04          |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр P (O P на рис.1), мм            | 2,1 +0/-0,04           |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр Q (O Q на рис.1), мм            | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.1), мкм | M 1,6 x 0,35 -0/-0,006 |
|                                                                                |                                                                                     | Масса, г                                | 0,14 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>MV VEGA Ø 3<br>мм, высотой 10<br>мм, цвет<br>желтый |  | Диаметр B (Ø B на рис.1), мм            | 3 ± 0,05               |
|                                                                                |                                                                                     | Длина C (C на рис.1), мм                | 10 ± 0,05              |
|                                                                                |                                                                                     | Длина D (D на рис.1), мм                | 1,19 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Длина F (F на рис.1), мм                | 8,6 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Длина G (G на рис.1), мм                | 0,73 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.1), мм            | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.1), мм            | 3 ± 0,05               |
|                                                                                |                                                                                     | Длина J (J на рис.1), мм                | 6,1 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Длина K (K на рис.1), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.1), мм            | 2,5 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.1), мм            | 2,1 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Длина N (N на рис.1), мм                | 1,85 +0/-0,014         |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.1), мм            | 1,86 +0/-0,04          |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.1), мм            | 2,1 +0/-0,04           |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.1), мм            | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                |                                                                                     | Шаг резьбы (R на рис.1), мкм            | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                |                                                                                     | Масса, г                                | 0,18 ± 5%              |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр B (Ø B на рис.1), мм            | 3 ± 0,05               |
|                                                                                |                                                                                     | Длина C (C на рис.1), мм                | 12 ± 0,05              |
|                                                                                |                                                                                     | Длина D (D на рис.1), мм                | 1,19 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Длина F (F на рис.1), мм                | 10,6 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Длина G (G на рис.1), мм                | 0,73 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.1), мм            | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.1), мм            | 3 ± 0,05               |
|                                                                                |                                                                                     | Длина J (J на рис.1), мм                | 6,1 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Длина K (K на рис.1), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.1), мм            | 2,5 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.1), мм            | 2,1 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Длина N (N на рис.1), мм                | 1,85 +0/-0,014         |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.1), мм            | 1,86 +0/-0,04          |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.1), мм            | 2,1 +0/-0,04           |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.1), мм            | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                |                                                                                     | Шаг резьбы (R на рис.1), мкм            | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                |                                                                                     | Масса, г                                | 0,23 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>MV VEGA Ø 3<br>мм, высотой 14<br>мм, цвет<br>желтый |  | Диаметр B (Ø B на рис.1), мм            | 3 ± 0,05               |
|                                                                                |                                                                                     | Длина C (C на рис.1), мм                | 14 ± 0,05              |
|                                                                                |                                                                                     | Длина D (D на рис.1), мм                | 1,19 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Длина F (F на рис.1), мм                | 12,6 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Длина G (G на рис.1), мм                | 0,73 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.1), мм            | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.1), мм            | 3 ± 0,05               |
|                                                                                |                                                                                     | Длина J (J на рис.1), мм                | 6,1 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Длина K (K на рис.1), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.1), мм            | 2,5 ± 0,05             |
|                                                                                |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.1), мм            | 2,1 ± 0,05             |

|  |                              |                               |
|--|------------------------------|-------------------------------|
|  | Диаметр М (О М на рис.1), мм | $2,1 \pm 0,05$                |
|  | Длина N (N на рис.1), мм     | $1,85 \pm 0,014$              |
|  | Диаметр О (О О на рис.1), мм | $1,86 \pm 0,04$               |
|  | Диаметр Р (О Р на рис.1), мм | $2,1 \pm 0,04$                |
|  | Диаметр Q (О Q на рис.1), мм | $1,3 \pm 0,04$                |
|  | Шаг резьбы (R на рис.1), мм  | $M 1,6 \times 0,35 \pm 0,006$ |
|  | Масса, г                     | $0,28 \pm 5\%$                |

## Имплантаты дентальные NV VEGA и NV VEGA CONTACTI

Схематическое изображение медицинских изделий

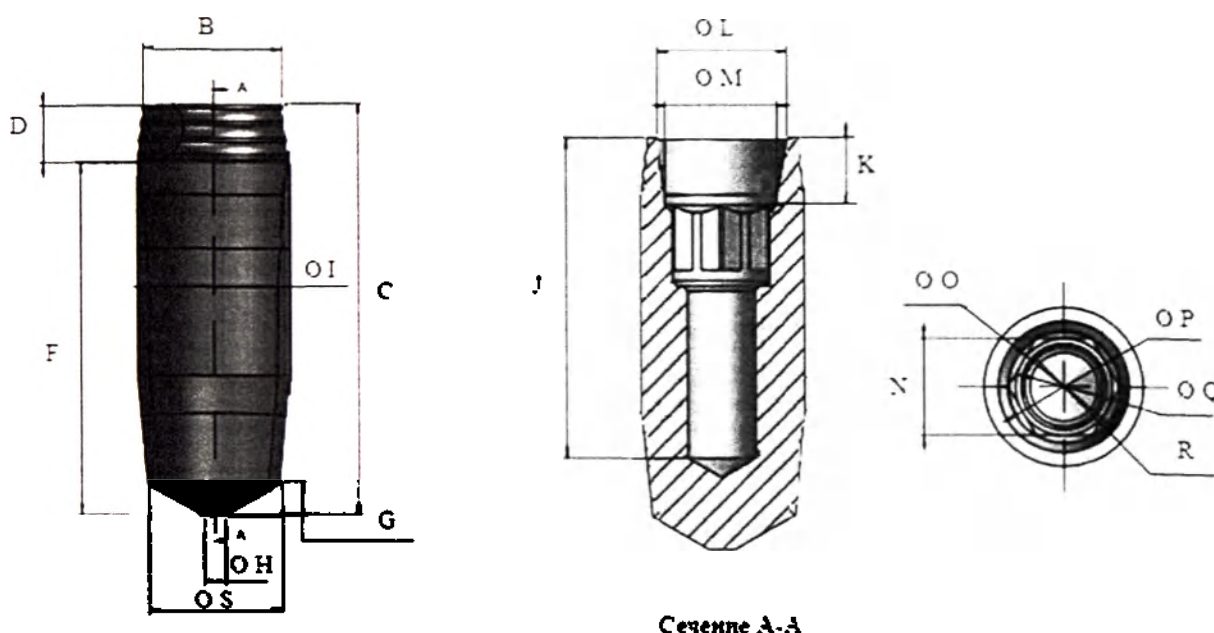


Рисунок 2. Схема имплантата дентального NV VEGA и NV VEGA CONTACTI

Функциональные и технические характеристики имплантатов дентальных NV VEGA и NV VEGA CONTACTI, и их фотографические изображения представлены в таблице 2.

Таблица 2. Функциональные и технические характеристики и фотографические изображения

| Название                                                            | Фото | Размеры                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|
| Имплантат дентальный NV VEGA Ø 3.5мм, высотой 8 мм, цвет фиолетовый |      | Диаметр В (Ø В на рис.2), мм | $3,26 \pm 0,05$ |
|                                                                     |      | Длина С (С на рис.2), мм     | $8 \pm 0,05$    |
|                                                                     |      | Длина D (D на рис.2), мм     | $1,3 \pm 0,05$  |
|                                                                     |      | Длина F (F на рис.2), мм     | $6,5 \pm 0,05$  |
|                                                                     |      | Длина G (G на рис.2), мм     | $0,74 \pm 0,05$ |
|                                                                     |      | Диаметр H (Ø H на рис.2), мм | $0,5 \pm 0,05$  |
|                                                                     |      | Диаметр I (Ø I на рис.2), мм | $3,55 \pm 0,05$ |


|                                                                                     |                                                                                     |                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.2), мм            | 3,09 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина J (J на рис.2), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина K (K на рис.2), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.2), мм            | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.2), мм            | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина N (N на рис.2), мм                | 2,05 +0/-0,024         |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.2), мм            | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.2), мм            | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.2), мм            | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                     |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.2), мкм | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                     |                                                                                     | Масса, г                                | 0,18 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA<br>CONTACTI Ø<br>3,5мм, высотой<br>8 мм          |    | Диаметр B (Ø B на рис.2), мм            | 3,26± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина C (C на рис.2), мм                | 8 ± 0,05               |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина D (D на рис.2), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина F (F на рис.2), мм                | 6,5 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина G (G на рис.2), мм                | 0,74 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.2), мм            | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.2), мм            | 3,55 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.2), мм            | 3,09 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина J (J на рис.2), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина K (K на рис.2), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.2), мм            | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.2), мм            | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина N (N на рис.2), мм                | 2,05 +0/-0,024         |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.2), мм            | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.2), мм            | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.2), мм            | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                     |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.2), мкм | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                     |                                                                                     | Масса, г                                | 0,18 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA Ø<br>3,5мм, высотой<br>10 мм, цвет<br>фиолетовый |  | Диаметр B (Ø B на рис.2), мм            | 3,26± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина C (C на рис.2), мм                | 10 ± 0,05              |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина D (D на рис.2), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина F (F на рис.2), мм                | 8,5 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина G (G на рис.2), мм                | 0,74 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.2), мм            | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.2), мм            | 3,55 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.2), мм            | 3,09 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина J (J на рис.2), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина K (K на рис.2), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.2), мм            | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.2), мм            | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина N (N на рис.2), мм                | 2,05 +0/-0,024         |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.2), мм            | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.2), мм            | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.2), мм            | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                     |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.2), мкм | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                     |                                                                                     | Масса, г                                | 0,25 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA<br>CONTACTI Ø                                    |  | Диаметр B (Ø B на рис.2), мм            | 3,26± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина C (C на рис.2), мм                | 10 ± 0,05              |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина D (D на рис.2), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина F (F на рис.2), мм                | 8,5 ± 0,05             |

|                                                                                     |                                                                                     |                                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 3,5мм. высотой<br>10мм                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.2), мм               | 0,74 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.2), мм           | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.2), мм           | 3,55 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.2), мм           | 3,09 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина J (J на рис.2), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина K (K на рис.2), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.2), мм           | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.2), мм           | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина N (N на рис.2), мм               | 2,05 +0/-0,024         |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.2), мм           | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.2), мм           | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.2), мм           | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                     |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.2), мм | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                     |                                                                                     | Масса, г                               | 0,25 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA Ø<br>3,5мм, высотой<br>12 мм, цвет<br>фиолетовый |    | Диаметр B (Ø B на рис.2), мм           | 3,26 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина C (C на рис.2), мм               | 12 ± 0,05              |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина D (D на рис.2), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина F (F на рис.2), мм               | 10,5 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина G (G на рис.2), мм               | 0,74 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.2), мм           | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.2), мм           | 3,55 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.2), мм           | 3,09 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина J (J на рис.2), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина K (K на рис.2), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.2), мм           | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.2), мм           | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина N (N на рис.2), мм               | 2,05 +0/-0,024         |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.2), мм           | 2,06 +0/-0,04          |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA<br>CONTACTI Ø<br>3,5мм, высотой<br>12 мм         |  | Диаметр B (Ø B на рис.2), мм           | 3,26 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина C (C на рис.2), мм               | 12 ± 0,05              |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина D (D на рис.2), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина F (F на рис.2), мм               | 10,5 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина G (G на рис.2), мм               | 0,74 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.2), мм           | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.2), мм           | 3,55 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.2), мм           | 3,09 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина J (J на рис.2), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина K (K на рис.2), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.2), мм           | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.2), мм           | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                     |                                                                                     | Длина N (N на рис.2), мм               | 2,05 +0/-0,024         |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.2), мм           | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.2), мм           | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                     |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.2), мм           | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                     |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.2), мм | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                     |                                                                                     | Масса, г                               | 0,32 ± 5%              |

|                                                                                        |                                                                                   |                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA Ø<br>3,5мм,<br>высотой 14 мм,<br>цвет<br>фиолетовый |  | Диаметр В (Ø В на рис.2), мм               | 3,26± 0,05             |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина С (С на рис.2), мм                   | 14 ± 0,05              |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина D (D на рис.2), мм                   | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина F (F на рис.2), мм                   | 12,5 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина G (G на рис.2), мм                   | 0,74 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр Н (Ø Н на рис.2), мм               | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр I (Ø I на рис.2), мм               | 3,55 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр S (Ø S на рис.2), мм               | 3,09 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина J (J на рис.2), мм                   | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина К (К на рис.2), мм                   | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр L (Ø L на рис.2), мм               | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр М (Ø М на рис.2), мм               | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина N (N на рис.2), мм                   | 2,05 +0/-0,024         |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр О (Ø О на рис.2), мм               | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр Р (Ø Р на рис.2), мм               | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр Q (Ø Q на рис.2), мм               | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                        |                                                                                   | Шаг внутренней резьбы (R на рис.2),<br>мкм | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                        |                                                                                   | Масса, г                                   | 0,39 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA<br>CONTACTI Ø<br>3,5мм, высотой<br>14 мм            |  | Диаметр В (Ø В на рис.2), мм               | 3,26± 0,05             |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина С (С на рис.2), мм                   | 14 ± 0,05              |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина D (D на рис.2), мм                   | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина F (F на рис.2), мм                   | 12,5 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина G (G на рис.2), мм                   | 0,74 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр Н (Ø Н на рис.2), мм               | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр I (Ø I на рис.2), мм               | 3,55 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр S (Ø S на рис.2), мм               | 3,09 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина J (J на рис.2), мм                   | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина К (К на рис.2), мм                   | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр L (Ø L на рис.2), мм               | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр М (Ø М на рис.2), мм               | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                        |                                                                                   | Длина N (N на рис.2), мм                   | 2,05 +0/-0,024         |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр О (Ø О на рис.2), мм               | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр Р (Ø Р на рис.2), мм               | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                        |                                                                                   | Диаметр Q (Ø Q на рис.2), мм               | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                        |                                                                                   | Шаг внутренней резьбы (R на рис.2),<br>мкм | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                        |                                                                                   | Масса, г                                   | 0,39 ±5%               |

## Имплантаты дентальные RV VEGA и RV VEGA CONTACTI

### Схематическое изображение медицинских изделий

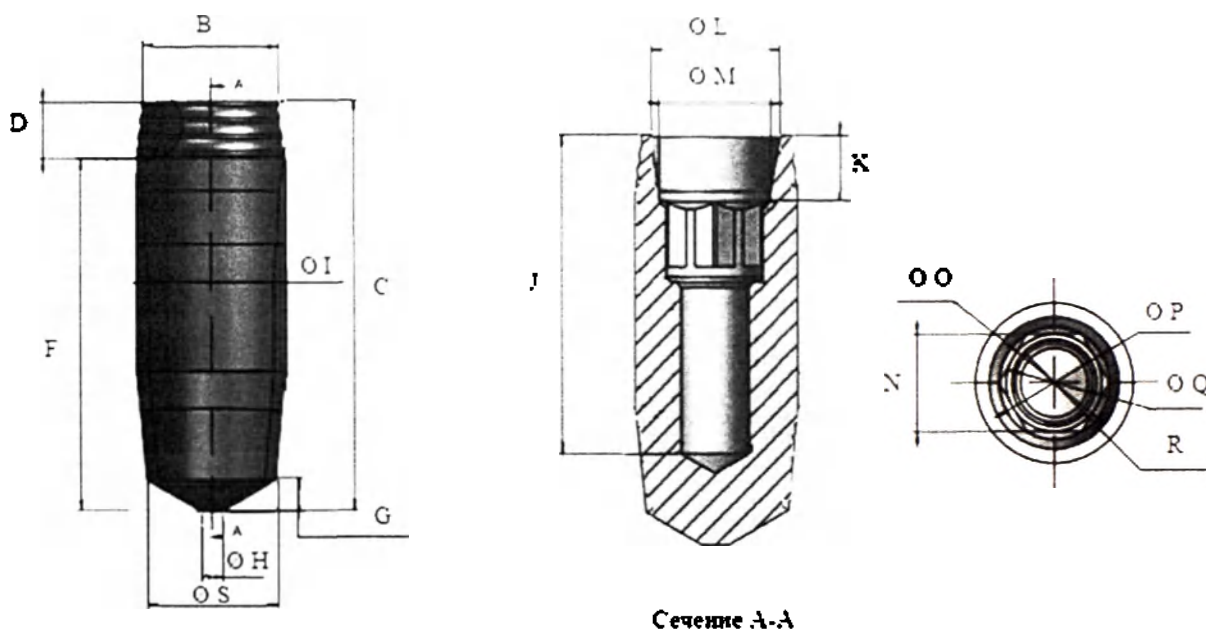


*Рисунок 3. Схема имплантата дентального RV VEGA и RV VEGA CONTACTI*

Функциональные и технические характеристики имплантатов дентальных RV VEGA и RV VEGA CONTACTI, и их фотографические изображения представлены в таблице 3.

*Таблица 3. Функциональные и технические характеристики и фотографические изображения*

| Название                                                      | Фото                                                                                | Размеры                                |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Имплантат дентальный RV VEGA Ø 4 мм, высотой 8 мм, цвет синий |  | Диаметр В (Ø В на рис.3), мм           | $3,76 \pm 0,05$               |
|                                                               |                                                                                     | Длина С (С на рис.3), мм               | $8 \pm 0,05$                  |
|                                                               |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм               | $1,4 \pm 0,05$                |
|                                                               |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм               | $6,5 \pm 0,05$                |
|                                                               |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм               | $0,88 \pm 0,05$               |
|                                                               |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.3), мм           | $0,5 \pm 0,05$                |
|                                                               |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | $3,95 \pm 0,05$               |
|                                                               |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм           | $3,56 \pm 0,05$               |
|                                                               |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм               | $6,6 \pm 0,05$                |
|                                                               |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм               | $1,24 \pm 0,05$               |
|                                                               |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм           | $3,07 \pm 0,05$               |
|                                                               |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.3), мм           | $2,7 \pm 0,05$                |
|                                                               |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм               | $2,35 +0/-0,024$              |
|                                                               |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.3), мм           | $2,36 +0/-0,04$               |
|                                                               |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.3), мм           | $2,65 +0/-0,04$               |
|                                                               |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм           | $1,52 +0/-0,04$               |
|                                                               |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мм | $M 1,8 \times 0,35 +0/-0,006$ |

|                                                                            |                                                                                     |                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA<br>CONTACTI Ø 4<br>мм, высотой 8 мм     |    | Масса, г                               | 0,21 ±5%               |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр В (Ø В на рис.3), мм           | 3,76± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина С (С на рис.3), мм               | 8 ± 0,05               |
|                                                                            |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм               | 1,4 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм               | 6,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм               | 0,88 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Н (Ø Н на рис.3), мм           | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | 3,95 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм           | 3,56 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм           | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.3), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм               | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.3), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.3), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм           | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                            |                                                                                     | Масса, г                               | 0,21 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA Ø 4 мм,<br>высотой 10 мм,<br>цвет синий |    | Диаметр В (Ø В на рис.3), мм           | 3,76± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина С (С на рис.3), мм               | 10 ± 0,05              |
|                                                                            |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм               | 1,4 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм               | 8,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм               | 0,88 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Н (Ø Н на рис.3), мм           | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | 3,95 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм           | 3,56 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм           | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.3), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм               | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.3), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.3), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм           | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                            |                                                                                     | Масса, г                               | 0,28 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA<br>CONTACTI Ø 4<br>мм, высотой 10<br>мм |  | Диаметр В (Ø В на рис.3), мм           | 3,76± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина С (С на рис.3), мм               | 10 ± 0,05              |
|                                                                            |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм               | 1,4 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм               | 8,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм               | 0,88 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Н (Ø Н на рис.3), мм           | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | 3,95 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм           | 3,56 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм           | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.3), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм               | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.3), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.3), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
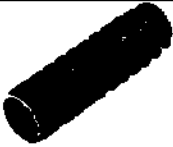
|                                                                            |                                                                                     |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм            | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мкм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                            |                                                                                     | Масса, г                                | 0,28 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA Ø 4 мм,<br>высотой 12 мм,<br>цвет синий |    | Диаметр B (Ø B на рис.3), мм            | 3,76± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина C (C на рис.3), мм                | 12 ± 0,05              |
|                                                                            |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм                | 1,4 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм                | 10,5 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм                | 0,88 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.3), мм            | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм            | 3,95 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм            | 3,56 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм            | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.3), мм            | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм                | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.3), мм            | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.3), мм            | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм            | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мкм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                            |                                                                                     | Масса, г                                | 0,37 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA<br>CONTACTI Ø 4<br>мм, высотой 12<br>мм |   | Диаметр B (Ø B на рис.3), мм            | 3,76± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина C (C на рис.3), мм                | 12 ± 0,05              |
|                                                                            |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм                | 1,4 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм                | 10,5 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм                | 0,88 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.3), мм            | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм            | 3,95 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм            | 3,56 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм            | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.3), мм            | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм                | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.3), мм            | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.3), мм            | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм            | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мкм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                            |                                                                                     | Масса, г                                | 0,37 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA Ø 4 мм,<br>высотой 14 мм,<br>цвет синий |  | Диаметр B (Ø B на рис.3), мм            | 3,76± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина C (C на рис.3), мм                | 14 ± 0,05              |
|                                                                            |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм                | 1,4 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм                | 12,5 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм                | 0,88 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.3), мм            | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм            | 3,95 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм            | 3,56 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм            | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.3), мм            | 2,7 ± 0,05             |

|                                                                            |                                                                                     |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                                            |    | Длина N (N на рис.3), мм                | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр O (O O на рис.3), мм            | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр P (O P на рис.3), мм            | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Q (O Q на рис.3), мм            | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мкм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                            |                                                                                     | Масса, г                                | 0,45 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA<br>CONTACTI Ø 4<br>мм, высотой 14<br>мм |  | Диаметр B (O B на рис.3), мм            | 3,76± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина C (C на рис.3), мм                | 14 ± 0,05              |
|                                                                            |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм                | 1,4 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм                | 12,5 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм                | 0,88 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр H (O H на рис.3), мм            | 0,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр I (O I на рис.3), мм            | 3,95 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (O S на рис.3), мм            | 3,56 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр L (O L на рис.3), мм            | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр M (O M на рис.3), мм            | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм                | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр O (O O на рис.3), мм            | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр P (O P на рис.3), мм            | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Q (O Q на рис.3), мм            | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мкм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                            |                                                                                     | Масса, г                                | 0,45 ±5%               |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр B (O B на рис.3), мм            | 4,26± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина C (C на рис.3), мм                | 8 ± 0,05               |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA Ø 4,5 мм,<br>высотой 8 мм               |  | Длина D (D на рис.3), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм                | 6,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм                | 1,08 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр H (O H на рис.3), мм            | 0,37 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр I (O I на рис.3), мм            | 4,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (O S на рис.3), мм            | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр L (O L на рис.3), мм            | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр M (O M на рис.3), мм            | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм                | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр O (O O на рис.3), мм            | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр P (O P на рис.3), мм            | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Q (O Q на рис.3), мм            | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мкм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                            |                                                                                     | Масса, г                                | 0,31 ±5%               |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр B (O B на рис.3), мм            | 4,26± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина C (C на рис.3), мм                | 8 ± 0,05               |
|                                                                            |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм                | 6,5 ± 0,05             |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA<br>CONTACTI Ø 4,5<br>мм, высотой 8 мм   |  | Длина G (G на рис.3), мм                | 1,08 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр H (O H на рис.3), мм            | 0,37 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр I (O I на рис.3), мм            | 4,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (O S на рис.3), мм            | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм                | 6,6 ± 0,05             |

|                                                                              |                                                                                     |                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                                                              |    | Длина К (К на рис.3), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр М (Ø М на рис.3), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм               | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр О (Ø О на рис.3), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр Р (Ø Р на рис.3), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм           | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                              |                                                                                     | Масса, г                               | 0,31 ± 5%              |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр В (Ø В на рис.3), мм           | 4,26 ± 0,05            |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA Ø 4,5 мм,<br>высотой 10 мм                |  | Длина С (С на рис.3), мм               | 10 ± 0,05              |
|                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм               | 8,5 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм               | 1,08 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.3), мм           | 0,37 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | 4,5 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм           | 3,07 ± 0,05            |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA<br>CONTACTI Ø 4,5<br>мм, высотой 10<br>мм |  | Диаметр М (Ø М на рис.3), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм               | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр О (Ø О на рис.3), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр Р (Ø Р на рис.3), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм           | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                              |                                                                                     | Масса, г                               | 0,43 ± 5%              |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр В (Ø В на рис.3), мм           | 4,26 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Длина С (С на рис.3), мм               | 10 ± 0,05              |
|                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм               | 1,3 ± 0,05             |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA Ø 4,5 мм,<br>высотой 12 мм                |  | Длина F (F на рис.3), мм               | 8,5 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм               | 1,08 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.3), мм           | 0,37 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | 4,5 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм           | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр М (Ø М на рис.3), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм               | 2,35 +0/-0,024         |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA Ø 4,5 мм,<br>высотой 12 мм                |  | Диаметр О (Ø О на рис.3), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр Р (Ø Р на рис.3), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм           | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                              |                                                                                     | Масса, г                               | 0,43 ± 5%              |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр В (Ø В на рис.3), мм           | 4,26 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Длина С (С на рис.3), мм               | 12 ± 0,05              |
|                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм               | 10,5 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм               | 1,08 ± 0,05            |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA Ø 4,5 мм,<br>высотой 12 мм                |  | Диаметр H (Ø H на рис.3), мм           | 0,37 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | 4,5 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм           | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр М (Ø М на рис.3), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм               | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр О (Ø О на рис.3), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр Р (Ø Р на рис.3), мм           | 2,65 +0/-0,04          |

|                                                                              |                                                                                     |                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | 4,5 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм           | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.3), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм               | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.3), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.3), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм           | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                              |                                                                                     | Масса, г                               | 0,54 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA<br>CONTACTI Ø 4,5<br>мм, высотой 12<br>мм |    | Диаметр B (Ø B на рис.3), мм           | 4,26 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.3), мм               | 12 ± 0,05              |
|                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм               | 10,5 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм               | 1,08 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.3), мм           | 0,37 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | 4,5 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм           | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.3), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм               | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.3), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA Ø 4,5 мм,<br>высотой 14 мм                |  | Диаметр P (Ø P на рис.3), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм           | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                              |                                                                                     | Масса, г                               | 0,54 ± 5%              |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр B (Ø B на рис.3), мм           | 4,26 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.3), мм               | 14 ± 0,05              |
|                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.3), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина F (F на рис.3), мм               | 12,5 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.3), мм               | 1,08 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.3), мм           | 0,37 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | 4,5 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.3), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.3), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм           | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.3), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                     | Длина N (N на рис.3), мм               | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр O (Ø O на рис.3), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр P (Ø P на рис.3), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм           | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                              |                                                                                     | Масса, г                               | 0,65 ± 5%              |

|                                                                              |                                                                                   |                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Имплантат<br>дентальный RV<br>VEGA<br>CONTACTI Ø 4,5<br>мм, высотой 14<br>мм |  | Диаметр В (Ø В на рис.3), мм           | 4,26± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                   | Длина С (С на рис.3), мм               | 14 ± 0,05              |
|                                                                              |                                                                                   | Длина D (D на рис.3), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                   | Длина F (F на рис.3), мм               | 12,5 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                   | Длина G (G на рис.3), мм               | 1,08 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                   | Диаметр H (Ø H на рис.3), мм           | 0,37 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                   | Диаметр I (Ø I на рис.3), мм           | 4,5 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                   | Диаметр S (Ø S на рис.3), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                   | Длина J (J на рис.3), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                   | Длина K (K на рис.3), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                   | Диаметр L (Ø L на рис.3), мм           | 3,07 ± 0,05            |
|                                                                              |                                                                                   | Диаметр M (Ø M на рис.3), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                              |                                                                                   | Длина N (N на рис.3), мм               | 2,35 +0/-0,024         |
|                                                                              |                                                                                   | Диаметр O (Ø O на рис.3), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                   | Диаметр P (Ø P на рис.3), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                   | Диаметр Q (Ø Q на рис.3), мм           | 1,52 +0/-0,04          |
|                                                                              |                                                                                   | Шаг внутренней резьбы (R на рис.3), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                              |                                                                                   | Масса, г                               | 0,65 ±5%               |

## Имплантаты дентальные MV VEGA +

### Схематическое изображение медицинских изделий

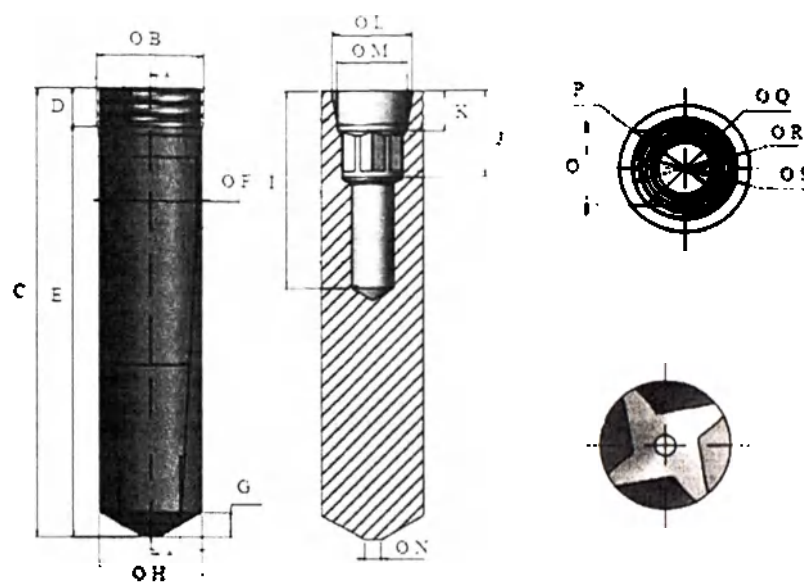


Рисунок 4. Схема имплантата дентального MV VEGA +

Функциональные и технические характеристики имплантатов дентальных MV VEGA+ и фотографические изображения представлены в таблице 4.

Таблица 4. Функциональные и технические характеристики и фотографические изображения


| Название                                                          | Фото | Размеры                                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Имплантат дентальный MV VEGA+ Ø 3,1 мм, высотой 8 мм, цвет желтый |      | Диаметр В (Ø В на рис.4), мм            | $3,3 \pm 0,05$                |
|                                                                   |      | Длина С (С на рис.4), мм                | $8 \pm 0,05$                  |
|                                                                   |      | Длина D (D на рис.4), мм                | $1,19 \pm 0,05$               |
|                                                                   |      | Длина E (E на рис.4), мм                | $6,6 \pm 0,05$                |
|                                                                   |      | Диаметр F (Ø F на рис.4), мм            | $3 \pm 0,05$                  |
|                                                                   |      | Длина G (G на рис.4), мм                | $0,76 \pm 0,05$               |
|                                                                   |      | Диаметр H (Ø H на рис.4), мм            | $3,15 \pm 0,05$               |
|                                                                   |      | Длина I (I на рис.4), мм                | $6,1 \pm 0,05$                |
|                                                                   |      | Длина J (J на рис.4), мм                | $2,7 \pm 0,05$                |
|                                                                   |      | Длина K (K на рис.4), мм                | $1,24 \pm 0,05$               |
|                                                                   |      | Диаметр L (Ø L на рис.4), мм            | $2,5 \pm 0,05$                |
|                                                                   |      | Диаметр M (Ø M на рис.4), мм            | $2,15 \pm 0,05$               |
|                                                                   |      | Диаметр N (Ø N на рис.4), мм            | $0,5 +0/-0,014$               |
|                                                                   |      | Длина O (O на рис.4), мм                | $1,86 +0/-0,04$               |
|                                                                   |      | Шаг внутренней резьбы (P на рис.4), мкм | $M 1,6 \times 0,35 +0/-0,006$ |
|                                                                   |      | Диаметр Q (Ø Q на рис.4), мм            | $2,1 +0/-0,04$                |
|                                                                   |      | Диаметр R (Ø Q на рис.4), мм            | $1,3 +0/-0,04$                |
|                                                                   |      | Диаметр S (Ø Q на рис.4), мм            | $1,86 +0/-0,04$               |
|                                                                   |      | Масса, г                                | $0,13 \pm 5\%$                |

|                                                                                   |                                                                                     |                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Имплантат<br>дентальный<br>MV VEGA+ Ø<br>3,1 мм,<br>высотой 10 мм,<br>цвет желтый |    | Диаметр В (Ø В на рис.4), мм           | 3,3 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина С (С на рис.4), мм               | 10 ± 0,05              |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина D (D на рис.4), мм               | 1,19 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина E (E на рис.4), мм               | 8,6 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.4), мм           | 3 ± 0,05               |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина G (G на рис.4), мм               | 0,76 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.4), мм           | 3,15 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина I (I на рис.4), мм               | 6,1 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина J (J на рис.4), мм               | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина K (K на рис.4), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.4), мм           | 2,5 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.4), мм           | 2,15 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.4), мм           | 0,5 +0/-0,014          |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина O (O на рис.4), мм               | 1,85 +0/-0,04          |
|                                                                                   |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.4), мм | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.4), мм           | 2,1 +0/-0,04           |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.4), мм           | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.4), мм           | 1,86 +0/-0,04          |
|                                                                                   |                                                                                     | Масса, г                               | 0,22 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>MV VEGA+ Ø<br>3,1 мм,<br>высотой 12 мм,<br>цвет желтый |    | Диаметр В (Ø В на рис.4), мм           | 3,3 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина С (С на рис.4), мм               | 12 ± 0,05              |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина D (D на рис.4), мм               | 1,19 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина E (E на рис.4), мм               | 10,6 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.4), мм           | 3 ± 0,05               |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина G (G на рис.4), мм               | 0,76 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.4), мм           | 3,15 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина I (I на рис.4), мм               | 6,1 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина J (J на рис.4), мм               | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина K (K на рис.4), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.4), мм           | 2,5 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.4), мм           | 2,15 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.4), мм           | 0,5 +0/-0,014          |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина O (O на рис.4), мм               | 1,85 +0/-0,04          |
|                                                                                   |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.4), мм | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.4), мм           | 2,1 +0/-0,04           |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.4), мм           | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.4), мм           | 1,86 +0/-0,04          |
|                                                                                   |                                                                                     | Масса, г                               | 0,28 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>MV VEGA+ Ø<br>3,1 мм,<br>высотой 14 мм,<br>цвет желтый |  | Диаметр В (Ø В на рис.4), мм           | 3,3 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина С (С на рис.4), мм               | 14 ± 0,05              |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина D (D на рис.4), мм               | 1,19 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина E (E на рис.4), мм               | 12,6 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.4), мм           | 3 ± 0,05               |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина G (G на рис.4), мм               | 0,76 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.4), мм           | 3,15 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина I (I на рис.4), мм               | 6,1 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина J (J на рис.4), мм               | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина K (K на рис.4), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.4), мм           | 2,5 ± 0,05             |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.4), мм           | 2,15 ± 0,05            |
|                                                                                   |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.4), мм           | 0,5 +0/-0,014          |
|                                                                                   |                                                                                     | Длина O (O на рис.4), мм               | 1,86 +0/-0,04          |

|  |  |                                           |                                  |
|--|--|-------------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | Шаг внутренней резьбы (Р на рис.4).<br>мм | $M 1,6 \times 0,35 - 0^{-0,006}$ |
|  |  | Диаметр Q (O Q на рис.4). мм              | $2,1 +0/-0,04$                   |
|  |  | Диаметр R (O Q на рис.4). мм              | $1,3 +0/-0,04$                   |
|  |  | Диаметр S (O Q на рис.4). мм              | $1,86 +0/-0,04$                  |
|  |  | Масса, г                                  | $0,35 \pm 5\%$                   |

## Имплантаты дентальные NV VEGA + и NV VEGA + CONTACTI

### Схематическое изображение медицинских изделий

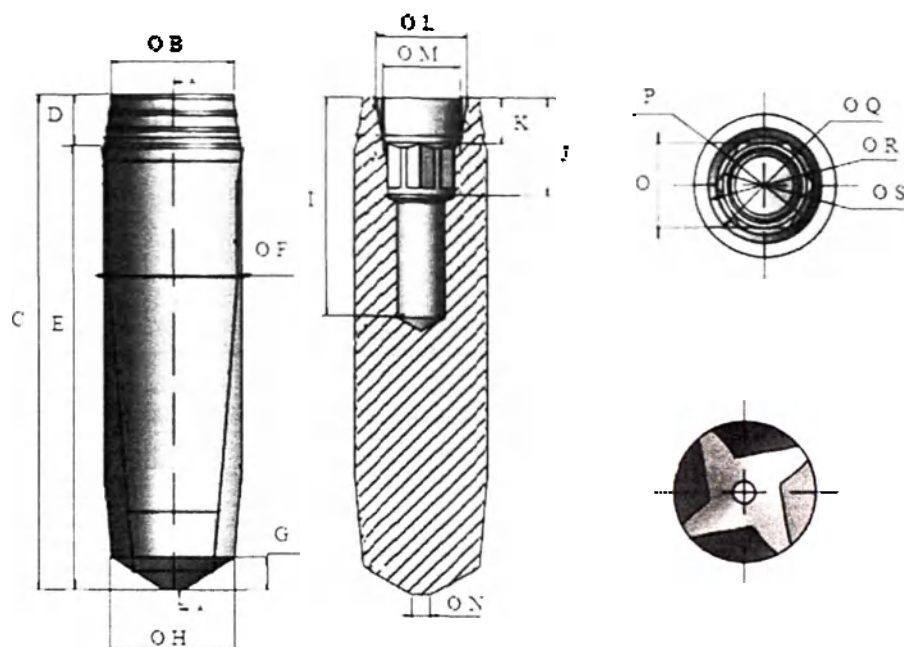

*Рисунок 5. Схема имплантата дентального NV VEGA + и NV VEGA + CONTACTI*

Функциональные и технические характеристики имплантатов дентальных NV VEGA + и NV VEGA + CONTACTI, и их фотографические изображения представлены в таблице 5.

*Таблица 5. Функциональные и технические характеристики и фотографические изображения*

| Название                                                              | Фото | Размеры                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Имплантат дентальный NV VEGA+ Ø 3.6 мм, высотой 8 мм, цвет фиолетовый |      | Диаметр В (О В на рис.5), мм            | $3.26 \pm 0.05$               |
|                                                                       |      | Длина С (С на рис.5), мм                | $8 \pm 0.05$                  |
|                                                                       |      | Длина D (D на рис.5), мм                | $1.3 \pm 0.05$                |
|                                                                       |      | Длина E (E на рис.5), мм                | $6.5 \pm 0.05$                |
|                                                                       |      | Диаметр F (О F на рис.5), мм            | $3.6 \pm 0.05$                |
|                                                                       |      | Длина G (G на рис.5), мм                | $0.79 \pm 0.05$               |
|                                                                       |      | Диаметр H (О H на рис.5), мм            | $3.26 \pm 0.05$               |
|                                                                       |      | Длина I (I на рис.5), мм                | $6.6 \pm 0.05$                |
|                                                                       |      | Длина J (J на рис.5), мм                | $3.2 \pm 0.05$                |
|                                                                       |      | Длина K (K на рис.5), мм                | $1.24 \pm 0.05$               |
|                                                                       |      | Диаметр L (О L на рис.5), мм            | $2.72 \pm 0.05$               |
|                                                                       |      | Диаметр M (О M на рис.5), мм            | $2.35 \pm 0.05$               |
|                                                                       |      | Диаметр N (О N на рис.5), мм            | $0.5 +0/-0.024$               |
|                                                                       |      | Длина O (O на рис.5), мм                | $2.05 +0/-0.04$               |
|                                                                       |      | Шаг внутренней резьбы (P на рис.5), мкм | $M 1.6 \times 0.35 +0/-0.006$ |
|                                                                       |      | Диаметр Q (О Q на рис.5), мм            | $2.3 +0/-0.04$                |

|                                                                                                      |                                                                                     |                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA+<br>CONTACTI O<br>3.6 мм,<br>высотой 8 мм,<br>цвет<br>фиолетовый  |    | Диаметр R (O Q на рис.5), мм           | 1.3 -0/-0.04           |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр S (O Q на рис.5), мм           | 2.06 +0/-0.04          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Масса, г                               | 0.17 ±5%               |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр B (O B на рис.5), мм           | 3.26± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина C (C на рис.5), мм               | 8 ± 0.05               |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина D (D на рис.5), мм               | 1.3 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина E (E на рис.5), мм               | 6.5 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр F (O F на рис.5), мм           | 3.6 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина G (G на рис.5), мм               | 0.79 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр H (O H на рис.5), мм           | 3.26 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина I (I на рис.5), мм               | 6.6 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина J (J на рис.5), мм               | 3.2 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина K (K на рис.5), мм               | 1.24 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр L (O L на рис.5), мм           | 2.72 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр M (O M на рис.5), мм           | 2.35 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр N (O N на рис.5), мм           | 0.5 +0/-0.024          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина O (O на рис.5), мм               | 2.05 +0/-0.04          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.5), мм | M 1.6 x 0.35 +0/-0.006 |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр Q (O Q на рис.5), мм           | 2.3 +0/-0.04           |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр R (O Q на рис.5), мм           | 1.3 +0/-0.04           |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр S (O Q на рис.5), мм           | 2.06 +0/-0.04          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Масса, г                               | 0.17 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA+ O<br>3.6 мм,<br>высотой 10 мм,<br>цвет<br>фиолетовый             |   | Диаметр B (O B на рис.5), мм           | 3.26± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина C (C на рис.5), мм               | 10 ± 0.05              |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина D (D на рис.5), мм               | 1.3 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина E (E на рис.5), мм               | 8.5 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр F (O F на рис.5), мм           | 3.6 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина G (G на рис.5), мм               | 0.79 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр H (O H на рис.5), мм           | 3.26 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина I (I на рис.5), мм               | 6.6 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина J (J на рис.5), мм               | 3.2 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина K (K на рис.5), мм               | 1.24 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр L (O L на рис.5), мм           | 2.72 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр M (O M на рис.5), мм           | 2.35 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр N (O N на рис.5), мм           | 0.5 +0/-0.024          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина O (O на рис.5), мм               | 2.05 +0/-0.04          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.5), мм | M 1.6 x 0.35 -0/-0.006 |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр Q (O Q на рис.5), мм           | 2.3 +0/-0.04           |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр R (O Q на рис.5), мм           | 1.3 +0/-0.04           |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр S (O Q на рис.5), мм           | 2.06 +0/-0.04          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Масса, г                               | 0.26 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA+<br>CONTACTI O<br>3.6 мм,<br>высотой 10 мм,<br>цвет<br>фиолетовый |  | Диаметр B (O B на рис.5), мм           | 3.26± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина C (C на рис.5), мм               | 10 ± 0.05              |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина D (D на рис.5), мм               | 1.3 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина E (E на рис.5), мм               | 8.5 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр F (O F на рис.5), мм           | 3.6 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина G (G на рис.5), мм               | 0.79 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр H (O H на рис.5), мм           | 3.26 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина I (I на рис.5), мм               | 6.6 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина J (J на рис.5), мм               | 3.2 ± 0.05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина K (K на рис.5), мм               | 1.24 ± 0.05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр L (O L на рис.5), мм           | 2.72 ± 0.05            |

|                                                                                                      |                                                                                     |                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр М (Ø М на рис.5), мм            | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.5), мм            | 0,5 +0/-0,024          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина О (О на рис.5), мм                | 2,05 +0/-0,04          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (Р на рис.5), мкм | М 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.5), мм            | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.5), мм            | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.5), мм            | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Масса, г                                | 0,26 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA+ Ø<br>3,6 мм,<br>высотой 12 мм,<br>цвет<br>фиолетовый             |    | Диаметр В (Ø В на рис.5), мм            | 3,26 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина С (С на рис.5), мм                | 12 ± 0,05              |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина D (D на рис.5), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина E (E на рис.5), мм                | 10,5 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.5), мм            | 3,6 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина G (G на рис.5), мм                | 0,79 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.5), мм            | 3,26 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина I (I на рис.5), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина J (J на рис.5), мм                | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина K (K на рис.5), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.5), мм            | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.5), мм            | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.5), мм            | 0,5 +0/-0,024          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина O (O на рис.5), мм                | 2,05 +0/-0,04          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (Р на рис.5), мкм | М 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.5), мм            | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.5), мм            | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.5), мм            | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Масса, г                                | 0,32 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA+<br>CONTACTI Ø<br>3,6 мм,<br>высотой 12 мм,<br>цвет<br>фиолетовый |  | Диаметр В (Ø В на рис.5), мм            | 3,26 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина С (С на рис.5), мм                | 12 ± 0,05              |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина D (D на рис.5), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина E (E на рис.5), мм                | 10,5 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.5), мм            | 3,6 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина G (G на рис.5), мм                | 0,79 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.5), мм            | 3,26 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина I (I на рис.5), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина J (J на рис.5), мм                | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина K (K на рис.5), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.5), мм            | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.5), мм            | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.5), мм            | 0,5 +0/-0,024          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина O (O на рис.5), мм                | 2,05 +0/-0,04          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (Р на рис.5), мкм | М 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.5), мм            | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.5), мм            | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.5), мм            | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                                      |                                                                                     | Масса, г                                | 0,32 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA+ Ø<br>3,6 мм,<br>высотой 14 мм,<br>цвет                           |  | Диаметр В (Ø В на рис.5), мм            | 3,26 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина С (С на рис.5), мм                | 14 ± 0,05              |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина D (D на рис.5), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина E (E на рис.5), мм                | 12,5 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.5), мм            | 3,6 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                     | Длина G (G на рис.5), мм                | 0,79 ± 0,05            |

|                                                                                                      |                                                                                   |                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| фиолетовый                                                                                           |                                                                                   | Диаметр Н (О Н на рис.5), мм           | 3,26 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина I (I на рис.5), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина J (J на рис.5), мм               | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина К (К на рис.5), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр L (О L на рис.5), мм           | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр М (О М на рис.5), мм           | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр N (О N на рис.5), мм           | 0,5 +0/-0,024          |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина О (О на рис.5), мм               | 2,05 +0/-0,04          |
|                                                                                                      |                                                                                   | Шаг внутренней резьбы (Р на рис.5), мм | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр Q (О Q на рис.5), мм           | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр R (О Q на рис.5), мм           | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр S (О Q на рис.5), мм           | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                                      |                                                                                   | Масса, г                               | 0,38 ± 5%              |
| Имплантат<br>дентальный<br>NV VEGA+<br>CONTACTI Ø<br>3,6 мм,<br>высотой 14 мм,<br>цвет<br>фиолетовый |  | Диаметр В (О В на рис.5), мм           | 3,26 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина С (С на рис.5), мм               | 14 ± 0,05              |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина D (D на рис.5), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина E (E на рис.5), мм               | 12,5 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр F (О F на рис.5), мм           | 3,6 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина G (G на рис.5), мм               | 0,79 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр Н (О Н на рис.5), мм           | 3,26 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина I (I на рис.5), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина J (J на рис.5), мм               | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина К (К на рис.5), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр L (О L на рис.5), мм           | 2,72 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр М (О М на рис.5), мм           | 2,35 ± 0,05            |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр N (О N на рис.5), мм           | 0,5 +0/-0,024          |
|                                                                                                      |                                                                                   | Длина О (О на рис.5), мм               | 2,05 +0/-0,04          |
|                                                                                                      |                                                                                   | Шаг внутренней резьбы (Р на рис.5), мм | M 1,6 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр Q (О Q на рис.5), мм           | 2,3 +0/-0,04           |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр R (О Q на рис.5), мм           | 1,3 +0/-0,04           |
|                                                                                                      |                                                                                   | Диаметр S (О Q на рис.5), мм           | 2,06 +0/-0,04          |
|                                                                                                      |                                                                                   | Масса, г                               | 0,38 ± 5%              |

## Имплантаты дентальные RV VEGA+ и RV VEGA+ CONTACTI

### Схематическое изображение медицинских изделий

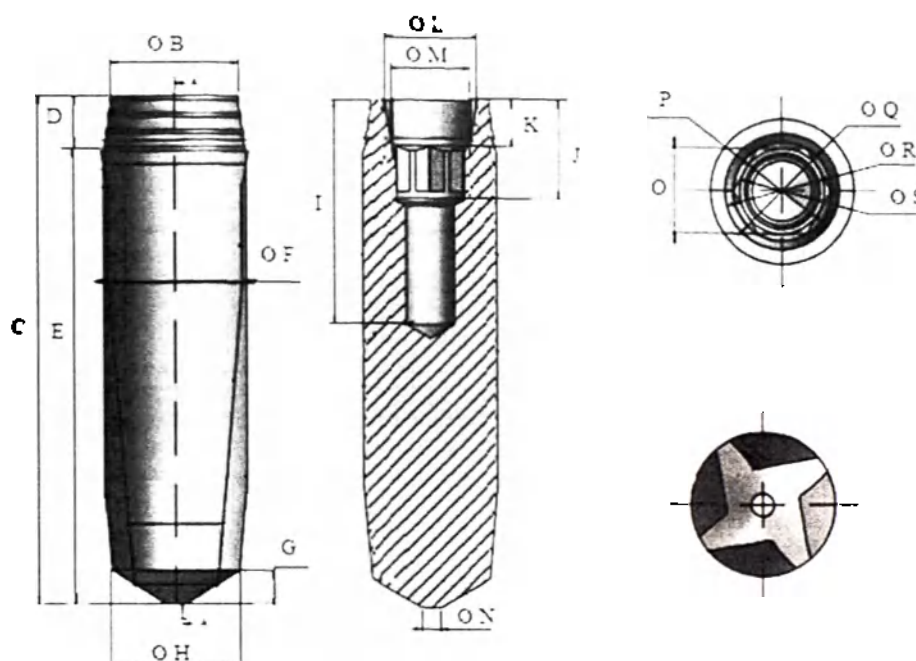


Рисунок 6. Схема имплантата дентального RV VEGA+ и RV VEGA + CONTACTI

Функциональные и технические характеристики имплантатов дентальных RV VEGA + и RV VEGA + CONTACTI, и их фотографические изображения представлены в таблице 6.

Таблица 6. Функциональные и технические характеристики и фотографические изображения

| Название                                                         | Фото | Размеры                                |                               |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Имплантат дентальный RV VEGA+ Ø 4.1 мм, высотой 8 мм, цвет синий |      | Диаметр В (Ø В на рис.6), мм           | $3,76 \pm 0,05$               |
|                                                                  |      | Длина С (С на рис.6), мм               | $8 \pm 0,05$                  |
|                                                                  |      | Длина D (D на рис.6), мм               | $1,3 \pm 0,05$                |
|                                                                  |      | Длина E (E на рис.6), мм               | $6,5 \pm 0,05$                |
|                                                                  |      | Диаметр F (Ø F на рис.6), мм           | $4,1 \pm 0,05$                |
|                                                                  |      | Длина G (G на рис.6), мм               | $0,95 \pm 0,05$               |
|                                                                  |      | Диаметр H (Ø H на рис.6), мм           | $3,79 \pm 0,05$               |
|                                                                  |      | Длина I (I на рис.6), мм               | $6,6 \pm 0,05$                |
|                                                                  |      | Длина J (J на рис.6), мм               | $3,2 \pm 0,05$                |
|                                                                  |      | Длина K (K на рис.6), мм               | $1,24 \pm 0,05$               |
|                                                                  |      | Диаметр L (Ø L на рис.6), мм           | $3 \pm 0,05$                  |
|                                                                  |      | Диаметр M (Ø M на рис.6), мм           | $2,7 \pm 0,05$                |
|                                                                  |      | Диаметр N (Ø N на рис.6), мм           | $0,5 +0/-0,024$               |
|                                                                  |      | Длина O (O на рис.6), мм               | $2,35 +0/-0,04$               |
|                                                                  |      | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мм | $M 1,8 \times 0,35 +0/-0,006$ |
|                                                                  |      | Диаметр Q (Ø Q на рис.6), мм           | $2,65 +0/-0,04$               |
|                                                                  |      | Диаметр R (Ø Q на рис.6), мм           | $2,36 +0/-0,04$               |

|                                                                                              |                                                                                     |                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Имплантат<br>дентальный<br>RV VEGA+<br>CONTACTI Ø<br>4,1 мм,<br>высотой 8 мм,<br>цвет синий  |    | Диаметр S (Ø Q на рис.6), мм           | 1,52+0/-0,06           |
|                                                                                              |                                                                                     | Масса, г                               | 0,21 ±5%               |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр B (Ø B на рис.6), мм           | 3,76± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм               | 8 ± 0,05               |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм               | 6,5 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.6), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм               | 0,95 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.6), мм           | 3,79 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм               | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.6), мм           | 3 ± 0,05               |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.6), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.6), мм           | 0,5 +0/-0,024          |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм               | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.6), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.6), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.6), мм           | 1,52+0/-0,06           |
| Имплантат<br>дентальный<br>RV VEGA+ Ø<br>4,1 мм,<br>высотой 10 мм,<br>цвет синий             |   | Диаметр B (Ø B на рис.6), мм           | 3,76± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм               | 10 ± 0,05              |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм               | 8,5 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.6), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм               | 0,95 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.6), мм           | 3,79 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм               | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.6), мм           | 3 ± 0,05               |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.6), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.6), мм           | 0,5 +0/-0,024          |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм               | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.6), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.6), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.6), мм           | 1,52+0/-0,06           |
|                                                                                              |                                                                                     | Масса, г                               | 0,31 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный<br>RV VEGA+<br>CONTACTI Ø<br>4,1 мм,<br>высотой 10 мм,<br>цвет синий |  | Диаметр B (Ø B на рис.6), мм           | 3,76± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм               | 10 ± 0,05              |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм               | 8,5 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.6), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм               | 0,95 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.6), мм           | 3,79 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм               | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.6), мм           | 3 ± 0,05               |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.6), мм           | 2,7 ± 0,05             |

|                                                                                              |                                                                                     |                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                                                                              |    | Диаметр N (O N на рис.6), мм           | 0,5 +0/-0,024          |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм               | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мм | M 1.8 x 0.35 +0/-0.006 |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (O Q на рис.6), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр R (O Q на рис.6), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (O Q на рис.6), мм           | 1,52+0/-0,06           |
|                                                                                              |                                                                                     | Масса, г                               | 0,31 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный<br>RV VEGA+ Ø<br>4,1 мм,<br>высотой 12 мм,<br>цвет синий             |  | Диаметр B (O B на рис.6), мм           | 3,76± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм               | 12 ± 0,05              |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм               | 10,5 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр F (O F на рис.6), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм               | 0,95 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (O H на рис.6), мм           | 3,79 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм               | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (O L на рис.6), мм           | 3 ± 0,05               |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (O M на рис.6), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр N (O N на рис.6), мм           | 0,5 +0/-0,024          |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм               | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мм | M 1.8 x 0.35 +0/-0.006 |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (O Q на рис.6), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр R (O Q на рис.6), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (O Q на рис.6), мм           | 1,52+0/-0,06           |
|                                                                                              |                                                                                     | Масса, г                               | 0,40 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный<br>RV VEGA+<br>CONTACTI Ø<br>4,1 мм,<br>высотой 12 мм,<br>цвет синий |  | Диаметр B (O B на рис.6), мм           | 3,76± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм               | 14 ± 0,05              |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм               | 12,5 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр F (O F на рис.6), мм           | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм               | 0,95 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (O H на рис.6), мм           | 3,79 ± 0,05            |

|                                                                                              |                                                                                     |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                                                              |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм                | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.6), мм            | 3 ± 0,05               |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.6), мм            | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.6), мм            | 0,5 +0/-0,024          |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм                | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мкм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.6), мм            | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.6), мм            | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.6), мм            | 1,52+0/-0,06           |
|                                                                                              |                                                                                     | Масса, г                                | 0,49 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный<br>RV VEGA+<br>CONTACTI Ø<br>4,1 мм,<br>высотой 14 мм,<br>цвет синий |    | Диаметр B (Ø B на рис.6), мм            | 3,76± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм                | 14 ± 0,05              |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм                | 12,5 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.6), мм            | 4,1 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм                | 0,95 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.6), мм            | 3,79 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм                | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.6), мм            | 3 ± 0,05               |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.6), мм            | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.6), мм            | 0,5 +0/-0,024          |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм                | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мкм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.6), мм            | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.6), мм            | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.6), мм            | 1,52+0/-0,06           |
|                                                                                              |                                                                                     | Масса, г                                | 0,49 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный<br>RV VEGA+ Ø<br>4,6 мм,<br>высотой 8 мм,<br>цвет серый              |  | Диаметр B (Ø B на рис.6), мм            | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм                | 8 ± 0,05               |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм                | 6,5 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.6), мм            | 4,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм                | 1,11 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.6), мм            | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм                | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.6), мм            | 3 ± 0,05               |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.6), мм            | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.6), мм            | 0,37 +0/-0,024         |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм                | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мкм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.6), мм            | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.6), мм            | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.6), мм            | 1,52+0/-0,06           |
|                                                                                              |                                                                                     | Масса, г                                | 0,29 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный                                                                      |  | Диаметр B (Ø B на рис.6), мм            | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм                | 8 ± 0,05               |

|                                                                            |                                                                                     |                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| RV VEGA-CONTACTI Ø 4,6 мм, высотой 8 мм, цвет серый                        |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм               | 6,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр F (O F на рис.6), мм           | 4,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм               | 1,11 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр H (O H на рис.6), мм           | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм               | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр L (O L на рис.6), мм           | 3 ± 0,05               |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр M (O M на рис.6), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр N (O N на рис.6), мм           | 0,37 +0/-0,024         |
|                                                                            |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм               | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Q (O Q на рис.6), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр R (O Q на рис.6), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (O Q на рис.6), мм           | 1,52+0/-0,06           |
| Имплантат дентальный RV VEGA+ Ø 4,6 мм, высотой 10 мм, цвет серый          |    | Диаметр B (O B на рис.6), мм           | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм               | 10 ± 0,05              |
|                                                                            |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм               | 8,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр F (O F на рис.6), мм           | 4,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм               | 1,11 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр H (O H на рис.6), мм           | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм               | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр L (O L на рис.6), мм           | 3 ± 0,05               |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр M (O M на рис.6), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр N (O N на рис.6), мм           | 0,37 +0/-0,024         |
|                                                                            |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм               | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Q (O Q на рис.6), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр R (O Q на рис.6), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (O Q на рис.6), мм           | 1,52+0/-0,06           |
| Имплантат дентальный RV VEGA+ CONTACTI Ø 4,6 мм, высотой 10 мм, цвет серый |  | Диаметр B (O B на рис.6), мм           | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм               | 10 ± 0,05              |
|                                                                            |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм               | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм               | 8,5 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр F (O F на рис.6), мм           | 4,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм               | 1,11 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр H (O H на рис.6), мм           | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм               | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм               | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм               | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр L (O L на рис.6), мм           | 3 ± 0,05               |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр M (O M на рис.6), мм           | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр N (O N на рис.6), мм           | 0,37 +0/-0,024         |
|                                                                            |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм               | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр Q (O Q на рис.6), мм           | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр R (O Q на рис.6), мм           | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                            |                                                                                     | Диаметр S (O Q на рис.6), мм           | 1,52+0/-0,06           |

|                                                                                              |                                                                                     |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Имплантат<br>дентальный<br>RV VEGA+ Ø<br>4,6 мм,<br>высотой 12 мм,<br>цвет серый             |    | Диаметр Q (Ø Q на рис.6), мм            | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.6), мм            | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.6), мм            | 1,52+0/-0,06           |
|                                                                                              |                                                                                     | Масса, г                                | 0,42 ±5%               |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр B (Ø B на рис.6), мм            | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм                | 12 ± 0,05              |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм                | 10,5 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.6), мм            | 4,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм                | 1,11 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.6), мм            | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм                | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.6), мм            | 3 ± 0,05               |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.6), мм            | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.6), мм            | 0,37 +0/-0,024         |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм                | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мкм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.6), мм            | 2,65 +0/-0,04          |
| Имплантат<br>дентальный<br>RV VEGA+<br>CONTACTI Ø<br>4,6 мм,<br>высотой 12 мм,<br>цвет серый |   | Диаметр B (Ø B на рис.6), мм            | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм                | 12 ± 0,05              |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм                | 10,5 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.6), мм            | 4,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм                | 1,11 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.6), мм            | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм                | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм                | 1,24 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр L (Ø L на рис.6), мм            | 3 ± 0,05               |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр M (Ø M на рис.6), мм            | 2,7 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр N (Ø N на рис.6), мм            | 0,37 +0/-0,024         |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина O (O на рис.6), мм                | 2,35 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мкм | M 1,8 x 0,35 +0/-0,006 |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр Q (Ø Q на рис.6), мм            | 2,65 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр R (Ø Q на рис.6), мм            | 2,36 +0/-0,04          |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр S (Ø Q на рис.6), мм            | 1,52+0/-0,06           |
|                                                                                              |                                                                                     | Масса, г                                | 0,52 ±5%               |
| Имплантат<br>дентальный<br>RV VEGA+ Ø<br>4,6 мм,<br>высотой 14 мм,<br>цвет серый             |  | Диаметр B (Ø B на рис.6), мм            | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина C (C на рис.6), мм                | 14 ± 0,05              |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина D (D на рис.6), мм                | 1,3 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина E (E на рис.6), мм                | 12,5 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр F (Ø F на рис.6), мм            | 4,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина G (G на рис.6), мм                | 1,11 ± 0,05            |
|                                                                                              |                                                                                     | Диаметр H (Ø H на рис.6), мм            | 4,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина I (I на рис.6), мм                | 6,6 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина J (J на рис.6), мм                | 3,2 ± 0,05             |
|                                                                                              |                                                                                     | Длина K (K на рис.6), мм                | 1,24 ± 0,05            |

|  |  |                                        |                               |
|--|--|----------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | Диаметр L (O L на рис.6), мм           | $3 \pm 0,05$                  |
|  |  | Диаметр M (O M на рис.6), мм           | $2,7 \pm 0,05$                |
|  |  | Диаметр N (O N на рис.6), мм           | $0,37 +0/-0,024$              |
|  |  | Длина O (O на рис.6), мм               | $2,35 +0/-0,04$               |
|  |  | Шаг внутренней резьбы (P на рис.6), мм | $M 1,8 \times 0,35 +0/-0,006$ |
|  |  | Диаметр Q (O Q на рис.6), мм           | $2,65 +0/-0,04$               |
|  |  | Диаметр R (O Q на рис.6), мм           | $2,36 +0/-0,04$               |
|  |  | Диаметр S (O Q на рис.6), мм           | $1,52+0/-0,06$                |
|  |  | Масса, г                               | $0,63 \pm 5\%$                |

## СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Медицинское изделие поставляется в стерильном виде. Стерилизация производится этилен оксидом

Имплантаты дентальные поставляются стерильными и предназначены только для одноразового применения. Не подлежат очистке и стерилизации. Очистка дезинфекция и стерилизация могут привести к ухудшению важных свойств материала и конструкции, спровоцировав отторжение изделия.

Интактная стерильная барьерная система защищает стерилизованный имплантат от воздействия окружающей среды и, при правильном хранении, гарантирует стерильность до истечения срока годности. Запрещается использовать имплантаты после истечения напечатанного срока годности. Имплантаты следует хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении, в защищенном от попадания прямого солнечного света месте при комнатной температуре. При извлечении имплантата из стерильной упаковки следует придерживаться соответствующей асептической техники. Стерильную упаковку следует вскрывать непосредственно перед операцией. Перед установкой имплантата следует проверить целостность упаковки. В случае повреждения стерильной упаковки имплантат не считается стерильным. Рекомендуется иметь в наличии резервный имплантат.

**Важно!** Использованный ранее или нестерильный имплантат ни в коем случае не подлежит имплантации.

## МАРКИРОВКА

| Символ                                                                              | Значение                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | Номер партии                                                           |
|    | Каталожный номер                                                       |
|    | Использовать до ....                                                   |
|    | Запрет на повторное применение                                         |
|    | Логотип, адрес и телефон производителя                                 |
|    | Дата изготовления                                                      |
|    | Уполномоченный представитель в Европейском сообществе                  |
|   | Применение только по назначению врача                                  |
|  | Изделие удовлетворяет основным требованиям Директив Европейского Союза |
|  | Обратитесь к инструкции по применению                                  |
|  | Стерилизация оксидом этилена                                           |
|  | Не использовать при повреждении упаковки                               |
|  | Не допускать воздействия солнечного света                              |
|  | Беречь от влаги                                                        |
|  | Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению                       |

Символы, указанные на транспортной упаковке медицинского изделия.

| Условное обозначение                                                              | Описание                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Указывает правильное вертикальное положение груза |
|  | хранить тару можно в сухом месте.                 |
|  | Хрупко                                            |
|  | Обращаться с осторожностью                        |

## УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Отчет об управлении рисками был составлен для этого изделия в соответствии со стандартом ISO 14971. В отчете указываются опасности, связанные с использованием медицинского изделия, а также оцениваются связанные риски. Каждый риск был оценен, те, которые невозможно снизить путем принятия мер для дополнительного снижения риска обозначены как «прислемые». Таким образом, все риски считаются сниженными до минимально возможного уровня.

В Отчете об управлении рисками делается вывод о том, что все соответствующие риски были выявлены и что предпринимаются соответствующие действия для контроля и устранения риска. При использовании в соответствии с инструкцией по применению медицинское изделие считается безопасным для применения по назначению.

## ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует отсутствие бракованных частей и ошибок производства. Имплантаты дентальные не содержат некачественные материалы. Гарантии распространяются только на изделия, для которых соблюдаются правила хранения и эксплуатации. Данная гарантия применима, только если имплантат для дентальной имплантации приобретен у уполномоченного дистрибьютора.

Производитель не несет гарантийной ответственности в случаях:

- использования совместно с медицинским изделием продукции третьих сторон, а также продукции, которая не была допущена к обращению в установленном порядке.
- нарушения инструкций по применению изделия
- нарушения условий хранения, транспортирования и (или) эксплуатации

- установки медицинского изделия лицами, не имеющими соответствующей квалификации
- установки медицинского изделия пациентам, имеющим к тому явные противопоказания.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 20 лет, гарантийный срок хранения составляет 5 лет с даты производства медицинского изделия и указан на упаковке. Срок хранения обусловлен возможностью обеспечения гарантированного уровня стерильности в течение данного срока.

# **ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

|                                 |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 13485:2016/ AC:2016      | Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования                                                                                        |
| EN ISO 10451:2010               | Стоматология - Содержание технической документации по системам дентальных имплантатов                                                                                        |
| EN 14971:2012                   | Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям                                                                                                     |
| EN ISO 14801:2016               | Стоматология - Имплантаты - Тест динамической нагрузки для внутрикостных зубных имплантатов                                                                                  |
| EN ISO 14155:2011               | Клинические исследования медицинских изделий для людей - Надлежащая клиническая практика                                                                                     |
| EN ISO 10993-1:2009/AC:2010     | Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 1: Оценка и тестирование в процессе управления рисками                                                                      |
| EN ISO 10993-3:2014             | Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 3: Тесты на генотоксичность, канцерогенность и репродуктивную токсичность                                                   |
| EN ISO 10993-5:2009             | Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 5: Тесты на цитотоксичность in vitro                                                                                        |
| EN ISO 10993-6:2009             | Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 6: Тесты на местные эффекты после имплантации                                                                               |
| EN ISO 10993-7:2008 / Cor1:2009 | Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 7: Остатки стерилизации оксидом этилена - Техническое исправление 1                                                         |
| EN ISO 10993-10:2013            | Биологическая оценка медицинских изделий. Тесты на раздражение и сенсибилизацию кожи                                                                                         |
| EN ISO 10993-11:2009            | Биологическая оценка медицинских изделий. Тесты на системную токсичность                                                                                                     |
| EN ISO 10993-12:2012            | Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 12: Подготовка проб и справочные материалы                                                                                  |
| EN ISO 7405:2008/ A1:2013       | Стоматология - Оценка биосовместимости медицинских изделий, используемых в стоматологии                                                                                      |
| EN 1642:2011                    | Стоматология - Медицинское оборудование для стоматологии - Зубные имплантаты                                                                                                 |
| EN ISO 11737-1:2006 /AC:2009    | Стерилизация медицинских изделий - Микробиологические методы - Часть 1: Определение популяции микроорганизмов на продуктах                                                   |
| EN ISO 11737-2:2009             | Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, выполняемые при определении, валидации и поддержании процесса стерилизации. |
| EN 868-10:2009                  | Упаковка для окончательно стерилизованных медицинских изделий. Часть 10. Нетканые материалы из полиолефинов с адгезивным покрытием. Требования и методы испытаний.           |
| EN ISO 11607-1:2009/AC:2014     | Упаковка медицинских изделий, стерилизуемых на завершающей стадии производства. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам стерилизации и системам упаковки        |
| EN ISO 11607-2:2006/AC:2014     | Упаковка для окончательно стерилизованных медицинских изделий - Часть 2: Требования к валидации для процессов формования, герметизации и сборки                              |
| EN ISO 11135:2014               | Стерилизация медицинских изделий. Оксид этилена. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий.                           |
| EN ISO 11135-1:2007             | Стерилизация медицинской продукции. Этилен оксид. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий                  |
| EN-556-1:2001/AC 2006           | Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 1. Требования к стерилизации упакованных медицинских изделий.              |
| EN 1422:2014                    | Стерилизаторы для медицинских целей. Стерилизаторы на основе этиленоксида. Требования и методы испытаний.                                                                    |

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 11138-2:2009   | Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 2. Биологические индикаторы для методов стерилизации оксидом этилена                                           |
| EN ISO 14644-1:2015   | Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 1: Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц                                                           |
| EN ISO 14644-2:2015   | Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 2: Мониторинг для подтверждения эффективности чистых помещений в отношении чистоты воздуха по концентрации частиц |
| EN 1041:2008/ A1:2013 | Информация, предоставленная производителем медицинских изделий                                                                                                                     |
| EN ISO 15223-1:2012   | Медицинские изделия. Символы, используемые на этикетках медицинских изделий, а также информация, которая должна быть предоставлена. Часть 1. Общие требования.                     |
| EN 980:2008           | Символы для использования в маркировке медицинских изделий                                                                                                                         |

[Перевод с английского языка на русский язык]

[Логотип: «Соадко» для системы имплантации «Клокнер»<sup>®</sup>]

Наименование компании: «СОАДКО Эс. Эл.» (SOADCO S.L.)

Генеральный директор: Мерседес (Мерсе) Рольдан Кеза (Mercedes (Mercè) Roldan Chesa)

Дата: 9 сентября 2021 г.

Подпись и печать: /подпись/

[Штамп: Логотип «Соадко»]

Ав. Пессебре, 76-82, Байшуш, AD700 Эскальдес-Энгордань

[КНЯЖЕСТВО АНДОРРА]

(Av. Pessebre 76-82, Baixos, AD700 Escaldes-Engordany

[PRINCIPAT D'ANDORRA])

Тел.: (+376) 800 590]

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

**Имплантат для дентальной имплантации «ВЕГА» (VEGA). в вариантах исполнения**

2021 г.

477/2021

Я, Исидре БАРТУМЕУ МАРТИНЕЗ (Isidre BARTUMEU MARTINEZ), государственный нотариус в Княжестве Андорра.

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЮ, что я считаю подлинной поставленную на обратной стороне этой страницы настоящего документа подпись госпожи Мерседес РОЛЬДАН КЕЗА, номер паспорта гражданина Андорры 04024695, поскольку эта подпись идентична подписям, которые она обычно ставит на всех своих документах.

Настоящее нотариальное заверение предназначено исключительно для аутентификации подписи.

В подтверждение чего я поставил свое имя и должностную печать сегодня, 9 сентября 2021 г.

*/подпись/*

[*Гербовая печать:* НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА БАРТУМЕУ МАРТИНЕЗА \* АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ \* КНЯЖЕСТВО АНДОРРА]

[*Текст документа на русском языке*]

Перевод данного текста выполнен переводчиком Сироткиной Марией Олеговной

*С*

Российская Федерация

Город Москва

Одиннадцатого ноября две тысячи двадцать первого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Сироткиной Марии Олеговны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09 – н/77 – 2021 – *84-1984*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



*Г.Б. Акимов*



Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью *53* лист(-а, -ов).

Нотариус:

*Г.Б. Акимов*