

**МАТРАС МЕДИЦИНСКИЙ**  
**ПО ТУ 31.03.12-004-72886127-2019**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ММ 72886127.00.002 РЭ**

Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика «ОМЕТА»  
Юридический адрес: 620010, г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский, д. 33.  
Почтовый адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 67Б.

**1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации, хранения и заказа медицинского изделия «Матрас медицинский по ТУ 31.03.12-004-72886127-2019».

Ассортимент (модельный ряд) матрасов, на который распространяется данное руководство, представлен в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование варианта исполнения                                       | Артикул                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Матрас медицинский односекционный                                      | ММ-01 Классик, ММ-01 Комфорт   |
| Матрас медицинский комбинированный односекционный                      | ММК-01 Комфорт плюс            |
| Матрас медицинский двухсекционный                                      | ММ-02 Классик, ММ-02 Комфорт   |
| Матрас медицинский комбинированный двухсекционный                      | ММК-02 Комфорт плюс            |
| Матрас медицинский трехсекционный                                      | ММ-03 Классик, ММ-03 Комфорт   |
| Матрас медицинский комбинированный трехсекционный                      | ММК-03 Комфорт плюс            |
| Матрас медицинский просечной                                           | ММ-04 Классик, ММ-04 Комфорт   |
| Матрас медицинский комбинированный просечной                           | ММК-04 Комфорт плюс            |
| Матрас медицинский акушерский просечной двухсекционный                 | МА-04 Классик, МА-04 Комфорт   |
| Матрас медицинский комбинированный акушерский просечной двухсекционный | МАК-04 Комфорт плюс            |
| Матрас медицинский средний                                             | ММ-05 Классик, ММ-05 Комфорт   |
| Матрас медицинский комбинированный средний                             | ММК-05 Комфорт плюс            |
| Матрас медицинский средний просечной                                   | ММ-06 Классик, ММ-06 Комфорт   |
| Матрас медицинский комбинированный средний просечной                   | ММК-06 Комфорт плюс            |
| Матрас медицинский малый                                               | ММ-07 Классик, ММ-07 Комфорт   |
| Матрас медицинский комбинированный малый                               | ММК-07 Комфорт плюс            |
| Матрас медицинский малый просечной                                     | ММ-08 Классик, ММ-08 Комфорт   |
| Матрас медицинский комбинированный малый просечной                     | ММК-08 Комфорт плюс            |
| Матрас медицинский для пеленальных столов                              | ММП-01 Классик, ММП-01 Комфорт |
| Матрас медицинский комбинированный для пеленальных столов              | ММПК-01 Комфорт плюс           |
| <b>Принадлежности:</b>                                                 |                                |
| Наматрасник (при необходимости)                                        | -                              |

**Назначение:** Изделия предназначены для размещения на опорной платформе для кроватного матраса с целью обеспечения комфортной поверхности, на которой можно лежать, отдыхать и спать; а также для распределения веса тела по большой площади поверхности с целью обеспечения уменьшения давления для удобства и улучшения кровообращения, для профилактики пролежней.

**Область применения:** широкого применения.

**Условия применения:** лечебно-профилактические учреждения.

**Потенциальные потребители:** лечебно-профилактические учреждения, у которых есть потребность в оснащении больничных кроватей, хирургических и пеленальных столов.

**Показания к применению:** рекомендуется к применению совместно с медицинскими кроватями в палатах общего и специализированного назначения при проведении процедур, требующих нахождения пациента в лежачем положении.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость материалов.

**Возможные побочные воздействия:** индивидуальная непереносимость (аллергическая реакция) на материал изделия.

**Информация о стерильности:** изделия являются нестерильными изделиями многократного применения.

**Информация о сроке службы:** 5 лет.

**Сведения об используемых при производстве материалах:**

- наполнение: пенополиуретан эластичный ST253 и LR5014GL (дополнительный слой для комбинированных матрасов);

- чехлы:

1) медицинская ткань SANMED (покрытие – полиуретан 100%, основа – полиэфир 100%);

2) кожзаменитель (внешний слой – поливинилхлорид (ПВХ), основа – трикотажное плотно (натуральные волокна синтетические полиэфирные нити или волокна и их смеси));

- наматрасник: медицинская ткань SANMED (покрытие – полиуретан 100%, основа – полиэфир 100%);

- армированные нити 70ЛЛ (полиэстер 100%);

- застежка молния: нейлон 100%, материал застежки – цинко-магнийевый сплав ЦАМ 4-1 (ЗАМАК);

- Товарный ярлык (вшивная маркировка): полиэстер 100%.

**Дата изготовления указана на последней странице настоящего руководства.**

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры изделий представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Артикул варианта исполнения | Габаритные размеры ДхШхВ, мм (шаг 10 мм) | Масса, кг **     | Наполнитель              | Чехол             |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| ММ-01 Классик               | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,6 до 18,21  | ППУ ST253                | Кожзаменитель     |
| ММ-01 Комфорт               | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,6 до 18,21  | ППУ ST253                | Медицинская ткань |
| ММК-01 Комфорт плюс         | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,61 до 18,22 | ППУ ST253 и ППУ LR5014GL | Медицинская ткань |
| ММ-02 Классик               | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,60 до 18,21 | ППУ ST253                | Кожзаменитель     |
| ММ-02 Комфорт               | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,60 до 18,21 | ППУ ST253                | Медицинская ткань |
| ММК-02 Комфорт плюс         | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,61 до 18,22 | ППУ ST253 и ППУ LR5014GL | Медицинская ткань |
| ММ-03 Классик               | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,60 до 18,21 | ППУ ST253                | Кожзаменитель     |
| ММ-03 Комфорт               | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,60 до 18,21 | ППУ ST253                | Медицинская ткань |
| ММК-03 Комфорт плюс         | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,61 до 18,22 | ППУ ST253 и ППУ LR5014GL | Медицинская ткань |
| ММ-04 Классик               | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,57 до 18,18 | ППУ ST253                | Кожзаменитель     |
| ММ-04 Комфорт               | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,57 до 18,18 | ППУ ST253                | Медицинская ткань |
| ММК-04 Комфорт плюс         | от 1800×700×80 до 2200×1000×180          | от 3,58 до 18,19 | ППУ ST253 и ППУ LR5014GL | Медицинская ткань |

|                     |                                                  |                      |                                |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| МА-04 Классик       | от 1400×700×80 до 1800×900×120 (спинной сегмент) | от 2,35 кг до 7,3 кг | ППУ ST253                      | Кожзаменитель     |
|                     | от 700×800×150 до 900×900×180 (ножной сегмент)   | от 2,25 кг до 5,5 кг |                                |                   |
| МА-04 Комфорт       | от 1400×700×80 до 1800×900×120 (спинной сегмент) | от 2,35 кг до 7,3 кг | ППУ ST253                      | Медицинская ткань |
|                     | от 700×800×150 до 900×900×180 (ножной сегмент)   | от 2,25 кг до 5,5 кг |                                |                   |
| МАК-04 Комфорт плюс | от 1400×700×80 до 1800×900×120 (спинной сегмент) | от 2,35 кг до 7,3 кг | ППУ ST253<br>и<br>ППУ LR5014GL | Медицинская ткань |
|                     | от 700×800×150 до 900×900×180 (ножной сегмент)   | от 2,25 кг до 5,5 кг |                                |                   |
| ММ-05 Классик       | от 1300×700×80 до 1750×900×180                   | от 2,61 до 13,18     | ППУ ST253                      | Кожзаменитель     |
| ММ-05 Комфорт       | от 1300×700×80 до 1750×900×180                   | от 2,61 до 13,18     | ППУ ST253                      | Медицинская ткань |
| ММК-05 Комфорт плюс | от 1300×700×80 до 1750×900×180                   | от 2,62 до 13,19     | ППУ ST253<br>и<br>ППУ LR5014GL | Медицинская ткань |
| ММ-06 Классик       | от 1300×700×80 до 1750×900×180                   | от 2,58 до 13,15     | ППУ ST253                      | Кожзаменитель     |
| ММ-06 Комфорт       | от 1300×700×80 до 1750×900×180                   | от 2,58 до 13,15     | ППУ ST253                      | Медицинская ткань |
| ММК-06 Комфорт плюс | от 1300×700×80 до 1750×900×180                   | от 2,59 до 13,16     | ППУ ST253<br>и<br>ППУ LR5014GL | Медицинская ткань |
| ММ-07 Классик       | от 1150×650×100 до 1250×900×180                  | от 2,61 до 9,52      | ППУ ST253                      | Кожзаменитель     |
| ММ-07 Комфорт       | от 1150×650×100 до 1250×900×180                  | от 2,61 до 9,52      | ППУ ST253                      | Медицинская ткань |
| ММК-07 Комфорт плюс | от 1150×650×100 до 1250×900×180                  | от 2,62 до 9,53      | ППУ ST253<br>и<br>ППУ LR5014GL | Медицинская ткань |
| ММ-08 Классик       | от 1150×650×100 до 1250×900×180                  | от 2,59 до 9,50      | ППУ ST253                      | Кожзаменитель     |
| ММ-08 Комфорт       | от 1150×650×100 до 1250×900×180                  | от 2,59 до 9,50      | ППУ ST253                      | Медицинская ткань |
| ММК-08 Комфорт плюс | от 1150×650×100 до 1250×900×180                  | от 2,60 до 9,51      | ППУ ST253<br>и<br>ППУ LR5014GL | Медицинская ткань |
| ММП-01 Классик      | от 600×400×20 до 1000×1000×50                    | от 0,24 до 4,00      | ППУ ST253                      | Кожзаменитель     |
| ММП-01 Комфорт      | от 600×400×20 до 1000×1000×50                    | от 0,24 до 4,00      | ППУ ST253                      | Медицинская ткань |
| ММПК-01             | от 600×400×20 до 1000×1000×50                    | от 0,24 до 4,01      | ППУ ST253<br>и<br>ППУ LR5014GL | Медицинская ткань |
| Наматрасник         | от 600×400×20 до 2200×1000×180                   | от 0,21 до 0,98      | -                              | Медицинская ткань |

\* Допустимые предельные отклонения габаритных размеров ±1 мм.

\*\* Допустимое предельное отклонение массы не более 5%

**Принадлежности:**

- Наматрасник: длина от 600 до 2200 мм, ширина от 400 до 1000 мм, высота от 20 до 180 мм (шаг 10 мм для всех измерений) – 1 шт. (при необходимости).

**Геометрические размеры секции:**

- Для двухсекционного матраса, длина в диапазоне от 600 мм до 1470 мм, шаг 10 мм. Ширина и высота секции соответствуют ширине и высоте матраса. Допустимые предельные отклонения габаритных размеров  $\pm 1$  мм.

- Для трехсекционного матраса, длина в диапазоне от 360 мм до 1000 мм, шаг 10 мм. Ширина и высота секции соответствуют ширине и высоте матраса. Допустимые предельные отклонения габаритных размеров  $\pm 1$  мм.

Физико-механические характеристики изделий представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование                                                      | Значение              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Категория мягкости матрасов толщиной свыше 100 мм                 | II                    |
| Деформация мягкого элемента под нагрузкой 70 даН                  | от 70 до 90 мм        |
| Податливость                                                      | от 1,3 до 1,6 мм/даН  |
| Прочность чехлов матрасов (в том числе швов между деталями чехла) | не менее 79 Н (8 кгс) |
| Раздвигаемость нитей тканей в шве чехлов                          | не более 2 мм         |
| Допустимая нагрузка на изделие                                    | не более 200 кг       |
| Остаточная деформация матраса                                     | не более 5 %          |
| Усадка                                                            | не более 30 мм        |
| Неравномерность усадки                                            | не более 10 мм        |
| Срок службы                                                       | 5 лет                 |

**3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

При покупке матраса необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, указанный на матрасе размер, а также комплектность, указанную в маркировке конкретного изделия.

В комплект поставки входят:

- Матрас одного варианта исполнения, типоразмера – 1 шт.;
- Наматрасник одного типоразмера – 1шт. (при необходимости);
- Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

**4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Необходимо провести предварительную проверку маркировки перед использованием матраса.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Необходимо использовать только подлинные принадлежности, другие комплектующие могут быть опасными и автоматически прекращают гарантийные обязательства.

Не используйте матрас не по назначению.

При выявлении механических повреждений, не используйте матрас. Не используйте матрас, если Вы считаете, что он подвергся чрезмерной нагрузке или ударам. В случае сомнений свяжитесь с вашим местным сервисным агентом.

**5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прежде чем приступать к использованию матраса, убедитесь, что вы правильно выбрали необходимые принадлежности (при их наличии).

Матрас предназначен для повседневного многократного применения пациентами только в сочетании с постельным бельем. Ремонту не подлежит. Использовать в помещении при комнатной температуре.

Матрас укомплектован съемным чехлом на молнии. Допускается машинная сушка чехла и наматрасника из медицинской ткани до  $t +120$  °C, автоклавирование при  $t+90$  °C, сушка в камере при  $t$  до  $+105$  °C (1 мин). Допускается чистка и мойка чехла из кожзаменителя любыми чистящими, моющими и дезинфицирующими средствами, за исключением препаратов, содержащими хлор и альдегиды.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не обрабатывать препаратами, содержащими хлор и альдегиды.

Дезинфекции подлежит только чехол. Дезинфекцию следует проводить по МУ-287-113 - способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе

дезинфицирующего средства на основе ЧАС, третичных аминов, гуанидинов, не содержащего хлора и альдегидов: «А-Дез», «Ника-экстра М профи», «3D-Септ», «Экстрацид».

После обработки дезинфицирующими средствами необходимо протереть тряпкой, смоченной в простой воде. Чехол из кожзаменителя также необходимо протереть до сухого состояния.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не гладить чехол из кожзаменителя горячими поверхностями.

## 6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия транспортирования и хранения изделий - по ГОСТ 19917.

Условия транспортирования матраса должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Изделия транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с матрасом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

Матрасы перемещают без переломов и скручивания. Складирование допускается методом штабелирования в горизонтальном виде. Высота штабеля не более 15 штук. Запрещено размещать поверх штабеля матрасов какой-либо иной груз.

В процессе хранения матрас в транспортной упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер.

Максимальный срок хранения – 5 лет.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Хранить и перемещать только в горизонтальном положении!

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий установленным требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатационной документации.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену матраса.

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения акта рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 дней выдает акт экспертизы.

Гарантия не распространяется на:

- изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.

- изделия, функциональность которых нарушена вследствие неправильной эксплуатации.

- изделия, ранее отремонтированные потребителем или необученным ремонту данного изделия специалистом.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт осуществляется в течение 20 дней с момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Если матрас поврежден так, что его больше нельзя использовать, утилизируйте изделие.

Утилизация изделий осуществляется на общих основаниях согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями (после дезинфекции), утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, относящимися к медицинским отходам класса Б.

Изделия с истекшими сроками годности, не загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, относящимися к медицинским отходам класса А.

## 9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправности                            | Возможные причины                                                            | Методы устранения                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Деформация размеров или потеря упругости | Производственный дефект                                                      | Обратиться в службу поддержки             |
|                                          | Механический дефект, вызванный неправильным хранением и (или) использованием | Не подлежит восстановлению                |
| Механическое повреждение чехла           | Небрежное обращение с чехлом или несоблюдение рекомендаций по уходу          | Ремонт при помощи швейных принадлежностей |

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ (ИЗГОТОВИТЕЛЕ)

Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика «ОМЕТА» (ООО «МФ «ОМЕТА»). Юридический адрес: Россия, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33. Почтовый адрес: Россия, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 67Б.

Тел.: +7 (343) 311-22-27. E-mail: [info@ometa.ru](mailto:info@ometa.ru).

Дата изготовления

В случае обнаружения дефектов связаться с производителем

**ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА**

Тел./ факс +7 343 311-22-27

e-mail: [info@ometa.ru](mailto:info@ometa.ru)

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Прошито, пронумеровано,  
скреплено подписью и печатью

7 (семь) листов (-а)

ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА».

Директор Поляков А.А.

Подпись \_\_\_\_\_



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА  
**ОМЕТА**

ИНН 6658181854 КПП 667901001

р/с 40702810316120121657 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург

к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

ООО Мебельная фабрика «ОМЕТА»

Юр. адрес: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33

Почт. адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 67 Б

Тел: (343) 311-22-27

ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ  
«Матрас медицинский по ТУ 31.03.12-004-72886127-2019»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА»

Поляков А.А.

2021 г.



1. Образец маркировки на матрас медицинский с чехлом из медицинской ткани и на индивидуальную упаковку изделия

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА<br/><b>OMETA</b></p> <p> </p> <p>г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 67 Б<br/>тел. 8 (343) 311-22-27<br/>www.ometa.ru</p> <p><b>Матрас медицинский<br/>комбинированный<br/>односекционный<br/>ММК-01<br/>Комфорт плюс<br/>(2000x800x120)</b></p> <p>ПУ № _____ ОТ _____<br/>ТУ 31.03.12-004-72886127-2019<br/>Дата выпуска указана в паспорте</p> | <p><b>Наполнение:</b> 100% пенополиуретан<br/><b>Чехол:</b> медицинская ткань<br/><b>Состав:</b><br/>Покрытие - 100% полиуретан<br/>Основа - 100% полиэфир<br/><b>Уход за чехлом:</b><br/>Машинная стирка при t +90°C<br/>Автоклавирование при t +130°C<br/>Допускается машинная сушка до t +120°C<br/>Не обрабатывать препаратами,<br/>содержащими хлор и альдегиды. Сушка<br/>в камере при t +105°C (1 мин). После<br/>обработки дезинфицирующими<br/>средствами необходимо протереть<br/>тряпкой, смоченной в простой воде</p> <p>    </p> <p>Хранить и перемещать только в<br/>горизонтальном положении</p> <p>Сделано в России</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Образец маркировки на матрас медицинский с чехлом из кожзаменителя и на индивидуальную упаковку изделия

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА<br/><b>OMETA</b></p> <p> </p> <p>г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 67 Б<br/>тел. 8 (343) 311-22-27<br/>www.ometa.ru</p> <p><b>Матрас медицинский<br/>средний просечной<br/>ММ-06 Классик<br/>(1500x800x100)</b></p> <p>ПУ № _____ ОТ _____<br/>ТУ 31.03.12-004-72886127-2019<br/>Дата выпуска указана в паспорте</p> | <p><b>Наполнение:</b> 100% пенополиуретан<br/><b>Чехол:</b> кожзаменитель<br/><b>Состав:</b><br/>Внешний слой - поливинилхлорид (ПВХ)<br/>Основа - трикотажное полотно<br/><b>Уход за чехлом:</b><br/>Чистка и мойка любыми чистящими,<br/>моющими и дезинфицирующими<br/>средствами, исключая препараты,<br/>содержащие хлор и альдегиды<br/>После обработки дезинфицирующими<br/>средствами необходимо протереть<br/>тряпкой, смоченной в простой воде,<br/>затем протереть до сухого состояния<br/>Не гладить горячими поверхностями</p> <p>   </p> <p>Хранить и перемещать только в<br/>горизонтальном положении</p> <p>Сделано в России</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Образец маркировки на наматрасник и на индивидуальную упаковку наматрасника

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА<br/><b>ОМЕТА</b></p> <p> </p> <p>г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 67 Б<br/>тел. 8 (343) 311-22-27<br/>www.ometa.ru</p> <p><b>НАМАТРАСНИК</b><br/>(2000x800x100)</p> <p>ПУ № _____ от _____<br/>ТУ 31.03.12-004-72886127-2019<br/>Дата выпуска указана в паспорте</p> | <p><b>Наполнение:</b> 100% пенополиуретан<br/><b>Состав:</b> медицинская ткань (покрытие - 100% полиуретан, основа - 100% полиэфир)<br/><b>Уход:</b><br/>Машинная стирка при t +90°C<br/>Автоклавирование при t +130°C<br/>Допускается машинная сушка до t +120°C<br/>Не обрабатывать препаратами, содержащими хлор и альдегиды. Сушка в камере при t +105°C (1 мин). После обработки дезинфицирующими средствами необходимо протереть тряпкой, смоченной в простой воде</p> <p></p> <p>Сделано в России</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. Образец маркировки на транспортную упаковку

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Матрас медицинский по ТУ 31.03.12-004-72886127-2019</b></p> <p><b>Вариант исполнения: Матрас медицинский комбинированный односекционный «ММК-01 Комфорт плюс»</b></p> <p>ПУ № _____ от _____      Габаритные размеры: 2000x800x120 мм</p> <p>Дата изготовления: Март 2021 г.</p> <p> ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА»<br/>Юридический адрес: 620010, Россия, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33<br/>Почтовый адрес: 620010, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 67 Б</p> <p>     </p> <p><b>Хранить и перемещать только в горизонтальном положении!</b></p> <p><b>Сделано в России</b></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Прошито, пронумеровано,  
скреплено подписью и печатью

3 (три) листов (-а)

ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА».

Директор Поляков А.А.

Подпись \_\_\_\_\_

