


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Орто Медикл Групп»

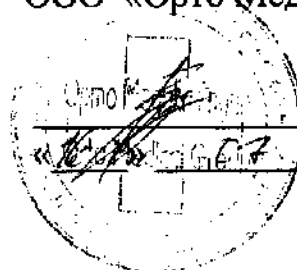

В.Ю.Задорожний
2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению
Кресла-коляски инвалидные
ВСН-5000, ВСН-5100, ВСН-5200, ВСН-5300

2010

1. Назначение

Кресло-коляска предназначена для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения инвалидов с утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и по дорогам с твёрдым покрытием

2. Основные технические характеристики

Каркас - Металл

Крестовина - Одинарная

Подлокотники - Фиксированные

Форма подлокотников - Прямая

Опора под голень - Регулируемая опора ПВХ

Тормозная система - Стояночная

Сидение - Стандартное съёмное сидение

3. Противопоказания

Нет

4. Подготовка к работе изделия

Перед использованием изделия в полной сборке необходимо проверить тормоза и состояние тормозных колодок.

Необходимо проверить состояние шин на передних и задних колёсах.

Необходимо проверить на прочность каркасные трубки на спинке кресла.

5. Порядок работы изделия

Кресло-коляска складывается и раскладывается простым движением без применения инструментов. Для складывания необходимо снять фиксирующий ремень для ног, снять подножки или откинуть их вверх, отогнуть назад мягкую спинку, сидение потянуть за середину вверх.

Для раскладывания необходимо нажать на внутреннюю трубку основания сидения, закрепить подножки и укрепить фиксирующий ремень.

Для торможения кресла-коляски во время движения необходимо равномерно и постепенно нажать на оба тормозных рычага до полной остановки.

6. Правила хранения и использования

Хранить товар в закрытых транспортных коробках при комнатной температуре и влажности до 70 %. Защищать от непрямого и прямого воздействия солнечного или искусственного света.

По мере необходимости необходимо смазывать несколькими каплями машинного масла втулки крестовины, подвижные части фиксаторов, втулки тормозных рукояток

Обивка моется тёплой водой. При сильном загрязнении используется мягкое моющее средство. Пятна удаляются мягкой губкой или мягкой щёткой. Металлические части протираются сухой чистой тряпкой.