

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Компания "Интермедсервис"»



Голубев В.А.

05 октября 2007 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цистоскоп

Содержание

Назначение / использование
Медицинская область применения
Меры предосторожности
Предупреждение
Использование руководства
Соответствие Директиве о медицинских изделиях
Упаковка / комплектация
Терминология
Идентификация / цветная маркировка
Технические характеристики
Вспомогательные приспособления
Начало работы
Использование
Подготовка
Подсоединение
Осмотр
Предупреждение
После использования
Обеззараживание / очистка
Техническое обслуживание
Стерилизация
Ремонт
Хранение / утилизация
Гарантия

Цистоскоп предназначен для эндоскопической диагностики и Назначение
ведения осмотра в урологии.

Данные изделия предназначены только для медицинского Медицинская
использования персоналом, специально обученным для этих целей область
в медицинских учреждениях. применения

Внимание!



Внимание:

Этот знак указывает на правила использования прибора.

Предупреждение



Предупреждение!

Этот символ указывает на меры предосторожности во избежание неправильного применения. Несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным травмам пациента и/или повреждению эндоскопа.

Предупреждающие символы

Внимательно прочтите настоящее руководство перед использованием медицинских инструментов. Оно содержит важную информацию как для не имеющего опыта, так и для опытного персонала. Использование руководства

Данное изделие соответствует Директиве о медицинских изделиях 93/42/ EWG (Класс II а). Изделия относятся к Классу II а или выше, так как являются стерильными и имеют маркировку с регистрационным номером от соответствующего уполномоченного органа, контролирующего качество медицинских приборов. Соответствие директиве о медицинских изделиях

Оптическая система произведена по стандартам DIN 14971, DIN 8600-2, DIN 8600-3.

CE 0483

Упаковочный материал изготовлен из картона.

Упаковка /
Комплектация

В комплект входят следующие части прибора:

- 1 жесткая трубка
- 1 совместимый адаптер световодного кабеля Wolf Код № 1014000002
- 1 совместимый адаптер световодного кабеля Storz/Olympus Код № 1014000006
- 1 дистальный колпачок дистального конца Код № 000700026
- 1 колпачок для окуляра
- 1 трубка для ствола
- 1 руководство


В случае отсутствия любой из перечисленных деталей, немедленно обратитесь к производителю.

Внимание! Жесткая трубка нестерильна.



Окуляр
Разъем для световодного кабеля
Фиксатор
Ствол
Основание ствола


Терминология

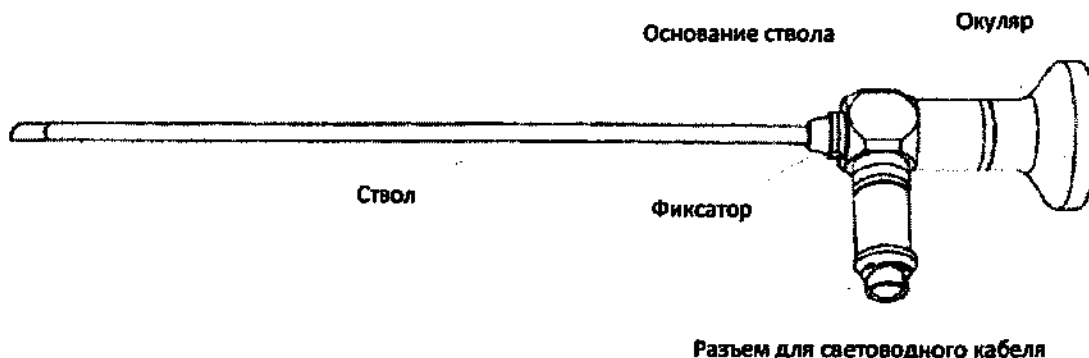

Продукт совместим с обычными вспомогательными приспособлениями (например, троакар, штифт, световодный кабель) **Приспособления**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по эксплуатации вспомогательных приспособлений.

Благодаря навинчиваемым адаптерам световодного кабеля и их заменяемости эндоскоп совместим с кабелями различных производителей.

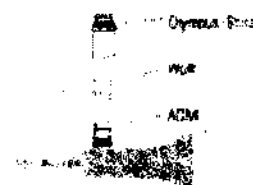

Цветное колесико окрашено в цвета-коды направления обзора:

**Идентификация
/ цветная
маркировка**

Зеленый 0°
Красный 25° | 30°
Желтый 70°
Черный 12° | 45°

Направление обзора также указано на приборе.

Номер модели (номер изделия) включает в себе спецификацию **Технические
характеристики**
эндоскопа.

Например:

	Номер модели	/ Серийный номер
Цистоскоп	HRC - 4.00-303-30-70	SN: 12345

Где HRA: Цистоскоп с высоким разрешением

4,0	внешний диаметр в мм
170	рабочая длина в мм
25	направление обзора в градусах (°)
95	угол обзора (°)
SN	серийный номер