



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Компания

«Интермедсервис»»



В.А. Лубев

«05» октября 2007 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нефроскоп

Содержание

Назначение / использование
Медицинская область применения
Меры предосторожности
Предупреждение
Использование руководства
Соответствие Директиве о медицинских изделиях
Упаковка / комплектация
Терминология
Идентификация / цветная маркировка
Технические характеристики
Вспомогательные приспособления
Начало работы
Использование
Подготовка
Подсоединение
Осмотр
Предупреждение
После использования
Обеззараживание / очистка
Техническое обслуживание
Стерилизация
Ремонт
Хранение / утилизация
Гарантия

Нефроскоп предназначен для эндоскопической диагностики и ведения осмотра внутренних органов пациента. Нефроскопия выполняется с использованием стандартных хирургических доступов. Не использовать в других целях.

Назначение

Данные изделия предназначены только для медицинского использования персоналом, специально обученным для этих целей в медицинских учреждениях.

Медицинская область применения

Внимание! Предупреждение



Внимание:
Этот знак указывает на правила использования прибора.



Предупреждение!
Этот символ указывает на меры предосторожности во избежание неправильного применения. Несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным травмам пациента и/или повреждению эндоскопа.

Предупреждающие символы

Внимательно прочтите настоящее руководство перед использованием медицинских инструментов. Оно содержит важную информацию как для не имеющего опыта, так и для опытного персонала.

Использование руководства

Данное изделие соответствует Директиве о медицинских изделиях 93/42/ EWG (Класс II a). Изделия относятся к Классу II a или выше, так как являются стерильными и имеют маркировку с регистрационным номером от соответствующего уполномоченного органа, контролирующего качество медицинских приборов.

Оптическая система произведена по стандартам DIN 14971, DIN 8600-2, DIN 8600-3.

Соответствие директиве о медицинских изделиях

CE 0483

Упаковочный материал изготовлен из картона.

**Упаковка /
Комплектаци
я**

В комплект входят следующие части прибора:

1 жесткая трубка

1 совместимый адаптер световодного кабеля Wolf Код №
1014000002

1 совместимый адаптер световодного кабеля
Storz/Olympus Код №
1014000006

1 дистальный колпачок дистального конца Код №
000700026

1 колпачок для окуляра

1 трубка для ствола

1 руководство

В случае отсутствия любой из перечисленных деталей,
немедленно обратитесь к производителю.

Внимание! Жесткая трубка нестерильна.



Окуляр


Разъем для световодного кабеля

Фиксатор

Ствол

Основание ствола

Терминология

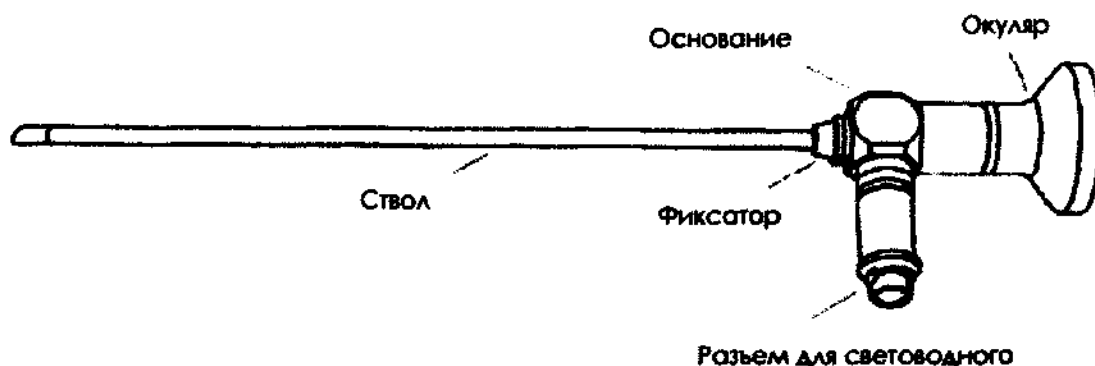

Продукт совместим с обычными вспомогательными приспособлениями (например, троакар, штифт, световодный кабель) **Приспособления**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по эксплуатации вспомогательных приспособлений.

Благодаря навинчиваемым адаптерам световодного кабеля и их заменяемости эндоскоп совместим с кабелями различных производителей.

