



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО ЦНТ "Грани"

 Кольчугина Т.Н.

« 14 » марта 2011 г.


М.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


**«Линзы интраокулярные акриловые
Basis, Special, AddOn, с принадлежностями»**

производства


1stQ GmbH, Германия

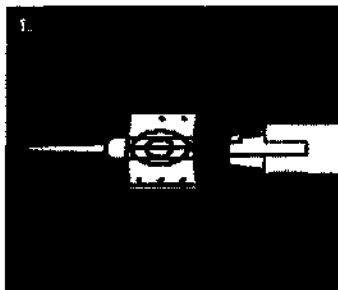


- Заполните вязкоэластичным раствором конец картриджа и направляющие пазы, расположенные по центру картриджа.
- Поместите ИОЛ с помощью пинцета в середину картриджа (см. рисунок).
- Осторожно придавите пинцетом оптическую и галтическую части ИОЛ вдоль направляющих пазов и защелкните картридж.
- Заполните пространство в картридже за линзой вязкоэластичным раствором.

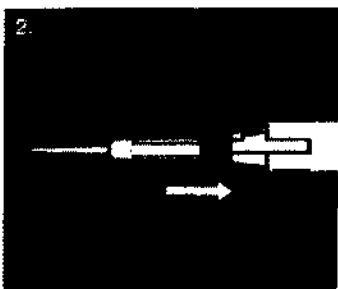

- Установите картридж в инжектор.

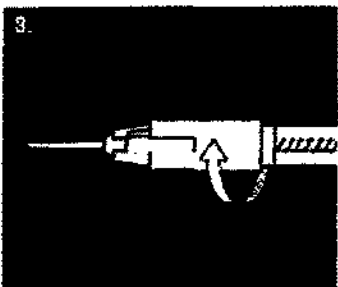

- Зафиксируйте картридж в инжекторе, повернув его по часовой стрелке.

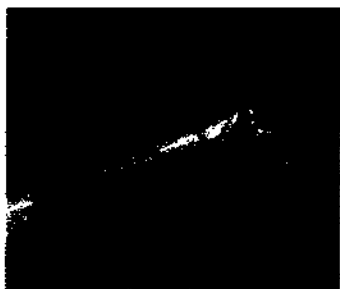


- Аккуратно выдавите ИОЛ поршнем инжектора, плавно вращая картридж с инжектором по часовой стрелке


**«Линзы витраокулярные акриловые
Basis, Special, AddOn, с принадлежностями»**

производства


1stQ GmbH, Германия

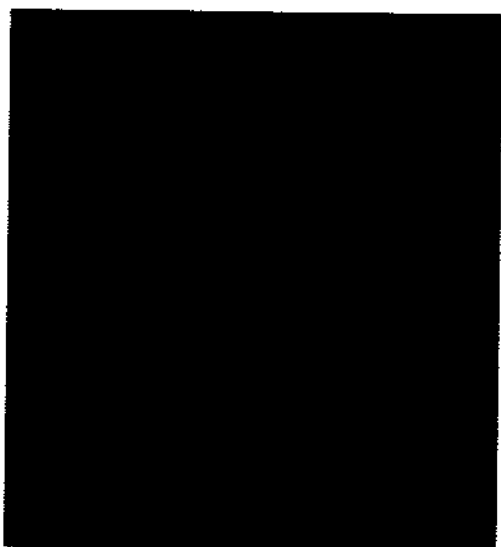

Basis

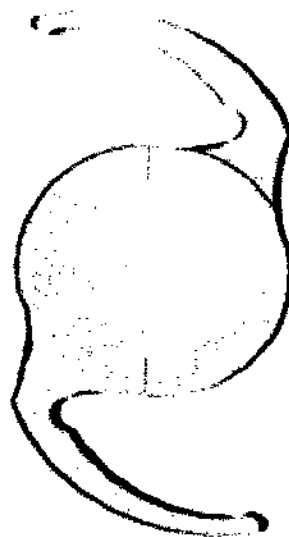

Special

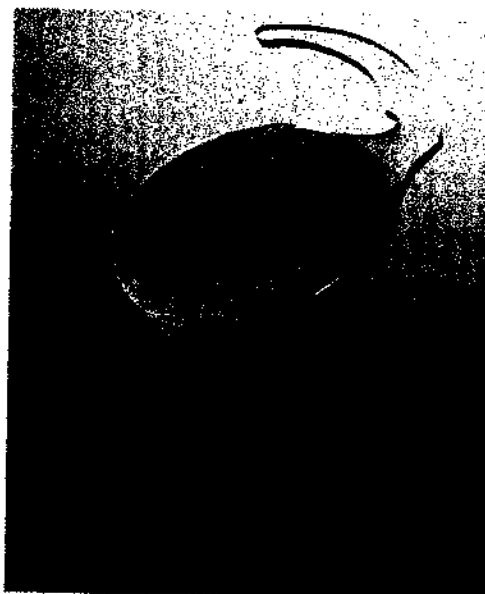

AddOn

**«Линзы интраокулярные акриловые
Basis, Special, AddOn, с принадлежностями»**

производства

1stQ GmbH, Германия

