

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОРТОНИКА»**

ОКПД 2 - 32.50.30.110



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Ортоника»

А.В. Терехов

17 » февраля 2020 г.

**МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ ORTONICA
ПО ТУ 32.50.30-012-66445146-2018 В НАБОРЕ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Редакция 2

Содержание:

Введение	3
1. Наименование, назначение, потенциальные потребители, производитель медицинского изделия	3
2. Показания, противопоказания, побочные эффекты, меры предосторожности	4
3. Основные функциональные и технические характеристики	5
3.1 Тумбочка медицинская Ortonica.....	5
3.2 Стол прикроватный медицинский Ortonica	16
3.3 Стол надкроватный медицинский Ortonica	28
3.4 Кушетка смотровая медицинская Ortonica	29
3.5 Банкетка медицинская Ortonica	33
3.6 Ступенька медицинская Ortonica	36
3.7 Стол палатный медицинский Ortonica.....	37
3.8 Стол манипуляционный медицинский Ortonica.....	39
3.9 Ширма медицинская Ortonica	46
4. Комплектность медицинского изделия	51
5. Наличие в медицинском изделии лекарственных средств, применяемые материалы	51
6. Подготовка к работе и порядок использования	52
6.1 Тумбочка медицинская Ortonica.....	52
6.2 Стол прикроватный медицинский Ortonica	53
6.3 Стол надкроватный медицинский Ortonica	59
6.4 Кушетка смотровая медицинская Ortonica	59
6.5 Банкетка медицинская Ortonica	61
6.6 Ступенька медицинская Ortonica	63
6.7 Стол палатный медицинский Ortonica.....	63
6.8 Стол манипуляционный медицинский Ortonica.....	64
6.9 Ширма медицинская Ortonica	68
7. Возможные неисправности и способы их устранения.....	70
8. Способы и методы дезинфекции медицинского изделия	71
9. Техническое обслуживание	71
10. Упаковка медицинского изделия.....	71
11. Информация о маркировке изделия.....	72
12. Условия хранения, эксплуатации и транспортировки.....	74
13. Гарантии изготовителя, срок службы медицинского изделия	74
14. Утилизация медицинского изделия.....	75
15. Применяемые стандарты	75
16. Рекламации.....	76
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Наименование, варианты исполнения и состав медицинского изделия.....	77
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Комплектация медицинского изделия	105
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Перечень применяемых материалов на медицинское изделие ...	134

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации включает в себя сведения, необходимые для изучения конструкции и правил эксплуатации, транспортирования и хранения Мебель медицинская для кабинетов и палат Ortonica по ТУ 32.50.30-012-66445146-2018 в наборе.

Прежде чем приступить к использованию изделия, необходимо изучить и понять содержание настоящего руководства по эксплуатации.

1. Наименование, назначение, потенциальные потребители, производитель медицинского изделия

1.1 Наименование: «Мебель медицинская для кабинетов и палат Ortonica по ТУ 32.50.30-012-66445146-2018 в наборе» (далее – «Мебель»).

Набор Мебели представлен следующими модельными рядами:

- I. Стол прикроватный медицинский Ortonica в вариантах исполнения (далее по тексту «Стол прикроватный медицинский Ortonica»);
- II. Тумбочка медицинская Ortonica в вариантах исполнения (далее по тексту «Тумбочка медицинская Ortonica»);
- III. Стол надкроватный медицинский Ortonica в вариантах исполнения (далее по тексту «Стол надкроватный медицинский Ortonica»);
- IV. Кушетка смотровая медицинская Ortonica в вариантах исполнения (далее по тексту «Кушетка смотровая медицинская Ortonica»);
- V. Банкетка медицинская Ortonica в вариантах исполнения (далее по тексту «Банкетка медицинская Ortonica»);
- VI. Ступенька медицинская Ortonica в вариантах исполнения (далее по тексту «Ступенька медицинская Ortonica»);
- VII. Стол палатный медицинский Ortonica в вариантах исполнения (далее по тексту «Стол палатный медицинский Ortonica»);
- VIII. Стол манипуляционный медицинский Ortonica в вариантах исполнения (далее по тексту «Стол манипуляционный медицинский Ortonica»);
- IX. Ширма медицинская Ortonica в вариантах исполнения (далее по тексту «Ширма медицинская Ortonica»).

Модельные ряды мебели изготавливаются в различных вариантах исполнения, которые имеют единый принцип функционирования и отличаются дизайном, массой, габаритными размерами и максимальной нагрузкой.

Варианты исполнения Мебели представлены в Приложении 1 к Руководству по эксплуатации.

1.2 Назначение: Предназначена для установки в медицинских кабинетах и палатах с целью разделения пространства, создания функционального рабочего места, места для хранения, приема пищи и комфортного пребывания пациентов и персонала в медицинских и профилактических учреждениях.

1.3 Потенциальными потребителями мебели являются медицинский персонал и

пациенты медицинских и профилактических учреждений.

1.4 Производитель:

Предприятие-изготовитель – ООО «Ортоника», юридический адрес: 105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я, д. 9/35, кв. 94.

Адрес места производства медицинского изделия: 394026, Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 11.

2. Показания, противопоказания, побочные действия, меры предосторожности

Показания к применению:

- Тумбочка медицинская Ortonica предназначена для оснащения палат, процедурных, кабинетов и комнат в медицинских учреждениях. Используется для организации рабочего места, хранения личных вещей, документов, инструментов и расходных материалов, размещения медицинского инвентаря и аппаратуры.
- Стол прикроватный медицинский Ortonica предназначен для ухода за инвалидами и лежащими больными.
- Стол надкроватный медицинский Ortonica предназначен для облегчения ухода за инвалидами и лежащими больными при их кормлении и приеме лекарств.
- Кушетка смотровая медицинская Ortonica предназначена для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах.
- Банкетка медицинская Ortonica широко используется во всех медицинских и профилактических учреждениях. Она необходима в разных ситуациях: при осмотрах, перевязке и других различных процедурах, при ожидании своей очереди.
- Ступенька медицинская Ortonica предназначена для использования в операционных залах и процедурных кабинетах медицинских учреждений при проведении лечебных процедур.
- Стол палатный медицинский Ortonica - предмет медицинской мебели, предназначен для обустройства комнат пациентов в больницах, стационарах, клиниках и других медучреждениях. Способствует рациональному использованию площади и созданию комфортных условий для питания, чтения.
- Стол манипуляционный медицинский Ortonica предназначен для выполнения различных медицинских манипуляций, размещения и хранения лекарств, инструментов, аппаратов, изделий медицинского назначения, а также их транспортировки.
- Ширма медицинская Ortonica - предмет медицинской мебели, который позволяет оптимально разделять пространства кабинетов на функциональные зоны, обеспечивая комфортную работу врача и удобство пациента.

Противопоказания к применению - отсутствуют.

Побочные действия - отсутствуют.

Меры предосторожности

- 1) Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.

2) Не прибегайте к самостоятельному изменению или доработке конструкции изделия. Изменение конструкции изделия может привести к нарушению его функционала, поломке изделия, а также к причинению травм во время его использования.

3) Не превышайте лимит по максимальной нагрузке на изделие.

4) Не допускайте контакта изделия с нагревательными приборами.

5) К сборке изделия допускаются лица, внимательно изучившие конструкцию изделия и правила эксплуатации.

6) При санитарной обработке изделий нельзя применять агрессивные чистящие средства, например: бытовые растворители (ацетон, бензин, уайт-спирит и т.п.), а также твёрдые щётки и абразивные материалы.

7) Не допускается использование изделий не по прямому назначению.

3. Основные функциональные и технические характеристики

Мебель соответствует требованиям ТУ 32.50.30-012-66445146-2018, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371, ГОСТ 19917, ГОСТ Р ИСО 15223-1 и комплекта конструкторской документации на конкретную модель.

В зависимости от потенциального риска применения Мебель относится к классу 1 (п. 4.1 Приложения №2 к Приказу МЗ РФ от 6 июня 2012 г. № 4н и ГОСТ 31508).

По воспринимаемым механическим воздействиям Мебель относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444, по последствиям отказа - к классу Г по ГОСТ Р 50444.

3.1 Тумбочка медицинская Ortonica предназначена для оснащения палат, процедурных, кабинетов и комнат в медицинских учреждениях. Используется для организации рабочего места, хранения личных вещей, документов, инструментов и расходных материалов, размещения медицинского инвентаря и аппаратуры.

Тумбочка медицинская Ortonica устанавливается:

- на цоколь (модели TM100, TM110, TM120, TM130, TM140, TM150, TM160, TM170, TM180);
- на ножки (модели TM200, TM210, TM220, TM230, TM240, TM250, TM260, TM270);
- на колеса (модели TM301, TM302, TM303, TM304, TM305, TM306, TM307, TM308, TM309, TM310, TM311, TM312, TM313, TM314, TM315, TM316, TM317, TM318, TM319, TM320, TM321, TM322, TM323, TM324, TM325, TM326, TM327, TM328, TM329, TM330, TM331, TM332, TM333, TM334, TM335, TM336, TM337, TM338, TM339, TM340, TM341).

Корпус Тумбочки медицинской Ortonica изготовлен из следующих материалов:

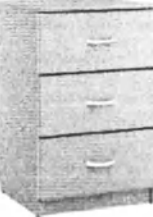
- ЛДСП, ЛДВП (модели TM100, TM110, TM120, TM130, TM140, TM150, TM160, TM170, TM180, TM200, TM210, TM220, TM230, TM240, TM250, TM260, TM301, TM302, TM303, TM304, TM305, TM306, TM307, TM308, TM339, TM340, TM341);
- сталь (TM309, TM310, TM311, TM312, TM313, TM314, TM315, TM316, TM317, TM318);
- сталь, ЛДСП (модели TM270, TM320, TM321, TM322, TM323, TM324, TM325, TM326, TM327, TM328, TM331, TM332, TM336, TM337, TM338);
- алюминиевый сплав, ЛДСП (модели TM319, TM329, TM330);
- сталь, ЛДСП, полипропилен (модели TM333, TM334, TM335).

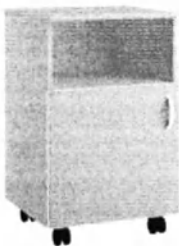
Дверца Тумбочки медицинской Ortonica (модели TM310, TM312, TM318) оснащена замком.

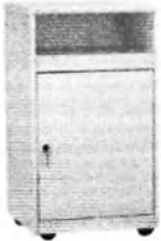
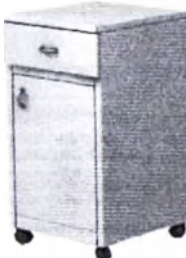
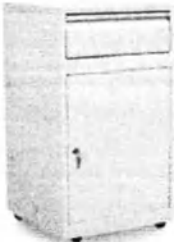
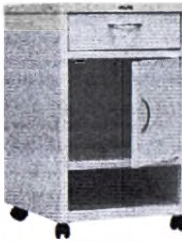
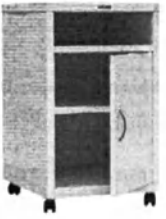
Дверца Тумбочки медицинской Ortonica (модели TM309, TM311, TM313-TM315, TM317) имеют магнитные защелки, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

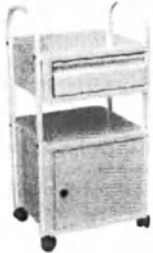
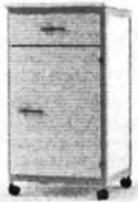
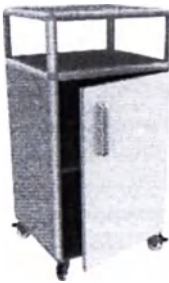
В таблице 1 представлены изображения вариантов исполнения (моделей) Тумбочки медицинской Ortonica.

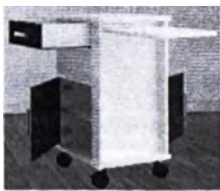
Таблица 1

Модель	Изображение	Модель	Изображение
TM100		TM110	
TM120		TM130	
TM140		TM150	
TM160		TM170	
TM180		TM200	

TM210		TM220	
TM230		TM240	
TM250		TM260	
TM270		TM301	
TM302		TM303	
TM304		TM305	

TM306		TM307	
TM308		TM309	
TM310		TM311	
TM312		TM313	
TM314		TM315	
TM316		TM317	

TM318		TM319	
TM320		TM321	
TM322		TM323	
TM324		TM325	
TM326		TM327	
TM328		TM329	

TM330		TM331	
TM332		TM333	
TM334		TM335	
TM336		TM337	
TM338		TM339	
TM340		TM341	

Технические характеристики Тумбочки медицинской Ortonica соответствуют указанным в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристики	Варианты исполнения тумбочки медицинской Ortonica								
	TM100	TM110	TM120	TM130	TM140	TM150	TM160	TM170	TM180
Ширина, ±10 мм	455	400	400	455	455	455	455	455	455
Глубина, ±10 мм	455	400	400	455	455	455	455	455	455
Высота, ±10 мм	725	550	580	725	725	725	725	725	725
Количество дверей	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Количество полок	1	-	-	1	1	1	-	-	-
Количество ящиков	-	1	-	-	1	1	2	3	4
Ниша	-	-	1	1	-	-	1	-	-
Масса, не более, кг	19	20	20	20	21	21	23	24	27
Максимальная нагрузка на тумбочку, кг	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Максимальная нагрузка на полку, кг	15	-	-	15	15	15	-	-	-
Максимальная нагрузка на ящик, кг	-	10	-	-	10	10	10	10	10
Усилие выдвигания ящиков, не более, даН	-	5	-	-	5	5	5	5	5
Усилие для открывания двери, не более, Н	15	15	15	15	15	15	-	-	-

Продолжение таблицы 2

Характеристики	Варианты исполнения тумбочки медицинской Ortonica							
	TM200	TM210	TM220	TM230	TM240	TM250	TM260	TM270
Ширина, ±10 мм	400	400	400	400	400	400	400	445
Глубина, ±10 мм	360	380	380	380	380	380	450	350
Высота, ±10 мм	600	760	760	760	760	760	650	805
Количество дверей	1	1	1	1	1	-	-	1
Количество полок	1	-	1	-	1	-	-	2
Количество ящиков	-	-	-	1	1	3	4	-
Ниша	-	1	1	-	-	-	-	1
Масса, не более, кг	20	21	21	22	22	25	27	30
Максимальная нагрузка на тумбочку, кг	30	30	30	30	30	30	30	30
Максимальная нагрузка на полку, кг	15	-	15	-	15	-	-	15
Максимальная нагрузка на ящик, кг	-	-	-	10	10	10	10	-
Усилие выдвигания ящиков, не более, даН	-	-	-	5	5	5	5	-
Усилие для открывания двери, не более, Н	15	15	15	15	15	-	-	15

Продолжение таблицы 2

Характеристики	варианты исполнения тумбочки медицинской Ortonica								
	ТМ301	ТМ302	ТМ303	ТМ304	ТМ305	ТМ306	ТМ307	ТМ308	ТМ309
Ширина, ± 10 мм	455	450	455	450	455	420	455	455	400
Глубина, ± 10 мм	455	430	455	430	455	420	455	455	465
Высота, ± 10 мм	725	660	725	660	725	800	725	725	850
Количество дверей	1	1	1	1	1	1	-	-	1
Количество полок	1	-	1	-	1	-	-	-	1
Количество ящиков	-	-	-	1	1	1	3	4	-
Ниша	-	1	1	-	-	1	-	-	1
Масса, не более, кг	19	15	20	16	22	25	24	27	17
Максимальная нагрузка на тумбочку, кг	30	30	30	30	30	30	30	30	45
Максимальная нагрузка на полку, кг	15	-	15	-	15	-	-	-	15
Максимальная нагрузка на ящик, кг	-	-	-	10	10	10	10	10	-
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Усилие выдвигания ящиков, не более, даН	-	-	-	5	5	5	5	5	-
Усилие для открывания двери, не более, Н	15	15	15	15	15	15	-	-	15

Продолжение таблицы 2

Характеристики	варианты исполнения тумбочки медицинской Ortonica								
	ТМ310	ТМ311	ТМ312	ТМ313	ТМ314	ТМ315	ТМ316	ТМ317	ТМ318
Ширина, ± 10 мм	460	400	460	420	420	420	420	450	450
Глубина, ± 10 мм	460	460	460	490	490	490	490	465	400
Высота, ± 10 мм	820	850	820	700	700	700	700	860	850
Количество дверей	1	1	1	1	1	1	-	1	1
Количество полок	1	1	1	-	1	1	-	-	-
Количество ящиков	-	1	1	1	1	-	3	1	1
Ниша	1	-	-	1	-	1	-	1	1
Масса, не более, кг	16	20	16	15	15	15	22	19	20
Максимальная нагрузка на тумбочку, кг	45	45	45	45	45	45	45	45	25
Максимальная нагрузка на полку, кг	15	15	15	-	15	15	-	-	-
Максимальная нагрузка на ящик, кг	-	7	7	7	7	-	7	7	7
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Усилие для перемещения в	30	30	30	30	30	30	30	30	30

движении, не более, Н									
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Усилие выдвигания ящиков, не более, даН	-	5	5	5	5	-	5	5	5
Усилие для открывания двери, не более, Н	15	15	15	15	15	15	-	15	15

Продолжение таблицы 2

Характеристики	Варианты исполнения тумбочки медицинской Ortonica								
	ТМ319	ТМ320	ТМ321	ТМ322	ТМ323	ТМ324	ТМ325	ТМ326	ТМ327
Ширина, ±10 мм	480	370	440	460	390	410	470	470	480
Глубина, ±10 мм	515	370	440	415	390	410	380	380	565
Высота, ±10 мм	840	800	810	730	730	860	860	860	880
Количество дверей	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Количество полок	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Количество ящиков	1	1	2	1	-	-	1	3	2
Ниша	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Масса, не более, кг	14	19	20	20	18	21	22	23	24
Максимальная нагрузка на тумбочку, кг	25	25	25	35	30	30	30	30	45
Максимальная нагрузка на полку, кг	10	10	10	10	10	10	10	-	-
Максимальная нагрузка на ящик, кг	10	7	7	8	-	-	10	10	7,5
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Усилие выдвигания ящиков, не более, даН	5	5	5	5	-	-	5	5	5
Усилие для открывания двери, не более, Н	15	15	15	15	15	15	15	-	-

Продолжение таблицы 2

Характеристики	Варианты исполнения тумбочки медицинской Ortonica								
	ТМ328	ТМ329	ТМ330	ТМ331	ТМ332	ТМ333	ТМ334	ТМ335	ТМ336
Ширина, ±10 мм	440	450	450	580	540	580	580	580	500
Глубина, ±10 мм	460	400	400	450	450	500	500	500	412
Высота, ±10 мм	745	900	900	800-1100 (плавная регулировка)	770-1100 (плавная регулировка)	785-1110 (плавная регулировка)	785-1110 (плавная регулировка)	785-1110 (плавная регулировка)	800-1120 (плавная регулировка)

Количество дверей	-	1	1	1	-	1	1	-	1
Количество полок	-	1	1	1	-	-	-	-	1
Количество ящиков	2	-	1	1	3	-	1	2	1
Ниша	1	1	1	-	-	1	-	-	-
Столик	-	-	1	1	1	1	1	1	1
Масса, не более, кг	28	23	24	25	28	32	33	37	40
Максимальная нагрузка на тумбочку, кг	45	45	45	35	35	30	30	30	35
Максимальная нагрузка на полку, кг	-	10	10	6	-	-	-	-	10
Максимальная нагрузка на ящик, кг	7	-	8	6	6	-	5	5	8
Максимальная нагрузка на столик, кг	-	-	5	10	10	8	8	8	5
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Усилие выдвижения ящиков, не более, даН	5	-	5	5	5	-	5	5	5
Усилие для открывания двери, не более, Н	-	15	15	15	-	15	15	-	15

Окончание таблицы 2

Характеристики	Варианты исполнения тумбочки медицинской Ortonica				
	TM337	TM338	TM339	TM340	TM341
Ширина, ±10 мм	565 (*1100 с разложенным столиком)	500 (*950 с разложенным столиком)	550 (*935 с разложенным столиком)	504 (*905 с разложенным столиком)	550 (*955 с разложенным столиком)
Глубина, ±10 мм	540	450 (*750 с разложенным столиком)	435	405	455
Высота, ±10 мм	950-1150 (плавная регулировка)	855-1090 (плавная регулировка)	820	805	880
Количество дверей	-	-	1	2	1
Количество полок	-	-	-	1	1
Количество ящиков	2	2	1	1	1
Ниша	1	1	1	1	1
Столик	1	1	1	1	1
Масса, не более, кг	40	35	40	30	32
Максимальная нагрузка на тумбочку, кг	45	40	30	30	30
Максимальная	-	-	-	10	10

нагрузка на полку, кг					
Максимальная нагрузка на ящик, кг	7,5	6	10	10	10
Максимальная нагрузка на столик, кг	4,5	4,5	7	7	7
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50	50
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	30	30	30	30	30
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40	40
Усилие выдвижения ящиков, не более, даН	5	5	5	5	5
Усилие для открывания двери, не более, Н	-	-	15	15	15

Таблица 3 Технические характеристики составных частей (фурнитура, элементы крепежа)
Тумбочки медицинской Ortonica

Модель	Элемент	Характеристики							
		Длина, мм (±5%)	Ширина, мм (±5%)	Высота, мм (±5%)	Диаметр, мм (±5%)	Диаметр головки винта/самореза, мм (±5%)	Шаг резьбы, мм (±5%)	Ширина стержня ключа, мм (±5%)	Масса, не более, кг
TM100, TM110, TM120, TM130, TM140, TM150, TM160, TM170, TM180, TM200, TM210, TM220, TM230, TM240, TM250, TM260, TM270, TM301, TM302, TM303, TM304, TM305, TM306, TM307, TM308, TM309, TM311, TM313, TM314, TM315, TM316, TM317, TM319, TM322, TM323, TM324, TM325, TM326, TM327, TM328, TM329, TM330, TM331, TM332, TM333, TM334, TM335, TM336, TM337, TM338, TM339, TM340, TM341	Ручка	110	8	25	-	-	-	-	0,04
TM320, TM321	Ручка	110	8	25	-	-	-	-	0,04
		-	-	30	30	-	-	-	0,02
TM100, TM110, TM120, TM130, TM140, TM150, TM160, TM170, TM180, TM200, TM210, TM220, TM230, TM240, TM250, TM260, TM270, TM301, TM302, TM303, TM304, TM305, TM306, TM307, TM308, TM319, TM324, TM325, TM326, TM327,	Винт	22	-	-	4	7	1	-	0,0024

TM328, TM329, TM330, TM331, TM332, TM333, TM334, TM335, TM337, TM338, TM339, TM340, TM341									
TM309, TM311, TM313, TM314, TM315, TM316, TM317, TM320, TM321, TM322, TM323, TM336	Винт	5	-	-	4	7	1	-	0,0011
TM200, TM210, TM220, TM230, TM240, TM250, TM260, TM301, TM302, TM303, TM304, TM305, TM306, TM307, TM308, TM339, TM340, TM341	Само рез	16	-	-	3,5	8	1,7	-	0,001
TM310, TM312, TM318	Ключ	43,6	19	1,7	-	-	-	7,2	0.01
TM200, TM210, TM220, TM230, TM240, TM250, TM260	Опора	-	-	100	55	-	-	-	0,1
TM301, TM302, TM303, TM304, TM305, TM306, TM307, TM308, TM339, TM340, TM341	Колес о со стопо ром	-	45	65	50	-	-	-	0,071
TM301, TM302, TM303, TM304, TM305, TM306, TM307, TM308, TM339, TM340, TM341	Колес о без стопо ра	-	45	65	50	-	-	-	0,072
TM309, TM310, TM311, TM312, TM313, TM314, TM315, TM316, TM317, TM318, TM319, TM320, TM321, TM322, TM323, TM324, TM325, TM326, TM327, TM328, TM329, TM330, TM331, TM332, TM333, TM334, TM335, TM336, TM337, TM338,	Колес о со стопо ром	-	45	75	50	-	-	-	0,063
TM309, TM310, TM311, TM312, TM313, TM314, TM315, TM316, TM317, TM318, TM319, TM320, TM321, TM322, TM323, TM324, TM325, TM326, TM327, TM328, TM329, TM330, TM331, TM332, TM333, TM334, TM335, TM336, TM337, TM338	Колес о без стопо ра	-	45	75	50	-	-	-	0,063

3.2 Стол прикроватный медицинский Ortonica (стол прикроватный) предназначен для ухода за инвалидами и лежачими больными. Нижняя часть стола прикроватного располагается под кроватью, а столешница удобно размещается над кроватью пациента, создавая комфортные условия для чтения, приема пищи и досуга.

Столешница стола прикроватного регулируется по высоте (кроме модели СП1000) и углу наклона (кроме моделей СП500, СП550, СП600, СП650, СП700, СП750, СП800, СП850, СП900, СП950, СП1000).

Модели стола прикроватного СП1050, СП1100, СП1150, СП1200, СП1250, СП1300,

СП1350, СП1400, СП1450 имеют две секции столешницы, одна из секций регулируется по углу наклона, другая фиксированная (кроме модели СП1450 у которой обе секции столешницы регулируются).

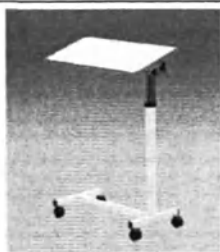
Передвижение стола прикроватного осуществляется за счет колес. На паре колес установлены стояночные тормоза.

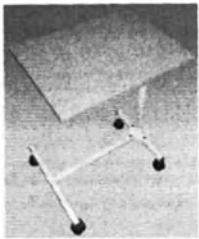
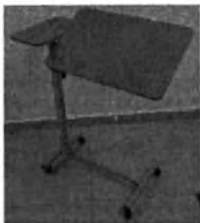
Основные детали стола прикроватного изготовлены из следующих материалов:

- Опорная часть рамы изготовлена из стали;
- Столешница:
 - ЛДСП (модели СП100, СП200, СП250, СП300, СП350, СП400, СП450, СП500, СП600, СП650, СП700, СП750, СП850, СП900, СП1050, СП1100, СП1150, СП1200, СП1250, СП1300, СП1350, СП1400, СП1450);
 - пластик (модели СП150, СП550, СП800, СП950);
 - сталь (модель СП1000).

В таблице 4 представлены изображения вариантов исполнения (моделей) Стола прикроватного медицинского Ortonica.

Таблица 4

Модель	Изображение	Модель	Изображение
СП100		СП150	
СП200		СП250	
СП300		СП350	
СП400		СП450	

СП500		СП550	
СП600		СП650	
СП700		СП750	
СП800		СП850	
СП900		СП950	
СП1000		СП1050	
СП1100		СП1150	

СП1200		СП1250	
СП1300		СП1350	
СП1400		СП1450	

Технические характеристики Стола прикроватного медицинского Ortonica соответствуют указанным в Таблице 5.

Таблица 5

Характеристики	варианты исполнения стола прикроватного медицинского Ortonica			
	СП100	СП150	СП200	СП250
Длина, ± 10 мм	788	760	764	755
Ширина, ± 10 мм	484	380	390	670
Высота, ± 10 мм	710-1120 (плавная регулировка)	650-1200 (плавная регулировка)	730-1140 (плавная регулировка)	800-1200 (плавная регулировка)
Размер столешницы, ± 10 мм	788×484	700×380	764×383	560×410
Количество секций столешницы	1	1	1	1
Тип секции	поворотная	поворотная	поворотная	поворотная
Количество поворотных секций	1	1	1	1
Угол наклона столешницы, $\pm 1^\circ$	± 70	± 75	± 70	± 60
Количество положений наклона столешницы	плавная регулировка	плавная регулировка	плавная регулировка	плавная регулировка
Количество колес	4	4	4	3
Количество колес с тормозом (стопором)	2	2	2	1
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50
Максимальная нагрузка, кг	10	7	13	13
Масса, кг, не более	9	10	10	10
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	20	20	20	20
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40

Продолжение таблицы 5

Характеристики	варианты исполнения стола прикроватного медицинского Ortonica			
	СП300	СП350	СП400	СП450
Длина, ±10 мм	760	610	760	760
Ширина, ±10 мм	380	410	380	380
Высота, ±10 мм	750-1150 (плавная регулировка)	710-1170 (плавная регулировка)	650-1200 (плавная регулировка)	650-1200 (плавная регулировка)
Размер столешницы, ±10 мм	760×380	610×410	720×320	740×360
Количество секций столешницы	1	1	1	1
Тип секции	поворотная	поворотная	поворотная	поворотная
Количество поворотных секций	1	1	1	1
Угол наклона столешницы, ±1°	±70	±90	±75	±75
Количество положений наклона столешницы	плавная регулировка	плавная регулировка	9 (-75°, -55°, -45°, -35°, 0°, +35°, +45°, +55°, +75°)	9 (-75°, -55°, -45°, -35°, 0°, +35°, +45°, +55°, +75°)
Количество колес	4	4	4	4
Количество колес с тормозом (стопором)	2	2	2	2
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50
Максимальная нагрузка, кг	13	10	7	7
Масса, кг, не более	10	7	10	10
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	20	20	20	20
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40

Продолжение таблицы 5

Характеристики	варианты исполнения стола прикроватного медицинского Ortonica			
	СП500	СП550	СП600	СП650
Длина, ±10 мм	567	770	760	600
Ширина, ±10 мм	500	390	410	420
Высота, ±10 мм	670-1000 (плавная регулировка)	700-1200 (плавная регулировка)	750-1100 (плавная регулировка)	510-880 (плавная регулировка)
Размер столешницы, ±10 мм	550×500	770×390	750×400	540×400
Количество секций столешницы	1	1	1	1
Тип секции	поворотная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Количество поворотных секций	1	-	-	-
Угол наклона столешницы, ±1°	±45	-	-	-
Количество положений наклона столешницы	плавная регулировка	-	-	-
Количество колес	4	4	4	4
Количество колес с тормозом (стопором)	2	2	2	2
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50
Максимальная нагрузка, кг	5	7,5	10	15
Масса, кг, не более	7	10	15	7
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	20	20	20	20
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40

Продолжение таблицы 5

Характеристики	варианты исполнения стола прикроватного медицинского Ortonica			
	СП700	СП750	СП800	СП850
Длина, ± 10 мм	600	850	710	764
Ширина, ± 10 мм	420	400	450	390
Высота, ± 10 мм	510-880 (плавная регулировка)	700-1000 (плавная регулировка)	750-1130 (плавная регулировка)	730-1140 (плавная регулировка)
Размер столешницы, ± 10 мм	540×400	750×400	690×430	764×383
Количество секций столешницы	1	1	1	1
Тип секции	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Количество поворотных секций	-	-	-	-
Угол наклона столешницы, $\pm 1^\circ$	-	-	-	-
Количество положений наклона столешницы	-	-	-	-
Количество колес	2	4	4	4
Количество колес с тормозом (стопором)	-	2	2	2
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50
Максимальная нагрузка, кг	15	12	10	13
Масса, кг, не более	7	15	12	10
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	20	20	20	20
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40

Продолжение таблицы 5

Характеристики	варианты исполнения стола прикроватного медицинского Ortonica		
	СП900	СП950	СП1000
Длина, ± 10 мм	765	700	410
Ширина, ± 10 мм	385	450	420
Высота, ± 10 мм	730-1140 (плавная регулировка)	750-1130 (плавная регулировка)	700
Размер столешницы, ± 10 мм	765×385	700×430	250×380
Количество секций столешницы	1	1	1
Тип секции	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Количество поворотных секций	-	-	-
Угол наклона столешницы, $\pm 1^\circ$	-	-	-
Количество положений наклона столешницы	-	-	-
Количество колес	4	4	4
Количество колес с тормозом (стопором)	2	2	2
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50
Максимальная нагрузка, кг	13	10	15
Масса, кг, не более	10	12	4
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	20	20	20
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40

Продолжение таблицы 5

Характеристики	варианты исполнения стола прикроватного медицинского Ortonica			
	СП1050	СП1100	СП1150	СП1200
Длина, ±10 мм	794	820	920	900
Ширина, ±10 мм	375	550	450	450
Высота, ±10 мм	740-1170 (плавная регулировка)	950-1400 (плавная регулировка)	820-1130 (плавная регулировка)	770-1010 (плавная регулировка)
Размер столешницы, ±10 мм	602×375 192×375	720×550 270×370	680×400 240×400	630×450 270×450
Количество секций столешницы	2	2	2	2
Тип секций	фиксированная, поворотная	фиксированная, поворотная	фиксированная, поворотная	фиксированная, поворотная
Количество поворотных секций	1	1	1	1
Угол наклона столешницы, ±1 °	±45	±90	±80	±60
Количество положений наклона столешницы	5 (-45°, -30°, 0°, +30°, +45°)	9 (-90°, -55°, -45°, -35°, 0°, +35°, +45°, +55°, +90°)	плавная регулировка	5 (-60°, -30°, 0°, +30°, +60°)
Количество колес	4	4	4	4
Количество колес с тормозом (стопором)	2	2	2	2
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50
Максимальная нагрузка, кг	7	15	7	10
Масса, кг, не более	10	10	10	15
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	20	20	20	20
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40

Окончание таблицы 5

Характеристики	варианты исполнения стола прикроватного медицинского Ortonica				
	СП1250	СП1300	СП1350	СП1400	СП1450
Длина, ±10 мм	810	810	900	730	800
Ширина, ±10 мм	420	430	410	410	500
Высота, ±10 мм	770-1100 (плавная регулировка)	650-940 (плавная регулировка)	790-1140 (8 положений, шаг регулировки 50)	700-1180 (плавная регулировка)	650-1000 (плавная регулировка)
Размер столешницы, ±10 мм	600×400 160×400	620×410 190×410	700×350 200×350	595×380 105×380	600×400 200×400
Количество секций столешницы	2	2	2	2	2
Тип секций	фиксированная, поворотная	фиксированная, поворотная	фиксированная, поворотная	фиксированная, поворотная	поворотная, поворотная
Количество поворотных секций	1	1	1	1	2
Количество положений наклона столешницы	плавная регулировка	плавная регулировка	плавная регулировка	плавная регулировка	9 (-90°, -55°, -45°, -35°, 0°, +35°, +45°, +55°, +90°)

Угол наклона столешницы, $\pm 1^\circ$	± 70	± 90	± 70	± 70	± 90
Количество колес	4	4	4	4	4
Количество колес с тормозом (стопором)	2	2	2	2	2
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50	50
Максимальная нагрузка, кг	8	10	10	15	20
Масса, кг, не более	10	8	14	9	10
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	20	20	20	20	20
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40	40

Технические характеристики фурнитуры и элементов крепежа Стола прикроватного медицинского Ortonica представлены в Таблице 6.

Таблица 6

Модель	Элемент	Характеристики							
		Ширина, мм ($\pm 5\%$)	Высота, мм ($\pm 5\%$)	Диаметр мм ($\pm 5\%$)	Длина, мм ($\pm 5\%$)	Шаг резьбы, мм ($\pm 5\%$)	Диаметр головки фиксатора/ болта/ самореза, мм ($\pm 5\%$)	Диаметр описанной окружности мм x Размер «под ключ» ($\pm 5\%$)	Масса, не более, кг
СП100, СП200, СП300, СП350, СП400, СП450, СП500	Болт	-	-	10	45	1,5	-	17,6x16	0,04
СП100, СП150, СП200, СП250, СП300, СП350, СП500, СП550, СП600, СП800, СП850, СП900, СП950, СП1050, СП1150, СП1200, СП1250, СП1300, СП1350, СП1400, СП1450	Болт	-	-	10	50	1,5	19	-	0,04
СП100, СП200, СП300, СП350, СП500	Болт	-	-	10	20	1,5	19	-	0,02
СП100, СП200, СП300, СП350, СП500, СП850, СП900, СП1250	Гайка	-	8,4	10	-	1,5	-	17,6x16	0,012
СП650, СП700, СП750, СП1250	Саморез	-	-	3,5	16	1,7	8	-	0,005
СП850, СП900	Крепежная пластина	30	3	-	40	-	-	-	0,04
СП850, СП900	Втулка	-	-	10	50	-	-	-	0,2

Технические характеристики составных частей Стола прикроватного медицинского Ortonica представлены в Таблице 7.

Таблица 7

Модель	Элемент	Характеристики				
		Длина, ± 10 мм	Ширина, ± 10 мм	Высота, мм ($\pm 5\%$)	Диаметр, мм ($\pm 5\%$)	Масса, не более, кг
СП100	Опорная часть рамы	668	390	36	-	2,2
	Неподвижная вертикальная часть рамы	518	106	30	-	1,6
	Подвижная вертикальная часть рамы	583	66	25	-	1,4
	Столешница с кронштейном	788	484	48	-	3
	Ограничитель поворота столешницы	124	75	3	-	0,24
СП150	Телескопическая стойка	510-1060	-	-	25	1,8
	U-образная рама	760	360	25	-	2,2
	Столешница с кронштейном	700	380	48	-	3,7
СП200	Опорная часть рамы	645	390	35	-	2,2
	Неподвижная вертикальная часть рамы	495	105	30	-	1,6
	Подвижная вертикальная часть рамы	570	65	25	-	1,4
	Столешница с кронштейном	764	383	48	-	4,2
	Ограничитель поворота столешницы	125	75	3	-	0,24
СП250	Столешница с кронштейном	560	410	45	-	3,5
	L-образная рама	755-1155	-	-	30	2,2
	T-образная рама	550	670	30	-	1,6
СП300	Опорная часть рамы	640	285	35	-	2,2
	Неподвижная вертикальная часть рамы	550	105	30	-	1,6
	Подвижная вертикальная часть рамы	615	65	25	-	1,4
	Столешница с кронштейном	760	380	45	-	3,5
	Ограничитель поворота столешницы	125	75	3	-	0,24
СП350	Опорная часть	610	410	35	-	2,0

	рамы					
	Неподвижная вертикальная часть рамы	570	145	30	-	1,2
	Подвижная вертикальная часть рамы	635	85	25	-	1,0
	Столешница с кронштейном	610	410	45	-	2,5
	Ограничитель поворота столешницы	125	75	3	-	0,24
СП400	Телескопическая стойка	540-1090	-	-	35	2,8
	U-образная рама	760	380	-	35	3,2
	Столешница с кронштейном	720	320	45	-	3,6
СП450	Телескопическая стойка	510-1060	-	-	35	2,8
	U-образная рама	760	380	-	35	3,4
	Столешница с кронштейном	740	360	45	-	3,2
СП500	Опорная часть рамы	567	500	35	-	1,8
	Неподвижная вертикальная часть рамы	500	105	30	-	1,2
	Подвижная вертикальная часть рамы	550	65	25	-	1,0
	Столешница с кронштейном	550	500	45	-	2,6
	Ограничитель поворота столешницы	125	75	3	-	0,24
СП550	Опорная часть рамы	750	390	35	-	2,5
	Неподвижная вертикальная часть рамы	505	405	30	-	1,7
	Подвижная вертикальная часть рамы	515	65	25	-	1,5
	Столешница с кронштейном	770	390	45	-	3,9
СП600	Телескопическая стойка	615-965	-	-	30	2,8
	Опорная рама с креплением	760	410	80	-	3,2
	Столешница с кронштейном	750	400	45	-	4,6
СП650	Столешница	540	400	16	-	3,2
	Крепление столешницы	50	30	35	-	0,008
	П-образная телескопическая	250	420	30	-	1

	стойка					
	U-образная рама	490-860	500	30	-	1,3
СП700	Столешница	540	400	16	-	2,8
	Крепление столешницы	50	30	35	-	0,008
	П-образная телескопическая стойка	250	420	30	-	1,2
	U-образная рама	490-860	500	30	-	1,6
СП750	U-образная двойная рама	850	380	624-924	-	7,5
	Крепление столешницы	50	30	35	-	0,5
	Столешница	750	400	16	-	4,8
СП800	Телескопическая стойка	645-1025	-	-	30	2,8
	U-образная рама с перемычкой	710	450	30	-	3,2
	Столешница с кронштейном	690	430	45	-	4,2
СП850	Столешница с кронштейном	764	383	45	-	3,6
	Телескопическая стойка	655-1065	-	-	30	2,4
	H-образная рама	764	390	30	-	2,8
	Втулка	50			10	0,2
	Крепежная пластина	40	30	3	-	0,04
СП900	Столешница с кронштейном	765	385	45	-	3,6
	Телескопическая стойка	655-1065	-	-	30	2,4
	H-образная рама	765	385	30	-	3,8
	Втулка	50			10	0,2
	Крепежная пластина	40	30	3	-	0,04
СП950	Телескопическая стойка	670-1050	-	-	30	2,2
	U-образная рама с перемычкой	700	450	30	-	3,8
	Столешница	700	430	16	-	4,6
СП1000	Стол прикроватный	410	420	640	-	3,8
СП1050	H-образная рама	600	375	30	-	2,2
	Телескопическая стойка	600-1030	-	-	30	1,8
	Столешница с механизмом регулировки угла наклона	602	375	75	-	3,8
	Столешница с кронштейном	192	375	45	-	1,4
СП1100	H-образная рама	820	550	35	-	2,4
	Телескопическая	780-1230	-	-	35	1,4

	стойка					
	Столешница с механизмом регулировки угла наклона	720	550	75	-	3,6
	Столешница с кронштейном	270	370	45	-	1,2
СП1150	П-образная рама	600	450	35	-	2,9
	Телескопическая стойка	620-930	-	-	35	1,9
	Столешница с механизмом регулировки угла наклона	680	400	75	-	3,4
	Столешница с кронштейном	240	400	45	-	1,3
СП1200	Н-образная рама	870	450	35	-	3,1
	Телескопическая стойка	650-890	-	-	35	2,2
	Столешница с механизмом регулировки угла наклона	630	450	60	-	3,6
	Столешница с кронштейном	270	450	45	-	1,8
СП1250	Н-образная рама	810	420	35	-	2,4
	Телескопическая стойка	650-980	-	-	35	1,2
	Столешница с механизмом регулировки угла наклона	600	400	75	-	3,2
	Столешница с кронштейном	160	400	45	-	1,2
СП1300	U-образная рама	750	430	35	-	1,8
	Телескопическая Г-образная стойка	550-840	-	-	35	2,1
	Столешница с механизмом регулировки угла наклона	620	410	75	-	3,1
	Столешница с кронштейном	190	410	45	-	1,0
СП1350	Н-образная рама	850	410	30	-	2,4
	Телескопическая стойка	625-975	200	30	-	1,4
	Столешница с механизмом регулировки угла наклона	700	350	75	-	4,3
	Столешница с кронштейном	200	350	45	-	1,4
СП1400	Н-образная рама	730	410	35	-	2,3
	Телескопическая стойка	590-1070	-	-	35	1,6

	Столешница с механизмом регулировки угла наклона	595	380	16	-	3,7
	Столешница с кронштейном	105	380	16	-	1,6
	Корзина	630	380	100	-	0,7
СП1450	П-образная рама	800	500	35	-	2,4
	Телескопическая стойка	540-890	-	-	35	1,4
	Столешница с механизмом регулировки угла наклона	600	400	45	-	3,5
	Столешница с кронштейном	200	400	75	-	1,4
	Фиксатор	100	10	3	-	0,05
Все варианты исполнения (кроме СП700)	Колесо со стопором, Колесо без стопора	-	45	75	50	0,063
Все варианты исполнения (кроме СП 1450, СП1000)	Фиксатор	52	-	-	8	0,052

3.3 Стол надкроватный медицинский Ortonica предназначен для облегчения ухода за инвалидами и лежащими больными при их кормлении и приеме лекарств.

Модель СН100 состоит из стального каркаса и столешницы изготовленной из ЛДСП, выполнен в виде складного металлического каркаса к которому прикреплена столешница. Столешница имеет бортики, по длинной стороне изделия, а также ручку для переноски столика. Конструкция столика позволяет изменять угол наклона столешницы от горизонтального положения до 55°.

Модель СН150 состоит из стального каркаса и столешницы изготовленной из ЛДСП.

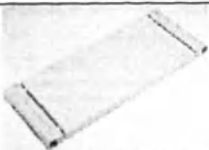
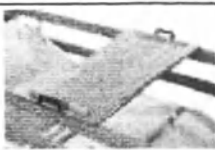
Модель СН200 изготовлена из пластика, оснащена возможностью регулировки ширины с помощью раздвижных кронштейнов, устанавливается на боковые ограждения кровати.

Модели СН250, СН300 изготовлены из ЛДСП, устанавливаются на боковые ограждения кровати.

В таблице 8 представлены изображения вариантов исполнения (моделей) Стола надкроватного медицинского Ortonica.

Таблица 8

Модель	Изображение	Модель	Изображение
СН100		СН150	

CH200		CH250	
CH300			

Технические характеристики Стола надкроватного медицинского Ortonica представлены в таблице 9.

Таблица 9

Характеристики	варианты исполнения стола надкроватного медицинского Ortonica				
	CH100	CH150	CH200	CH250	CH300
Длина, ±10 мм	720	650	890-1090 Плавная регулировка	800	850-1050 Плавная регулировка
Ширина, ±10 мм	410	300	340	300	250
Высота, ±10 мм	370	320	25	90	90
Размер столешницы, ±10 мм	788×484	550×300	800×340	800×300	850×250
Количество секций столешницы	1	1	1	1	1
Тип секций	поворотная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Количество поворотных секций	1	-	-	-	-
Количество положений наклона столешницы	плавная регулировка	-	-	-	-
Угол наклона столешницы, ±1°	0-55	-	-	-	-
Максимальная нагрузка, кг	10	10	15	10	15
Масса, кг, не более	6	6	3	8	11

3.4 Кушетка смотровая медицинская Ortonica предназначена для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах.

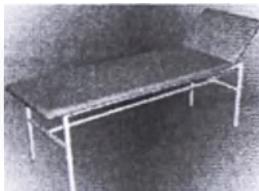
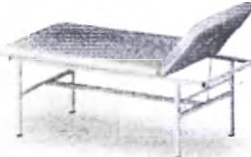
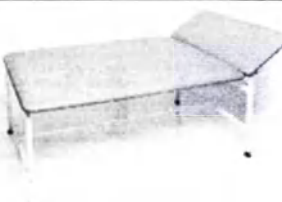
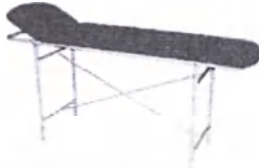
Каркас кушетки изготовлен из стальных труб, подголовник и лежак выполнены из ДСП с поролоновой прослойкой, облицованы кожзаменителем.

Угол подъема подголовника регулируется относительно горизонтальной плоскости.

В таблице 10 представлены изображения вариантов исполнения (моделей) Кушетки смотровой медицинской Ortonica.

Таблица 10

Модель	Изображение	Модель	Изображение
КС400		КС405	

KC410		KC415	
KC420		KC425	
KC430		KC435	
KC440		KC445	
KC450		KC455	

Технические характеристики Кушетки смотровой медицинской Ortonica представлены в таблице 11.

Таблица 11

Характеристики	варианты исполнения кушетки смотровой медицинской Ortonica			
	KC400	KC405	KC410	KC415
Длина, ±10 мм	1980	1960	2000	1950
Ширина, ±10 мм	650	660	650	600
Высота, ±10 мм	530	520	610	560
Количество секций ложа	2	2	2	2
Угол наклона подголовника, ±1°	0-45	0-45	0-45	0-45
Количество положений подголовника	6 (шаг регулировки 9)	3 (шаг регулировки 22,5)	6 (шаг регулировки 9)	6 (шаг регулировки 9)
Максимальная нагрузка, кг	120	120	120	120
Масса, кг, не более	26	20	25	25
Толщина мягкого элемента, ± 3 мм	25	25	25	25

Продолжение таблицы 11

Характеристики	варианты исполнения кушетки смотровой медицинской Ortonica			
	KC420	KC425	KC430	KC435

Длина, ±10 мм	1900	1950	2000	1950
Ширина, ±10 мм	605	640	650	620
Высота, ±10 мм	550	540	520	520
Количество секций ложа	2	2	2	2
Угол наклона подголовника, ±1°	0-35	0-60	0-40	0-45
Количество положений подголовника	4 (шаг регулировки 11,5)	5 (шаг регулировки 15)	6 (шаг регулировки 8)	4 (шаг регулировки 15)
Максимальная нагрузка, кг	120	145	120	160
Масса, кг, не более	19	30	35	25
Толщина мягкого элемента, ± 3 мм	25	25	25	25

Окончание таблицы 11

Характеристики	варианты исполнения кушетки смотровой медицинской Ortonica			
	КС440	КС445	КС450	КС455
Длина, ±10 мм	1930	2000	1970	1980
Ширина, ±10 мм	600	1000	750	610
Высота, ±10 мм	560	550	500	810
Количество секций ложа	2	2	2	2
Угол наклона подголовника, ±1°	0-40	0-45	0-30	0-30
Количество положений подголовника	6 (шаг регулировки 8)	4 (шаг регулировки 15)	2 (шаг регулировки 30)	2 (шаг регулировки 30)
Максимальная нагрузка, кг	130	150	150	180
Масса, кг, не более	23	46	26	24
Толщина мягкого элемента, ± 3 мм	25	25	25	25

Технические характеристики фурнитуры и элементов крепежа Кушетки смотровой медицинской Ortonica представлены в таблице 12.

Таблица 12

Модель	Элемент	Характеристики							
		Ширина, мм (±5%)	Высота, мм (±5%)	Диаметр, мм (±5%)	Длина, мм (±5%)	Шаг резьбы, мм (±5%)	Диаметр головки шурупа/винта, мм (±5%)	Диаметр описанной окружности, мм х Размер «под ключ» (±5%)	Масса, не более, кг
КС400, КС405, КС410, КС415, КС420, КС425, КС430, КС435, КС445, КС450, КС455	Шуруп	-	-	4	16	1,7	8	-	0,005
КС400, КС405, КС410, КС415, КС420, КС425, КС430, КС435, КС440, КС445, КС450, КС455	Механизм регулировки и угла наклона подголовника	30	10	-	215	-	-	-	0,3
КС400, КС435	Болт	-	-	10	40	1,5	-	17,6x16	0,03
КС400, КС405, КС410, КС415, КС420, КС425, КС430, КС435, КС445, КС450	Болт	-	-	8	35	1,25	-	14,2x13	0,02
КС400, КС405, КС410, КС415,	Петля шарнирная	60	10	-	60	-	-	-	0,12

КС420, КС425, КС430, КС435, КС445, КС450									
КС440, КС455	Винт	-	-	6	25	1	10	-	0,008
КС440	Шайба	-	1,6	8,4 (*16 внешний диаметр)	-	-	-	-	0,002
КС440	Гайка	-	6,8	8	-	1,25	-	14,2x13	0,005

Технические характеристики составных частей Кушетки смотровой медицинской Ortonica представлены в таблице 13.

Таблица 13

Модель	Элемент	Характеристики				
		Длина, ±10 мм	Ширина, ±5 мм	Высота, ±5 мм	Диаметр, мм (±5%)	Масса, не более, кг
КС400	Опора	450	-	-	40	1,2
	Рама-основание	1840	600	35	-	6,8
	Ложe кушетки	1460	650	50	-	10,4
	Подголовник	500	650	50	-	2,2
КС405	Рама-основание	1820	610	25	-	4,4
	Рама опорная	1800	25	470	-	4,2
	Связь поперечная	560	-	-	25	0,8
	Ложe кушетки	1290	660	50	-	10,4
	Подголовник	650	660	50	-	2,2
КС410	Рама опорная	1860	25	560	-	6,4
	Связь поперечная	550	25	460	-	1,2
	Ложe кушетки	1480	650	50	-	10,6
	Подголовник	500	650	50	-	2,4
КС415	Рама-основание	1800	550	25	-	4,8
	Рама опорная	1700	25	510	-	3,6
	Ложe кушетки	1430	600	50	-	10,6
	Подголовник	500	600	50	-	2,4
КС420	Стойка (передняя, задняя)	550	25	475	-	1,6
	Рама-основание	1750	550	25	-	4,6
	Ложe кушетки	1380	605	50	-	10,6
	Подголовник	500	605	50	-	2,2
КС425	Стойка (передняя, задняя)	590	25	490	-	1,6
	Рама-основание	1810	590	25	-	4,8
	Связь продольная	1785	-	-	25	1,2
	Ложe кушетки	1430	640	50	-	10,6
	Подголовник	500	640	50	-	2,2
КС430	Стойка (передняя, задняя)	600	25	445	-	2,2
	Рама-основание	1860	600	25	-	4,3
	Связь продольная	1750	-	-	25	1,6
	Ложe кушетки	1480	650	50	-	10,6
	Подголовник	500	650	50	-	2,2
КС435	Стойка (передняя, задняя)	570	25	445	-	2,4
	Связь продольная	1760	-	-	20	1,3
	Ложe кушетки	1480	620	50	-	10,6
	Подголовник	450	620	50	-	2,2
КС440	Ложe кушетки	1410	600	50	-	10,6
	Подголовник	500	600	50	-	2,2
	Стойка (передняя, задняя)	550	30	510	-	2,7
	Перемычка	1500	-	-	30	1,8
	Связь продольная	800	-	-	20	1,2
КС445	Рама-основание	1600	900	25	-	8,7

	Рама подголовника	400	900	25	-	3,8
	Стойка (передняя, задняя)	950	25	500	-	2,6
	Связь продольная	1550	-	-	25	1,8
	Связь поперечная	900	-	-	25	1,2
	Ложе кушетки	1480	1000	50	-	14,4
	Подголовник	500	1000	50	-	3,8
КС450	Рама-основание	1800	700	25	-	3,6
	Рама опорная	700	25	425	-	4,8
	Ложе кушетки	1550	750	50	-	8,5
	Подголовник	400	750	50	-	2,2
	Связь продольная	1400	-	-	25	1,2
КС455	Рама-основание	1840	550	25	-	4,2
	Стойка (передняя, задняя)	550	25	735	-	2,4
	Перемычка	1500	-	-	25	1,3
	Ложе кушетки	1560	610	50	-	10,6
	Подголовник	400	610	50	-	2,2

3.5 Банкетка медицинская Ortonica (банкетка) используется во всех медицинских и профилактических учреждениях. Она необходима при осмотрах, перевязке и других различных процедурах, при ожидании своей очереди.

Существуют разные модели банкетки:

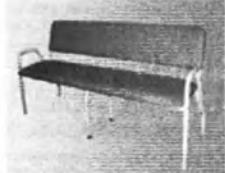
- с поручнями (модели БМ530, БМ535, БМ540, БМ560, БМ565);
- со спинкой (модели БМ530, БМ535, БМ540, БМ545, БМ550, БМ555, БМ560, БМ565);
- простой вариант банкетки типа скамьи (модели БМ500, БМ505, БМ510, БМ515, БМ520, БМ525).

Каркас банкетки выполнен из стали, обивка сиденья и спинки изготовлена из кожзаменителя.

В таблице 14 представлены изображения вариантов исполнения (моделей) Банкетки медицинской Ortonica.

Таблица 14

Модель	Изображение	Модель	Изображение
БМ500		БМ505	
БМ510		БМ515	
БМ520		БМ525	

БМ530		БМ535	
БМ540		БМ545	
БМ550		БМ555	
БМ560		БМ565	

Технические характеристики Банкетки медицинской Ortonica представлены в таблице 15.

Таблица 15

Характеристики	варианты исполнения банкетки медицинской Ortonica						
	БМ500	БМ505	БМ510	БМ515	БМ520	БМ525	БМ530
Ширина, ± 10 мм	900	1400	1540	1500	700	1700	750
Глубина, ± 10 мм	400	385	370	400	500	500	660
Высота, ± 10 мм	400	450	455	440	430	430	850
Высота от пола до сиденья, ± 10 мм	400	450	455	440	430	430	470
Максимальная нагрузка, кг	160	100	120	150	100	140	120
Масса, кг, не более	6	10	15	15	12	16	20
Толщина мягкого элемента, ± 3 мм	25	25	50	25	200	200	25

Продолжение Таблицы 15

Характеристики	варианты исполнения банкетки медицинской Ortonica						
	БМ535	БМ540	БМ545	БМ550	БМ555	БМ560	БМ565
Ширина, ± 10 мм	1065	1570	1540	1500	1500	1550	1900
Глубина, ± 10 мм	555	555	480	450	540	500	660
Высота, ± 10 мм	815	815	810	780	860	850	850
Высота от пола до сиденья, ± 10 мм	465	415	450	430	480	450	470
Максимальная нагрузка, кг	200	260	120	150	270	150	360

Масса, кг, не более	15,5	19,5	32,0	25,0	21,1	30	62
Толщина мягкого элемента, ± 3 мм	25	25	25	25	25	25	25

Технические характеристики элементов крепежа Банкетки медицинской Ortonica представлены в таблице 16.

Таблица 16

Модель	Элемент	Характеристики						
		Высота, мм (±5%)	Диаметр, мм (±5%)	Длина, мм (±5%)	Шаг резьбы, мм (±5%)	Диаметр головки винта/самореза, мм (±5%)	Диаметр описанной окружности, мм x Размер «под ключ» (±5%)	Масса, не более, кг
БМ500, БМ510, БМ535, БМ540, БМ555	Винт	-	5	50	0,8	8,5	-	0,003
БМ500, БМ510	Гайка	4	5	-	0,8	-	8,6x8	0,001
БМ500, БМ530, БМ540, БМ545, БМ550, БМ555, БМ560, БМ565	Саморез	-	4	35	1,75	8	-	0,003
БМ510, БМ555	Шайба	1	5,3 (*9 внешний диаметр)	-	-	-	-	0,001
БМ515, БМ530, БМ545, БМ550, БМ560, БМ565	Болт	-	10	35	1,5	-	17,6x16	0,03
БМ515	Болт	-	8	35	1,25	-	14,2x13	0,02
БМ530, БМ545, БМ550, БМ565	Гайка	8,4	10	-	1,5	-	17,6x17	0,01
БМ530, БМ545, БМ550, БМ565	Шайба	2	10,5 (*20 внешний диаметр)	-	-	-	-	0,004

Технические характеристики составных частей Банкетки медицинской Ortonica представлены в таблице 17.

Таблица 17

Модель	Элемент	Характеристики				
		Длина, ±10 мм	Ширина, ±5 мм	Высота, ±5 мм	Диаметр, мм (±5%)	Масса, не более, кг
БМ500	Рама опорная	350	20	150	-	2,2
	Перемычка	850	20	350	-	0,8
	Сиденье	900	400	50	-	2,8
БМ510	Сиденье	1540	370	75	-	8,1
	Опора	380	-	-	40	6,8
БМ515	Рама опорная	350	30	390	-	3,3
	Связь продольная	1340	-	-	30	1,2
	Сиденье	1500	400	50	-	4,6
БМ530	Рама опорная	660	30	600	-	3,5
	Рама основания	600	450	30	-	2,4

	Рама спинки	600	600	30	-	2,2
	Сиденье	690	500	50	-	2,4
	Спинка	690	400	50	-	2,4
БМ535	Рама опорная	555	30	800	-	2,3
	Связь продольная	1065	-	-	16	1,8
	Сиденье	1000	400	50	-	2,6
	Спинка	1000	450	50	-	2,4
БМ540	Рама опорная	555	30	800	-	2,4
	Связь продольная	1570	-	-	16	1,3
	Сиденье	1505	400	50	-	4,5
	Спинка	1505	450	50	-	4,4
БМ545	Рама опорная	1500	25	430	-	7,6
	Рама основания	1450	-	-	25	7,4
	Сиденье	1540	455	50	-	8,7
	Спинка	1540	350	50	-	8,6
БМ550	Рама опорная	450	25	380	-	3,4
	Связь продольная	1350	25	150	-	1,6
	Рама спинки	1400	250	680	-	2,8
	Сиденье	1500	450	50	-	6,4
	Спинка	1500	300	50	-	6,2
БМ555	Рама опорная	500	30	800	-	3,6
	Связь продольная	1300	-	-	30	1,4
	Сиденье	1500	540	50	-	6,3
	Спинка	1500	500	50	-	6,1
БМ560	Рама опорная	500	25	800	-	4,8
	Связь продольная	1500	-	-	25	1,4
	Сиденье	1500	500	50	-	7,8
	Спинка	1500	400	50	-	7,6
	Подлокотник	150	70	25	-	0,8
БМ565	Рама опорная	660	30	550/420	-	8,3
	Связь продольная	1840	-	-	30	3,5
	Рама спинки	1840	30	650	-	8,8
	Сиденье	1840	600	50	-	10,4
	Спинка	1840	300	50	-	10,2

3.6 Ступенька медицинская Ortonica предназначена для использования в операционных залах и процедурных кабинетах медицинских учреждений при проведении лечебных процедур.

Модели СМ600, СМ630, СМ640 полностью изготовлены из стали.

Модель СМ620 одноплоскостная полностью изготовлена из дерева – массива натурального бука.

Модели СМ610, СМ650 состоят из стального каркаса и плиты (модель СМ650 имеет две плиты). Плиты изготовлены из ДСП.

В таблице 18 представлены изображения вариантов исполнения (моделей) Ступеньки медицинской Ortonica.

Таблица 18

Модель	Изображение	Модель	Изображение
СМ600		СМ610	
СМ620		СМ630	
СМ640		СМ650	

Технические характеристики Ступеньки медицинской Ortonica представлены в таблице 19.

Таблица 19

Характеристики	варианты исполнения ступеньки медицинской Ortonica					
	СМ600	СМ610	СМ620	СМ630	СМ640	СМ650
Длина, ± 10 мм	350	220	400	650	600	440
Ширина, ± 10 мм	600	410	600	600	600	410
Высота, ± 10 мм	220	240	245	440	600	360
Длина ступени, ± 10 мм: 1-ой ступени; 2-ой ступени	- -	- -	- -	325 325	300 300	220 220
Ширина ступени, ± 10 мм: 1-ой ступени; 2-ой ступени	- -	- -	- -	600 600	600 600	410 410
Высота ступени (от пола), ± 10 мм: 1-ой ступени; 2-ой ступени	- -	- -	- -	220 440	300 600	180 360
Максимальная нагрузка, кг	100	130	100	100	130	130
Масса, не более, кг	3	3	2	5	5	5

3.7 Стол палатный медицинский Ortonica (стол палатный) предназначен для обустройства комнат пациентов в больницах, стационарах, клиниках и других медучреждениях. Способствует рациональному использованию площади и созданию комфортных условий для питания, чтения.

Каркас столов палатных изготовлен из стального профиля, столешница из ЛДСП (модели СПМ700, СПМ720, СПМ730, СПМ740, СПМ750, СПМ760) или МДФ (модели СПМ710, СПМ770).

В таблице 20 представлены изображения вариантов исполнения (моделей) Стола палатного медицинского Ortonica.

Таблица 20

Модель	Изображение	Модель	Изображение
СПМ700		СПМ710	
СПМ720		СПМ730	
СПМ740		СПМ750	
СПМ760		СПМ770	

Технические характеристики Стола палатного медицинского Ortonica представлены в таблице 21.

Таблица 21

Характеристики	варианты исполнения стола палатного медицинского Ortonica							
	СПМ700	СПМ710	СПМ720	СПМ730	СПМ740	СПМ750	СПМ760	СПМ770
Ширина, ± 10 мм	900	900	900	850	1000	800	800	850
Глубина, ± 10 мм	700	700	900	750	750	800	800	750
Высота, ± 10 мм	750	750	750	750	750	730	730	750
Максимальная нагрузка, кг	100	100	100	80	80	100	100	80
Масса, не более, кг	21	22	20	20	25	19	21	30

Технические характеристики элементов крепежа Стола палатного медицинского Ortonica представлены в таблице 22.

Таблица 22

Модель	Элемент	Характеристики				
		Высота, мм (±5%)	Диаметр, мм (±5%)	Диаметр описанной окружности, мм х Размер «под ключ» (±5%)	Шаг резьбы, мм (±5%)	Масса, не более, кг
СПМ700, СПМ710, СПМ730, СПМ740, СПМ770	Гайка	8,4	10	17,6х16	1,5	0,04
СПМ700, СПМ710, СПМ730, СПМ740, СПМ770	Шайба	2	10,5 (*20 внешний диаметр)	-	-	0,003

Технические характеристики составных частей Стола палатного медицинского Ortonica представлены в таблице 23.

Таблица 23

Модель	Элемент	Характеристики				
		Длина, ±10 мм	Ширина, ±10 мм	Высота, мм (±5%)	Диаметр, мм (±5%)	Масса, не более, кг
СПМ700	Столешница	900	700	25	-	8,8
	Каркас- основание	700	600	50	-	5,6
	Опора	725	-	-	40	1,4
СПМ710	Столешница	900	700	25	-	8,7
	Каркас- основание	700	600	50	-	5,8
	Опора	725	-	-	40	1,3
СПМ720	Столешница	900	900	25	-	12,6
	Опора	725	-	-	50	1,8
СПМ730	Каркас- столешница	850	750	75	-	11,2
	Опора	725	-	-	40	2,2
СПМ740	Каркас- столешница	1000	750	75	-	13,6
	Опора	725	-	-	40	2,8
СПМ750	Столешница	800	800	25	-	11,2
	Опора	705	-	-	40	1,8
СПМ760	Столешница	800	800	25	-	12,4
	Опора	705	-	-	50	2,1
СПМ770	Столешница	850	750	25	-	17,4
	Каркас- основание	650	600	50	-	4,0
	Опора	725	-	-	40	2,1

3.8 Стол манипуляционный медицинский Ortonica (стол манипуляционный) предназначен для выполнения различных медицинских манипуляций, размещения и хранения лекарств, инструментов, аппаратов, изделий медицинского назначения, а также внутри корпусной транспортировке.

Рама стола изготовлена из стали.

Стол установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом.

Материал используемый для изготовления полок:

- стекло (модели СММ800, СММ830);
- сталь (модели СММ810, СММ820, СММ825, СММ835, СММ850, СММ855, СММ860, СММ865, СММ870 СММ875, СММ880, СММ885, СММ890, СММ895);
- ЛДСП (модель СММ805).

Материал используемый для изготовления ящиков:

- сталь (модели СММ850, СММ855, СММ860, СММ865, СММ870, СММ875, СММ880, СММ885, СММ890, СММ895).

Модель СММ815 оснащена корзиной, которая изготовлена из стали.

Модели СММ840, СММ845 оснащены стальной столешницей.

В таблице 24 представлены изображения вариантов исполнения (моделей) Стола манипуляционного медицинского Ortonica.

Таблица 24

Модель	Изображение	Модель	Изображение
СММ800		СММ805	
СММ810		СММ815	
СММ820		СММ825	
СММ830		СММ835	

CMM840		CMM845	
CMM850		CMM855	
CMM860		CMM865	
CMM870		CMM875	
CMM880		CMM885	
CMM890		CMM895	

Технические характеристики Стола манипуляционного медицинского Ortonica представлены в таблице 25.

Таблица 25

Характеристики	варианты исполнения стола манипуляционного медицинского Ortonica						
	CMM800	CMM805	CMM810	CMM815	CMM820	CMM825	CMM830
Ширина, ± 10 мм	640	640	540	480	480	640	585
Глубина, ± 10 мм	450	450	390	585	585	450	480
Высота, ± 10 мм	880	880	880	850	850	880	850
Количество полок	2	2	2	2	2	3	3
Количество ящиков	-	-	-	-	-	-	-
Количество колес	4	4	4	4	4	4	4
Количество колес с тормозом (стопором)	2	2	2	2	2	2	2
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50	50	50	50
Максимальная нагрузка на полку, кг	5	8	5	-	25	8	7
Максимальная нагрузка на корзину, кг	-	-	-	7	-	-	-
Масса, не более, кг	13	18	10	12	12	11	18
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	20	20	20	20	20	20	20
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40	40	40	40
Толщина стеклянной полки, мм	5	-	-	-	-	-	5

Продолжение таблицы 25

Характеристики	варианты исполнения стола манипуляционного медицинского Ortonica						
	CMM835	CMM840	CMM845	CMM850	CMM855	CMM860	CMM865
Ширина, ± 10 мм	640	550	700	510	645	800	640
Глубина, ± 10 мм	420	350	500	585	425	500	450
Высота, ± 10 мм	860	600-800 Плавная регулиру вка	950-1250 Плавная регулиру вка	850	920	900	880
Количество полок	3	-	-	2	2	2	3
Количество ящиков	-	-	-	1	1	2	1
Количество столешниц	-	1	1	-	-	-	-
Количество колес	4	4	4	4	4	4	4
Количество колес с тормозом (стопором)	2	2	2	2	-	-	2
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50	50	50	50
Максимальная нагрузка на столешницу, кг	-	10	10	-	-	-	-
Максимальная нагрузка на полку, кг	50	-	-	25	50	50	8
Максимальная нагрузка на ящик, кг	-	-	-	7	10	10	5
Масса, не более, кг	20	7	9	18,5	18	25	17
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	20	20	20	20	20	20	20
Значения усилий для включения тормоза	40	40	40	40	40	40	40

(стопора), не более, Н							
Усилие выдвижения ящиков, не более, даН	-	-	-	5	5	5	5

Окончание таблицы 25

Характеристики	варианты исполнения стола манипуляционного медицинского Ortonica					
	CMM870	CMM875	CMM880	CMM885	CMM890	CMM895
Ширина, ± 10 мм	750	640	600	640	640	600
Глубина, ± 10 мм	475	450	470	450	450	470
Высота, ± 10 мм	917	880	940	880	880	940
Количество полок	3	2	3	2	1	1
Количество ящиков	1	2	2	3	4	6
Количество колес	4	4	4	4	4	4
Количество колес с тормозом (стопором)	2	2	2	2	2	2
Диаметр колес, ± 5 мм	50	50	50	50	50	50
Максимальная нагрузка на полку, кг	25	8	10	8	8	10
Максимальная нагрузка на ящик, кг	25	5	15	5	5	15
Масса, не более, кг	19	19,5	27	23,5	26,5	34
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	20	20	20	20	20	20
Значения усилий для включения тормоза (стопора), не более, Н	40	40	40	40	40	40
Усилие выдвижения ящиков, не более, даН	5	5	5	5	5	5

Технические характеристики фурнитуры и элементов крепежа Стола манипуляционного медицинского Ortonica представлены в таблице 26.

Таблица 26

Модель	Элемент	Характеристики								Масса, не более, кг
		Ширина, мм (±5%)	Высота, мм (±5%)	Диаметр, мм (±5%)	Длина, мм (±5%)	Шаг резьбы, мм (±5%)	Диаметр головки винта/фиксатора, мм (±5%)	Диаметр описанной окружности, мм x Размер «под ключ» (±5%)	Ширина стержня ключа, мм (±5%)	
CMM800, CMM805, CMM810, CMM815, CMM820, CMM825, CMM830, CMM835, CMM850, CMM855, CMM860, CMM865, CMM870, CMM875, CMM880, CMM885, CMM890, CMM895	Колесо без стопора	18	75	50	-	-	-	-	-	0,063
CMM800, CMM805, CMM810, CMM815, CMM820, CMM825, CMM830, CMM835, CMM850, CMM865, CMM870, CMM875, CMM880, CMM885, CMM890, CMM895	Колесо со стопором	18	75	50	-	-	-	-	-	0,063

СММ840, СММ845	Колесо без стопора	45	75	50	-	-	-	-	-	0,071
СММ840, СММ845	Колесо со стопором	45	75	50	-	-	-	-	-	0,072
СММ800, СММ805, СММ810, СММ825, СММ835, СММ865, СММ875, СММ885, СММ890	Винт	-	-	7	50	1	10	-	-	0,01
СММ800, СММ805, СММ810, СММ825, СММ835, СММ860, СММ865, СММ875, СММ885, СММ890	Винт	-	-	10	20	1,5	16	-	-	0,02
СММ855	Винт	-	-	6	35	1	10	-	-	0,01
СММ855, СММ860	Шайба	-	0,5	4,3 (*8 внешний диаметр)	-	-	-	-	-	0,001
СММ800, СММ805, СММ810, СММ825, СММ835, СММ855, СММ860, СММ865, СММ875, СММ885, СММ890	Шайба	-	2	10,5 (*20 внешний диаметр)	-	-	-	-	-	0,003
СММ835	Гайка	-	5,2	7	-	1	-	12,12x11	-	0,012
СММ835	Шайба	-	2	7,4 (*22 внешний диаметр)	-	-	-	-	-	0,005
СММ810, СММ840, СММ845	Фиксатор	-	-	10	52	1,5	50	-	-	0,051
СММ840, СММ845, СММ870, СММ880, СММ895	Болт	-	-	10	50	1,5	-	17,6x16	-	0,02
СММ815, СММ820, СММ830, СММ850, СММ855	Болт	-	-	10	20	1,5	-	17,6x16	-	0,02
СММ855	Шайба	-	1,6	6,4 (*12 внешний диаметр)	-	-	-	-	-	0,001
СММ855	Гайка	-	5,2	6	-	1	-	10,9x10	-	0,009
СММ850, СММ855, СММ860, СММ865, СММ875, СММ880, СММ885, СММ890, СММ895	Ручка	8	25	-	110	-	-	-	-	0,035
СММ850, СММ855, СММ860, СММ865,	Винт	-	-	4	5	1	7	-	-	0,001

CMM875, CMM880, CMM885, CMM890, CMM895										
CMM870	Ключ	19	1,7	-	43,6	-	-	-	7,2	0,01

Технические характеристики составных частей Стола манипуляционного медицинского Ortonica представлены в таблице 27.

Таблица 27

Модель	Элемент	Характеристики				
		Длина, ±10 мм	Ширина, мм (±5%)	Высота, мм (±5%)	Диаметр, мм (±5%)	Масса, не более, кг
CMM800	Стойка	450	20	805	-	2,4
	Поперечина	600	-	-	16	0,6
	Полка	620	405	5	-	2,2
CMM805	Стойка	450	20	805	-	3,8
	Поперечина	600	-	-	16	1,2
	Полка	620	405	16	-	2,2
CMM810	Стойка	655	-	-	20	2,8
	Рама	390	20	150	-	1,6
	Поперечина	500	-	-	16	0,8
	Полка (поддон)	450/455	370/375	5/12	-	2,2
CMM815	Стойка	585	20	775	-	2,4
	Поперечина	440	-	-	20	0,8
	Корзина	460	565	90	-	1,6
CMM820	Стойка	585	20	775	-	2,4
	Поперечина	440	-	-	20	0,8
	Полка	440	545	15	-	2,2
CMM825	Стойка	450	20	805	-	2,4
	Поперечина	600	-	-	20	1,1
	Полка (поддон)	600	410	15	-	1,8
CMM830	Стойка	480	20	775	-	2,2
	Поперечина	545	-	-	20	0,9
	Рама	545	440	20	-	1,8
	Полка	540	435	5	-	1,9
CMM835	Стойка	420	20	785	-	1,8
	Стойка	685	-	-	20	2,1
	Полка (поддон)	600	380	15	-	2,4
CMM840	Рама-основание	550	350	500	-	2,3
	Кронштейн	400	-	-	20	1,8
	Столешница	545	350	15	-	2,2
CMM845	Рама-основание	700	500	100	-	3,4
	Телескопическая стойка	730-1030	-	-	40	1,6
	Столешница с кронштейном	700	500	45	-	3,6
CMM850	Стойка	510	20	775	-	2,4
	Поперечина	470	-	-	20	1,4
	Полка (поддон)	450	525	20	-	2,3
	Ящик	450	500	90	-	5,8
CMM855	Корпус с ящиком	525	370	110	-	5,2
	Стойка	425	20	845	-	1,8
	Стойка	745	-	-	20	2,4

	Рама поперечная	605	-	-	20	1,2
	Полка (поддон)	605	385	10	-	2,2
СММ860	Корпус с двумя ящиками	390	480	210	-	8,4
	Рама	500	800	825	-	3,2
	Полка (поддон)	780	480	15	-	2,6
СММ865	Стойка	450	20	805	-	2,4
	Поперечина	600	-	-	16	1,2
	Ящик	570	395	85	-	6,8
	Полка (поддон)	600	410	15	-	1,8
СММ870	Стойка	475	20	750	-	2,5
	Рама поперечная с ручками	750	475	20	-	1,5
	Поперечина	710	-	-	20	0,7
	Ящик	560	380	100	-	4,2
	Кронштейн поворотный	250	70	20	-	0,6
	Тазик почкообразный	150	70	50	-	0,15
	Полка (поддон)	600	400	16	-	1,4
СММ875	Стойка	450	20	805	-	2,6
	Поперечина	600	-	-	16	1,2
	Ящик	570	395	85	-	8,6
	Полка (поддон)	600	410	15	-	1,8
СММ880	Стойка	470	20	865	-	3,2
	Корпус с ящиком	520	450	120	-	5,4
	Полка (поддон)	560	470	15	-	2,1
СММ885	Стойка	450	20	805	-	2,7
	Поперечина	600	-	-	16	0,8
	Ящик	570	395	85	-	3,6
	Полка (поддон)	600	410	15	-	2,2
СММ890	Стойка	450	20	805	-	2,8
	Поперечина	600	-	-	16	0,8
	Ящик	570	395	85	-	3,6
	Полка (поддон)	600	410	15	-	2,2
СММ895	Стойка	470	20	865	-	2,4
	Корпус с ящиком	470	560	120	-	3,8
	Корпус с четырьмя ящиками	470	560	120	-	5,6
	Полка (поддон)	560	470	15	-	2,2

3.9 Ширма медицинская Ortonica (ширма) – это предмет медицинской мебели, который позволяет оптимально разделять пространства кабинетов на функциональные зоны, обеспечивая комфортную работу врача и удобство пациента.

Ширма состоит из рамы и натянутого на него полотна.

Медицинские ширмы, бывают одно-, двух-, трех- и четырехсекционными:

- односекционные ширмы (модели ШМ100, ШМ110, ШМ120, ШМ130, ШМ140, ШМ150)

- двухсекционные ширмы (модели ШМ200, ШМ210, ШМ220, ШМ230);

- трехсекционные ширмы (модели ШМ300, ШМ310, ШМ320);
- четырехсекционные ширмы (модель ШМ400).

Для удобства перемещения ширмы оснащены колесами (модели ШМ130, ШМ140, ШМ150, ШМ220, ШМ230, ШМ320, ШМ400).

Материал используемый для изготовления рамы ширмы:

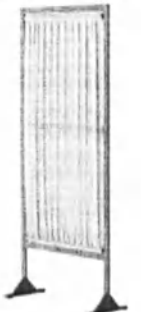
- сталь (модели ШМ100, ШМ130, ШМ140, ШМ150, ШМ210, ШМ220, ШМ310, ШМ320, ШМ400);
- бук (модели ШМ120, ШМ200, ШМ300);
- алюминий (модели ШМ110, ШМ230).

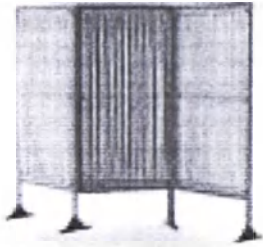
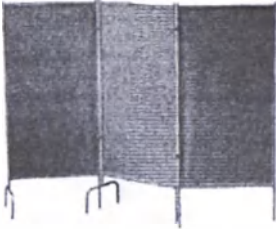
Материал используемый для изготовления экрана ширмы:

- пленка (модели ШМ100, ШМ130, ШМ150, ШМ210, ШМ220, ШМ310);
- ткань (модели ШМ110, ШМ120, ШМ140, ШМ230, ШМ300, ШМ320, ШМ400).

В таблице 28 представлены изображения вариантов исполнения Ширмы медицинской Ortonica.

Таблица 28

Модель	Изображение	Модель	Изображение
ШМ100		ШМ110	
ШМ120		ШМ130	
ШМ140		ШМ150	

ШМ200		ШМ210	
ШМ220		ШМ230	
ШМ300		ШМ310	
ШМ320		ШМ400	

Технические характеристики Ширмы медицинской Ortonica представлены в таблице 29.

Таблица 29

Характеристики	варианты исполнения ширмы медицинской Ortonica					
	ШМ100	ШМ110	ШМ120	ШМ130	ШМ140	ШМ150
Длина, ± 10 мм	800	800	740	665	700	692
Ширина, ± 10 мм	400	350	300	506	390	410
Высота, ± 10 мм	1720	1700	1650	1810	1600	1645
Количество секций	1	1	1	1	1	1
Количество колес	-	-	-	2	2	4
Диаметр колес, ± 5 мм	-	-	-	50	50	50
Масса, кг, не более	4,0	3,5	3,5	3,2	3,6	7,2
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	-	-	-	10	10	10

Продолжение таблицы 29

Характеристики	варианты исполнения ширмы медицинской Ortonica			
	ШМ200	ШМ210	ШМ220	ШМ230
Длина, ± 10 мм	1500	1600	1600	1600
Ширина, ± 10 мм	300	400	400	350

Высота, ± 10 мм	1650	1720	1780	1700
Количество секций	2	2	2	2
Габаритные размеры одной секции, ± 10 мм	750×300×1650	800×400×1720	800×400×1780	800×350×1700
Количество колес	-	-	6	1
Диаметр колес, ± 5 мм	-	-	50	50
Масса, кг, не более	7,0	8,0	8,5	6,0
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	-	-	10	10

Окончание таблицы 29

Характеристики	варианты исполнения ширмы медицинской Ortonica			
	ШМ300	ШМ310	ШМ320	ШМ400
Длина, ± 10 мм	2250	2400	2085	2000
Ширина, ± 10 мм	300	400	410	400
Высота, ± 10 мм	1650	1720	1645	1850
Количество секций	3	3	3	4
Габаритные размеры одной секции, ± 10 мм	750×300×1650	800×400×1720	695×410×1645	500×400×1850
Количество колес	-	-	6	7
Диаметр колес, ± 5 мм	-	-	50	50
Масса, кг, не более	10,5	9,0	19,3	16,5
Усилие для перемещения в движении, не более, Н	-	-	10	10

Технические характеристики фурнитуры и элементов крепежа Ширмы медицинской Ortonica представлены в таблице 30.

Таблица 30

Модель	Элемент	Характеристики							
		Ширина, мм (±5%)	Высота, мм (±5%)	Диаметр, мм (±5%)	Длина, мм (±5%)	Шаг резьбы, мм (±5%)	Диаметр головки винта/самореза, мм (±5%)	Диаметр описанной окружности, мм x Размер «под ключ» (±5%)	Масса, не более, кг
ШМ100, М210, ШМ220, ШМ310	Болт	-	-	6	30	1	-	10,9x10	0,008
ШМ100, М210, ШМ220, ШМ310	Шайба	-	1,6	6,4 (*12 внешний диаметр)	-	-	-	-	0,001
ШМ100, М130, ШМ210, М220, ШМ310	Болт	-	-	4	20	0,7	-	7,9x7	0,003
ШМ100, М130, ШМ140, М210, ШМ220	Гайка	-	3	4	-	0,7	-	7,9x7	0,0008
ШМ100, М130, ШМ140, М210, ШМ220, ШМ310	Шайба	-	0,5	4,3 (*8 внешний диаметр)	-	-	-	-	0,001
ШМ100, М210, ШМ220, ШМ310	Заглушка	-	20	16	-	-	-	-	0,008
ШМ100, М130, ШМ140, М210, ШМ220, ШМ310	Колодка соединительная	20	20	-	40	-	-	-	0,005
ШМ110, ШМ230	Колодка угловая	30	15	-	30	-	-	-	0,01
ШМ130, М140, ШМ150, М220,	Колесо без	45	75	50	-	-	-	-	0,063

ШМ230, М320, ШМ400	стопора								
ШМ140	Винт	-	-	6	30	1	10	-	0,004
ШМ150, ШМ320	Болт	-	-	6	16	1	-	10,9x10	0,004
ШМ200, ШМ230, ШМ300, М320, ШМ400	Петля шарнирн ая	40	10	-	60	-	-	-	0,12
ШМ200, М230, ШМ300, М320, ШМ400	Саморез	-	-	3,5	16	1,7	8	-	0,001

Технические характеристики составных частей Ширмы медицинской Ortonica представлены в таблице 31.

Таблица 31

Модель	Элемент	Характеристики					
		Длина, ±10 мм	Ширина, ±5 мм	Высота, ±5 мм	Диаметр, мм (±5%)	Толщина, мм (±5%)	Масса, не более, кг
ШМ100	Экран	1500	768	-	-	1	1,1
	Поперечина	768	-	-	14	-	0,6
	Стойка одинарная	1720	-	-	16	-	0,8
	Стойка двойная	400	16	1720	-	-	0,8
ШМ110	Экран	1600	770	-	-	1	1,1
	Стойка одинарная	1650	-	-	15	-	0,8
	Опора	350	15	50	-	-	0,6
	Поперечина	770	-	-	15	-	0,6
ШМ120	Рама на опорах	740	300	1650	-	-	2,0
	Экран	1400	700	-	-	1	1,4
ШМ130	Экран	1600	630	-	-	1	1,0
	Поперечина	633	-	-	16	-	0,4
	Стойка одинарная	1810	-	-	16	-	0,8
	Стойка двойная	506	16	1750	-	-	0,8
ШМ140	Рама	700	25	1515	-	-	1,6
	Опора	390	25	25	-	-	0,9
	Экран	1400	650	-	-	1	1,0
ШМ150	Рама	692	20	1565	-	-	3,6
	Опора	410	-	-	20	-	1,0
	Экран	1500	650	-	-	1	1,5
ШМ200	Рама на опорах	740	300	1650	-	-	2,0
	Экран	1400	700	-	-	1	1,4
ШМ210	Экран	1500	768	-	-	1	1,4
	Поперечина	768	-	-	14	-	0,6
	Стойка одинарная	1720	-	-	16	-	0,8
	Стойка двойная	400	16	1720	-	-	0,8
ШМ220	Экран	1500	768	-	-	1	1,0
	Поперечина	768	-	-	14	-	0,8
	Стойка	1720	-	-	16	-	1,0

	одинарная						
	Стойка двойная	400	16	1720	-	-	1,2
ШМ230	Экран	1600	770	-	-	1	0,3
	Стойка одинарная	1650	-	-	15	-	0,7
	Опора	350	15	50	-	-	0,6
	Поперечина	770	-	-	15	-	0,3
	Экран	1540	770	-	-	1	0,2
	Стойка одинарная	1590	-	-	15	-	0,7
ШМ300	Рама на опорах	740	300	1650	-	-	2,0
	Экран	1400	700	-	-	1	1,3
ШМ310	Экран	1500	768	-	-	1	0,8
	Поперечина	768	-	-	14	-	0,5
	Стойка одинарная	1720	-	-	16	-	0,7
	Стойка двойная	400	16	1720	-	-	0,8
ШМ320	Рама	692	20	1565	-	-	3,17
	Экран	410	-	-	20	-	1,77
	Опора	1500	650	-	-	1	1,2
ШМ400	Рама на опорах	500	400	1790	-	-	2,75
	Экран	1400	460	-	-	1	0,8
	Поперечина	460	-	-	20	-	0,4

4. Комплектность медицинского изделия

Комплектность медицинского изделия Мебель медицинская для кабинетов и палат Ortonica по ТУ 32.50.30-012-66445146-2018 в наборе представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 2 данного документа.

5. Наличие в медицинском изделии лекарственных средств, применяемые материалы

Мебель не содержит в себе лекарственных средств и материалов животного или человеческого происхождения.

Элементы Мебели, имеющие контакт с пациентом и обслуживающим персоналом, изготовлены или имеют покрытия из материалов, безопасность которых подтверждена в установленном порядке сертификатом соответствия, декларацией о соответствии или протоколом испытаний, а так же разрешенных к применению в медицинской практике и соответствовать требованиям, указанным в ПРИЛОЖЕНИИ 3 данного документа.

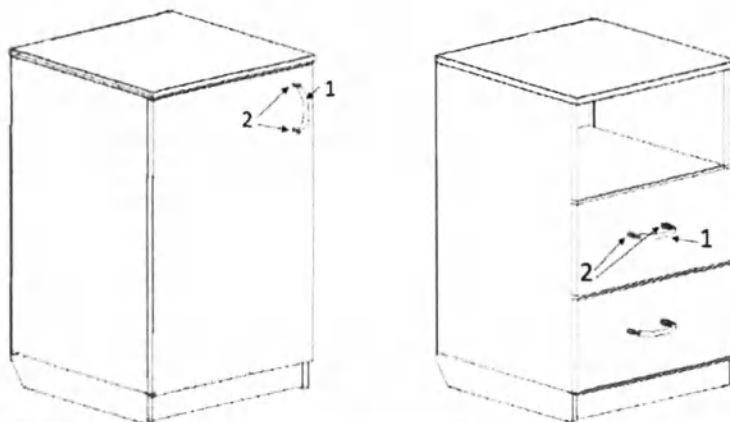
6. Подготовка к работе и порядок использования

6.1 Тумбочка медицинская Ortonica

Перед сборкой изделия освободите все комплектующие от упаковки, проверьте комплектующие на наличие дефектов и следуйте следующей инструкции:

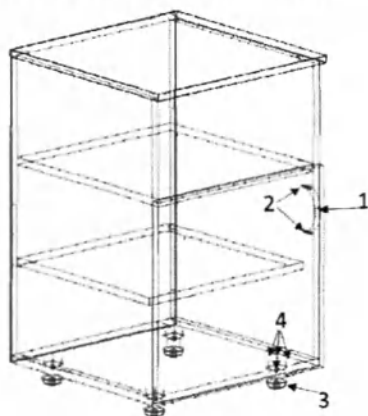
Модели TM100-TM180, TM270

1. Закрепите ручку (1) на двери тумбочки/выдвижном ящике винтами (2).



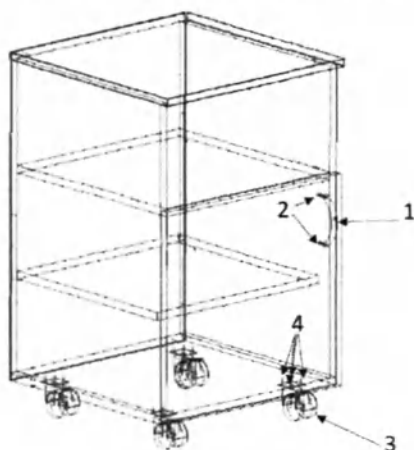
Модели TM200-TM260

1. Закрепите ручку (1) на двери тумбочки/выдвижном ящике винтами (2);
2. Прикрепите опоры (3) к нижней панели тумбочки при помощи саморезов (4).



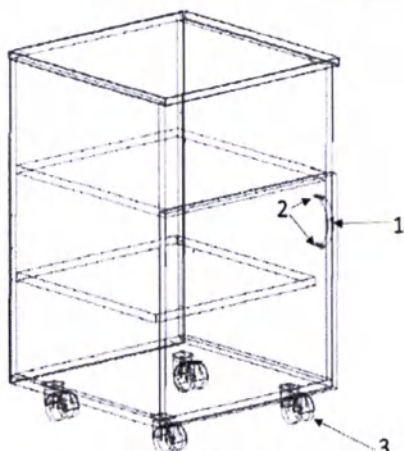
Модели TM301-TM308, TM339-TM341

1. Закрепите ручку (1) на двери тумбочки/выдвижном ящике винтами (2);
2. Прикрепите колеса (3) к нижней панели тумбочки при помощи саморезов (4).



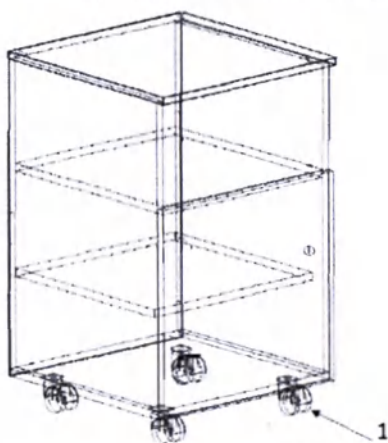
Модели: ТМ309, ТМ311, ТМ313-ТМ317, ТМ319-ТМ338

1. Закрепите ручку (1) на двери/выдвижном ящике тумбочки винтами (2);
2. Прикрутите колеса (3) к тумбочке при помощи винта колеса.



Модели ТМ310, ТМ312, ТМ318

1. Прикрутить колеса (1) к тумбочке при помощи винта колеса.

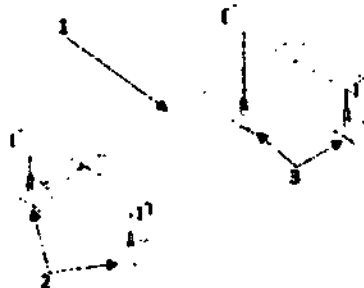


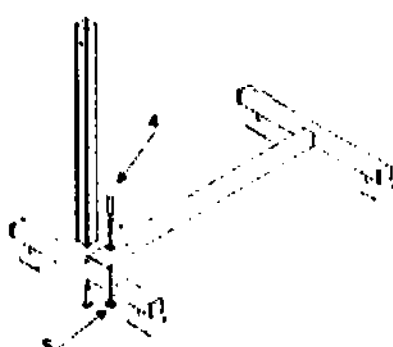
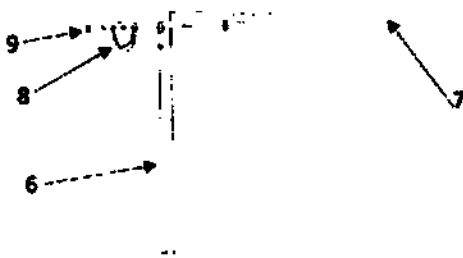
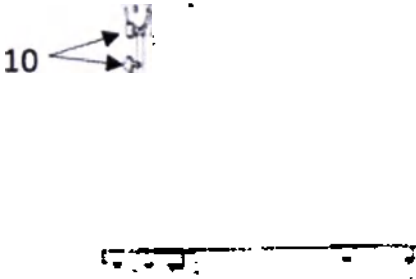
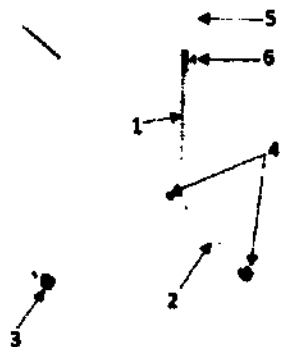
6.2 Стол прикроватный медицинский Ortonica

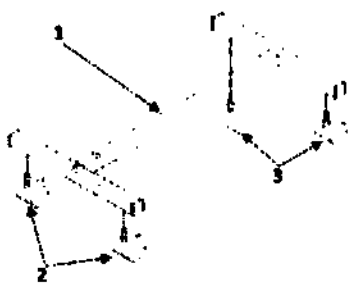
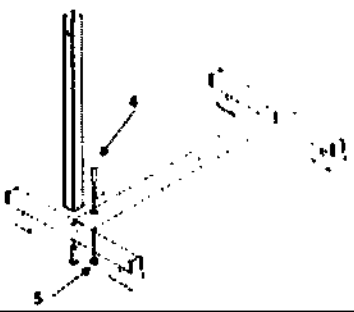
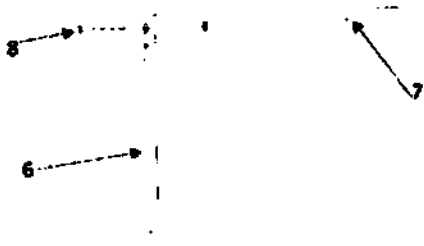
Перед сборкой изделия освободите все комплектующие от упаковки, проверьте комплектующие на наличие дефектов и следуйте следующей инструкции:

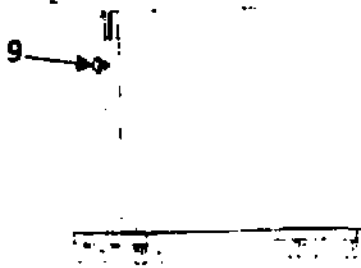
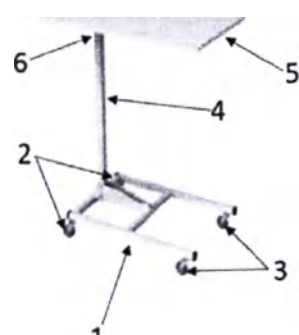
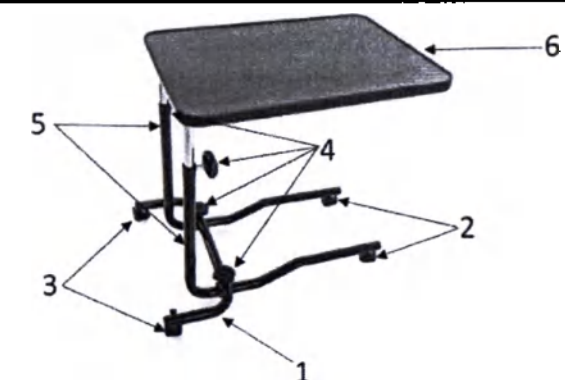
Модели СП100, СП200, СП300, СП350, СП500

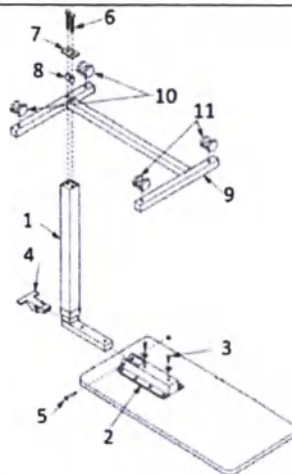
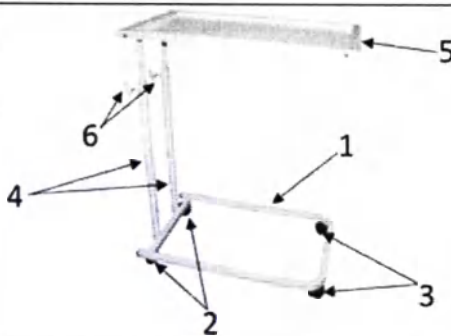
1. Установите на опорную часть рамы (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к опорной части рамы при помощи винта колеса;

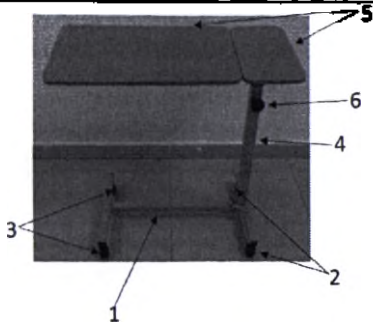
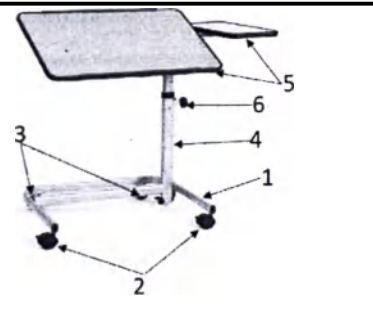
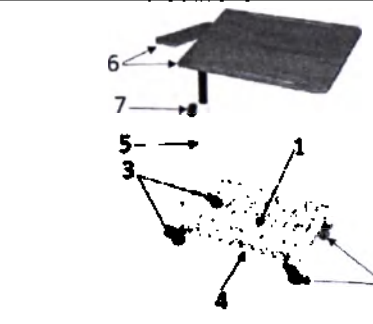
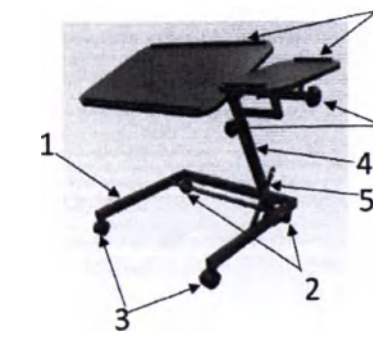


2. Болтом (4) и гайкой (5) зафиксируйте на опорной части рамы неподвижную вертикальную часть рамы;	
3. Закрепите на подвижной вертикальной части рамы (6) столешницу с кронштейном (7) и ограничитель поворота столешницы (8) с помощью болта (9).	
4. Соедините две части прикроватного столика. Установите фиксаторы (10) и отрегулируйте положение столешницы.	
Модель СП150	
1. Установите на U-образную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к U-образной раме при помощи винта колеса; 2. Болтами (4) зафиксируйте на U-образной раме телескопические стойки (5); 3. Соедините телескопические стойки со столешницей (6) с помощью кронштейна; 4. Установите фиксаторы (7).	
Модель СП250	
1. Соедините L-образную (1) и T-образную рамы (2) с помощью болта; 2. Установите колеса со стопором (3) и колеса без стопора (4), прикрутив колеса к L-образной раме и T-образной раме при помощи винта колеса; 3. Соедините L-образную раму со столешницей (5) с помощью кронштейна; 4. Установите фиксатор (6).	

Модель СП400	
1. Установить на U-образную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к U-образной раме при помощи винта колеса; 2. Болтами зафиксировать на U-образной раме телескопическую стойку (4); 3. Соединить телескопическую стойку со столешницей (5) с помощью кронштейна; 4. Установить фиксаторы (6).	
Модель СП450	
1. Установить на U-образную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к U-образной раме при помощи винта колеса; 2. Болтами зафиксируйте на U-образной раме телескопическую стойку (4); 3. Соедините телескопическую стойку со столешницей (5) с помощью кронштейна; 4. Установите фиксаторы (6).	
Модель СП550	
1. Установите на опорную часть рамы (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к опорной части рамы при помощи винта колеса.	
2. Болтом (4) и гайкой (5) зафиксируйте на опорной части рамы неподвижную вертикальную часть рамы.	
3. Закрепите на подвижной вертикальной части рамы (6) столешницу с кронштейном (7) с помощью болта (8).	

4. Соедините две части прикроватного столика вставив подвижную вертикальную часть рамы в неподвижную. Установите фиксатор (9) и отрегулируйте положение столешницы.	
Модель СП600	
1. Установите на опорную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к опорной части рамы при помощи винта колеса; 2. Зафиксируйте болтами на опорной раме телескопическую стойку (4); 3. Соедините телескопическую стойку со столешницей (5) с помощью кронштейна; 4. Установите фиксатор (6).	
Модель СП650	
1. Установите на U-образную раму (1) колеса без стопора (3), прикрутив колеса к U-образной раме при помощи винта колеса; 2. Фиксаторами (4) зафиксировать на U-образной раме П-образные телескопические стойки (5); 3. Установите на П-образную раму колеса со стопором (2), прикрутив колеса к П-образной раме при помощи винта колеса; 4. Закрепите столешницу (6) с П-образными телескопическими стойками при помощи саморезов и креплений; 5. Установить фиксаторы (4).	
Модель СП700	
1. Установите на U-образную раму (1) колеса без стопора (2), прикрутив колеса к U-образной раме при помощи винта колеса; 2. Фиксаторами (3) зафиксируйте на U-образной раме П-образные телескопические стойки (4). 3. Закрепите столешницу (5) с П-образными телескопическими стойками при помощи саморезов и креплений. 4. Установить фиксаторы (3).	
Модель СП750	
1. Установите на U-образную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к U-образной раме при помощи винта колеса. 2. Закрепите столешницу (4) с U-образной рамой при помощи саморезов и креплений	

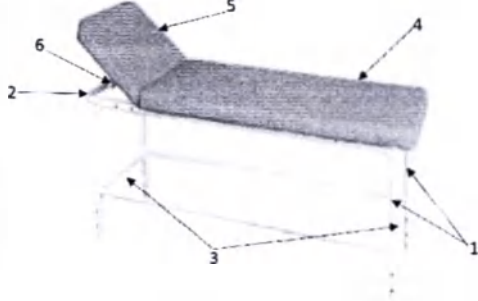
<u>Модель СП800</u>	
1. Установите на U-образную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к U-образной раме при помощи винта колеса. 2. Болтами зафиксируйте на U-образной раме телескопическую стойку (4). 3. Соедините телескопическую стойку со столешницей (5) с помощью кронштейна. 4. Установите фиксатор (6).	
<u>Модели СП850, СП900</u>	
1. Вставьте телескопическую стойку (1) в кронштейн столешницы (2) и закрепите их болтами (3). 2. Установите фиксатор (4). Выровняйте отверстия в фиксаторе с отверстиями в кронштейне столешницы, вставьте болт и гайку (5) и скрепите ими фиксатор с кронштейном. 3. Вставьте болты (6) в крепежную пластину (7) и во втулки (8) и присоедините с их помощью телескопическую стойку к H-образной раме (9). 4. Установите на H-образную раму колеса со стопором (10) и колеса без стопора (11). Для этого необходимо прикрутить колеса к H-образной раме при помощи винта колеса.	
<u>Модель СП950</u>	
1. Установить на U-образную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к U-образной раме при помощи винта колеса. 2. Болтами зафиксировать на U-образной раме телескопические стойки (4). 3. Соедините телескопическую стойку со столешницей (5) с помощью кронштейна. 4. Установите фиксаторы (6).	
<u>Модель СП1000</u>	
1. Установите колеса со стопором (1) и колеса без стопора (2), прикрутив колеса к столику при помощи винта колеса.	
<u>Модели СП1050, СП1100, СП1200, СП1250, СП1350</u>	

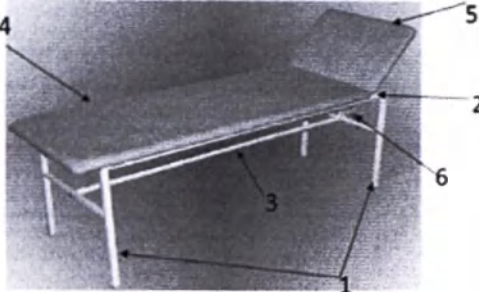
1. Установите на Н-образную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к Н-образной раме при помощи винта колеса. 2. Болтами зафиксируйте на Н-образной раме телескопическую стойку (4). 3. Соедините телескопическую стойку со столешницами (5) с помощью кронштейна. 4. Установите фиксаторы (6).	
Модель СП1150	
1. Установите на П-образную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к П-образной раме при помощи винта колеса. 2. Болтами зафиксируйте на П-образной раме телескопическую стойку (4). 3. Соедините телескопическую стойку со столешницами (5) с помощью кронштейна. 4. Установите фиксаторы (6).	
Модель СП1300	
1. Установите на U-образную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к U-образной раме при помощи винта колеса. 2. Болтами зафиксируйте на U-образной раме телескопическую стойку (4). 3. Соедините телескопическую стойку со столешницами (5) с помощью кронштейна. 4. Установите фиксаторы (6).	
Модель СП1400	
1. Установите на Н-образную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к Н-образной раме при помощи винта колеса. 2. Болтами зафиксируйте на Н-образной раме корзину (4) и телескопическую стойку (5). 3. Соедините телескопическую стойку со столешницами (6) с помощью кронштейна. 4. Установите фиксаторы (7).	
Модель СП1450	
1. Установите на П-образную раму (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3), прикрутив колеса к П-образной раме при помощи винта колеса. 2. Болтами зафиксируйте на П-образной раме телескопическую стойку (4), упор регулировки угла наклона стойки (5). 3. Соедините телескопическую стойку со столешницами (6) с помощью кронштейна. 4. Установите фиксаторы (7).	

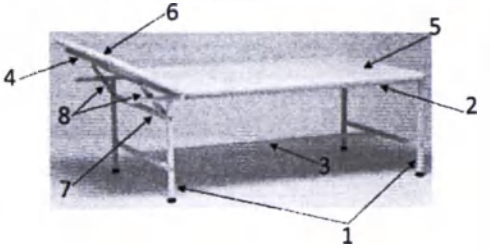
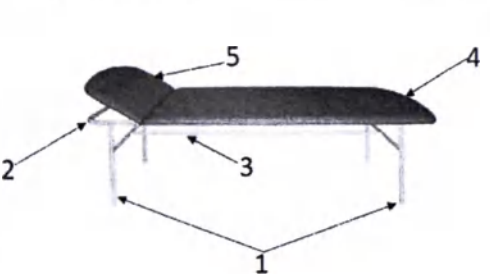
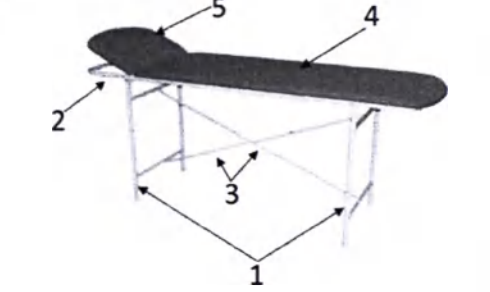
6.3 Стол надкроватный медицинский Ortonica поставляется в собранном виде.

6.4 Кушетка смотровая медицинская Ortonica

Перед сборкой изделия освободите все комплектующие от упаковки, проверьте комплектующие на наличие дефектов и следуйте следующей инструкции:

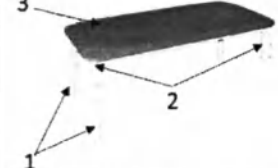
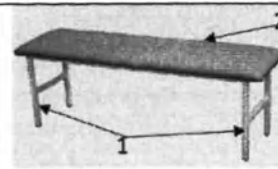
Модель KC400 1. Прикрутить опоры (1) к раме-основанию (2) с помощью болтов. 2. Разместить на раме-основании ложе кушетки (3) и закрепить шурупами. 3. Прикрепить петли шарнирные к подголовнику (4) и к ложе кушетки шурупами. 4. Механизм регулировки угла наклона подголовника прикрепить к подголовнику и к раме-основанию с помощью шурупов.	
Модель KC405 1. Прикрутите опорные рамы (1) к раме-основанию (2) с помощью болтов. 2. Прикрутите поперечные связи (3) к опорным рамам с помощью болтов. 3. Разместите на раме-основании ложе кушетки (4) и закрепите шурупами. 4. Прикрепите петлю шарнирную к подголовнику (5) и к ложе кушетки шурупами. 5. Механизм регулировки угла наклона подголовника (6) прикрепите к подголовнику и к раме-основанию с помощью шурупов.	
Модель KC410 1. Прикрутите поперечные связи (1) к опорным рамам (2) с помощью болтов. 2. Разместите на раме ложе кушетки (3) и закрепите шурупами. 3. Прикрепите петлю шарнирную к подголовнику (4) и к ложе кушетки шурупами. 4. Механизм регулировки угла наклона подголовника прикрепите к подголовнику и к раме с помощью шурупов.	
Модель KC415 1. Прикрутите рамы опорные (1) к раме-основанию (2) с помощью болтов. 2. Разместите на раме-основании ложе кушетки (3) и закрепите шурупами. 3. Прикрепите петлю шарнирную к подголовнику (4) и к ложе кушетки шурупами. 4. Механизм регулировки угла наклона подголовника прикрепите к подголовнику и к раме-основанию с помощью шурупов.	
Модель KC420 1. Прикрутите стойки (1) к раме-основанию (2) с помощью болтов. 2. Разместите на раме-основании ложе кушетки (3) и закрепите шурупами. 3. Прикрепите петлю шарнирную к подголовнику (4) и к ложе кушетки шурупами. 4. Механизм регулировки угла наклона подголовника (5)	

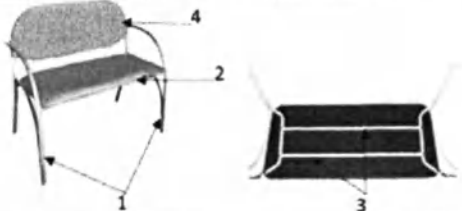
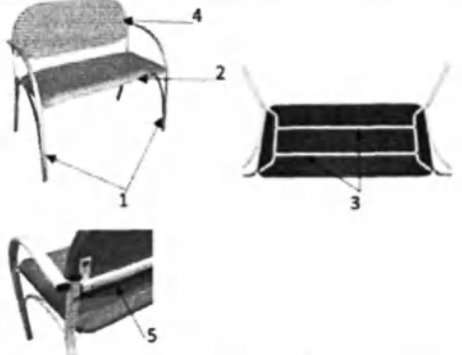
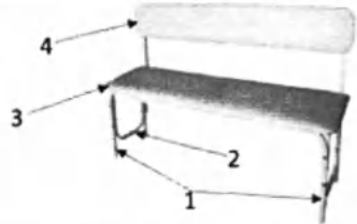
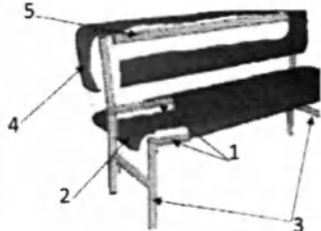
прикрепите к подголовнику и к раме-основанию с помощью шурупов.	
Модель КС425, Модель КС430 1. Прикрутите стойки (1) к раме-основанию (2) с помощью болтов. 2. Продольную связь (3) вставьте в отверстия стоек и закрепите их болтом. 3. Разместите на раме-основании ложе кушетки (4) и закрепите шурупами. 4. Прикрепите петлю шарнирную к подголовнику (5) и к ложу кушетки шурупами. 5. Механизм регулировки угла наклона подголовника (6) прикрепите к подголовнику и к стойке с помощью шурупов.	
Модель КС435 1. Соедините ложе кушетки (1) и стойки (2) с помощью болтов. 2. Соедините связь продольную (3) со стойками с помощью болтов. 3. Закрепите петли шарнирные на подголовнике (4) при помощи шурупов. 4. Механизм регулировки угла наклона подголовника (5) прикрепите к подголовнику и к стойке с помощью шурупов.	
Модель КС440 1. Прикрепите одну из продольной связи (1) к ложе кушетки (2) с помощью винтов (3). 2. Сориентируйте продольную связь относительно ложа кушетки. При этом несквозное отверстие продольной связи должно быть обращено вовнутрь ложа кушетки. В несквозное отверстие продольной связи вставьте пруток подголовника. Соедините таким же образом вторую продольную связь с подголовником, после чего прикрепите продольную связь к ложу кушетки при помощи винтов (3). 3. Выберите из двух стоек (4) ту, которая имеет приваренный болт. Стойку расположите со стороны подголовника так, чтобы болт стойки и болт подголовника были направлены в одну сторону. 4. Прикрепите стойку к связи продольной (1) при помощи винтов (5), подложив под шляпки винтов шайбы (6). 5. Прикрепите с помощью двух винтов (5) и двух шайб (6) вторую стойку (8) к связям продольным (1) через боковые отверстия продольных связей. 6. Прикрепите перемычки (7): использовать винты (5) для крепления к ложе кушетки (2) и винты (8) для крепления к стойкам (4). 7. Механизм регулировки угла наклона подголовника (9) прикрепить к приваренным болтам подголовника (10) и стойки (4) с помощью гаек (11), подложив по обе стороны механизма регулировки угла наклона подголовника шайбы (6).	
Модель КС445 1. Прикрепите стойки (1) к раме-основанию (2) с помощью болтов. 2. Продольную связь (3) вставьте в отверстия поперечин стоек и закрепите шурупами. 3. Раму подголовника (4) прикрутите к раме-основанию	

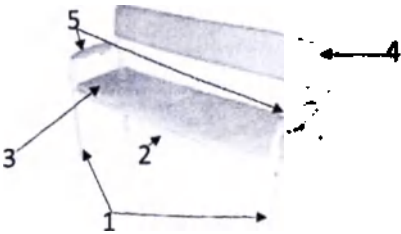
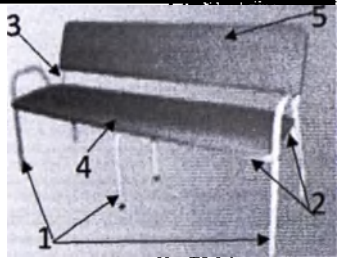
при помощи болтов. 4. Разместите на раме-основании ложе кушетки (5) и закрепить шурупами. 5. Разместите на раме подголовника подголовник (6) и закрепить его шурупами. 6. Соедините поперечную связь (7) со стойкой с помощью шурупов 7. Прикрепите петлю шарнирную к раме подголовника и к раме-основанию шурупами. 8. Механизм регулировки угла наклона подголовника (8) прикрепите к раме подголовника и к связи поперечной с помощью шурупов.	
Модель KC450 1. Прикрепите опорные рамы (1) к раме-основанию (2) с помощью болтов. 2. Продольную связь (3) вставьте в отверстия поперечин опорных рам и закрепите их болтом. 3. Разместите на раме-основании ложе кушетки (4) и закрепите шурупами. 4. Прикрепите петлю шарнирную к ложу кушетки и подголовнику (5) шурупами. 5. Механизм регулировки угла наклона подголовника прикрепите к подголовнику и к раме-основанию с помощью шурупов.	
Модель KC455 1. Привинтите стойки (1) к раме-основанию (2) с помощью винтов. 2. Перемычки (3) вставьте наперекрест в отверстия поперечин стоек и закрепите их винтом. 3. Разместите на раме-основании ложе кушетки (4) и подголовник (5) и закрепите их шурупами. 4. Механизм регулировки угла наклона подголовника прикрепите к подголовнику и к раме-основанию с помощью винтов.	

6.5 Банкетка медицинская Ortonica

Перед сборкой изделия освободите все комплектующие от упаковки, проверьте комплектующие на наличие дефектов и следуйте следующей инструкции:

Модель БМ500 1. Соедините между собой опорные рамы (1) и перемычки (2) с помощью винтов и гаек. 2. Положите сиденье (3) на каркас и закрепить саморезами.	
Модель БМ510 1. Приверните опоры (1) через отверстия в каркасе сиденья (2) при помощи винтов, шайб и гаек.	
Модель БМ515 1. Соедините опорные рамы (1) с продольными связями при помощи болтов. 2. Соедините полученную конструкцию с сиденьем (2) при помощи болтов.	

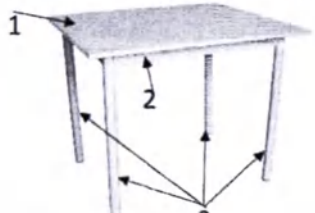
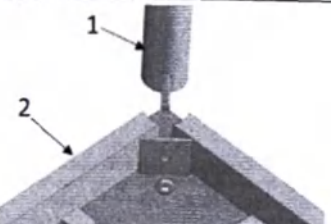
<u>Модель БМ530</u> 1. Прикрутите опорные рамы (1) к раме основания (2) при помощи болтов, гаек и шайб. 2. Прикрутите раму спинки (3) к опорным рамам при помощи болтов, гаек и шайб. 3. Прикрутите сиденье (4) к раме основания при помощи саморезов. 4. Прикрутите спинку (5) саморезами к раме спинки.	
<u>Модель БМ535</u> 1. Прикрутите опорные рамы (1) к сиденью (2) при помощи винтов. 2. Установите продольные связи (3) и закрепите их к сиденью винтами. 3. Прикрутите спинку (4) винтами к опорным рамам	
<u>Модель БМ540</u> 1. Прикрутите опорные рамы (1) к сиденью (2) при помощи винтов. 2. Установите продольные связи (3) и закрепите их к сиденью винтами. 3. Прикрутите спинку (4) винтами к опорным рамам. 4. Установите продольную связь (5) и закрепите ее к спинке саморезами.	
<u>Модель БМ545</u> 1. Прикрутите опорные рамы (1) к раме основания (2) при помощи болтов, гаек и шайб. 2. Прикрутите сиденье (3) и спинку (4) к раме основания при помощи саморезов.	
<u>Модель БМ550</u> 1. Прикрутите опорные рамы (1) к продольным связям (2) при помощи болтов, гаек и шайб. 2. Прикрутите раму спинки (3) к опорным рамам при помощи болтов, гаек и шайб. 3. Прикрутите сиденье (4) к опорным рамам и продольным связям при помощи саморезов. 4. Прикрутите спинку (5) саморезами к раме спинки.	
<u>Модель БМ555</u> 1. Прикрепите продольные связи (1) к сиденью (2) с помощью винтов. 2. Прикрепите опорные рамы (3) к продольным связям при помощи винтов и шайб. 3. Прикрепите спинку (4) к опорным рамам с помощью винтов. 4. Прикрепите продольную связь (5) к спинке с помощью саморезов.	

Модель БМ560 1. Соберите металлокаркас при помощи болтов. Для этого необходимо прикрепить к опорным рамам (1) продольные связи (2). 2. Закрепите сиденье (3) и спинку (4) при помощи саморезов. 3. Закрепите подлокотники (5) при помощи саморезов.	
Модель БМ565 1. Прикрутите опорные рамы (1) к продольным связям (2) при помощи болтов, гаек и шайб. 2. Прикрутите раму спинки (3) к опорным рамам при помощи болтов, гаек и шайб. 3. Прикрутите сиденье (4) к опорным рамам и продольным связям при помощи саморезов. 4. Прикрутите спинку (5) саморезами к раме спинки.	

6.6 Ступенька медицинская Ortonica поставляется в собранном виде.

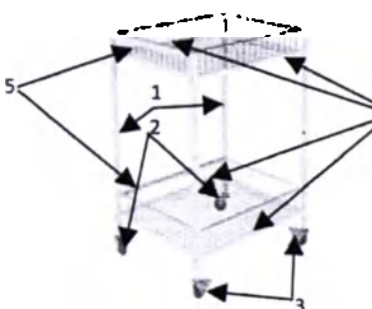
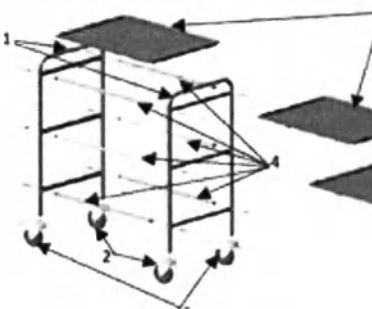
6.7 Стол палатный медицинский Ortonica.

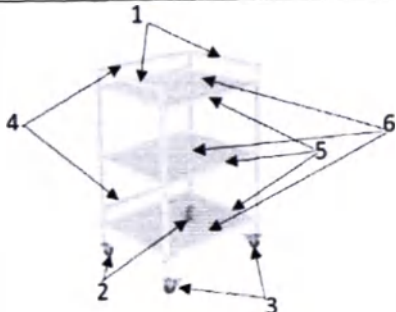
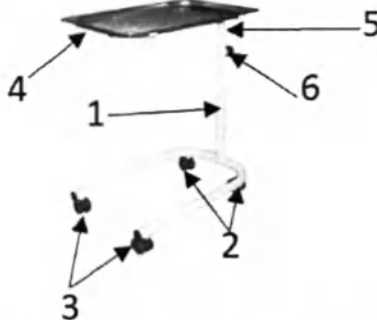
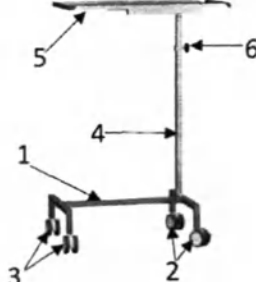
Перед сборкой изделия освободите все комплектующие от упаковки, проверьте комплектующие на наличие дефектов и следуйте следующей инструкции:

Модели: СПМ700, СПМ710, СПМ770 1. Установите столешницу (1) на каркас-основание (2), установить ножки (3). Для этого необходимо прикрутить их гайками с шайбами к каркасу столешницы.	
Модели: СПМ720, СПМ750, СПМ760 1. Прикрутите опоры (1) к столешнице (2) с помощью винтов опор.	
Модели СПМ730, СПМ740 1. Установите опоры (1). Прикрутите их гайками с шайбами к каркасу столешницы (2).	

6.8 Стол манипуляционный медицинский Ortonica.

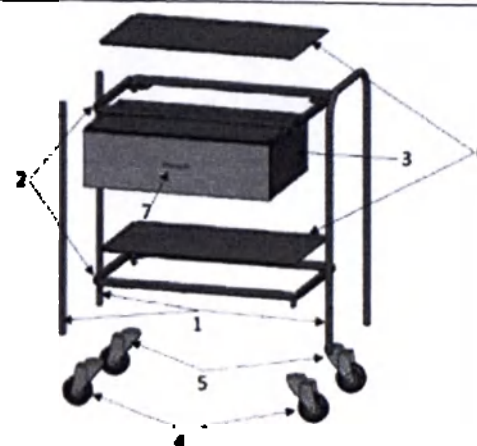
Перед сборкой изделия освободите все комплектующие от упаковки, проверьте комплектующие на наличие дефектов и следуйте следующей инструкции:

Модели: CMM800, CMM805 1. Установить колеса на стойки (1), используя винты и шайбы (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)). 2. Соединить винтами стойки с поперечинами (4). 3. Установить полки (5) на поперечины.	
Модель: CMM810 3. Установите колеса на стойки (1), используя винты и шайбы (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)). 4. Установите рамы (4) на стойках и зафиксировать их фиксаторами (5). 5. Соедините винтами стойки с поперечиной (6). 6. Установите полки (7) на рамы.	
Модель CMM815 1. Установите колеса на стойки (1), используя винты колес (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)). 2. Соедините болтами стойки с поперечинами (4). 3. Установите корзины (5) на поперечины.	
Модель CMM820 1. Установите колеса на стойки (1), используя винты колес (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)). 2. Соедините болтами стойки с поперечинами (4). 3. Установите полки (5) на поперечины.	
Модель CMM825 1. Установите колеса на стойки (1), используя винты и шайбы (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)). 2. Соедините винтами стойки с поперечинами (4). 3. Установите полки (5) на поперечины.	

<u>Модель СММ830</u> 1. Установите колеса на стойки (1), используя винты колес (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)). 2. Соедините болтами стойки с поперечинами (4). 3. Установите рамы (5) на стойках и зафиксировать их болтами. 4. Установите полки (6) на рамы.	
<u>Модель СММ835</u> 1. Прикрепите полки (1) к стойкам (2) при помощи винтов, гаек и шайб. 2. Установите колеса без стопора (3) и колеса со стопором (4) на стойки, используя винты и шайбы.	
<u>Модель СММ840</u> 1. Установите на раму-основание (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3). Для этого необходимо прикрутить колеса к раме при помощи винта колеса. 2. Столешницу (4) присоедините к кронштейну (5) с помощью болтов. 3. Соедините кронштейн с рамой-основанием при помощи фиксатора (6).	
<u>Модель СММ845</u> 1. Установите на раму-основание (1) колеса со стопором (2) и колеса без стопора (3). Для этого необходимо прикрутить колеса к раме при помощи винта колеса. 2. Болтами зафиксировать на раме-основании телескопическую стойку (4). 3. Присоедините столешницу с кронштейном (5) к телескопической стойке при помощи фиксатора (6).	
<u>Модель СММ850</u> 1. Присоедините стойки (1) к поперечинам (2) при помощи болтов. 2. Присоедините болтам ящик (3). 3. Колеса присоедините к стойкам при помощи винта колеса (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (4) и колесо со стопором (5)). 4. Присоедините полки (6) к стойкам при помощи болтов. 5. Прикрутите ручку (7) на ящик с помощью винтов.	

Модель СММ855

1. Присоедините стойки (1) к поперечным рамам (2), посредством винтов и гаек.
2. Корпус с ящиком (3) присоедините к верхней поперечной раме винтом.
3. Колеса присоедините к стойкам при помощи болтов и шайб (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (4) и колесо со стопором (5)).
4. На поперечные рамы установите полки (6).
5. Прикрутите ручку (7) на ящик с помощью винтов.



Модель СММ860

1. Корпус с ящиками (1) присоедините к раме (2) при помощи винтов и шайб.
2. Колеса (3) присоедините к раме при помощи винтов и шайб.
3. На верхнюю и нижнюю рамки установите полки (4).
4. Прикрутите ручки (5) на ящики с помощью винтов.



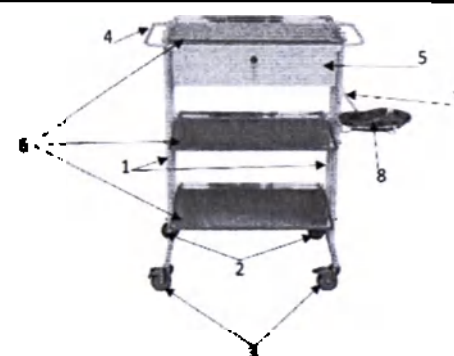
Модель: СММ865

1. Установите колеса на стойки (1), используя винты и шайбы (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)).
2. Соедините винтами стойки с поперечинами (4).
3. Установите полки (5) на поперечины.
4. На ящик (6) установите ручку (7), используя винты.
5. Вставьте ящик в направляющие и задвиньте его до упора.



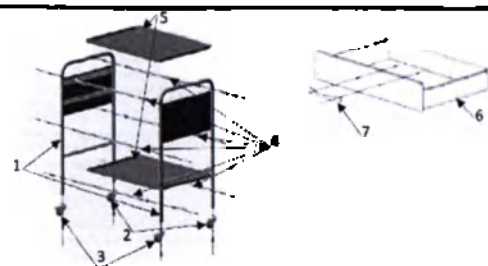
Модель СММ870

1. Колеса присоедините к стойкам (1) при помощи винта колеса (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)).
2. Соедините болтами стойки с поперечинами.
3. Соедините болтами раму поперечную с ручками (4) со стойками с помощью болтов.
4. Закрепите ящик (5) на раме поперечной с помощью болтов.
5. Установите полки (6) на поперечины и на раму поперечную с ручками.
6. Закрепить кронштейн поворотный (7) на стойке с помощью фиксатора кронштейна.
7. Вставьте тазик почкообразный (8) в поворотный кронштейн.



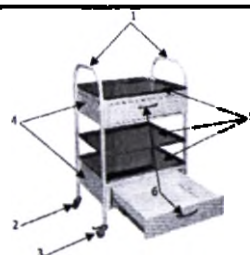
Модель CMM875

1. Установить колеса на стойки (1), используя винты и шайбы (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)).
2. Соединить винтами стойки с поперечинами (4).
3. Установить полки (5) на поперечины.
4. На ящик (6) установить ручку (7), используя винты.
5. Вставить ящики в направляющие и задвинуть их до упора.



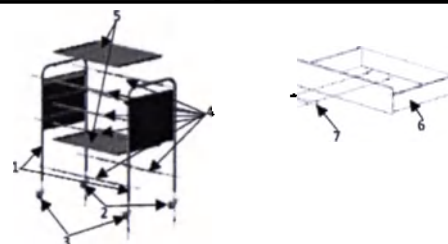
Модель CMM880

1. Колеса присоедините к стойкам (1) при помощи винта колеса (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)).
2. Корпус с ящиком (4) присоедините к стойкам при помощи болтов.
3. Прикрепите полки (5) к стойкам при помощи болтов.
4. На ящики установите ручку (6), используя винты.



Модель CMM885

1. Установить колеса на стойки (1), используя винты и шайбы (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)).
2. Соединить винтами стойки с поперечинами (4).
3. Установить полки (5) на поперечины.
4. На ящик (6) установить ручку (7), используя винты.
5. Вставить ящики в направляющие и задвинуть их до упора.



Модель CMM890

1. Установите колеса на стойки (1), используя винты и шайбы (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)).
2. Соедините винтами стойки с поперечинами (4).
3. Установите полки (5) на поперечины.
4. На ящик (6) установите ручку (7), используя винты.
5. Вставьте ящики в направляющие и задвиньте их до упора.



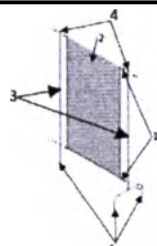
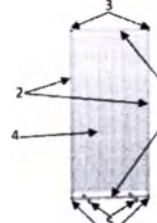
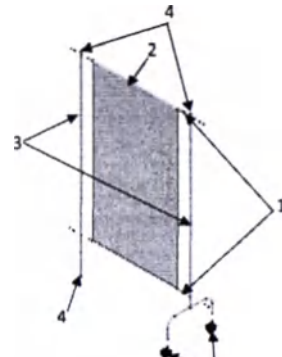
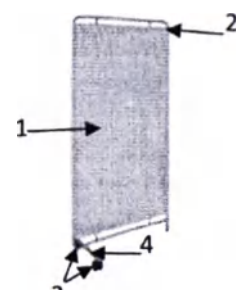
Модель CMM895

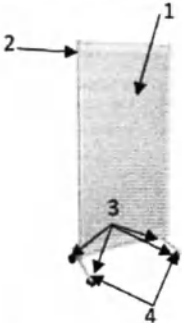
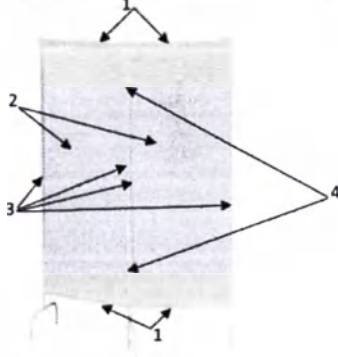
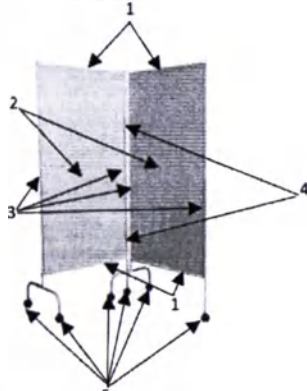
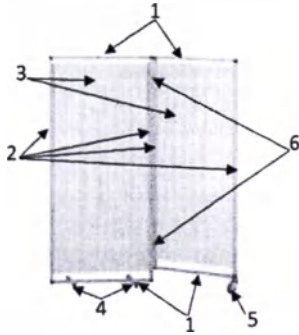
1. Колеса присоедините к стойкам (1) при помощи винта колеса (на каждой стойке должно находиться колесо без стопора (2) и колесо со стопором (3)).
2. Корпус с ящиками/-ом (4) присоедините к стойкам при помощи болтов.
3. Установите полку (5) на корпус ящика.
4. На ящики установите ручку (6), используя винты.

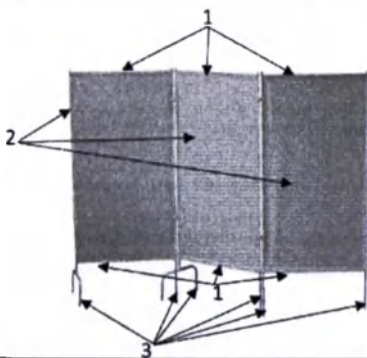
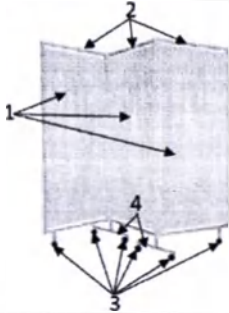
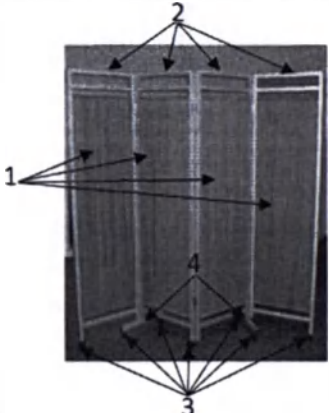


6.9 Ширма медицинская Ortonica.

Перед сборкой изделия освободите все комплектующие от упаковки, проверьте комплектующие на наличие дефектов и следуйте следующей инструкции:

Модель ШМ100 1. Проденьте поперечины (1) через полотно экрана (2). 2. Прикрепите поперечины к стойкам (3) болтами с шайбами. 2. Вставьте заглушки (4) в стойки.	
Модель ШМ110 1. Прикрепите поперечины (1) к стойкам (2) угловыми колодками (3). 2. Вставьте экран ширмы (4) в отверстия стоек. 3. Прикрепите опоры (5) к поперечине болтами опор.	
Модель ШМ120 1. Вставьте экран ширмы (1) в отверстия рамы (2).	
Модель ШМ130 1. Проденьте поперечины (1) через полотно экрана (2). 2. Прикрепите поперечины к стойкам (3) болтами с шайбами. 3. Вставьте заглушки (4) в стойки. 4. Присоединить колеса (5) к стойке при помощи винта колеса.	
Модель ШМ140 1. Вставьте экран ширмы (1) в отверстия рамы (2). 2. Присоединить колеса (3) к опоре (4) при помощи винта колеса. 3. Присоединить опору к раме при помощи винтов, шайб и гаск.	

<u>Модель ШМ150</u> 1. Вставьте экран ширмы (1) в отверстия рамы (2). 2. Присоединить колеса (3) к опоре (4) при помощи винта колеса. 3. Присоединить опору к раме при помощи болтов.	
<u>Модель ШМ200</u> 1. Вставьте экран ширмы (1) в отверстия рамы (2). 2. Соедините рамы при помощи шарнирных петель и саморезов.	
<u>Модель ШМ210</u> 1. Проденьте поперечины (1) через полотно экрана (2). 2. Прикрепите поперечины к стойкам (3) болтами с шайбами. 3. Вставьте заглушки в стойки. 4. Соедините секции при помощи соединительных колодок (4), болтов, гаек и шайб.	
<u>Модель ШМ220</u> 1. Проденьте поперечины (1) через полотно экрана (2). 2. Прикрепите поперечины к стойкам (3) болтами с шайбами. 3. Вставьте заглушки в стойки. 4. Соедините секции при помощи соединительных колодок (4), болтов, гаек и шайб. 5. Присоединить колеса (5) к стойке при помощи винта колеса.	
<u>Модель ШМ230</u> 1. Прикрепите поперечины (1) к стойкам (2) угловыми колодками. 2. Вставьте экран ширмы (3) в отверстия стоек. 3. Прикрепите опоры (4) к поперечине болтами опор. 4. Присоединить колесо (5) к стойке при помощи винта колеса. 5. Соедините рамы при помощи шарнирных петель (6) и саморезов.	

<u>Модель ШМ300</u> 1. Вставьте экран ширмы (1) в отверстия рамы (2). 2. Соединить рамы при помощи шарнирных петель и саморезов.	
<u>Модель ШМ310</u> 1. Проденьте поперечины (1) через полотно экрана (2). 2. Прикрепите поперечины к стойкам (3) болтами с шайбами. 3. Вставьте заглушки в стойки. 4. Соедините секции при помощи соединительных колодок, болтов, гаек и шайб.	
<u>Модель ШМ320</u> 1. Вставьте экран ширмы (1) в отверстия рамы (2). 2. Присоединить колеса (3) к опоре (4) и раме при помощи винта колеса. 3. Присоединить опору к раме при помощи болтов. 4. Соедините рамы при помощи шарнирных петель и саморезов.	
<u>Модель ШМ400</u> 1. Вставьте экран ширмы (1) в отверстия рамы (2). 2. Присоединить колеса (3) к поперечинам (4) и раме при помощи винта колеса. 3. Присоединить поперечины к раме болтами поперечин. 4. Соедините рамы при помощи шарнирных петель и саморезов.	

7. Возможные неисправности и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Способ решения
При сборке, элемент крепежа не закручивается.	Забилась мусором, пути. Или при сборке, изначально не так вкручивался крепеж.	Очистка путей, нарезка резьбы метчиком. Почистите отверстие, и тогда крепеж легко вкрутится. Если Вы изначально вкручивали крепежный элемент под другим углом, то могла сорваться резьба и надо будет ее нарезать заново. Для этого существуют

		специальные инструменты, которые продаются в строительных магазинах.
Перекося дверей тумбочки.	Ослабление крепления петель.	Замена негодных петель или шурупов. Сняв петлю, в старое гнездо вбивают колышек и заворачивают туда новый шуруп. Так меняют все петли или шурупы на новые, не снимая дверки, если есть возможность.
Затруднено выдвижение ящика.	Чрезмерная нагрузка.	Регулировка направляющих. Откручиваем крепеж направляющей, кроме одной точки возле самого переднего ролика, выравниваем, прикручиваем на место. Это проделываем с частью направляющей, которая расположена на мебельной стенке.
Поломка ножек тумбочки.	Чрезмерная нагрузка.	Следует выкрутить поломанные ножки и закрепить новые.
Мебель на колесах плохо катится или имеет наклон на какую-либо сторону.	Произошла поломка колеса, или, возможно, колеса загрязнены.	Замените колесо или все колеса. Если есть поломка, то нужно снять и поставить новое. Иногда, колеса просто забиваются грязью, тогда поможет простая очистка.
Мебель расшатана.	Со временем при использовании изделия выкрутился крепеж.	Подкрутить крепежные элементы.

8. Способы и методы дезинфекции медицинского изделия

Мебель поставляется нестерильной.

Наружные поверхности Мебели устойчивы к санитарной обработке дезинфицирующими средствами (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в количестве 50 г на 10 л раствора). Нельзя применять абразивные чистящие средства.

9. Техническое обслуживание

Для данного медицинского изделия техническое обслуживание – не предусмотрено.

10. Упаковка медицинского изделия

Упаковка Мебели выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371, ГОСТ 19917 и ТУ 32.50.30-012-66445146-2018.

Упаковка мебели, предназначенной для экспорта, соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и ТУ 32.50.30-012-66445146-2018.

Упаковка мебели, предназначенной для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, соответствует требованиям ГОСТ 15846.

Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Все части мебели и эксплуатационная документация упакованы в потребительскую тару - негерметичный пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и потребительскую тару – коробку из картона.

В каждую коробку вложен упаковочный лист по ГОСТ Р 50444, который содержит следующую информацию:

- наименование производителя;
- наименование изделия;
- наименование варианта исполнения;
- условный номер упаковщика и контролера;
- дата упаковки.

Допускается изменение упаковки, не ухудшающее устойчивости к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании и хранении

11. Информация о маркировке изделия.

11.1 Маркировка Мебели выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371, ГОСТ 19917, ГОСТ Р ИСО 15223-1 и ТУ 32.50.30-012-66445146-2018.

11.2 Маркировка Мебели содержит следующую информацию:

- наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению;
- обозначение варианта исполнения;
- габаритный размер, мм;
- заводской номер;
- товарный знак (логотип) изготовителя;
- дата изготовления (год и месяц);
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы, установленный изготовителем;
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- номер настоящих технических условий;
- номер регистрационного удостоверения.

11.3 Маркировка Мебели, предназначенной для экспорта, содержит следующую информацию:

- наименование изделия;
- наименование варианта исполнения;
- габаритный размер, мм;
- заводской номер;
- дата изготовления (год);
- обозначение и товарный знак экспортера;
- надписи “Экспорт”, “Страна-изготовитель”;
- номер настоящих технических условий.

11.4 Транспортная маркировка выполнена по ГОСТ 14192 и содержит следующую информацию:

- наименование производителя;
- наименование изделия;
- наименование варианта исполнения;
- габаритный размер, мм;
- год и месяц изготовления.

Маркировку наносят на тару. Переменные данные на ярлыке могут быть заполнены от руки четко и разборчиво.

На транспортную упаковку нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги".

Манипуляционные знаки наносятся по трафарету или штемпелеванием водостойкой краской. Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи нанесены на тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки.

11.5 Транспортная маркировка мебели, предназначенной для экспорта, выполнена по ГОСТ 14192 и содержит следующую информацию:

- номер контракта и (или) номер заказа иностранного покупателя;
- номер заказа-наряда;
- номер грузового места;
- полное наименование или условное обозначение иностранного грузополучателя;
- наименование пункта назначения с указанием станции или порта перегрузки;
- страна назначения груза;
- станция и дорога назначения груза;
- товарные знаки и марки грузоотправителя;
- наименование экспортирующей организации;
- пункт отправления груза;
- станция и дорога отправления;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- массы нетто и брутто в килограммах;
- объем грузового места в кубических метрах;
- надписи "Экспорт", "Страна-изготовитель и (или) поставщик".

На транспортную упаковку нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги".

Манипуляционные знаки наносятся по трафарету или штемпелеванием водостойкой краской. Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи нанесены на тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки.

Расшифровка символов, применяемых в маркировке Мебели:

Знак, символ	Пояснение
	Вертикальное положение упаковки
	Беречь от влаги
	Хрупкое обращаться осторожно

12. Условия хранения, эксплуатации и транспортировки

Мебель, упакованная в соответствии с требованиями ТУ 32.50.30-012-66445146-2018, устойчива к климатическим воздействиям при транспортировке от минус 40°C до +55°C, влажность воздуха от 35% до 85%.

Транспортирование и хранение мебели должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Мебель работоспособна в процессе эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +10 °C до +40 °C и относительной влажности 80 % при температуре +25 °C.

13. Гарантии изготовителя, срок службы медицинского изделия

Изготовитель гарантирует соответствие качества Мебели требованиям ТУ 32.50.30-012-66445146-2018 при соблюдении условий упаковки, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки или продажи – 2 года.

Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные эксплуатацией изделия в условиях, не соответствующих условиям эксплуатации, установленным в технических условиях или руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные внешними воздействиями (физическими или химическими) вследствие использования Мебели не по назначению, установленному в технических условиях или руководстве по эксплуатации, а также применения химических веществ, не соответствующих или эквивалентных химическим веществам, допустимым к применению средств в технических условиях или руководстве по эксплуатации.

Гарантия предполагает ремонт или обмен изделия.

Порядок обращения в отдел рекламаций предполагает следующие действия:

- письменное описание причины обращения: подробное описание проблемы, а также возможную причину для гарантийной претензии;
- письменное описание времени и места приобретения изделия: дата приобретения, наименование и адрес компании-поставщика. Необходимо также приложить копии товарных чеков/накладных и/или счета-фактуры;
- при необходимости возврата изделий после ремонта – указать почтовый адрес, а также Ф.И.О. и контактные данные лица, ответственного за прием изделий при возврате после ремонта;

– перед отправкой необходимо провести дезинфекцию изделия, а затем надежно закрепить и упаковать изделие, защитив его от внешних воздействий во время транспортировки. Для контроля (отслеживания) за пересылкой изделия необходимо зафиксировать его идентификационный номер отправки и сообщить его также в отдел рекламации.

Средний срок службы Мебели не менее 10 лет. За критерий предельного состояния принимают невозможность или технико-экономическую нецелесообразность восстановления мебели путем ремонта.

14. Утилизация медицинского изделия

Утилизация Мебели должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам). Утилизация мебели вместе с бытовыми отходами не предусмотрена.

15. Применяемые стандарты

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.032-74	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.410-88	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 3749-77	Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ Р 6799-2005	Стеклоизделия для мебели. Технические условия
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 10634-88	Плиты древесностружечные. Методы определения физических свойств
ГОСТ ISO 10993-1-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ ISO 14971-2011	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия
ГОСТ 19917-2014	Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
ГОСТ 21640-91	Мебель для сидения и лежания. Мягкие элементы. Метод определения мягкости
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
СанПиН.2.1.7.2790-2010	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.
РД 50-204-87	Методические указания. Надежность в технике. Сбор и обработка информации о надежности изделий в эксплуатации. Основные положения

16. Рекламации

Организация, принимающая на территории Российской Федерации претензии от потребителя по качеству продукта:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника»

ООО «Ортоника», юридический адрес: 105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я, д. 9/35, кв. 94.

Телефон: +7 (495) 648-60-42

E-mail: info@ortonica.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование, варианты исполнения и состав медицинского изделия

Мебель медицинская для кабинетов и палат Ortonica по ТУ 32.50.30-012-66445146-2018 в наборе, варианты исполнения:

I. Стол прикроватный медицинский Ortonica в вариантах исполнения:

1) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП100 в составе:

- опорная часть рамы – 1 шт.,
- неподвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
- подвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
- столешница с кронштейном – 1 шт.,
- ограничитель поворота столешницы – 1 шт.,
- колесо без стопора – 2 шт.,
- колесо со стопором – 2 шт.,
- фиксатор – 2 шт.,
- болт – 3 шт.,
- гайка – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

2) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП150 в составе:

- телескопическая стойка – 2 шт.,
- U-образная рама – 1 шт.,
- столешница с кронштейном – 1 шт.,
- колесо без стопора – 2 шт.,
- колесо со стопором – 2 шт.,
- фиксатор – 2 шт.,
- болт – 4 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

3) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП200 в составе:

- опорная часть рамы – 1 шт.,
- неподвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
- подвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
- столешница с кронштейном – 1 шт.,
- ограничитель поворота столешницы – 1 шт.,
- колесо без стопора – 2 шт.,
- колесо со стопором – 2 шт.,
- фиксатор – 2 шт.,
- болт – 3 шт.,
- гайка – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

4) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП250 в составе:

- столешница с кронштейном – 1 шт.,
- L-образная рама – 1 шт.,
- T-образная рама – 1 шт.,
- фиксатор – 1 шт.,
- колесо без стопора – 2 шт.,
- колесо со стопором – 1 шт.,
- болт – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

5) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП300 в составе:

- опорная часть рамы – 1 шт.,
 - неподвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
 - подвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - ограничитель поворота столешницы – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - фиксатор – 2 шт.,
 - болт – 3 шт.,
 - гайка – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 6) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП350 в составе:
- опорная часть рамы – 1 шт.,
 - неподвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
 - подвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - ограничитель поворота столешницы – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - фиксатор – 2 шт.,
 - болт – 3 шт.,
 - гайка – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 7) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП400 в составе:
- телескопическая стойка – 1 шт.,
 - U-образная рама – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - фиксатор – 2 шт.,
 - болт – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 8) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП450 в составе:
- телескопическая стойка – 1 шт.,
 - U-образная рама – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - фиксатор – 3 шт.,
 - болт – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 9) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП500 в составе:
- опорная часть рамы – 1 шт.,
 - неподвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
 - подвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - ограничитель поворота столешницы – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - фиксатор – 1 шт.,

- болт – 3 шт.,
 - гайка – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 10) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП550 в составе:
- опорная часть рамы – 1 шт.,
 - неподвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
 - подвижная вертикальная часть рамы – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - фиксатор – 1 шт.,
 - болт – 3 шт.,
 - гайка – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 11) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП600 в составе:
- телескопическая стойка – 1 шт.,
 - опорная рама с креплением – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - фиксатор – 1 шт.,
 - болт – 3 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 12) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП650 в составе:
- столешница – 1 шт.,
 - крепление столешницы – 4 шт.,
 - саморез – 8 шт.,
 - П-образная телескопическая стойка – 2 шт.,
 - U-образная рама – 1 шт.,
 - фиксатор – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 13) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП700 в составе:
- столешница – 1 шт.,
 - крепление столешницы – 4 шт.,
 - саморез – 8 шт.,
 - П-образная телескопическая стойка – 2 шт.,
 - U-образная рама – 1 шт.
 - фиксатор – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 14) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП750 в составе:
- U-образная двойная рама – 1 шт.,
 - крепление столешницы – 4 шт.,
 - саморез – 8 шт.,
 - столешница – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 15) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП800 в составе:
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - U-образная рама с перемычкой – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - фиксатор – 1 шт.,
 - болт – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 16) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП850 в составе:
 - H-образная рама – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 6 шт.,
 - фиксатор – 1 шт.,
 - гайка – 1 шт.,
 - крепежная пластина – 1 шт.,
 - втулка – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 17) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП900 в составе:
 - H-образная рама – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 6 шт.,
 - фиксатор – 1 шт.,
 - гайка – 1 шт.,
 - крепежная пластина – 1 шт.,
 - втулка – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 18) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП950 в составе:
 - U-образная рама с перемычкой – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 2 шт.,
 - столешница – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - фиксатор – 2 шт.,
 - болт – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 19) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1000 в составе:
 - стол прикроватный медицинский Ortonica – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или

- 20) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1050 в составе:
- Н-образная рама – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - столешница с механизмом регулировки угла наклона – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - фиксатор – 3 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 3 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 21) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1100 в составе:
- Н-образная рама – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - столешница с механизмом регулировки угла наклона – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - фиксатор – 2 шт.,
 - болт – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 22) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1150 в составе:
- П-образная рама – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - столешница с механизмом регулировки угла наклона – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - фиксатор – 3 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 23) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1200 в составе:
- Н-образная рама – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - столешница с механизмом регулировки угла наклона – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - фиксатор – 3 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 24) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1250 в составе:
- Н-образная рама – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - столешница с механизмом регулировки угла наклона – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - фиксатор – 2 шт.,
 - саморез – 4 шт.,
 - гайка – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,

- болт – 2 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 25) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1300 в составе:
 - U-образная рама – 1 шт.,
 - телескопическая Г-образная стойка – 1 шт.,
 - столешница с механизмом регулировки угла наклона – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - фиксатор – 2 шт.,
 - болт – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 26) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1350 в составе:
 - H-образная рама – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - столешница с механизмом регулировки угла наклона – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 4 шт.,
 - фиксатор – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 27) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1400 в составе:
 - H-образная рама – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - столешница с механизмом регулировки угла наклона – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - корзина – 1 шт.,
 - фиксатор – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 28) Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1450 в составе:
 - П-образная рама – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - столешница с механизмом регулировки угла наклона – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - фиксатор – 3 шт.,
 - упор регулировки угла наклона стойки – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 6 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- II. Тумбочка медицинская Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):
 - 1) Тумбочка медицинская Ortonica ТМ100 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.

- или
- 2) Тумбочка медицинская Ortonica TM110 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 3) Тумбочка медицинская Ortonica TM120 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 4) Тумбочка медицинская Ortonica TM130 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 5) Тумбочка медицинская Ortonica TM140 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 6) Тумбочка медицинская Ortonica TM150 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 7) Тумбочка медицинская Ortonica TM160 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 8) Тумбочка медицинская Ortonica TM170 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 3 шт.,
 - винт – 6 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 9) Тумбочка медицинская Ortonica TM180 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 4 шт.,
 - винт – 8 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 10) Тумбочка медицинская Ortonica TM200 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - опора – 4 шт.,

- саморез – 16 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 11) Тумбочка медицинская Ortonica TM210 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 12) Тумбочка медицинская Ortonica TM220 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 13) Тумбочка медицинская Ortonica TM230 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 14) Тумбочка медицинская Ortonica TM240 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 15) Тумбочка медицинская Ortonica TM250 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 3 шт.,
 - винт – 6 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 16) Тумбочка медицинская Ortonica TM260 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 4 шт.,
 - винт – 8 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 17) Тумбочка медицинская Ortonica TM270 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,

- винт – 2 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 18) Тумбочка медицинская Ortonica TM301 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 19) Тумбочка медицинская Ortonica TM302 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 20) Тумбочка медицинская Ortonica TM303 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 21) Тумбочка медицинская Ortonica TM304 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 22) Тумбочка медицинская Ortonica TM305 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 23) Тумбочка медицинская Ortonica TM306 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,

- саморез – 16 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 24) Тумбочка медицинская Ortonica TM307 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 3 шт.,
 - винт – 6 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 25) Тумбочка медицинская Ortonica TM308 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 4 шт.,
 - винт – 8 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 26) Тумбочка медицинская Ortonica TM309 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 27) Тумбочка медицинская Ortonica TM310 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ключ – 3 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 28) Тумбочка медицинская Ortonica TM311 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 29) Тумбочка медицинская Ortonica TM312 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ключ – 3 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 30) Тумбочка медицинская Ortonica TM313 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,

- винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 31) Тумбочка медицинская Ortonica TM314 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 32) Тумбочка медицинская Ortonica TM315 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 33) Тумбочка медицинская Ortonica TM316 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 3 шт.,
 - винт – 6 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 34) Тумбочка медицинская Ortonica TM317 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 35) Тумбочка медицинская Ortonica TM318 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ключ – 3 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 36) Тумбочка медицинская Ortonica TM319 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 37) Тумбочка медицинская Ortonica TM320 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,

- ручка – 2 шт.,
 - винт – 3 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 38) Тумбочка медицинская Ortonica TM321 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 3 шт.,
 - винт – 5 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 39) Тумбочка медицинская Ortonica TM322 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 40) Тумбочка медицинская Ortonica TM323 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 41) Тумбочка медицинская Ortonica TM324 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 42) Тумбочка медицинская Ortonica TM325 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 43) Тумбочка медицинская Ortonica TM326 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 3 шт.,
 - винт – 6 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

- 44) Тумбочка медицинская Ortonica TM327 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 45) Тумбочка медицинская Ortonica TM328 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 46) Тумбочка медицинская Ortonica TM329 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 47) Тумбочка медицинская Ortonica TM330 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 48) Тумбочка медицинская Ortonica TM331 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 49) Тумбочка медицинская Ortonica TM332 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 3 шт.,
 - винт – 6 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 50) Тумбочка медицинская Ortonica TM333 в составе:
- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 51) Тумбочка медицинская Ortonica TM334 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 52) Тумбочка медицинская Ortonica TM335 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 53) Тумбочка медицинская Ortonica TM336 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 54) Тумбочка медицинская Ortonica TM337 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 55) Тумбочка медицинская Ortonica TM338 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 56) Тумбочка медицинская Ortonica TM339 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - винт – 4 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 57) Тумбочка медицинская Ortonica TM340 в составе:
 - тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - ручка – 3 шт.,

- винт – 6 шт.,
- колесо без стопора – 2 шт.,
- колесо со стопором – 2 шт.,
- саморез – 16 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

58) Тумбочка медицинская Ortonica TM341 в составе:

- тумбочка медицинская Ortonica – 1 шт.,
- ручка – 2 шт.,
- винт – 4 шт.,
- колесо без стопора – 2 шт.,
- колесо со стопором – 2 шт.,
- саморез – 16 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

III. Стол надкроватный медицинский Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):

1) Стол надкроватный медицинский Ortonica CH100 в составе:

- стол надкроватный медицинский Ortonica – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

2) Стол надкроватный медицинский Ortonica CH150 в составе:

- стол надкроватный медицинский Ortonica – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

3) Стол надкроватный медицинский Ortonica CH200 в составе:

- стол надкроватный медицинский Ortonica – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

4) Стол надкроватный медицинский Ortonica CH250 в составе:

- стол надкроватный медицинский Ortonica – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

5) Стол надкроватный медицинский Ortonica CH300 в составе:

- стол надкроватный медицинский Ortonica – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

IV. Кушетка смотровая медицинская Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):

1) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC400 в составе:

- опора – 4 шт.,
- рама-основание – 1 шт.,
- ложе кушетки – 1 шт.,
- подголовник – 1 шт.,
- болт – 6 шт.,
- шуруп – 18 шт.,
- механизм регулировки угла наклона подголовника – 1 шт.,
- петля шарнирная – 2 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

2) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC405 в составе:

- рама-основание – 1 шт.,
- рама опорная – 2 шт.,
- связь поперечная – 2 шт.,
- ложе кушетки – 1 шт.,
- подголовник – 1 шт.,
- болт – 8 шт.,
- шуруп – 18 шт.,

- механизм регулировки угла наклона подголовника – 1 шт.,
 - петля шарнирная – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 3) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC410 в составе:
- рама опорная – 2 шт.,
 - связь поперечная – 2 шт.,
 - ложе кушетки – 1 шт.,
 - подголовник – 1 шт.,
 - болт – 8 шт.,
 - шуруп – 24 шт.,
 - механизм регулировки угла наклона подголовника – 1 шт.,
 - петля шарнирная – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 4) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC415 в составе:
- рама-основание – 1 шт.,
 - рама опорная – 2 шт.,
 - ложе кушетки – 1 шт.,
 - подголовник – 1 шт.,
 - болт – 8 шт.,
 - шуруп – 24 шт.,
 - механизм регулировки угла наклона подголовника – 1 шт.,
 - петля шарнирная – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 5) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC420 в составе:
- стойка (передняя, задняя) – 2 шт.,
 - рама-основание – 1 шт.,
 - ложе кушетки – 1 шт.,
 - подголовник – 1 шт.,
 - болт – 8 шт.,
 - шуруп – 24 шт.,
 - механизм регулировки угла наклона подголовника – 1 шт.,
 - петля шарнирная – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 6) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC425 в составе:
- стойка (передняя, задняя) – 2 шт.,
 - рама-основание – 1 шт.,
 - связь продольная – 1 шт.,
 - ложе кушетки – 1 шт.,
 - подголовник – 1 шт.,
 - болт – 10 шт.,
 - шуруп – 24 шт.,
 - механизм регулировки угла наклона подголовника – 1 шт.,
 - петля шарнирная – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 7) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC430 в составе:
- стойка (передняя, задняя) – 2 шт.,
 - рама-основание – 1 шт.,
 - связь продольная – 1 шт.,
 - ложе кушетки – 1 шт.,

- подголовник – 1 шт.,
 - болт – 10 шт.,
 - шуруп – 28 шт.,
 - механизм регулировки угла наклона подголовника – 1 шт.,
 - петля шарнирная – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 8) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC435 в составе:
- стойка (передняя, задняя) – 2 шт.,
 - связь продольная – 1 шт.,
 - ложе кушетки – 1 шт.,
 - подголовник – 1 шт.,
 - болт – 6 шт.,
 - шуруп – 12 шт.,
 - петля шарнирная – 2 шт.,
 - механизм регулировки угла наклона подголовника – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 9) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC440 в составе:
- ложе кушетки – 1 шт.,
 - подголовник – 1 шт.,
 - стойка (передняя, задняя) – 2 шт.,
 - перемычка – 2 шт.,
 - связь продольная – 2 шт.,
 - винт – 14 шт.,
 - шайба – 8 шт.,
 - гайка – 2 шт.,
 - механизм регулировки угла наклона подголовника – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 10) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC445 в составе:
- рама-основание – 1 шт.,
 - рама подголовника – 1 шт.,
 - стойка (передняя, задняя) – 2 шт.,
 - связь продольная – 1 шт.,
 - связь поперечная – 1 шт.,
 - механизм регулировки угла наклона подголовника – 2 шт.,
 - ложе кушетки – 1 шт.,
 - подголовник – 1 шт.,
 - болт – 16 шт.,
 - шуруп – 28 шт.,
 - петля шарнирная – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 11) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC450 в составе:
- рама-основание – 1 шт.,
 - рама опорная – 2 шт.,
 - ложе кушетки – 1 шт.,
 - подголовник – 1 шт.,
 - связь продольная – 1 шт.,
 - болт – 12 шт.,
 - шуруп – 24 шт.,
 - механизм регулировки угла наклона подголовника – 1 шт.,
 - петля шарнирная – 2 шт.,

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 12) Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC455 в составе:
 - рама-основание – 1 шт.,
 - стойка (передняя, задняя) – 2 шт.,
 - перемычка – 2 шт.,
 - ложе кушетки – 1 шт.,
 - подголовник – 1 шт.,
 - винт – 8 шт.,
 - шуруп – 14 шт.,
 - механизм регулировки угла наклона подголовника – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.

V. Банкетка медицинская Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):

- 1) Банкетка медицинская Ortonica БМ500 в составе:
 - рама опорная – 2 шт.,
 - перемычка – 2 шт.,
 - сиденье – 1 шт.,
 - винт – 8 шт.,
 - гайка – 8 шт.,
 - саморез – 6 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 2) Банкетка медицинская Ortonica БМ505 в составе:
 - банкетка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 3) Банкетка медицинская Ortonica БМ510 в составе:
 - сиденье – 1 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - винт – 8 шт.,
 - шайба – 8 шт.,
 - гайка – 8 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 4) Банкетка медицинская Ortonica БМ515 в составе:
 - рама опорная – 2 шт.,
 - связь продольная – 3 шт.,
 - сиденье – 1 шт.,
 - болт – 6 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 5) Банкетка медицинская Ortonica БМ520 в составе:
 - банкетка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 6) Банкетка медицинская Ortonica БМ525 в составе:
 - банкетка медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 7) Банкетка медицинская Ortonica БМ530 в составе:
 - рама опорная – 2 шт.,
 - рама основания – 1 шт.,
 - рама спинки – 1 шт.,
 - сиденье – 1 шт.,

- спинка – 1 шт.,
 - болт – 12 шт.,
 - гайка – 12 шт.,
 - шайба – 12 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 8) Банкетка медицинская Ortonica БМ535 в составе:
- рама опорная – 2 шт.,
 - связь продольная – 2 шт.,
 - сиденье – 1 шт.,
 - спинка – 1 шт.,
 - винт – 10 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 9) Банкетка медицинская Ortonica БМ540 в составе:
- рама опорная – 2 шт.,
 - связь продольная – 3 шт.,
 - сиденье – 1 шт.,
 - спинка – 1 шт.,
 - винт – 10 шт.,
 - саморез – 5 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 10) Банкетка медицинская Ortonica БМ545 в составе:
- рама опорная – 2 шт.,
 - рама основания – 1 шт.,
 - сиденье – 1 шт.,
 - спинка – 1 шт.,
 - болт – 12 шт.,
 - гайка – 12 шт.,
 - шайба – 12 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 11) Банкетка медицинская Ortonica БМ550 в составе:
- рама опорная – 2 шт.,
 - связь продольная – 2 шт.,
 - рама спинки – 1 шт.,
 - сиденье – 1 шт.,
 - спинка – 1 шт.,
 - болт – 8 шт.,
 - гайка – 8 шт.,
 - шайба – 8 шт.,
 - саморез – 24 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 12) Банкетка медицинская Ortonica БМ555 в составе:
- рама опорная – 2 шт.,
 - связь продольная – 3 шт.,
 - спинка – 1 шт.,
 - сиденье – 1 шт.,
 - винт – 14 шт.,
 - шайба – 4 шт.,

- саморез – 3 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

13) Банкетка медицинская Ortonica BM560 в составе:

- рама опорная – 2 шт.,
 - связь продольная – 4 шт.,
 - сиденье – 1 шт.,
 - спинка – 1 шт.,
 - подлокотник – 2 шт.,
 - болт – 8 шт.,
 - саморез – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

14) Банкетка медицинская Ortonica BM565 в составе:

- рама опорная – 3 шт.,
- связь продольная – 2 шт.,
- рама спинки – 1 шт.,
- сиденье – 1 шт.,
- спинка – 1 шт.,
- болт – 12 шт.,
- гайка – 12 шт.,
- шайба – 12 шт.,
- саморез – 32 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

VI. Ступенька медицинская Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):

1) Ступенька медицинская Ortonica CM600 в составе:

- ступенька медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

2) Ступенька медицинская Ortonica CM610 в составе:

- ступенька медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

3) Ступенька медицинская Ortonica CM620 в составе:

- ступенька медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

4) Ступенька медицинская Ortonica CM630 в составе:

- ступенька медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

5) Ступенька медицинская Ortonica CM640 в составе:

- ступенька медицинская Ortonica – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

6) Ступенька медицинская Ortonica CM650 в составе:

- ступенька медицинская Ortonica – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

VII. Стол палатный медицинский Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):

1) Стол палатный медицинский Ortonica СПМ700 в составе:

- столешница – 1 шт.,
- каркас-основание – 1 шт.,
- опора – 4 шт.,
- гайка – 4 шт.,

- шайба – 4 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 2) Стол палатный медицинский Ortonica СПМ710 в составе:
 - столешница – 1 шт.,
 - каркас-основание – 1 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - гайка – 4 шт.,
 - шайба – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 3) Стол палатный медицинский Ortonica СПМ720 в составе:
 - столешница – 1 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 4) Стол палатный медицинский Ortonica СПМ730 в составе:
 - каркас-столешница – 1 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - гайка – 4 шт.,
 - шайба – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 5) Стол палатный медицинский Ortonica СПМ740 в составе:
 - каркас-столешница – 1 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - гайка – 4 шт.,
 - шайба – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 6) Стол палатный медицинский Ortonica СПМ750 в составе:
 - столешница – 1 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 7) Стол палатный медицинский Ortonica СПМ760 в составе:
 - столешница – 1 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - или
- 8) Стол палатный медицинский Ortonica СПМ770 в составе:
 - столешница – 1 шт.,
 - каркас-основание – 1 шт.,
 - опора – 4 шт.,
 - гайка – 4 шт.,
 - шайба – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- VIII. Стол манипуляционный медицинский Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):
 - 1) Стол манипуляционный медицинский Ortonica СММ800 в составе:
 - стойка – 2 шт.,
 - поперечина – 4 шт.,
 - полка – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,

- винт – 12 шт.,
- шайба – 4 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 2) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM805 в составе:
 - стойка – 2 шт.,
 - поперечина – 4 шт.,
 - полка – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - винт – 12 шт.,
 - шайба – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 3) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM810 в составе:
 - стойка – 2 шт.,
 - рама – 2 шт.,
 - поперечина – 1 шт.,
 - полка (поддон) – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - винт – 6 шт.,
 - шайба – 4 шт.,
 - фиксатор – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 4) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM815 в составе:
 - стойка – 2 шт.,
 - поперечина – 4 шт.,
 - корзина – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 8 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 5) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM820 в составе:
 - стойка – 2 шт.,
 - поперечина – 6 шт.,
 - полка – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 12 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или
- 6) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM825 в составе:
 - стойка – 2 шт.,
 - поперечина – 6 шт.,
 - полка (поддон) – 3 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - винт – 16 шт.,
 - шайба – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
или

- 7) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM830 в составе:
- стойка – 2 шт.,
 - поперечина – 2 шт.,
 - рама – 3 шт.,
 - полка – 3 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 16 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 8) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM835 в составе:
- стойка – 3 шт.,
 - полка (поддон) – 3 шт.,
 - винт – 16 шт.,
 - гайка – 12 шт.,
 - шайба – 16 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 9) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM840 в составе:
- рама-основание – 1 шт.,
 - кронштейн – 1 шт.,
 - столешница – 1 шт.,
 - фиксатор – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 10) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM845 в составе:
- рама-основание – 1 шт.,
 - телескопическая стойка – 1 шт.,
 - столешница с кронштейном – 1 шт.,
 - фиксатор – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 11) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM850 в составе:
- стойка – 2 шт.,
 - поперечина – 2 шт.,
 - полка (поддон) – 2 шт.,
 - ящик – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 10 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 12) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM855 в составе:
- корпус с ящиком – 1 шт.,

- стойка – 3 шт.,
 - рама поперечная – 2 шт.,
 - полка (поддон) – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 4 шт.,
 - винт – 12 шт.,
 - болт – 4 шт.,
 - шайба – 16 шт.,
 - гайка – 8 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

13) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM860 в составе:

- корпус с двумя ящиками – 1 шт.,
 - рама – 1 шт.,
 - полка (поддон) – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 4 шт.,
 - винт – 10 шт.,
 - шайба – 10 шт.,
 - ручка – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

14) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM865 в составе:

- стойка – 2 шт.,
 - поперечина – 6 шт.,
 - ящик – 1 шт.,
 - полка (поддон) – 3 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - ручка – 1 шт.,
 - винт – 18 шт.,
 - шайба – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

15) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM870 в составе:

- стойка – 2 шт.,
 - рама поперечная с ручками – 1 шт.,
 - поперечина – 4 шт.,
 - ящик – 1 шт.,
 - кронштейн поворотный – 1 шт.,
 - тазик почкообразный – 1 шт.,
 - полка (поддон) – 3 шт.,
 - ключ – 3 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колесо со стопором – 2 шт.,
 - болт – 12 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

16) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM875 в составе:

- стойка – 2 шт.,
- поперечина – 6 шт.,
- ящик – 2 шт.,
- полка (поддон) – 2 шт.,
- колесо без стопора – 2 шт.,
- колесо со стопором – 2 шт.,

- ручка – 2 шт.,
- винт – 20 шт.,
- шайба – 4 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

17) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM880 в составе:

- стойка – 2 шт.,
- корпус с ящиком – 2 шт.,
- полка (поддон) – 3 шт.,
- колесо без стопора – 2 шт.,
- колесо со стопором – 2 шт.,
- болт – 8 шт.,
- ручка – 2 шт.,
- винт – 4 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

18) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM885 в составе:

- стойка – 2 шт.,
- поперечина – 8 шт.,
- ящик – 3 шт.,
- полка (поддон) – 2 шт.,
- колесо без стопора – 2 шт.,
- колесо со стопором – 2 шт.,
- ручка – 3 шт.,
- винт – 26 шт.,
- шайба – 4 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

19) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM890 в составе:

- стойка – 2 шт.,
- поперечина – 8 шт.,
- ящик – 4 шт.,
- полка (поддон) – 1 шт.,
- колесо без стопора – 2 шт.,
- колесо со стопором – 2 шт.,
- ручка – 4 шт.,
- винт – 28 шт.,
- шайба – 4 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

или

20) Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM895 в составе:

- стойка – 2 шт.,
- корпус с ящиком – 2 шт.,
- корпус с четырьмя ящиками – 1 шт.,
- полка (поддон) – 1 шт.,
- колесо без стопора – 2 шт.,
- колесо со стопором – 2 шт.,
- болт – 12 шт.,
- ручка – 6 шт.,
- винт – 12 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

IX. Ширма медицинская Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):

1) Ширма медицинская Ortonica ШМ100 в составе:

- экран – 1 шт.,

- поперечина – 2 шт.,
 - стойка одинарная – 1 шт.,
 - стойка двойная – 1 шт.,
 - колодка соединительная – 4 шт.,
 - болт – 6 шт.,
 - шайба – 6 шт.,
 - гайка – 2 шт.,
 - заглушка – 5 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 2) Ширма медицинская Ortonica ШМ110 в составе:
- экран – 1 шт.,
 - стойка одинарная – 2 шт.,
 - опора – 2 шт.,
 - поперечина – 2 шт.,
 - колодка угловая – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 3) Ширма медицинская Ortonica ШМ120 в составе:
- рама на опорах – 1 шт.,
 - экран – 1 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 4) Ширма медицинская Ortonica ШМ130 в составе:
- экран – 1 шт.,
 - поперечина – 2 шт.,
 - стойка одинарная – 1 шт.,
 - стойка двойная – 1 шт.,
 - колодка соединительная – 4 шт.,
 - болт – 6 шт.,
 - шайба – 6 шт.,
 - гайка – 2 шт.,
 - заглушка – 5 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 5) Ширма медицинская Ortonica ШМ140 в составе:
- рама – 1 шт.,
 - опора – 1 шт.,
 - экран – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 2 шт.,
 - колодка соединительная – 4 шт.,
 - винт – 2 шт.,
 - шайба – 2 шт.,
 - гайка – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 6) Ширма медицинская Ortonica ШМ150 в составе:
- рама – 1 шт.,
 - опора – 2 шт.,
 - экран – 1 шт.,
 - колесо без стопора – 4 шт.,
 - болт – 2 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.

- или
- 7) Ширма медицинская Ortonica ШМ200 в составе:
- рама на опорах – 2 шт.,
 - экран – 2 шт.,
 - петля шарнирная – 2 шт.,
 - саморез – 12 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 8) Ширма медицинская Ortonica ШМ210 в составе:
- экран – 2 шт.,
 - поперечина – 4 шт.,
 - стойка одинарная – 2 шт.,
 - стойка двойная – 2 шт.,
 - колодка соединительная – 8 шт.,
 - болт – 12 шт.,
 - шайба – 12 шт.,
 - гайка – 4 шт.,
 - заглушка – 10 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 9) Ширма медицинская Ortonica ШМ220 в составе:
- экран – 2 шт.,
 - поперечина – 4 шт.,
 - стойка одинарная – 2 шт.,
 - стойка двойная – 2 шт.,
 - колесо без стопора – 6 шт.,
 - колодка соединительная – 8 шт.,
 - болт – 12 шт.,
 - шайба – 12 шт.,
 - гайка – 4 шт.,
 - заглушка – 4 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 10) Ширма медицинская Ortonica ШМ230 в составе:
- экран – 2 шт.,
 - стойка одинарная – 4 шт.,
 - опора – 2 шт.,
 - поперечина – 4 шт.,
 - колодка угловая – 8 шт.,
 - колесо без стопора – 1 шт.,
 - петля шарнирная – 2 шт.,
 - саморез – 12 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 11) Ширма медицинская Ortonica ШМ300 в составе:
- рама на опорах – 3 шт.,
 - экран – 3 шт.,
 - петля шарнирная – 4 шт.,
 - саморез – 24 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или
- 12) Ширма медицинская Ortonica ШМ310 в составе:
- экран – 3 шт.,
 - поперечина – 6 шт.,

- стойка одинарная – 3 шт.,
 - стойка двойная – 3 шт.,
 - колодка соединительная – 12 шт.,
 - болт – 18 шт.,
 - шайба – 18 шт.,
 - гайка – 6 шт.,
 - заглушка – 15 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

13) Ширма медицинская Ortonica ШМ320 в составе:

- рама – 3 шт.,
 - экран – 3 шт.,
 - опора – 2 шт.,
 - болт – 2 шт.,
 - петля шарнирная – 4 шт.,
 - саморез – 24 шт.,
 - колесо без стопора – 6 шт.,
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
- или

14) Ширма медицинская Ortonica ШМ400 в составе:

- рама на опорах – 4 шт.,
- экран – 4 шт.,
- поперечина – 2 шт.,
- петля шарнирная – 6 шт.,
- саморез – 36 шт.,
- колесо без стопора – 7 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Комплектация медицинского изделия Мебель медицинская для кабинетов и палат Ortonica по ТУ 32.50.30-012-66445146-2018 в наборе

Наименование	Кол-во, шт.
Мебель медицинская для кабинетов и палат Ortonica по ТУ 32.50.30-012-66445146-2018 в наборе, варианты исполнения:	
<i>1. Стол прикроватный медицинский Ortonica в вариантах исполнения:</i>	
1. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП100 в составе:	
- опорная часть рамы	1
- неподвижная вертикальная часть рамы	1
- подвижная вертикальная часть рамы	1
- столешница с кронштейном	1
- ограничитель поворота столешницы	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	2
- болт	3
- гайка	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
2. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП150 в составе:	
- телескопическая стойка	2
- U-образная рама	1
- столешница с кронштейном	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	2
- болт	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
3. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП200 в составе:	
- опорная часть рамы	1
- неподвижная вертикальная часть рамы	1
- подвижная вертикальная часть рамы	1
- столешница с кронштейном	1
- ограничитель поворота столешницы	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	2
- болт	3
- гайка	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
4. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП250 в составе:	
- столешница с кронштейном	1
- L-образная рама	1
- T-образная рама	1
- фиксатор	1
- колесо без стопора	2

- колесо со стопором	1
- болт	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
5. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП300 в составе:	
- опорная часть рамы	1
- неподвижная вертикальная часть рамы	1
- подвижная вертикальная часть рамы	1
- столешница с кронштейном	1
- ограничитель поворота столешницы	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	2
- болт	3
- гайка	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
6. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП350 в составе:	
- опорная часть рамы	1
- неподвижная вертикальная часть рамы	1
- подвижная вертикальная часть рамы	1
- столешница с кронштейном	1
- ограничитель поворота столешницы	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	2
- болт	3
- гайка	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
7. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП400 в составе:	
- телескопическая стойка	1
- U-образная рама	1
- столешница с кронштейном	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	2
- болт	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
8. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП450 в составе:	
- телескопическая стойка	1
- U-образная рама	1
- столешница с кронштейном	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	3
- болт	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
9. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП500 в составе:	
- опорная часть рамы	1

- неподвижная вертикальная часть рамы	1
- подвижная вертикальная часть рамы	1
- столешница с кронштейном	1
- ограничитель поворота столешницы	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	1
- болт	3
- гайка	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
10. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП550 в составе:	
- опорная часть рамы	1
- неподвижная вертикальная часть рамы	1
- подвижная вертикальная часть рамы	1
- столешница с кронштейном	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	1
- болт	3
- гайка	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
11. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП600 в составе:	
- телескопическая стойка	1
- опорная рама с креплением	1
- столешница с кронштейном	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	1
- болт	3
- руководство по эксплуатации	1
или	
12. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП650 в составе:	
- столешница	1
- крепление столешницы	4
- саморез	8
- П-образная телескопическая стойка	2
- U-образная рама	1
- фиксатор	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
13. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП700 в составе:	
- столешница	1
- крепление столешницы	4
- саморез	8
- П-образная телескопическая стойка	2
- U-образная рама	1
- фиксатор	4
- колесо без стопора	2

- руководство по эксплуатации	1
или	
14. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП750 в составе:	
- U-образная двойная рама	1
- крепление столешницы	4
- саморез	8
- столешница	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
15. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП800 в составе:	
- телескопическая стойка	1
- U-образная рама с перемычкой	1
- столешница с кронштейном	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	1
- болт	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
16. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП850 в составе:	
- столешница с кронштейном	1
- телескопическая стойка	1
- болт	6
- фиксатор	1
- гайка	1
- крепежная пластина	1
- втулка	2
- H-образная рама	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
17. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП900 в составе:	
- столешница с кронштейном	1
- телескопическая стойка	1
- болт	6
- фиксатор	1
- гайка	1
- крепежная пластина	1
- втулка	2
- H-образная рама	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
18. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП950 в составе:	
- телескопическая стойка	2
- U-образная рама с перемычкой	1
- столешница	1
- колесо без стопора	2

- колесо со стопором	2
- фиксатор	2
- болт	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
19. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1000 в составе:	
- стол прикроватный медицинский Ortonica	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
20. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1050 в составе:	
- Н-образная рама	1
- телескопическая стойка	1
- столешница с механизмом регулировки угла наклона	1
- столешница с кронштейном	1
- фиксатор	3
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	3
- руководство по эксплуатации	1
или	
21. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1100 в составе:	
- Н-образная рама	1
- телескопическая стойка	1
- столешница с механизмом регулировки угла наклона	1
- столешница с кронштейном	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	2
- болт	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
22. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1150 в составе:	
- П-образная рама	1
- телескопическая стойка	1
- столешница с механизмом регулировки угла наклона	1
- столешница с кронштейном	1
- фиксатор	3
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
23. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1200 в составе:	
- Н-образная рама	1
- телескопическая стойка	1
- столешница с механизмом регулировки угла наклона	1
- столешница с кронштейном	1
- фиксатор	3
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2

- болт	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
24. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1250 в составе:	
- Н-образная рама	1
- телескопическая стойка	1
- столешница с механизмом регулировки угла наклона	1
- столешница с кронштейном	1
- фиксатор	2
- саморез	4
- гайка	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
25. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1300 в составе:	
- U-образная рама	1
- телескопическая Г-образная стойка	1
- столешница с механизмом регулировки угла наклона	1
- столешница с кронштейном	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- фиксатор	2
- болт	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
26. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1350 в составе:	
- столешница с механизмом регулировки угла наклона	1
- столешница с кронштейном	1
- телескопическая стойка	1
- Н-образная рама	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	4
- фиксатор	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
27. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1400 в составе:	
- Н-образная рама	1
- телескопическая стойка	1
- столешница с механизмом регулировки угла наклона	1
- корзина	1
- столешница с кронштейном	1
- фиксатор	2
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
28. Стол прикроватный медицинский Ortonica СП1450 в составе:	
- П-образная рама	1

- телескопическая стойка	1
- столешница с механизмом регулировки угла наклона	1
- столешница с кронштейном	1
- фиксатор	3
- упор регулировки угла наклона стойки	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	6
- руководство по эксплуатации	1
II. Тумбочка медицинская Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):	
1. Тумбочка медицинская Ortonica TM100 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
2. Тумбочка медицинская Ortonica TM110 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
3. Тумбочка медицинская Ortonica TM120 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
4. Тумбочка медицинская Ortonica TM130 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
5. Тумбочка медицинская Ortonica TM140 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
6. Тумбочка медицинская Ortonica TM150 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
7. Тумбочка медицинская Ortonica TM160 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- руководство по эксплуатации	1

или 8. Тумбочка медицинская Ortonica TM170 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	3
- винт	6
- руководство по эксплуатации	1
или 9. Тумбочка медицинская Ortonica TM180 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	4
- винт	8
- руководство по эксплуатации	1
или 10. Тумбочка медицинская Ortonica TM200 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- опора	4
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 11. Тумбочка медицинская Ortonica TM210 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- опора	4
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 12. Тумбочка медицинская Ortonica TM220 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- опора	4
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 13. Тумбочка медицинская Ortonica TM230 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- опора	4
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 14. Тумбочка медицинская Ortonica TM240 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- опора	4
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1

или 15. Тумбочка медицинская Ortonica TM250 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	3
- винт	6
- опора	4
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 16. Тумбочка медицинская Ortonica TM260 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	4
- винт	8
- опора	4
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 17. Тумбочка медицинская Ortonica TM270 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- руководство по эксплуатации	1
или 18. Тумбочка медицинская Ortonica TM301 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 19. Тумбочка медицинская Ortonica TM302 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 20. Тумбочка медицинская Ortonica TM303 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 21. Тумбочка медицинская Ortonica TM304 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1

- ручка - винт - колесо без стопора - колесо со стопором - саморез - руководство по эксплуатации	2 4 2 2 16 1
или 22. Тумбочка медицинская Ortonica TM305 в составе: - тумбочка медицинская Ortonica - ручка - винт - колесо без стопора - колесо со стопором - саморез - руководство по эксплуатации	1 2 4 2 2 16 1
или 23. Тумбочка медицинская Ortonica TM306 в составе: - тумбочка медицинская Ortonica - ручка - винт - колесо без стопора - колесо со стопором - саморез - руководство по эксплуатации	1 2 4 2 2 16 1
или 24. Тумбочка медицинская Ortonica TM307 в составе: - тумбочка медицинская Ortonica - ручка - винт - колесо без стопора - колесо со стопором - саморез - руководство по эксплуатации	1 3 6 2 2 16 1
или 25. Тумбочка медицинская Ortonica TM308 в составе: - тумбочка медицинская Ortonica - ручка - винт - колесо без стопора - колесо со стопором - саморез - руководство по эксплуатации	1 4 8 2 2 16 1
или 26. Тумбочка медицинская Ortonica TM309 в составе: - тумбочка медицинская Ortonica - ручка - винт - колесо без стопора - колесо со стопором - руководство по эксплуатации	1 1 2 2 2 1
или 27. Тумбочка медицинская Ortonica TM310 в составе:	

- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ключ	3
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
28. Тумбочка медицинская Ortonica TM311 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
29. Тумбочка медицинская Ortonica TM312 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ключ	3
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
30. Тумбочка медицинская Ortonica TM313 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
31. Тумбочка медицинская Ortonica TM314 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
32. Тумбочка медицинская Ortonica TM315 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
33. Тумбочка медицинская Ortonica TM316 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	3
- винт	6
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2

- руководство по эксплуатации	1
или	
34. Тумбочка медицинская Ortonica TM317 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
35. Тумбочка медицинская Ortonica TM318 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ключ	3
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
36. Тумбочка медицинская Ortonica TM319 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
37. Тумбочка медицинская Ortonica TM320 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	3
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
38. Тумбочка медицинская Ortonica TM321 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	3
- винт	5
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
39. Тумбочка медицинская Ortonica TM322 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1

или 40. Тумбочка медицинская Ortonica TM323 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или 41. Тумбочка медицинская Ortonica TM324 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или 42. Тумбочка медицинская Ortonica TM325 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или 43. Тумбочка медицинская Ortonica TM326 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	3
- винт	6
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или 44. Тумбочка медицинская Ortonica TM327 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или 45. Тумбочка медицинская Ortonica TM328 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или 46. Тумбочка медицинская Ortonica TM329 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1

- винт	2
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
47. Тумбочка медицинская Ortonica TM330 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
48. Тумбочка медицинская Ortonica TM331 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
49. Тумбочка медицинская Ortonica TM332 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	3
- винт	6
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
50. Тумбочка медицинская Ortonica TM333 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	1
- винт	2
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
51. Тумбочка медицинская Ortonica TM334 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
52. Тумбочка медицинская Ortonica TM335 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1

или 53. Тумбочка медицинская Ortonica TM336 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или 54. Тумбочка медицинская Ortonica TM337 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или 55. Тумбочка медицинская Ortonica TM338 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или 56. Тумбочка медицинская Ortonica TM339 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 57. Тумбочка медицинская Ortonica TM340 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	3
- винт	6
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 58. Тумбочка медицинская Ortonica TM341 в составе:	
- тумбочка медицинская Ortonica	1
- ручка	2
- винт	4
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
III. Стол надкроватный медицинский Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):	

1. Стол надкроватный медицинский Ortonica CH100 в составе:	
- стол надкроватный медицинский Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
2. Стол надкроватный медицинский Ortonica CH150 в составе:	
- стол надкроватный медицинский Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
3. Стол надкроватный медицинский Ortonica CH200 в составе:	
- стол надкроватный медицинский Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
4. Стол надкроватный медицинский Ortonica CH250 в составе:	
- стол надкроватный медицинский Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
5. Стол надкроватный медицинский Ortonica CH300 в составе:	
- стол надкроватный медицинский Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
<i>IV. Кушетка смотровая медицинская Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):</i>	
1. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC400 в составе:	
- опора	4
- рама-основание	1
- ложе кушетки	1
- подголовник	1
- болт	6
- шуруп	18
- механизм регулировки угла наклона подголовника	1
- петля шарнирная	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
2. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC405 в составе:	
- рама-основание	1
- рама опорная	2
- связь поперечная	2
- ложе кушетки	1
- подголовник	1
- болт	8
- шуруп	18
- механизм регулировки угла наклона подголовника	1
- петля шарнирная	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
3. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC410 в составе:	
- рама опорная	2
- связь поперечная	2
- ложе кушетки	1
- подголовник	1
- болт	8
- шуруп	24
- механизм регулировки угла наклона подголовника	1
- петля шарнирная	2

- руководство по эксплуатации	1
или	
4. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC415 в составе:	
- рама-основание	1
- рама опорная	2
- ложе кушетки	1
- подголовник	1
- болт	8
- шуруп	24
- механизм регулировки угла наклона подголовника	1
- петля шарнирная	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
5. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC420 в составе:	
- стойка (передняя, задняя)	2
- рама-основание	1
- ложе кушетки	1
- подголовник	1
- болт	8
- шуруп	24
- механизм регулировки угла наклона подголовника	1
- петля шарнирная	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
6. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC425 в составе:	
- стойка (передняя, задняя)	2
- рама-основание	1
- связь продольная	1
- ложе кушетки	1
- подголовник	1
- болт	10
- шуруп	24
- механизм регулировки угла наклона подголовника	1
- петля шарнирная	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
7. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC430 в составе:	
- стойка (передняя, задняя)	2
- рама-основание	1
- связь продольная	1
- ложе кушетки	1
- подголовник	1
- болт	10
- шуруп	28
- механизм регулировки угла наклона подголовника	1
- петля шарнирная	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
8. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC435 в составе:	
- стойка (передняя, задняя)	2
- связь продольная	1
- ложе кушетки	1

- подголовник	1
- болт	6
- шуруп	12
- механизм регулировки угла наклона подголовника	1
- петля шарнирная	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
9. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC440 в составе:	
- ложе кушетки	1
- подголовник	1
- стойка (передняя, задняя)	2
- перемычка	2
- связь продольная	2
- винт	14
- шайба	8
- гайка	2
- механизм регулировки угла наклона подголовника	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
10. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC445 в составе:	
- рама-основание	1
- рама подголовника	1
- стойка (передняя, задняя)	2
- связь продольная	1
- связь поперечная	1
- механизм регулировки угла наклона подголовника	2
- ложе кушетки	1
- подголовник	1
- болт	16
- шуруп	28
- петля шарнирная	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
11. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC450 в составе:	
- рама-основание	1
- рама опорная	2
- ложе кушетки	1
- подголовник	1
- связь продольная	1
- болт	12
- шуруп	24
- механизм регулировки угла наклона подголовника	1
- петля шарнирная	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
12. Кушетка смотровая медицинская Ortonica KC455 в составе:	
- рама-основание	1
- стойка (передняя, задняя)	2
- перемычка	2
- ложе кушетки	1
- подголовник	1
- винт	8

- шуруп	14
- механизм регулировки угла наклона подголовника	1
- руководство по эксплуатации	1
<i>V. Банкетка медицинская Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):</i>	
1. Банкетка медицинская Ortonica БМ500 в составе:	
- рама опорная	2
- перемычка	2
- сиденье	1
- винт	8
- гайка	8
- саморез	6
- руководство по эксплуатации	1
или	
2. Банкетка медицинская Ortonica БМ505 в составе:	
- банкетка медицинская Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
3. Банкетка медицинская Ortonica БМ510 в составе:	
- сиденье	1
- опора	4
- винт	8
- шайба	8
- гайка	8
- руководство по эксплуатации	1
или	
4. Банкетка медицинская Ortonica БМ515 в составе:	
- рама опорная	2
- связь продольная	3
- сиденье	1
- болт	6
- руководство по эксплуатации	1
или	
5. Банкетка медицинская Ortonica БМ520 в составе:	
- банкетка медицинская Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
6. Банкетка медицинская Ortonica БМ525 в составе:	
- банкетка медицинская Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
7. Банкетка медицинская Ortonica БМ530 в составе:	
- рама опорная	2
- рама основания	1
- рама спинки	1
- сиденье	1
- спинка	1
- болт	12
- гайка	12
- шайба	12
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1

или 8. Банкетка медицинская Ortonica БМ535 в составе:	
- рама опорная	2
- связь продольная	2
- сиденье	1
- спинка	1
- винт	10
- руководство по эксплуатации	1
или 9. Банкетка медицинская Ortonica БМ540 в составе:	
- рама опорная	2
- связь продольная	3
- сиденье	1
- спинка	1
- винт	10
- саморез	5
- руководство по эксплуатации	1
или 10. Банкетка медицинская Ortonica БМ545 в составе:	
- рама опорная	2
- рама основания	1
- сиденье	1
- спинка	1
- болт	12
- гайка	12
- шайба	12
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или 11. Банкетка медицинская Ortonica БМ550 в составе:	
- рама опорная	2
- связь продольная	2
- рама спинки	1
- сиденье	1
- спинка	1
- болт	8
- гайка	8
- шайба	8
- саморез	24
- руководство по эксплуатации	1
или 12. Банкетка медицинская Ortonica БМ555 в составе:	
- рама опорная	2
- связь продольная	3
- спинка	1
- сиденье	1
- винт	14
- шайба	4
- саморез	3
- руководство по эксплуатации	1
или 13. Банкетка медицинская Ortonica БМ560 в составе:	

- рама опорная	2
- связь продольная	4
- спинка	1
- сиденье	1
- подлокотник	2
- болт	8
- саморез	16
- руководство по эксплуатации	1
или	
14. Банкетка медицинская Ortonica БМ565 в составе:	
- рама опорная	3
- связь продольная	2
- рама спинки	1
- сиденье	1
- спинка	1
- болт	12
- гайка	12
- шайба	12
- саморез	32
- руководство по эксплуатации	1
VI. Ступенька медицинская Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):	
1. Ступенька медицинская Ortonica СМ600 в составе:	
- ступенька медицинская Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
2. Ступенька медицинская Ortonica СМ610 в составе:	
- ступенька медицинская Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
3. Ступенька медицинская Ortonica СМ620 в составе:	
- ступенька медицинская Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
4. Ступенька медицинская Ortonica СМ630 в составе:	
- ступенька медицинская Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
5. Ступенька медицинская Ortonica СМ640 в составе:	
- ступенька медицинская Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
6. Ступенька медицинская Ortonica СМ650 в составе:	
- ступенька медицинская Ortonica	1
- руководство по эксплуатации	1
VII. Стол палатный медицинский Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):	
1. Стол палатный медицинский Ortonica СПМ700 в составе:	
- столешница	1
- каркас-основание	1
- опора	4
- гайка	4
- шайба	4

- руководство по эксплуатации	1
или	
2. Стол палатный медицинский Ortonica СПМ710 в составе:	
- столешница	1
- каркас-основание	1
- опора	4
- гайка	4
- шайба	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
3. Стол палатный медицинский Ortonica СПМ720 в составе:	
- столешница	1
- опора	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
4. Стол палатный медицинский Ortonica СПМ730 в составе:	
- каркас-столешница	1
- опора	4
- гайка	4
- шайба	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
5. Стол палатный медицинский Ortonica СПМ740 в составе:	
- каркас-столешница	1
- опора	4
- гайка	4
- шайба	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
6. Стол палатный медицинский Ortonica СПМ750 в составе:	
- столешница	1
- опора	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
7. Стол палатный медицинский Ortonica СПМ760 в составе:	
- столешница	1
- опора	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
8. Стол палатный медицинский Ortonica СПМ770 в составе:	
- столешница	1
- каркас-основание	1
- опора	4
- гайка	4
- шайба	4
- руководство по эксплуатации	1
<i>VIII. Стол манипуляционный медицинский Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):</i>	
1. Стол манипуляционный медицинский Ortonica СММ800 в составе:	
- стойка	2
- поперечина	4

- полка - колесо без стопора - колесо со стопором - винт - шайба - руководство по эксплуатации	2 2 2 12 4 1
или 2. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM805 в составе: - стойка - поперечина - полка - колесо без стопора - колесо со стопором - винт - шайба - руководство по эксплуатации	2 4 2 2 2 12 4 1
или 3. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM810 в составе: - стойка - рама - поперечина - полка (поддон) - колесо без стопора - колесо со стопором - винт - шайба - фиксатор - руководство по эксплуатации	2 2 1 2 2 2 6 4 4 1
или 4. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM815 в составе: - стойка - поперечина - корзина - колесо без стопора - колесо со стопором - болт - руководство по эксплуатации	2 4 2 2 2 8 1
или 5. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM820 в составе: - стойка - поперечина - полка - колесо без стопора - колесо со стопором - болт - руководство по эксплуатации	2 6 2 2 2 12 1
или 6. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM825 в составе: - стойка - поперечина - полка (поддон) - колесо без стопора	2 6 3 2

- колесо со стопором	2
- винт	16
- шайба	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
7. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM830 в составе:	
- стойка	2
- поперечина	2
- рама	3
- полка	3
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	16
- руководство по эксплуатации	1
или	
8. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM835 в составе:	
- стойка	3
- полка (поддон)	3
- винт	16
- гайка	12
- шайба	16
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
9. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM840 в составе:	
- рама – основание	1
- кронштейн	1
- столешница	1
- фиксатор	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
10. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM845 в составе:	
- рама – основание	1
- телескопическая стойка	1
- столешница с кронштейном	1
- фиксатор	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
11. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM850 в составе:	
- стойка	2
- поперечина	2
- полка (поддон)	2
- ящик	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2

- болт	10
- ручка	1
- винт	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
12. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM855 в составе:	
- корпус с ящиком	1
- стойка	3
- рама поперечная	2
- полка (поддон)	2
- колесо без стопора	4
- винт	12
- болт	4
- шайба	16
- гайка	8
- ручка	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
13. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM860 в составе:	
- корпус с двумя ящиками	1
- рама	1
- полка (поддон)	2
- колесо без стопора	4
- винт	10
- шайба	10
- ручка	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
14. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM865 в составе:	
- стойка	2
- поперечина	6
- ящик	1
- полка (поддон)	3
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- ручка	1
- винт	18
- шайба	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
15. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM870 в составе:	
- стойка	2
- рама поперечная с ручками	1
- поперечина	4
- ящик	1
- кронштейн поворотный	1
- тазик почкообразный	1
- полка (поддон)	3
- ключ	3
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	12

- руководство по эксплуатации	1
или	
16. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM875 в составе:	
- стойка	2
- поперечина	6
- ящик	2
- полка (поддон)	2
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- ручка	2
- винт	20
- шайба	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
17. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM880 в составе:	
- стойка	2
- корпус с ящиком	2
- полка (поддон)	3
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	8
- ручка	2
- винт	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
18. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM885 в составе:	
- стойка	2
- поперечина	8
- ящик	3
- полка (поддон)	2
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- ручка	3
- винт	26
- шайба	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
19. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM890 в составе:	
- стойка	2
- поперечина	8
- ящик	4
- полка (поддон)	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- ручка	4
- винт	28
- шайба	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
20. Стол манипуляционный медицинский Ortonica CMM895 в составе:	
- стойка	2
- корпус с ящиком	2

- корпус с четырьмя ящиками	1
- полка (поддон)	1
- колесо без стопора	2
- колесо со стопором	2
- болт	12
- ручка	6
- винт	12
- руководство по эксплуатации	1
IX. Ширма медицинская Ortonica в вариантах исполнения (при необходимости):	
1. Ширма медицинская Ortonica ШМ100 в составе:	
- экран	1
- поперечина	2
- стойка одинарная	1
- стойка двойная	1
- колодка соединительная	4
- болт	6
- шайба	6
- гайка	2
- заглушка	5
- руководство по эксплуатации	1
или	
2. Ширма медицинская Ortonica ШМ110 в составе:	
- экран	1
- стойка одинарная	2
- опора	2
- поперечина	2
- колодка угловая	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
3. Ширма медицинская Ortonica ШМ120 в составе:	
- рама на опорах	1
- экран	1
- руководство по эксплуатации	1
или	
4. Ширма медицинская Ortonica ШМ130 в составе:	
- экран	1
- поперечина	2
- стойка одинарная	1
- стойка двойная	1
- колодка соединительная	4
- болт	6
- шайба	6
- гайка	2
- заглушка	5
- колесо без стопора	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
5. Ширма медицинская Ortonica ШМ140 в составе:	
- рама	1
- опора	1
- экран	1
- колесо без стопора	2

- колодка соединительная	4
- винт	2
- шайба	2
- гайка	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
6. Ширма медицинская Ortonica ШМ150 в составе:	
- рама	1
- опора	2
- экран	1
- колесо без стопора	4
- болт	2
- руководство по эксплуатации	1
или	
7. Ширма медицинская Ortonica ШМ200 в составе:	
- рама на опорах	2
- экран	2
- петля шарнирная	2
- саморез	12
- руководство по эксплуатации	1
или	
8. Ширма медицинская Ortonica ШМ210 в составе:	
- экран	2
- поперечина	4
- стойка одинарная	2
- стойка двойная	2
- колодка соединительная	8
- болт	12
- шайба	12
- гайка	4
- заглушка	10
- руководство по эксплуатации	1
или	
9. Ширма медицинская Ortonica ШМ220 в составе:	
- экран	2
- поперечина	4
- стойка одинарная	2
- стойка двойная	2
- колесо без стопора	6
- колодка соединительная	8
- болт	12
- шайба	12
- гайка	4
- заглушка	4
- руководство по эксплуатации	1
или	
10. Ширма медицинская Ortonica ШМ230 в составе:	
- экран	2
- стойка одинарная	4
- опора	2
- поперечина	4
- колодка угловая	8

- колесо без стопора	1
- петля шарнирная	2
- саморез	12
- руководство по эксплуатации	1
или	
11. Ширма медицинская Ortonica ШМ300 в составе:	
- рама на опорах	3
- экран	3
- петля шарнирная	4
- саморез	24
- руководство по эксплуатации	1
или	
12. Ширма медицинская Ortonica ШМ310 в составе:	
- экран	3
- поперечина	6
- стойка одинарная	3
- стойка двойная	3
- колодка соединительная	12
- болт	18
- шайба	18
- гайка	6
- заглушка	15
- руководство по эксплуатации	1
или	
13. Ширма медицинская Ortonica ШМ320 в составе:	
- рама	3
- экран	3
- опора	2
- болт	2
- петля шарнирная	4
- саморез	24
- колесо без стопора	6
- руководство по эксплуатации	1
или	
14. Ширма медицинская Ortonica ШМ400 в составе:	
- рама на опорах	4
- экран	4
- поперечина	2
- петля шарнирная	6
- саморез	36
- колесо без стопора	7
- руководство по эксплуатации	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень применяемых материалов на медицинское изделие Мебель медицинская для кабинетов и палат Ortonica по ТУ 32.50.30-012-66445146-2018 в наборе

Варианты исполнения:	Материалы, применяемые при изготовлении	
Тумбочка медицинская Ortonica в вариантах исполнения: ТМ100, ТМ110, ТМ120, ТМ130, ТМ140, ТМ150, ТМ160, ТМ170, ТМ180, ТМ200, ТМ210, ТМ220, ТМ230, ТМ240, ТМ250, ТМ260, ТМ301, ТМ302, ТМ303, ТМ304, ТМ305, ТМ306, ТМ307, ТМ308, ТМ309, ТМ310, ТМ311, ТМ312, ТМ313, ТМ314, ТМ315, ТМ316, ТМ317, ТМ318, ТМ319, ТМ320, ТМ321, ТМ322, ТМ323, ТМ324, ТМ325, ТМ326, ТМ327, ТМ328, ТМ329, ТМ330, ТМ331, ТМ332, ТМ333, ТМ334, ТМ335, ТМ336, ТМ337, ТМ338, ТМ339, ТМ340, ТМ341	Тумбочка (модели ТМ100, ТМ110, ТМ120, ТМ130, ТМ140, ТМ150, ТМ160, ТМ170, ТМ180, ТМ200, ТМ210, ТМ220, ТМ230, ТМ240, ТМ250, ТМ260, ТМ301, ТМ302, ТМ303, ТМ304, ТМ305, ТМ306, ТМ307, ТМ308, ТМ309, ТМ310, ТМ311, ТМ312, ТМ313, ТМ314, ТМ315, ТМ316, ТМ317, ТМ318)	ЛДСП марки П-Б (класс эмиссии формальдегида Е1), ЛДВП ТСН-40
	Тумбочка (модели ТМ309, ТМ310, ТМ311, ТМ312, ТМ313, ТМ314, ТМ315, ТМ316, ТМ317, ТМ318)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Тумбочка (модели ТМ270, ТМ320, ТМ321, ТМ322, ТМ323, ТМ324, ТМ325, ТМ326, ТМ327, ТМ328, ТМ331, ТМ332, ТМ336, ТМ337, ТМ338)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010), ЛДСП марки П-Б (класс эмиссии формальдегида Е1)
	Тумбочка (модели ТМ319, ТМ329, ТМ330)	Алюминиевый сплав АД33(краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010), ЛДСП марки П-Б (класс эмиссии формальдегида Е1)
	Тумбочка (модели ТМ333, ТМ334, ТМ335)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010), ЛДСП марки П-Б (класс эмиссии формальдегида Е1), Полипропилен РРG 1035-08
	Ручка (модели ТМ100, ТМ110, ТМ120, ТМ130, ТМ140, ТМ150, ТМ160, ТМ170, ТМ180, ТМ200, ТМ210, ТМ220, ТМ230, ТМ240, ТМ250, ТМ260, ТМ270, ТМ301, ТМ302, ТМ303, ТМ304, ТМ305, ТМ306, ТМ307, ТМ308, ТМ309, ТМ311, ТМ313, ТМ314, ТМ315, ТМ316, ТМ317, ТМ319, ТМ320, ТМ321, ТМ322, ТМ323, ТМ324, ТМ325, ТМ326, ТМ327, ТМ328, ТМ329, ТМ330, ТМ331, ТМ332, ТМ333, ТМ334, ТМ335, ТМ336, ТМ337, ТМ338, ТМ339, ТМ340, ТМ341)	Алюминиевый сплав АК12
	Опора (модели ТМ200, ТМ210, ТМ220, ТМ230, ТМ240, ТМ250, ТМ260)	Пластик ABS 2020
	Колесо без стопора, колесо со стопором (модели ТМ309, ТМ310, ТМ311, ТМ312, ТМ313, ТМ314, ТМ315, ТМ316, ТМ317, ТМ318, ТМ319, ТМ320, ТМ321, ТМ322, ТМ323, ТМ324, ТМ325, ТМ326, ТМ327, ТМ328, ТМ329, ТМ330, ТМ331, ТМ332, ТМ333, ТМ334, ТМ335, ТМ336, ТМ337, ТМ338, ТМ339, ТМ340, ТМ341)	Пластик ABS 2020
	Винт (модели ТМ100, ТМ110, ТМ120, ТМ130, ТМ140, ТМ150, ТМ160, ТМ170, ТМ180, ТМ200, ТМ210, ТМ220, ТМ230, ТМ240, ТМ250, ТМ260, ТМ270, ТМ301, ТМ302, ТМ303, ТМ304, ТМ305, ТМ306, ТМ307, ТМ308, ТМ309, ТМ311, ТМ313, ТМ314, ТМ315, ТМ316, ТМ317, ТМ319, ТМ320,	Сталь С1018

	ТМ321, ТМ322, ТМ323, ТМ324, ТМ325, ТМ326, ТМ327, ТМ328, ТМ329, ТМ330, ТМ331, ТМ332, ТМ333, ТМ334, ТМ335, ТМ336, ТМ337, ТМ338, ТМ339, ТМ340, ТМ341)	
	Саморез (модели ТМ200, ТМ210, ТМ220, ТМ230, ТМ240, ТМ250, ТМ260, ТМ301, ТМ302, ТМ303, ТМ304, ТМ305, ТМ306, ТМ308, ТМ339, ТМ340, ТМ341)	Сталь С1018
	Ключ (модели ТМ310, ТМ312, ТМ318)	Латунь Л69
Стол прикроватный медицинский Ortonica в вариантах исполнения: СП100, СП150, СП200, СП250, СП300, СП350, СП400, СП450, СП500, СП550, СП600, СП650, СП700, СП750, СП800, СП850, СП900, СП950, СП1000, СП1050, СП1100, СП1150, СП1200, СП1250, СП1300, СП1350, СП1400, СП1450	Опорная часть рамы, неподвижная вертикальная часть рамы, подвижная вертикальная часть рамы (модели СП100, СП200, СП300, СП350, СП500, СП550)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Ограничитель поворота столешницы (модели СП100, СП200, СП300, СП350, СП500)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Телескопическая стойка (модели СП150, СП400, СП450, СП600, СП800, СП850, СП900, СП950, СП1050, СП1100, СП1150, СП1200, СП1250, СП1300, СП1350, СП1400, СП1450)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Опорная рама с креплением (модель СП600)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Столешница (модели СП100, СП200, СП250, СП300, СП350, СП400, СП450, СП500, СП600, СП650, СП700, СП750, СП850, СП900, СП1050, СП1100, СП1150, СП1200, СП1250, СП1300, СП1350, СП1400, СП1450)	ЛДСП марки П-Б (класс эмиссии формальдегида Е1)
	Столешница (модели СП150, СП550, СП800, СП950)	Полипропилен РРG 1035-08
	Столешница, рама (модель СП1000)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Кронштейн (модели СП100, СП150, СП200, СП250, СП300, СП350, СП400, СП450, СП500, СП550, СП600, СП800, СП1050, СП1100, СП1150, СП1200, СП1250, СП1300, СП1350, СП1400, СП1450)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Корзина (модель СП1400)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Крепление столешницы (модели СП650, СП700, СП750)	ПВХ НJ01
	Колесо со стопором, колесо без стопора (модели СП100, СП150, СП200, СП250, СП300, СП350, СП400, СП450, СП500, СП550, СП600, СП650, СП700, СП750, СП800, СП850, СП900, СП950, СП1000, СП1050, СП1100, СП1150, СП1200, СП1250, СП1300, СП1350, СП1400, СП1450)	Пластик ABS 2020
	Фиксатор (модели СП100, СП150, СП200, СП250, СП300, СП350, СП400, СП450, СП500, СП550, СП600, СП650, СП700, СП800, СП850, СП900, СП950, СП1050, СП1100, СП1150,	Пластик ABS 2020, Сталь С1018

	СП1200, СП1250, СП1300, СП1350, СП1400, СП1450)	
	Болт (модели СП100, СП150, СП200, СП250, СП300, СП350, СП400, СП450, СП500, СП550, СП600, СП800, СП850, СП900, СП950, СП1050, СП1100, СП1150, СП1200, СП1250, СП1300, СП1350, СП1400, СП1450)	Сталь С1018
	Гайка (модели СП100, СП200, СП300, СП350, СП500, СП550, СП850, СП900, СП1250)	Сталь С1018
	Саморез (модели СП650, СП700, СП750, СП1250)	Сталь С1018
	Втулка (модели СП850, СП900)	Сталь С1018
	Крепежная пластина (модели СП850, СП900)	Сталь С1018
	Упор регулировки угла наклона стойки (модель СП1450)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	U-образная рама (модели СП150, СП400, СП450, СП650, СП700, СП750, СП800, СП950, СП1300)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	L-образная рама (модель СП250)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	T-образная рама (модель СП250)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	H-образная рама (модели СП850, СП900, СП1050, СП1100, СП1200, СП1250, СП1350, СП1400)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	П-образная телескопическая стойка (модели СП650, СП700, СП1150, СП1450)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
Стол надкроватный медицинский Ortonica в вариантах исполнения: СН100, СН150, СН200, СН250, СН300	Столешница (модели СН100, СН150, СН250, СН300)	ЛДСП марки П-Б (класс эмиссии формальдегида Е1)
	Столешница (модель СН200)	Полипропилен РРG 1035-08
	Каркас (модели СН100, СН150)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
Кушетка смотровая медицинская Ortonica в вариантах исполнения: КС400, КС405, КС410, КС415, КС420, КС425, КС430, КС435, КС440,	Стойка (модели КС420, КС425, КС430, КС435, КС440, КС445, КС455)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Опора (модель КС400)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)

КС445, КС450, КС455	Рама-основание (модели КС400, КС405, КС415, КС420, КС425, КС430, КС445, КС450, КС455)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Рама опорная (модели КС405, КС410, КС415, КС450)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Рама подголовника (модель КС445)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Связь поперечная (модели КС405, КС410, КС445)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Связь продольная (модели КС425, КС430, КС435, КС440, КС445, КС450)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Ложе кушетки (модели КС400, КС405, КС410, КС415, КС420, КС425, КС430, КС435, КС440, КС445, КС450, КС455)	ДСП тип Р2-А по ТУ 16.21.13-003-00255088, ППУ эластичный ST 2536 по ТУ 2254-001-70465083-2016, ПВХ-С-7058 М
	Подголовник (модели КС400, КС405, КС410, КС415, КС420, КС425, КС430, КС435, КС440, КС445, КС450, КС455)	ДСП тип Р2-А по ТУ 16.21.13-003-00255088, ППУ эластичный ST 2536 по ТУ 2254-001-70465083-2016, ПВХ-С-7058 М
	Болт (модели КС400, КС405, КС410, КС415, КС420, КС425, КС430, КС435, КС445, КС450)	Сталь С1018
	Механизм регулировки угла наклона подголовника (модели КС400, КС405, КС410, КС415, КС420, КС425, КС430, КС435, КС440, КС445, КС450, КС455)	Сталь С1018
	Шуруп (модели КС400, КС405, КС410, КС415, КС420, КС425, КС430, КС435, КС445, КС450, КС455)	Сталь С1018
	Винт (модели КС440, КС455)	Сталь С1018
	Шайба (модель КС440)	Сталь С1018
	Гайка (модель КС440)	Сталь С1018
	Перемычка (модели КС440, КС455)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Петля шарнирная (модели КС400, КС405, КС410, КС415, КС420, КС425, КС430, КС435, КС445, КС450)	Сталь С1018
Банкетка медицинская Ortonica в вариантах исполнения: БМ500, БМ505, БМ510, БМ515, БМ520, БМ525, БМ530, БМ535, БМ540, БМ545, БМ550, БМ555, БМ560, БМ565	Рама опорная (модели БМ500, БМ505, БМ515, БМ530, БМ535, БМ540, БМ545, БМ550, БМ555, БМ560, БМ565)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Перемычка (модель БМ500)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Опора (модели БМ510, БМ520, БМ525)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Сиденье (модели БМ500, БМ505, БМ510, БМ515, БМ520, БМ525, БМ530, БМ535, БМ540, БМ545, БМ550, БМ555, БМ560, БМ565)	ДСП тип Р2-А по ТУ 16.21.13-003-00255088, ППУ эластичный ST 2536

	БМ565)	по ТУ 2254-001-70465083-2016, ПВХ-С-7058 М
	Винт (модели БМ500, БМ510, БМ535, БМ540, БМ555)	Сталь С1018
	Гайка (модели БМ500, БМ510, БМ530, БМ545, БМ550, БМ565)	Сталь С1018
	Саморез (модели БМ500, БМ530, БМ540, БМ545, БМ550, БМ555, БМ560, БМ565)	Сталь С1018
	Рама основания (модели БМ530, БМ545)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Рама спинки (модели БМ530, БМ550, БМ565)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Болт (модели БМ515, БМ530, БМ545, БМ550, БМ560, БМ565)	Сталь С1018
	Спинка (модели БМ530, БМ535, БМ540, БМ545, БМ550, БМ555, БМ560, БМ565)	ДСП тип Р2-А по ТУ 16.21.13-003-00255088, ППУ эластичный ST 2536 по ТУ 2254-001-70465083-2016, ПВХ-С-7058 М
	Шайба (модели БМ510, БМ530, БМ545, БМ550, БМ555, БМ565)	Сталь С1018
	Связь продольная (модели БМ515, БМ535, БМ540, БМ550, БМ555, БМ560, БМ565)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
Ступенька медицинская Ortonica в вариантах исполнения: СМ600, СМ610, СМ620, СМ630, СМ640, СМ650	Подлокотник (модель БМ560)	ДСП тип Р2-А по ТУ 16.21.13-003-00255088, ППУ эластичный ST 2536 по ТУ 2254-001-70465083-2016, ПВХ-С-7058 М
	Ступенька (модели СМ600, СМ630, СМ640)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Ступенька (модели СМ610, СМ650)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010), ДСП тип Р2-А по ТУ 16.21.13-003-00255088, ПВХ-С-7058 М
	Ступенька (модель СМ620)	Бук (покрытие: Лак НЦ-134)
Стол палатный медицинский Ortonica в вариантах исполнения: СПМ700, СПМ710, СПМ720, СПМ730, СПМ740, СПМ750, СПМ760, СПМ770	Каркас-столешница (модели СПМ730, СПМ740)	ЛДСП марки П-Б (класс эмиссии формальдегида Е1)
	Опора (модели СПМ700, СПМ710, СПМ720, СПМ730, СПМ740, СПМ750, СПМ760, СПМ770)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Гайка (модели СПМ700, СПМ710, СПМ730, СПМ740, СПМ770)	Сталь С1018
	Шайба (модели СПМ700, СПМ710, СПМ730, СПМ740, СПМ770)	Сталь С1018

	Столешница (модели СПМ700, СПМ720, СПМ750, СПМ760)	ЛДСП марки П-Б (класс эмиссии формальдегида E1)
	Столешница (модели СПМ710, СПМ770)	МДФ по ТУ 5536-008-58242280-2006
	Каркас-основание (модели СПМ700, СПМ710, СПМ770)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
Стол манипуляционный медицинский Ortonica в вариантах исполнения: СММ800, СММ805, СММ810, СММ815, СММ820, СММ825, СММ830, СММ835, СММ840, СММ845, СММ850, СММ855, СММ860, СММ865, СММ870, СММ875, СММ880, СММ885, СММ890, СММ895	Стойка (модели СММ800, СММ805, СММ810, СММ815, СММ820, СММ825, СММ830, СММ835, СММ850, СММ855, СММ865, СММ870, СММ875, СММ880, СММ885, СММ890, СММ895)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Поперечина (модели СММ800, СММ805, СММ810, СММ815, СММ820, СММ825, СММ830, СММ850, СММ865, СММ870, СММ875, СММ885, СММ890)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Корзина (модель СММ815)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Полка (модели СММ800, СММ830)	Стекло МЗ
	Колесо без стопора, колесо со стопором (модели СММ800, СММ805, СММ810, СММ815, СММ820, СММ825, СММ830, СММ835, СММ840, СММ845, СММ850, СММ855, СММ860, СММ865, СММ870, СММ875, СММ880, СММ885, СММ890, СММ895)	Пластик ABS 2020, Полипропилен Технотэп 35-1К-60А нат.
	Винт (модели СММ800, СММ805, СММ810, СММ825, СММ835, СММ850, СММ855, СММ860, СММ865, СММ875, СММ880, СММ885, СММ890, СММ895)	Сталь С1018
	Шайба (модели СММ800, СММ805, СММ810, СММ825, СММ835, СММ855, СММ860, СММ865, СММ875, СММ885, СММ890)	Сталь С1018
	Полка (модель СММ820)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Полка (модель СММ805)	ЛДСП марки П-Б (класс эмиссии формальдегида E1)
	Рама (модель СММ810, СММ830, СММ855, СММ860)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Полка (поддон) (модели СММ810, СММ825, СММ835, СММ850, СММ855, СММ860, СММ865, СММ870, СММ875, СММ880, СММ885, СММ890, СММ895)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Гайка (модели СММ835, СММ855)	Сталь С1018
	Рама-основание (модели СММ840, СММ845)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)

		хромирование)
	Рама поперечная с ручками (модель СММ870)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Кронштейн (модель СММ840)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Телескопическая стойка (модель СММ845)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Столешница (модель СММ840)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Столешница с кронштейном (модель СММ845)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Фиксатор (модели СММ810, СММ840, СММ845)	Полипропилен РРG 1035-08
	Кронштейн поворотный (модель СММ870)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Тазик почкообразный (модель СММ870)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Ключ (модель СММ870)	Латунь Л69
	Болт (модели СММ815, СММ820, СММ830, СММ840, СММ845, СММ850, СММ855, СММ870, СММ880, СММ895)	Сталь С1018
	Ящик (модели СММ850, СММ865, СММ870, СММ875, СММ885, СММ890)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
	Ручка (модели СММ850, СММ855, СММ860, СММ865, СММ875, СММ880, СММ885, СММ890, СММ895)	Алюминиевый сплав АК12
	Корпус с ящиком(-ами) (модели СММ855, СММ860, СММ880, СММ895)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010 или хромирование)
Ширма медицинская Ortonica в вариантах исполнения: ШМ100, ШМ110, ШМ120, ШМ130, ШМ140, ШМ150, ШМ200, ШМ210, ШМ220, ШМ230, ШМ300,	Экран (модели ШМ100, ШМ130, ШМ150, ШМ210, ШМ220, ШМ310)	Пленка ПГВ-040
	Экран (модели ШМ110, ШМ120, ШМ200, ШМ230, ШМ140, ШМ300, ШМ320, ШМ400)	Ткань Оксфорд 600D
	Поперечина (модели ШМ100, ШМ130, ШМ210, ШМ220, ШМ310, ШМ400)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)

ШМ310, ШМ320, ШМ400	Поперечина (модели ШМ110, ШМ230)	Алюминиевый сплав АД33 (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Рама на опорах (модели ШМ120, ШМ200, ШМ300)	Бук (покрытие: Лак НЦ-134)
	Стойка одинарная (модели ШМ110, ШМ230)	Алюминиевый сплав АД33 (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Опора (модели ШМ110, ШМ230)	Алюминиевый сплав АД33 (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Стойка одинарная (модели ШМ100, ШМ130, ШМ210, ШМ220, ШМ310)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Стойка двойная (модели ШМ100, ШМ130, ШМ210, ШМ220, ШМ310)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Колодка соединительная (модели ШМ100, ШМ110, ШМ130, ШМ140, ШМ210, ШМ220, ШМ310)	ПВХ НЖ01
	Колодка угловая (модели ШМ110, ШМ230)	ПВХ НЖ01
	Болт (модели ШМ100, ШМ130, ШМ150, ШМ210, ШМ220, ШМ310, ШМ320)	Сталь С1018
	Шайба (модели ШМ100, ШМ130, ШМ140, ШМ210, ШМ220, ШМ310)	Сталь С1018
	Гайка (модели ШМ100, ШМ130, ШМ140, ШМ210, ШМ220, ШМ310)	Сталь С1018
	Заглушка (модели ШМ100, ШМ130, ШМ210, ШМ220, ШМ310)	Полипропилен РРГ 1035-08
	Колесо без стопора (модели ШМ130, ШМ140, ШМ150, ШМ220, ШМ230, ШМ320, ШМ400)	Пластик ABS 2020
	Рама на опорах (модель ШМ400)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Рама (модели ШМ140, ШМ150, ШМ320)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Опора (модели ШМ140, ШМ150, ШМ320)	Сталь 08кп (краситель: порошковая полиэфирная краска П-ПЛ-1010)
	Петля шарнирная (модели ШМ200, ШМ230, ШМ300, ШМ320, ШМ400)	Сталь С1018
	Саморез (модели ШМ200, ШМ230, ШМ300, ШМ320, ШМ400)	Сталь С1018
	Винт (модель ШМ140)	Сталь С1018

Прошито и пронумеровано

141 лист

Ген.директор

