

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Ортоника»

А.В. Терехов

январе 2020 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

**Матрас противопрележневый пенополиуретановый Ortonica
по ТУ 32.50.50-013-66445146-2019, в вариантах исполнения**

Редакция 2

Настоящее руководство по эксплуатации подготовлено для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.01.2017 № 11 н).

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника», ООО «Ортоника»

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника»

ООО «Ортоника»,

Россия, 105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я, д. 9/35, кв. 94.

Телефон: +7 (495) 648-60-42

Место производства медицинского изделия:

Россия, 394026, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, д.11.

1. Название, назначение, конструкция медицинского изделия и краткое описание.

Предназначены для профилактики пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела в условиях ЛПУ и домашнего использования.

Матрас противопролежневый пенополиуретановый предназначен для настила поверх ложа – как обычного, домашнего, так и кровати, которая используется в стационарных условиях и в медицинских учреждениях.

Для идентификации всех вариантов исполнения матраса вводится буквенно-цифровое обозначение.



Модели матрасов:

S – Standart
SP – Standart Plus
SS – Standart San
L – Light
LP – Light Plus
W – Wave
P – Profile
PP – Profile Plus
C – Combi
M – Memory
MP – Memory Plus
D – Duo
T – Trio

Секции:

1 – односекционный
2 – двухсекционный
3 – трехсекционный
4 – четырехсекционный
5 – пятисекционный

Материал чехла:

N – нейлоновая ткань
K – кожзаменитель
V – клеенка медицинская
M – мембранная ткань

Матрас противопролежневый пенополиуретановый Ortonica по ТУ 32.50.50-013-66445146-2019, в вариантах исполнения:

1. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:
PS101N, PS102N, PS103N, PS104N, PS105N, PS106N, PS107N, PS108N, PS109N, PS110N,

PS111N, PS112N, PS113N, PS114N, PS115N, PS116N, PS117N

В составе:

- 1.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1 шт;
- 1.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
- 1.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

2. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PS101K, PS102K, PS103K, PS104K, PS105K, PS106K, PS107K, PS108K, PS109K, PS110K, PS111K, PS112K, PS113K, PS114K, PS115K, PS116K, PS117K

В составе:

- 2.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1 шт;
- 2.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
- 2.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

3. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PS101V, PS102V, PS103V, PS104V, PS105V, PS106V, PS107V, PS108V, PS109V, PS110V, PS111V, PS112V, PS113V, PS114V, PS115V, PS116V, PS117V

В составе:

- 3.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1 шт;
- 3.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
- 3.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

4. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PS101M, PS102M, PS103M, PS104M, PS105M, PS106M, PS107M, PS108M, PS109M, PS110M, PS111M, PS112M, PS113M, PS114M, PS115M, PS116M, PS117M

В составе:

- 4.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1 шт;
- 4.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
- 4.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

5. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PS201N, PS202N, PS203N, PS204N, PS205N, PS206N, PS207N, PS208N, PS209N, PS210N, PS211N, PS212N, PS213N, PS214N, PS215N, PS216N, PS217N

В составе:

- 5.1 Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1 шт;
- 5.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
- 5.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

6. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PS201K, PS202K, PS203K, PS204K, PS205K, PS206K, PS207K, PS208K, PS209K, PS210K, PS211K, PS212K, PS213K, PS214K, PS215K, PS216K, PS217K

В составе:

- 6.1 Матрас двухсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1шт;
6.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;
6.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

7. Матрас двухсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PS201V, PS202V, PS203V, PS204V, PS205V, PS206V, PS207V, PS208V, PS209V, PS210V, PS211V, PS212V, PS213V, PS214V, PS215V, PS216V, PS217V

В составе:

- 7.1 Матрас двухсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1шт;
7.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;
7.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

8. Матрас двухсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PS201M, PS202M, PS203M, PS204M, PS205M, PS206M, PS207M, PS208M, PS209M, PS210M, PS211M, PS212M, PS213M, PS214M, PS215M, PS216M, PS217M

В составе:

- 8.1 Матрас двухсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1шт;
8.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;
8.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

9. Матрас трехсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PS301N, PS302N, PS303N, PS304N, PS305N, PS306N, PS307N, PS308N, PS309N, PS310N, PS311N

В составе:

- 9.1 Матрас трехсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1шт;
9.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;
9.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

10. Матрас трехсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PS301K, PS302K, PS303K, PS304K, PS305K, PS306K, PS307K, PS308K, PS309K, PS310K, PS311K

В составе:

- 10.1 Матрас трехсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1шт;
10.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;
10.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

11. Матрас трехсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PS301V, PS302V, PS303V, PS304V, PS305V, PS306V, PS307V, PS308V, PS309V, PS310V, PS311V

В составе:

- 11.1 Матрас трехсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart –

1 шт;

11.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

11.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

12. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PS301M, PS302M, PS303M, PS304M, PS305M, PS306M, PS307M, PS308M, PS309M, PS310M, PS311M

В составе:

12.1 Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1 шт;

12.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

12.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

13. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PS401N, PS402N, PS403N, PS404N, PS405N, PS406N, PS407N, PS408N, PS409N, PS410N, PS411N

В составе:

13.1 Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1 шт;

13.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

13.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

14. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PS401K, PS402K, PS403K, PS404K, PS405K, PS406K, PS407K, PS408K, PS409K, PS410K, PS411K

В составе:

14.1 Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1 шт;

14.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

14.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

15. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PS401V, PS402V, PS403V, PS404V, PS405V, PS406V, PS407V, PS408V, PS409V, PS410V, PS411V

В составе:

15.1 Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart – 1 шт;

15.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

15.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

16. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PS401M, PS402M, PS403M, PS404M, PS405M, PS406M, PS407M, PS408M, PS409M, PS410M, PS411M

В составе:

16.1 Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart

- 1 шт;
- 16.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
- 16.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

17. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PSP401N, PSP402N, PSP403N, PSP404N, PSP405N, PSP406N, PSP407N, PSP408N, PSP409N, PSP410N, PSP411N

В составе:

17.1 Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus – 1 шт;

17.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

17.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

18. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PSP401K, PSP402K, PSP403K, PSP404K, PSP405K, PSP406K, PSP407K, PSP408K, PSP409K, PSP410K, PSP411K

В составе:

18.1 Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus – 1 шт;

18.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

18.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

19. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PSP401V, PSP402V, PSP403V, PSP404V, PSP405V, PSP406V, PSP407V, PSP408V, PSP409V, PSP410V, PSP411V

В составе:

19.1 Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus – 1 шт;

19.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

19.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

20. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PSP401M, PSP402M, PSP403M, PSP404M, PSP405M, PSP406M, PSP407M, PSP408M, PSP409M, PSP410M, PSP411M

В составе:

20.1 Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus – 1 шт;

20.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

20.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

21. Матрас пятисекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart San с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PSS501N, PSS502N, PSS503N, PSS504N, PSS505N, PSS506N, PSS507N, PSS508N, PSS509N, PSS510N, PSS511N

В составе:

21.1 Матрас пятисекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart San – 1 шт;

21.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

21.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

22. Матрас пятисекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart San с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PSS501K, PSS502K, PSS503K, PSS504K, PSS505K, PSS506K, PSS507K, PSS508K, PSS509K, PSS510K, PSS511K

В составе:

22.1 Матрас пятисекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart San – 1шт;

22.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

22.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

23. Матрас пятисекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart San с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PSS501V, PSS502V, PSS503V, PSS504V, PSS505V, PSS506V, PSS507V, PSS508V, PSS509V, PSS510V, PSS511V

В составе:

23.1 Матрас пятисекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart San – 1шт;

23.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

23.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

24. Матрас пятисекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart San с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PSS501M, PSS502M, PSS503M, PSS504M, PSS505M, PSS506M, PSS507M, PSS508M, PSS509M, PSS510M, PSS511M

В составе:

24.1 Матрас пятисекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart San – 1шт;

24.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

24.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

25. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Light с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PL101N, PL102N, PL103N, PL104N, PL105N, PL106N, PL107N, PL108N, PL109N, PL110N, PL111N, PL112N, PL113N, PL114N, PL115N, PL116N, PL117N

В составе:

25.1 Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Light - 1шт;

25.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

25.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

26. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Light с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PL101K, PL102K, PL103K, PL104K, PL105K, PL106K, PL107K, PL108K, PL109K, PL110K, PL111K, PL112K, PL113K, PL114K, PL115K, PL116K, PL117K

В составе:

26.1 Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Light - 1шт;

26.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

26.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

27. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:
PL101V, PL102V, PL103V, PL104V, PL105V, PL106V, PL107V, PL108V, PL109V, PL110V, PL111V, PL112V, PL113V, PL114V, PL115V, PL116V, PL117V

В составе:

27.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light - 1 шт;

27.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

27.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

28. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:
PL101M, PL102M, PL103M, PL104M, PL105M, PL106M, PL107M, PL108M, PL109M, PL110M, PL111M, PL112M, PL113M, PL114M, PL115M, PL116M, PL117M

В составе:

28.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light - 1 шт;

28.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

28.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

29. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:
PLP101N, PLP102N, PLP103N, PLP104N, PLP105N, PLP106N, PLP107N, PLP108N, PLP109N, PLP110N, PLP111N

В составе:

29.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus - 1 шт;

29.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

29.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

30. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:
PLP101K, PLP102K, PLP103K, PLP104K, PLP105K, PLP106K, PLP107K, PLP108K, PLP109K, PLP110K, PLP111K

В составе:

30.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus - 1 шт;

30.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

30.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

31. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:
PLP101V, PLP102V, PLP103V, PLP104V, PLP105V, PLP106V, PLP107V, PLP108V, PLP109V, PLP110V, PLP111V

В составе:

31.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus - 1 шт;

31.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

31.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

32. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PLP101M, PLP102M, PLP103M, PLP104M, PLP105M, PLP106M, PLP107M, PLP108M, PLP109M, PLP110M, PLP111M

В составе:

32.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus - 1 шт;

32.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

32.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

33. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Wave с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PW101N, PW102N, PW103N, PW104N, PW105N, PW106N, PW107N, PW108N, PW109N, PW110N, PW111N, PW112N, PW113N, PW114N, PW115N, PW116N, PW117N

В составе:

33.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Wave - 1 шт;

33.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

33.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

34. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Wave с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PW101K, PW102K, PW103K, PW104K, PW105K, PW106K, PW107K, PW108K, PW109K, PW110K, PW111K, PW112K, PW113K, PW114K, PW115K, PW116K, PW117K

В составе:

34.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Wave - 1 шт;

34.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

34.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

35. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Wave с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PW101V, PW102V, PW103V, PW104V, PW105V, PW106V, PW107V, PW108V, PW109V, PW110V, PW111V, PW112V, PW113V, PW114V, PW115V, PW116V, PW117V

В составе:

35.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Wave - 1 шт;

35.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

35.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

36. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Wave с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PW101M, PW102M, PW103M, PW104M, PW105M, PW106M, PW107M, PW108M, PW109M, PW110M, PW111M, PW112M, PW113M, PW114M, PW115M, PW116M, PW117M

В составе:

36.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Wave - 1 шт;

36.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

36.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

37. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PP101N, PP102N, PP103N, PP104N, PP105N, PP106N, PP107N, PP108N, PP109N, PP110N, PP111N, PP112N, PP113N, PP114N, PP115N, PP116N, PP117N

В составе:

37.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile - 1 шт;

37.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

37.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

38. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PP101K, PP102K, PP103K, PP104K, PP105K, PP106K, PP107K, PP108K, PP109K, PP110K, PP111K, PP112K, PP113K, PP114K, PP115K, PP116K, PP117K

В составе:

38.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile - 1 шт;

38.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

38.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

39. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PP101V, PP102V, PP103V, PP104V, PP105V, PP106V, PP107V, PP108V, PP109V, PP110V, PP111V, PP112V, PP113V, PP114V, PP115V, PP116V, PP117V

В составе:

39.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile - 1 шт;

39.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

39.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

40. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PP101M, PP102M, PP103M, PP104M, PP105M, PP106M, PP107M, PP108M, PP109M, PP110M, PP111M, PP112M, PP113M, PP114M, PP115M, PP116M, PP117M

В составе:

40.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile - 1 шт;

40.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

40.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

41. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PPP101N, PPP102N, PPP103N, PPP104N, PPP105N, PPP106N, PPP107N, PPP108N, PPP109N, PPP110N, PPP111N, PPP112N, PPP113N, PPP114N, PPP115N, PPP116N, PPP117N

В составе:

41.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile Plus - 1 шт;

41.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

41.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

42. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PPP101K, PPP102K, PPP103K, PPP104K, PPP105K, PPP106K, PPP107K, PPP108K, PPP109K, PPP110K, PPP111K, PPP112K, PPP113K, PPP114K, PPP115K, PPP116K, PPP117K

В составе:

42.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile Plus

- 1 шт;
- 42.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
- 42.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

43. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PPP101V, PPP102V, PPP103V, PPP104V, PPP105V, PPP106V, PPP107V, PPP108V, PPP109V, PPP110V, PPP111V, PPP112V, PPP113V, PPP114V, PPP115V, PPP116V, PPP117V

В составе:

43.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile Plus -1 шт;

43.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

43.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

44. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PPP101M, PPP102M, PPP103M, PPP104M, PPP105M, PPP106M, PPP107M, PPP108M, PPP109M, PPP110M, PPP111M, PPP112M, PPP113M, PPP114M, PPP115M, PPP116M, PPP117M

В составе:

44.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile Plus -1 шт;

44.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

44.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

45. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Combi с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PC101N, PC102N, PC103N, PC104N, PC105N, PC106N, PC107N, PC108N, PC109N, PC110N, PC111N

В составе:

45.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Combi - 1 шт;

45.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

45.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

46. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Combi с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PC101K, PC102K, PC103K, PC104K, PC105K, PC106K, PC107K, PC108K, PC109K, PC110K, PC111K

В составе:

46.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Combi - 1 шт;

46.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

46.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

47. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Combi с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PC101V, PC102V, PC103V, PC104V, PC105V, PC106V, PC107V, PC108V, PC109V, PC110V, PC111V

В составе:

47.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Combi - 1 шт;

- 47.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
47.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

48. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Combi с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:
PC101M, PC102M, PC103M, PC104M, PC105M, PC106M, PC107M, PC108M, PC109M, PC110M, PC111M

В составе:

- 48.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Combi - 1 шт;
48.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
48.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

49. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:
PM101N, PM102N, PM103N, PM104N, PM105N, PM106N, PM107N, PM108N, PM109N, PM110N, PM111N, PM112N, PM113N, PM114N, PM115N, PM116N, PM117N

В составе:

- 49.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;
49.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
49.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

50. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:
PM101K, PM102K, PM103K, PM104K, PM105K, PM106K, PM107K, PM108K, PM109K, PM110K, PM111K, PM112K, PM113K, PM114K, PM115K, PM116K, PM117K

В составе:

- 50.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;
50.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
50.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

51. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:
PM101V, PM102V, PM103V, PM104V, PM105V, PM106V, PM107V, PM108V, PM109V, PM110V, PM111V, PM112V, PM113V, PM114V, PM115V, PM116V, PM117V

В составе:

- 51.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;
51.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
51.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

52. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:
PM101M, PM102M, PM103M, PM104M, PM105M, PM106M, PM107M, PM108M, PM109M, PM110M, PM111M, PM112M, PM113M, PM114M, PM115M, PM116M, PM117M

В составе:

- 52.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;
52.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
52.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

53. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PM201N, PM202N, PM203N, PM204N, PM205N, PM206N, PM207N, PM208N, PM209N, PM210N, PM211N, PM212N, PM213N, PM214N, PM215N, PM216N, PM217N

В составе:

53.1 Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;

53.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

53.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

54. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PM201K, PM202K, PM203K, PM204K, PM205K, PM206K, PM207K, PM208K, PM209K, PM210K, PM211K, PM212K, PM213K, PM214K, PM215K, PM216K, PM217K

В составе:

54.1 Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;

54.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

54.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

55. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PM201V, PM202V, PM203V, PM204V, PM205V, PM206V, PM207V, PM208V, PM209V, PM210V, PM211V, PM212V, PM213V, PM214V, PM215V, PM216V, PM217V

В составе:

55.1 Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;

55.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

55.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

56. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PM201M, PM202M, PM203M, PM204M, PM205M, PM206M, PM207M, PM208M, PM209M, PM210M, PM211M, PM212M, PM213M, PM214M, PM215M, PM216M, PM217M

В составе:

56.1 Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;

56.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

56.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

57. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PM301N, PM302N, PM303N, PM304N, PM305N, PM306N, PM307N, PM308N, PM309N, PM310N, PM311N

В составе:

57.1 Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;

57.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

57.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

58. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с

чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PM301K, PM302K, PM303K, PM304K, PM305K, PM306K, PM307K, PM308K, PM309K, PM310K, PM311K

В составе:

58.1 Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;

58.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

58.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

59. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PM301V, PM302V, PM303V, PM304V, PM305V, PM306V, PM307V, PM308V, PM309V, PM310V, PM311V

В составе:

59.1 Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;

59.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

59.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

60. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PM301M, PM302M, PM303M, PM304M, PM305M, PM306M, PM307M, PM308M, PM309M, PM310M, PM311M

В составе:

60.1 Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory - 1 шт;

60.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

60.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

61. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

RMP101N, RMP102N, RMP103N, RMP104N, RMP105N, RMP106N, RMP107N, RMP108N, RMP109N, RMP110N, RMP111N, RMP112N, RMP113N, RMP114N, RMP115N, RMP116N, RMP117N

В составе:

61.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus - 1 шт;

61.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

61.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

62. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

RMP101K, RMP102K, RMP103K, RMP104K, RMP105K, RMP106K, RMP107K, RMP108K, RMP109K, RMP110K, RMP111K, RMP112K, RMP113K, RMP114K, RMP115K, RMP116K, RMP117K

В составе:

62.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus - 1 шт;

62.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

62.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

63. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory

Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PMP101V, PMP102V, PMP103V, PMP104V, PMP105V, PMP106V, PMP107V, PMP108V, PMP109V, PMP110V, PMP111V, PMP112V, PMP113V, PMP114V, PMP115V, PMP116V, PMP117V

В составе:

63.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus -1шт;

63.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

63.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

64. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PMP101M, PMP102M, PMP103M, PMP104M, PMP105M, PMP106M, PMP107M, PMP108M, PMP109M, PMP110M, PMP111M, PMP112M, PMP113M, PMP114M, PMP115M, PMP116M, PMP117M

В составе:

64.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus -1шт;

64.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

64.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

65. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PMP201N, PMP202N, PMP203N, PMP204N, PMP205N, PMP206N, PMP207N, PMP208N, PMP209N, PMP210N, PMP211N, PMP212N, PMP213N, PMP214N, PMP215N, PMP216N, PMP217N

В составе:

65.1 Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus -1шт;

65.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

65.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

66. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PMP201K, PMP202K, PMP203K, PMP204K, PMP205K, PMP206K, PMP207K, PMP208K, PMP209K, PMP210K, PMP211K, PMP212K, PMP213K, PMP214K, PMP215K, PMP216K, PMP217K

В составе:

66.1 Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus -1шт;

66.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

66.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

67. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PMP201V, PMP202V, PMP203V, PMP204V, PMP205V, PMP206V, PMP207V, PMP208V, PMP209V, PMP210V, PMP211V, PMP212V, PMP213V, PMP214V, PMP215V, PMP216V, PMP217V

В составе:

67.1 Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus -1шт;

67.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

67.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

68. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:
RMP201M, RMP202M, RMP203M, RMP204M, RMP205M, RMP206M, RMP207M, RMP208M, RMP209M, RMP210M, RMP211M, RMP212M, RMP213M, RMP214M, RMP215M, RMP216M, RMP217M

В составе:

68.1 Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus -1шт;

68.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

68.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

69. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:
RMP301N, RMP302N, RMP303N, RMP304N, RMP305N, RMP306N, RMP307N, RMP308N, RMP309N, RMP310N, RMP311N

В составе:

69.1 Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus-1шт;

69.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

69.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

70. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:
RMP301K, RMP302K, RMP303K, RMP304K, RMP305K, RMP306K, RMP307K, RMP308K, RMP309K, RMP310K, RMP311K

В составе:

70.1 Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus-1шт;

70.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

70.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

71. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:
RMP301V, RMP302V, RMP303V, RMP304V, RMP305V, RMP306V, RMP307V, RMP308V, RMP309V, RMP310V, RMP311V

В составе:

71.1 Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus-1шт;

71.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

71.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

72. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:
RMP301M, RMP302M, RMP303M, RMP304M, RMP305M, RMP306M, RMP307M, RMP308M, RMP309M, RMP310M, RMP311M

В составе:

72.1 Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus-1шт;

72.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

72.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

73. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:
PD101N, PD102N, PD103N, PD104N, PD105N, PD106N, PD107N, PD108N, PD109N, PD110N, PD111N, PD112N, PD113N, PD114N, PD115N, PD116N, PD117N

В составе:

73.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo - 1 шт;

73.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

73.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

74. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PD101K, PD102K, PD103K, PD104K, PD105K, PD106K, PD107K, PD108K, PD109K, PD110K, PD111K, PD112K, PD113K, PD114K, PD115K, PD116K, PD117K

В составе:

74.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo - 1 шт;

74.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

74.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

75. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PD101V, PD102V, PD103V, PD104V, PD105V, PD106V, PD107V, PD108V, PD109V, PD110V, PD111V, PD112V, PD113V, PD114V, PD115V, PD116V, PD117V

В составе:

75.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo - 1 шт;

75.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

75.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

76. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PD101M, PD102M, PD103M, PD104M, PD105M, PD106M, PD107M, PD108M, PD109M, PD110M, PD111M, PD112M, PD113M, PD114M, PD115M, PD116M, PD117M

В составе:

76.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo - 1 шт;

76.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

76.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

77. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Trio с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PT101N, PT102N, PT103N, PT104N, PT105N, PT106N, PT107N, PT108N, PT109N, PT110N, PT111N, PT112N, PT113N, PT114N, PT115N, PT116N, PT117N

В составе:

77.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Trio - 1 шт;

77.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

77.3 Чехол для матраса из нейлоновой ткани – 1 шт.

78. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Trio с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PT101K, PT102K, PT103K, PT104K, PT105K, PT106K, PT107K, PT108K, PT109K, PT110K, PT111K, PT112K, PT113K, PT114K, PT115K, PT116K, PT117K

В составе:

78.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Trio - 1 шт;

- 78.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
78.3 Чехол для матраса из кожзаменителя – 1 шт.

79. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Trio с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:
PT101V, PT102V, PT103V, PT104V, PT105V, PT106V, PT107V, PT108V, PT109V, PT110V, PT111V, PT112V, PT113V, PT114V, PT115V, PT116V, PT117V

В составе:

- 79.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Trio - 1 шт;
79.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
79.3 Чехол для матраса из клеенки медицинской – 1 шт.

80. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Trio с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:
PT101M, PT102M, PT103M, PT104M, PT105M, PT106M, PT107M, PT108M, PT109M, PT110M, PT111M, PT112M, PT113M, PT114M, PT115M, PT116M, PT117M

В составе:

- 80.1 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Trio - 1 шт;
80.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;
80.3 Чехол для матраса из мембранной ткани – 1 шт.

Краткое описание медицинского изделия:

1. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:
PS101N, PS102N, PS103N, PS104N, PS105N, PS106N, PS107N, PS108N, PS109N, PS110N, PS111N, PS112N, PS113N, PS114N, PS115N, PS116N, PS117N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 , обеспечивает равномерное распределение нагрузки, с чехлом из нейлоновой ткани;
2. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:
PS101K, PS102K, PS103K, PS104K, PS105K, PS106K, PS107K, PS108K, PS109K, PS110K, PS111K, PS112K, PS113K, PS114K, PS115K, PS116K, PS117K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 , обеспечивает равномерное распределение нагрузки, с чехлом из кожзаменителя;
3. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:
PS101V, PS102V, PS103V, PS104V, PS105V, PS106V, PS107V, PS108V, PS109V, PS110V, PS111V, PS112V, PS113V, PS114V, PS115V, PS116V, PS117V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 , обеспечивает равномерное распределение нагрузки, с чехлом из клеенки медицинской;
4. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:
PS101M, PS102M, PS103M, PS104M, PS105M, PS106M, PS107M, PS108M, PS109M, PS110M, PS111M, PS112M, PS113M, PS114M, PS115M, PS116M, PS117M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 , обеспечивает равномерное распределение нагрузки, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение «Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения» представлено на рис.1.



Рис. 1 . Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения

5. Матрас двухсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PS201N, PS202N, PS203N, PS204N, PS205N, PS206N, PS207N, PS208N, PS209N, PS210N, PS211N, PS212N, PS213N, PS214N, PS215N, PS216N, PS217N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции, с чехлом из нейлоновой ткани;

6. Матрас двухсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PS201K, PS202K, PS203K, PS204K, PS205K, PS206K, PS207K, PS208K, PS209K, PS210K, PS211K, PS212K, PS213K, PS214K, PS215K, PS216K, PS217K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции, с чехлом из кожзаменителя;

7. Матрас двухсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PS201V, PS202V, PS203V, PS204V, PS205V, PS206V, PS207V, PS208V, PS209V, PS210V, PS211V, PS212V, PS213V, PS214V, PS215V, PS216V, PS217V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции, с чехлом из клеенки медицинской;

8. Матрас двухсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PS201M, PS202M, PS203M, PS204M, PS205M, PS206M, PS207M, PS208M, PS209M, PS210M, PS211M, PS212M, PS213M, PS214M, PS215M, PS216M, PS217M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение «Матрас двухсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения» представлено на рис.2.



Рис. 2 Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения

9. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PS301N, PS302N, PS303N, PS304N, PS305N, PS306N, PS307N, PS308N, PS309N, PS310N, PS311N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции с чехлом из нейлоновой ткани;

10. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PS301K, PS302K, PS303K, PS304K, PS305K, PS306K, PS307K, PS308K, PS309K, PS310K, PS311K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции с чехлом из кожзаменителя;

11. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PS301V, PS302V, PS303V, PS304V, PS305V, PS306V, PS307V, PS308V, PS309V, PS310V, PS311V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции с чехлом из клеенки медицинской;

12. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PS301M, PS302M, PS303M, PS304M, PS305M, PS306M, PS307M, PS308M, PS309M, PS310M, PS311M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции с чехлом из мембранной ткани.

Изображение «Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения» представлено на рис.3.

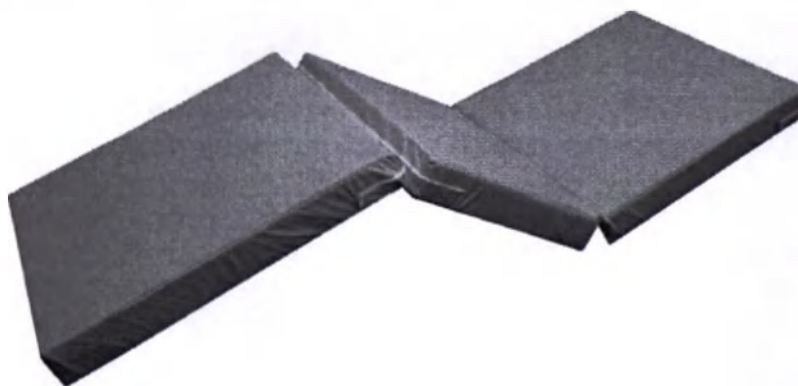


Рис. 3 Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения

13. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PS401N, PS402N, PS403N, PS404N, PS405N, PS406N, PS407N, PS408N, PS409N, PS410N, PS411N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции с чехлом из нейлоновой ткани;

14. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PS401K, PS402K, PS403K, PS404K, PS405K, PS406K, PS407K, PS408K, PS409K, PS410K, PS411K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции с чехлом из кожзаменителя;

15. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart

с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PS401V, PS402V, PS403V, PS404V, PS405V, PS406V, PS407V, PS408V, PS409V, PS410V, PS411V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции с чехлом из клеенки медицинской;

16. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PS401M, PS402M, PS403M, PS404M, PS405M, PS406M, PS407M, PS408M, PS409M, PS410M, PS411M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции с чехлом из мембранной ткани.

Изображение «Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения» представлено на рис.4.



Рис. 4 Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения

17. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PSP401N, PSP402N, PSP403N, PSP404N, PSP405N, PSP406N, PSP407N, PSP408N, PSP409N, PSP410N, PSP411N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции состоит из четырех секций с увеличенной толщиной матраса (150 мм), с чехлом из нейлоновой ткани;

18. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PSP401K, PSP402K, PSP403K, PSP404K, PSP405K, PSP406K, PSP407K, PSP408K, PSP409K, PSP410K, PSP411K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции состоит из четырех секций с увеличенной толщиной матраса (150 мм), с чехлом из кожзаменителя;

19. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PSP401V, PSP402V, PSP403V, PSP404V, PSP405V, PSP406V, PSP407V, PSP408V, PSP409V, PSP410V, PSP411V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции состоит из четырех секций с увеличенной толщиной матраса (150 мм), с чехлом из клеенки медицинской;

20. Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PSP401M, PSP402M, PSP403M, PSP404M, PSP405M, PSP406M, PSP407M, PSP408M, PSP409M, PSP410M, PSP411M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 , предназначен для функциональных кроватей различной конструкции состоит из четырех секций с увеличенной толщиной матраса (150 мм), с чехлом из мембранной ткани.

Изображение «Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus в вариантах исполнения» представлено на рис.5.

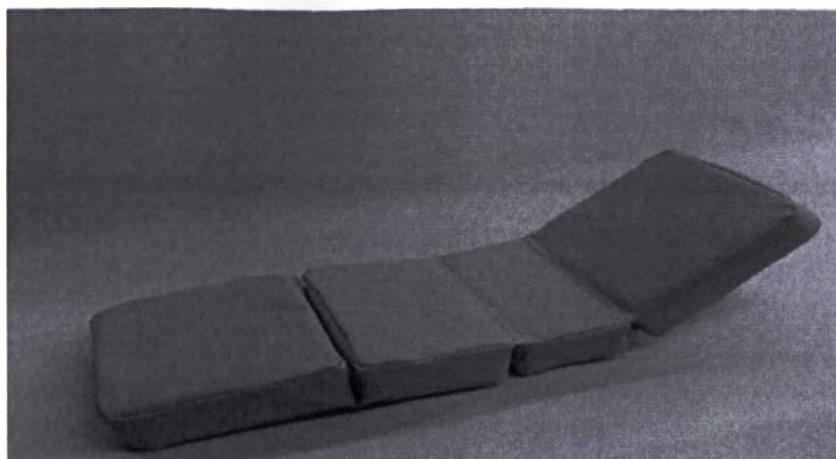


Рис. 5 Матрас четырехсекционный противолежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus в вариантах исполнения

21. Матрас пятисекционный противолежневый пенополиуретановый Ortonica Standart San с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PSS501N, PSS502N, PSS503N, PSS504N, PSS505N, PSS506N, PSS507N, PSS508N, PSS509N, PSS510N, PSS511N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для использования на многофункциональных кроватях, состоит из пяти секций с отверстием под санитарное оснащение, что облегчает уход за больным и проведение санитарно-гигиенических процедур обслуживающего персонала, с чехлом из нейлоновой ткани;

22. Матрас пятисекционный противолежневый пенополиуретановый Ortonica Standart San с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PSS501K, PSS502K, PSS503K, PSS504K, PSS505K, PSS506K, PSS507K, PSS508K, PSS509K, PSS510K, PSS511K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для использования на многофункциональных кроватях, состоит из пяти секций с отверстием под санитарное оснащение, что облегчает уход за больным и проведение санитарно-гигиенических процедур обслуживающего персонала, с чехлом из кожзаменителя;

23. Матрас пятисекционный противолежневый пенополиуретановый Ortonica Standart San с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PSS501V, PSS502V, PSS503V, PSS504V, PSS505V, PSS506V, PSS507V, PSS508V, PSS509V, PSS510V, PSS511V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для использования на многофункциональных кроватях, состоит из пяти секций с отверстием под санитарное оснащение, что облегчает уход за больным и проведение санитарно-гигиенических процедур обслуживающего персонала, с чехлом из клеенки медицинской;

24. Матрас пятисекционный противолежневый пенополиуретановый Ortonica Standart San с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PSS501M, PSS502M, PSS503M, PSS504M, PSS505M, PSS506M, PSS507M, PSS508M, PSS509M, PSS510M, PSS511M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 , предназначен для использования на многофункциональных кроватях, состоит из пяти секций с отверстием под санитарное оснащение, что облегчает уход за больным и проведение санитарно-гигиенических процедур обслуживающего персонала, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение «Матрас пятисекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart San в вариантах исполнения» представлено на рис.6.



Рис. 6 Матрас пятисекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Standart San в вариантах исполнения

25. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Light с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PL101N, PL102N, PL103N, PL104N, PL105N, PL106N, PL107N, PL108N, PL109N, PL110N, PL111N, PL112N, PL113N, PL114N, PL115N, PL116N, PL117N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 . Снизу поперечный профиль, придающий матрасу гибкость и способность принимать форму 2-3-4-секционной кровати, с чехлом из нейлоновой ткани;

26. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Light с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PL101K, PL102K, PL103K, PL104K, PL105K, PL106K, PL107K, PL108K, PL109K, PL110K, PL111K, PL112K, PL113K, PL114K, PL115K, PL116K, PL117K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 . Снизу поперечный профиль, придающий матрасу гибкость и способность принимать форму 2-3-4-секционной кровати, с чехлом из кожзаменителя;

27. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Light с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PL101V, PL102V, PL103V, PL104V, PL105V, PL106V, PL107V, PL108V, PL109V, PL110V, PL111V, PL112V, PL113V, PL114V, PL115V, PL116V, PL117V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 . Снизу поперечный профиль, придающий матрасу гибкость и способность принимать форму 2-3-4-секционной кровати, с чехлом из клеенки медицинской;

28. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Light с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PL101M, PL102M, PL103M, PL104M, PL105M, PL106M, PL107M, PL108M, PL109M, PL110M, PL111M, PL112M, PL113M, PL114M, PL115M, PL116M, PL117M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 . Снизу поперечный профиль, придающий матрасу гибкость и способность принимать форму 2-3-4-секционной кровати, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение «Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Light в вариантах исполнения» представлено на рис.7.



Рис. 7 Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light в вариантах исполнения

29. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PLP101N, PLP102N, PLP103N, PLP104N, PLP105N, PLP106N, PLP107N, PLP108N, PLP109N, PLP110N, PLP111N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 . Снизу поперечный профиль, придающий матрасу гибкость и способность принимать форму 2-3-4-секционной кровати. Матрас с увеличенной толщиной (120 мм), с чехлом из нейлоновой ткани;

30. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PLP101K, PLP102K, PLP103K, PLP104K, PLP105K, PLP106K, PLP107K, PLP108K, PLP109K, PLP110K, PLP111K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 . Снизу поперечный профиль, придающий матрасу гибкость и способность принимать форму 2-3-4-секционной кровати. Матрас с увеличенной толщиной (120 мм), с чехлом из кожзаменителя;

31. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PLP101V, PLP102V, PLP103V, PLP104V, PLP105V, PLP106V, PLP107V, PLP108V, PLP109V, PLP110V, PLP111V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 . Снизу поперечный профиль, придающий матрасу гибкость и способность принимать форму 2-3-4-секционной кровати. Матрас с увеличенной толщиной (120 мм), с чехлом из клеенки медицинской;

32. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PLP101M, PLP102M, PLP103M, PLP104M, PLP105M, PLP106M, PLP107M, PLP108M, PLP109M, PLP110M, PLP111M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 . Снизу поперечный профиль, придающий матрасу гибкость и способность принимать форму 2-3-4-секционной кровати. Матрас с увеличенной толщиной (120 мм), с чехлом из мембранной ткани.

Изображение специального профиля матраса односекционного противопролежневого пенополиуретанового Ortonica Light Plus представлено на рис.8.

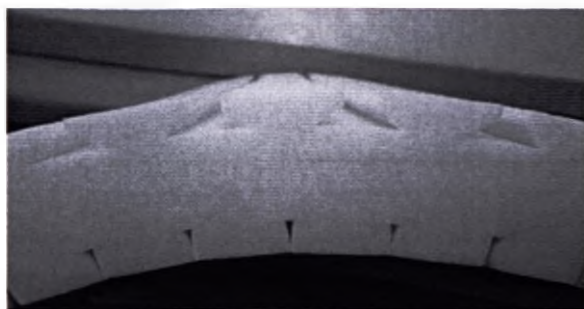


Рис.8 Профиль матраса односекционного противопрележневого пенополиуретановый Ortonica Light Plus в вариантах исполнения

33. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Wave с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PW101N, PW102N, PW103N, PW104N, PW105N, PW106N, PW107N, PW108N, PW109N, PW110N, PW111N, PW112N, PW113N, PW114N, PW115N, PW116N, PW117N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме волны, которая обеспечивает надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигается независимо друг от друга, с чехлом из нейлоновой ткани;

34. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Wave с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PW101K, PW102K, PW103K, PW104K, PW105K, PW106K, PW107K, PW108K, PW109K, PW110K, PW111K, PW112K, PW113K, PW114K, PW115K, PW116K, PW117K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме волны, которая обеспечивает надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигается независимо друг от друга, с чехлом из кожзаменителя;

35. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Wave с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PW101V, PW102V, PW103V, PW104V, PW105V, PW106V, PW107V, PW108V, PW109V, PW110V, PW111V, PW112V, PW113V, PW114V, PW115V, PW116V, PW117V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме волны, которая обеспечивает надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигается независимо друг от друга, с чехлом из клеенки медицинской;

36. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Wave с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PW101M, PW102M, PW103M, PW104M, PW105M, PW106M, PW107M, PW108M, PW109M, PW110M, PW111M, PW112M, PW113M, PW114M, PW115M, PW116M, PW117M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме волны, которая обеспечивает надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигается независимо друг от друга, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение специального профиля матраса односекционного противопрележневого пенополиуретанового Ortonica Wave представлено на рис.9.

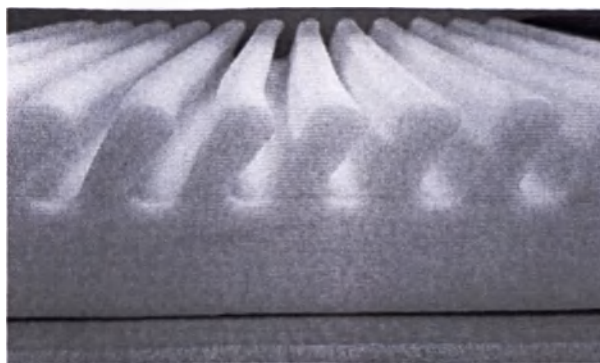


Рис.9 Профиль матраса односекционного противопролежневого пенополиуретанового Ortonica Wave в вариантах исполнения

37. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PP101N, PP102N, PP103N, PP104N, PP105N, PP106N, PP107N, PP108N, PP109N, PP110N, PP111N, PP112N, PP113N, PP114N, PP115N, PP116N, PP117N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме мини блоков, которые обеспечивают надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга, с чехлом из нейлоновой ткани;

38. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PP101K, PP102K, PP103K, PP104K, PP105K, PP106K, PP107K, PP108K, PP109K, PP110K, PP111K, PP112K, PP113K, PP114K, PP115K, PP116K, PP117K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме мини блоков, которые обеспечивают надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга, с чехлом из кожзаменителя;

39. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PP101V, PP102V, PP103V, PP104V, PP105V, PP106V, PP107V, PP108V, PP109V, PP110V, PP111V, PP112V, PP113V, PP114V, PP115V, PP116V, PP117V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме мини блоков, которые обеспечивают надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга, с чехлом из клеенки медицинской;

40. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PP101M, PP102M, PP103M, PP104M, PP105M, PP106M, PP107M, PP108M, PP109M, PP110M, PP111M, PP112M, PP113M, PP114M, PP115M, PP116M, PP117M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме мини блоков, которые обеспечивают надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение специального профиля односекционного противопролежневого пенополиуретанового Ortonica Profile представлено на рис.10.



Рис.10 Профиль матраса односекционного противопрележного пенополиуретанового Ortonica Profile в вариантах исполнения

41. Матрас односекционный противопрележный пенополиуретановый Ortonica Profile Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PPP101N, PPP102N, PPP103N, PPP104N, PPP105N, PPP106N, PPP107N, PPP108N, PPP109N, PPP110N, PPP111N, PPP112N, PPP113N, PPP114N, PPP115N, PPP116N, PPP117N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме больших блоков, которые обеспечивают надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга, с чехлом из нейлоновой ткани;

42. Матрас односекционный противопрележный пенополиуретановый Ortonica Profile Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PPP101K, PPP102K, PPP103K, PPP104K, PPP105K, PPP106K, PPP107K, PPP108K, PPP109K, PPP110K, PPP111K, PPP112K, PPP113K, PPP114K, PPP115K, PPP116K, PPP117K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме больших блоков, которые обеспечивают надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга, с чехлом из кожзаменителя;

43. Матрас односекционный противопрележный пенополиуретановый Ortonica Profile Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PPP101V, PPP102V, PPP103V, PPP104V, PPP105V, PPP106V, PPP107V, PPP108V, PPP109V, PPP110V, PPP111V, PPP112V, PPP113V, PPP114V, PPP115V, PPP116V, PPP117V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме больших блоков, которые обеспечивают надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга, с чехлом из клеенки медицинской;

44. Матрас односекционный противопрележный пенополиуретановый Ortonica Profile Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PPP101M, PPP102M, PPP103M, PPP104M, PPP105M, PPP106M, PPP107M, PPP108M, PPP109M, PPP110M, PPP111M, PPP112M, PPP113M, PPP114M, PPP115M, PPP116M, PPP117M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем в форме больших блоков, которые обеспечивают надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение специального профиля матраса односекционного противопрележного пенополиуретанового Ortonica Profile Plus представлено на рис.11.

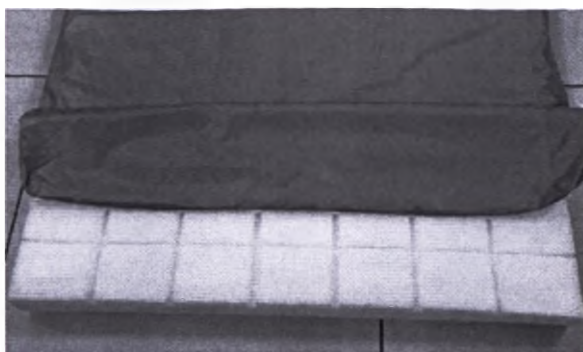


Рис. 11 Профиль матраса односекционного противопротележного пенополиуретановый Ortonica Profile Plus в вариантах исполнения

45. Матрас односекционный противопротележный пенополиуретановый Ortonica Combi с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PC101N, PC102N, PC103N, PC104N, PC105N, PC106N, PC107N, PC108N, PC109N, PC110N, PC111N, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем: пенополиуретан в форме мини блоков по краям укрепленный рамой из планок пенополиуретана, с чехлом из нейлоновой ткани;

46. Матрас односекционный противопротележный пенополиуретановый Ortonica Combi с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PC101K, PC102K, PC103K, PC104K, PC105K, PC106K, PC107K, PC108K, PC109K, PC110K, PC111K, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем: пенополиуретан в форме мини блоков по краям укрепленный рамой из планок пенополиуретана, с чехлом из кожзаменителя;

47. Матрас односекционный противопротележный пенополиуретановый Ortonica Combi с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PC101V, PC102V, PC103V, PC104V, PC105V, PC106V, PC107V, PC108V, PC109V, PC110V, PC111V, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем: пенополиуретан в форме мини блоков по краям укрепленный рамой из планок пенополиуретана, с чехлом из клеенки медицинской;

48. Матрас односекционный противопротележный пенополиуретановый Ortonica Combi с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PC101M, PC102M, PC103M, PC104M, PC105M, PC106M, PC107M, PC108M, PC109M, PC110M, PC111M, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25кг/м^3 со специальным профилем: пенополиуретан в форме мини блоков по краям укрепленный рамой из планок пенополиуретана, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение специального профиля матраса односекционного противопротележного пенополиуретанового Ortonica Combi представлено на рис.12.



Рис.12 Профиль матраса односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Combi в вариантах исполнения

49. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PM101N, PM102N, PM103N, PM104N, PM105N, PM106N, PM107N, PM108N, PM109N, PM110N, PM111N, PM112N, PM113N, PM114N, PM115N, PM116N, PM117N изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из нейлоновой ткани;

50. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PM101K, PM102K, PM103K, PM104K, PM105K, PM106K, PM107K, PM108K, PM109K, PM110K, PM111K, PM112K, PM113K, PM114K, PM115K, PM116K, PM117K изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из кожзаменителя;

51. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PM101V, PM102V, PM103V, PM104V, PM105V, PM106V, PM107V, PM108V, PM109V, PM110V, PM111V, PM112V, PM113V, PM114V, PM115V, PM116V, PM117V изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из клеенки медицинской;

52. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PM101M, PM102M, PM103M, PM104M, PM105M, PM106M, PM107M, PM108M, PM109M, PM110M, PM111M, PM112M, PM113M, PM114M, PM115M, PM116M, PM117M изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение ячеек матраса односекционного противопрележневого пенополиуретанового Ortonica Memory представлено на рис.13.



Рис. 13 Ячейки матраса односекционного противопрележневого пенополиуретанового Ortonica Memory в вариантах исполнения

53. Матрас двухсекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PM201N, PM202N, PM203N, PM204N, PM205N, PM206N, PM207N, PM208N, PM209N,

PM210N, PM211N, PM212N, PM213N, PM214N, PM215N, PM216N, PM217N состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из нейлоновой ткани;

54. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PM201K, PM202K, PM203K, PM204K, PM205K, PM206K, PM207K, PM208K, PM209K, PM210K, PM211K, PM212K, PM213K, PM214K, PM215K, PM216K, PM217K состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из кожзаменителя;

55. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PM201V, PM202V, PM203V, PM204V, PM205V, PM206V, PM207V, PM208V, PM209V, PM210V, PM211V, PM212V, PM213V, PM214V, PM215V, PM216V, PM217V состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из клеенки медицинской;

56. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PM201M, PM202M, PM203M, PM204M, PM205M, PM206M, PM207M, PM208M, PM209M, PM210M, PM211M, PM212M, PM213M, PM214M, PM215M, PM216M, PM217M состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение «Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory в вариантах исполнения» представлено на рис.14.



Рис.14. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory в вариантах исполнения

57. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PM301N, PM302N, PM303N, PM304N, PM305N, PM306N, PM307N, PM308N, PM309N, PM310N, PM311N состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из нейлоновой ткани;

58. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PM301K, PM302K, PM303K, PM304K, PM305K, PM306K, PM307K, PM308K, PM309K,

PM310K, PM311K состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из кожзаменителя;

59. Матрас трехсекционный противопротективный пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PM301V, PM302V, PM303V, PM304V, PM305V, PM306V, PM307V, PM308V, PM309V, PM310V, PM311V состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из кожзаменителя;

60. Матрас трехсекционный противопротективный пенополиуретановый Ortonica Memory с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PM301M, PM302M, PM303M, PM304M, PM305M, PM306M, PM307M, PM308M, PM309M, PM310M, PM311M состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы», плотностью 40 кг/м^3 , который сохраняет форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение секции матраса противопротективного пенополиуретанового Ortonica Memory представлено на рис.15.



Рис.15. Секция матраса трехсекционного противопротективного пенополиуретанового Ortonica Memory, в вариантах исполнения

61. Матрас односекционный противопротективный пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

RMP101N, RMP102N, RMP103N, RMP104N, RMP105N, RMP106N, RMP107N, RMP108N, RMP109N, RMP110N, RMP111N, RMP112N, RMP113N, RMP114N, RMP115N, RMP116N, RMP117N изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из нейлоновой ткани;

62. Матрас односекционный противопротективный пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

RMP101K, RMP102K, RMP103K, RMP104K, RMP105K, RMP106K, RMP107K, RMP108K, RMP109K, RMP110K, RMP111K, RMP112K, RMP113K, RMP114K, RMP115K, RMP116K, RMP117K изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые

обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из кожзаменителя;

63. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

RMP101V, RMP102V, RMP103V, RMP104V, RMP105V, RMP106V, RMP107V, RMP108V, RMP109V, RMP110V, RMP111V, RMP112V, RMP113V, RMP114V, RMP115V, RMP116V, RMP117V изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из клеенки медицинской;

64. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

RMP101M, RMP102M, RMP103M, RMP104M, RMP105M, RMP106M, RMP107M, RMP108M, RMP109M, RMP110M, RMP111M, RMP112M, RMP113M, RMP114M, RMP115M, RMP116M, RMP117M изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение «Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus в вариантах исполнения» представлено на рис.16.



Рис.16. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus в вариантах исполнения

65. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

RMP201N, RMP202N, RMP203N, RMP204N, RMP205N, RMP206N, RMP207N, RMP208N, RMP209N, RMP210N, RMP211N, RMP212N, RMP213N, RMP214N, RMP215N, RMP216N, RMP217N состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном и икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из нейлоновой ткани;

66. Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

RMP201K, RMP202K, RMP203K, RMP204K, RMP205K, RMP206K, RMP207K, RMP208K, RMP209K, RMP210K, RMP211K, RMP212K, RMP213K, RMP214K, RMP215K, RMP216K, RMP217K состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном и

икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из кожзаменителя;

67. Матрас двухсекционный противопротлежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

RMP201V, RMP202V, RMP203V, RMP204V, RMP205V, RMP206V, RMP207V, RMP208V, RMP209V, RMP210V, RMP211V, RMP212V, RMP213V, RMP214V, RMP215V, RMP216V, RMP217V состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном и икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из клеенки медицинской;

68. Матрас двухсекционный противопротлежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

RMP201M, RMP202M, RMP203M, RMP204M, RMP205M, RMP206M, RMP207M, RMP208M, RMP209M, RMP210M, RMP211M, RMP212M, RMP213M, RMP214M, RMP215M, RMP216M, RMP217M состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном и икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение двух секций матраса Ortonica Memory Plus представлено на рис.17.



Рис.17. Две секции матраса противопротлежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus в вариантах исполнения

69. Матрас трехсекционный противопротлежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

RMP301N, RMP302N, RMP303N, RMP304N, RMP305N, RMP306N, RMP307N, RMP308N, RMP309N, RMP310N, RMP311N состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из нейлоновой ткани;

70. Матрас трехсекционный противопротлежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

RMP301K, RMP302K, RMP303K, RMP304K, RMP305K, RMP306K, RMP307K, RMP308K, RMP309K, RMP310K, RMP311K состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из кожзаменителя;

71. Матрас трехсекционный противопротлежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

RMP301V, RMP302V, RMP303V, RMP304V, RMP305V, RMP306V, RMP307V, RMP308V,

RMP309V, RMP310V, RMP311V состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из клеенки медицинской;

72. Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

RMP301M, RMP302M, RMP303M, RMP304M, RMP305M, RMP306M, RMP307M, RMP308M, RMP309M, RMP310M, RMP311M состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 со вставками из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 которые обеспечивают отсутствие сдавливания на лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном участках тела, подверженных риску образования пролежней, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение трех секций матраса противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus представлено на рис.18.



Рис.18. Три секции матраса противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus в вариантах исполнения

73. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PD101N, PD102N, PD103N, PD104N, PD105N, PD106N, PD107N, PD108N, PD109N, PD110N, PD111N, PD112N, PD113N, PD114N, PD115N, PD116N, PD117N двухслойный матрас: верхний слой из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 высотой 40 мм, нижний слой – из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 высотой 100 мм, с чехлом из нейлоновой ткани;

74. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PD101N, PD102N, PD103N, PD104N, PD105N, PD106N, PD107N, PD108N, PD109N, PD110N, PD111N, PD112N, PD113N, PD114N, PD115N, PD116N, PD117N двухслойный матрас: верхний слой из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 высотой 40 мм, нижний слой – из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 высотой 100 мм, с чехлом из кожаменителя;

75. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PD101V, PD102V, PD103V, PD104V, PD105V, PD106V, PD107V, PD108V, PD109V, PD110V, PD111V, PD112V, PD113V, PD114V, PD115V, PD116V, PD117V двухслойный матрас: двухслойный матрас: верхний слой из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 высотой 40 мм, нижний слой – из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 высотой 100 мм, с чехлом из клеенки медицинской;

76. Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo с

чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения:

PD101M, PD102M, PD103M, PD104M, PD105M, PD106M, PD107M, PD108M, PD109M, PD110M, PD111M, PD112M, PD113M, PD114M, PD115M, PD116M, PD117M двухслойный матрас: верхний слой из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 высотой 40 мм, нижний слой – из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 высотой 100 мм, с чехлом из мембранной ткани.

Изображение «Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Duo в вариантах исполнения» представлено на рис.19.

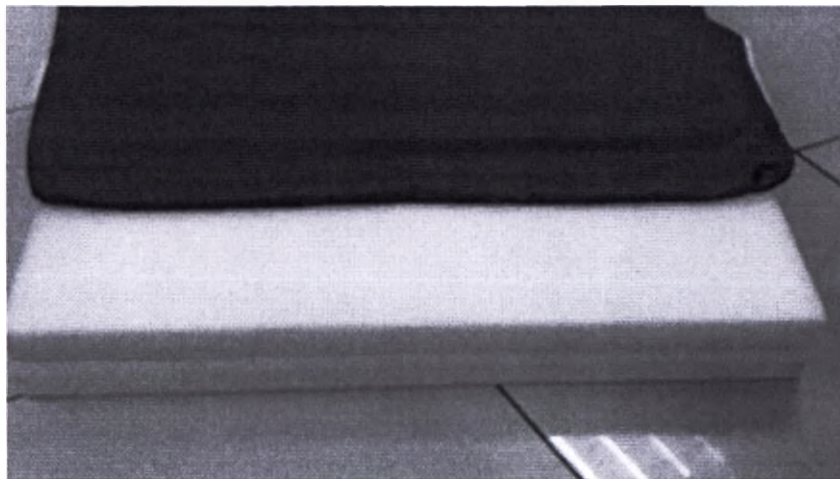


Рис.19. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Duo в вариантах исполнения

77. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Trio с чехлом из нейлоновой ткани, в вариантах исполнения:

PT101N, PT102N, PT103N, PT104N, PT105N, PT106N, PT107N, PT108N, PT109N, PT110N, PT111N, PT112N, PT113N, PT114N, PT115N, PT116N, PT117N трехслойный матрас: верхний слой из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 высотой 20 мм, средний слой из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 высотой 70 мм, нижний слой – из пенополиуретана плотностью 35 кг/м^3 высотой 110 мм, с чехлом из нейлоновой ткани;

78. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Trio с чехлом из кожзаменителя, в вариантах исполнения:

PT101K, PT102K, PT103K, PT104K, PT105K, PT106K, PT107K, PT108K, PT109K, PT110K, PT111K, PT112K, PT113K, PT114K, PT115K, PT116K, PT117K трехслойный матрас: верхний слой из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 высотой 20 мм, средний слой из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 высотой 70 мм, нижний слой – из пенополиуретана плотностью 35 кг/м^3 высотой 110 мм, с чехлом из кожзаменителя;

79. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Trio с чехлом из клеенки медицинской, в вариантах исполнения:

PT101V, PT102V, PT103V, PT104V, PT105V, PT106V, PT107V, PT108V, PT109V, PT110V, PT111V, PT112V, PT113V, PT114V, PT115V, PT116V, PT117V трехслойный матрас: верхний слой из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 высотой 20 мм, средний слой из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 высотой 70 мм, нижний слой – из пенополиуретана плотностью 35 кг/м^3 высотой 110 мм, с чехлом из клеенки медицинской;

80. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Trio с чехлом из мембранной ткани, в вариантах исполнения: PT101M, PT102M, PT103M, PT104M, PT105M, PT106M, PT107M, PT108M, PT109M, PT110M, PT111M, PT112M, PT113M, PT114M, PT115M, PT116M, PT117M трехслойный матрас: верхний слой из пенополиуретана плотностью 25 кг/м^3 высотой 20 мм, средний слой из пенополиуретана с «эффектом запоминания формы» плотностью 40 кг/м^3 высотой 70 мм, нижний слой – из пенополиуретана плотностью 35 кг/м^3 высотой 110 мм, с чехлом из мембранной ткани;

Изображение «Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Trio в вариантах исполнения» представлено на рис.20.

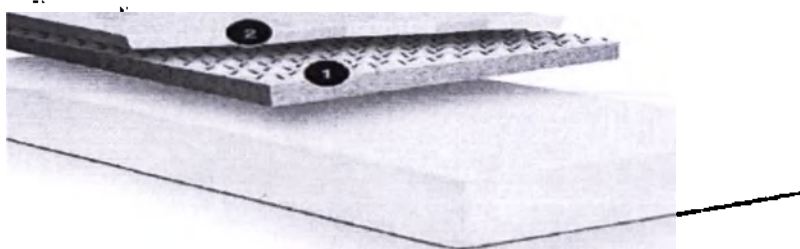


Рис.20. Матрас односекционный противопрележневый пенополиуретановый Ortonica Trio в вариантах исполнения

Чехол для матраса из нейлоновой ткани

Нейлоновая ткань - это полиэстер с полиуретановым покрытием. Предназначен для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного, непроницаемого материала, для покрытия матрасов. Чехол - съемный на молнии с двух сторон (по ширине и длине).

Потребительские свойства:

- подлежит обработке паром, автоклавированию;
- чехол можно стирать в режиме ежедневной стирки;
- воздухопроницаемый.



Рис.21. Чехол для матраса из нейлоновой ткани

Чехол для матраса из кожзаменителя

Кожзаменитель на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием предназначен для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного, непроницаемого материала, для покрытия матрасов. Чехол - съемный на молнии с двух сторон (по ширине и длине).

Потребительские свойства:

- водонепроницаемый;
- стойкий к санитарно-гигиенической обработке, в том числе альдегид и хлор содержащими средствами.



Рис.22. Чехол для матраса из кожзаменителя

Чехол для матраса из клеенки медицинской

Чехол сделан из клеенки медицинской, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием. Предназначен для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного, непроницаемого материала, для покрытия матрасов. Чехол - съемный на молнии с двух сторон (по ширине и длине). Хорошо переносит многоразовые дезинфекции, не теряя своих качеств.

Потребительские свойства:

- водонепроницаемый;
- воздухопроницаемый;
- эластичный;
- отсутствует липкость;
- стойкий к санитарно-гигиенической обработке, в том числе альдегид и хлор содержащими средствами.



Рис.23. Чехол для матраса из клеенки медицинской

Чехол для матраса из мембранной ткани

Предназначен для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного, непроницаемого материала, для покрытия матрасов. Мембранная ткань - это полиэстер, кругловязального плетения с полиуретановым покрытием. Ткань эластичная, тянется в двух направлениях, что позволяет реагировать и подстраиваться к движениям человека, лежащего на ней. Чехол - съемный на молнии с двух сторон (по ширине и длине).

Потребительские свойства:

- водонепроницаемый;
- воздухопроницаемый;
- паропроницаемый
- стойкий к санитарно-гигиенической обработке, за исключением альдегид и хлор содержащих средств.

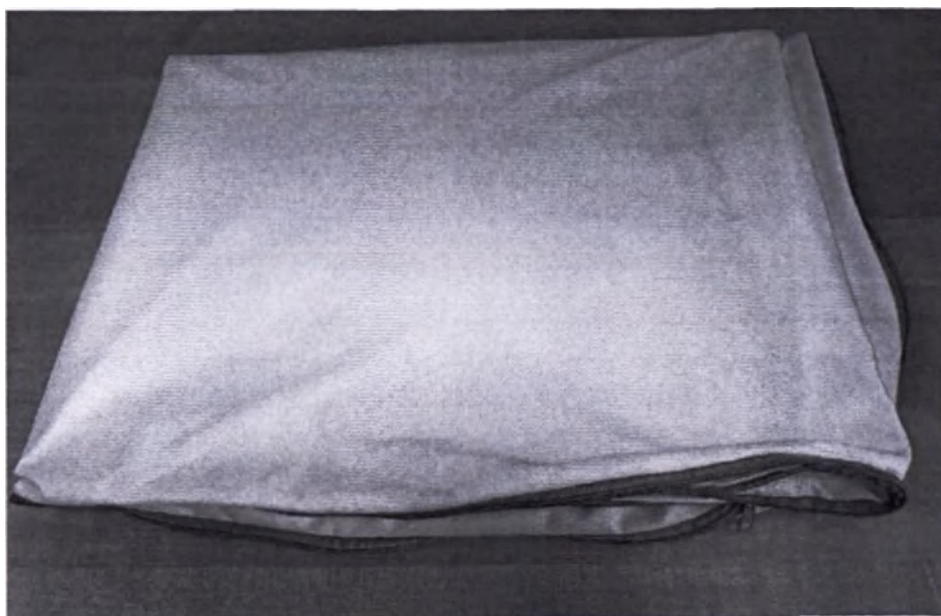


Рис.24. Чехол для матраса из мембранной ткани

2. Показания, противопоказания, побочные эффекты, меры предосторожности

Потенциальными потребителями матрасов противолежневых пенополиуретановых являются инвалиды, немощные и престарелые люди, ожоговые больные, больные с заболеваниями центральной нервной системой, больные с разнообразными повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

⚠ ВНИМАНИЕ: Перед применением проконсультируйтесь с врачом, в случае противопоказаний, указанных ниже.

Показания к применению:

- профилактика пролежней различной степени;
- ожоговая болезнь;
- развитие мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении больного в положении лежа;
- заболевания позвоночника (радикулит, сколиоз, остеохондроз, кифоз);
- заболевания центральной нервной системы (церебральный паралич, рассеянный склероз с парестезией всего тела).

Противопоказания к применению:

- недопустимо при травмах спинного мозга;
- недопустимо при скелетно-шейных вытяжениях;
- при множественных и нестабильных переломах;

По максимальной нагрузке тела:

- Для вариантов исполнения модели «Ortonica Wave» - 80 кг.
- Для вариантов исполнения модели «Ortonica Profile» - 90 кг.
- Для вариантов исполнения модели «Ortonica Profile Plus» - 110 кг.
- Для вариантов исполнения моделей «Ortonica Light», «Ortonica Memory» - 120 кг.
- Для вариантов исполнения моделей «Ortonica Standart», «Ortonica Standart San», «Ortonica Memory Plus» - 125 кг.
- Для вариантов исполнения модели «Ortonica Combi» - 130 кг.
- Для вариантов исполнения модели «Ortonica Standart Plus», «Ortonica Duo» - 140 кг.
- Для вариантов исполнения моделей «Ortonica Light Plus», «Trio» - 150 кг.

В противном случае нагрузка на поверхность будет неоптимальной и сведет на нет весь лечебный эффект.

Побочные эффекты:

- аллергическая реакция на используемые материалы.

Меры безопасности:

- Избегать попадания прямых солнечных лучей;
- Не допускать контакта изделия с замораживающим оборудованием;
- Не допускать контакта изделия с нагревательными приборами;
- Не превышать максимальную нагрузку;
- Не ложиться на матрас без покрытия или одежды, чтобы исключить кожную аллергию;
- Не гладить матрасы противопролежневые пенополиуретановые Ortonica;
- Не гладить чехлы (из нейлоновой ткани, кожзаменителя, клеенки медицинской и мембранной ткани);
- Не подвергать матрас тепловой обработке и не пользоваться отбеливателем;
- Не класть матрас на сломанное или не предназначенное для этого основание;
- Не класть матрас на неровное основание, на основания разного уровня;
- Не класть матрас на решетчатое основание, если зазор между рейками превышает 5 см. Это может сказаться на форме матраса и сократить срок его службы;
- Не класть матрас на основание неподходящего размера. Матрас в кровати должен располагаться свободно (внутренние размеры кровати не должны быть меньше размеров матраса);
- Изделие нельзя подвергать резким механическим воздействиям (прыгать (в том числе детям), ходить по матрасу);
- После чистки и дезинфекции тщательно высушить изделие;
- Для предотвращения деформации матрас не следует скручивать или складывать.

3. Подготовка к работе и порядок работы Матрасов противопролежневых пенополиуретановых Ortonica

- Извлеките матрас из транспортной коробки;
- Перед использованием снимите с матраса полиэтиленовую упаковку и проветрите его;
- Разместите матрас на кровати, расправьте поверхность так, чтобы на нем не было складок и заломов;
- При необходимости наденьте на матрас чехол;
- Накройте матрас хлопковой простыней и положите на него пациента;
- Меняйте положение голова - ноги у матраса раз в 3 месяца (для восстановления слоев настила в процессе эксплуатации);
- Матрасы и чехлы требуют своевременной (в зависимости от загрязнения) дезинфекции и очистки.

4. Технические характеристики

Технические характеристики МИ «Матрас противопролежневый пенополиуретановый Ortonica по ТУ 32.50.50-013-66445146-2019, в вариантах исполнения» должны соответствовать указанным в таблицах 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование и вариант исполнения		Размеры, мм (ДхШхВ)±10 мм	Размеры чехла, мм (ДхШхВ)±10 мм	Размеры секций, мм ячеек ±10 мм	Масса, кг, ±5%	Максимальная нагрузка, кг	Плотность ППУ, кг/м ³
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart	PS101(N,K,V,M)	1300х600х80	1310х610х85	1300х600х80	1,9	125	25
	PS102(N,K,V,M)	1300х700х80	1310х710х85	1300х700х80	2		
	PS103(N,K,V,M)	1300х800х80	1310х810х85	1300х800х80	2,1		
	PS104(N,K,V,M)	1600х600х80	1610х610х85	1600х600х80	2,4		
	PS105(N,K,V,M)	1600х700х80	1610х710х85	1600х700х80	2,5		
	PS106(N,K,V,M)	1600х800х80	1610х810х85	1600х800х80	2,6		
	PS107(N,K,V,M)	1900х700х80	1910х710х85	1900х700х80	3		
	PS108(N,K,V,M)	1900х800х80	1910х810х85	1900х800х80	3,1		
	PS109(N,K,V,M)	1900х850х80	1910х860х85	1900х850х80	3,2		
	PS110(N,K,V,M)	1900х900х80	1910х910х85	1900х900х80	3,3		
	PS111(N,K,V,M)	1950х700х80	1960х710х85	1950х700х80	3,3		
	PS112(N,K,V,M)	1950х800х80	1960х810х85	1950х800х80	3,4		
	PS113(N,K,V,M)	1950х850х80	1960х860х85	1950х850х80	3,5		
	PS114(N,K,V,M)	1950х900х80	1960х910х85	1950х900х80	3,6		
	PS115(N,K,V,M)	2000х800х80	2010х810х85	2000х800х80	3,7		
	PS116(N,K,V,M)	2000х850х80	2010х860х85	2000х850х80	3,8		
	PS117(N,K,V,M)	2000х900х80	2010х910х85	2000х900х80	3,9		
Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart	PS201(N,K,V,M)	1300х600х80	Две секции 560х610х85 760х610х85	Две секции 550х600х80 750х600х80	2,1	125	25
	PS202(N,K,V,M)	1300х700х80	Две секции 560х710х85 760х710х85	Две секции 550х700х80 750х700х80	2,2		
	PS203(N,K,V,M)	1300х800х80	Две секции 560х810х85 760х810х85	Две секции 550х800х80 750х800х80	2,3		

PS204(N,K,V,M)	1600x600x80	Две секции 710x610x85 910x610x85	Две секции 700x600x80 900x600x80	2,6
PS205(N,K,V,M)	1600x700x80	Две секции 710x710x85 910x710x85	Две секции 700x700x80 900x700x80	2,7
PS206(N,K,V,M)	1600x800x80	Две секции 710x810x85 910x810x85	Две секции 700x800x80 900x800x80	2,8
PS207(N,K,V,M)	1900x700x80	Две секции 860x710x85 1060x710x85	Две секции 850x700x80 1050x700x80	3,1
PS208(N,K,V,M)	1900x800x80	Две секции 860x810x85 1060x810x85	Две секции 850x800x80 1050x800x80	3,2
PS209(N,K,V,M)	1900x850x80	Две секции 860x860x85 1060x860x85	Две секции 850x850x80 1050x850x80	3,3
PS210(N,K,V,M)	1900x900x80	Две секции 860x910x85 1060x910x85	Две секции 850x900x80 1050x900x80	3,4
PS211(N,K,V,M)	1950x700x80	Две секции 860x710x85 1110x710x85	Две секции 850x700x80 1100x700x80	3,4
PS212(N,K,V,M)	1950x800x80	Две секции 860x810x85 1110x810x85	Две секции 850x800x80 1100x800x80	3,5
PS213(N,K,V,M)	1950x850x80	Две секции 860x860x85 1110x860x85	Две секции 850x850x80 1100x850x80	3,6
PS214(N,K,V,M)	1950x900x80	Две секции 860x910x85 1110x910x85	Две секции 850x900x80 1100x900x80	3,7
PS215(N,K,V,M)	2000x800x80	Две секции	Две секции	3,8

			860x810x85 1160x810x85	850x800x80 1150x800x80		
	PS216(N,K,V,M)	2000x850x80	Две секции 860x860x85 1160x860x85	Две секции 850x850x80 1150x850x80	3,9	
	PS217(N,K,V,M)	2000x900x80	Две секции 860x910x85 1160x910x85	Две секции 850x900x80 1150x900x80	4	
Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart	PS301(N,K,V,M)	1900x700x80	Три секции 640x710x85	Три секции 630x700x80	2,9	125
	PS302(N,K,V,M)	1900x800x80	Три секции 640x810x85	Три секции 630x800x80	3	
	PS303(N,K,V,M)	1900x850x80	Три секции 640x860x85	Три секции 630x850x80	3,1	
	PS304(N,K,V,M)	1900x900x80	Три секции 640x910x85	Три секции 630x900x80	3,2	
	PS305(N,K,V,M)	1950x700x80	Три секции 660x710x85	Три секции 650x700x80	3,3	
	PS306(N,K,V,M)	1950x800x80	Три секции 660x810x85	Три секции 650x800x80	3,4	
	PS307(N,K,V,M)	1950x850x80	Три секции 660x860x85	Три секции 650x850x80	3,5	
	PS308(N,K,V,M)	1950x900x80	Три секции 660x910x85	Три секции 650x900x80	3,6	
	PS309(N,K,V,M)	2000x800x80	Три секции 675x810x85	Три секции 665x800x80	3,7	
	PS310(N,K,V,M)	2000x850x80	Три секции 675x860x85	Три секции 665x850x80	3,8	
	PS311(N,K,V,M)	2000x900x80	Три секции 675x910x85	Три секции 665x900x80	3,9	
Матрас четырёхсекционный противопролежневый пенополиуретановый	PS401(N,K,V,M)	1900x700x80	Четыре секции 610x710x85 310x710x85 260x710x85	Четыре секции 600x700x80 300x700x80 250x700x80	3,2	125

25

25

Ortonica Standart			710x710x85	700x700x80	
	PS402(N,K,V,M)	1900x800x80	Четыре секции 610x810x85 310x810x85 260x810x85 710x810x85	Четыре секции 600x800x80 300x800x80 250x800x80 700x800x80	3,3
	PS403(N,K,V,M)	1900x850x80	Четыре секции 610x860x85 310x860x85 260x860x85 710x860x85	Четыре секции 600x850x80 300x850x80 250x850x80 700x850x80	3,4
	PS404(N,K,V,M)	1900x900x80	Четыре секции 610x910x85 310x910x85 260x910x85 710x910x85	Четыре секции 600x900x80 300x900x80 250x900x80 700x900x80	3,5
	PS405(N,K,V,M)	1950x700x80	Четыре секции 610x710x85 310x710x85 260x710x85 760x710x85	Четыре секции 600x700x80 300x700x80 250x700x80 750x700x80	3,6
	PS406(N,K,V,M)	1950x800x80	Четыре секции 610x810x85 310x810x85 260x810x85 760x810x85	Четыре секции 600x800x80 300x800x80 250x800x80 750x800x80	3,7
	PS407(N,K,V,M)	1950x850x80	Четыре секции 610x860x85 310x860x85 260x860x85 760x860x85	Четыре секции 600x850x80 300x850x80 250x850x80 750x850x80	3,8
	PS408(N,K,V,M)	1950x900x80	Четыре секции 610x910x85 310x910x85	Четыре секции 600x900x80 300x900x80	3,9

			260x910x85 760x910x85	250x900x80 750x900x80			
	PS409(N,K,V,M)	2000x800x80	Четыре секции 610x810x85 310x810x85 260x810x85 810x810x85	Четыре секции 600x800x80 300x800x80 250x800x80 800x800x80	2,4		
	PS410(N,K,V,M)	2000x850x80	Четыре секции 610x860x85 310x860x85 260x860x85 810x860x85	Четыре секции 600x850x80 300x850x80 250x850x80 800x850x80	2,5		
	PS411(N,K,V,M)	2000x900x80	Четыре секции 610x910x85 310x910x85 260x910x85 810x910x85	Четыре секции 600x900x80 300x900x80 250x900x80 800x900x80	2,6		
Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus	PSP401(N,K,V,M)	1900x700x150	Четыре секции 610x710x155 310x710x155 260x710x155 710x710x155	Четыре секции 600x700x150 300x700x150 250x700x150 700x700x150	4,8	140	25
	PSP402(N,K,V,M)	1900x800x150	Четыре секции 610x810x155 310x810x155 260x810x155 710x810x155	Четыре секции 600x800x150 300x800x150 250x800x150 700x800x150	4,9		
	PSP403(N,K,V,M)	1900x850x150	Четыре секции 610x860x155 310x860x155 260x860x155 710x860x155	Четыре секции 600x850x150 300x850x150 250x850x150 700x850x150	5		
	PSP404(N,K,V,M)	1900x900x150	Четыре секции 610x910x155	Четыре секции 600x900x150	5,1		

		310x910x155 260x910x155 710x910x155	300x900x150 250x900x150 700x900x150	
PSP405(N,K,V,M)	1950x700x150	Четыре секции 610x710x155 310x710x155 260x710x155 760x710x155	Четыре секции 600x700x150 300x700x150 250x700x150 750x700x150	5,2
PSP406(N,K,V,M)	1950x800x150	Четыре секции 610x810x155 310x810x155 260x810x155 760x810x155	Четыре секции 600x800x150 300x800x150 250x800x150 750x800x150	5,3
PSP407(N,K,V,M)	1950x850x150	Четыре секции 610x860x155 310x860x155 260x860x155 760x860x155	Четыре секции 600x850x150 300x850x150 250x850x150 750x850x150	5,4
PSP408(N,K,V,M)	1950x900x150	Четыре секции 610x910x155 310x910x155 260x910x155 760x910x155	Четыре секции 600x900x150 300x900x150 250x900x150 750x900x150	5,5
PSP409(N,K,V,M)	2000x800x150	Четыре секции 610x810x155 310x810x155 260x810x155 810x810x155	Четыре секции 600x800x150 300x800x150 250x800x150 800x800x150	5,6
PSP410(N,K,V,M)	2000x850x150	Четыре секции 610x860x155 310x860x155 260x860x155 810x860x155	Четыре секции 600x850x150 300x850x150 250x850x150 800x850x150	5,7
PSP411(N,K,V,M)	2000x900x150	Четыре секции	Четыре секции	5,8

			610х910х155 310х910х155 260х910х155 810х910х155	600х900х150 300х900х150 250х900х150 800х900х150		
Матрас пятисекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart San	PSS501(N,K,V,M)	1900х700х80	Пять секций 360х710х85 290х710х85 180х710х85 360х710х85 710х710х85 Отверстие 310х210х85	Пять секций 350х700х80 280х700х80 170х700х80 350х700х80 700х700х80 Отверстие 300х200х80	3,9	125
	PSS502(N,K,V,M)	1900х800х80	Пять секций 360х810х85 290х810х85 180х810х85 360х810х85 710х810х85 секция в отверстие 310х210х85	Пять секций 350х800х80 280х800х80 170х800х80 350х800х80 700х800х80 секция в отверстие 300х200х80	4	
	PSS503(N,K,V,M)	1900х850х80	Пять секций 360х860х85 290х860х85 180х860х85 360х860х85 710х860х85 секция в отверстие 310х210х85	Пять секций 350х850х80 280х850х80 170х850х80 350х850х80 700х850х80 секция в отверстие 300х200х80	4,1	
	PSS504(N,K,V,M)	1900х900х80	Пять секций 360х910х85 290х910х85 180х910х85	Пять секций 350х900х80 280х900х80 170х900х80	4,2	
						25

		360х910х85 710х910х85 секция в отверстие 310х210х85	350х900х80 700х900х80 секция в отверстие 300х200х80	
PSS505(N,K,V,M)	1950х700х80	Пять секций 360х710х85 290х710х85 180х710х85 360х710х85 760х710х85 секция в отверстие 310х210х85	Пять секций 350х700х80 280х700х80 170х700х80 350х700х80 750х700х80 секция в отверстие 300х200х80	4,3
PSS506(N,K,V,M)	1950х800х80	Пять секций 360х810х85 290х810х85 180х810х85 360х810х85 760х810х85 секция в отверстие 310х210х85	Пять секций 350х800х80 280х800х80 170х800х80 350х800х80 750х800х80 секция в отверстие 300х200х80	4,4
PSS507(N,K,V,M)	1950х850х80	Пять секций 360х860х85 290х860х85 180х860х85 360х860х85 760х860х85 секция в отверстие 310х210х85	Пять секций 350х850х80 280х850х80 170х850х80 350х850х80 750х850х80 секция в отверстие 300х200х80	4,5
PSS508(N,K,V,M)	1950х900х80	Пять секций 360х910х85	Пять секций 350х900х80	4,6

			290х910х85 180х910х85 360х910х85 760х910х85 секция в отверстие 310х210х85	280х900х80 170х900х80 350х900х80 750х900х80 секция в отверстие 300х200х80	
	PSS509(N,K,V,M)	2000х800х80	Пять секций 360х810х85 290х810х85 180х810х85 360х810х85 810х810х85 секция в отверстие 310х210х85	Пять секций 350х800х80 280х800х80 170х800х80 350х800х80 800х800х80 секция в отверстие 300х200х80	4,7
	PSS510(N,K,V,M)	2000х850х80	Пять секций 360х860х85 290х860х85 180х860х85 360х860х85 810х860х85 секция в отверстие 310х210х85	Пять секций 350х800х80 280х800х80 170х800х80 350х800х80 700х800х80 секция в отверстие 300х200х80	4,8
	PSS511(N,K,V,M)	2000х900х80	Пять секций 360х910х85 290х910х85 180х910х85 360х910х85 810х910х85 секция в отверстие 310х210х85	Пять секций 350х900х80 280х900х80 170х900х80 350х900х80 800х900х80 секция в отверстие 300х200х80	4,9

Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light	PL101(N,K,V,M)	1300x600x100	1310x650x105	- на рабочей поверхности трапециевидны е конусы, размер 60 мм в широкой части, 20 мм в узкой части и высотой 25 мм. Расстояние между конусами в широкой части составляет 40 мм. - на нижней поверхности матраца прямоугольные поперечные насечки, шириной 10 мм, глубиной 22 мм, расстояние между насечками 45 мм.	2,6	120	25
	PL102(N,K,V,M)	1300x700x100	1310x710x105		2,7		
	PL103(N,K,V,M)	1300x800x100	1310x810x105		2,8		
	PL104(N,K,V,M)	1600x600x100	1610x610x105		3,1		
	PL105(N,K,V,M)	1600x700x100	1610x710x105		3,3		
	PL106(N,K,V,M)	1600x800x100	1610x810x105		3,4		
	PL107(N,K,V,M)	1900x700x100	1910x710x105		4,1		
	PL108(N,K,V,M)	1900x800x100	1910x810x105		4,3		
	PL109(N,K,V,M)	1900x850x100	1910x860x105		4,5		
	PL110(N,K,V,M)	1900x900x100	1910x910x105		4,7		
	PL111(N,K,V,M)	1950x700x100	1960x710x105		4,7		
	PL112(N,K,V,M)	1950x800x100	1960x810x105		4,9		
	PL113(N,K,V,M)	1950x850x100	1960x860x105		5		
	PL114(N,K,V,M)	1950x900x100	1960x910x105		5,2		
	PL115(N,K,V,M)	2000x800x100	2010x810x105		5,2		
	PL116(N,K,V,M)	2000x850x100	2010x860x105		5,3		
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый					5,5	150	25
	PL117(N,K,V,M)	2000x900x100	2010x910x105				
	PLP101(N,K,V,M)	1900x700x120	1910x710x125	- на рабочей поверхности трапециевидны е конусы,	5,3		
	PLP102(N,K,V,M)	1900x800x120	1910x810x125		5,5		
	PLP103(N,K,V,M)	1900x850x120	1910x860x125		5,7		

Ortonica Light Plus	PLP104(N,K,V,M)	1900x900x120	1910x910x125	размер 60 мм в широкой части, 20 мм в узкой части и высотой 25 мм. Расстояние между конусами в широкой части составляет 40 мм. - на нижней поверхности матраца прямоугольные поперечные насечки, шириной 10 мм, глубиной 22 мм, расстояние между насечками 45 мм.	5,8		
	PLP105(N,K,V,M)	1950x700x120	1960x710x125		5,9		
	PLP106(N,K,V,M)	1950x800x120	1960x810x125		6,1		
	PLP107(N,K,V,M)	1950x850x120	1960x860x125		6,2		
	PLP108(N,K,V,M)	1950x900x120	1960x910x125		6,4		
	PLP109(N,K,V,M)	2000x800x120	2010x810x125		6,4		
	PLP110(N,K,V,M)	2000x850x120	2010x860x125		6,6		
	PLP111(N,K,V,M)	2000x900x120	2010x910x125		6,9		
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Wave	PW101(N,K,V,M)	1300x600x120	1310x610x125	Высота волн 50мм	1,9	80	25
	PW102(N,K,V,M)	1300x700x120	1310x710x125		2		
	PW103(N,K,V,M)	1300x800x120	1310x810x125		2,1		
	PW104(N,K,V,M)	1600x600x120	1610x610x125		2,3		
	PW105(N,K,V,M)	1600x700x120	1610x710x125		2,4		
	PW106(N,K,V,M)	1600x800x120	1610x810x125		2,5		
	PW107(N,K,V,M)	1900x700x120	1910x710x125		2,8		
	PW108(N,K,V,M)	1900x800x120	1910x810x125		2,9		
	PW109(N,K,V,M)	1900x850x120	1910x860x125		3		

	PW110(N,K,V,M)	1900x900x120	1910x910x125		3,1		
	PW111(N,K,V,M)	1950x700x120	1960x710x125		3,2		
	PW112(N,K,V,M)	1950x800x120	1960x810x125		3,3		
	PW113(N,K,V,M)	1950x850x120	1960x860x125		3,4		
	PW114(N,K,V,M)	1950x900x120	1960x910x125		3,5		
	PW115(N,K,V,M)	2000x800x120	2010x810x125		3,6		
	PW116(N,K,V,M)	2000x850x120	2010x860x125		3,7		
	PW117(N,K,V,M)	2000x900x120	2010x910x125		3,8		
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile	PP101(N,K,V,M)	1300x600x110	1310x610x115	Ячейка 50x50 мм, высота 80 мм, расстояние между ячейками 10 мм	3,6	90	25
	PP102(N,K,V,M)	1300x700x110	1310x710x115		3,7		
	PP103(N,K,V,M)	1300x800x110	1310x810x115		3,8		
	PP104(N,K,V,M)	1600x600x110	1610x610x115		4,1		
	PP105(N,K,V,M)	1600x700x110	1610x710x115		4,2		
	PP106(N,K,V,M)	1600x800x110	1610x810x115		4,3		
	PP107(N,K,V,M)	1900x700x110	1910x710x115		4,6		
	PP108(N,K,V,M)	1900x800x110	1910x810x115		4,7		
	PP109(N,K,V,M)	1900x850x110	1910x860x115		4,8		
	PP110(N,K,V,M)	1900x900x110	1910x910x115		4,9		
	PP111(N,K,V,M)	1950x700x110	1960x710x115		5		
	PP112(N,K,V,M)	1950x800x110	1960x810x115		5,1		
	PP113(N,K,V,M)	1950x850x110	1960x860x115		5,2		
	PP114(N,K,V,M)	1950x900x110	1960x910x115		5,3		
	PP115(N,K,V,M)	2000x800x110	2010x810x115		5,4		
	PP116(N,K,V,M)	2000x850x110	2010x860x115		5,5		

	PP117(N,K,V,M)	2000x900x110	2010x910x115		5,6		
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile Plus	PPP101(N,K,V,M)	1300x600x110	1310x610x115	Ячейка 100x100 мм, высота 80 мм, расстояние между ячейками 10 мм	3,8	110	25
	PPP102(N,K,V,M)	1300x700x110	1310x710x115		3,9		
	PPP103(N,K,V,M)	1300x800x110	1310x810x115		4		
	PPP104(N,K,V,M)	1600x600x110	1610x610x115		4,3		
	PPP105(N,K,V,M)	1600x700x110	1610x710x115		4,4		
	PPP106(N,K,V,M)	1600x800x110	1610x810x115		4,5		
	PPP107(N,K,V,M)	1900x700x110	1910x710x115		4,8		
	PPP108(N,K,V,M)	1900x800x110	1910x810x115		4,9		
	PPP109(N,K,V,M)	1900x850x110	1910x860x115		5		
	PPP110(N,K,V,M)	1900x900x110	1910x910x115		5,1		
	PPP111(N,K,V,M)	1950x700x110	1960x710x115		5,2		
	PPP112(N,K,V,M)	1950x800x110	1960x810x115		5,3		
	PPP113(N,K,V,M)	1950x850x110	1960x860x115		5,4		
	PPP114(N,K,V,M)	1950x900x110	1960x910x115		5,5		
	PPP115(N,K,V,M)	2000x800x110	2010x810x115		5,6		
	PPP116(N,K,V,M)	2000x850x110	2010x860x115		5,7		
	PPP117(N,K,V,M)	2000x900x110	2010x910x115		5,8		
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Combi	PC101(N,K,V,M)	1900x700x130	1910x710x135	Основание 1900x700x50, планки 1750x150x80, 550x150x80, верхние секции с ячейками 1600x400x80, ячейки	6,3		

				50x50x50, расстояние между ячейками 5мм		25
	PC102(N,K,V,M)	1900x800x130	1910x810x135	Основание 1900x800x50, планки 1750x150x80, 650x150x80, верхние секции с ячейками 1600x500x80, ячейки 50x50x50, расстояние между ячейками 5мм	6,5	
	PC103(N,K,V,M)	1900x850x130	1910x860x135	Основание 1900x850x50, планки 1750x150x80, 700x150x80, верхние секции с ячейками 1600x550x80, ячейки 50x50x50, расстояние между ячейками 5мм	6,7	
	PC104(N,K,V,M)	1900x900x130	1910x910x135	Основание 1900x900x50, планки 1750x150x80, 750x150x80,	6,9	

				верхние секции с ячейками 1600х600х80, ячейки 50х50х50, расстояние между ячейками 5мм	
	PC105(N,K,V,M)	1950х700х130	1960х710х135	Основание 1950х700х50, планки 1800х150х80, 550х150х80, верхние секции с ячейками 1650х400х80, ячейки 50х50х50, расстояние между ячейками 5мм	6,9
	PC106(N,K,V,M)	1950х800х130	1960х810х135	Основание 1950х800х50, планки 1800х150х80, 650х150х80, верхние секции с ячейками 1650х500х80, ячейки 50х50х50, расстояние между ячейками 5мм	7,1

130

	PC107(N,K,V,M)	1950x850x130	1960x860x135	Основание 1950x850x50, планки 1800x150x80, 700x150x80, верхние секции с ячейками 1650x550x80, ячейки 50x50x50, расстояние между ячейками 5мм	7,3
	PC108(N,K,V,M)	1950x900x130	1960x910x135	Основание 1950x900x50, планки 1800x150x80, 750x150x80, верхние секции с ячейками 1650x600x80, ячейки 50x50x50, расстояние между ячейками 5мм	7,5
	PC109(N,K,V,M)	2000x800x130	2010x810x135	Основание 2000x800x50, планки 1850x150x80, 650x150x80, верхние секции с ячейками 1700x500x80, ячейки	7,6

				50x50x50, расстояние между ячейками 5мм			
	PC110(N,K,V,M)	2000x850x130	2010x860x135	Основание 2000x850x50, планки 1850x150x80, 700x150x80, верхние секции с ячейками 1700x550x80, ячейки 50x50x50, расстояние между ячейками 5мм	7,8		
	PC111(N,K,V,M)	2000x900x130	2010x910x135	Основание 2000x900x50, планки 1850x150x80, 750x150x80, верхние секции с ячейками 1700x600x80, ячейки 50x50x50, расстояние между ячейками 5мм	8		
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый	PM101(N,K,V,M)	1300x600x80	1310x610x85	Ячейки 100x100x10	8,3	120	40
	PM102(N,K,V,M)	1300x700x80	1310x710x85		8,5		
	PM103(N,K,V,M)	1300x800x80	1310x810x85		8,7		

Ortonica Memory	PM104(N,K,V,M)	1600x600x80	1610x610x85		9,4		
	PM105(N,K,V,M)	1600x700x80	1610x710x85		9,7		
	PM106(N,K,V,M)	1600x800x80	1610x810x85		10,0		
	PM107(N,K,V,M)	1900x700x80	1910x710x85		10,5		
	PM108(N,K,V,M)	1900x800x80	1910x810x85		10,7		
	PM109(N,K,V,M)	1900x850x80	1910x860x85		11,1		
	PM110(N,K,V,M)	1900x900x80	1910x910x85		11,3		
	PM111(N,K,V,M)	1950x700x80	1960x710x85		11,5		
	PM112(N,K,V,M)	1950x800x80	1960x810x85		11,7		
	PM113(N,K,V,M)	1950x850x80	1960x860x85		12,0		
	PM114(N,K,V,M)	1950x900x80	1960x910x85		12,2		
	PM115(N,K,V,M)	2000x800x80	2010x810x85		12,4		
	PM116(N,K,V,M)	2000x850x80	2010x860x85		12,5		
	PM117(N,K,V,M)	2000x900x80	2010x910x85		12,6		
Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory	PM201(N,K,V,M)	1300x600x80	1310x610x85	Две секции 650x600x80 Ячейки 100x100x10	8,4	120	
	PM202(N,K,V,M)	1300x700x80	1310x710x85	Две секции 650x700x80 Ячейки 100x100x10	8,6		
	PM203(N,K,V,M)	1300x800x80	1310x810x85	Две секции 650x800x80 Ячейки 100x100x10	8,8		
	PM204(N,K,V,M)	1600x600x80	1610x610x85	Две секции 800x600x80 Ячейки 100x100x10	9,4		

	PM205(N,K,V,M)	1600x700x80	1610x710x85	Две секции 800x700x80 Ячейки 100x100x10	9,7
	PM206(N,K,V,M)	1600x800x80	1610x810x85	Две секции 800x800x80 Ячейки 100x100x10	10,0
	PM207(N,K,V,M)	1900x700x80	1910x710x85	Две секции 950x700x80 Ячейки 100x100x10	10,5
	PM208(N,K,V,M)	1900x800x80	1910x810x85	Две секции 950x800x80 Ячейки 100x100x10	10,7
	PM209(N,K,V,M)	1900x850x80	1910x860x85	Две секции 950x850x80 Ячейки 100x100x10	11,1
	PM210(N,K,V,M)	1900x900x80	1910x910x85	Две секции 950x900x80 Ячейки 100x100x10	11,3
	PM211(N,K,V,M)	1950x700x80	1960x710x85	Две секции 975x700x80 Ячейки 100x100x10	11,5
	PM212(N,K,V,M)	1950x800x80	1960x810x85	Две секции 975x800x80 Ячейки 100x100x10	11,7
	PM213(N,K,V,M)	1950x850x80	1960x860x85	Две секции 975x850x80	12,0

				Ячейки 100х100х10			
	PM214(N,K,V,M)	1950х900х80	1960х910х85	Две секции 975х900х80 Ячейки 100х100х10	12,2		
	PM215(N,K,V,M)	2000х800х80	2010х810х85	Две секции 1000х800х80 Ячейки 100х100х10	12,4		
	PM216(N,K,V,M)	2000х850х80	2010х860х85	Две секции 1000х850х80 Ячейки 100х100х10	12,5		
	PM217(N,K,V,M)	2000х900х80	2010х910х85	Две секции 1000х900х80 Ячейки 100х100х10	12,6		
Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory	PM301(N,K,V,M)	1900х700х80	1910х710х85	Три секции 630х700х80 Ячейки 100х100х10	10,5	120	40
	PM302(N,K,V,M)	1900х800х80	1910х810х85	Три секции 630х800х80 Ячейки 100х100х10	10,7		
	PM303(N,K,V,M)	1900х850х80	1910х860х85	Три секции 630х850х80 Ячейки 100х100х10	11,1		
	PM304(N,K,V,M)	1900х900х80	1910х910х85	Три секции 630х900х80 Ячейки 100х100х10	11,3		

	PM305(N,K,V,M)	1950x700x80	1960x710x85	Три секции 650x700x80 Ячейки 100x100x10	11,5
	PM306(N,K,V,M)	1950x800x80	1960x810x85	Три секции 650x800x80 Ячейки 100x100x10	11,7
	PM307(N,K,V,M)	1950x850x80	1960x860x85	Три секции 650x850x80 Ячейки 100x100x10	12,0
	PM308(N,K,V,M)	1950x900x80	1960x910x85	Три секции 650x900x80 Ячейки 100x100x10	12,2
	PM308(N,K,V,M)	2000x800x80	2010x810x85	Три секции 665x800x80 Ячейки 100x100x10	12,4
	PM310(N,K,V,M)	2000x850x80	2010x860x85	Три секции 665x850x80 Ячейки 100x100x10	12,5
	PM311(N,K,V,M)	2000x900x80	2010x910x85	Три секции 665x900x80 Ячейки 100x100x10	12,6

Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus	PMP101(N,K,V,M)	1300x600x80	1310x610x85	Ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, две вставки ППУ по всей ширине матраса 390x600x20, расстояние от края матраса 130мм, между вставками 260 мм	2	125	25/40
	PMP102(N,K,V,M)	1300x700x80	1310x710x85	Ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, две вставки ППУ по всей ширине матраса 390x700x20, расстояние от края матраса 130мм, между вставками 260 мм	2,05		
	PMP103(N,K,V,M)	1300x800x80	1310x810x80	Ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, две вставки ППУ по всей	2,1		

				ширине матраца 390х800х20, расстояние от края матраца 130мм, между вставками 260 мм	
	PMP104(N,K,V,M)	1600х600х80	1610х610х80	Ячейки 60х40х20 мм расстояние между ячейками 10мм, две вставки ППУ по всей ширине матраца 540х600х20, расстояние от края матраца 130мм, между вставками 260 мм	2,3
	PMP105(N,K,V,M)	1600х700х80	1610х710х80	Ячейки 60х40х20 мм расстояние между ячейками 10мм, две вставки ППУ-по всей ширине матраца 540х700х20, расстояние от края матраца 130мм, между вставками 260 мм	2,35

	PMP106(N,K,V,M)	1600x800x80	1610x810x80	Ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, две вставки ППУ по всей ширине матраса 540x800x20, расстояние от края матраса 130мм, между вставками 260 мм	2,4
	PMP107(N,K,V,M)	1900x700x80	1910x710x80	Ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, три вставки ППУ по всей ширине матраса 390x700x20, расстояние от края матраса 130мм, между вставками 235 мм	2,7
	PMP108(N,K,V,M)	1900x800x80	1910x810x80	Ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, три вставки ППУ по всей	2,8

				ширине матраса 390х800х20, расстояние от края матраса 130мм, между вставками 235 мм	
	PMP109(N,K,V,M)	1900х850х80	1910х860х80	Ячейки 60х40х20 мм расстояние между ячейками 10мм, три вставки ППУ по всей ширине матраса 390х850х20, расстояние от края матраса 130мм, между вставками 235 мм	2,9
	PMP110(N,K,V,M)	1900х900х80	1910х910х80	Ячейки 60х40х20 мм расстояние между ячейками 10мм, три вставки ППУ по всей ширине матраса 390х900х20, расстояние от края матраса 130мм, между вставками 235 мм	3

	PMP111(N,K,V,M)	1950x700x80	1960x710x85	Ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, три вставки ППУ по всей ширине матраса 390x700x20, расстояние от края матраса 130мм, между вставками 260 мм	3,1
	PMP112(N,K,V,M)	1950x800x80	1960x810x85	Ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, три вставки ППУ по всей ширине матраса 390x800x20, расстояние от края матраса 130мм, между вставками 260 мм	3,2
	PMP113(N,K,V,M)	1950x850x80	1960x860x85	Ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, три вставки ППУ по всей	3,3

				ширине матраса 390х850х20, расстояние от края матраса 130мм, между вставками 260 мм	
	PMP114(N,K,V,M)	1950х900х80	1960х910х85	Ячейки 60х40х20 мм расстояние между ячейками 10мм, три вставки ППУ по всей ширине матраса 390х900х20, расстояние от края матраса 130мм, между вставками 260 мм	3,4
	PMP115(N,K,V,M)	2000х800х80	2010х810х85	Ячейки 60х40х20 мм расстояние между ячейками 10мм, три вставки ППУ по всей ширине матраса 400х800х20, расстояние от края матраса 140мм, между вставками 260 мм	3,5

Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus	PMP116(N,K,V,M)	2000x850x80	2010x860x85	Ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, три вставки ППУ по всей ширине матраса 400x850x20, расстояние от края матраса 140мм, между вставками 260 мм	3,6		
	PMP117(N,K,V,M)	2000x900x80	2010x910x85	Ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, три вставки ППУ по всей ширине матраса 400x900x20, расстояние от края матраса 140мм, между вставками 260 мм	3,7		
	PMP201(N,K,V,M)	1300x600x80	1310x610x85	Две секции 550x600x80 750x600x80, ячейки 60x40x20, расстояние между	2		

				ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 450х600х20	
	PMP202(N,K,V,M)	1300х700х80	1310х710х85	Две секции 550х700х80 750х700х80, ячейки 60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 450х700х20	2,1
	PMP203(N,K,V,M)	1300х800х80	1310х810х85	Две секции 550х800х80 750х800х80, ячейки 60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 450х800х20	2,2
	PMP204(N,K,V,M)	1600х600х80	1610х610х85	Две секции 700х600х80 900х600х80, ячейки 60х40х20, расстояние	2,35

125

25/40

				между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 600х600х20	
	PMP205(N,K,V,M)	1600х700х80	1610х710х85	Две секции 700х700х80 900х700х80, ячейки 60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 600х700х20	2,4
	PMP206(N,K,V,M)	1600х800х80	1610х810х85	Две секции 700х800х80 900х800х80, ячейки 60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 600х800х20	2,5
	PMP207(N,K,V,M)	1900х700х80	1910х710х85	Две секции 850х700х80 1050х700х80, ячейки 60х40х20,	2,8

				расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 650х700х20	
	PMP208(N,K,V,M)	1900х800х80	1910х810х85	Две секции 850х800х80 1050х800х80, ячейки 60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 650х800х20	2,9
	PMP209(N,K,V,M)	1900х850х80	1910х860х85	Две секции 850х850х80 1050х850х80, ячейки 60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 650х850х20	,3
	PMP210(N,K,V,M)	1900х900х80	1910х910х85	Две секции 850х900х80 1050х900х80, ячейки	3,1

				60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 650х900х20	
	PMP211(N,K,V,M)	1950х700х80	1960х710х85	Две секции 850х700х80 1100х700х80, ячейки 60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 675х700х20	3,2
	PMP212(N,K,V,M)	1950х800х80	1960х810х85	Две секции 850х800х80 1100х800х80, ячейки 60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 675х800х20	3,3
	PMP213(N,K,V,M)	1950х850х80	1960х860х85	Две секции 850х850х80 1100х850х80,	3,4

			ячейки 60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 675х850х20	
PMP214(N,K,V,M)	1950х900х80	1960х910х85	Две секции 850х900х80 1100х900х80, ячейки 60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 675х900х20	3,5
PMP215(N,K,V,M)	2000х800х80	2010х810х85	Две секции 850х800х80 1150х800х80, ячейки 60х40х20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 700х800х20	3,6

	PMP216(N,K,V,M)	2000x850x80	2010x860x85	Две секции 850x850x80 1150x850x80, ячейки 60x40x20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 700x850x20	3,7		
	PMP217(N,K,V,M)	2000x900x80	2010x910x85	Две секции 850x900x80 1150x900x80, ячейки 60x40x20, расстояние между ячейками 10 мм, в каждой секции вставка ППУ 700x900x20	3,8		
Матрас трехсекционный противопролежневый пенополнуретановый Ortonica Memory Plus	PMP301(N,K,V,M)	1900x700x80	1910x710x85	Три секции 630x700x80, ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, в каждой секции вставка ППУ по всей ширине	2,9	125	25/40

				330x700x20	
	PMP302(N,K,V,M)	1900x800x80	1910x810x85	Три секции 630x800x80, ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, , в каждой секции вставка ППУ по всей ширине 330x800x20	3
	PMP303(N,K,V,M)	1900x850x80	1910x860x85	Три секции 630x850x80, ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, , в каждой секции вставка ППУ по всей ширине 330x850x20	3,1
	PMP304(N,K,V,M)	1900x900x80	1910x910x85	Три секции 630x900x80, ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, , в каждой секции вставка ППУ по всей	3,2

				ширине 330х900х20	
	PMP305(N,K,V,M)	1950х700х80	1960х710х85	Три секции 650х700х80, ячейки 60х40х20 мм расстояние между ячейками 10мм, , в каждой секции вставка ППУ по всей ширине 350х700х20	3,3
	PMP306(N,K,V,M)	1950х800х80	1960х810х85	Три секции 650х800х80, ячейки 60х40х20 мм расстояние между ячейками 10мм, , в каждой секции вставка ППУ по всей ширине 350х800х20	3,4
	PMP307(N,K,V,M)	1950х850х80	1960х860х85	Три секции 650х850х80, ячейки 60х40х20 мм расстояние между ячейками 10мм, , в каждой	3,5

			секции вставка ПТУ по всей ширине 350x850x20	
	PMP308(N,K,V,M)	1950x900x80	1960x910x85 Три секции 650x900x80, ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, в каждой секции вставка ПТУ по всей ширине 350x900x20	3,6
	PMP309(N,K,V,M)	2000x800x80	2010x810x85 Три секции 665x800x80, ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм, в каждой секции вставка ПТУ по всей ширине 365x800x20	3,7
	PMP310(N,K,V,M)	2000x850x80	2010x860x85 Три секции 665x850x80, ячейки 60x40x20 мм расстояние между ячейками 10мм,	3,8

				в каждой секции вставка ППУ по всей ширине 365х850х20			
	PMP311(N,K,V,M)	2000х900х80	2010х910х85	Три секции 665х900х80, ячейки 60х40х20 мм расстояние между ячейками 10мм, в каждой секции вставка ППУ по всей ширине 365х900х20	3,9		
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Duo	PD101(N,K,V,M)	1300х600х140	1310х610х145	Матрас двухслойный: верхний слой - 40 мм; нижний слой - 100 мм	5,6	140	25/40
	PD102(N,K,V,M)	1300х700х140	1310х710х145		5,8		
	PD103(N,K,V,M)	1300х800х140	1310х810х145		6		
	PD104(N,K,V,M)	1600х600х140	1610х610х145		6,5		
	PD105(N,K,V,M)	1600х700х140	1610х710х145		6,7		
	PD106(N,K,V,M)	1600х800х140	1610х810х145		6,9		
	PD107(N,K,V,M)	1900х700х140	1910х710х145		7,4		
	PD108(N,K,V,M)	1900х800х140	1910х810х145		7,6		
	PD109(N,K,V,M)	1900х850х140	1910х860х145		7,8		
	PD110(N,K,V,M)	1900х900х140	1910х910х145		8		
	PD111(N,K,V,M)	1950х700х140	1960х710х145		8,2		
	PD112(N,K,V,M)	1950х800х140	1960х810х145		8,4		
	PD113(N,K,V,M)	1950х850х140	1960х860х145		8,6		

	PD114(N,K,V,M)	1950x900x140	1960x910x145		8,8		
	PD115(N,K,V,M)	2000x800x140	2010x810x145		9		
	PD116(N,K,V,M)	2000x850x140	2010x860x145		9,2		
	PD117(N,K,V,M)	2000x900x140	2010x910x145		9,4		
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Trio	PT101(N,K,V,M)	1300x600x200	1310x610x210	Трехслойный матрас: верхний слой - 20мм; средний слой - 70мм; нижний слой - 110мм	10,2	150	25/40/35
	PT102(N,K,V,M)	1300x700x200	1310x710x210		10,4		
	PT103(N,K,V,M)	1300x800x200	1310x810x210		10,6		
	PT104(N,K,V,M)	1600x600x200	1610x610x210		11,1		
	PT105(N,K,V,M)	1600x700x200	1610x710x210		11,3		
	PT106(N,K,V,M)	1600x800x200	1610x810x210		11,5		
	PT107(N,K,V,M)	1900x700x200	1910x710x210		12,1		
	PT108(N,K,V,M)	1900x800x200	1910x810x210		12,4		
	PT109(N,K,V,M)	1900x850x200	1910x860x210		12,7		
	PT110(N,K,V,M)	1900x900x200	1910x910x210		13		
	PT111(N,K,V,M)	1950x700x200	1960x710x210		13,3		
	PT112(N,K,V,M)	1950x800x200	1960x810x210		13,5		
	PT113(N,K,V,M)	1950x850x200	1960x860x210		13,8		
	PT114(N,K,V,M)	1950x900x200	1960x910x210		14,1		
	PT115(N,K,V,M)	2000x800x200	2010x810x210		14,4		
	PT116(N,K,V,M)	2000x850x200	2010x860x210		14,7		
	PT117(N,K,V,M)	2000x900x200	2010x910x210		15		

Таблица 1.2 Технические характеристики чехла для матраса

Характеристики	Значение
<i>N – нейлоновая ткань (марки Oxford 210D)</i>	
Поверхностная плотность, (г/м ²)	>200
Относительное удлинение при разрыве, %	
Продольное	>130
Поперечное	>150
Водонепроницаемость, мм	1000
Воздухопроницаемость, г/м ² /24ч	2000
Устойчивость к многократному изгибу, кц	-
Разрывная нагрузка (даН/50мм)	
Продольная	>400
Поперечная	>700
Цвет чехла	Белый, синий,зеленый
<i>K- кожзаменитель (на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap)</i>	
Плотность ткани чехла, (г/м ²)	250
Масса 1 м ² , г, не более	400,0
Разрывная нагрузка, даН, не менее:	
продольное направление	20,0
поперечное направление	10,0
Удлинение при разрыве, %:	
продольное направление	6,0-45,0
поперечное направление	12,0-65,0
Жесткость, сН, не более:	
продольное направление	30,0
Водонепроницаемость, мм	до 15000
Воздухопроницаемость, г/м ² /24ч	до 1000
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	150
Прочность связи между слоями, Н/мм, не менее:	0,5
продольное направление	
Устойчивость окраски к трению, баллы, не менее:	
сухое	4
мокрое	4
Сопротивление раздиру, Н, не менее:	
Продольное направление	15
Поперечное направление	10
Истираемость лицевого покрытия, мкг/Дж, не более	84,0
обороты, не менее (для искожи с жесткостью ниже 20 сН)	300,0
Огнеопасность, мм/с, не более	1,7
Цвет чехла	Белый, синий, зеленый,
<i>V - клеенка медицинская (на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием)</i>	
Плотность ткани чехла, (г/м ²)	390
Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее:	

по основе	300 (30)
по утку	190 (19)
Жесткость, Н (кгс), не более	0,05 (5)
Масса 1 м ² , кг, не более	0,65
Водонепроницаемость, мм.вод.ст	до 15000
Воздухопроницаемость, г/м ² /24ч	до 1000
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100
Липкость	отсутствует
Цвет чехла	Бежевый, синий, зеленый
<i>М – мембранная ткань (марки Биэластик)</i>	
Плотность ткани чехла, (г/м ²)	170
Масса 1 м ² , г, не более	400,0
Разрывная нагрузка, даН, не менее:	
продольное направление	25,0
поперечное направление	20,0
Удлинение при разрыве, %:	
продольное направление, не более	80,0
поперечное направление, не более	150,0
Жесткость, сН, не более:	
продольное направление	20,0
Водонепроницаемость, мм.вод.ст	до 10000
Воздухопроницаемость, г/м ² /24ч	до 5000
Паропроницаемость, г/м ² /24ч	до 5000
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	150
Прочность связи между слоями, Н/мм, не менее:	0,5
продольное направление	
Устойчивость окраски к трению, баллы, не менее:	
сухое	4
мокрое	4
Удлинение под нагрузкой 2,0 даН/см, %:	
продольное направление	12,0-30,0
поперечное направление	70,0-100,0
диагональное направление	35,0-60,0
Сопротивление раздиру, Н, не менее:	
Продольное направление	15
Поперечное направление	15
Обороты, не менее (для искожи с жесткостью ниже 20 сН)	300,0
Огнеопасность, мм/с, не более	1,7
Цвет чехла	Белый, синий, зеленый

5. Материалы

Матрас противопролежневый не содержит в себе лекарственных средств и материалов животного или человеческого происхождения.

Элементы Матраса, имеющие контакт с пациентом и обслуживающим персоналом, изготовлены или имеют покрытия из материалов, безопасность которых подтверждена протоколом токсикологических испытаний.

Материалы МИ «Матрас противопролежневый пенополиуретановый Ortonica по ТУ 32.50.50-013-66445146-2019, в вариантах исполнения» указанным в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование изделия	Применяемые материалы
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PS101N, PS102N, PS103N, PS104N, PS105N, PS106N, PS107N, PS108N, PS109N, PS110N, PS111N, PS112N, PS113N, PS114N, PS115N, PS116N, PS117N, С чехлом из кожзаменителя PS101K, PS102K, PS103K, PS104K, PS105K, PS106K, PS107K, PS108K, PS109K, PS110K, PS111K, PS112K, PS113K, PS114K, PS115K, PS116K, PS117K, С чехлом из клеенки медицинской PS101V, PS102V, PS103V, PS104V, PS105V, PS106V, PS107V, PS108V, PS109V, PS110V, PS111V, PS112V, PS113V, PS114V, PS115V, PS116V, PS117V, С чехлом из мембранной ткани PS101M, PS102M, PS103M, PS104M, PS105M, PS106M, PS107M, PS108M, PS109M, PS110M, PS111M, PS112M, PS113M, PS114M, PS115M, PS116M, PS117M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); K- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); M – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки AK12).
Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PS201N, PS202N, PS203N, PS204N, PS205N, PS206N, PS207N, PS208N, PS209N, PS210N, PS211N, PS212N, PS213N, PS214N, PS215N, PS216N, PS217N, С чехлом из кожзаменителя PS201K, PS202K, PS203K, PS204K, PS205K, PS206K, PS207K, PS208K, PS209K, PS210K, PS211K, PS212K, PS213K, PS214K, PS215K,	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); K- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый);

PS216K, PS217K, С чехлом из клеенки медицинской PS201V, PS202V, PS203V, PS204V, PS205V, PS206V, PS207V, PS208V, PS209V, PS210V, PS211V, PS212V, PS213V, PS214V, PS215V, PS216V, PS217V, С чехлом из мембранной ткани PS201M, PS202M, PS203M, PS204M, PS205M, PS206M, PS207M, PS208M, PS209M, PS210M, PS211M, PS212M, PS213M, PS214M, PS215M, PS216M, PS217M	V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PS301N, PS302N, PS303N, PS304N, PS305N, PS306N, PS307N, PS308N, PS309N, PS310N, PS311N, С чехлом из кожзаменителя PS301K, PS302K, PS303K, PS304K, PS305K, PS306K, PS307K, PS308K, PS309K, PS310K, PS311K, С чехлом из клеенки медицинской PS301V, PS302V, PS303V, PS304V, PS305V, PS306V, PS307V, PS308V, PS309V, PS310V, PS311V, С чехлом из мембранной ткани PS301M, PS302M, PS303M, PS304M, PS305M, PS306M, PS307M, PS308M, PS309M, PS310M, PS311M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PS401N, PS402N, PS403N, PS404N, PS405N, PS406N, PS407N, PS408N, PS409N, PS410N, PS411N, С чехлом из кожзаменителя PS401K, PS402K, PS403K, PS404K, PS405K, PS406K, PS407K, PS408K, PS409K, PS410K, PS411K,	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый);

С чехлом из клеенки медицинской PS401V, PS402V, PS403V, PS404V, PS405V, PS406V, PS407V, PS408V, PS409V, PS410V, PS411V, С чехлом из мембранной ткани PS401M, PS402M, PS403M, PS404M, PS405M, PS406M, PS407M, PS408M, PS409M, PS410M, PS411M	RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Бизластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас четырехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart Plus в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PSP401N, PSP402N, PSP403N, PSP404N, PSP405N, PSP406N, PSP407N, PSP408N, PSP409N, PSP410N, PSP411N, С чехлом из кожзаменителя PSP401K, PSP402K, PSP403K, PSP404K, PSP405K, PSP406K, PSP407K, PSP408K, PSP409K, PSP410K, PSP411K, С чехлом из клеенки медицинской PSP401V, PSP402V, PSP403V, PSP404V, PSP405V, PSP406V, PSP407V, PSP408V, PSP409V, PSP410V, PSP411V, С чехлом из мембранной ткани PSP401M, PSP402M, PSP403M, PSP404M, PSP405M, PSP406M, PSP407M, PSP408M, PSP409M, PSP410M, PSP411M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211- 00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Бизластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас пятисекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Standart San в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PSS501N, PSS502N, PSS503N, PSS504N, PSS505N, PSS506N, PSS507N, PSS508N, PSS509N, PSS510N, PSS511N, С чехлом из кожзаменителя PSS501K, PSS502K, PSS503K, PSS504K, PSS505K, PSS506K, PSS507K, PSS508K,	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211- 00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый),

PSS509K, PSS510K, PSS511K, С чехлом из клеенки медицинской PSS501V, PSS502V, PSS503V, PSS504V, PSS505V, PSS506V, PSS507V, PSS508V, PSS509V, PSS510V, PSS511V, С чехлом из мембранной ткани PSS501M, PSS502M, PSS503M, PSS504M, PSS505M, PSS506M, PSS507M, PSS508M, PSS509M, PSS510M, PSS511M	краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PL101N, PL102N, PL103N, PL104N, PL105N, PL106N, PL107N, PL108N, PL109N, PL110N, PL111N, PL112N, PL113N, PL114N, PL115N, PL116N, PL117N, С чехлом из кожзаменителя PL101K, PL102K, PL103K, PL104K, PL105K, PL106K, PL107K, PL108K, PL109K, PL110K, PL111K, PL112K, PL113K, PL114K, PL115K, PL116K, PL117K, С чехлом из клеенки медицинской PL101V, PL102V, PL103V, PL104V, PL105V, PL106V, PL107V, PL108V, PL109V, PL110V, PL111V, PL112V, PL113V, PL114V, PL115V, PL116V, PL117V, С чехлом из мембранной ткани PL101M, PL102M, PL103M, PL104M, PL105M, PL106M, PL107M, PL108M, PL109M, PL110M, PL111M, PL112M, PL113M, PL114M, PL115M, PL116M, PL117M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Escotar, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Light Plus в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PLP101N, PLP102N, PLP103N, PLP104N, PLP105N, PLP106N, PLP107N, PLP108N, PLP109N, PLP110N, PLP111N, С чехлом из кожзаменителя PLP101K, PLP102K, PLP103K, PLP104K,	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки

PLP105K, PLP106K, PLP107K, PLP108K, PLP109K, PLP110K, PLP111K, С чехлом из клеенки медицинской PLP101V, PLP102V, PLP103V, PLP104V, PLP105V, PLP106V, PLP107V, PLP108V, PLP109V, PLP110V, PLP111V, С чехлом из мембранной ткани PLP101M, PLP102M, PLP103M, PLP104M, PLP105M, PLP106M, PLP107M, PLP108M, PLP109M, PLP110M, PLP111M	Есотар, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Wave в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PW101N, PW102N, PW103N, PW104N, PW105N, PW106N, PW107N, PW108N, PW109N, PW110N, PW111N, PW112N, PW113N, PW114N, PW115N, PW116N, PW117N, С чехлом из кожзаменителя PW101K, PW102K, PW103K, PW104K, PW105K, PW106K, PW107K, PW108K, PW109K, PW110K, PW111K, PW112K, PW113K, PW114K, PW115K, PW116K, PW117K, С чехлом из клеенки медицинской PW101V, PW102V, PW103V, PW104V, PW105V, PW106V, PW107V, PW108V, PW109V, PW110V, PW111V, PW112V, PW113V, PW114V, PW115V, PW116V, PW117V, С чехлом из мембранной ткани PW101M, PW102M, PW103M, PW104M, PW105M, PW106M, PW107M, PW108M, PW109M, PW110M, PW111M, PW112M, PW113M, PW114M, PW115M, PW116M, PW117M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211- 00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); K- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Есотар, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PP101N, PP102N, PP103N, PP104N, PP105N, PP106N, PP107N, PP108N, PP109N, PP110N,	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211- 00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель

PP111N, PP112N, PP113N, PP114N, PP115N, PP116N, PP117N, С чехлом из кожзаменителя PP101K, PP102K, PP103K, PP104K, PP105K, PP106K, PP107K, PP108K, PP109K, PP110K, PP111K, PP112K, PP113K, PP114K, PP115K, PP116K, PP117K, С чехлом из клеенки медицинской PP101V, PP102V, PP103V, PP104V, PP105V, PP106V, PP107V, PP108V, PP109V, PP110V, PP111V, PP112V, PP113V, PP114V, PP115V, PP116V, PP117V, С чехлом из мембранной ткани PP101M, PP102M, PP103M, PP104M, PP105M, PP106M, PP107M, PP108M, PP109M, PP110M, PP111M, PP112M, PP113M, PP114M, PP115M, PP116M, PP117M	RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Profile Plus в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PPP101N, PPP102N, PPP103N, PPP104N, PPP105N, PPP106N, PPP107N, PPP108N, PPP109N, PPP110N, PPP111N, PPP112N, PPP113N, PPP114N, PPP115N, PPP116N, PPP117N, С чехлом из кожзаменителя PPP101K, PPP102K, PPP103K, PPP104K, PPP105K, PPP106K, PPP107K, PPP108K, PPP109K, PPP110K, PPP111K, PPP112K, PPP113K, PPP114K, PPP115K, PPP116K, PPP117K, С чехлом из клеенки медицинской PPP101V, PPP102V, PPP103V, PPP104V, PPP105V, PPP106V, PPP107V, PPP108V, PPP109V, PPP110V, PPP111V, PPP112V, PPP113V, PPP114V, PPP115V, PPP116V, PPP117V, С чехлом из мембранной ткани PPP101M, PPP102M, PPP103M, PPP104M, PPP105M, PPP106M, PPP107M, PPP108M, PPP109M, PPP110M, PPP111M, PPP112M, PPP113M, PPP114M, PPP115M, PPP116M, PPP117M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Combi в вариантах исполнения:	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST 25/36; Чехол для матраса:

С чехлом из нейлоновой ткани PC101N, PC102N, PC103N, PC104N, PC105N, PC106N, PC107N, PC108N, PC109N, PC110N, PC111N, С чехлом из кожзаменителя PC101K, PC102K, PC103K, PC104K, PC105K, PC106K, PC107K, PC108K, PC109K, PC110K, PC111K, С чехлом из клеенки медицинской PC101V, PC102V, PC103V, PC104V, PC105V, PC106V, PC107V, PC108V, PC109V, PC110V, PC111V, С чехлом из мембранной ткани PC101M, PC102M, PC103M, PC104M, PC105M, PC106M, PC107M, PC108M, PC109M, PC110M, PC111M	N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); K- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); M – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PM101N, PM102N, PM103N, PM104N, PM105N, PM106N, PM107N, PM108N, PM109N, PM110N, PM111N, PM112N, PM113N, PM114N, PM115N, PM116N, PM117N, С чехлом из кожзаменителя PM101K, PM102K, PM103K, PM104K, PM105K, PM106K, PM107K, PM108K, PM109K, PM110K, PM111K, PM112K, PM113K, PM114K, PM115K, PM116K, PM117K, С чехлом из клеенки медицинской PM101V, PM102V, PM103V, PM104V, PM105V, PM106V, PM107V, PM108V, PM109V, PM110V, PM111V, PM112V, PM113V, PM114V, PM115V, PM116V, PM117V, С чехлом из мембранной ткани PM101M, PM102M, PM103M, PM104M, PM105M, PM106M, PM107M, PM108M, PM109M, PM110M, PM111M, PM112M, PM113M, PM114M, PM115M, PM116M, PM117M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); K- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); M – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).

Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PM201N, PM202N, PM203N, PM204N, PM205N, PM206N, PM207N, PM208N, PM209N, PM210N, PM211N, PM212N, PM213N, PM214N, PM215N, PM216N, PM217N, С чехлом из кожзаменителя PM201K, PM202K, PM203K, PM204K, PM205K, PM206K, PM207K, PM208K, PM209K, PM210K, PM211K, PM212K, PM213K, PM214K, PM215K, PM216K, PM217K, С чехлом из клеенки медицинской PM201V, PM202V, PM203V, PM204V, PM205V, PM206V, PM207V, PM208V, PM209V, PM210V, PM211V, PM212V, PM213V, PM214V, PM215V, PM216V, PM217V, С чехлом из мембранной ткани PM201M, PM202M, PM203M, PM204M, PM205M, PM206M, PM207M, PM208M, PM209M, PM210M, PM211M, PM212M, PM213M, PM214M, PM215M, PM216M, PM217M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); K- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotar, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); M – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас трехсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PM301N, PM302N, PM303N, PM304N, PM305N, PM306N, PM307N, PM308N, PM309N, PM310N, PM311N, С чехлом из кожзаменителя PM301K, PM302K, PM303K, PM304K, PM305K, PM306K, PM307K, PM308K, PM309K, PM310K, PM311K, С чехлом из клеенки медицинской PM301V, PM302V, PM303V, PM304V, PM305V, PM306V, PM307V, PM308V, PM309V, PM310V, PM311V, С чехлом из мембранной ткани PM301M, PM302M, PM303M, PM304M, PM305M, PM306M, PM307M, PM308M, PM309M, PM310M, PM311M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); K- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotar, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); M – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии –

	силумин марки АК12).
Матрас односекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани RMP101N, RMP102N, RMP103N, RMP104N, RMP105N, RMP106N, RMP107N, RMP108N, RMP109N, RMP110N, RMP111N, RMP112N, RMP113N, RMP114N, RMP115N, RMP116N, RMP117N, С чехлом из кожзаменителя RMP101K, RMP102K, RMP103K, RMP104K, RMP105K, RMP106K, RMP107K, RMP108K, RMP109K, RMP110K, RMP111K, RMP112K, RMP113K, RMP114K, RMP115K, RMP116K, RMP117K, RMP101V, RMP102V, RMP103V, RMP104V, С чехлом из клеенки медицинской RMP101V, RMP102V, RMP103V, RMP104V, RMP105V, RMP106V, RMP107V, RMP108V, RMP109V, RMP110V, RMP111V, RMP112V, RMP113V, RMP114V, RMP115V, RMP116V, RMP117V, С чехлом из мембранной ткани RMP101M, RMP102M, RMP103M, RMP104M, RMP105M, RMP106M, RMP107M, RMP108M, RMP109M, RMP110M, RMP111M, RMP112M, RMP113M, RMP114M, RMP115M, RMP116M, RMP117M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас двухсекционный противопролежневый пенополиуретановый Ortonica Memory Plus в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани RMP201N, RMP202N, RMP203N, RMP204N, RMP205N, RMP206N, RMP207N, RMP208N, RMP209N, RMP210N, RMP211N, RMP212N, RMP213N, RMP214N, RMP215N, RMP216N, RMP217N, С чехлом из кожзаменителя RMP201K, RMP202K, RMP203K, RMP204K, RMP205K, RMP206K, RMP207K, RMP208K, RMP209K, RMP210K, RMP211K, RMP212K, RMP213K, RMP214K, RMP215K, RMP216K, RMP217K, С чехлом из клеенки медицинской RMP201V, RMP202V, RMP203V, RMP204V, RMP205V, RMP206V, RMP207V, RMP208V, RMP209V, RMP210V, RMP211V, RMP212V,	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029

PMP213V, PMP214V, PMP215V, PMP216V, PMP217V, С чехлом из мембранной ткани PMP201M, PMP202M, PMP203M, PMP204M, PMP205M, PMP206M, PMP207M, PMP208M, PMP209M, PMP210M, PMP211M, PMP212M, PMP213M, PMP214M, PMP215M, PMP216M, PMP217M	(зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас трехсекционный противоположный пенополиуретановый Ortonica Memory Plus в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PMP301N, PMP302N, PMP303N, PMP304N, PMP305N, PMP306N, PMP307N, PMP308N, PMP309N, PMP310N, PMP311N, С чехлом из кожзаменителя PMP301K, PMP302K, PMP303K, PMP304K, PMP305K, PMP306K, PMP307K, PMP308K, PMP309K, PMP310K, PMP311K, С чехлом из клеенки медицинской PMP301V, PMP302V, PMP303V, PMP304V, PMP305V, PMP306V, PMP307V, PMP308V, PMP309V, PMP310V, PMP311V, С чехлом из мембранной ткани PMP301M, PMP302M, PMP303M, PMP304M, PMP305M, PMP306M, PMP307M, PMP308M, PMP309M, PMP310M, PMP311M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас односекционный противоположный пенополиуретановый Ortonica Duo в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PD101N, PD102N, PD103N, PD104N, PD105N, PD106N, PD107N, PD108N, PD109N, PD110N, PD111N, PD112N, PD113N, PD114N, PD115N, PD116N, PD117N, С чехлом из кожзаменителя PD101K, PD102K, PD103K, PD104K, PD105K, PD106K, PD107K, PD108K, PD109K, PD110K, PD111K, PD112K, PD113K, PD114K, PD115K, PD116K, PD117K, С чехлом из клеенки медицинской	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый);

PD101V, PD102V, PD103V, PD104V, PD105V, PD106V, PD107V, PD108V, PD109V, PD110V, PD111V, PD112V, PD113V, PD114V, PD115V, PD116V, PD117V, С чехлом из мембранной ткани PD101M, PD102M, PD103M, PD104M, PD105M, PD106M, PD107M, PD108M, PD109M, PD110M, PD111M, PD112M, PD113M, PD114M, PD115M, PD116M, PD117M	V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
Матрас односекционный противоположный пенополиуретановый Ortonica Trio в вариантах исполнения: С чехлом из нейлоновой ткани PT101N, PT102N, PT103N, PT104N, PT105N, PT106N, PT107N, PT108N, PT109N, PT110N, PT111N, PT112N, PT113N, PT114N, PT115N, PT116N, PT117N, С чехлом из кожзаменителя PT101K, PT102K, PT103K, PT104K, PT105K, PT106K, PT107K, PT108K, PT109K, PT110K, PT111K, PT112K, PT113K, PT114K, PT115K, PT116K, PT117K, С чехлом из клеенки медицинской PT101V, PT102V, PT103V, PT104V, PT105V, PT106V, PT107V, PT108V, PT109V, PT110V, PT111V, PT112V, PT113V, PT114V, PT115V, PT116V, PT117V, С чехлом из мембранной ткани PT101M, PT102M, PT103M, PT104M, PT105M, PT106M, PT107M, PT108M, PT109M, PT110M, PT111M, PT112M, PT113M, PT114M, PT115M, PT116M, PT117M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки HR3535; Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; Чехол для матраса: N – нейлоновая ткань марки Oxford 210D, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); К- кожзаменитель, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием марки Ecotap, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием по ГОСТ 3251, краситель RAL1001 (бежевый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); М – мембранная ткань марки Биэластик, краситель RAL9010 (белый), краситель RAL5001 (синий), краситель RAL6029 (зеленый); Застежка-молния №6 (движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).

Упаковка: Полиэтилен (HP 0722N), картон (FBB)

6. Упаковка и маркировка

Маркировка должна быть четкой и содержать:

- наименование изделия с обозначением ТУ;
- вариант исполнения изделия;
- габаритные размеры;
- масса;
- максимальная нагрузка;
- материал;
- производитель;
- юридический адрес;
- место производства;
- дата изготовления (месяц, год);
- номер регистрационного удостоверения;
- заводской номер партии.

Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192-96. На транспортную тару должна быть нанесена маркировка:

- наименование производителя;
- наименование изделия;
- наименование варианта исполнения;
- число изделий;
- год и месяц упаковывания.

Маркировку наносят на тару. Переменные данные на ярлыке могут быть заполнены от руки четко и разборчиво.

Маркировка матрасов, предназначенных для экспорта, должна содержать:


- наименование изделия;
- наименование варианта исполнения;
- заводской номер;
- дата изготовления (год);
- обозначение и товарный знак экспортера;
- надписи “Экспорт”, “Страна-изготовитель”;
- максимальная нагрузка;
- номер настоящих технических условий.

Транспортная маркировка матрасов, предназначенных для экспорта, должна быть выполнена по ГОСТ 14192 и содержать:

- номер контракта и (или) номер заказа иностранного покупателя;
- номер заказа-наряда;
- номер грузового места;
- полное наименование или условное обозначение иностранного грузополучателя;
- наименование пункта назначения с указанием станции или порта перегрузки;
- страна назначения груза;
- станция и дорога назначения груза;
- товарные знаки и марки грузоотправителя.
- наименование экспортирующей организации;
- пункт отправления груза;
- станция и дорога отправления;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- массы нетто и брутто в килограммах;
- объем грузового места в кубических метрах;
- надписи "Экспорт", "Страна-изготовитель и (или) поставщик".

На транспортную упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги".

Расшифровка графических символов, представленных на маркировке:

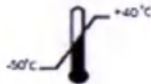	Хрупкое, обращаться осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
	Температурный диапазон

7. Условия хранения и транспортировки

Температура транспортирования и хранения МИ «Матрас противопролежневый пенополиуретановый Ortonica по ТУ 32.50.50-013-66445146-2019, в вариантах исполнения» составляет от -50°C до +40°C, относительная влажность 98% при 25°C. Температура эксплуатации изделия составляет от +10°C до +40°C и влажности 90% при температуре +25°C.

Продукт следует хранить в закрытых сухих помещениях с достаточной циркуляцией воздуха и защищать его от внешних воздействий.

Упакованное изделие «Матрас противопролежневый пенополиуретановый Ortonica по ТУ 32.50.50-013-66445146-2019, в вариантах исполнения» транспортируется любым видом наземного транспорта, а так же водным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортировка осуществляется с учетом условий хранения.

Срок службы матрасов 5 лет.

8. Уход, чистка и дезинфекция

Медицинское изделие «Матрас противопролежневый пенополиуретановый Ortonica по ТУ 32.50.50-013-66445146-2019, в вариантах исполнения» поставляется нестерильным.

Следует производить влажную очистку изделия от пыли и грязи. Ежедневная необходимая санитарная очистка и дезинфекция изделия может проводиться с применением мыльного водного раствора или бытовых моющих средств. Нельзя применять агрессивные чистящие средства, например, растворители, а также твердые щетки и т.д., это может поцарапать изделие.

Чехол из нейлоновой ткани рекомендуемый уход:

- подлежит автоклавному при температуре до 110°C, время выдержки 20-30 мин;
- протирание влажной салфеткой с помощью воды или антисептического раствора. Покрытие (чехол) устойчиво к дезинфекции дезинфицирующим средством, «МультиДез (концентрат)» (протереть салфеткой или губкой, смоченной в растворе 0,05% концентрата (0,5 мл на 1 л воды), смывание раствора средства не требуется (при необходимости протереть сухой салфеткой), полностью просушить;
- ежедневная стирка до 60°C, время выдержки 30-60 мин;
- машинная стирка до 95°C, время выдержки не менее 60 мин;

Чехол из кожзаменителя для матраса рекомендации по уходу:

- стойкий к санитарно-гигиенической обработке, в том числе альдегид и хлор содержащими средствами;
- во время чистки следует использовать средства защиты (перчатки);
- покрытие (чехол) протирать влажной салфеткой с помощью воды или антисептического раствора. Покрытие (чехол) устойчиво к дезинфекции дезинфицирующим средством, например, «МультиДез (концентрат)» (протереть салфеткой или губкой, смоченной в растворе 0,05% концентрата (0,5 мл на 1 л воды), смывание раствора средства не требуется (при необходимости протереть сухой салфеткой), полностью просушить;
- при чистке всегда проверять покрытие (чехол) на предмет повреждений, при обнаружении повреждений надо заменить покрытие (чехол);
- не использовать пока все поверхности не высохнут;

- не допускается интенсивное затираание, чистка абразивными моющими или чистящими средствами;
- запрещается использование чистящих средств, имеющих в своем составе спирт, а также красители.

Чехол из клеенки медицинской рекомендуемый уход:

- стойкий к санитарно-гигиенической обработке, в том числе альдегид и хлор содержащими средствами, например «Деналь» (1 способ: протереть салфеткой или губкой, смоченной в растворе 0,1% концентрата (1,0 мл на 1 л воды), смыть проточной холодной водой, просушить (при необходимости протереть сухой салфеткой); 2 способ: замочить в растворе 0,1% концентрата (1,0 мл на 1 л воды), время выдержки 30 мин, ополаскивание проточной водой, просушить);
- подлежит автоклавированию при температуре до 110°C, время выдержки не менее 30 мин.

Чехол из мембранной ткани рекомендуемый уход:

- стойкий к санитарно-гигиенической обработке, за исключением альдегид и хлор содержащих средств, можно использовать «МультиДез (концентрат)» (протереть салфеткой или губкой, смоченной в растворе 0,05% концентрата (0,5 мл на 1 л воды), смывание раствора средства не требуется, просушить (при необходимости протереть сухой салфеткой);
- подлежит автоклавированию при температуре до 130°C, время выдержки 20-30 мин;
- машинная стирка до 90°C, время выдержки не менее 60 мин.

9. Утилизация

Утилизация продукта вместе с бытовыми отходами не предусмотрена.

Утилизация матрасов Ortopica по ТУ 32.50.50-013-66445146-2019 должна осуществляться в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10, для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

10. Техническое обслуживание

Для данных медицинских изделий техническое обслуживание – не предусмотрено.

11. Применяемые национальные стандарты

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

Часть 1. Основные требования»;

ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными».

ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro».

ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

ГОСТ ISO 10993-12-2015. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы».

12. Гарантийная информация

Гарантийный срок хранения матрасов – 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации матрасов с момента поставки или продажи - 12 месяцев.

Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные грубым обращением с изделием. Гарантия распространяется только на производственный брак. На быстроизнашивающиеся части (чехол) гарантия не предоставляется.

Гарантия предполагает обмен изделия. Необходимо как можно подробнее описать проблему и возможную причину для гарантийной претензии. Требуется приложить копию счета-фактуры и сообщить, если продукт должен вернуться назад после ремонта. Указывается адрес доставки, контактное лицо и номер телефона. Необходимо хорошо упаковать продукт, чтобы защитить его от повреждений во время перевозки. Необходимо зафиксировать идентификационный номер отправки в документации, для того чтобы отслеживать пересылку.

13. Рекламация

Организация, принимающая на территории Российской Федерации претензии от потребителя по качеству продукта:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника»

ООО «Ортоника», юридический адрес: Россия, 105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я, д. 9/35, кв. 94.

Телефон: +7 (495) 648-60-42.

Прощнуровано и пронумеровано

99 лист 06

Генеральный Директор

ООО «Ортоника»

А.В.Терехов

