

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Ортоника»

М.К. Терехов

2019 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

**Матрас противопролежневый Ortonica
с гелевым наполнителем по ТУ 32.50.50-014-66445146-2019, в вариантах исполнения**

Настоящее руководство по эксплуатации подготовлено для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.01.2017 № 11 н).

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника», ООО «Ортоника»

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника»

ООО «Ортоника»,

Россия, 105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я, д. 9/35, кв. 94.

Телефон: +7 (495) 648-60-42

Место производства медицинского изделия:

Россия, 394026, Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Московский, д.11

1. Название, назначение, конструкция медицинского изделия и краткое описание.

Предназначены для профилактики и лечения пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела в условиях ЛПУ и домашнего использования.

Матрас противопролежневый Ortonica с гелевым наполнителем по ТУ 32.50.50-014-66445146-2019, в вариантах исполнения

1. Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio в вариантах исполнения:

G01, G02, G03

В составе:

1.1 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio – 1 шт;

1.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

2. Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring в вариантах исполнения:

GS101N, GS102N, GS103N, GS104N, GS105N, GS106N, GS107N, GS108N, GS109N, GS110N, GS111N, GS112N, GS113N, GS114N, GS115N, GS116N, GS117N, GS101K, GS102K, GS103K, GS104K, GS105K, GS106K, GS107K, GS108K, GS109K, GS110K, GS111K, GS112K, GS113K, GS114K, GS115K, GS116K, GS117K, GS101V, GS102V, GS103V, GS104V, GS105V, GS106V, GS107V, GS108V, GS109V, GS110V, GS111V, GS112V, GS113V, GS114V, GS115V, GS116V, GS117V, GS101M, GS102M, GS103M, GS104M, GS105M, GS106M, GS107M, GS108M, GS109M, GS110M, GS111M, GS112M, GS113M, GS114M, GS115M, GS116M, GS117M

В составе:

2.1 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring – 1 шт;

2.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

2.3 Чехол для матраса (при необходимости) – 1 шт.

3. Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения:

GM101N, GM102N, GM103N, GM104N, GM105N, GM106N, GM107N, GM108N, GM109N, GM110N, GM111N, GM112N, GM113N, GM114N, GM115N, GM116N, GM117N, GM101K, GM102K, GM103K, GM104K, GM105K, GM106K, GM107K, GM108K, GM109K, GM110K, GM111K, GM112K, GM113K, GM114K, GM115K, GM116K, GM117K, GM101V, GM102V, GM103V, GM104V, GM105V, GM106V, GM107V, GM108V, GM109V, GM110V, GM111V, GM112V, GM113V, GM114V, GM115V, GM116V, GM117V, GM101M, GM102M, GM103M, GM104M, GM105M, GM106M, GM107M, GM108M, GM109M, GM110M, GM111M, GM112M, GM113M, GM114M, GM115M, GM116M, GM117M

В составе:

3.1 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med – 1 шт;

3.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

3.3 Чехол для матраса (при необходимости) – 1 шт.

4. Матрас двухсекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения:

GM201N, GM202N, GM203N, GM204N, GM205N, GM206N, GM207N, GM208N, GM209N, GM210N, GM211N, GM212N, GM213N, GM214N, GM215N, GM216N, GM217N, GM201K, GM202K, GM203K, GM204K, GM205K, GM206K, GM207K, GM208K, GM209K, GM210K, GM211K, GM212K, GM213K, GM214K, GM215K, GM216K, GM217K, GM201V, GM202V, GM203V, GM204V, GM205V, GM206V, GM207V, GM208V, GM209V, GM210V, GM211V, GM212V, GM213V, GM214V, GM215V, GM216V, GM217V, GM201M, GM202M, GM203M, GM204M, GM205M, GM206M, GM207M, GM208M, GM209M, GM210M, GM211M, GM212M, GM213M, GM214M, GM215M, GM216M, GM217M

В составе:

4.1 Матрас двухсекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med – 1шт;

4.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

4.3 Чехол для матраса (при необходимости) – 1 шт.

5. Матрас трехсекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения:

GM301N, GM302N, GM303N, GM304N, GM305N, GM306N, GM307N, GM308N, GM309N, GM310N, GM311N, GM301K, GM302K, GM303K, GM304K, GM305K, GM306K, GM307K, GM308K, GM309K, GM310K, GM311K, GM301V, GM302V, GM303V, GM304V, GM305V, GM306V, GM307V, GM308V, GM309V, GM310V, GM311V, GM301M, GM302M, GM303M, GM304M, GM305M, GM306M, GM307M, GM308M, GM309M, GM310M, GM311M

В составе:

5.1 Матрас трехсекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med – 1шт;

5.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

5.3 Чехол для матраса (при необходимости) – 1 шт.

6. Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light в вариантах исполнения:

GL101N, GL102N, GL103N, GL104N, GL105N, GL106N, GL107N, GL108N, GL109N, GL110N, GL111N, GL112N, GL113N, GL114N, GL115N, GL116N, GL117N, GL101K, GL102K, GL103K, GL104K, GL105K, GL106K, GL107K, GL108K, GL109K, GL110K, GL111K, GL112K, GL113K, GL114K, GL115K, GL116K, GL117K, GL101V, GL102V, GL103V, GL104V, GL105V, GL106V, GL107V, GL108V, GL109V, GL110V, GL111V, GL112V, GL113V, GL114V, GL115V, GL116V, GL117V, GL101M, GL102M, GL103M, GL104M, GL105M, GL106M, GL107M, GL108M, GL109M, GL110M, GL111M, GL112M, GL113M, GL114M, GL115M, GL116M, GL117M

В составе:

6.1 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light – 1шт;

6.2 Руководство по эксплуатации – 1шт;

6.3 Чехол для матраса (при необходимости) – 1 шт.

7. Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus в вариантах исполнения:

GLP101N, GLP102N, GLP103N, GLP104N, GLP105N, GLP106N, GLP107N, GLP108N, GLP109N, GLP110N, GLP111N, GLP101K, GLP102K, GLP103K, GLP104K, GLP105K, GLP106K, GLP107K, GLP108K, GLP109K, GLP110K, GLP111K, GLP101V, GLP102V, GLP103V, GLP104V, GLP105V, GLP106V, GLP107V, GLP108V, GLP109V, GLP110V,

GLP111V, GLP101M, GLP102M, GLP103M, GLP104M, GLP105M, GLP106M, GLP107M, GLP108M, GLP109M, GLP110M, GLP111M

В составе:

7.1 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus – 1 шт;

7.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

7.3 Чехол для матраса (при необходимости) – 1 шт.

8. Матрас двухсекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения:

GR201N, GR202N, GR203N, GR204N, GR205N, GR206N, GR207N, GR208N, GR209N, GR210N, GR211N, GR212N, GR213N, GR214N, GR215N, GR216N, GR217N, GR201K, GR202K, GR203K, GR204K, GR205K, GR206K, GR207K, GR208K, GR209K, GR210K, GR211K, GR212K, GR213K, GR214K, GR215K, GR216K, GR217K, GR201V, GR202V, GR203V, GR204V, GR205V, GR206V, GR207V, GR208V, GR209V, GR210V, GR211V, GR212V, GR213V, GR214V, GR215V, GR216V, GR217V, GR201M, GR202M, GR203M, GR204M, GR205M, GR206M, GR207M, GR208M, GR209M, GR210M, GR211M, GR212M, GR213M, GR214M, GR215M, GR216M, GR217M

В составе:

8.1 Матрас двухсекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax – 1 шт;

8.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

8.3 Чехол для матраса (при необходимости) – 1 шт.

9. Матрас трехсекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения:

GR301N, GR302N, GR303N, GR304N, GR305N, GR306N, GR307N, GR308N, GR309N, GR310N, GR311N, GR301K, GR302K, GR303K, GR304K, GR305K, GR306K, GR307K, GR308K, GR309K, GR310K, GR311K, GR301V, GR302V, GR303V, GR304V, GR305V, GR306V, GR307V, GR308V, GR309V, GR310V, GR311V, GR301M, GR302M, GR303M, GR304M, GR305M, GR306M, GR307M, GR308M, GR309M, GR310M, GR311M

В составе:

9.1 Матрас трехсекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax – 1 шт;

9.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт;

9.3 Чехол для матраса (при необходимости) – 1 шт.

Существуют матрасы односекционные, двухсекционные, трехсекционные (несколько вариантов исполнения, приводятся ниже).

1. Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio в вариантах исполнения: G01, G02, G03 - односекционный матрас, изготовлен из термопластичного полиуретана и геля.

Противопролежневый матрас с гелевым наполнителем предназначен для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства отдыха и комфорта.

Противопролежневый эффект образуется за счет равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела. Гелевый слой обладает высокой теплопроводимостью по сравнению с другими материалами. Материал снижает температуру

соприкосновения примерно на 1,5-2°C путем распределения тепла, которое производится человеческим телом, по всей поверхности и частично рассеивая его. Матрас снимает давление с участков тела, уменьшает боль и дискомфорт, улучшает кровообращение и насыщает кислородом поверхность кожи (противопролежневый эффект), обладает противоотечным свойством за счет гипотермии верхнего слоя.

Матрас Ortonica Gelio используется как поверхностный слой к пенополиуретановому матрасу. Подходит для многофункциональной кровати.

Изображение «Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio в вариантах исполнения» представлено на рис.1



Рис. 1 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio в вариантах исполнения

2. Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring в вариантах исполнения: GS101N, GS102N, GS103N, GS104N, GS105N, GS106N, GS107N, GS108N, GS109N, GS110N, GS111N, GS112N, GS113N, GS114N, GS115N, GS116N, GS117N односекционный матрас изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, с чехлом из ткани марки OXFORD (при необходимости).

Имеет поверхность с перфорацией (отверстия), которая обладает дифференцированным массажно-релаксирующим эффектом, что также препятствует сдавливанию сосудов, повышая анатомический эффект матраса. Данный эффект достигается за счет диаметра отверстий (перфорация).

Гелевое наполнение изделия состоит из трёх секций, которые сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring в вариантах исполнения: GS101K, GS102K, GS103K, GS104K, GS105K, GS106K, GS107K, GS108K, GS109K, GS110K, GS111K, GS112K, GS113K, GS114K, GS115K, GS116K, GS117K односекционный матрас изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, с чехлом из кожзаменителя для матраса (при необходимости).

Имеет поверхность с перфорацией (отверстия), которая обладает дифференцированным массажно-релаксирующим эффектом, что также препятствует сдавливанию сосудов, повышая анатомический эффект матраса. Данный эффект достигается за счет диаметра отверстий (перфорация).

Гелевое наполнение изделия состоит из трёх секций, которые сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Матрас односекционный противопрележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring в вариантах исполнения: GS101V, GS102V, GS103V, GS104V, GS105V, GS106V, GS107V, GS108V, GS109V, GS110V, GS111V, GS112V, GS113V, GS114V, GS115V, GS116V, GS117V, односекционный матрас изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, с чехлом из клеенки медицинской, на тканевой основе для матраса (при необходимости).

Имеет поверхность с перфорацией (отверстия), которая обладает дифференцированным массажно-релаксирующим эффектом, что также препятствует сдавливанию сосудов, повышая анатомический эффект матраса. Данный эффект достигается за счет диаметра отверстий (перфорация).

Гелевое наполнение изделия состоит из трёх секций, которые сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Матрас односекционный противопрележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring в вариантах исполнения: GS101M, GS102M, GS103M, GS104M, GS105M, GS106M, GS107M, GS108M, GS109M, GS110M, GS111M, GS112M, GS113M, GS114M, GS115M, GS116M, GS117M односекционный матрас изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, с чехлом из мембранной ткани для матраса (при необходимости).

Имеет поверхность с перфорацией (отверстия), которая обладает дифференцированным массажно-релаксирующим эффектом, что также препятствует сдавливанию сосудов, повышая анатомический эффект матраса. Данный эффект достигается за счет диаметра отверстий (перфорация).

Гелевое наполнение изделия состоит из трёх секций, которые сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Изображение «Матрас односекционный противопрележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring в вариантах исполнения» представлено на рис.2.

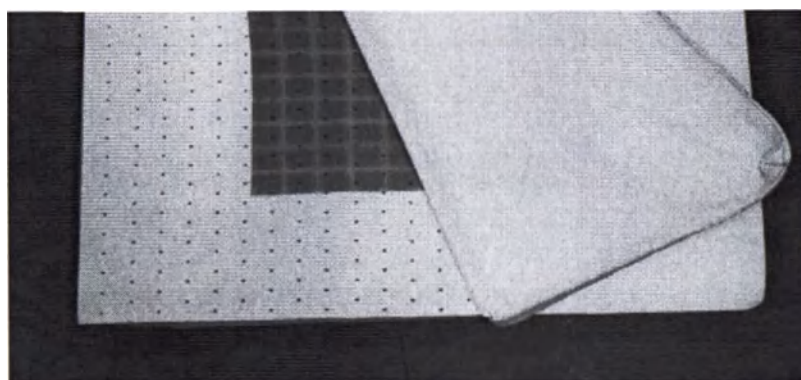


Рис. 2 Матрас односекционный противопрележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring в вариантах исполнения

Одно, двух и трех секционные матрасы Ortonica Gelio Med предназначены для функциональных кроватей различной конструкции.

3. Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM101N, GM102N, GM103N, GM104N, GM105N, GM106N, GM107N, GM108N, GM109N, GM110N, GM111N, GM112N, GM113N, GM114N, GM115N, GM116N, GM117N односекционный матрас изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха, с чехлом из ткани марки OXFORD (при необходимости).

Имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха.

Гелевые вставки сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM101K, GM102K, GM103K, GM104K, GM105K, GM106K, GM107K, GM108K, GM109K, GM110K, GM111K, GM112K, GM113K, GM114K, GM115K, GM116K, GM117K односекционный матрас изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха, с чехлом из кожзаменителя для матраса (при необходимости).

Имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха.

Гелевые вставки сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM101V, GM102V, GM103V, GM104V, GM105V, GM106V, GM107V, GM108V, GM109V, GM110V, GM111V, GM112V, GM113V, GM114V, GM115V, GM116V, GM117V односекционный матрас изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха, с чехлом из клеенки медицинской, на тканевой основе для матраса (при необходимости).

Имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха.

Гелевые вставки сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM101M, GM102M, GM103M, GM104M, GM105M, GM106M, GM107M, GM108M, GM109M, GM110M, GM111M, GM112M, GM113M, GM114M, GM115M, GM116M, GM117M односекционный матрас изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха, с чехлом из мембранной ткани для матраса (при необходимости).

Имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха.

Гелевые вставки сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Изображение «Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения» представлено на рис.3.



Рис. 3 Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения

4. Матрас двухсекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM201N, GM202N, GM203N, GM204N, GM205N, GM206N, GM207N, GM208N, GM209N, GM210N, GM211N, GM212N, GM213N, GM214N, GM215N, GM216N, GM217N состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха, с чехлом из ткани марки OXFORD (при необходимости).

Гелевые вставки расположены в лопаточно-грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, подверженных риску образования протележней.

Матрас двухсекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM201K, GM202K, GM203K, GM204K, GM205K, GM206K, GM207K, GM208K, GM209K, GM210K, GM211K, GM212K, GM213K, GM214K, GM215K, GM216K, GM217K состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха, с чехлом из кожаноматериала для матраса (при необходимости).

Гелевые вставки расположены в лопаточно-грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, подверженных риску образования протележней.

Матрас двухсекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM201V, GM202V, GM203V, GM204V, GM205V, GM206V, GM207V, GM208V, GM209V, GM210V, GM211V, GM212V, GM213V, GM214V, GM215V, GM216V, GM217V состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха, с чехлом из клеенки медицинской, на тканевой основе для матраса (при необходимости).

Гелевые вставки расположены в лопаточно-грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, подверженных риску образования протележней.

Матрас двухсекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM201M, GM202M, GM203M, GM204M, GM205M, GM206M, GM207M, GM208M, GM209M, GM210M, GM211M, GM212M, GM213M, GM214M, GM215M, GM216M, GM217M состоит из двух формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха, с чехлом из мембранной ткани для матраса (при необходимости).

Гелевые вставки расположены в лопаточно-грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Изображение «Матрас двухсекционный противолежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения» представлено на рис.4.



Рис. 4 Матрас двухсекционный противолежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения

5. Матрас трехсекционный противолежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM301N, GM302N, GM303N, GM304N, GM305N, GM306N, GM307N, GM308N, GM309N, GM310N, GM311N состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха, с чехлом из ткани марки OXFORD (при необходимости).

Гелевые вставки сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Матрас трехсекционный противолежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM301K, GM302K, GM303K, GM304K, GM305K, GM306K, GM307K, GM308K, GM309K, GM310K, GM311K состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха, с чехлом из кожаменителя для матраса (при необходимости).

Гелевые вставки сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Матрас трехсекционный противолежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM301V, GM302V, GM303V, GM304V, GM305V, GM306V, GM307V, GM308V, GM309V, GM310V, GM311V состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха с чехлом из клеенки медицинской, на тканевой основе для матраса (при необходимости).

Гелевые вставки сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Матрас трехсекционный противолежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM301M, GM302M, GM303M, GM304M, GM305M, GM306M, GM307M, GM308M, GM309M, GM310M, GM311M состоит из трех формообразующих секций, изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеет

ячеистую поверхность, что гарантирует надежное циркулирование воздуха с чехлом из мембранной ткани для матраса (при необходимости).

Гелевые вставки сосредоточены в лопаточно-грудном, пояснично-крестцовом и икроножно-голеностопном отделах позвоночника, подверженных риску образования пролежней.

Изображение «Матрас трехсекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения» представлено на рис.5.



Рис. 5 Матрас трехсекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения

6. Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light в вариантах исполнения: GL101N, GL102N, GL103N, GL104N, GL105N, GL106N, GL107N, GL108N, GL109N, GL110N, GL111N, GL112N, GL113N, GL114N, GL115N, GL116N, GL117N односекционный матрас со специальным профилем с двух сторон полотна отличается повышенной гибкостью, что позволяет использовать его на разных видах кроватей в том числе многофункциональных, с чехлом из ткани марки OXFORD (при необходимости).

Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light в вариантах исполнения: GL101K, GL102K, GL103K, GL104K, GL105K, GL106K, GL107K, GL108K, GL109K, GL110K, GL111K, GL112K, GL113K, GL114K, GL115K, GL116K, GL117K односекционный матрас со специальным профилем с двух сторон полотна отличается повышенной гибкостью, что позволяет использовать его на разных видах кроватей в том числе многофункциональных, с чехлом из кожзаменителя для матраса (при необходимости).

Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light в вариантах исполнения: GL101V, GL102V, GL103V, GL104V, GL105V, GL106V, GL107V, GL108V, GL109V, GL110V, GL111V, GL112V, GL113V, GL114V, GL115V, GL116V, GL117V односекционный матрас со специальным профилем с двух сторон полотна отличается повышенной гибкостью, что позволяет использовать его на разных видах кроватей в том числе многофункциональных, с чехлом из клеенки медицинской, на тканевой основе для матраса (при необходимости).

Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light в вариантах исполнения: GL101M, GL102M, GL103M, GL104M, GL105M,

GL106M, GL107M, GL108M, GL109M, GL110M, GL111M, GL112M, GL113M, GL114M, GL115M, GL116M, GL117M односекционный матрас со специальным профилем с двух сторон полотна отличается повышенной гибкостью, что позволяет использовать его на разных видах кроватей в том числе многофункциональных, с чехлом из мембранной ткани для матраса (при необходимости).

Изображение «Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light в вариантах исполнения» представлено на рис.6.

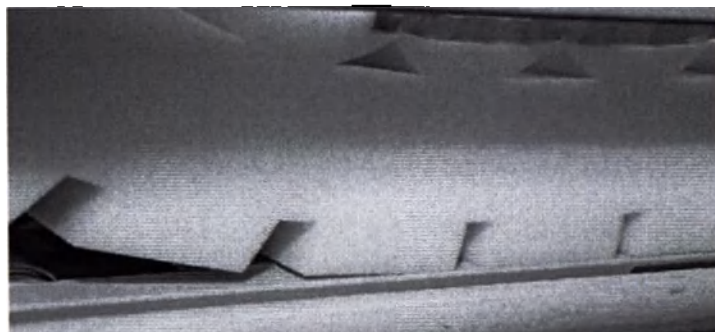


Рис. 6 Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light в вариантах исполнения

7. Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus в вариантах исполнения: GLP101N, GLP102N, GLP103N, GLP104N, GLP105N, GLP106N, GLP107N, GLP108N, GLP109N, GLP110N, GLP111N односекционный матрас с увеличенной толщиной (150 мм) позволяет довести максимальную нагрузку до 150 кг и обеспечивает комфорт и долговечность, с чехлом из ткани марки OXFORD (при необходимости).

Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus в вариантах исполнения: GLP101K, GLP102K, GLP103K, GLP104K, GLP105K, GLP106K, GLP107K, GLP108K, GLP109K, GLP110K, GLP111K односекционный матрас с увеличенной толщиной (150 мм) позволяет довести максимальную нагрузку до 150 кг и обеспечивает комфорт и долговечность, с чехлом из кожзаменителя для матраса (при необходимости).

Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus в вариантах исполнения: GLP101V, GLP102V, GLP103V, GLP104V, GLP105V, GLP106V, GLP107V, GLP108V, GLP109V, GLP110V, GLP111V односекционный матрас с увеличенной толщиной (150 мм) позволяет довести максимальную нагрузку до 150 кг и обеспечивает комфорт и долговечность, с чехлом из клеенки медицинской, на тканевой основе для матраса (при необходимости).

Матрас односекционный противопротележный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus в вариантах исполнения: GLP101M, GLP102M, GLP103M, GLP104M, GLP105M, GLP106M, GLP107M, GLP108M, GLP109M, GLP110M, GLP111M односекционный матрас с увеличенной толщиной (150 мм) позволяет довести максимальную нагрузку до 150 кг и обеспечивает комфорт и долговечность, с чехлом из мембранной ткани для матраса (при необходимости).

Изображение «Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus в вариантах исполнения» представлено на рис.7



Рис. 7 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus в вариантах исполнения

8. Матрас двухсекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR201N, GR202N, GR203N, GR204N, GR205N, GR206N, GR207N, GR208N, GR209N, GR210N, GR211N, GR212N, GR213N, GR214N, GR215N, GR216N, GR217N состоящий из двух формообразующих секций облегчает перемещение матрасов обслуживающему персоналу лечебных учреждений. Матрас изготовлен из пенополиуретана с эффектом запоминания формы с применением натурального латекса, обладая высокой степенью вязкости, характеризуется отсутствием пружинящего эффекта. Поэтому он максимально долго сохраняет нужную форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания. В результате чего происходит значительное уменьшение сдавливания участков тела, которые принимают на себя основное давление (крестец, лопатки, бедра, ягодицы). При этом позвоночник принимает естественную форму, с чехлом из ткани марки OXFORD (при необходимости).

Матрас двухсекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR201K, GR202K, GR203K, GR204K, GR205K, GR206K, GR207K, GR208K, GR209K, GR210K, GR211K, GR212K, GR213K, GR214K, GR215K, GR216K, GR217K состоящий из двух формообразующих секций облегчает перемещение матрасов обслуживающему персоналу лечебных учреждений. Матрас изготовлен из пенополиуретана с эффектом запоминания формы с применением натурального латекса, обладая высокой степенью вязкости, характеризуется отсутствием пружинящего эффекта. Поэтому он максимально долго сохраняет нужную форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания. В результате чего происходит значительное уменьшение сдавливания участков тела, которые принимают на себя основное давление (крестец, лопатки, бедра, ягодицы). При этом позвоночник принимает естественную форму, с чехлом из кожзаменителя для матраса (при необходимости).

Матрас двухсекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR201V, GR202V, GR203V, GR204V, GR205V, GR206V, GR207V, GR208V, GR209V, GR210V, GR211V, GR212V, GR213V, GR214V, GR215V, GR216V, GR217V состоящий из двух формообразующих секций облегчает перемещение матрасов обслуживающему персоналу лечебных учреждений. Матрас изготовлен из пенополиуретана с эффектом запоминания формы с применением натурального латекса, обладая высокой степенью вязкости, характеризуется отсутствием пружинящего эффекта.

Поэтому он максимально долго сохраняет нужную форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания. В результате чего происходит значительное уменьшение сдавливания участков тела, которые принимают на себя основное давление (крестец, лопатки, бедра, ягодицы). При этом позвоночник принимает естественную форму, с чехлом из клеенки медицинской, на тканевой основе для матраса (при необходимости).

Матрас двухсекционный противопротезный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR201M, GR202M, GR203M, GR204M, GR205M, GR206M, GR207M, GR208M, GR209M, GR210M, GR211M, GR212M, GR213M, GR214M, GR215M, GR216M, GR217M состоящий из двух формообразующих секций облегчает перемещение матрасов обслуживающему персоналу лечебных учреждений. Матрас изготовлен из пенополиуретана с эффектом запоминания формы с применением натурального латекса, обладая высокой степенью вязкости, характеризуется отсутствием пружинящего эффекта. Поэтому он максимально долго сохраняет нужную форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания. В результате чего происходит значительное уменьшение сдавливания участков тела, которые принимают на себя основное давление (крестец, лопатки, бедра, ягодицы). При этом позвоночник принимает естественную форму, с чехлом из мембранной ткани для матраса (при необходимости).

Изображение «Матрас двухсекционный противопротезный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения» представлено на рис.8



Рис. 8 Матрас двухсекционный противопротезный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения

9. Матрас трехсекционный противопротезный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR301N, GR302N, GR303N, GR304N, GR305N, GR306N, GR307N, GR308N, GR309N, GR310N, GR311N состоящий из трех формообразующих секций облегчает перемещение матрасов обслуживающему персоналу лечебных учреждений. Матрас изготовлен из пенополиуретана с эффектом запоминания формы с применением натурального латекса, обладая высокой степенью вязкости, характеризуется отсутствием

пружинящего эффекта. Поэтому он максимально долго сохраняет нужную форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания. В результате чего происходит значительное уменьшение сдавливания участков тела, которые принимают на себя основное давление (крестец, лопатки, бедра, ягодицы). При этом позвоночник принимает естественную форму, с чехлом из ткани марки OXFORD (при необходимости).

Матрас трехсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR301K, GR302K, GR303K, GR304K, GR305K, GR306K, GR307K, GR308K, GR309K, GR310K, GR311K состоящий из трех формообразующих секций облегчает перемещение матрасов обслуживающему персоналу лечебных учреждений. Матрас изготовлен из пенополиуретана с эффектом запоминания формы с применением натурального латекса, обладая высокой степенью вязкости, характеризуется отсутствием пружинящего эффекта. Поэтому он максимально долго сохраняет нужную форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания. В результате чего происходит значительное уменьшение сдавливания участков тела, которые принимают на себя основное давление (крестец, лопатки, бедра, ягодицы). При этом позвоночник принимает естественную форму, с чехлом из кожаменителя для матраса (при необходимости).

Матрас трехсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR301V, GR302V, GR303V, GR304V, GR305V, GR306V, GR307V, GR308V, GR309V, GR310V, GR311V состоящий из трех формообразующих секций облегчает перемещение матрасов обслуживающему персоналу лечебных учреждений. Матрас изготовлен из пенополиуретана с эффектом запоминания формы с применением натурального латекса, обладая высокой степенью вязкости, характеризуется отсутствием пружинящего эффекта. Поэтому он максимально долго сохраняет нужную форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания. В результате чего происходит значительное уменьшение сдавливания участков тела, которые принимают на себя основное давление (крестец, лопатки, бедра, ягодицы). При этом позвоночник принимает естественную форму, с чехлом из клеенки медицинской, на тканевой основе для матраса (при необходимости).

Матрас трехсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR301M, GR302M, GR303M, GR304M, GR305M, GR306M, GR307M, GR308M, GR309M, GR310M, GR311M состоящий из трех формообразующих секций облегчает перемещение матрасов обслуживающему персоналу лечебных учреждений. Матрас изготовлен из пенополиуретана с эффектом запоминания формы с применением натурального латекса, обладая высокой степенью вязкости, характеризуется отсутствием пружинящего эффекта. Поэтому он максимально долго сохраняет нужную форму и постепенно восстанавливается при отсутствии сдавливания. В результате чего происходит значительное уменьшение сдавливания участков тела, которые принимают на себя основное давление (крестец, лопатки, бедра, ягодицы). При этом позвоночник принимает естественную форму, с чехлом из мембранной ткани для матраса (при необходимости).

Изображение «Матрас трехсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения» представлено на рис.9



Рис. 9 Матрас трехсекционный противопротезный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения

Чехол для матраса из ткани марки OXFORD (при необходимости)

Чехол из нейлона это бюджетный вариант защиты матраса. Чехол не прихотлив в эксплуатации и подходит для стирки в стиральной машине. Использование защитных наматрасников повышает гигиенические свойства матраса и значительно продлевает его срок службы.

Потребительские свойства:

- подлежит обработке паром, автоклавированию;
- отсутствует липкость;
- чехол можно стирать в режиме ежедневной стирки.



Рис.10 Чехол для матраса из ткани марки OXFORD

Чехол из кожзаменителя для матраса (при необходимости)

Высокая плотность чехла делает его долговечным и легким в уходе. Чехол из искусственной кожи ПВХ можно обрабатывать любыми дезинфицирующими средствами, он быстро высыхает и не накапливает запахи, что делает его незаменимым для ухода за лежащими больными.

Потребительские свойства:

- водоотталкивающий;
- водонепроницаемый;
- отсутствует липкость;
- стойкий к санитарно-гигиенической обработке, в том числе альдегид и хлор содержащими средствами.



Рис.11 Чехол из кожзаменителя для матраса

Чехол из клеенки медицинской, на тканевой основе для матраса (при необходимости)

Чехол сделан из клеенки медицинской, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление), на молнии. Используется в санитарных и гигиенических мероприятиях, в быту, лечебных учреждениях. Это универсальный подкладочный непромокаемый материал из ткани. Чехол на матрас из резиноканевого изделия позволит защитить мебель от воздействия химических и биологических жидкостей, упростит уборку и стерилизацию. Хорошо переносит многократные дезинфекции, не теряя своих качеств и эластичности.

Потребительские свойства:

- водоотталкивающий;
- водонепроницаемый;
- обладает хорошей теплопроводностью;
- устраняет эффект холодного прикосновения;
- принимает температуру тела;
- газонепроницаем;
- высоко эластичен;
- отсутствует липкость.



Рис.12 Чехол из клеенки медицинской, на тканевой основе для матраса

Чехол из мембранной ткани для матраса (при необходимости).

Чехлы из ткани Бизластик из прочного «дышащего» материала полиэстера с полиуретановым покрытием. Это эластичная ткань, которая тянется в двух направлениях. Благодаря водонепроницаемому полиуретановому покрытию, жидкость легко удаляется с поверхности ткани. Предохраняет матрас от загрязнения. Это абсолютный барьер против крови, медицинских жидкостей и мочи. Защищает пациентов от проникновения вирусов, бактерий и аллергенов. Активно участвует в профилактике появления пролежней. Ткань Бизластик намного более эластичная и мягкая, чем представленные на рынке аналоги. Это позволяет ткани реагировать и подстраиваться к движениям человека, лежащего на ней.

- влагонепроницаемый;
- обладает хорошей теплопроводностью;
- устраняет эффект холодного прикосновения;
- принимает температуру тела;
- отсутствует липкость;
- не скользкий;
- противопролежневый.

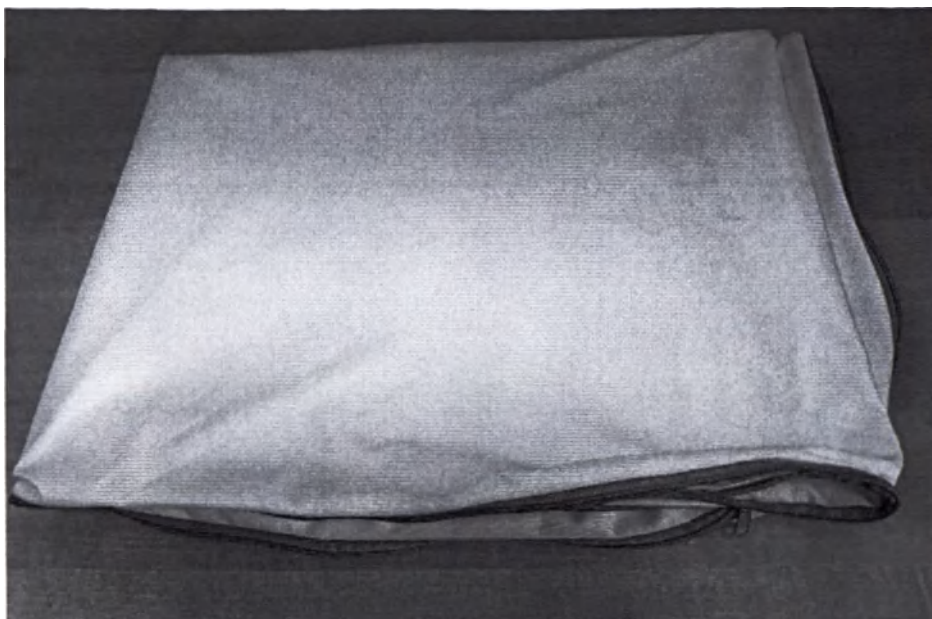


Рис.13 Чехол из мембранной ткани для матраса

2. Показания, противопоказания, побочные эффекты, меры предосторожности

Потенциальными потребителями Матрасов противолежневых с гелевым наполнителем Ortonica являются инвалиды, немощные и престарелые люди, ожоговые больные, больные с заболеваниями ЦНС, больные с разнообразными повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

⚠ ВНИМАНИЕ: Перед применением проконсультируйтесь с врачом, в случае противопоказаний, указанных ниже.

Показания к применению:

- профилактика и лечение пролежней различной степени;
- ожоговая болезнь;
- тяжелые соматические заболевания, сопровождающиеся длительным вынужденным неподвижным положением тела;
- развитие мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении больного в положении лежа;
- для удобства отдыха и комфорта, снятия усталости;
- заболевания позвоночника (радикулит, сколиоз, остеохондроз, кифоз);
- заболевания центральной нервной системы (церебральный паралич, рассеянный склероз с парестезией всего тела);
- лечение боли.

Противопоказания к применению:

- не рекомендована лицам с массой тела свыше 100 кг для Ortonica Gelio G01, G02, G03, максимальная масса тела для Ortonica Gelio Spring, Ortonica Gelio Med, Ortonica Gelio Light, Ortonica Gelio Relax - 120 кг, максимальная масса тела для Ortonica Gelio Lihgt Plus - 150 кг. В противном случае нагрузка на поверхность будет неоптимальной и сведет на нет весь позитивный эффект;
- недопустимо при травмах спинного мозга;
- недопустимо при скелетно-шейных вытяжениях;
- при множественных и нестабильных переломах.

Побочные эффекты:

- аллергическая реакция на используемые материалы.

Меры безопасности:

- Запрещается резать изделие;
- Избегать попадания прямых солнечных лучей;
- Не допускать контакта изделия с замораживающим оборудованием;
- Не допускать контакта изделия с нагревательными приборами;
- Не превышать лимит по весу;
- Не ложитесь на матрас без покрытия или одежды, чтобы исключить кожную аллергию;
- Категорически запрещается гладить матрас;
- Не обрабатывать матрас паром;
- Не подвергать матрас тепловой обработке и не пользоваться отбеливателем;
- Не кладите матрас на сломанное или не предназначенное для этого основание;
- Не кладите матрас на неровное основание, на основания разного уровня;
- Не кладите матрас на решетчатое основание, если зазор между рейками превышает 5 см. Это может сказаться на форме матраса и сократить срок его службы;
- Не кладите матрас на основание неподходящего размера. Матрас в кровати должен располагаться свободно (внутренние размеры кровати не должны быть меньше размеров матраса);
- Изделие нельзя подвергать резким механическим воздействиям (прыгать (в том числе детям), ходить по матрасу, ронять);
- После чистки и дезинфекции тщательно высушите изделие;
- Для предотвращения деформации матрас не следует скручивать или складывать.

3. Подготовка к работе и порядок работы Матрасов противопротележных с гелевым наполнителем Ortonica

- Перед использованием снимите с матраса полиэтиленовую упаковку.
- Разместите матрас на кровати, расправьте поверхность так, чтобы на нем не было складок и заломов.
- Не кладите матрас на сломанное или не предназначенное для этого основание, на неровное основание, на основания разного уровня, на решетчатое основание, если

зазор между рейками превышает 5 см. Это может сказаться на форме матраса и сократить срок его службы.

- Не кладите матрас на основание неподходящего размера. Матрас в кровати должен располагаться свободно (внутренние размеры кровати не должны быть меньше размеров матраса).
- Накройте матрас хлопковой простыней и положите на него пациента.
- Изделие нельзя подвергать резким механическим воздействиям (прыгать, ходить по матрасу, ронять).
- Матрасы и чехлы требуют своевременной (в зависимости от загрязнения) дезинфекции и сушки.
- Меняйте положение голова-ноги у матраса раз в 3 месяца (для восстановления слоев настила в процессе эксплуатации).

4. Технические характеристики

Технические характеристики МИ «Матрас противопролежневый Ortonica с гелевым наполнителем по ТУ 32.50.50-014-66445146-2019, в вариантах исполнения» должны соответствовать указанным в таблицах 1,2.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование и вариант исполнения		Размеры, мм (ДхШ)±10 мм	Размеры высоты, мм ±0,3мм	Размеры чехла, мм (ДхШхВ)±10 мм	Размеры секций и ячеек, мм	Масса, кг, ±5%	Мах нагрузка, кг
Матрас односекционный гелевый противопролежневый Ortonica Gelio	G01	1050x480	15	-	-	8,0	100
	G02	680x450				5,0	
	G03	1880x650				21,0	

Таблица 2. Технические характеристики

Наименование и вариант исполнения	Размеры, мм (ДхШхВ)±10 мм	Размеры чехла, мм (ДхШхВ)±10 мм	Размеры секций и ячеек, мм	Размеры секций и ячеек, мм	Масса, кг, ±5%	Мах нагрузка, кг
Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring	GS101(N,K,V,M)	1300x600x80	1310x610x85	Отверстие перфорации ППУ диаметром 5 мм Три гелевые вставки 380x340x5 мм, гелевая ячейка 30x30x2 мм, расстояние между ячейками 4 мм	6,9	120
	GS102(N,K,V,M)	1300x700x80	1310x710x85		7,0	
	GS103(N,K,V,M)	1300x800x80	1310x810x85		7,1	
	GS104(N,K,V,M)	1600x600x80	1610x610x85		7,7	
	GS105(N,K,V,M)	1600x700x80	1610x710x85		7,9	
	GS106(N,K,V,M)	1600x800x80	1610x810x85		8,0	
	GS107(N,K,V,M)	1900x700x80	1910x710x85		8,3	
	GS108(N,K,V,M)	1900x800x80	1910x810x85		8,5	
	GS109(N,K,V,M)	1900x850x80	1910x860x85		8,7	
	GS110(N,K,V,M)	1900x900x80	1910x910x85		8,9	
	GS111(N,K,V,M)	1950x700x80	1960x710x85		9,1	
	GS112(N,K,V,M)	1950x800x80	1960x810x85		9,4	
	GS113(N,K,V,M)	1950x850x80	1960x860x85		9,6	
	GS114(N,K,V,M)	1950x900x80	1960x910x85		9,8	

	GS115(N,K,V,M)	2000x800x80	2010x810x85		9,9	
	GS116(N,K,V,M)	2000x850x80	2010x860x85		10,0	
	GS117(N,K,V,M)	2000x900x80	2010x910x85		10,2	
Матрас односекционный противопо- ложневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med	GM101(N,K,V,M)	1300x600x80	1310x610x85	Ячейки ППУ 60x40x20 мм, расстояние между ячейками 10 мм Три гелевые вставки 380x340x5 мм Гелевая ячейка 30x30x2 мм, расстояние между ячейками 4 мм	6,3	120
	GM102(N,K,V,M)	1300x700x80	1310x710x85		6,4	
	GM103(N,K,V,M)	1300x800x80	1310x810x85		6,5	
	GM104(N,K,V,M)	1600x600x80	1610x610x85		6,9	
	GM105(N,K,V,M)	1600x700x80	1610x710x85		7,0	
	GM106(N,K,V,M)	1600x800x80	1610x810x85		7,2	
	GM107(N,K,V,M)	1900x700x80	1910x710x85		7,7	
	GM108(N,K,V,M)	1900x800x80	1910x810x85		7,9	
	GM109(N,K,V,M)	1900x850x80	1910x860x85		8,1	
	GM110(N,K,V,M)	1900x900x80	1910x910x85		8,3	
	GM111(N,K,V,M)	1950x700x80	1960x710x85		8,5	
	GM112(N,K,V,M)	1950x800x80	1960x810x85		8,7	
	GM113(N,K,V,M)	1950x850x80	1960x860x85		8,8	
	GM114(N,K,V,M)	1950x900x80	1960x910x85		9,0	
	GM115(N,K,V,M)	2000x800x80	2010x810x85		9,2	
	GM116(N,K,V,M)	2000x850x80	2010x860x85		9,4	
	GM117(N,K,V,M)	2000x900x80	2010x910x85		9,6	
Матрас двухсекционный противопо- ложневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med	GM201(N,K,V,M)	1300x600x80	1310x650x105	Две секции 550x600x80 750x600x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	5,8	120

	GM202(N,K,V,M)	1300x700x80	1310x710x105	Две секции 550x700x80 750x700x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	6,0
	GM203(N,K,V,M)	1300x800x80	1310x810x105	Две секции 550x800x80 750x800x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	6,1
	GM204(N,K,V,M)	1600x600x80	1610x610x105	Две секции 700x600x80 900x600x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	6,6
	GM205(N,K,V,M)	1600x700x80	1610x710x105	Две секции 700x700x80 900x700x80	6,8

				ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм	
	GM206(N,K,V,M)	1600х800х80	1610х810х105	Две секции 700х800х80 900х800х80 ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм	7,0
	GM207(N,K,V,M)	1900х700х80	1910х710х105	Две секции 850х700х80 1050х700х80 ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм	7,5
	GM208(N,K,V,M)	1900х800х80	1910х810х105	Две секции 850х800х80 1050х800х80 ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между	7,8

				ячейками 10мм, две гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм	
	GM209(N,K,V,M)	1900х850х80	1910х860х105	Две секции 850х850х80 1050х850х80 ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм	8,0
	GM210(N,K,V,M)	1900х900х80	1910х910х105	Две секции 850х900х80 1050х900х80 ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм	8,2

	GM211(N,K,V,M)	1950x700x80	1960x710x105	Две секции 850x700x80 1100x700x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	8,4
	GM212(N,K,V,M)	1950x800x80	1960x810x105	Две секции 850x800x80 1100x800x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	8,7
	GM213(N,K,V,M)	1950x850x80	1960x860x105	Две секции 850x850x80 1100x850x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	8,9
	GM214(N,K,V,M)	1950x900x80	1960x910x105	Две секции 850x900x80 1100x900x80 ячейка	9,1

				ППУ 60х40х20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм	
	GM215(N,K,V,M)	2000х800х80	2010х810х105	Две секции 850х800х80 1150х800х80 ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм	9,3
	GM216(N,K,V,M)	2000х850х80	2010х860х105	Две секции 850х850х80 1150х850х80 ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между ячейками 10мм, две гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм	9,5
	GM217(N,K,V,M)	2000х900х80	2010х910х105	Две секции 850х900х80 1150х900х80 ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между	9,7

				ячейками 10мм, две гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм		
Матрас трехсекционный противопро- лежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med	GM301(N,K,V,M)	1900х700х80	Три секции 640х710х85	Три секции 630х700х80 ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между ячейками 10мм, три гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм	7,6	
	GM302(N,K,V,M)	1900х800х80	Три секции 640х810х85	Три секции 630х800х80 ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между ячейками 10мм, три гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм	7,8	
	GM303(N,K,V,M)	1900х850х80	Три секции 640х860х85	Три секции 630х850х80 ячейка ППУ 60х40х20 расстояние между ячейками 10мм, три гелевые вставки 380х340х5. Гелевая ячейка 30х30х5, расстояние между	8,0	

				ячейками 4мм		120
	GM304(N,K,V,M)	1900x900x80	Три секции 640x910x85	Три секции 630x900x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, три гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	8,1	
	GM305(N,K,V,M)	1950x700x80	Три секции 660x710x85	Три секции 650x700x80	8,4	
	GM306(N,K,V,M)	1950x800x80	Три секции 660x810x85	Три секции 650x800x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, три гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	8,6	
	GM307(N,K,V,M)	1950x850x80	Три секции 660x860x85	Три секции 650x850x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, три гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	8,8	
	GM308(N,K,V,M)	1950x900x80	Три секции	Три секции 650x900x80	9,0	

			660x910x85	ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, три гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	
	GM309(N,K,V,M)	2000x800x80	Три секции 675x810x85	Три секции 665x800x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, три гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	9,2
	GM310(N,K,V,M)	2000x850x80	Три секции 675x860x85	Три секции 665x850x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, три гелевые вставки 380x340x5. Гелевая ячейка 30x30x5, расстояние между ячейками 4мм	9,3
	GM311(N,K,V,M)	2000x900x80	Три секции 675x910x85	Три секции 665x900x80 ячейка ППУ 60x40x20 расстояние между ячейками 10мм, три гелевые вставки 380x340x5. Гелевая	9,5

				ячейка 30х30х5, расстояние между ячейками 4мм		
Матрас односекционный противопролеж- невый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light	GL101(N,K,V,M)	1300х600х100	1310х650х105	- на рабочей поверхности трапециевидные конусы, размер 60 мм в широкой части, 20 мм в узкой части и высотой 25 мм. Расстояние между конусами в широкой части составляет 40 мм. - ниши для заполнения гелевыми элементами внутри матраца имеют размер 360мм. * (ширина матраца) * 15 мм. - на нижней поверхности матраца прямоугольные поперечные насечки, шириной 10 мм, глубиной 22 мм, расстояние между насечками 45 мм.	2,8	120
	GL102(N,K,V,M)	1300х700х100	1310х710х105		2,9	
	GL103(N,K,V,M)	1300х800х100	1310х810х105		3,0	
	GL104(N,K,V,M)	1600х600х100	1610х610х105		3,3	
	GL105(N,K,V,M)	1600х700х100	1610х710х105		3,4	
	GL106(N,K,V,M)	1600х800х100	1610х810х105		3,5	
	GL107(N,K,V,M)	1900х700х100	1910х710х105		3,8	
	GL108(N,K,V,M)	1900х800х100	1910х810х105		3,9	
	GL109(N,K,V,M)	1900х850х100	1910х860х105		4,0	
	GL110(N,K,V,M)	1900х900х100	1910х910х105		4,1	
	GL111(N,K,V,M)	1950х700х100	1960х710х105		4,2	
	GL112(N,K,V,M)	1950х800х100	1960х810х105		4,3	
	GL113(N,K,V,M)	1950х850х100	1960х860х105		4,4	
	GL114(N,K,V,M)	1950х900х100	1960х910х105		4,5	
	GL115(N,K,V,M)	2000х800х100	2010х810х105		4,7	
	GL116(N,K,V,M)	2000х850х100	2010х860х105		5,0	
	GL117(N,K,V,M)	2000х900х100	2010х910х105		5,2	
Матрас	GLP101(N,K,V,M)	1900х700х120	1910х710х125	- на рабочей поверхности	3,7	150

односекционный противопролеж- невый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus	GLP102(N,K,V,M)	1900x800x120	1910x810x125	трапециевидные конусы, размер 60 мм в широкой части, 20 мм в узкой части и высотой 25 мм. Расстояние между конусами в широкой части составляет 40 мм. - ниши для заполнения гелевыми элементами внутри матраца имеют размер 360мм. * (ширина матраца) * 15 мм. - на нижней поверхности матраца прямоугольные поперечные насечки, шириной 10 мм, глубиной 22 мм, расстояние между насечками 45 мм.	3,9	
	GLP103(N,K,V,M)	1900x850x120	1910x860x125		4,1	
	GLP104(N,K,V,M)	1900x900x120	1910x910x125		4,3	
	GLP105(N,K,V,M)	1950x700x120	1960x710x125		4,5	
	GLP106(N,K,V,M)	1950x800x120	1960x810x125		4,7	
	GLP107(N,K,V,M)	1950x850x120	1960x860x125		4,9	
	GLP108(N,K,V,M)	1950x900x120	1960x910x125		5,1	
	GLP109(N,K,V,M)	2000x800x120	2010x810x125		5,4	
	GLP110(N,K,V,M)	2000x850x120	2010x860x125		5,7	
	GLP111(N,K,V,M)	2000x900x120	2010x910x125		6,1	
Матрас двухсекционный противопролеж- невый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax	GR201(N,K,V,M)	1300x600x70	Две секции 660x610x75	Две секции 650x600x70, в каждой секции 6 гелевых вставок 300x170x10	25,9	120
	GR202(N,K,V,M)	1300x700x70	Две секции 660x710x75	Две секции 650x700x70, в каждой секции 6 гелевых вставок 300x170x10	27,1	
	GR203(N,K,V,M)	1300x800x70	Две секции 660x810x75	Две секции 650x800x70, в каждой секции 6 гелевых вставок 300x170x10	28,8	
	GR204(N,K,V,M)	1300x850x70	Две секции 660x610x75	Две секции 650x850x70, в каждой секции 6 гелевых	30,0	

			вставок 300x170x10	
GR205(N,K,V,M)	1600x700x70	Две секции 810x710x75	Две секции 800x700x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	34,1
GR206(N,K,V,M)	1600x800x70	Две секции 810x810x75	Две секции 800x800x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	35,8
GR207(N,K,V,M)	1900x700x70	Две секции 860x710x75	Две секции 850x700x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	37,2
GR208(N,K,V,M)	1900x800x70	Две секции 860x810x75	Две секции 850x800x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	38,7
GR209(N,K,V,M)	1900x850x70	Две секции 860x860x75	Две секции 850x850x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	40,1
GR210(N,K,V,M)	1900x900x70	Две секции 86x910x75	Две секции 850x900x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	41,4
GR211(N,K,V,M)	1950x700x70	Две секции 985x710x75	Две секции 975x700x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	42,7
GR212(N,K,V,M)	1950x800x70	Две секции 985x810x75	Две секции 975x800x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	43,9
GR213(N,K,V,M)	1950x850x70	Две секции 985x860x75	Две секции 975x850x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	45,0
GR214(N,K,V,M)	1950x900x70	Две секции 985x910x75	Две секции 975x900x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	46,0

	GR215(N,K,V,M)	2000x800x70	Две секции 1010x810x75	Две секции 1000x800x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	47,1	
	GR216(N,K,V,M)	2000x850x70	Две секции 1010x860x75	Две секции 1000x850x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	48,5	
	GR217(N,K,V,M)	2000x900x70	Две секции 1010x910x75	Две секции 1000x900x70, в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	50,0	
Матрас трехсекционный противопролеж- невый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax	GR301(N,K,V,M)	1900x700x80	Три секции 640x710x85	Три секции 630x700x70 в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	37,5	120
	GR302(N,K,V,M)	1900x800x80	Три секции 640x810x85	Три секции 630x800x70 в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	38,8	
	GR303(N,K,V,M)	1900x850x80	Три секции 640x860x85	Три секции 630x850x70 в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	40,0	
	GR304(N,K,V,M)	1900x900x80	Три секции 640x910x85	Три секции 630x900x70 в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	41,1	
	GR305(N,K,V,M)	1950x700x80	Три секции 660x710x85	Три секции 650x700x70 в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	42,4	

	GR306(N,K,V,M)	1950x800x80	Три секции 660x810x85	Три секции 650x800x70 в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	43,7
	GR307(N,K,V,M)	1950x850x80	Три секции 660x860x85	Три секции 650x850x70 в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	45,0
	GR308(N,K,V,M)	1950x900x80	Три секции 660x910x85	Три секции 650x900x70 в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	46,2
	GR309(N,K,V,M)	2000x800x80	Три секции 675x810x85	Три секции 665x800x70 в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	47,6
	GR310(N,K,V,M)	2000x850x80	Три секции 675x860x85	Три секции 665x850x70 в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	48,7
	GR311(N,K,V,M)	2000x900x80	Три секции 675x910x85	Три секции 665x900x70 в каждой секции 8 гелевых вставок 300x170x10	50,0

Таблица 3. Технические характеристики чехла для матраса

Характеристики	Значение
<i>N - ткань марки OXFORD 240D</i>	
Поверхностная плотность, (г/м ²)	>200
Относительное удлинение при разрыве, %	
Продольное	>130
Поперечное	>150
Водонепроницаемость	непроницаем
Устойчивость к многократному изгибу, кц	-
Разрывная нагрузка (даН/50мм)	
Продольная	>400
Поперечная	>700
<i>K- кожзаменитель повышенной плотности</i>	
Масса 1 м ² , г, не более	400,0
Разрывная нагрузка, даН, не менее:	
продольное направление	20,0
поперечное направление	10,0
Удлинение при разрыве, %:	
продольное направление	6,0-45,0
поперечное направление	12,0-65,0
Жесткость, сН, не более:	
продольное направление	30,0
Водонепроницаемость	непроницаем
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	150
Прочность связи между слоями, Н/мм, не менее:	0,5
продольное направление	
Устойчивость окраски к трению, баллы, не менее:	
сухое	4
мокрое	4
Сопротивление раздиру, Н, не менее:	
Продольное направление	15
Поперечное направление	10
Истираемость лицевого покрытия, мкг/Дж, не более	84,0
обороты, не менее (для искус. с жесткостью ниже 20 сН)	300,0
Огнеопасность, мм/с, не более	1,7
<i>V - клеенка медицинская</i>	
Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее:	
по основе	300 (30)
по утку	190 (19)
Жесткость, Н (кгс), не более	0,05 (5)
Масса 1 м ² , кг, не более	0,65
<i>M - ткань биэластик (Bielastic)</i>	
Масса 1 м ² , г, не более	400,0

Разрывная нагрузка, даН, не менее:	
продольное направление	25,0
поперечное направление	20,0
Удлинение при разрыве, %:	
продольное направление, не более	80,0
поперечное направление, не более	150,0
Жесткость, сН, не более:	
продольное направление	20,0
Водонепроницаемость	непроницаем
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	150
Прочность связи между слоями, Н/мм, не менее:	0,5
продольное направление	
Устойчивость окраски к трению, баллы, не менее:	
сухое	4
мокрое	4
Удлинение под нагрузкой 2,0 даН/см, %:	
продольное направление	12,0-30,0
поперечное направление	70,0-100,0
диагональное направление	35,0-60,0
Сопротивление раздиру, Н, не менее:	
Продольное направление	15
Поперечное направление	15
Обороты, не менее (для искожи с жесткостью ниже 20 сН)	300,0
Огнеопасность, мм/с, не более	1,7

5. Материалы

Матрас противопролежневый Ortonica с гелевым наполнителем, не содержит в себе лекарственных средств и материалов животного или человеческого происхождения.

Элементы Матраса, имеющие контакт с пациентом и обслуживающим персоналом, изготовлены или имеют покрытия из материалов, безопасность которых подтверждена протоколом токсикологических испытаний.

Материалы МИ «Матрас противопролежневый Ortonica с гелевым наполнителем по ТУ 32.50.50-014-66445146-2019, в вариантах исполнения» указанным в Таблице 4.

Таблица 4.

Наименование изделия	Применяемые материалы
Матрас противопролежневый Ortonica с гелевым наполнителем по ТУ 32.50.50-014-66445146-2019, в вариантах исполнения	
1. Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio в вариантах исполнения G01, G02, G03	Основа из термопластичного полиуретана (ТПУ) марки BT 65 и полиуретана (ПУ) гель марки ds03
2.1 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring в вариантах исполнения: GS101N, GS102N, GS103N, GS104N, GS105N, GS106N, GS107N, GS108N, GS109N, GS110N, GS111N, GS112N, GS113N, GS114N, GS115N, GS116N, GS117N	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: N - ткань марки OXFORD 240D (полиэстер с полиуретановым напылением, плотностью 135 г/м²). Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
2.2 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring в вариантах исполнения: GS101K, GS102K, GS103K, GS104K, GS105K, GS106K, GS107K, GS108K, GS109K, GS110K, GS111K, GS112K, GS113K, GS114K, GS115K, GS116K, GS117K	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: K- кожаменитель повышенной плотности, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление), плотностью 250 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
2.3 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring в вариантах исполнения: GS101V, GS102V, GS103V, GS104V, GS105V, GS106V, GS107V, GS108V, GS109V, GS110V, GS111V, GS112V, GS113V, GS114V, GS115V, GS116V, GS117V	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с ПВХ напылением, плотностью 390 г/м².

	Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
2.4 Матрас односекционный противопрележневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Spring в вариантах исполнения: GS101M, GS102M, GS103M, GS104M, GS105M, GS106M, GS107M, GS108M, GS109M, GS110M, GS111M, GS112M, GS113M, GS114M, GS115M, GS116M, GS117M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки LR4010P; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: М - ткань бизэластик (Bielastic) - мембранная ткань, сделанная из прочного, дышащего материала полиэстера, кругловязального плетения, с полиуретановым покрытием, плотностью 170 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
3.1 Матрас односекционный противопрележневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM101N, GM102N, GM103N, GM104N, GM105N, GM106N, GM107N, GM108N, GM109N, GM110N, GM111N, GM112N, GM113N, GM114N, GM115N, GM116N, GM117N	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: N - ткань марки OXFORD 240D (полиэстер с полиуретановым напылением, плотностью 135 г/м²). Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
3.2 Матрас односекционный противопрележневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM101K, GM102K, GM103K, GM104K, GM105K, GM106K, GM107K, GM108K, GM109K, GM110K, GM111K, GM112K, GM113K, GM114K, GM115K, GM116K, GM117K	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: К- кожзаменитель повышенной плотности, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление), плотностью 250 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).

3.3 Матрас односекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM101V, GM102V, GM103V, GM104V, GM105V, GM106V, GM107V, GM108V, GM109V, GM110V, GM111V, GM112V, GM113V, GM114V, GM115V, GM116V, GM117V	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с ПВХ напылением, плотностью 390 г/м². Застежка-молния №6 (тесма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
3.4 Матрас односекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM101M, GM102M, GM103M, GM104M, GM105M, GM106M, GM107M, GM108M, GM109M, GM110M, GM111M, GM112M, GM113M, GM114M, GM115M, GM116M, GM117M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: M - ткань биэластик (Bielastic) - мембранная ткань, сделанная из прочного, дышащего материала полиэстера, кругловязального плетения, с полиуретановым покрытием, плотностью 170 г/м². Застежка-молния №6 (тесма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
4.1 Матрас двухсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM201N, GM202N, GM203N, GM204N, GM205N, GM206N, GM207N, GM208N, GM209N, GM210N, GM211N, GM212N, GM213N, GM214N, GM215N, GM216N, GM217N	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: N - ткань марки OXFORD 240D (полиэстер с полиуретановым напылением, плотностью 135 г/м²) Застежка-молния №6 (тесма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).

4.2 Матрас двухсекционный противопрележневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM201K, GM202K, GM203K, GM204K, GM205K, GM206K, GM207K, GM208K, GM209K, GM210K, GM211K, GM212K, GM213K, GM214K, GM215K, GM216K, GM217K	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: К- кожаменитель повышенной плотности, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление), плотностью 250 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
4.3 Матрас двухсекционный противопрележневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM201V, GM202V, GM203V, GM204V, GM205V, GM206V, GM207V, GM208V, GM209V, GM210V, GM211V, GM212V, GM213V, GM214V, GM215V, GM216V, GM217V	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с ПВХ напылением, плотностью 390 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
4.4 Матрас двухсекционный противопрележневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM201M, GM202M, GM203M, GM204M, GM205M, GM206M, GM207M, GM208M, GM209M, GM210M, GM211M, GM212M, GM213M, GM214M, GM215M, GM216M, GM217M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: М - ткань биэластик (Bielastic) - мембранная ткань, сделанная из прочного, дышащего материала полиэстера, кругловязального плетения, с полиуретановым покрытием, плотностью 170 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).

5.1 Матрас трехсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM301N, GM302N, GM303N, GM304N, GM305N, GM306N, GM307N, GM308N, GM309N, GM310N, GM311N	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: N - ткань марки OXFORD 240D (полиэстер с полиуретановым напылением, плотностью 135 г/м²) Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
5.2 Матрас трехсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM301K, GM302K, GM303K, GM304K, GM305K, GM306K, GM307K, GM308K, GM309K, GM310K, GM311K	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: K- кожаный заменитель повышенной плотности, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление), плотностью 250 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
5.3 Матрас трехсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM301V, GM302V, GM303V, GM304V, GM305V, GM306V, GM307V, GM308V, GM309V, GM310V, GM311V	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с ПВХ напылением, плотностью 390 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).

5.4 Матрас трехсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Med в вариантах исполнения: GM301M, GM302M, GM303M, GM304M, GM305M, GM306M, GM307M, GM308M, GM309M, GM310M, GM311M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ 2254-211-00244147-2001 марки ST35/42; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, водорастворимый клей SIMALFA 337 red Чехол для матраса: М - ткань биэластик (Bielastic) - мембранная ткань, сделанная из прочного, дышащего материала полиэстера, кругловязального плетения, с полиуретановым покрытием, плотностью 170 г/м². Застежка-молния №6 (тесма - нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии - силумин марки АК12).
6.1 Матрас односекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light в вариантах исполнения: GL101N, GL102N, GL103N, GL104N, GL105N, GL106N, GL107N, GL108N, GL109N, GL110N, GL111N, GL112N, GL113N, GL114N, GL115N, GL116N, GL117N	Пенополиуретан (ППУ) марки ST25/36; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола, водорастворимый клей SIMALFA 337 red; Чехол для матраса: N - ткань марки OXFORD 240D (полиэстер с полиуретановым напылением, плотностью 135 г/м²) Застежка-молния №6 (тесма - нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии - силумин марки АК12).
6.2 Матрас односекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light в вариантах исполнения: GL101K, GL102K, GL103K, GL104K, GL105K, GL106K, GL107K, GL108K, GL109K, GL110K, GL111K, GL112K, GL113K, GL114K, GL115K, GL116K, GL117K	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола, водорастворимый клей SIMALFA 337 red; Чехол для матраса: К- кожзаменитель повышенной плотности, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление), плотностью 250 г/м² Застежка-молния №6 (тесма - нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии - силумин марки АК12).

6.3 Матрас односекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light в вариантах исполнения: GL101V, GL102V, GL103V, GL104V, GL105V, GL106V, GL107V, GL108V, GL109V, GL110V, GL111V, GL112V, GL113V, GL114V, GL115V, GL116V, GL117V	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола, водорастворимый клей SIMALFA 337 red; Чехол для матраса: V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с ПВХ напылением, плотностью 390 г/м² Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
6.4 Матрас односекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light в вариантах исполнения: GL101M, GL102M, GL103M, GL104M, GL105M, GL106M, GL107M, GL108M, GL109M, GL110M, GL111M, GL112M, GL113M, GL114M, GL115M, GL116M, GL117M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола, водорастворимый клей SIMALFA 337 red; Чехол для матраса: M - ткань биэластик (Bielastic) - мембранная ткань, сделанная из прочного, дышащего материала полиэстера, кругловязального плетения, с полиуретановым покрытием, плотностью 170 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
7.1 Матрас односекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus в вариантах исполнения: GLP101N, GLP102N, GLP103N, GLP104N, GLP105N, GLP106N, GLP107N, GLP108N, GLP109N, GLP110N, GLP111N	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола, водорастворимый клей SIMALFA 337 red; Чехол для матраса: N - ткань марки OXFORD 240D (полиэстер с полиуретановым напылением, плотностью 135 г/м²) Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной

7.2 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus в вариантах исполнения: GLP101K, GLP102K, GLP103K, GLP104K, GLP105K, GLP106K, GLP107K, GLP108K, GLP109K, GLP110K, GLP111K	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола, водорастворимый клей SIMALFA 337 red; Чехол для матраса: К- кожаменитель повышенной плотности, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление), плотностью 250 г/м² Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной.
7.3 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus в вариантах исполнения: GLP101V, GLP102V, GLP103V, GLP104V, GLP105V, GLP106V, GLP107V, GLP108V, GLP109V, GLP110V, GLP111V	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола, водорастворимый клей SIMALFA 337 red; Чехол для матраса: V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с ПВХ напылением, плотностью 390 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
7.4 Матрас односекционный противопролежневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Light Plus в вариантах исполнения: GLP101M, GLP102M, GLP103M, GLP104M, GLP105M, GLP106M, GLP107M, GLP108M, GLP109M, GLP110M, GLP111M	Пенополиуретан (ППУ) по ТУ2254-211-00244147-2001 марки ST25/36; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола, водорастворимый клей SIMALFA 337 red; Чехол для матраса: М - ткань биэластик (Bielastic) - мембранная ткань, сделанная из прочного, дышащего материала полиэстера, кругловязального плетения, с полиуретановым покрытием, плотностью 170 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).

8.1 Матрас двухсекционный противопрележневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR201N, GR202N, GR203N, GR204N, GR205N, GR206N, GR207N, GR208N, GR209N, GR210N, GR211N, GR212N, GR213N, GR214N, GR215N, GR216N, GR217N	Вязкоэластичный пенополиуретан LR с эффектом запоминания формы; натуральный каучук; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола; Чехол для матраса: N - ткань марки OXFORD 240D (полиэстер с полиуретановым напылением, плотностью 135 г/м²). Застежка-молния №6 (тесма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
8.2 Матрас двухсекционный противопрележневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR201K, GR202K, GR203K, GR204K, GR205K, GR206K, GR207K, GR208K, GR209K, GR210K, GR211K, GR212K, GR213K, GR214K, GR215K, GR216K, GR217K	Вязкоэластичный пенополиуретан LR с эффектом запоминания формы; натуральный каучук; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола; Чехол для матраса: К- кожаменитель повышенной плотности, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление), плотностью 250 г/м². Застежка-молния №6 (тесма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
8.3 Матрас двухсекционный противопрележневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR201V, GR202V, GR203V, GR204V, GR205V, GR206V, GR207V, GR208V, GR209V, GR210V, GR211V, GR212V, GR213V, GR214V, GR215V, GR216V, GR217V	Вязкоэластичный пенополиуретан LR с эффектом запоминания формы; натуральный каучук; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола; Чехол для матраса: V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с ПВХ напылением, плотностью 390 г/м² Застежка-молния №6 (тесма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).

8.4 Матрас двухсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR201M, GR202M, GR203M, GR204M, GR205M, GR206M, GR207M, GR208M, GR209M, GR210M, GR211M, GR212M, GR213M, GR214M, GR215M, GR216M, GR217M	Вязкоэластичный пенополиуретан LR с эффектом запоминания формы; натуральный каучук; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола; Чехол для матраса: М - ткань биэластик (Bielastic) - мембранная ткань, сделанная из прочного, дышащего материала полиэстера, кругловязального плетения, с полиуретановым покрытием, плотностью 170 г/м². Застежка-молния №6 (тесма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
9.1 Матрас трехсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR301N, GR302N, GR303N, GR304N, GR305N, GR306N, GR307N, GR308N, GR309N, GR310N, GR311N	Вязкоэластичный пенополиуретан LR с эффектом запоминания формы; натуральный каучук; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола; Чехол для матраса: N - ткань марки OXFORD 240D (полиэстер с полиуретановым напылением, плотностью 135 г/м²) Застежка-молния №6 (тесма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
9.2 Матрас трехсекционный противоположный с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR301K, GR302K, GR303K, GR304K, GR305K, GR306K, GR307K, GR308K, GR309K, GR310K, GR311K	Вязкоэластичный пенополиуретан LR с эффектом запоминания формы; натуральный каучук; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола; Чехол для матраса: К- кожзаменитель повышенной плотности, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление), плотностью 250 г/м² Застежка-молния №6 (тесма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).

9.3 Матрас трехсекционный противопрележневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR301V, GR302V, GR303V, GR304V, GR305V, GR306V, GR307V, GR308V, GR309V, GR310V, GR311V	Вязкоэластичный пенополиуретан LR с эффектом запоминания формы; натуральный каучук; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола; Чехол для матраса: V - клеенка медицинская, на тканевой основе, с ПВХ напылением, плотностью 390 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).
9.4 Матрас трехсекционный противопрележневый с гелевым наполнителем Ortonica Gelio Relax в вариантах исполнения: GR301M, GR302M, GR303M, GR304M, GR305M, GR306M, GR307M, GR308M, GR309M, GR310M, GR311M	Вязкоэластичный пенополиуретан LR с эффектом запоминания формы; натуральный каучук; пленка ПВХ непрозрачная, толщина 140 мкм; гель марки ds03, гранулы пенополистерола; Чехол для матраса: М - ткань бизластик (Bielastic) - мембранная ткань, сделанная из прочного, дышащего материала полиэстера, кругловязального плетения, с полиуретановым покрытием, плотностью 170 г/м². Застежка-молния №6 (тесьма – нейлон марки 6.6, спираль - полиамид марки ПА6-210/310, движок для спиральной молнии – силумин марки АК12).

Упаковка: Полиэтилен (HP 0722N), картон (FBB)

6. Упаковка и маркировка

Маркировка должна быть четкой и содержать:

- наименование изделия с обозначением ТУ;
- вариант исполнения изделия;
- габаритные размеры;
- масса;
- максимальная нагрузка;
- материал;
- производитель;
- юридический адрес;

- место производства;
- дата изготовления (месяц, год);
- номер регистрационного удостоверения;
- заводской номер партии.

Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192-96. На транспортную тару должна быть нанесена маркировка:

- наименование производителя;
- наименование изделия;
- наименование варианта исполнения;
- число изделий;
- год и месяц упаковывания.

Маркировку наносят на тару. Переменные данные на ярлыке могут быть заполнены от руки четко и разборчиво.

Маркировка матрасов, предназначенных для экспорта, должна содержать:

- наименование изделия;
- наименование варианта исполнения;
- заводской номер;
- дата изготовления (год);
- обозначение и товарный знак экспортера;
- надписи “Экспорт”, “Страна-изготовитель”;
- максимальная нагрузка;
- номер настоящих технических условий.

Транспортная маркировка матрасов, предназначенных для экспорта, должна быть выполнена по ГОСТ 14192-96 и содержать:

- номер контракта и (или) номер заказа иностранного покупателя;
- номер заказа-наряда;
- номер грузового места;
- полное наименование или условное обозначение иностранного грузополучателя;
- наименование пункта назначения с указанием станции или порта перегрузки;
- страна назначения груза;
- станция и дорога назначения груза;
- товарные знаки и марки грузоотправителя.
- наименование экспортирующей организации;

- пункт отправления груза;
- станция и дорога отправления;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- массы нетто и брутто в килограммах;
- объем грузового места в кубических метрах;
- надписи "Экспорт", "Страна-изготовитель и (или) поставщик".

На транспортную упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги".

Расшифровка графических символов, представленных на маркировке:

	Хрупкое, обращаться осторожно
	Этой стороной вверх
	Беречь от влаги
	Температурный диапазон
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Товарный знак производителя
	Товарный знак грузоотправителя
	Место строповки
EXPORT	Экспорт

7. Условия хранения и транспортировки

Температура транспортирования и хранения МИ «Матрас противопротезный Ortonica с гелевым наполнителем по ТУ 32.50.50-014-66445146-2019, в вариантах исполнения» составляет от -50°C до +40°C, относительная влажность 98% при 25°C.

Температура эксплуатации изделия составляет от +10 °C до +40 °C и относительной влажности 90 % при температуре +25 °C.

Продукт следует хранить в закрытых сухих помещениях с достаточной циркуляцией воздуха и защищать его от внешних воздействий.

Транспортирование «Матрас противопротезный Ortonica с гелевым наполнителем по ТУ 32.50.50-014-66445146-2019, в вариантах исполнения» должно производиться любым видом наземного транспорта, а так же водным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортировка осуществляется с учетом условий хранения.

Средний срок службы матрасов должен быть не менее 5 лет.

8. Уход, чистка и дезинфекция

Медицинское изделие «Матрас противопротезный Ortonica с гелевым наполнителем по ТУ 32.50.50-014-66445146-2019, в вариантах исполнения» поставляется нестерильным.

Следует производить влажную очистку изделия от пыли и грязи. Ежедневная необходимая санитарная очистка и дезинфекция изделия может проводиться с применением мыльного водного раствора или бытовых моющих средств. Нельзя применять агрессивные чистящие средства, например, растворители, а также твердые щетки и т.д., это может повредить изделие.

Для чехла из ткани марки OXFORD рекомендуемый уход:

- подлежит автоклавированию при температуре до 110°C, время выдержки 20-30 мин.
 - протирание влажной салфеткой с помощью воды или антисептического раствора.
- Покрывало (чехол) устойчиво к дезинфекции дезинфицирующим средством, «МультиДез (концентрат)» (протереть салфеткой или губкой, смоченной в растворе 0,05% концентрата (0,5 мл на 1 л воды), смывание раствора средства не требуется (при необходимости протереть сухой салфеткой), полностью просушить;

- ежедневная стирка до 60°C, время выдержки 30-60 мин;
- машинная стирка до 95°C, время выдержки не менее 60 мин;

Чехол с кожзаменителя для матраца рекомендации по уходу:

- стойкий к санитарно-гигиенической обработке, в том числе альдегид и хлор содержащими средствами;
- во время чистки следует использовать средства защиты (перчатки);
- покрытие (чехол) протирать влажной салфеткой с помощью воды или антисептического раствора. Покрытие (чехол) устойчиво к дезинфекции дезинфицирующим средством, например, «МультиДез (концентрат)» (протереть салфеткой или губкой, смоченной в растворе 0,05% концентрата (0,5 мл на 1 л воды), смывание раствора средства не требуется (при необходимости протереть сухой салфеткой), полностью просушить;
- при чистке всегда проверять покрытие (чехол) на предмет повреждений, при обнаружении повреждений надо заменить покрытие (чехол);
- не использовать пока все поверхности не высохнут;
- не допускается интенсивное затираание, чистка абразивными моющими или чистящими средствами;
- запрещается использование чистящих средств, имеющих в своем составе спирт, а также красители.

Чехол из клеенки медицинской, на тканевой основе рекомендуемый уход:

- стойкий к санитарно-гигиенической обработке, в том числе альдегид и хлор содержащими средствами, например «Деналь» (1 способ: протереть салфеткой или губкой, смоченной в растворе 0,1% концентрата (1,0 мл на 1 л воды), смыть проточной холодной водой, просушить (при необходимости протереть сухой салфеткой); 2 способ: замочить в растворе 0,1% концентрата (1,0 мл на 1 л воды), время выдержки 30 мин, ополаскивание проточной водой, просушить);
- подлежит автоклавированию при температуре до 110°C, время выдержки не менее 30 мин.

Чехол из мембранной ткани рекомендуемый уход:

- стойкий к санитарно-гигиенической обработке, за исключением альдегид и хлор содержащих средств, можно использовать «МультиДез (концентрат)» (протереть салфеткой или губкой, смоченной в растворе 0,05% концентрата (0,5 мл на 1 л воды),

смывание раствора средства не требуется, просушить (при необходимости протереть сухой салфеткой);

- подлежит автоклавированию при температуре до 130°C, время выдержки 20-30 мин;
- машинная стирка до 90°C, время выдержки не менее 60 мин.

9. Утилизация

Утилизация продукта вместе с бытовыми отходами не предусмотрена.

Утилизация матрасов Ortonica по ТУ 32.50.50-014-66445146-2019 должна осуществляться в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10, для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

10. Техническое обслуживание

Для данных медицинских изделий техническое обслуживание – не предусмотрено.

11. Применяемые национальные стандарты

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»;

ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными».

ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro».

ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и sensibilizing действия».

ГОСТ ISO 10993-12-2015. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы».

12. Гарантийная информация

Гарантийный срок хранения матрасов – не менее 3 лет.

Гарантийный срок эксплуатации матрасов с момента поставки или продажи - 12 месяцев.

Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные грубым обращением с изделием. Гарантия распространяется только на производственный брак. На быстроизнашивающиеся части (чехол) гарантия не предоставляется.

Гарантия предполагает обмен изделия. Необходимо как можно подробнее описать проблему и возможную причину для гарантийной претензии. Требуется приложить копию счета-фактуры и сообщить, если продукт должен вернуться назад после ремонта. Указывается адрес доставки, контактное лицо и номер телефона. Необходимо хорошо упаковать продукт, чтобы защитить его от повреждений во время перевозки. Необходимо зафиксировать идентификационный номер отправки в документации, для того чтобы отслеживать пересылку.

13. Рекламация

Организация, принимающая на территории Российской Федерации претензии от потребителя по качеству продукта:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника»

ООО «Ортоника», юридический адрес: Россия, 105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я, д. 9/35, кв. 94.

Телефон: +7 (495) 648-60-42.

Прошнуровано и пронумеровано

55 лист об

Генеральный Директор

ООО «Ортоника»

М.К.Терехов

