

ОКП 94 5200

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО НПФ «Аском»



А.А. Вязигин

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ СМ-«АСКОМ»

9452-003-77825900-2011 ПС

Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Технические характеристики.....	3
3. Комплектность	5
4. Устройство и принцип работы	5
5. Указание мер безопасности	5
6. Подготовка к работе	6
7. Порядок сборки	6
8. Техническое обслуживание	7
9. Правило транспортирование и хранение	7
10. Гарантии изготовителя	7
11. Приложение 1 Свидетельство о консервации	9
12. Приложение 2 Свидетельство об упаковывании	10
13. Приложение 3 Свидетельство о приемке	11
14. Гарантийный талон	12
15. Лист регистрации изменений	13

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. «Столы медицинские СМ-«Аском» предназначенные для размещения на них пациентов в процедурных, перевязочных и физиотерапевтических отделениях.

1.2. Область применения – медицинские лечебные и лечебно-профилактические учреждения.

1.3. Столы производятся в двух исполнениях:

- столы медицинские массажные – СММ-«Аском»;
- столы медицинские перевязочные – СПП-«Аском».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Исполнения, модели, их обозначение, габаритные размеры и масса столов приведены в таблице 1.

Таблица 1

№№ пп	Наименование	Обозначени е исполнения	Габаритные размеры, мм	Конструктивные особенности	Масса, кг
Столы медицинские перевязочные					
1	СМПэ-01- «Аском»	СМ.02.01	(1980x600)±4	Регулировка высоты электроприводом. Односекционный	45
	СМПэ-02- «Аском»	СМ.02.02	(1980x600)±4	Регулировка высоты электроприводом. Двухсекционный с регулируемым подголовником от 0 до 45°	45
2	СМПг-01- «Аском»	СМ.03.01	(1980x600)±4	Регулировка высоты гидроприводом. Односекционный	47
	СМПг-02- «Аском»	СМ.04.01	(1980x600)±4	Регулировка высоты гидроприводом. Двухсекционный с регулируемым подголовником от 0 до 45°	47

Продолжение таблицы 1

№№ пп	Наименование	Обозначение исполнения	Габаритные размеры, мм	Конструктивные особенности	Масса, кг
Столы медицинские массажные					
3	СММ-01-«Аском»	СМ.01.00	(1980x600)±4	Регулировка высоты электроприводом. Односекционный	45
4	СММ-02- «Аском»	СМ.02.00	(1980x600)±4	Регулировка высоты электроприводом. Двухсекционный с регулируемым подголовником от 0 до 45°	47
5	СММ-03-«Аском»	СМ.03.00	(1980x600)±4	Регулировка высоты электроприводом. Трехсекционный с регулируемым подголовником от 0 до 45° и регулируемой ножной секцией от 0 до 45°	50
6	СММ-05-«Аском»	СМ.05.00	(1980x600)±4	Регулировка высоты электроприводом. Пятисекционный с регулируемым подголовником от 0 до 45° и регулируемой ножной секцией от 0 до 45°. Два регулируемых по высоте подлокотника	55

2.2. Размер ложа столов (1980x600)±4 мм.

2.3. Высота столов не более 900 мм.

2.4. Диапазон регулирования высоты подъема ложа столов в пределах 450 – 900 мм.

2.5. Размеры секций столов:

- модели СММ-01 (СМП-01) односекционные – 1980x600 мм;

- модели СММ-02 (СМП-02) двухсекционные – подголовник 420х600 мм, тазобедренная 1560х600 мм;

- модели СММ-03, СММ-05) трехсекционные – головная 690х600, тазобедренная 570х600 мм, ножная 710х600 мм.

2.6. Диаметр колес не менее 100 мм.

2.7. Столы должны выдерживать равномерно-распределенную нагрузку на ложе столов массой (160 ± 5) кг.

2.8. Столы установленные на колесные опоры легко, без заеданий перемещаются по горизонтальной поверхности. Усилие перемещения столов на колесных опорах не превышает 50 Н.

2.9. Столы стоят на горизонтальной поверхности бесшовного каменного пола устойчиво, при этом зазор между колесом или одной из опор и поверхностью пола не более 3 мм.

2.10. Колеса столов установленных на колесные опоры ошпированы резиной, вращаться относительно вертикальной оси свободно, без заедания и иметь тормозное устройство.

2.11. Усилие срабатывания тормоза более 120 Н.

2.12. Пневмопружина, обеспечивающая регулировку высоты ложа столов герметична..

2.13. Усилие, прикладываемое к рычагу расфиксации пневмопружины, обеспечивающей регулировку высоты ложа столов, не более 50Н.

2.14. Неподвижные опоры имеют диапазон регулирования не менее 10 мм.

2.15. Подголовник столов моделей СММ-02, СММ-03, СМП-02 устанавливается под углом в диапазоне от 0° до 45° ступенчато, с шагом 5°.

2.16. Детали изделий столов изготовлены из следующих материалов:

- каркас – стальная тонкостенная труба с полимерно-порошковым покрытием;
- рабочая поверхность (ложе, подголовник) – ДСП 16 мм, поролон 20 мм искусственная кожа (винилискожа) по ГОСТ 23367.

2.17. Покупные изделия имеют сопроводительную документацию, подтверждающую их соответствие нормативным документам, распространяющихся на них.

2.18. Поверхность столов не имеет вмятин, царапин, трещин, потертостей, отслоений, вздутий покрытий, клеевых пятен, следов коррозии и других дефектов.

2.19. Каждая секция столов покрыта полотном. Полотно натянуто ровно, без морщин и перекосов.

2.20. Винилискожа натянута плотно, без морщин.

2.21. Сварные швы каркаса ровные, плотные, без наплывов, прожогов, непроваренных мест и зачищены.

2.22. Столы с электроприводом работают от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (220 ± 22) В,

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки столов соответствует таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Обозначение документа	Кол - во
1 Столы медицинские массажные СММ-«Аском»	ТУ 9452-003-77825900-2011	1
2 Столы медицинские перевязочные СМП-«Аском»	ТУ 9452-003-77825900-2011	1
Эксплуатационная документация		
2 Паспорт	9452-003-77825900-2011 ПС	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Детали изделий столов изготовлены из следующих материалов:

- каркас – стальная тонкостенная труба с полимерно-порошковым покрытием;
- рабочая поверхность (ложе, подголовник) – ДСП 16 мм, поролон 20 мм искусственная кожа (винилискожа) по ГОСТ 23367.

4.2. Покупные изделия имеют сопроводительную документацию, подтверждающую их соответствие нормативным документам, распространяющихся на них.

4.3. Поверхность столов не имеют вмятин, царапин, трещин, потертостей, отслоений, вздутий покрытий, клеевых пятен, следов коррозии и других дефектов.

4.4. Каждая секция столов покрыта полотном. Полотно натянуто ровно, без морщин и перекосов.

4.5. Винилискожа наята плотно, без морщин.

4.6. Сварные швы каркаса ровные, плотные, без наплывов, прожогов, непроваренных мест и зачищены.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 В период эксплуатации столов должны выполняться порядок и правила инструкции по эксплуатации.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. После транспортирования в условиях отрицательных температур столы должны быть выдержаны в транспортной таре в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 2 ч.

6.2. Распакуйте стол. Проверьте комплектность.

6.3. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего описания.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Периодический осмотр включает в себя.

- осмотр колес, работоспособность тормозов, надежность крепления колес к ножкам, свободное вращение колес вокруг своей оси;

- осмотр подвижных частей секций (надежность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций);

- осмотр ножек (надежность их фиксации);

В случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 Транспортировать столы следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

9.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.

9.3 Столы в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться на складах поставщика в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 не более 2-х лет.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте .

10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Столы медицинские СМ-«АСКОМ»

наименование изделия

обозначение модели

номер технических условий ТУ 9452-003-77825900-2011

заводской номер _____

подвергнуты _____

наименование или шифр предприятия,

_____ консервации согласно

производившего консервацию

требованиям, предусмотренным в _____

Дата консервации _____

Срок консервации _____ М.П

Консервацию произвел _____ (подпись)

Изделие после консервации принял _____ (подпись)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Столы медицинские СМ-«АСКОМ»

наименование изделия

обозначение

заводской номер _____

упакована _____

(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям ТУ 9452-003-77825900-2011 и комплекту
технической документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел

(должность,

личная подпись,

расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столы медицинские СМ-«АСКОМ»

наименование изделия

обозначение

заводской номер _____

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями ТУ 9452-003-77825900-2011 и комплекту технической документации.

МП _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Завод-изготовитель

Адрес, реквизиты, телефон

Адрес, реквизиты, телефон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт(замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники

Столы медицинские СМ-«АСКОМ»

наименование изделия

обозначение

заводской номер _____

выпущенные _____

(по свидетельству о приемке)

приобретенные _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

введены в эксплуатацию _____

(дата, подпись)

приняты на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

(адрес ремонтного предприятия)

МП Подпись руководителя и

печать ремонтного предприятия _____

МП Подпись руководителя и

печать предприятия-владельца _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документ а	Входящий № сопроводительног о документа и дата	Подпись	Дат а
	Изме ненн ых	замене нных	новы х	изъяты х					

[illegible]