



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Гермес-Технология»

Жарнов П.М.

«25» марта 2022 г.

**Инструкция по применению
на медицинское изделие**

**Бахилы медицинские одноразовые нестерильные
по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019**

1.	Наименование и варианты исполнения медицинского изделия.....	3
2.	Сведения о производителе, разработчике, адресах мест производства медицинского изделия	3
3.	Назначение медицинского изделия	3
4.	Показания для применения и область применения медицинского изделия.....	3
5.	Противопоказания к применению медицинского изделия	4
6.	Нежелательные реакции и побочные эффекты при применении медицинского изделия ..	4
7.	Инструкция по применению медицинского изделия.....	4
8.	Предупреждения и рекомендации при применении медицинского изделия	4
9.	Меры предосторожности при применении медицинского изделия	4
10.	Условия применения медицинского изделия	4
11.	Частота замены медицинского изделия	4
12.	Вид и длительность контакта медицинского изделия с организмом человека.....	4
13.	Описание и принцип действия медицинского изделия и фотографические изображения.	4
14.	Техническое описание медицинского изделия.....	11
15.	Условия транспортировки медицинского изделия	13
16.	Условия и срок хранения медицинского изделия	13
17.	Очистка, дезинфекция, стерилизация медицинского изделия.....	13
18.	Упаковка медицинского изделия	13
19.	Комплектность поставки медицинского изделия	14
20.	Маркировка, макеты маркировки и этикеток медицинского изделия	15
21.	Требования к утилизации медицинского изделия	16
22.	Гарантии изготовителя	16
23.	Методы испытаний и контроля медицинского изделия.....	16
24.	Перечень нормативных документов/стандартов.....	16
25.	Рекламация.....	17

1. Наименование и варианты исполнения медицинского изделия

Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019, варианты исполнения:

1. Стандартные, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
2. Стандартные с двумя резинками, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
3. Лайт, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
4. Экстра Лайт, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
5. Прочные, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
6. Прочные с двумя резинками, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке. - 10 пар в упаковке.
7. Особо прочные, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
8. Особо прочные с двумя резинками, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
9. Сверхпрочные, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
10. Сверхпрочные с двумя резинками, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
11. Мегапрочные, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
12. Мегапрочные с двумя резинками, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
13. Суперпрочные с двумя резинками, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
14. Экстрапрочные с двумя резинками, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
15. С двойной подошвой, цвета: двухцветные (бело-синие) - 10 пар в упаковке.
16. Детские, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.
17. Высокопрочные с двумя резинками, цвета: синие, голубые, зеленые, оранжевые, розовые, красные, серые, черные, фиолетовые, желтые, белые - 10 пар в упаковке.

Далее по тексту: бахилы, изделие

2. Сведения о производителе, разработчике, адресах мест производства медицинского изделия

Производитель: ООО «Гермес Технология», Адрес: 142653, Московская область, г. Орехово-Зуево, с.Хотенчи, д. 263, пом. 3, этаж 1.

Место производства: ООО «Гермес Технология», 140030, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок Малаховка, Касимовское шоссе, дом 1А (Литера О), этаж 1, кабинет 101.

3. Назначение медицинского изделия

Бахилы предназначены для использования в качестве физического барьера на обуви для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой.

4. Показания для применения и область применения медицинского изделия

Показания к применению: бахилы применяются для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой.

Область применения: бахилы применяются в условиях отделений/кабинетов функциональной диагностики, кардиологических, терапевтических, физиотерапевтических, патологоанатомических отделениях, поликлинических условиях. Возможны применения в условиях скорой помощи и экстремальной медицины.

5. Противопоказания к применению медицинского изделия

Противопоказаний к применению не имеется.

6. Нежелательные реакции и побочные эффекты при применении медицинского изделия

Побочные эффекты и нежелательные реакции отсутствуют.

Тем не менее, бахилы следует использовать с осторожностью людям с ярко выраженной индивидуальной непереносимостью отдельных компонентов изделия.

7. Инструкция по применению медицинского изделия

Для начала применения бахил необходимо:

- вскрыть упаковку;
- извлечь изделие из упаковки;
- расправить бахилы;
- надеть бахилы поверх обуви, начиная с носочной части обуви, затем расправить по всей ширине;
- закрепить бахилы на пяточной части обуви;
- использовать по назначению;
- утилизировать после применения.

Бахилы рекомендованы для одноразового применения. Заменять бахилы следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений бахил.

8. Предупреждения и рекомендации при применении медицинского изделия

Изделия не следует использовать после истечения срока годности, поскольку физические свойства изделий не могут далее оставаться оптимальными для целевого назначения.

Не допускается применять бахилы, имеющие механические повреждения, нарушающие целостность изделия, а также изделия с поврежденной резинкой. Не допускается применять бахилы при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом бахил. Хотя бахилы и является термопластичным изделием, во избежание их оплавления не рекомендуется нахождение в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.

9. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Изделие предназначено для однократного применения и не должно использоваться повторно. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции или перекрестной контаминации, а также к изменению физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению.

10. Условия применения медицинского изделия

- Температура окружающей среды: от +10°C до +40°C.
- Относительная влажность воздуха: не более 80%.
- Атмосферное давление: от 84 до 106, кПа.

11. Частота замены медицинского изделия

Изделие применяется однократно и не предназначено для повторного использования. Заменять бахилы следует при необходимости, в зависимости от износа и повреждений бахил.

12. Вид и длительность контакта медицинского изделия с организмом человека

Бахилы относятся к медицинским изделиям, контактирующим с поверхностью неповрежденной кожи (подгруппа а по ГОСТ ISO 10993-1), по продолжительности контакта к категории А по ГОСТ ISO 10993-1 – медицинское изделие кратковременного контакта, общая продолжительность однократного воздействия - не более 24 ч.

13. Описание и принцип действия медицинского изделия и фотографические изображения

Бахилы изготавливаются из полиэтиленовой пленки, в верхнюю часть которой встраивается пропаянная по всей длине резинка (одинарная или двойная) для фиксации на обуви. Бахилы носят поверх обуви и тем самым предотвращают перекрестное заражение между обувью и окружающей средой в различных условиях.

Бахилы имеют конструкцию, позволяющую полностью закрыть нижнюю часть обуви и подошву, обеспечивая плотную фиксацию на обуви во время их применения. Бахилы доступны в различных вариантах исполнения, которые кроме цветов отличаются такими показателями, как толщина, плотность,

количество фиксирующих резинок. Бахилы с двойной подошвой представляют собой двойные бахилы (конструкция «одна в другой»), скреплённые между собой машинным способом сваривания, и выпускаются только в бело-синей расцветке.

Конструкция бахил представлена на рисунке 13.1

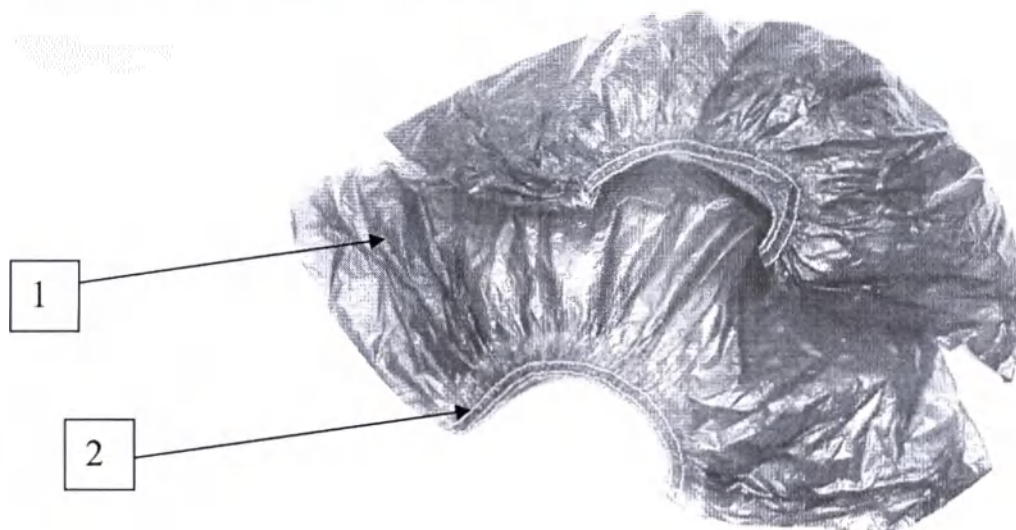


Рисунок 13.1

Описание: 1. Пленка полиэтиленовая. 2.Резинка

Представительные фотографические изображения каждого варианта исполнения бахил приведены на рисунках 13.2 – 13.18.



Рисунок 13.2 – Внешний вид изделия

Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019, серые, стандартные



Рисунок 13.3 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019,
серые, стандартные с двумя резинками

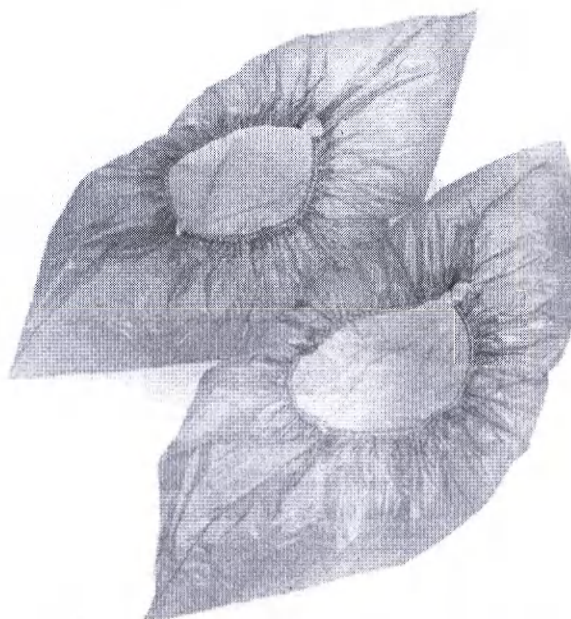


Рисунок 13.4 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019,
серые, лайт



Рисунок 13.5 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019,
серые, экстра лайт



Рисунок 13.6 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019,
серые, прочные



Рисунок 13.7 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019,
серые, прочные с двумя резинками



Рисунок 13.8 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019,
серые, особо прочные

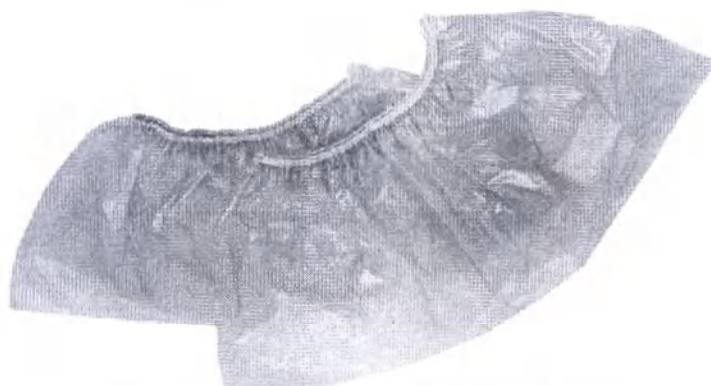


Рисунок 13.9 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019,
серые, особо прочные с двумя резинками



Рисунок 13.10 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019,
серые, сверхпрочные



Рисунок 13.11 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019, синие, сверхпрочные с двумя резинками



Рисунок 13.12 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019, серые, мегапрочные



Рисунок 13.13 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019, серые, мегапрочные с двумя резинками



Рисунок 13.14 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019,
серые, суперпрочные с двумя резинками



Рисунок 13.15 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019,
серые, экстрапрочные с двумя резинками



Рисунок 13.16 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019,
с двойной подошвой, двухцветные (бело-синие)



Рисунок 13.17 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019, серые, детские



Рисунок 13.18 – Внешний вид изделия
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019, серые, высокопрочные с двумя резинками

14. Техническое описание медицинского изделия

Технические характеристики изделий приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.4

Вариант исполнения	Длина, мм*	Ширина, мм*	Толщина, мм	Объём, л	Плотность, г/м*	Масса, г*	Прочность на разрыв, не более, Н
Стандартные	360/400	145	0,014	2,25	0,023	1,35	6,7
Стандартные с двумя резинками	330/380	130	0,012	2,25	0,027	1,35	8,5
Лайт	360/400	140	0,008	2,30	0,020	1,15	4,7
Экстра Лайт	360/400	140	0,006	2,30	0,037	2,10	4,0
Прочные	350/380	125	0,017	2,30	0,042	2,00	9,5
Прочные с двумя резинками	350/390	130	0,014	2,30	0,043	2,25	9,7
Особо прочные	370/400	140	0,016	2,00	0,036	2,05	10,2

Вариант исполнения	Длина, мм*	Ширина, мм*	Толщина, мм	Объём, л	Плотность, г/м*	Масса, г*	Прочность на разрыв, не более, Н
Особо прочные с двумя резинками	370/400	145	0,012	2,00	0,040	2,70	10,3
Сверхпрочные	340/390	135	0,014	2,30	0,040	2,15	10,3
Сверхпрочные с двумя резинками	370/390	130	0,014	2,30	0,039	2,00	11,2
Мегапрочные	370/390	130	0,014	2,35	0,044	2,25	11,0
Мегапрочные с двумя резинками	370/390	130	0,014	2,35	0,046	2,35	11,9
Супер прочные с двумя резинками	370/390	135	0,023	2,35	0,049	2,60	12,2
Экстрапрочные с двумя резинками	380/400	130	0,027	2,10	0,060	3,10	12,6
С двойной подошвой	340/390	135	0,019	1,70	0,046	2,30	16,8
Детские	290/300	120	0,004	1,35	0,020	0,80	4,5
Высокопрочные с двумя резинками	380/390	135	0,023	2,10	0,067	3,50	16,3

*допуск по всем параметрам должен быть $\pm 10\%$.

Подробная информация о составе материалов, из которых изготавливаются изделия, указана в таблице 14.2

Таблица 14.2

Вариант исполнения	Компонент, материал, марка, производитель
Стандартные.	Пленка полиэтиленовая низкого давления (ПНД) (пр-во ООО «ПолиэстПласт», Россия); Нить латексная оплетенная одинарная и многожильная 36/330 (пр-во ООО "Тринити", Россия).
Стандартные с двумя резинками.	
Лайт.	
Экстра Лайт.	
Прочные.	
Прочные с двумя резинками.	
Особо прочные.	
Особо прочные с двумя резинками.	
Детские.	Пленка полиэтиленовая низкого давления (ПНД) РЕ4050Q (пр-во ОАО «Нижнекамск-нефтехим», Россия); Нить латексная оплетенная одинарная и многожильная 36/330 (пр-во ООО "Тринити", Россия).
Сверхпрочные.	
Сверхпрочные с двумя резинками.	
Мегапрочные.	
Мегапрочные с двумя резинками.	
Суперпрочные с двумя резинками.	
Экстрапрочные с двумя резинками.	
С двойной подошвой.	
Высокопрочные с двумя резинками.	Синий - Мастербатч SIMPLbatch 7033 E Голубой - Мастербатч SIMPLbatch 5101 E Зеленый - Мастербатч SIMPLbatch 7065 E Оранжевый - Мастербатч SIMPLbatch 7026 E Розовый - Мастербатч SIMPLbatch 7047 E Красный - Мастербатч SIMPLbatch 3604 E Серый - Мастербатч SIMPLbatch 7001 E Черный - Мастербатч SIMPLbatch 92113 E Фиолетовый - Мастербатч SIMPLbatch 7053EE Желтый - Мастербатч SIMPLbatch 2501 E Белый - Мастербатч SIMPLbatch 7004 (пр-во ООО НПП «Симлекс»)
Красители (применимо ко всем вариантам исполнения)	

15. Условия транспортировки медицинского изделия

Упакованные бахилы перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке открытым транспортом изделие защищает от атмосферных осадков.

Транспортирование упаковок, сформированных в транспортные упаковки - по ГОСТ 26663, ГОСТ 24597 и другим нормативным документам.

Транспортирование - по условиям хранения 2 ГОСТ 15150.

При внутригородских перевозках бахилы транспортируют в потребительской таре.

Размеры и масса брутто пакета должны соответствовать ГОСТ 24597.

Погрузка, крепление, транспортирование, разгрузка изделий должны обеспечить ее сохранность и исключить возможность повреждения упаковки.

Средства скрепления упаковок, упакованных в транспортную тару в пакетированном виде - по ГОСТ 21650.

16. Условия и срок хранения медицинского изделия

Изделия должны храниться в складских помещениях при температуре от минус 40°C до плюс 40°C, относительной влажности воздуха 50-70% и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей, огня, воздействий атмосферных и агрессивных сред.

Срок хранения бахил не должен превышать 5 лет с даты изготовления.

17. Очистка, дезинфекция, стерилизация медицинского изделия

Изделие предназначено для одноразового использования и не является стерильным. Очистка, дезинфекция и стерилизация не применимы.

18. Упаковка медицинского изделия

Таблица 18.1 содержит характеристики упаковок и информацию о материалах.

Таблица 18.1

Тип упаковки	Материал	Габаритные размеры
Индивидуальная (групповая)	Пленка полимерная	Ширина 140±2 мм Длина 150±2 мм Плотность 73±2 г/см ²
Транспортная	Гофрокартон	Ширина 600±20 мм Глубина 400±20 мм Высота 300±20 мм

Стороны индивидуальной упаковки (пакета) соединены термошвом без применения клея. Ширина шва запайки 6 ± 1 мм.

Фотографическое изображение индивидуальной (групповой) упаковки бахил представлено на рисунке 18.1, транспортной – на рисунке 18.2.

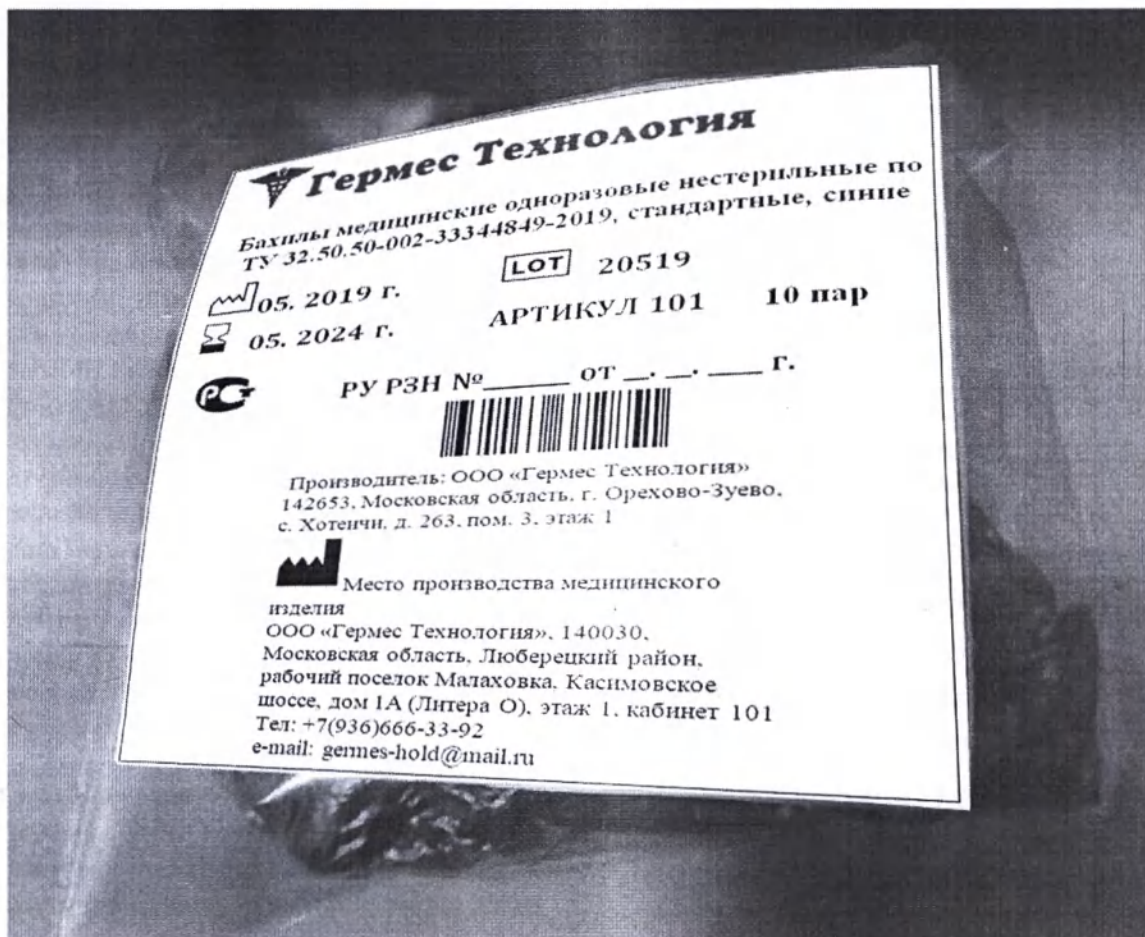


Рисунок 18.1



Рисунок 18.2 - транспортная упаковка

19. Комплектность поставки медицинского изделия

В комплект поставки продукции входит изделие и комплект документации на поставляемое изделие (инструкция по применению для потребителя).

В индивидуальной (групповой) упаковке должно быть 20 штук бахил (10 пар) одного варианта исполнения и цвета.

В транспортной упаковке должно быть 50 штук групповых упаковок (1000 штук бахил) одного варианта исполнения и цвета.

20. Маркировка, макеты маркировки и этикеток медицинского изделия

Следующая информация указывается производителем на этикетке индивидуальной (групповой) упаковки бахил:

- товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, адрес;
- наименование изделия, вариант исполнения изделия;
- вариант исполнения изделия, цвет изделия;
- номер изделия (артикул);
- штрих-код;
- дата и номер регистрационного удостоверения;
- дата изготовления изделия (месяц, год);
- дата истечения срока годности;
- обозначение ТУ;
- размер изделия;
- номер партии;
- знак соответствия;
- количество штук изделий в упаковке.

Следующая информация указывается производителем на транспортной упаковке бахил:

- товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, адрес;
- наименование изделия, вариант исполнения изделия;
- вариант исполнения изделия, цвет изделия;
- номер изделия (артикул);
- штрих-код;
- дата изготовления изделия (месяц, год);
- дата истечения срока годности;
- обозначение ТУ;
- номер партии;
- знак соответствия;
- количество штук изделий в упаковке.

Макет этикетки для упаковок изделий (индивидуальной (групповой) и транспортной) приведен на рисунке 20.1.

		Гермес Технологии	
Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-333-448-9-2019, стандартные, синие			
	05. 2019 г.		20519
	05. 2024 г.	АРТИКУЛ 101	10 пар
	РУ РЗН № _____ от ____ . ____ . ____ г.		
			
Производитель: ООО «Гермес Технологии» 142653, Московская область, г. Орехово-Зуево, с. Хотеничи, д. 263, пом. 3, этаж 1			
	Место производства медицинского изделия ООО «Гермес Технологии», 140030, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок Матаховка, Касимовское шоссе, дом 1А (Литера О), этаж 1, кабинет 101 Тел: +7(936)666-33-92 e-mail: gennes-hold@mail.ru		

В таблице 20.1 представлены символы, используемые для маркировки изделия на этикетках (индивидуальной (групповой) и транспортной).

Таблица 20.1

Символ	Значение
	Знак соответствия при декларировании соответствия
	Номер партии
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Использовать до

21. Требования к утилизации медицинского изделия

Утилизация изделия осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Изделия после окончания использования могут утилизироваться как отходы класса Б в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 и действующими на момент утилизации государственными правилами.

Неиспользованные изделия специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как отходы класса А или бытовые отходы.

22. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества бахил требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, применения.

Гарантийный срок хранения изделий – 5 лет с даты изготовления при соблюдении указанных производителем условий.

23. Методы испытаний и контроля медицинского изделия

Производитель проводит контроль при производстве изделий на всех этапах, включающих контроль сырья для последующего производства изделий, контроль самого процесса производства, упаковки, стерилизации, а также контроль изделий после производства согласно спецификации в соответствии с ТУ 32.50.50-002-33344849-2019.

24. Перечень нормативных документов/стандартов

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)
ГОСТ 13514-93	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 26663-85	Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (с Изменением N 1)
ГОСТ 24597-81	Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры
ГОСТ Р 52901-2007	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия (с Поправкой)
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.3.030-83	Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности
СанПиН 2.1.3684-21	Об утверждении санитарных правил и норм "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007	Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)
ГОСТ 14236-81	Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 21650-76	Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования
ГОСТ 6507-90	Микрометры. Технические условия
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия

25. Реклама

В случае возникновения нежелательных явлений, связанных с применением медицинского изделия, а также по вопросам качества, обращаться:

ООО «Гермес Технология»

Адрес: 142653, Московская область, г. Орехово-Зуево, с.Хотеичи, д. 263, пом. 3, этаж 1

Тел: +7(936)666-33-92

Эл.почта: germes-hold@mail.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 44 листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Гермес Технология»
Жирнов П.М.

