

Ограничения по применению

Нельзя применять респиратор:

- имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала;
- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема (колоды, закрытые емкости и т.п.)

ВНИМАНИЕ!

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность защиты респиратора снижается.

Правила, условия и сроки хранения

Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температуре окружающей среды от -30 °C до +70 °C и относительной влажности до 80 %.

Гарантийный срок хранения - 4 года при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления и окончание срока годности смотрите на упаковке.

Транспортирование

Транспортирование респираторов осуществляется всеми видами транспорта, защищенном от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающимися веществами.

Требования утилизации

Респираторы после их использования по назначению относятся к отходам Класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Комплектность

Респираторы поставляются комплектом, состоящим из: респиратор - 1 шт; индивидуальный пакет с наклеенными указаниями по эксплуатации.

Побочные эффекты

Индивидуальная аллергическая реакция на применяемые материалы.

Респираторы фильтрующие АЛИНАВ - 202 ТУ 32.50.50-001-32502950-2020 являются изделиями медицинского назначения (регистрационное удостоверение: МРЗМ 2021/15430 от 28.09.2021 Российской Федерации) и соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.294-2015.



Изготовитель

ООО «Саратовское предприятие «Алькор»»
427964, Саратовская Республика, Г.О. город, Саратов г.,
ул. Фабричная, д.1Г
тел./факс: +7 (34147) 2-57-47, e-mail: info@alcor.ru
Презентации от потребителя направляются в адрес изготовителя.



Респиратор фильтрующий медицинского назначения

АЛИНА® - 202

по ТУ 32.50.50-001-32502950-2020



УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Респиратор фильтрующий медицинского назначения
АЛИНАВ - 202 по ТУ 32.50.50-001-32502950-2020

Респиратор АЛИНАВ - 202 в виде индивидуальной фильтрующей полумаски, предназначенный для установки на нос и рот человека для обеспечения нормального дыхания и защиты его от воздействия патогенных биологических агентов в воздухе (например, при работе с биологическими материалами).

Респиратор АЛИНАВ - 202 является медицинским изделием, вид медицинского изделия 180770 (согласно Номенклатурной классификации медицинских изделий), класс: потенциального риска применения медицинского изделия 1. Респиратор АЛИНАВ - 202 относится к нестерильным изделиям. При применении респиратора АЛИНАВ - 202 по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, и в соответствии с эксплуатационной документацией риск отсутствует. Показаниями к применению респиратора является наличие патогенных биологических агентов в воздухе (например, при работе с биологическими материалами).

Гарантированные значения основных параметров и характеристик:

- Форма полумаски гарантирует плотное и стабильное прилегание;
- Эластичное оголовье обеспечивает надежную фиксацию полумаски на лице;
- Легкий вес, универсальный размер;
- Совместимость полумаски с другими СИЗ (например с защитными очками);
- Средний класс эффективности - FFP2 (по ГОСТ 12.4.294-2015);

Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку, на входе, при расходе 30 л/мин	не более 70 Па
Проницаемость фильтрующего материала корпуса респиратора, при расходе 55 л/мин	не более 5 %

Область применения

Применяется в стационарных и лабораторных лечебно-профилактических учреждениях, в местах массового скопления людей (транспорт, общественные организации), а также в домашних условиях.

Обозначение респиратора АЛИНАВ - 202 FFP2 NR D (BFI):

АЛИНАВ - марка респиратора, 202 - модель, где:
2 - второго класса защиты по аэрозольям,
D - без клапана.

2 - для применения в медицинских учреждениях;

FFP2 - класс защиты по аэрозольям,
NR - однократного применения,
D - устойчив к задымлению,
BFI - выполнен из материала типа BFI.

Правила использования

Респиратор является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть респиратор на наличие дефектов. Завести эластичные ремни крепления за голову и, начиная с подбородка, надеть респиратор. Закрепить ремни крепления на голове, зафиксировав их на уровне темени и затылочной части головы при помощи фиксатора. Обжать пластину носового зажима на переносицу, равномерно расправить края респиратора на лице для исключения подсоса воздуха по полосе обтяжки (прокладке). Проверить респиратор на плотность прилегания: не вдыхая респиратор, полностью накрыть его обхватив руками и сделать резкий выдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение ремней крепления. Повторить проверку респиратора на плотность прилегания.

Респиратор АЛИНАВ - 202, не стерилизуемый, предназначен для однократного применения, не подлежит чистке, дезинфекции и стерилизации. Продолжительность использования - не более 6 часов.

Респиратор подлежит замене после окончания срока службы, а также в случае его повреждения или сильного сопротивления дыханию.

