

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Респиратор фильтрующий
медицинского назначения
АЛИНА® - 202 по

ТУ 32.50.50-001-32502950-2020

Респиратор фильтрующий медицинского назначения АЛИНА® - 202 по ТУ 32.50.50-001-32502950-2020 (далее – респиратор) в виде неформованной фильтрующей полумаски, предназначенный для установки на нос и рот человека для обеспечения нормального дыхания и защиты его от воздействия патогенных биологических взвешенных в воздухе частиц во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья медицинского персонала и населения (например, пандемии гриппа).

Респиратор является медицинским изделием. Вид медицинского изделия 180770 (согласно Номенклатурной классификации медицинских изделий), класс потенциального риска применения медицинского изделия 1.

Респиратор относится к нестерильным изделиям.

При применении респиратора АЛИНА® - 202 по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, и в соответствии с эксплуатационной документацией риски отсутствуют.

Показанием к применению респиратора является наличие патогенных биологических взвешенных в воздухе частиц во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья медицинского персонала и населения (например, пандемии гриппа).

Гарантированные значения основных параметров и характеристик:

- Форма полумаски гарантирует плотное и стабильное прилегание; Легкий вес, универсальный размер;
- Эластичное оголовье обеспечивает надежную фиксацию полумаски на лице;
- Совместимость полумаски с другими СИЗ (например с защитными очками);
- Средний класс эффективности – FFP2 (по ГОСТ 12.4.294-2015):

Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку, на вдохе, при расходе 30 дм³/мин	не более 70 Па
Проницаемость фильтрующего материала корпуса респиратора, при расходе 95 дм³/мин	не более 6 %

Область применения

Применяется в стационарных и лабораторных лечебно-профилактических учреждениях, в местах массового скопления людей (транспорт, общественные организации), а также в домашних условиях.

Обозначение респиратора АЛИНА® - 202 FFP2 NR D (ФП):

АЛИНА® – марка респиратора; 202 – модель, где:

0 – второго класса защиты по аэрозолям;

0 – без клапана;

2 – для применения в медицинских учреждениях;

FFP2 класс защиты по аэрозолям;

NR – одноразового применения;

D – устойчив к запылению;

ФП – выполнен из материала типа ФП.

Ограничения по применению (противопоказания)

Нельзя применять респиратор:

- имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала;
- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема (колодцы, закрытые емкости и т.п.).

ВНИМАНИЕ!!!

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность защиты респиратора снижается.

Правила использования

Респиратор является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть респиратор на наличие дефектов. Завести эластичные ремни крепления за голову и, начиная с подбородка, надеть респиратор. Закрепить ремни крепления на голове, зафиксировав их на уровне теменной и затылочной части головы при помощи фиксатора. Обжать пластину носового зажима на переносице, равномерно расправить края респиратора на лице для исключения подсоса воздуха по полосе обтюрации (прилегания).

Проверить респиратор на плотность прилегания: не сдвигая респиратор, полностью накрыть его обеими руками и сделать резкий вдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение ремней крепления. Повторить проверку респиратора на плотность прилегания.

Респиратор АЛИНА® - 202, не стерилен, предназначен для одноразового применения, не подлежит чистке, дезинфекции и стерилизации. Продолжительность использования - не более одной смены (8 часов).

Респиратор подлежит замене после окончания срока службы, а также в случае его повреждения или сильного сопротивления дыханию.

Правила, условия и сроки хранения

Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температурах окружающей среды от - 30 °С до +70 °С и относительной влажности до 80 %.

Гарантийный срок хранения - 4 года при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления и окончание срока годности смотрите на упаковке.

Транспортирование

Транспортирование респираторов осуществляется всеми видами транспорта, защищенном от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений при температурах окружающей среды от - 30 °С до +70 °С и относительной влажности до 80 %. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающимися веществами.

Требования утилизации

Респираторы после их использования по назначению относятся к отходам Класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

Комплектность

Респираторы поставляются комплектом, состоящим из:- респиратор – 1 шт, - индивидуальный пакет с нанесенными указаниями по эксплуатации – 1 шт.

Побочные эффекты:

Индивидуальная аллергическая реакция на применяемые материалы.

Изготовитель – ООО «Сарапульское предприятие «АЛЬКОР»

427970, Удмуртская республика, город Сарапул,

ул. Некрасова, дом 16Б, литер Б, офис 1, тел./факс +7(34147) 2-57-47, e-mail: s-ea@list.ru

Претензии от потребителя направляются в адрес изготовителя.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

