


Роевская
Вероника
на СД

8

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО Компания «Бакстер»

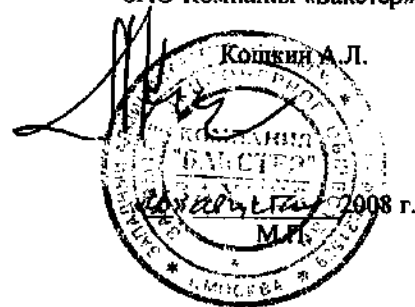

ИНСТРУКЦИЯ


По применению
Сепаратора клеток крови «Амикус»

Руководство оператора

Fenwal

Сепаратор Амикус

REF 4R4580

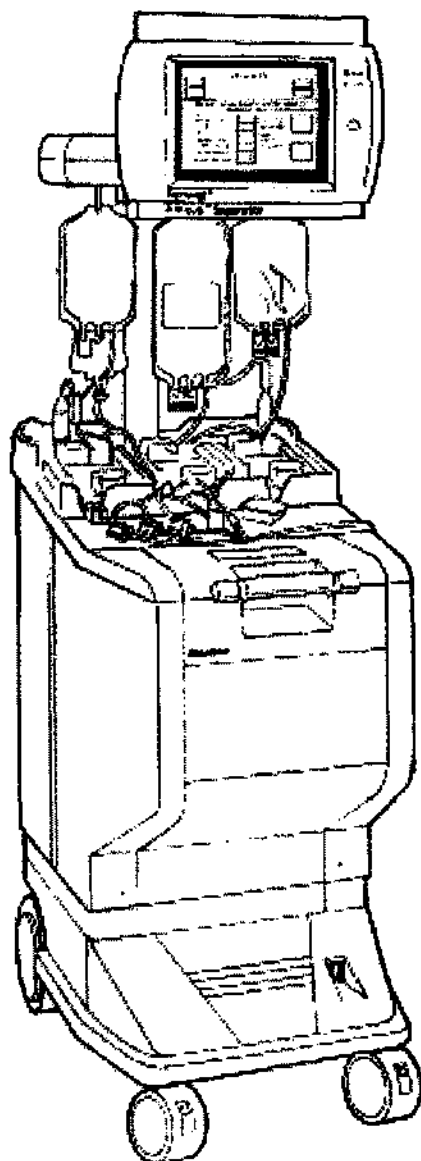

BAXTER

Руководство оператора

Редакция 1.9

Fenwal

Сепаратор Амикус

REF 4R4580

Серийный номер сепаратора _____

BAXTER

7/10/17

8. Технические характеристики	8-1	2/2001
Подробное описание программного обеспечения, аппаратной части и принадлежностей сепаратора		
Приложение	A-1	2/2001
Дополнительная информация, которая может быть полезна для оператора		
Глоссарий	G-1	2/2001
Определения и термины, используемые в руководстве		
Указатель	I-1	2/2001

Изменения в руководстве

Дата
редакции 08/2003

Далее приведен список изменений в новом Руководстве оператора сепаратора Amicus и в программном обеспечении при переходе от версии 2.41 к версии 2.5:

	<u>ГЛАВА</u>
Новая организация руководства оператора	Все
Одноигольная процедура сбора тромбоцитов с обновлениями программного обеспечения, включая:	4
• Использование добавочного раствора для тромбоцитов (ДРТ – PAS):	
• Интегратор ПБТ (PRP)	
• Ресуспендирование с физиологическим раствором	
• Совместный сбор эритроцитов	
Двухигольная процедура сбора тромбоцитов с обновлениями программного обеспечения, включая:	4
• Использование добавочного раствора для тромбоцитов (ДРТ – PAS):	
• Интегратор ПБТ (PRP)	
• Ресуспендирование с физиологическим раствором	i
• Процедура попеременного наполнения игл	
Процедура сбора мононуклеарных клеток	4
Устранение неполадок	5
с обновлениями программного обеспечения, включая:	
• Интегратор ПБТ (PRP)	
• Проверка контейнеров АЦД и физиологического раствора	
• Автоматический перезапуск при закупорке входной линии	
• Изменение клавиш помощи	
Технические характеристики сепаратора с обновлениями программного обеспечения, включая:	7
• Конфигурация принтера	
• Иерархия меню	
• Изменения на экране	
• Интегратор ПБТ (PRP)	
• Добавочный раствор для тромбоцитов и Множитель ДРТ	
• Смесь для наполнения линий АЦД/физраствора	
• Автоматический перезапуск при закупорке входной линии	
• Ресуспендирование с физиологическим раствором	
• Управление давлением в манжете	
• Опции печатного отчета	
• Совместный сбор эритроцитов	

i

[illegible]

[Handwritten signature]

Глава 1. Как пользоваться руководством

	СТРАНИЦА	ДАТА РЕДАКЦИИ
	1-1	08/2003
1.1 Введение	1-3	3/2002
1.2 С самого начала	1-4	08/2003
	1-5	04/2003
1.3 Соглашения, используемые в данном руководстве	1-6	3/2002

07-19-28-000 — август 2003

Глава 1 – Как пользоваться руководством

1-1

