

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «РАФЭЛ»

Мухаметзянов А.Р.



«19» ноября 2021 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Иглы стерильные для взятия крови одноразового использования


Производитель: «Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd.» («Вэйхай Хоньюй Медикал Девайсез Ко., Лтд.»), No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic Development Area, Weihai, Shandong Province, China (№86 Шэньчжэнь Роуд, Зона развития экономики и техники, Вэйхай, провинция Шаньдун, Китай)

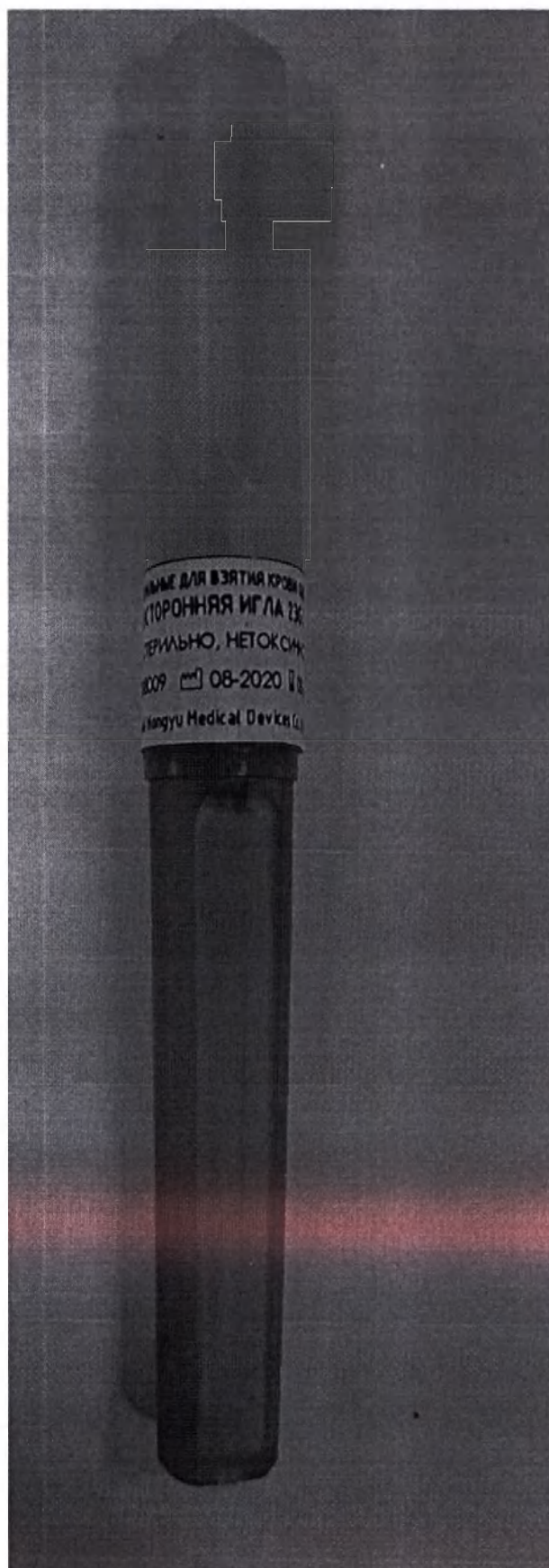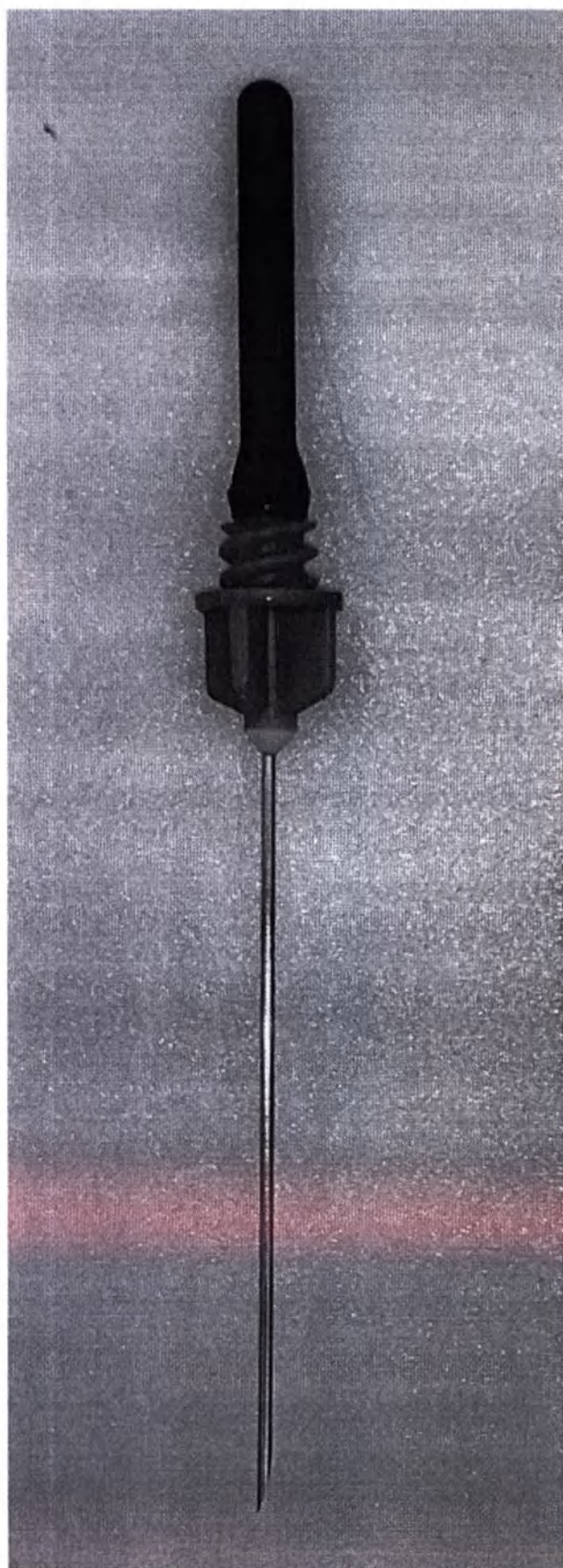


Общий вид изделия: Двусторонняя игла (слева) и индивидуальная упаковка иглы (справа)

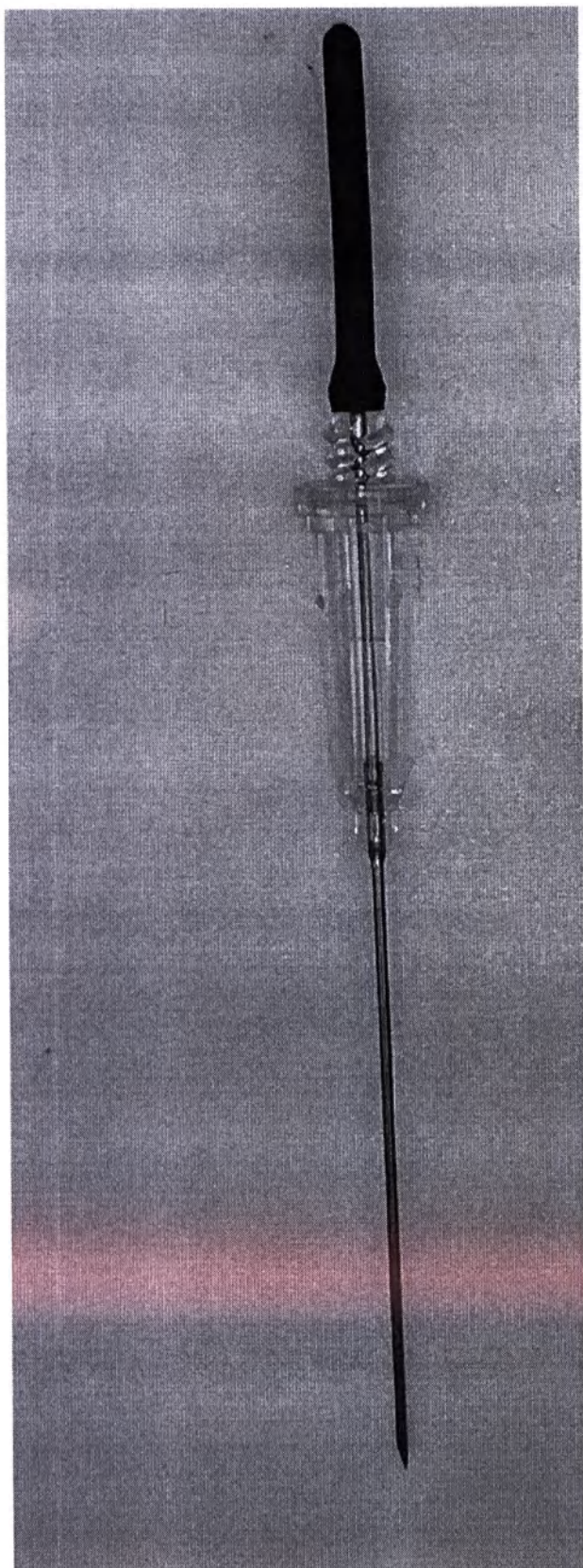



Общий вид изделия: Двусторонняя игла с прозрачной камерой (слева) и индивидуальная упаковка иглы (справа)

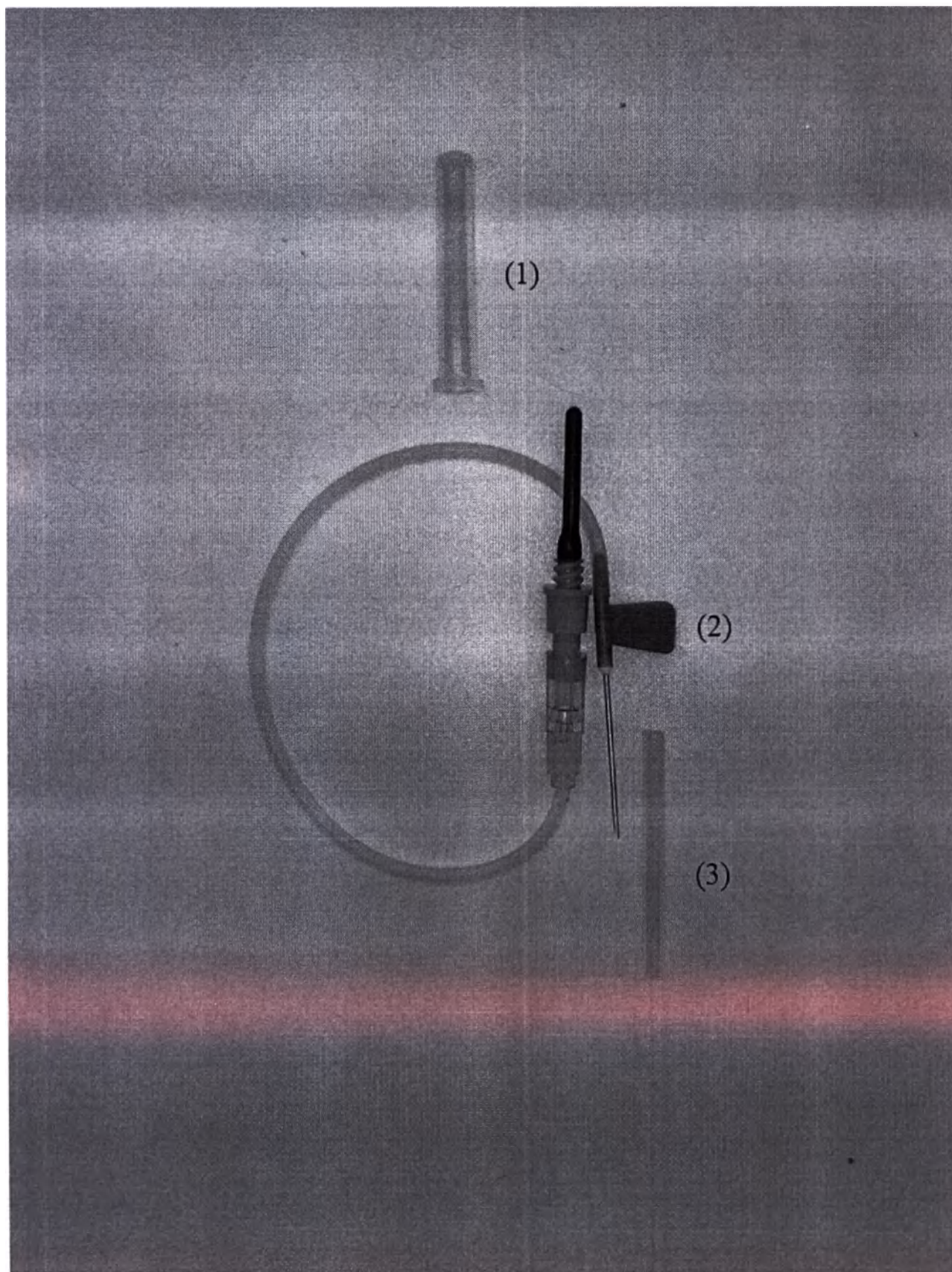

Общий вид изделия: Игла-бабочка с одним крылышком (2) с защитным колпачками (1,3):
защитный колпачок иглы для введения в вену (3), защитный колпачок иглы, входящей в
пробирку (1)

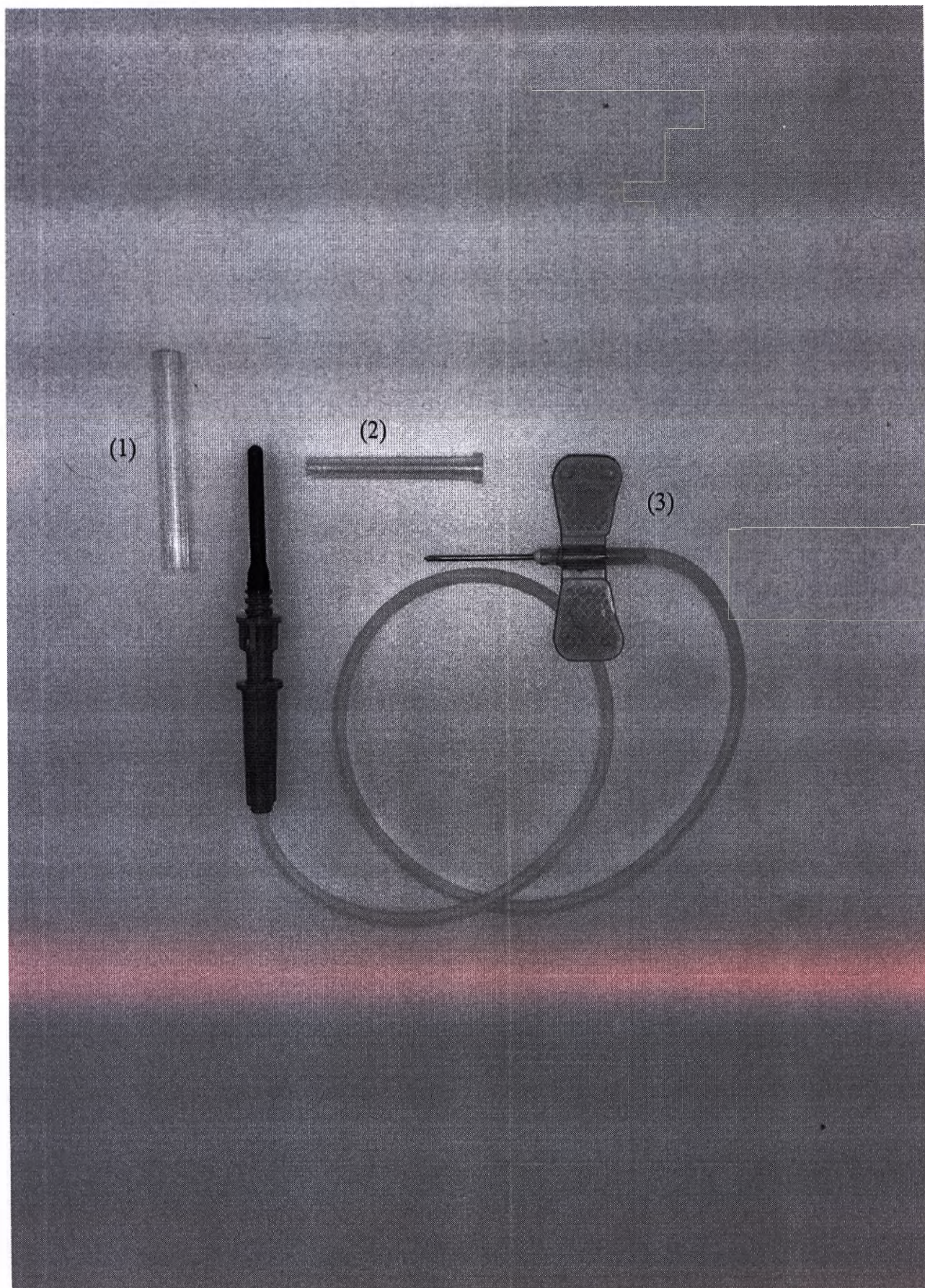

Общий вид изделия: Игла-бабочка с двумя крылышками (3) с защитными колпачками (1,2):
защитный колпачок иглы для введения в вену (2), защитный колпачок иглы, входящей в
пробирку (1)

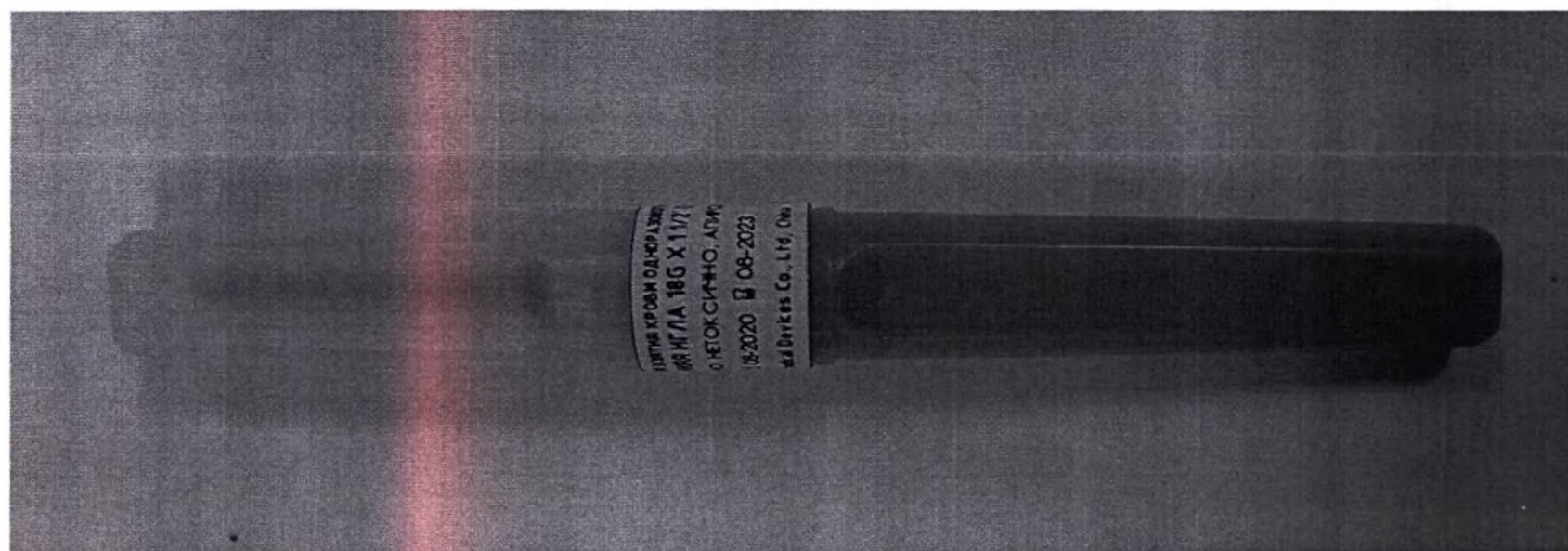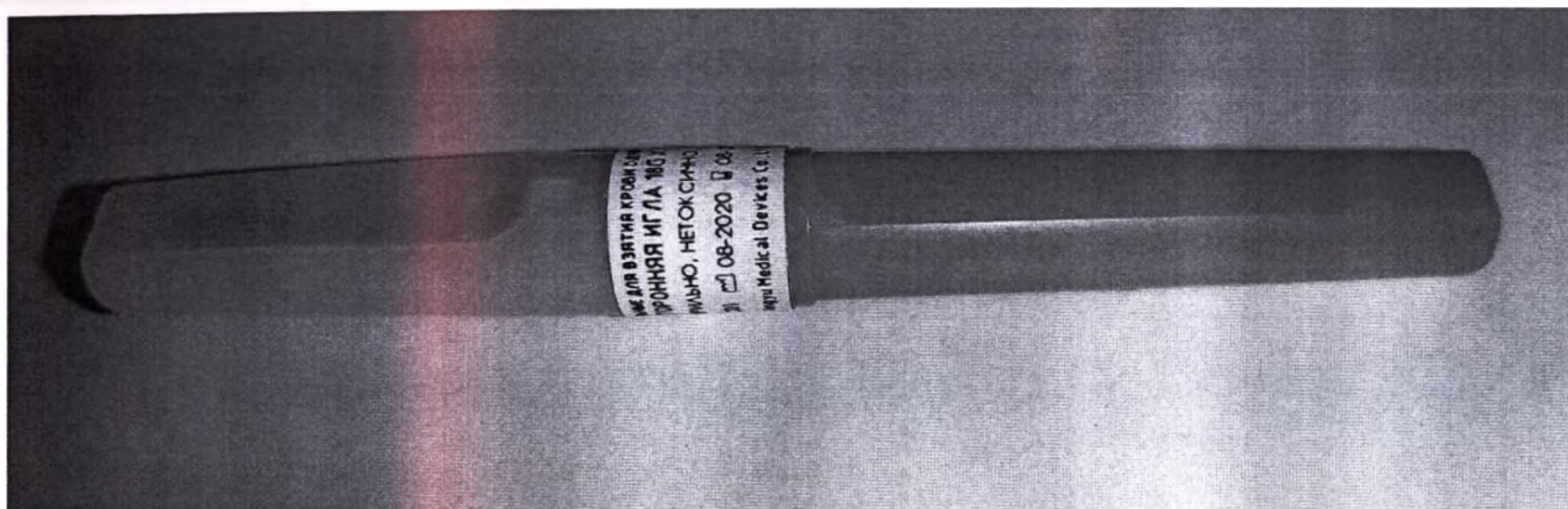

Общий вид индивидуальной упаковки изделия «Двусторонняя игла» с маркировкой

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ
ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГЛА-БАБОЧКА С ОДНИМ КРЫЛЫШКОМ
21G X 1" (0,8x25 мм)

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО

ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО С
ВАКУУМНОЙ ПРОБИРКОЙ



"H"

2

STERILE EO

LOT 2012011

12-2020 11-2023

Wei Hai Hongyu Medical
Devices Co., Ltd, China

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ
ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГЛА-БАБОЧКА С ОДНИМ КРЫЛЫШКОМ
22G X 1" (0,7x25 мм)

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО

ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО С
ВАКУУМНОЙ ПРОБИРКОЙ



"H"

2

STERILE EO

LOT 2012012

12-2020 11-2023

Wei Hai Hongyu Medical
Devices Co., Ltd, China


ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Общий вид индивидуальной упаковки изделия «Игла-бабочка с одним крылышком» с маркировкой

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ
ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГЛА-БАБОЧКА С ДВУМЯ КРЫЛЫШКАМИ
22G X 3/4" (0,7x19 мм)

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО

ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО С
ВАКУУМНОЙ ПРОБИРКОЙ

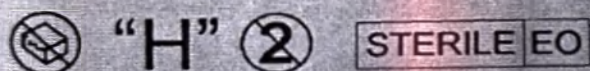

LOT 2012014

12-2020 11-2023


Wei Hai Hongyu Medical
Devices Co., Ltd, China

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ
ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГЛА-БАБОЧКА С ДВУМЯ КРЫЛЫШКАМИ
21G X 3/4" (0,8x19 мм)

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО

ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО С
ВАКУУМНОЙ ПРОБИРКОЙ

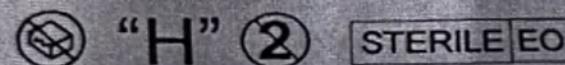


LOT 2012013

12-2020 11-2023

Wei Hai Hongyu Medical
Devices Co., Ltd, China

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Общий вид индивидуальной упаковки изделия «Игла-бабочка с двумя крылышками» с маркировкой

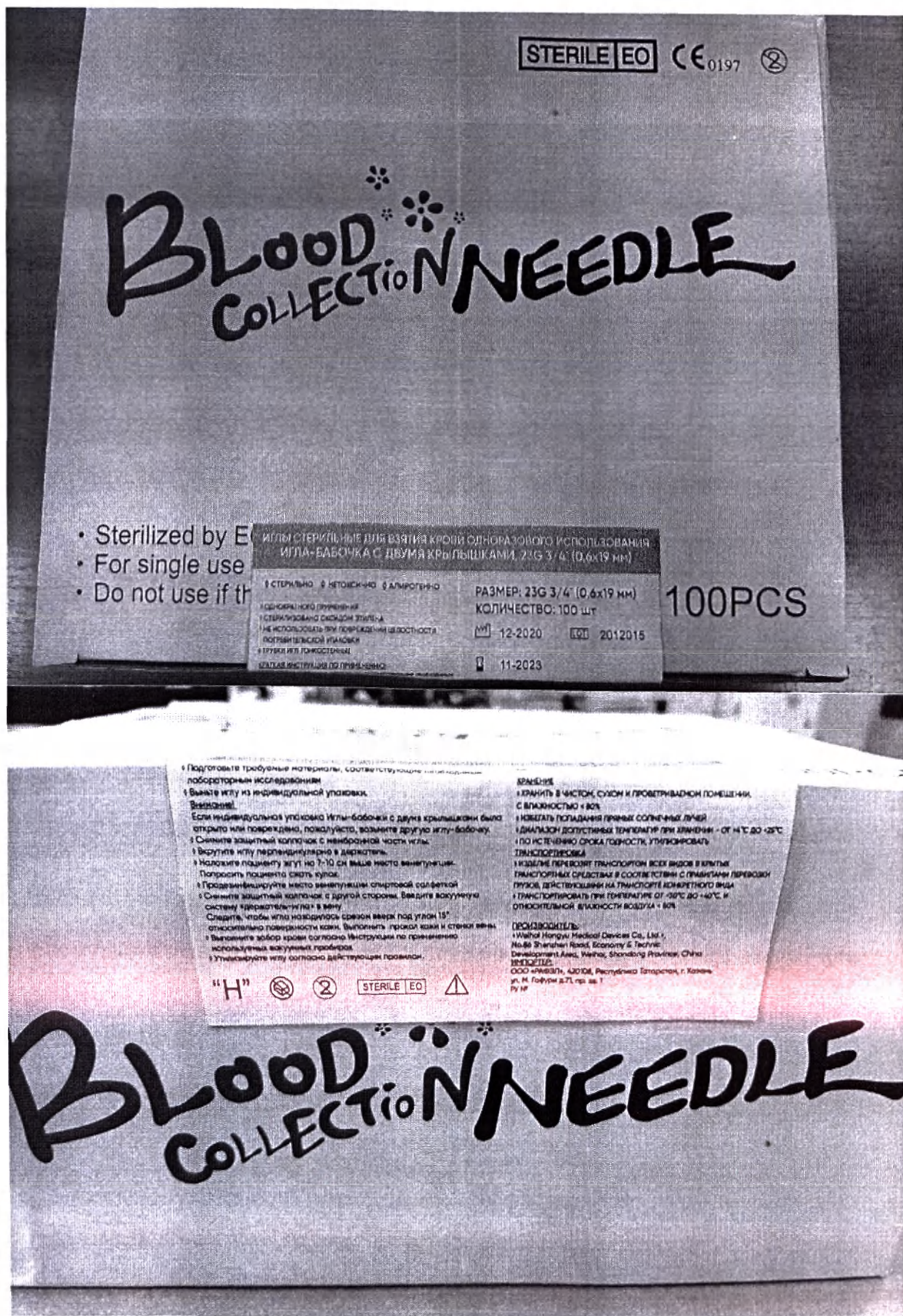

Групповая упаковка изделия «Игла-бабочка с двумя крылышками» с маркировкой

STERILE EO CE 0197

BLOOD COLLECTION NEEDLE

- Sterilized by EO
- For single use
- Do not use if th

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГЛА-БАБОЧКА С ОДНИМ КРЫЛЫШКОМ, 21G 1 (0,8x25 мм)

• СТЕРИЛЬНО • НЕТОКСИЧНО • АПИРОГЕННО
• ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
• СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
• НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ
• ТРУБКА ИГЛЫ ТОНКОСТЕННАЯ

РАЗМЕР: 21G 1 (0,8x25 мм)
КОЛИЧЕСТВО: 100 шт

12-2020 2012011

11-2023

100PCS

BLOOD COLLECTION NEEDLE

- Sterilized by E
- For single use
- Do not use if th

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГЛА-БАБОЧКА С ОДНИМ КРЫЛЫШКОМ, 21G 1 (0,8x25 мм)

• СТЕРИЛЬНО • НЕТОКСИЧНО • АПИРОГЕННО
• ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
• СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
• НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ
• ТРУБКА ИГЛЫ ТОНКОСТЕННАЯ

РАЗМЕР: 21G 1 (0,8x25 мм)
КОЛИЧЕСТВО: 100 шт

12-2020 2012011



11-2023

100PCS


BLOOD COLLECTION NEEDLE

Групповая упаковка изделия «Игла-бабочка с одним крылышком» с маркировкой

ООО ЦРПИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

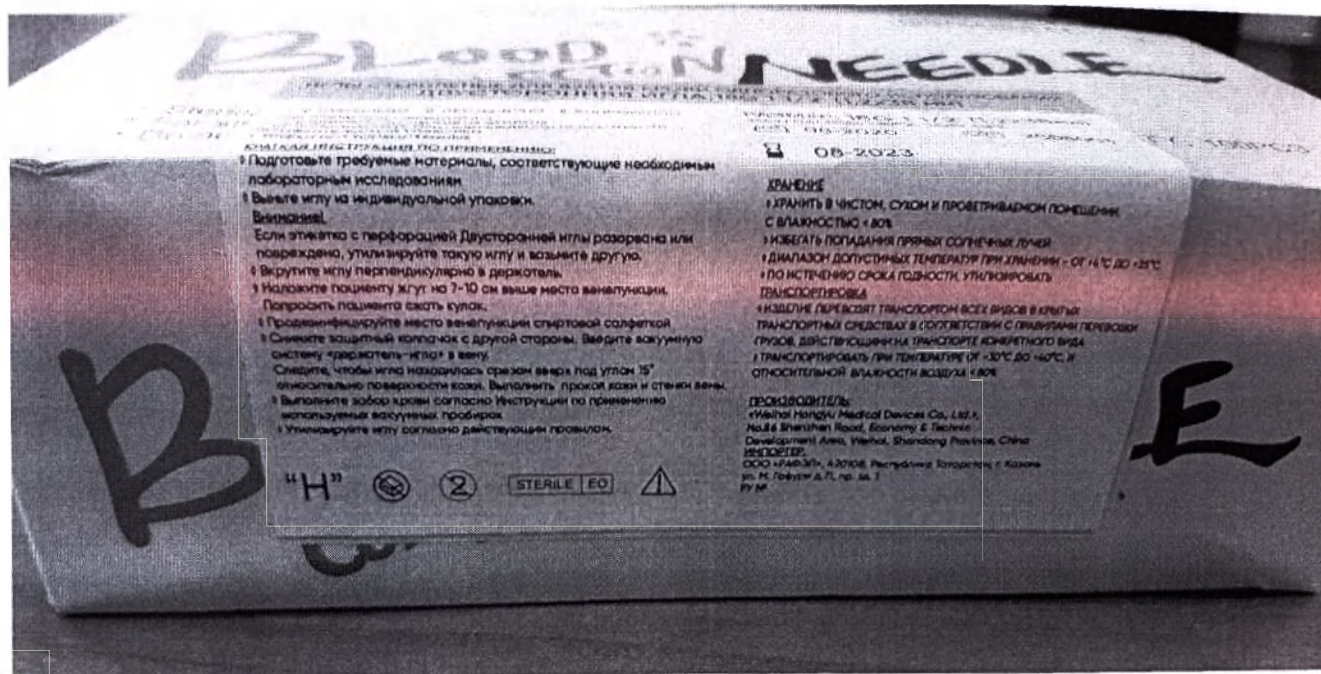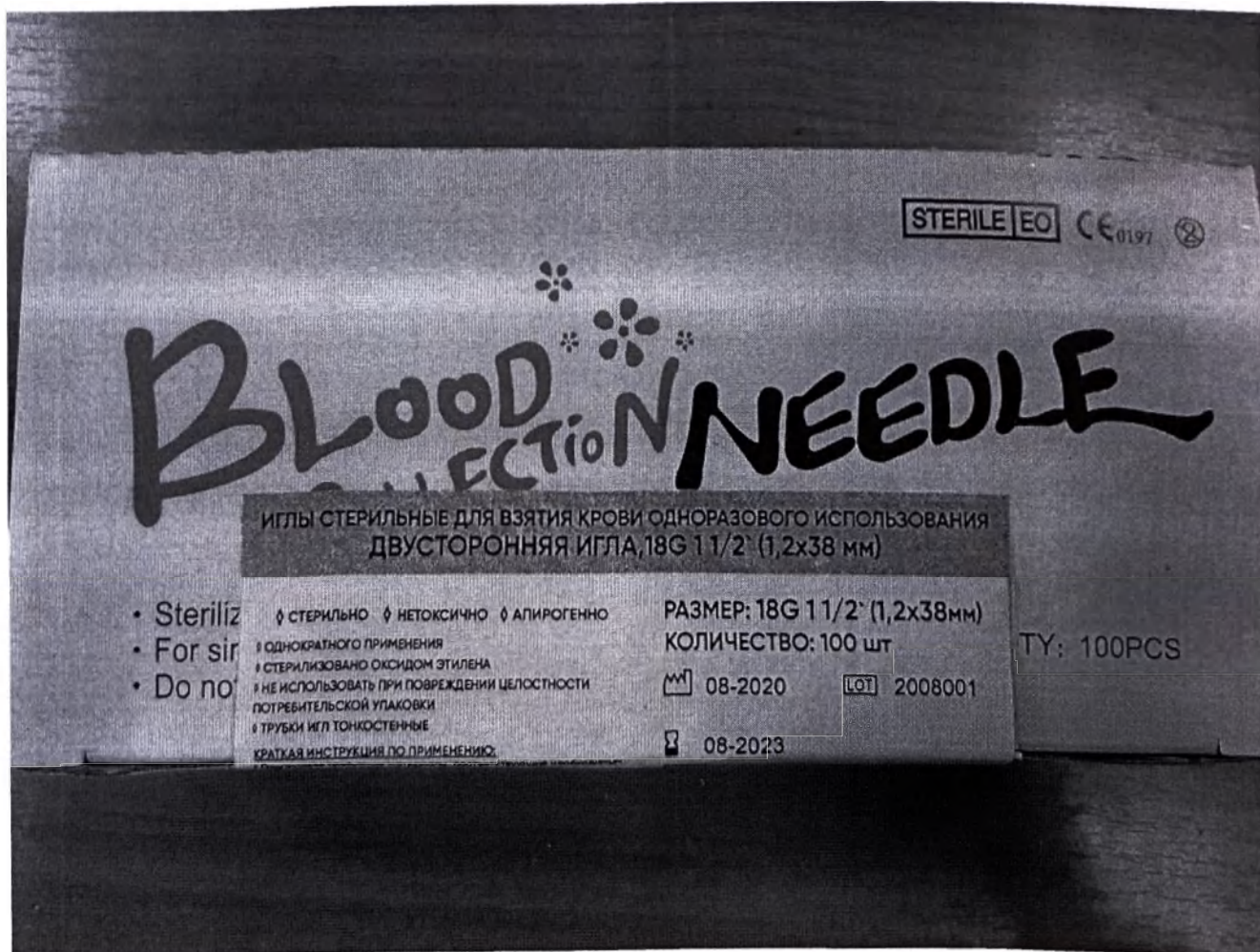

Групповая упаковка изделия «Двусторонняя игла» с маркировкой

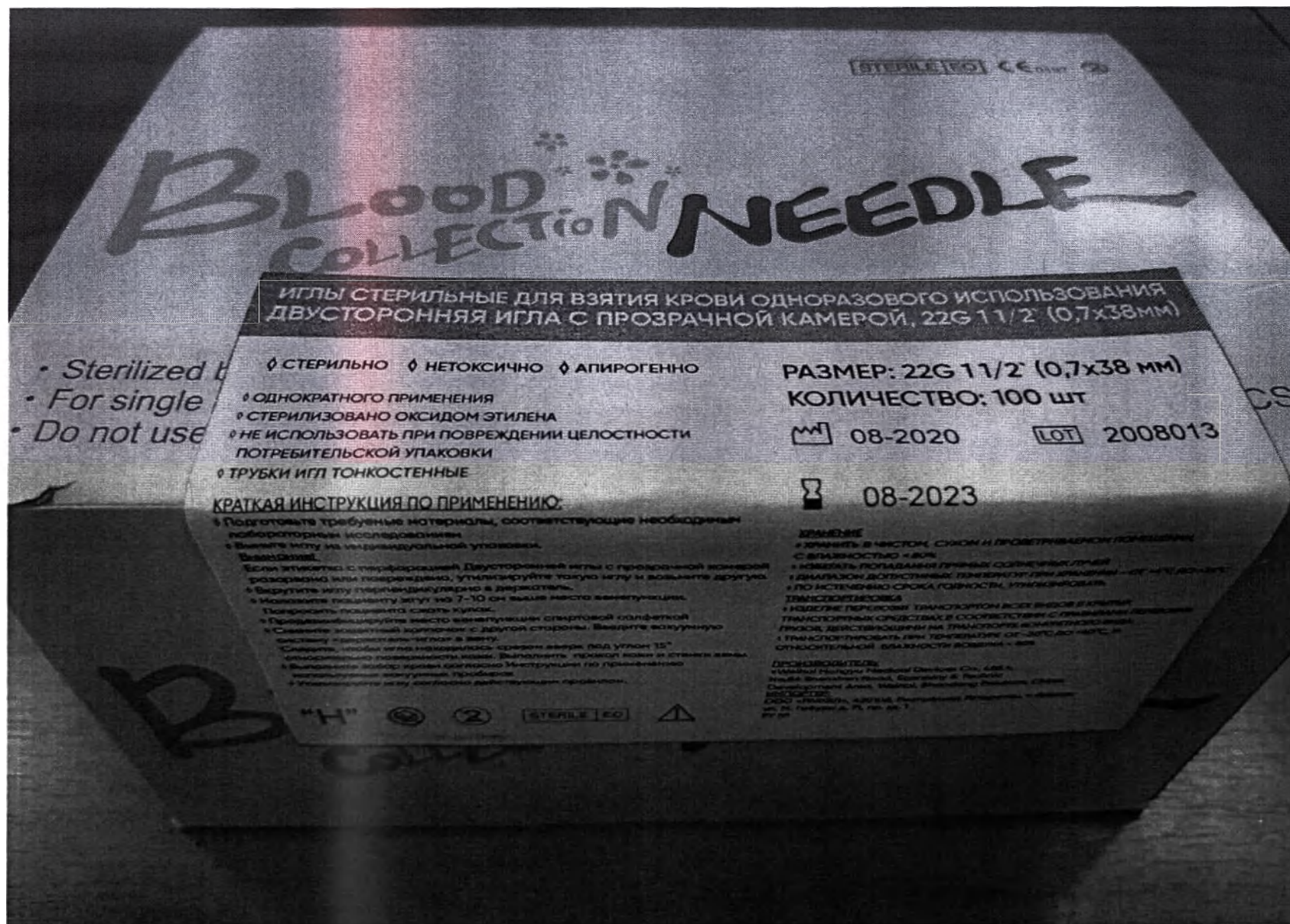


Групповая упаковка изделия «Двусторонняя игла с прозрачной камерой» с маркировкой

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДВУСТОРОННЯЯ ИГЛА,
18G X 1 1/2" (1,2x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ◊ АППИРОГЕННО ◊ НЕТОКСИЧНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
ТРУБКИ НЕПЛОТНОСТЕННЫЕ

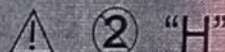

STERILE EO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd.» No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic Development Area, Weihai,
Shandong Province, China

ИМПОРТЕР:

РУ №

ХРАНЕНИЕ

- ХРАНИТЬ В ЧИСТОМ, СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ С ВЛАЖНОСТЬЮ < 80%
- ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
- ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ХРАНЕНИИ: ОТ +4°C ДО +25°C
- ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ УТИЛИЗИРОВАТЬ
- ТРАНСПОРТИРОВАТЬ
- ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕВОЗИТЬ ТРАНСПОРТОМ ВОСКЛЮЧЕНО В КРЫТЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТРАНСПОРТЕ КОНКРЕТНОГО ВИДА
- ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА < 80%

QUANTITY/КОЛИЧЕСТВО: 5000 ШТУК

№ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 08-2020

№ / ГОДЕН ДО: 08-2023

LOT / ПАРТИЯ №: 2008001

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: 14,2 КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: 13,4 КГ

РАЗМЕРЫ КОР: 440x360x330 CM




• Общий вид транспортной упаковки изделия «Двусторонняя игла» с маркировкой

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДВУСТОРОННЯЯ ИГЛА С ПРОЗРАЧНОЙ КАМЕРОЙ,
21G X 1 1/2" (0,8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ◊ АППИРОГЕННО ◊ НЕТОКСИЧНО

ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛИЗОВАНО СКИНДОМ ЭТИЛЕНА
ТРУБКИ ИЛИ ТОЧНОСТЕННЫМ

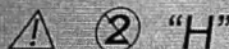

STERILE EO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

• Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd., No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic Development Area, Weihai,
Shandong Province, China

ИМПОРТЕР:

РУ №

ХРАНЕНИЕ:
• ХРАНИТЬ В ЧАСТНОМ СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ
С ВЛАЖНОСТЬЮ < 80%
• ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
• ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ
ХРАНЕНИИ - ОТ +4°C ДО +25°C
• ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ, УТИЛИЗИРОВАТЬ
ТРАНСПОРТИРОВКА:
• КОДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТОМ ВСЕХ ВИДОВ В КЛАССАХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТРАНСПОРТЕ
КОНКРЕТНОГО ВИДА
• ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +40°C И
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА < 80%

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: 4000 шт/ук

DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 08-2020

ГОДЕН ДО: 08-2023

ПАРТИЯ №: 2008011

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: 14,1 кг

NET WEIGHT / НЕТТО: 13,3 кг

РАЗМЕРЫ КОР.: 440x310x410 см




Общий вид транспортной упаковки изделия «Игла-бабочка с прозрачной камерой» с маркировкой

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГЛА-БАБОЧКА С ОДНИМ КРЫЛЫШКОМ,
21G X 1" (0,8x25 мм)

СТЕРИЛЬНО ◊ АППИРОГЕННО ◊ НЕТОКСИЧНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛИЗОВАНО СКОЛОМ ЭТИЛЕНА
ТРУБКИ ИЗ ПОЛИПРОПYLEНА

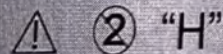

STERILE EO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
«Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd.», No.66 Shenzhen Road, Economy & Technic Development Area, Weihai,
Shandong Province, China

ИМПОРТЕР:

РУ №

ИЗМЕНЕНИЕ
- ХРАНИТЬ В ЧИСТОМ, СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ
С ВЛАЖНОСТЬЮ < 80%
- ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
- ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ
ХРАНЕНИИ: ОТ +4°C ДО +25°C
- ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ, УТИЛИЗИРОВАТЬ
ТРАНСПОРТИРОВАТЬ
- ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕВОЗИТ ТРАНСПОРТОМ ВСЕХ ВИДОВ В КРЫТЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТРАНСПОРТЕ
КОНКРЕТНОГО ВИДА
- ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +40°C И
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА < 80%

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО 2000 ШТУК

CS / ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 12-2020

B / ГОДЕН ДО 11-2023

LOT / ПАРТИЯ № 2012011


GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО 8 КГ

NET WEIGHT / НЕТТО 7 КГ

РАЗМЕРЫ КОР. 580x460x270 CM



Общий вид транспортной упаковки изделия «Игла-бабочка с одним крылышком» с маркировкой

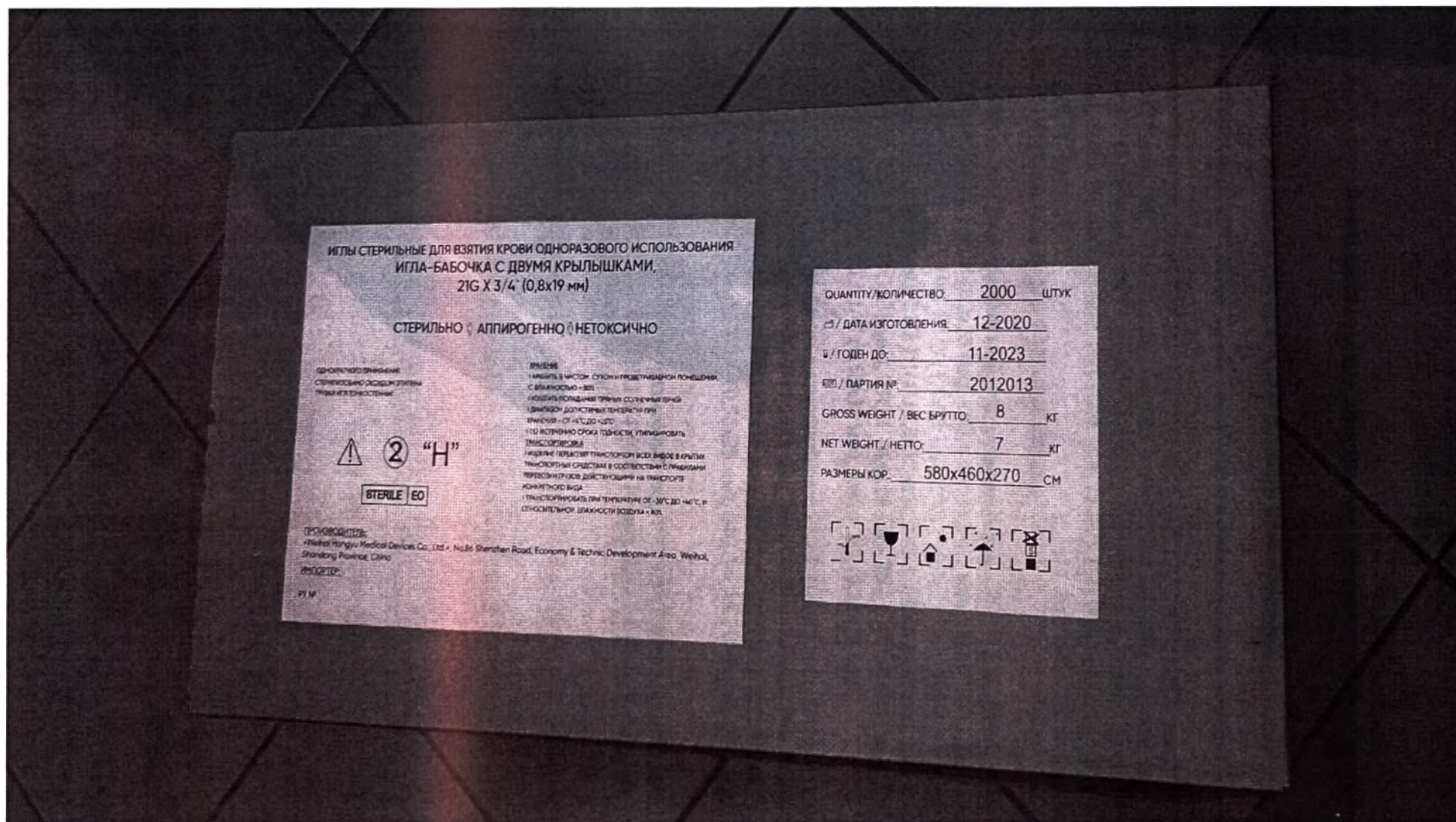

Общий вид транспортной упаковки изделия «Игла-бабочка с двумя крылышками» с маркировкой

ПРИЛОЖЕНИЕ
(справочное)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Иглы стерильные для взятия крови одноразового использования

I. Иглы стерильные для взятия крови одноразового использования, варианты исполнения:

1. Двусторонняя игла, размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 1 1/4' (1,4x32 мм), 17G 1 1/2' (1,4x38 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 1 1/4' (1,2x32 мм), 18G 1 1/2' (1,2x38 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 1 1/4' (1,1x32 мм), 19G 1 1/2' (1,1x38 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 1 1/4' (0,9x32 мм), 20G 1 1/2' (0,9x38 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 1 1/4' (0,8x32 мм), 21G 1 1/2' (0,8x38 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 1 1/4' (0,7x32 мм), 22G 1 1/2' (0,7x38 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 1 1/4' (0,6x32 мм), 23G 1 1/2' (0,6x38 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 1 1/4' (0,55x32 мм), 24G 1 1/2' (0,55x38 мм)

2. Двусторонняя игла с прозрачной камерой, размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 1 1/4' (1,4x32 мм), 17G 1 1/2' (1,4x38 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 1 1/4' (1,2x32 мм), 18G 1 1/2' (1,2x38 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 1 1/4' (1,1x32 мм), 19G 1 1/2' (1,1x38 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 1 1/4' (0,9x32 мм), 20G 1 1/2' (0,9x38 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 1 1/4' (0,8x32 мм), 21G 1 1/2' (0,8x38 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 1 1/4' (0,7x32 мм), 22G 1 1/2' (0,7x38 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 1 1/4' (0,6x32 мм), 23G 1 1/2' (0,6x38 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 1 1/4' (0,55x32 мм), 24G 1 1/2' (0,55x38 мм)

3. Игла-бабочка с одним крылышком, размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 3/4' (1,4x19 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 3/4' (1,2x19 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 3/4' (1,1x19 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 3/4' (0,9x19 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 3/4' (0,8x19 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 3/4' (0,7x19 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 3/4' (0,6x19 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 3/4' (0,55x19 мм), 25G 1' (0,5x25 мм), 25G 3/4' (0,5x19 мм)

4. Игла-бабочка с двумя крылышками, размерный ряд: 17G 3/4' (1,4x19 мм), 18G 3/4' (1,2x19 мм), 19G 3/4' (1,1x19 мм), 20G 3/4' (0,9x19 мм), 21G 3/4' (0,8x19 мм), 22G 3/4' (0,7x19 мм), 23G 3/4' (0,6x19 мм), 24G 3/4' (0,55x19 мм), 25G 3/4' (0,5x19 мм)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 20 (двадцать) листа (ов)
Директор
ООО «РАФЭЛ» _____
А.Р. Мухаметзянов _____



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «РАФЭЛ»

Мухаметзянов А.Р.

«19» ноября 2021 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВОК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Иглы стерильные для взятия крови одноразового использования

Производитель: «Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd.» («Вэйхай Хонгюй Медикал Девайсез Ко., Лтд.»), No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic Development Area, Weihai, Shandong Province, China (№86 Шэньчжэнь Роуд, Зона развития экономики и техники, Вэйхай, провинция Шаньдун, Китай)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДВУСТОРОННЯЯ ИГЛА _G X _' (_x _ мм)
 СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО

LOT



STERILE EO



Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd, China



"H"



Макет индивидуальной упаковки изделия «Двусторонняя игла», размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 1 1/4' (1,4x32 мм), 17G 1 1/2' (1,4x38 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 1 1/4' (1,2x32 мм), 18G 1 1/2' (1,2x38 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 1 1/4' (1,1x32 мм), 19G 1 1/2' (1,1x38 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 1 1/4' (0,9x32 мм), 20G 1 1/2' (0,9x38 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 1 1/4' (0,8x32 мм), 21G 1 1/2' (0,8x38 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 1 1/4' (0,7x32 мм), 22G 1 1/2' (0,7x38 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 1 1/4' (0,6x32 мм), 23G 1 1/2' (0,6x38 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 1 1/4' (0,55x32 мм), 24G 1 1/2' (0,55x38 мм)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ
ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДВУСТОРОННЯЯ ИГЛА С ПРОЗРАЧНОЙ КАМЕРОЙ

_G X _' (_x _ мм)

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО

LOT



STERILE EO



"H"



Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd, China

Макет индивидуальной упаковки изделия «Двусторонняя игла с прозрачной камерой», размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 1 1/4' (1,4x32 мм), 17G 1 1/2' (1,4x38 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 1 1/4' (1,2x32 мм), 18G 1 1/2' (1,2x38 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 1 1/4' (1,1x32 мм), 19G 1 1/2' (1,1x38 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 1 1/4' (0,9x32 мм), 20G 1 1/2' (0,9x38 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 1 1/4' (0,8x32 мм), 21G 1 1/2' (0,8x38 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 1 1/4' (0,7x32 мм), 22G 1 1/2' (0,7x38 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 1 1/4' (0,6x32 мм), 23G 1 1/2' (0,6x38 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 1 1/4' (0,55x32 мм), 24G 1 1/2' (0,55x38 мм)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ
ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГЛА-БАБОЧКА С ОДНИМ КРЫЛЫШКОМ
___G X ___' (___x___ мм)

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО

ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО С
ВАКУУМНОЙ ПРОБИРКОЙ



“H”



STERILE EO

LOT



Weihei Hongyu Medical
Devices Co., Ltd, China

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Макет индивидуальной упаковки изделия «Игла-бабочка с одним крылышком»,
размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 3/4' (1,4x19 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 3/4'
(1,2x19 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 3/4' (1,1x19 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 3/4' (0,9x19
мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 3/4' (0,8x19 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 3/4' (0,7x19 мм), 23G
1' (0,6x25 мм), 23G 3/4' (0,6x19 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 3/4' (0,55x19 мм), 25G 1'
(0,5x25 мм), 25G 3/4' (0,5x19 мм)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ
ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГЛА-БАБОЧКА С ДВУМЯ КРЫЛЫШКАМИ
___G X ___' (___x___ мм)

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО

ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО С
ВАКУУМНОЙ ПРОБИРКОЙ



“H”



STERILE EO

LOT



Wei Hai Hongyu Medical
Devices Co., Ltd, China

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Макет индивидуальной упаковки изделия «Игла-бабочка с двумя крылышками»,
размерный ряд: 17G 3/4' (1,4x19 мм), 18G 3/4' (1,2x19 мм), 19G 3/4' (1,1x19 мм), 20G 3/4'
(0,9x19 мм), 21G 3/4' (0,8x19 мм), 22G 3/4' (0,7x19 мм), 23G 3/4' (0,6x19 мм), 24G 3/4'
(0,55x19 мм), 25G 3/4' (0,5x19 мм)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУВУСТОРОННЯЯ ИГЛА, __ G __ (__ x __ мм)

♦ СТЕРИЛЬНО ♦ НЕТОКСИЧНО ♦ АПИРОГЕННО

- ♦ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- ♦ СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
- ♦ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ
- ♦ ТРУБКИ ИГЛ ТОНКОСТЕННЫЕ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ♦ Подготовьте требуемые материалы, соответствующие необходимым лабораторным исследованиям
- ♦ Выньте иглу из индивидуальной упаковки.
- Внимание!**
Если этикетка с перфорацией Двусторонней иглы разорвана или повреждена, утилизируйте такую иглу и возьмите другую.
- ♦ Вкрутите иглу перпендикулярно в держатель.
- ♦ Наложите пациенту жгут на 7-10 см выше места венопункции. Попросите пациента сжать кулак.
- ♦ Продезинфицируйте место венопункции спиртовой салфеткой
- ♦ Снимите защитный колпачок с другой стороны. Введите вакуумную систему «держатель-игла» в вену.
Следите, чтобы игла находилась срезом вверх под углом 15° относительно поверхности кожи. Выполнить прокол кожи и стенки вены.
- ♦ Выполните забор крови согласно Инструкции по применению используемых вакуумных пробирок
- ♦ Утилизируйте иглу согласно действующим правилам.

РАЗМЕР: __ G __ (__ x __ мм)

КОЛИЧЕСТВО: 100 шт



LOT



ХРАНЕНИЕ

- ♦ ХРАНИТЬ В ЧИСТОМ, СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, С ВЛАЖНОСТЬЮ < 80%
- ♦ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
- ♦ ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ХРАНЕНИИ - ОТ +4°C ДО +25°C
- ♦ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ, УТИЛИЗИРОВАТЬ

ТРАНСПОРТИРОВКА

- ♦ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕВОЗЯТ ТРАНСПОРТОМ ВСЕХ ВИДОВ В КРЫТЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТРАНСПОРТЕ КОНКРЕТНОГО ВИДА
- ♦ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +40°C, И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА < 80%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd.»
No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic
Development Area, Weihai, Shandong Province, China

ИМПОРТЕР:

РУ №

“H”



2

STERILE EO



Макет групповой этикетки изделия «Двусторонняя игла», размерный ряд:
17G 1' (1,4x25 мм), 17G 1 1/4' (1,4x32 мм), 17G 1 1/2' (1,4x38 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 1 1/4' (1,2x32 мм), 18G 1 1/2' (1,2x38 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 1 1/4' (1,1x32 мм), 19G 1 1/2' (1,1x38 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 1 1/4' (0,9x32 мм), 20G 1 1/2' (0,9x38 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 1 1/4' (0,8x32 мм), 21G 1 1/2' (0,8x38 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 1 1/4' (0,7x32 мм), 22G 1 1/2' (0,7x38 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 1 1/4' (0,6x32 мм), 23G 1 1/2' (0,6x38 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 1 1/4' (0,55x32 мм), 24G 1 1/2' (0,55x38 мм)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУСТОРОННЯЯ ИГЛА С ПРОЗРАЧНОЙ КАМЕРОЙ, __G__ (__x__ мм)

♦ СТЕРИЛЬНО ♦ НЕТОКСИЧНО ♦ АПИРОГЕННО

- ♦ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- ♦ СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
- ♦ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ
- ♦ ТРУБКИ ИГЛ ТОНКОСТЕННЫЕ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ♦ Подготовьте требуемые материалы, соответствующие необходимым лабораторным исследованиям
- ♦ Выньте иглу из индивидуальной упаковки.
- Внимание!**
Если этикетка с перфорацией двусторонней иглы с прозрачной камерой разорвана или повреждена, утилизируйте такую иглу и возьмите другую.
- ♦ Вкрутите иглу перпендикулярно в держатель.
- ♦ Наложите пациенту жгут на 7-10 см выше места венепункции.
Попросите пациента сжать кулак.
- ♦ Прозеинфицируйте место венепункции спиртовой салфеткой
- ♦ Снимите защитный колпачок с другой стороны. Введите вакуумную систему «держатель-игла» в вену.
Следите, чтобы игла находилась срезом вверх под углом 15° относительно поверхности кожи. Выполните прокол кожи и стенки вены.
- ♦ Выполните забор крови согласно Инструкции по применению используемых вакуумных пробирок
- ♦ Утилизируйте иглу согласно действующим правилам.

РАЗМЕР: __G__ (__x__ мм)

КОЛИЧЕСТВО: 100 шт



LOT



ХРАНЕНИЕ

- ♦ ХРАНИТЬ В ЧИСТОМ, СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, С ВЛАЖНОСТЬЮ < 80%
- ♦ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
- ♦ ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ХРАНЕНИИ - ОТ +4°C ДО +25°C
- ♦ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ, УТИЛИЗИРОВАТЬ

ТРАНСПОРТИРОВКА

- ♦ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕВОЗЯТ ТРАНСПОРТОМ ВСЕХ ВИДОВ В КРЫТЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТРАНСПОРТЕ КОНКРЕТНОГО ВИДА
- ♦ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +40°C, И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА < 80%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

« Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd. »,
No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic
Development Area, Weihai, Shandong Province, China

ИМПОРТЕР:

РУ №

“Н”



STERILE EO



Макет групповой этикетки изделия «Двусторонняя игла с прозрачной камерой»,
размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 1 1/4' (1,4x32 мм), 17G 1 1/2' (1,4x38 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 1 1/4' (1,2x32 мм), 18G 1 1/2' (1,2x38 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 1 1/4' (1,1x32 мм), 19G 1 1/2' (1,1x38 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 1 1/4' (0,9x32 мм), 20G 1 1/2' (0,9x38 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 1 1/4' (0,8x32 мм), 21G 1 1/2' (0,8x38 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 1 1/4' (0,7x32 мм), 22G 1 1/2' (0,7x38 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 1 1/4' (0,6x32 мм), 23G 1 1/2' (0,6x38 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 1 1/4' (0,55x32 мм), 24G 1 1/2' (0,55x38 мм)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГЛА-БАБОЧКА С ОДНИМ КРЫЛЫШКОМ, __G __` (__x __ мм)

♦ СТЕРИЛЬНО ♦ НЕТОКСИЧНО ♦ АПИРОГЕННО

- ♦ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- ♦ СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
- ♦ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ
- ♦ ТРУБКИ ИГЛ ТОНКОСТЕННЫЕ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ♦ Подготовьте требуемые материалы, соответствующие необходимым лабораторным исследованиям
- ♦ Выньте иглу из индивидуальной упаковки.
- Внимание!**
Если индивидуальная упаковка Иглы-бабочки с одним крылышком была открыта или повреждена, пожалуйста, возьмите другую иглу-бабочку.
- ♦ Снимите защитный колпачок с мембранной части иглы.
- ♦ Вкрутите иглу перпендикулярно в держатель.
- ♦ Наложите пациенту жгут на 7-10 см выше места венопункции. Попросите пациента сжать кулак.
- ♦ Прозеинфицируйте место венопункции спиртовой салфеткой
- ♦ Снимите защитный колпачок с другой стороны. Введите вакуумную систему «держатель-игла» в вену.
- ♦ Следите, чтобы игла находилась срезом вверх под углом 15° относительно поверхности кожи. Выполнить прокол кожи и стенки вены.
- ♦ Выполните забор крови согласно Инструкции по применению используемых вакуумных пробирок
- ♦ Утилизируйте иглу согласно действующим правилам.

РАЗМЕР: __G __` (__x __ мм)
КОЛИЧЕСТВО: 100 шт



LOT



ХРАНЕНИЕ

- ♦ ХРАНИТЬ В ЧИСТОМ, СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, С ВЛАЖНОСТЬЮ < 80%
 - ♦ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
 - ♦ ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ХРАНЕНИИ - ОТ +4°C ДО +25°C
 - ♦ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ, УТИЛИЗИРОВАТЬ
- ## ТРАНСПОРТИРОВКА
- ♦ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕВОЗЯТ ТРАНСПОРТОМ ВСЕХ ВИДОВ В КРЫТЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТРАНСПОРТЕ КОНКРЕТНОГО ВИДА
 - ♦ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +40°C, И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА < 80%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd.»
No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic
Development Area, Weihai, Shandong Province, China

ИМПОРТЕР:

РУ №

“H”



STERILE EO



Макет групповой этикетки изделия «Игла-бабочка с одним крылышком», размерный ряд:
17G 1' (1,4x25 мм), 17G 3/4' (1,4x19 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 3/4' (1,2x19 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 3/4' (1,1x19 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 3/4' (0,9x19 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 3/4' (0,8x19 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 3/4' (0,7x19 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 3/4' (0,6x19 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 3/4' (0,55x19 мм), 25G 1' (0,5x25 мм), 25G 3/4' (0,5x19 мм)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГЛА-БАБОЧКА С ДВУМЯ КРЫЛЫШКАМИ, __ G __ (__ x __ мм)

♦ СТЕРИЛЬНО ♦ НЕТОКСИЧНО ♦ АПИРОГЕННО

- ♦ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- ♦ СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
- ♦ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ
- ♦ ТРУБКИ ИГЛ ТОНКОСТЕННЫЕ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ♦ Подготовьте требуемые материалы, соответствующие необходимым лабораторным исследованиям
 - ♦ Выньте иглу из индивидуальной упаковки.
- Внимание!**
Если индивидуальная упаковка Иглы-бабочки с двумя крылышками была открыта или повреждена, пожалуйста, возьмите другую иглу-бабочку.
- ♦ Снимите защитный колпачок с мембранной части иглы.
 - ♦ Вкрутите иглу перпендикулярно в держатель.
 - ♦ Наложите пациенту жгут на 7-10 см выше места венопункции. Попросите пациента сжать кулак.
 - ♦ Прозеинфицируйте место венопункции спиртовой салфеткой
 - ♦ Снимите защитный колпачок с другой стороны. Введите вакуумную систему «держатель-игла» в вену.
 - ♦ Следите, чтобы игла находилась срезом вверх под углом 15° относительно поверхности кожи. Выполнить прокол кожи и стенки вены.
 - ♦ Выполните забор крови согласно Инструкции по применению используемых вакуумных пробирок
 - ♦ Утилизируйте иглу согласно действующим правилам.

РАЗМЕР: __ G __ (__ x __ мм)
КОЛИЧЕСТВО: 100 шт



LOT



ХРАНЕНИЕ

- ♦ ХРАНИТЬ В ЧИСТОМ, СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, С ВЛАЖНОСТЬЮ < 80%
 - ♦ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
 - ♦ ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ХРАНЕНИИ - ОТ +4°C ДО +25°C
 - ♦ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ, УТИЛИЗИРОВАТЬ
- ## ТРАНСПОРТИРОВКА
- ♦ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕВОЗЯТ ТРАНСПОРТОМ ВСЕХ ВИДОВ В КРЫТЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТРАНСПОРТЕ КОНКРЕТНОГО ВИДА
 - ♦ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +40°C, И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА < 80%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd.»,
No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic
Development Area, Weihai, Shandong Province, China
ИМПОРТЕР:

РУ №

“H”



STERILE EO



Макет групповой этикетки изделия «Игла-бабочка с двумя крылышками», размерный ряд:

17G 3/4' (1,4x19 мм), 18G 3/4' (1,2x19 мм), 19G 3/4' (1,1x19 мм), 20G 3/4' (0,9x19 мм), 21G 3/4' (0,8x19 мм), 22G 3/4' (0,7x19 мм), 23G 3/4' (0,6x19 мм), 24G 3/4' (0,55x19 мм), 25G 3/4' (0,5x19 мм)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГЛА-БАБОЧКА С ОДНИМ КРЫЛЫШКОМ,
___ G X ___ (___ x ___ мм)

СТЕРИЛЬНО ♦ АППИРОГЕННО ♦ НЕТОКСИЧНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
ТРУБКИ ИГЛ ТОНКОСТЕННЫЕ



"H"

STERILE EO

ХРАНЕНИЕ

- ♦ ХРАНИТЬ В ЧИСТОМ, СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, С ВЛАЖНОСТЬЮ < 80%
 - ♦ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
 - ♦ ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ХРАНЕНИИ - ОТ +4°C ДО +25°C
 - ♦ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ, УТИЛИЗИРОВАТЬ
- ТРАНСПОРТИРОВКА**
- ♦ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕВОЗЯТ ТРАНСПОРТОМ ВСЕХ ВИДОВ В КРЫТЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТРАНСПОРТЕ КОНКРЕТНОГО ВИДА
 - ♦ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +40°C, И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА < 80%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd.», No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic Development Area, Weihai, Shandong Province, China

ИМПОРТЕР:

РУ №

QUANTITY/КОЛИЧЕСТВО: _____ ШТУК

☞ / ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

📅 / ГОДЕН ДО: _____

📦 / ПАРТИЯ №: _____

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: _____ КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: _____ КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: _____ СМ



Макет этикетки транспортной упаковки изделия «Игла-бабочка с одним крылышком», размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 3/4' (1,4x19 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 3/4' (1,2x19 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 3/4' (1,1x19 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 3/4' (0,9x19 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 3/4' (0,8x19 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 3/4' (0,7x19 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 3/4' (0,6x19 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 3/4' (0,55x19 мм), 25G 1' (0,5x25 мм), 25G 3/4' (0,5x19 мм)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГЛА-БАБОЧКА С ДВУМЯ КРЫЛЫШКАМИ,
___ G X ___ (___ x ___ мм)

СТЕРИЛЬНО ♦ АППИРОГЕННО ♦ НЕТОКСИЧНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
ТРУБКИ ИГЛ ТОНКОСТЕННЫЕ



STERILE EO

ХРАНЕНИЕ

♦ ХРАНИТЬ В ЧИСТОМ, СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ,
С ВЛАЖНОСТЬЮ < 80%
♦ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
♦ ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ
ХРАНЕНИИ - ОТ +4°C ДО +25°C
♦ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ, УТИЛИЗИРОВАТЬ

ТРАНСПОРТИРОВКА

♦ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕВОЗЯТ ТРАНСПОРТОМ ВСЕХ ВИДОВ В КРЫТЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТРАНСПОРТЕ
КОНКРЕТНОГО ВИДА
♦ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +40°C, И
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА < 80%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd.», No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic Development Area, Weihai,
Shandong Province, China

ИМПОРТЕР:

РУ №

QUANTITY/КОЛИЧЕСТВО: _____ ШТУК

/ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

/ ГОДЕН ДО: _____

/ ПАРТИЯ №: _____

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: _____ КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: _____ КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: _____ СМ



Макет этикетки транспортной упаковки изделия «Игла-бабочка с двумя крылышками»,
размерный ряд: 17G 3/4' (1,4x19 мм), 18G 3/4' (1,2x19 мм), 19G 3/4' (1,1x19 мм), 20G 3/4'
(0,9x19 мм), 21G 3/4' (0,8x19 мм), 22G 3/4' (0,7x19 мм), 23G 3/4' (0,6x19 мм), 24G 3/4'
(0,55x19 мм), 25G 3/4' (0,5x19 мм)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУСТОРОННЯЯ ИГЛА,

___ G X ___ (___ x ___ мм)

СТЕРИЛЬНО ♦ АППИРОГЕННО ♦ НЕТОКСИЧНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
ТРУБКИ ИГЛ ТОНКОСТЕННЫЕ



STERILE EO

ХРАНЕНИЕ

- ♦ ХРАНИТЬ В ЧИСТОМ, СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ,
- С ВЛАЖНОСТЬЮ < 80%
- ♦ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
- ♦ ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ХРАНЕНИИ - ОТ +4°C ДО +25°C
- ♦ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ, УТИЛИЗИРОВАТЬ

ТРАНСПОРТИРОВКА

- ♦ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕВОЗЯТ ТРАНСПОРТОМ ВСЕХ ВИДОВ В КРЫТЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТРАНСПОРТЕ КОНКРЕТНОГО ВИДА
- ♦ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +40°C, И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА < 80%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd.», No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic Development Area, Weihai, Shandong Province, China

ИМПОРТЕР:

РУ №

QUANTITY/КОЛИЧЕСТВО: _____ ШТУК

☞ / ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

☞ / ГОДЕН ДО: _____

☞ / ПАРТИЯ №: _____

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: _____ КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: _____ КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: _____ СМ



Макет этикетки транспортной упаковки изделия «Двусторонняя игла», размерный ряд:
17G 1' (1,4x25 мм), 17G 1 1/4' (1,4x32 мм), 17G 1 1/2' (1,4x38 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 1 1/4' (1,2x32 мм), 18G 1 1/2' (1,2x38 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 1 1/4' (1,1x32 мм), 19G 1 1/2' (1,1x38 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 1 1/4' (0,9x32 мм), 20G 1 1/2' (0,9x38 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 1 1/4' (0,8x32 мм), 21G 1 1/2' (0,8x38 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 1 1/4' (0,7x32 мм), 22G 1 1/2' (0,7x38 мм), 23G 1' (0,60x25 мм), 23G 1 1/4' (0,6x32 мм), 23G 1 1/2' (0,6x38 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 1 1/4' (0,55x32 мм), 24G 1 1/2' (0,55x38 мм)

ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ДВУСТОРОННЯЯ ИГЛА С ПРОЗРАЧНОЙ КАМЕРОЙ,
 ___ G X ___ (___ x ___ мм)

СТЕРИЛЬНО ♦ АППИРОГЕННО ♦ НЕТОКСИЧНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
 ТРУБКИ ИГЛ ТОНКОСТЕННЫЕ



STERILE EO

ХРАНЕНИЕ

♦ ХРАНИТЬ В ЧИСТОМ, СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ,
 С ВЛАЖНОСТЬЮ < 80%

♦ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

♦ ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ

ХРАНЕНИИ - ОТ +4°C ДО +25°C

♦ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ, УТИЛИЗИРОВАТЬ

ТРАНСПОРТИРОВКА

♦ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕВОЗЯТ ТРАНСПОРТОМ ВСЕХ ВИДОВ В КРЫТЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТРАНСПОРТЕ

КОНКРЕТНОГО ВИДА

♦ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +40°C, И

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА < 80%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd.», No.86 Shenzhen Road, Economy & Technic Development Area, Weihai,
 Shandong Province, China

ИМПОРТЕР:

РУ №

QUANTITY/КОЛИЧЕСТВО: _____ ШТУК

☞ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

☞ / ГОДЕН ДО: _____

☞ / ПАРТИЯ №: _____

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: _____ КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: _____ КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: _____ СМ



Макет этикетки транспортной упаковки изделия «Двусторонняя игла с прозрачной камерой», размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 1 1/4' (1,4x32 мм), 17G 1 1/2' (1,4x38 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 1 1/4' (1,2x32 мм), 18G 1 1/2' (1,2x38 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 1 1/4' (1,1x32 мм), 19G 1 1/2' (1,1x38 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 1 1/4' (0,9x32 мм), 20G 1 1/2' (0,9x38 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 1 1/4' (0,8x32 мм), 21G 1 1/2' (0,8x38 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 1 1/4' (0,7x32 мм), 22G 1 1/2' (0,7x38 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 1 1/4' (0,6x32 мм), 23G 1 1/2' (0,6x38 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 1 1/4' (0,55x32 мм), 24G 1 1/2' (0,55x38 мм)

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Иглы стерильные для взятия крови одноразового использования

I. Иглы стерильные для взятия крови одноразового использования, варианты исполнения:

1. Двусторонняя игла, размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 1 1/4' (1,4x32 мм), 17G 1 1/2' (1,4x38 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 1 1/4' (1,2x32 мм), 18G 1 1/2' (1,2x38 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 1 1/4' (1,1x32 мм), 19G 1 1/2' (1,1x38 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 1 1/4' (0,9x32 мм), 20G 1 1/2' (0,9x38 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 1 1/4' (0,8x32 мм), 21G 1 1/2' (0,8x38 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 1 1/4' (0,7x32 мм), 22G 1 1/2' (0,7x38 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 1 1/4' (0,6x32 мм), 23G 1 1/2' (0,6x38 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 1 1/4' (0,55x32 мм), 24G 1 1/2' (0,55x38 мм)
2. Двусторонняя игла с прозрачной камерой, размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 1 1/4' (1,4x32 мм), 17G 1 1/2' (1,4x38 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 1 1/4' (1,2x32 мм), 18G 1 1/2' (1,2x38 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 1 1/4' (1,1x32 мм), 19G 1 1/2' (1,1x38 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 1 1/4' (0,9x32 мм), 20G 1 1/2' (0,9x38 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 1 1/4' (0,8x32 мм), 21G 1 1/2' (0,8x38 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 1 1/4' (0,7x32 мм), 22G 1 1/2' (0,7x38 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 1 1/4' (0,6x32 мм), 23G 1 1/2' (0,6x38 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 1 1/4' (0,55x32 мм), 24G 1 1/2' (0,55x38 мм)
3. Игла-бабочка с одним крылышком, размерный ряд: 17G 1' (1,4x25 мм), 17G 3/4' (1,4x19 мм), 18G 1' (1,2x25 мм), 18G 3/4' (1,2x19 мм), 19G 1' (1,1x25 мм), 19G 3/4' (1,1x19 мм), 20G 1' (0,9x25 мм), 20G 3/4' (0,9x19 мм), 21G 1' (0,8x25 мм), 21G 3/4' (0,8x19 мм), 22G 1' (0,7x25 мм), 22G 3/4' (0,7x19 мм), 23G 1' (0,6x25 мм), 23G 3/4' (0,6x19 мм), 24G 1' (0,55x25 мм), 24G 3/4' (0,55x19 мм), 25G 1' (0,5x25 мм), 25G 3/4' (0,5x19 мм)
4. Игла-бабочка с двумя крылышками, размерный ряд: 17G 3/4' (1,4x19 мм), 18G 3/4' (1,2x19 мм), 19G 3/4' (1,1x19 мм), 20G 3/4' (0,9x19 мм), 21G 3/4' (0,8x19 мм), 22G 3/4' (0,7x19 мм), 23G 3/4' (0,6x19 мм), 24G 3/4' (0,55x19 мм), 25G 3/4' (0,5x19 мм)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 13 (тринадцать) листа (ов)
Директор
ООО «РАФЭЛ» _____
А.Р. Мухаметзянов

