

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО НПП «Ларикс»

Л. В. Ковалева



Инструкция по применению

**Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»**

ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

Введена впервые

Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»

ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

Комплектность:

- 1) Простыня медицинская (длина: 100, 110, 120, 140, 160, 200, 210, 220, 240, 300 см; ширина: 70, 80, 90, 100, 140, 160, 200 см) – от 1 до 10 шт.
- 2) Простыня (пеленка) медицинская (длина: 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100 см; ширина: 50, 60, 65, 70 см) – от 1 до 25 шт. (при необходимости).
- 3) Салфетка-полотенце (длина: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 см; ширина: 20, 25, 30, 40, 45, 50 см) – от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 4) Халат медицинский стандарт (размеры: 44-46/М, 48-50/Л, 52-54/ХЛ, 56-58/ХХЛ, 60-62/ХХХЛ; длина: 110, 120, 130, 140, 150, 160 см) – от 1 до 10 шт.
- 5) Халат медицинский с усиленной защитой длина (тип А), (размеры: 44-46/М, 48-50/Л, 52-54/ХЛ, 56-58/ХХЛ, 60-62/ХХХЛ; длина: 110, 120, 130, 140, 150, 160 см) – от 1 до 10 шт. (при необходимости).
- 6) Халат медицинский с усиленной защитой (тип Б), (размеры: 44-46/М, 48-50/Л, 52-54/ХЛ, 56-58/ХХЛ, 60-62/ХХХЛ; длина: 110, 120, 130, 140, 150, 160 см) – от 1 до 10 шт. (при необходимости).
- 7) Маска медицинская из нетканого материала одноразовая, производства ИП Прибылов Дания Петрович, РУ №ФСР 2011/10561 от 11.10.2016г., (длина: 17,5; 18 см; ширина: 9, 10 см) – от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 8) Шапочка «Колпак» (высота: 14, 17, 20, 24 см, ширина: 25, 30) – от 1 до 25 шт. (при необходимости).
- 9) Шапочка «Берет» (диаметр: 50, 60 см), производства ООО НПП «Ларикс», или Шапочка медицинская одноразовая, из нетканого материала, производства ИП Прибылов Дания Петрович, РУ №РЗН 2016/3790 от 7.03.2016 г. – от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 10) Бахилы медицинские низкие (тип А), (высота: 12, 16, 20, 25, 30 см, длина: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 11) Бахилы медицинские низкие (тип Б), (высота: 20, 25, 30 см, длина следа: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 12) Бахилы медицинские высокие (тип А), (высота: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 см, длина следа: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 13) Бахилы медицинские высокие (тип Б), (высота: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 см, длина следа: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 14) Бахилы медицинские с двойной подошвой (тип А), (высота: 20, 25, 30 см, длина следа: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 15) Бахилы медицинские с двойной подошвой (тип Б), (высота: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 см, длина следа: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 16) Халат медицинский (накидка) (размеры: (размеры: 44-46/М, 48-50/Л, 52-54/ХЛ, 56-58/ХХЛ, 60-62/ХХХЛ; длина: 90, 100, 110, 120, 130, 140 см) – от 1 до 10 шт. (при необходимости).
- 17) Трусы медицинские (тип А), (размеры: 44-46/М, 48-50/Л, 52-54/ХЛ, 56-58/ХХЛ, 60-62/ХХХЛ; длина: 40, 50, 60 см) – от 1 до 5 шт. (при необходимости).
- 18) Трусы медицинские (тип Б), (ширина: 50, 55, 60, 65, 70 см) – от 1 до 5 шт. (при необходимости).
- 19) Рубашка медицинская для пациента (тип А), (длина: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 см; ширина: 80, 90, 100 см) – от 1 до 20 шт. (при необходимости).
- 20) Рубашка медицинская для пациента (тип Б), (длина: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 см; ширина: 80, 90, 100 см) – от 1 до 20 шт. (при необходимости).
- 21) Инструкция по применению- 1 экз.

Назначение:

для соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твер-

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

дыми частицами между пациентом, персоналом и оборудованием при проведении осмотра, обследовании и различных медицинских процедур.

Потенциальные потребители:

Потенциальными потребителями изделия является медицинский персонал лечебно-профилактических учреждений, а также пациенты.

Показания к применению:

для соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований при проведении осмотра пациента, обследовании и различных медицинских процедур.

Область применения:

в медицинской практике в лечебно-профилактических учреждениях для защиты медицинского персонала, пациента, медицинского оборудования от перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения различными веществами. Изделие предназначено для использования только в одной медицинской процедуре/ манипуляции/ обследовании и подлежит последующей утилизации.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость одного или нескольких компонентов содержащихся в составе медицинских изделий.

Возможные побочные действия:

Местные аллергические реакции в виде раздражения кожи, покраснения эпидермиса.

Описание медицинского изделия и его основные технические характеристики.

.2 Основные параметры и характеристики.

1.2.1 Изделия собственного производства указаны в Приложении Б-1 (см. в Приложение 1 к настоящей Инструкции).

1.2.2 Изделия собственного производства в зависимости от области применения и технических характеристик используемых материалов, выпускаются в стандартном исполнении (Приложение Б-2). Требования к исполнению указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к исполнению изделий собственного производства.

Наименование показателя	Единица изм.	Требования к исполнению
		Стандартное исполнение
Микробная проницаемость в сухом состоянии	Lg (CFU)	$\leq 2^{a),c)}$
Пыле-, ворсоотделение	Lg (от-подсчитанных частиц корпии)	$<4,0$
Водоупорность	см H ₂ O	≥ 10
Прочность на разрыв в сухом состоянии	кПа	≥ 40
Прочность на растяжение в сухом состоянии	Н	>15

1.2.3 Изделие должно быть изготовлено из нетканого материала зеленого, белого, синего или голубого цвета. Окрас материала должен быть равномерный.

1.2.4 Требования к размерам изделий, внешнему виду указаны в приложении В (в виде технических схем и соответствующих им таблиц) (см. в Приложении 2 к настоящей Инструкции), поверх-

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»

ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

ностная плотность материала указана в приложении Б2 (см. в Приложении 3 к настоящей Инструкции).

1.2.5 Требования к массе изделий собственного производства, а также к общей массе набора с упаковкой, представлены в приложении Г.

1.2.6 Соединительные швы изделий стандартного уровня исполнения должны быть выполнены по средствам ниточного шва, стежками код 301 или код 504 по ГОСТ 12807 или путем ультразвуковой сварки. Строчки изделий должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их количества. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны. Швы изделий (или части изделий) должны быть спаяны непрерывным сварным швом, шириной не менее 4мм. Швы должны быть ровными, без растяжения или посадки одного из срезов, без разрывов, рисунок шва должен быть однородным по всей длине.

1.2.7 Поверхность изделия не должна иметь механических повреждений, разрывов, складок, масляных пятен, нарушений структуры материала.

1.2.8 Изделие должно быть нестерильным.

1.2.9 Изделие должно быть нетоксичным.

1.2.10 Упаковка изделия не должна иметь механических повреждений, разрывов, складок, масляных пятен, нарушений структуры материала.

1.2.11 Изделие в транспортной упаковке должно быть устойчиво к воздействию климатических факторов при транспортировании по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

1.2.12 Изделия, упакованные в транспортную тару, должны быть устойчивы к воздействию механических факторов и обладать вибропрочностью по ГОСТ Р 50444.

1.2.13 Средний срок годности изделий при условиях хранения, указанных в настоящих технических условиях, должен быть не более 5 лет с даты изготовления.


1.2.14 Изделие не подлежит повторному использованию. Изделие подлежит утилизации в случае нарушения целостности.

1.2.15 Технологический процесс производства изделия представлен в приложении Д.

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

Рисунок 1-Схематическое изображение медицинского изделия

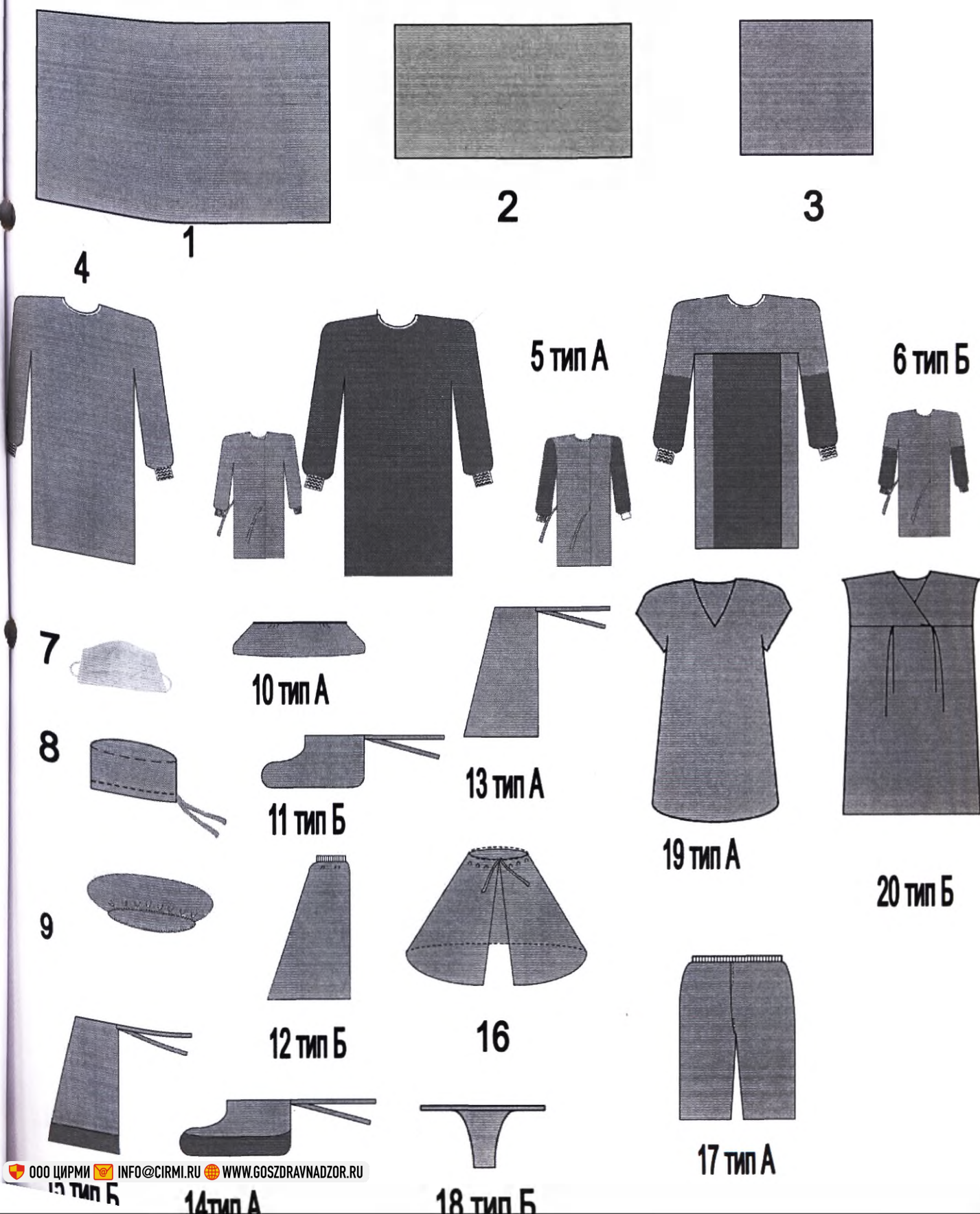

Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

Способ применения при проведении обследований и различных медицинских процедур:

Перед использованием проверьте целостность упаковки!

Пакет не должен иметь повреждения и разрывы!

1. В комнате персонала вскрывается пакет с комплектом.
2. При выполнении обследований, перевязок и других процедур накрыть инструментальные столы, кушетки для осмотра, оборудование для осмотра «простыней медицинской» (1), или «простыней (пеленкой) медицинской» (2)
3. После проведения обследований, перевязок и других процедур провести обработку с помощью «салфетки-полотенце» (3).
4. При выполнении обследований, перевязок и других процедур медперсонал надевает «халат медицинский» (4,5,6), «шапочку» (8,9), «маску медицинскую» (7), «бахилы медицинские» (9,10,11) в начале смены и используется в течение нее. Для обработки оборудования, сушки рук используется «салфетка – полотенце» (3).
5. Халат медицинский (накидку)» (12), «маску медицинскую» (7), «шапочку-берет» (9), «трусы медицинские» (17, 18), «бахилы медицинские» (10, 11, 12, 13, 14, 15), «Рубашку медицинскую для пациента» (19,20) могут надевать на пациента при проведении различных медицинских процедур и обследований.
6. «Халат медицинский (накидку)» (16), «маску медицинскую» (7), «бахилы медицинские» (10, 11, 12, 13, 14, 15) могут надевать пациенты/посетители при входе в медицинское учреждение в соответствии с информацией.
7. После проведения процедуры изделия свернуть, упаковать в полиэтиленовый пакет и утилизировать.
8. При выходе из отделения медицинского учреждения, изделия снимают и складывают в специальные контейнеры/урны.

Идентификация изделия:

ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

Условия хранения и транспортировки:

Изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность продукции, в соответствии с действующими для каждого вида транспорта правилами перевозки грузов.

При транспортировании, погрузке и выгрузке изделий должны быть приняты меры по предохранению от повреждения их упаковки и увлажнения продукции. После транспортирования в условиях отрицательных температур Набор должен быть выдержан в транспортной таре при комнатной температуре не менее 24 часов. Вид отправки - почтовой пересылкой, автомашинами, ж/д транспортом (по ГОСТ 20435).

Изделия должны храниться в закрытых сухих помещениях в упаковке изготовителя, находиться на расстоянии не менее 1 м от источников нагрева (отопительных систем) при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80% при +20°C по ГОСТ 15150.

Не допускается попадание на изделия прямых солнечных лучей, воды и различных загрязнений.

НЕСТЕРИЛЬНО.НЕТОКСИЧНО.

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

Условия эксплуатации:

При температуре от +1°C до +40 °C, относительная влажность не более 80% при +20°C, атмосферное давление 630-800 мм рт. ст.

Срок годности:

5 лет с даты изготовления. Не применять после истечения срока годности.

Производитель:

ООО НПП «Ларикс» Россия
347810, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, д.53

Приём претензий:

ООО НПП «Ларикс» Россия
347810, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, д. 53

Нормативный документ:

ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

Сведения о применяемых производителем МИ национальных стандартов:

ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования

-ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

-ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

-ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

-ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения прочности.

Утилизация:

В соответствии СанПиН 2.1.3684-21 Использованные изделия подлежат утилизации как медицинские отходы **класса опасности Б**. Изделия с просроченным сроком годности, неиспользованные изделия (в вскрытых или поврежденных упаковках) подлежат утилизации как медицинские отходы **класса опасности А**.

Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»

ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изделия собственного производства.

- 1) Простыня медицинская (длина: 100, 110, 120, 140, 160, 200, 210, 220, 240, 300 см; ширина: 70, 80, 90, 100, 140, 160, 200 см) – от 1 до 10 шт.
- 2) Простыня (пеленка) медицинская (длина: 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100 см; ширина: 50, 60, 65, 70 см) – от 1 до 25 шт. (при необходимости).
- 3) Салфетка-полотенце (длина: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 см; ширина: 20, 25, 30, 40, 45, 50 см) – от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 4) Халат медицинский стандарт (размеры: 44-46/М, 48-50/Л, 52-54/ХЛ, 56-58/ХХЛ, 60-62/ХХХЛ; длина: 110, 120, 130, 140, 150, 160 см) – от 1 до 10 шт.
- 5) Халат медицинский с усиленной защитой длина (тип А), (размеры: 44-46/М, 48-50/Л, 52-54/ХЛ, 56-58/ХХЛ, 60-62/ХХХЛ; длина: 110, 120, 130, 140, 150, 160 см) – от 1 до 10 шт. (при необходимости).
- 6) Халат медицинский с усиленной защитой (тип Б), (размеры: 44-46/М, 48-50/Л, 52-54/ХЛ, 56-58/ХХЛ, 60-62/ХХХЛ; длина: 110, 120, 130, 140, 150, 160 см) – от 1 до 10 шт. (при необходимости).
- 7) Шапочка «Колпак» (высота: 14, 17, 20, 24 см, ширина: 25, 30) – от 1 до 25 шт. (при необходимости).
- 8) Шапочка «Берет» (диаметр: 50, 60 см), производства ООО НПП «Ларикс» – от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 9) Бахилы медицинские низкие (тип А), (высота: 12, 16, 20, 25, 30 см, длина: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 10) Бахилы медицинские низкие (тип Б), (высота: 20, 25, 30 см, длина следа: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 11) Бахилы медицинские высокие (тип А), (высота: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 см, длина следа: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 12) Бахилы медицинские высокие (тип Б), (высота: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 см, длина следа: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 13) Бахилы медицинские с двойной подошвой (тип А), (высота: 20, 25, 30 см, длина следа: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 14) Бахилы медицинские с двойной подошвой (тип Б), (высота: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 см, длина следа: 35, 40, 45 см) – от 1 до 25 пар. (при необходимости).
- 15) Халат медицинский (накидка) (размеры: (размеры: 44-46/М, 48-50/Л, 52-54/ХЛ, 56-58/ХХЛ, 60-62/ХХХЛ; длина: 90, 100, 110, 120, 130, 140 см) – от 1 до 10 шт. (при необходимости).
- 16) Трусы медицинские (тип А), (размеры: 44-46/М, 48-50/Л, 52-54/ХЛ, 56-58/ХХЛ, 60-62/ХХХЛ; длина: 40, 50, 60 см) – от 1 до 5 шт. (при необходимости).
- 17) Трусы медицинские (тип Б), (ширина: 50, 55, 60, 65, 70 см) – от 1 до 5 шт. (при необходимости).
- 18) Рубашка медицинская для пациента (тип А), (длина: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 см; ширина: 80, 90, 100 см) – от 1 до 20 шт. (при необходимости).
- 19) Рубашка медицинская для пациента (тип Б), (длина: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 см; ширина: 80, 90, 100 см) – от 1 до 20 шт. (при необходимости).

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»

ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Технические схемы изделий.

Размеры изделий указаны в сантиметрах (см)


Условные обозначения:



усиленная зона (дополнительный слой ламинированного материала)


Набор одежды и белья медицинский одноразовый нестерильный «Ларикс» ТУ 32.50.50-002-27221798-2019, в составе:

1. Простыня медицинская – от 1 до 10 шт.

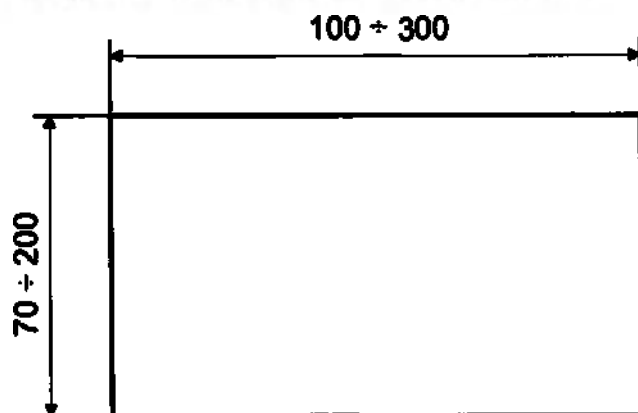

Варианты изготовления простыни п.1	
Длина, см	Ширина, см
100, 110, 120, 140, 160, 200, 210, 220, 240, 300	70, 80, 90, 100, 140, 160, 200
Допускаемое отклонение	
+/-5	+/-5


2. Простыня (пеленка) медицинская –от 1 до 25 шт. (при необходимости).

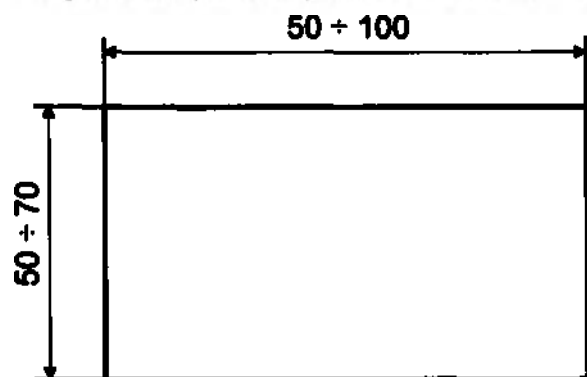

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №
Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

Варианты изготовления пеленки п.2	
Длина, см	Ширина, см
50, 60, 65, 70, 80, 90, 100	50, 60, 65, 70
Допускаемое отклонение	
+/-5	+/-5

3. Салфетка- полотенце-от 1 до 100 шт. (при необходимости).

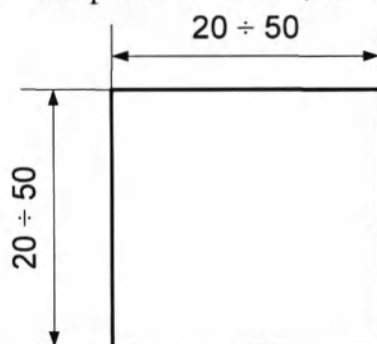

Варианты изготовления салфетки п.3	
Длина, см	Ширина, см
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
Допускаемое отклонение	
+/-5	+/-5

4. Халат медицинский стандарт-от 1 до 10 шт.


Изготавливается размерами от 44-46/М до 60-62/XXXL

(Таблица соответствия размеров и используемые материалы см. п. 4 Приложения В), варианты

исполнения:

Длина, см	Размер российский	Размер между-народный
110, 120, 130, 140, 150, 160	44-46	М
	48-50	L
	52-54*	XL
	56-58	XXL
	60-62	XXXL
+/-5		

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №
Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

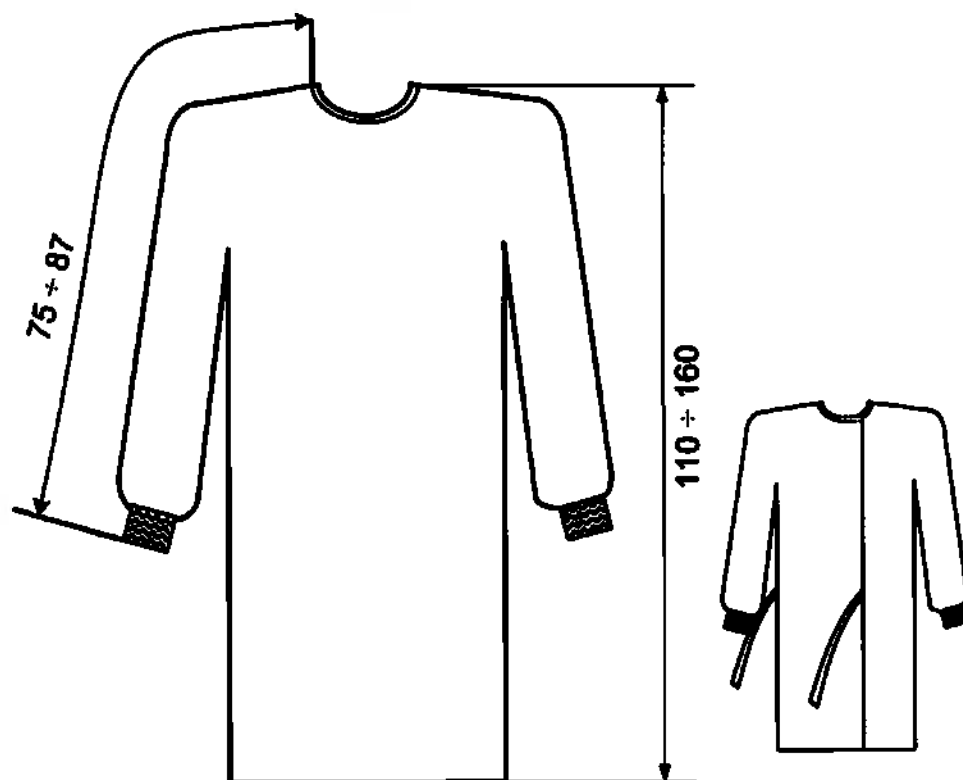


5. Халат медицинский с усиленной защитой (тип А) -от 1 до 10 шт. (при необходимости).

Изготавливается размерами от 44-46/М до 60-62/XXXL

(Таблица соответствия размеров и используемые материалы см. п. 4 Приложения В), варианты исполнения:


Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №
Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

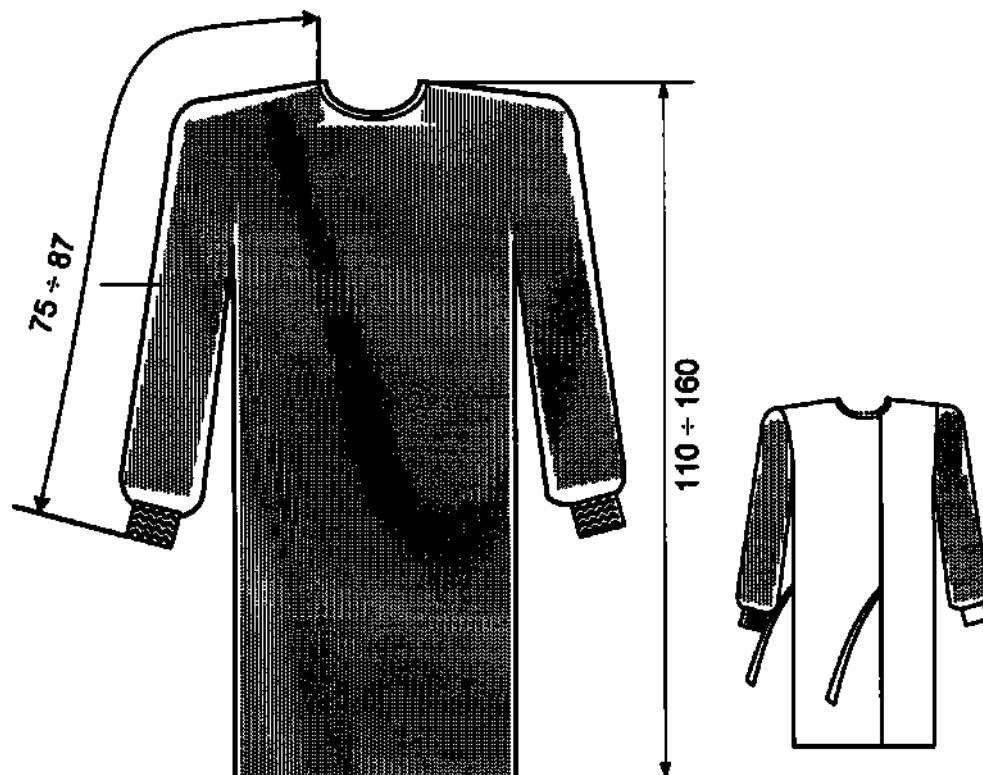

6. Халат медицинский с усиленной защитой (тип Б)- от 1 до 10 шт. (при необходимости).
Изготавливается размерами от 44-46/М до 60-62/XXXL. (таблица соответствия размеров и используемые материалы см. п. 4 Приложения В).

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

**Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019**

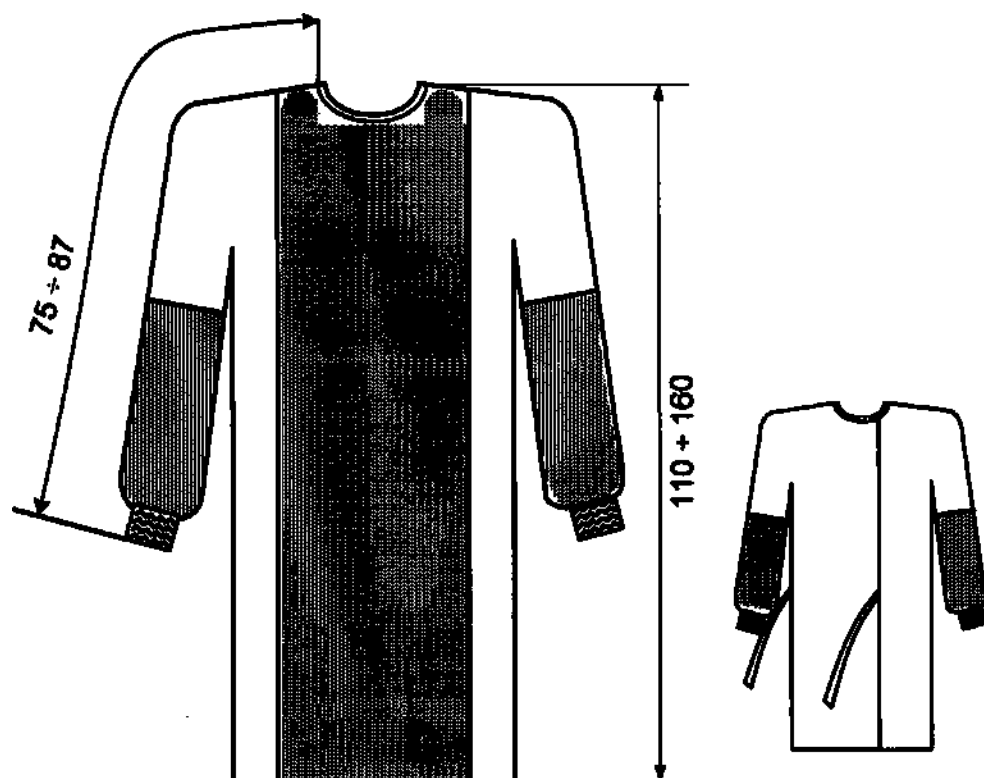

7. Маска медицинская из нетканого материала одноразовая—от 1 до 100 шт. (при необходимости)
(комплектация покупными изделиями)

Наименование	Длина, см	Ширина, см	НД	Производитель, № РУ
Маска медицинская из нетканого материала одноразовая	17,5;18 Доп.откл +/-1	9,10 Доп.откл +/-1	по ТУ 9398-001-0081581726-2010	ИП Прибылов Д.П., РУ №ФСР 2011/10561


8. Шапочка «Колпак»—от 1 до 25 шт. (при необходимости).

Варианты изготовления шапочки «Колпак» п 8	
Высота, см	Ширина, см
14, 17, 20, 24	25, 30
Допускаемое отклонение	
+/-2	+/-2,5


Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

**Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»**

ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

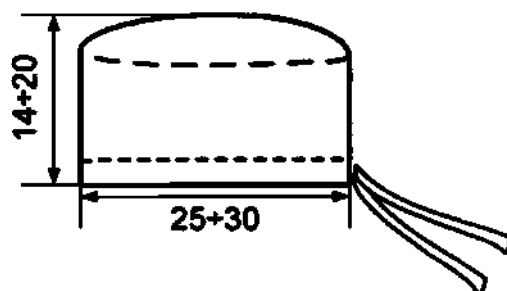

9. Шапочка «Берет»-от 1 до 100 шт. (при необходимости).

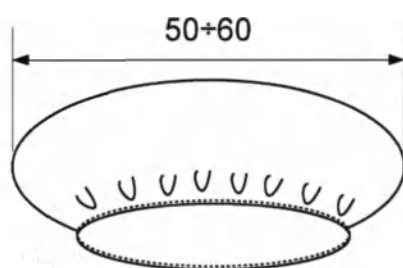


Шапочка медицинская одноразовая, из нетканого материала- комплектация покупными изделиями

Наименование	Длина в собранном виде, см	Примечание	НД	Производитель, № РУ
Шапочка медицинская одноразовая, из нетканого материала	25,27, 30 Доп.откл +/-1	Шапочка собрана на резинку таким образом, что в готовом виде представляет собой гофрированную ленту.	по ТУ 9398-004-0081581726-2015	ИП Прибылов Д.П., РУ №РЭН 2016/3790

Варианты изготовления шапочки «Берет» п 9	
Диаметр, см	50, 60
Допускаемое отклонение	+/-2,5


10. Бахилы медицинские низкие (тип А) –от 1 до 25 пар:(при необходимости).

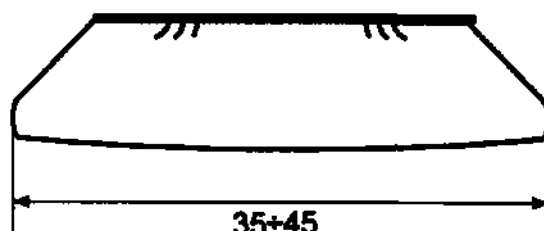


Варианты изготовления бахил медицинских п. 10, п.11, п.12, п.13	
Высота, см	Длина следа, см
«низкие» тип А: 12, 16, 20, 25, 30	35, 40, 45
«низкие» тип Б: 20,25, 30	35, 40, 45
«высокие» тип А: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65	35, 40, 45
«высокие» тип Б: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65	35, 40, 45
Допускаемое отклонение	
+/-2,5	+/-2,5

11. Бахилы медицинские низкие (тип Б) от 1 до 25 пар:(при необходимости).

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №
Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

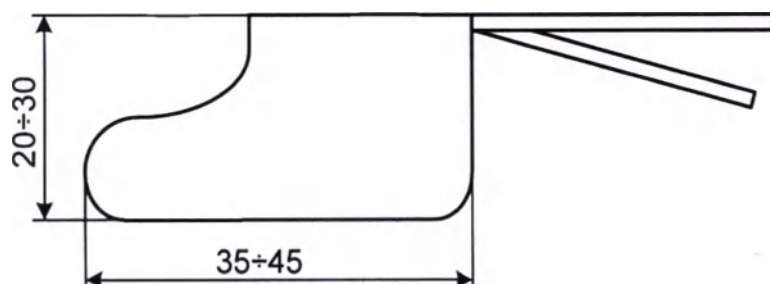


12. Бахилы медицинские высокие (тип А) —от 1 до 25 пар. (при необходимости).

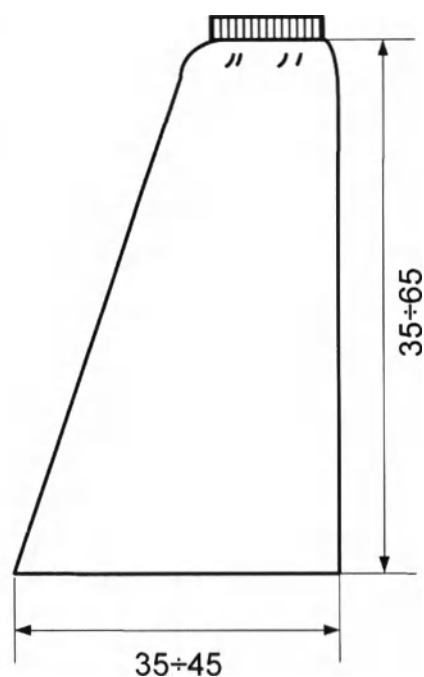


13. Бахилы медицинские высокие (тип Б) —от 1 до 25 пар. (при необходимости).

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №
Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

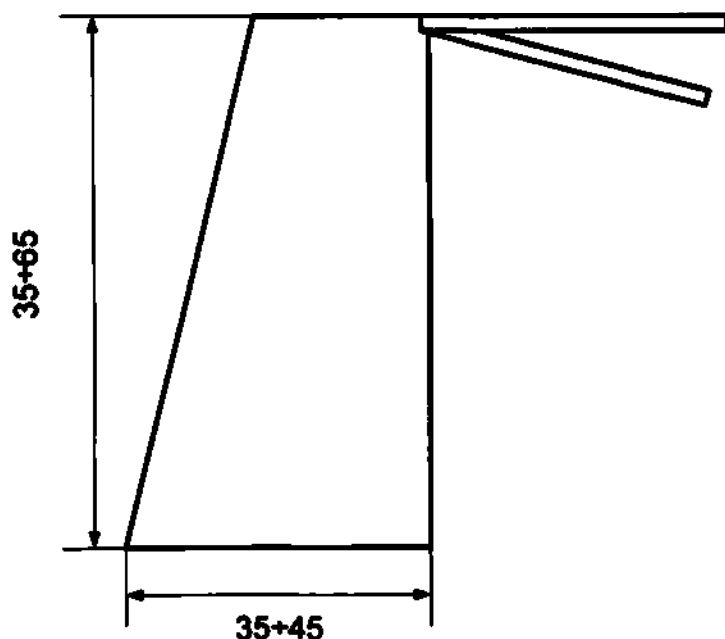

14. Бахилы медицинские с двойной подошвой (тип А)-от 1 до 25 пар (при необходимости).

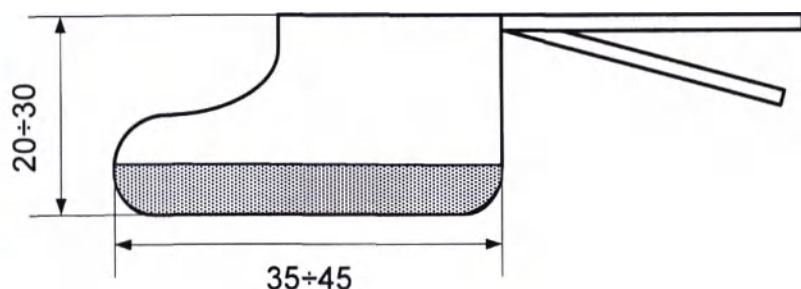


Варианты изготовления бахил медицинских п. 14, п.15	
Высота, см	Длина следа, см
Тип А: 20, 25, 30	35, 40, 45
Тип Б: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65	35, 40, 45
Допускаемое отклонение	
+/-2,5	+/-2,5

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №


**Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019**

15. Бахилы медицинские с двойной подошвой (тип Б)- от 1 до 25 пар (при необходимости).

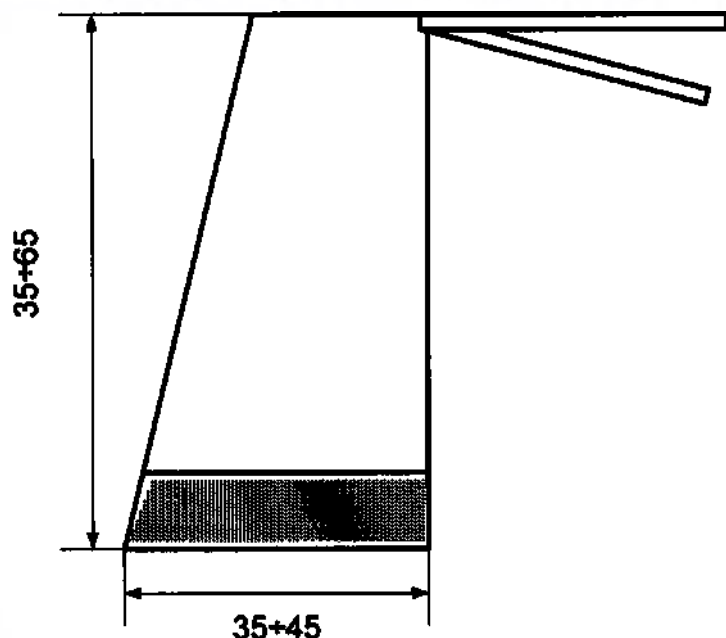

16. Халат медицинский (накидка) -от 1 до 10шт.(при необходимости).
Изготавливается размерами от 44-46/М до 60-62/XXXL

Длина, см	Размер российский	Размер между- народный
90, 100, 110, 120, 130, 140	44-46	М
	48-50	L
	52-54*	XL
	56-58	XXL
	60-62	XXXL
+/-5		

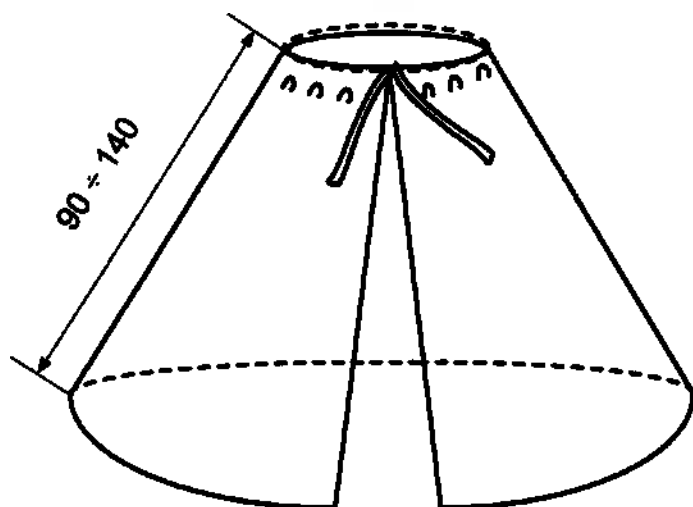


Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

**Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»**


ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

17.Трусы медицинские (тип А)–от 1 до 5 шт. (при необходимости):

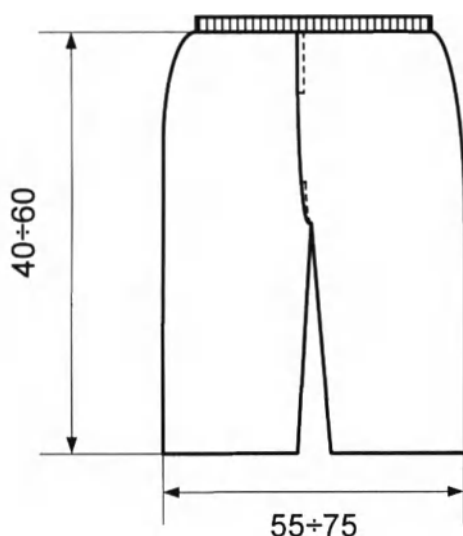

Варианты изготовления трусы медицинские п. 17(тип А)		
Длина, см	Размер российский	Размер международный
40, 50, 60	44-46	M
	48-50	L
	52-54*	XL
	56-58	XXL
	60-62	XXXL
Допускаемое отклонение		
+/-5		

18. Трусы медицинские (тип Б)- от 1 до 5 шт. (при необходимости).

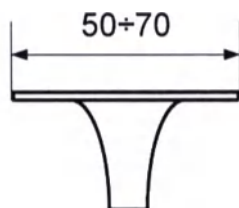

Варианты изготовления трусы медицинские п. 18 (тип Б)	
Ширина, см	
50, 55, 60, 70	
Допускаемое отклонение	
+/-2,5	


19. Рубашка медицинская для пациента (тип А)- от 1 до 20 шт. (при необходимости):

Варианты изготовления рубашки медицинской для пациента п.19, п.20	
Длина, см	Ширина, см
80, 90, 100, 110, 120, 130, 140	80, 90, 100
Допускаемое отклонение	
+/-5	+/-5


Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»

ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

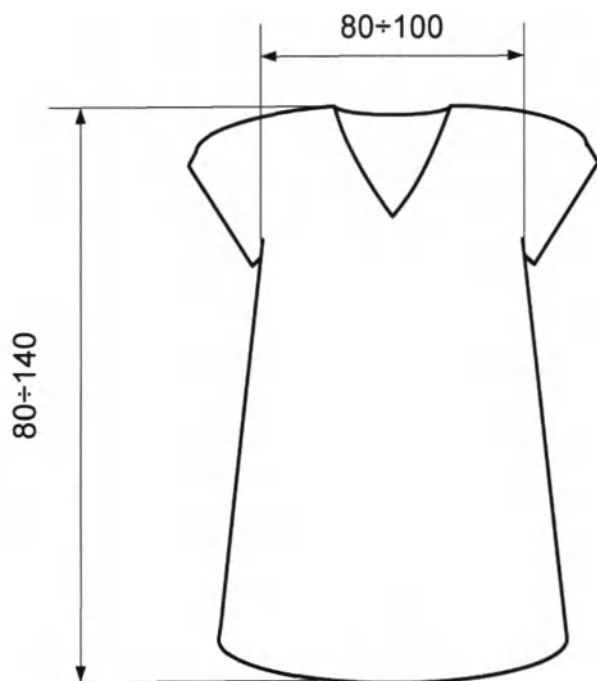

20. Рубашка медицинская для пациента (тип Б)- от 1 до 20 шт. (при необходимости)

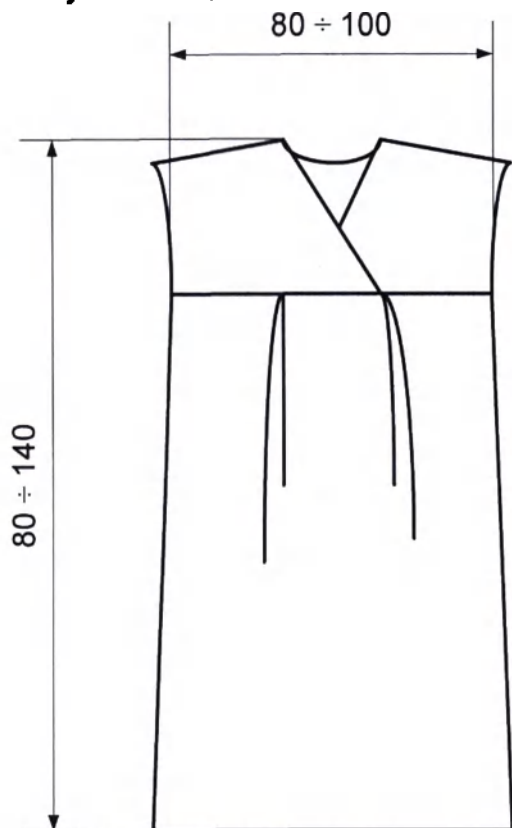

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

**Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019**

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Требование к материалам, используемых для изготовления изделий собственного производства, уровни исполнения изделий (в зависимости от применяемых материалов)

Наименование изделий	Материал			Нормативно-техническая документация	Изготовитель	Исполнение изделия
	Наименование, марка	Состав	Плотность г/м2			
1.Халат медицинский стандарт	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС	100% полипропилен	25-50	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
2.Халат медицинский с усиленной защитой (тип А, тип Б)	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС+	100% полипропилен	25-50	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
	Полотно нетканое «Полиспан ®Меди» ламинированное (спанбонд ламинированный)	100% полипропилен/ 100% полиэтилен	30-40	СТО 96891647-002-2009	АО «Поли-матиз»	стандартное
3.Халат медицинский (накидка)	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС	100% полипропилен	25-50	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
4. Шапочка-колпак	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС	100% полипропилен	25-60	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
5. Шапочка «Берет»	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС	100% полипропилен	17-40	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
6. Бахилы медицинские низкие (тип А, тип Б)	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС	100% полипропилен	25-50	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
7. Бахилы медицинские высокие (тип А, тип Б)	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС	100% полипропилен	25-50	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
		100% полипропилен	25-50	ТУ 8390-010-	ООО «Завод	стандарт-

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

**Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»
ТУ 32.50.50-002-27221798-2019**

медицинские с двойной подошвой (тип А, тип Б)	липропиленовое полотно марки СМС+	пилен		74582615-2009	Эластик»	ное
	Полотно нетканое «Пол-испан ®Меди» ламинированное (спанбонд ламинированный)	100% полипропилен/100% полиэтилен	30-50	СТО 96891647-002-2009	АО «Поли-матиз»	стандартное
9. Трусы медицинские (тип А, тип Б)	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС	100% полипропилен	30-40	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
10. Рубашка медицинская для пациента (тип А, тип Б)	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС	100% полипропилен	25-50	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
11. Простыня медицинская	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС	100% полипропилен	20-50	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
	Полотно нетканое «Пол-испан ®Меди» ламинированное (спанбонд ламинированный)	100% полипропилен/ 100% полиэтилен	30-50	СТО 96891647-002-2009	АО «Поли-матиз»	стандартное
12. Простыня (пеленка) медицинская	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС	100% полипропилен	20-50	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
	Полотно нетканое «Пол-испан ®Меди» ламинированное (спанбонд ламинированный)	100% полипропилен/ 100% полиэтилен	30-50	СТО 96891647-002-2009	АО «Поли-матиз»	стандартное
13. Салфетка-полотенце	Нетканое полипропиленовое полотно марки СМС	100% полипропилен	20-50	ТУ 8390-010-74582615-2009	ООО «Завод Эластик»	стандартное
	Полотно нетканое «Пол-испан ®Меди» ламинированное (спанбонд ламинированный)	100% полипропилен/ 100% полиэтилен	30-50	СТО 96891647-002-2009	АО «Поли-матиз»	стандартное

Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя
Регистрационное удостоверение №

Набор одежды и белья медицинский одноразовый
нестерильный «Ларикс»

ТУ 32.50.50-002-27221798-2019

	ное (спанбонд ламинирован- ный)					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

В этом списке спито, пронумеровано и
скреплено печатью 22 листов.

Генеральный директор ООО НПП «Ларикс»

Подпись  / Ковалева Д.В.

Расшифровка подписи

