



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
«МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НЕСТЕРИЛЬНАЯ, ОДНОРАЗОВАЯ»  
по ТУ 32.50.50- 004-64015714-2020  
НЕСТЕРИЛЬНО**

**Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_  
ОДНОРАЗОВАЯ**

**Назначение:** Маска предназначена для ограничения передачи и распространения инфекционных агентов, а также для фильтрации воздуха при дыхании и обеспечения барьера для передачи капель и частиц от человека к человеку.

Маска рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в офисах, в домашних условиях.

**Показания к применению:** при возникновении угрозы инфицирования, с целью ограничения передачи и распространения инфекционных агентов, капель и частиц, распространяющихся воздушно-капельным путем.

**Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

**Возможные побочные действия:** Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

**Основные технические характеристики**

| Размер   | Длина маски (Н), см | Ширина маски (С), см |
|----------|---------------------|----------------------|
| Стандарт | 17,5 ± 1,5          | 9,5 ± 0,5            |

Маска изготовлена из нетканых материалов: «Спанбонд» или «СМС» (внешние слои), «СМС» или «Мелтблаун»: (внутренний слой); Фиксирующие петли: нить шнуровязальная на основе спандекса и полиэфира.

Расположение слоёв:

**Арт.3(1)-Г-Ст** - (1 слой – СМС-12 г/м<sup>2</sup>, 2 слой – СМС-17 г/м<sup>2</sup>, 3 слой – СМС-17 г/м<sup>2</sup>)

**Арт.3(2)-Г-Ст** - (1 слой – Спанбонд - 12 г/м<sup>2</sup>, 2 слой – Мелтблаун 22 г/м<sup>2</sup>, 3 слой – Спанбонд, 17 г/м<sup>2</sup>)

Маска упакована в потребительскую упаковку по 1 шт. 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 50 шт., 100 шт.

**Описание изделия:** Маска представляет собой трехслойное прямоугольное, изделие, которое состоит из внешнего, внутреннего слоев из нетканого материала «Спанбонд» или «СМС» и среднего слоя из нетканого материала «Мелтблаун» или «СМС». По центру маска имеет три односторонние складки. Маска фиксируется на лице с помощью заушных петель. В верхней части маски расположен гибкий носовой фиксатор.

**Примечание:** нетканые материалы применяемые при изготовлении маски имеют кратковременный контакт с неповрежденной кожей.

Маска нестерильная, стерилизация и (или) дезинфекция перед использованием не требуется.

**Правила эксплуатации:** расположите маску перед лицом, удерживая ее за заушные петли, наденьте маску так, чтобы нос и рот были закрыты маской. Слегка продавите пальцами носовой фиксатор для более плотного расположения маски на лице.

После использования снимите маску за заушные резинки и положите её в контейнер или пакет для сбора отходов.

**Меры предосторожности:** после двух часов эксплуатации или при увлажнении/загрязнении маски, её следует заменить на чистую и сухую. Не следует касаться закрепленной на лице маски. Маска должна плотно прилегать к лицу.

**НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ.**

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия.

**Не использовать повторно, только для однократного применения.**

Не допускать контакта с открытым пламенем.

Изделия ремонту и техническому обслуживанию не подлежат.

**Утилизация:** использованные изделия складироваться как отходы класса Б, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**Условия хранения и транспортирования:** Упакованная продукция должна храниться вдали от солнечного света, огня. Условия транспортирования и хранения – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 40°C до - 40°C.

Гарантийный срок хранения – 3 года.

Срок хранения изделия в индивидуальной упаковке при соблюдении условий хранения составляет 5 лет.

Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020



- Изготовитель



- Запрет на повторное применение



- Не допускать воздействия солнечного света



-Дата изготовления



- Не стерильно



- Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения



- Код партии



- Беречь от влаги

Претензии потребителей принимаются по адресу:

ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. м.о. Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон: 8-812-400-81-00

[sale@bahilyrf.ru](mailto:sale@bahilyrf.ru)

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации:



*[Signature]* Срашов А.В.