

Инструкция по эксплуатации микрохирургических офтальмологических инструментов

Мы рады, что Вы выбрали микрохирургические инструменты фирмы «Аппасами», изготовленных с большим усердием и вниманием.

Следующие указания помогут Вам содержать инструменты в исправности и сохранить качество данных инструментов.

***При получении инструментов внимательно осмотрите их.**

***Храните инструменты в защищенных контейнерах, в которых они будут стерилизоваться. Разместите инструменты, так что бы они не соприкасались друг с другом. Обеспечьте подставку подходящего размера. Из мягкого силиконового материала.**

***Используйте защитный наконечник рекомендованного качества (мягкий силиконовый самоклеящийся материал)**

***Никогда не стерилизуйте титановые инструменты и из нержавеющей стали вместе.**

***Внимательно осматривайте инструменты после работы.**

***Чистите инструменты вручную, используйте мягкое растворимое (жидкое мыло), и щетку с мягкой щетиной для удаления пятен.**

***используйте дистиллированную воду, для тщательного прополаскивания инструментов. Затем просушите инструменты теплым воздухом вентилятора, не оставляя не капли воды.**

***не давайте солевым и медицинским растворам, а так же другим протеиновым веществам высыхать на инструментах.**

***Может быть, использован другой сверхзвуковой способ очистки, который дает наилучший результат.**

***Использовать только силиконовые смазочные материалы, если Вы хотите смазывать инструменты. Но при этом не использовать простые смазочные материалы.**

***Никогда не покрывайте коррозию смазочной краской, это может быть причиной сильных повреждений инструмента.**

***Чистите и ополаскивайте инструменты перед стерилизацией. Используйте любой стерилизационный метод: паровое автоклавирование, газом оксида этилена, или в сухо жарочном шкафу, согласно стандартом установленном в вашем институте.**