



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкий А.К.
26.11 2021 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ – «КРЕЙТ»»
НЕСТЕРИЛЬНО**

ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж послеродовой предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для ношения после родов для восстановления тонуса брюшных мышц, а также после Кесарева сечения для фиксации послеоперационного шва и поддержки нижней части брюшной стенки.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Послеродовой период, в том числе после кесарева сечения;

Восстановление тонуса мышц брюшной стенки в послеродовой период.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж послеродовой - «Крейт»	1
Инструкция	1
Индивидуальная потребительская упаковка	1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.

6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.

6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.

6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.

6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1 Размерный ряд и масса изделий указана в таблице 1.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий

Размер	Обхват талии, см	Масса изделия, г	
		Б-240	Б-245
№ 3	60-80	138,9	188,9

№ 4	80-100	153,9	212,0
№ 5	100-120	143,0	224,0
№ 6	120-140	173,2	241,1
№ 7	140-160	203,4	258,2
№ 8	160-180	233,6	275,3

7.2 Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

8.2. Надеть бандаж в положении лежа на спине, плотно зафиксировать застежку бандажа на животе.

8.3. СТИРКА И УХОД.

8.3.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.

8.3.2. Отбеливание запрещено.

8.3.3. Не применять барабанную сушилку.

8.3.4. Глажение запрещено.

8.3.5. Чистка запрещена.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).

9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9.4. Средний срок хранения не менее трех лет

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации



