

Одобрено Федеральной службой
По надзору в сфере здравоохранения
И социального развития

Инструкция
По применению протектора тканей глаза
ОКВИС
0,3% стерильный

ТУ 9393-001-78099152-2006

Регистрационное удостоверение:

Производитель:

ООО «Дубна-Биофарм», 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Центральная, д.7.

Филиал в Москве: 105318, ул. Ткацкая, д.5, стр.3.

Тел.: (495)921-36-97 www.xentek.ru dubna-biofarm@bk.ru

Состав:

Протектор тканей глаза на основе сульфатированного гликозаминогликана хондроитин сульфата, гидроксиэтилцеллюлозы и сбалансированного солевого раствора.

Свойства:

вязкоэластичный раствор для обволакивания поверхности роговой оболочки и конъюнктивы. Действие протектора основано на защитном эффекте входящих в состав гидроксиэтилцеллюлозы, хондроитин сульфата и сбалансированного солевого раствора.

Показания к применению:

В офтальмологии:

- «синдром сухого глаза;
- профилактика раздражающего действия на глаза загрязненной атмосферы;
- профилактика раздражающего действия на глаза сухого воздуха;
- защита роговицы от раздражающего действия контактных линз.

В офтальмохирургии:

- в предоперационной подготовке к операции по поводу экстракции катаракты и в раннем послеоперационном периоде;
- при подготовке к лазерным операциям и в раннем послеоперационном периоде;
- до и после сквозной кератопластики и других хирургических вмешательствах на глазах.

После однократного закапывания протектор действует не менее 90 минут.

Способ применения:

При синдроме «сухого глаза» 3 раза в день по 1-2 капли в каждый глаз утром и вечером. В качестве профилактического средства от раздражающего действия загрязненной атмосферы, сухого воздуха, контактных линз по 1-2 капли в каждый глаз 1 раз в день.

Противопоказания:

Побочные реакции не выявлены, может быть гиперчувствительность к любому компоненту данного протектора, которая быстро проходит при отмене средства.

Форма выпуска:

Раствор в стеклянном флаконе с капельницей-дозатором по 5 мл.

Условия хранения: хранить при температуре от 8 до 25°C в защищенном от света месте.

Хранить в местах, недоступных для детей. Не замораживать.

Срок годности: 1 год

Срок годности после вскрытия флакона: 2 недели

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____

Одобрено Федеральной службой
По надзору в сфере здравоохранения
И социального развития

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОТЕКТОР ТКАНЕЙ ГЛАЗА «ОКВИС»
2,0% СТЕРИЛЬНЫЙ

ТУ 9393-001-78099152-2006

Регистрационное удостоверение № ФС 01262006/3576-06

Сертификат № РОСС RU.ИМ24.В00058.

Производитель: ООО «Дубна-Биофарм», Московская область, г. Дубна, ул. Центральная, д.7

Почтовый адрес в г.Москве: ул. Ткацкая, д.5 Тел./факс: (495)921-36-97.

Интернет сайт: www.dubna-biopharm.ru

E-mail: dubna-biopharm@bk.ru

Состав: протектор тканей глаза на основе хондроитин сульфата, гидроксиэтилцеллюлозы сбалансированного солевого раствора.

Свойства: вязкоэластичный раствор для введения в переднюю камеру глаза с целью защиты эндотелия и радужки при экстракции катаракты, имплантации интраокулярной линзы и в качестве наружного средства при лазерных операциях, сквозной кератопластике и других хирургических вмешательствах. Действие протектора основано на защитном свойстве гидроксиэтилцеллюлозы и хондроитин сульфата, благодаря которому эндотелиальный слой клеток предохраняется от механических воздействий во время операции.

Показания к применению:

В офтальмохирургии:

- при экстракции катаракты;
- при имплантации интраокулярной линзы;
- при лазерных операциях для защиты эпителия роговицы;
- сквозной кератопластике с целью предотвращения подсыхания трансплантата роговицы и других хирургических вмешательствах.

Способ применения:

В хирургической практике в операционных условиях 1-1,5 мл в переднюю камеру глаза, после окончания удаления хрусталиковых масс протектор удаляется промыванием, сбалансированным солевым раствором.

Противопоказания: побочные реакции не выявлены.

Форма выпуска: в шприце или стеклянном флаконе по 2,0 мл.

Условия хранения: хранить при температуре от 8° до 25°С в защищенном от света месте.

Не помещать в холодильник.

Срок годности: 1 год.

Использовать однократно, непосредственно после вскрытия.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.



КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ