



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкий А.К.
26.11.2021 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ – «КРЕЙТ»»**

НЕСТЕРИЛЬНО

ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Корсет предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, в период реабилитации после операций и травм пояснично-крестцового отдела позвоночника, при радикулите, а также для профилактики повреждений пояснично-крестцового отдела позвоночника.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Остеохондроз, спондилез, спондилоартроз в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, в том числе с болевым синдромом;

Грыжи межпозвонковых дисков;

Спондилолистез;

Радикулит, миозит, люмбалгии, ишалгии, ушибы позвоночника;

Восстановительный период после травм и операций в пояснично-крестцовом отделе позвоночника;

Профилактика повреждения поясничной области при физических нагрузках.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый - «Крейт»	1
Инструкция	1
Индивидуальная потребительская упаковка	1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.

6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.

6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.

6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.

6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1. Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-3.

Таблица 1 - Размерный ряд и масса изделий Б-502Э, Б-502ПР, Б-502/4МР, Б-502/6МР, Б-2502ПР, Б-2502МР, Б-507Э, Б-507, Б-2507, Б-2511

Размер	Обхват талии, см	Масса, г									
		Б-502Э	Б-502ПР	Б-502/4МР	Б-502/6МР	Б-2502ПР	Б-2502МР	Б-507Э	Б-507	Б-2507	Б-2511
№ 2	50-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269,5
№ 3	60-80	186,4	224,4	266,4	307,0	235,6	253,2	245,6	373,2	356,9	305,8
№ 4	80-100	216,3	260,4	313,4	345,8	269,5	283,2	274,2	419,2	387,7	342,1
№ 5	100-120	259,4	311,7	347,5	387,5	301,7	359,5	301,4	443,9	425,9	375,6
№ 6	120-140	305,1	436,8	374,2	429,4	346,8	395,9	338,5	517,0	464,4	410,7
№ 7	140-160	350,8	561,9	400,9	471,3	391,9	432,3	375,6	590,1	502,9	445,8
№ 8	160-180	396,5	687,0	427,6	513,2	437,0	468,7	412,7	663,2	541,4	480,9

Таблица 2- Размерный ряд и масса изделий Б-513, Б-2513

Размер	Обхват талии, см	Масса, г	
		Б-513	Б-2513
№ 3	60-80	296,2	296,2
№ 4	80-100	357,8	357,8
№ 5	110-135	419,4	419,4
№ 6	135-160	481,0	481,0
№ 7	160-185	539,6	539,6
№ 8	185-210	598,2	598,2

Таблица 3 - Размерный ряд и масса изделий К-510, К-520, К-525

Размер	Обхват талии, см	Масса, г		
		К-510	К-520	К-525
№ 2	60-75	251,5	318,5	384,5
№ 3	70-90	282,7	349,3	420,0
№ 4	85-110	327,7	376,7	459,0
№ 5	105-125	365,1	409,8	489,3
№ 6	120-140	395,3	439,0	534,5
№ 7	135-155	425,5	468,2	579,7
№ 8	150-170	455,7	497,4	624,9

7.2 Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

8.2. Надеть корсет на нижнее белье лежа на спине. Ребра жесткости должны располагаться посередине поясничного отдела позвоночника на одинаковом расстоянии от позвоночного столба. Зафиксировать застежку корсета на животе. Отрегулировать степень фиксации с помощью стяжки.

8.3. СТИРКА И УХОД.

8.3.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.

8.3.2. Отбеливание запрещено.

8.3.3. Не применять барабанную сушилку.

8.3.4. Глажение запрещено.

8.3.5. Чистка запрещена.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).

9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9.4. Средний срок хранения не менее трех лет

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 лист(ов)

Руководитель организации





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкий А.К.
2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ «КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ – «КРЕЙТ»»

НЕСТЕРИЛЬНО

ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Корсет предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, в период реабилитации после травм и операций для разгрузки, фиксации и стабилизации пояснично-крестцового и нижней части грудного отдела позвоночника, предотвращает деформации во время физической или статической нагрузки, поддерживает позвоночник в правильном положении, препятствует смещению позвонков и стиранию межпозвоночных дисков.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Различные формы нарушения осанки;

Кифотическая и сколиотическая деформации позвоночника;

Реабилитация после травм и операций в грудном и поясничном отделах позвоночника;

Остеохондроз, остеоартроз в грудопоясничном отделе позвоночника;

Радикулиты, миозиты, перенапряжения мышц спины;

Спондилолистез, явления нестабильности в грудопоясничном отделе позвоночника;

Межпозвоночные грыжи грудного и поясничного отделов позвоночника.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Корсет ортопедический грудопоясничный - «Крейт»	1
Инструкция	1
Индивидуальная потребительская упаковка	1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.

6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.

6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.

6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.

6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1. Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-4.

Таблица 1 - Размерный ряд и масса изделий Б-503Э, Б-503, Б-2503, Б-2512, К-530

Размер	Обхват талии, см	Масса, г				
		Б-503Э	Б-503	Б-2503	Б-2512	К-530
№ 3	60-80	362,8	464,2	453,3	395,9	405,4
№ 4	80-100	368,0	506,4	499,3	454,1	459,8
№ 5	100-120	430,7	596,6	581,6	491,8	519,5
№ 6	120-140	462,0	628,3	595,8	542,8	559,8
№ 7	140-160	493,3	660,0	610,0	593,8	600,1
№ 8	160-180	524,6	691,7	624,2	644,8	640,4

Таблица 2- Размерный ряд и масса изделий Б-504Э, Б-504, Б-2504, Б-2509, Б-2514

Размер	Рост, см	Обхват талии, см	Масса, г				
			Б-504Э	Б-504	Б-2504	Б-2509	Б-2514
№ 3, P1	155-165	60-80	480,0	563,7	551,7	627,5	649,5
№ 4, P1		80-100	530,8	616,4	600,5	695,1	717,1
№ 5, P1		100-120	609,3	695,6	672,2	757,7	779,7
№ 6, P1		120-140	687,8	774,8	743,9	820,3	842,3
№ 7, P1		140-160	766,3	854	815,6	882,9	904,9
№ 8, P1		160-180	874,0	907	887,3	956,5	978,5
№ 3, P2	165-175	60-80	527,4	626,5	600,9	635,0	657,0
№ 4, P2		80-100	579,5	676,1	662,6	710,7	732,7
№ 5, P2		100-120	643,2	751,7	735,8	769,0	791,0
№ 6, P2		120-140	717,0	840,9	807,5	831,3	853,3
№ 7, P2		140-160	795,5	920,1	879,2	893,9	915,9
№ 8, P2		160-180	903,2	973,1	950,9	967,5	989,5
№ 3, P3	175-185	60-80	618,3	657,2	654,8	654,8	676,8
№ 4, P3		80-100	638,5	740,7	704,9	719,8	741,8
№ 5, P3		100-120	672,4	827,9	784,1	777,5	799,5
№ 6, P3		120-140	746,2	907,0	871,1	842,3	864,3
№ 7, P3		140-160	824,7	986,2	942,8	904,9	926,9
№ 8, P3		160-180	932,4	1065,4	1014,5	978,5	1000,5
№ 3, P4	185-195	60-80	709,2	687,9	708,7	674,6	696,6
№ 4, P4		80-100	729,4	805,3	747,2	728,9	750,9
№ 5, P4		100-120	763,3	904,1	832,4	786	808,0
№ 6, P4		120-140	837,1	973,1	934,7	853,3	875,3
№ 7, P4		140-160	915,6	1052,3	1006,4	915,9	937,9
№ 8, P4		160-180	1023,3	1131,5	1078,1	989,5	1011,5

Таблица 3 - Размерный ряд и масса изделия Е-504

Размер	Рост, см	Обхват талии, см	Масса, г
№ 1, P1	До 120см	45-55	290,4
№ 2, P1		55-65	324,1
№ 3, P1		65-80	357,8
№ 4, P1		80-95	391,5
№ 1, P2	120-140	45-55	370,6
№ 2, P2		55-65	404,3
№ 3, P2		65-80	438,0
№ 4, P2		80-95	471,7
№ 1, P3	140-160	45-55	403,6
№ 2, P3		55-65	434,0
№ 3, P3		65-80	464,4
№ 4, P3		80-95	494,8

Таблица 4 –Размерный ряд и масса изделия Б-506.

Размер	Рост, см	Обхват талии, см	Б-506
№ 1, P1	до 120	45-55	258,5
№ 2, P1	120-140	55-65	299,8
№ 3, P1	155-165	60-80	388,9
№ 4, P1		80-100	431,1
№ 5, P1		100-120	466,1
№ 6, P1		120-140	501,1
№ 7, P1		140-160	536,1
№ 8, P1		160-180	571,1
№ 2, P2	120-140	55-65	332,0
№ 3, P2	165-175	60-80	430,4
№ 4, P2		80-100	470,2
№ 5, P2		100-120	509,8
№ 6, P2		120-140	549,4
№ 7, P2		140-160	589,0
№ 8, P2		160-180	628,6
№ 3, P3	175-185	60-80	464,4
№ 4, P3		80-100	509,9
№ 5, P3		100-120	549,7
№ 6 P3		120-140	589,5
№ 7, P3		140-160	629,3
№ 8, P3		160-180	669,1
№ 3, P4	185-195	60-80	498,4
№ 4, P4		80-100	543,9
№ 5, P4		100-120	589,4
№ 6, P4		120-140	634,9
№ 7, P4		140-160	680,4
№ 8, P4		160-180	725,9

7.2 Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

8.2. Надеть корсет на нижнее белье лежа на спине. Ребра жесткости должны располагаться посередине поясничного отдела позвоночника на одинаковом расстоянии от позвоночного столба. Зафиксировать застежку корсета на животе. Отрегулировать степень фиксации с помощью стяжки.

8.3. СТИРКА И УХОД.

8.3.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.

8.3.2. Отбеливание запрещено.

8.3.3. Не применять барабанную сушилку.

8.3.4. Глажение запрещено.

8.3.5. Чистка запрещена.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).

9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9.4. Средний срок хранения не менее трех лет

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 лист(ов)

Руководитель организации



