

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Гипо-Бируинца»



Котельникова Е. Н.
_____ 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

**Перчатки диагностические из натурального и синтетического латекса
нестерильные с текстурированной поверхностью, с гладкой поверхностью,
опудренные и неопудренные
Производства фирмы «ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перчатки изготовлены из натурального и синтетического латекса с различными видами отделок: текстурированная поверхность, гладкая поверхность, опудренная поверхность, неопудренная поверхность.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для людей, имеющих аллергическую реакцию на натуральный латекс, следует использовать перчатки из материала альтернативного состава.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Извлечь из упаковки непосредственно перед использованием.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Перчатки предназначены для одноразового использования, универсальны для обеих рук.

5.2. Требования, которые необходимо соблюдать при работе в перчатках:

- необходимо подбирать перчатки нужного размера. Выбор перчаток зависит от характера выполняемых манипуляций.
 - следует надевать чистые перчатки перед проведением манипуляций, связанных с контактом со слизистой оболочкой или поврежденной кожей.
 - манипуляции с кровью или другими биологическими жидкостями рекомендуется производить в латексных перчатках (перчатки уменьшают количество инокулята крови, который передается при случайном уколе использованной иглой).
 - использование дополнительной пары перчаток уменьшают частоту повреждений при работе с острыми инструментами в 2-4 раза.
 - снимать перчатки необходимо очень осторожно, чтобы избежать загрязнения кожи рук.
 - порванные или протекающие перчатки к применению непригодны.
- 5.3. Рекомендуется хранить в сухом месте.

Генеральный директор
ООО «Гипс-Бируинца»



Котельникова Е.Н.