

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тумбочки включает в себя:

- поддержание технического состояния тумбочки в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек ящиков не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей тумбочки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей тумбочки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СанПиН 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт тумбочки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тумбочки.

10. Утилизация

Тумбочка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тумбочка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Тумбочка медицинская лабораторная (мод.1) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.112 ТУ и признана годной для эксплуатации.

□ Код 0000000 Тумбочка медицинская лабораторная (мод.1)

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com




Регистрационное удостоверение



ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Ишкитова Р.Н. 13.12.2022.

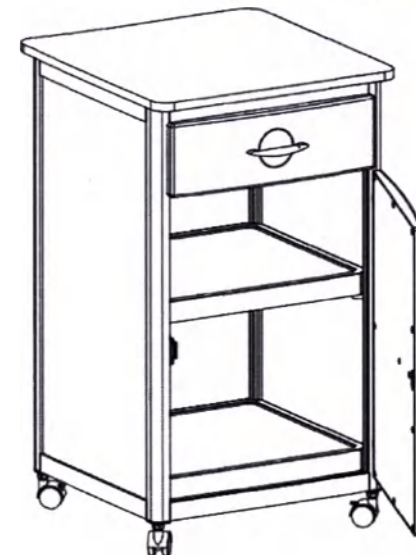

ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПО ГИКС.942810.112 ТУ

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.1)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.235 РЭ

Тумбочка медицинская лабораторная (мод.1) (в дальнейшем тумбочка) предназначена для применения в специальном медицинском помещении для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека и подвергается дезинфекционной обработке.

Показания к применению: устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! Перед использованием тумбочки проверьте её устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор.

! При значительной загрузке ящика не следует выдвигать ящик полностью, необходимо придерживать ящик снизу для предупреждения опрокидывания тумбочки!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться и надавливать на верхние грани открытых дверей и выдвинутых ящиков!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия $12 \pm 1,2$ кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: $(480 \times 515 \times 831) \pm 4$.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных колёсных опорах.

1.3 Размеры поверхности свободнолежащих полок (длина х ширина х высота), мм: (426x397x20)±4, масса, кг – 0,8±0,08.

1.4 Размеры рабочей поверхности выдвижных ящиков (длина х ширина х высота), мм: (348x353x92)±4, масса, кг – 1,5±0,15.

1.5 Размеры двухколесной опоры, мм, не более: (длина х ширина х высота), мм – 60x45x72, диаметр – 40; масса, кг, не более – 0,07; допустимая нагрузка на каждую опору, даН, не более – 50.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики тумбочки при равномерном распределении нагрузки:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;
- на полку полимерную – 10 кг;
- на дно ящика полимерного – 7 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм.

2.4 Угол открывания дверей тумбочки не менее 110°.

2.5 Усилие выдвижения ящика не более 5 даН. Ящик имеет устройство для предотвращения выпадения при выдвижении.

2.6 Высота регулировки опор не более 15 мм.

2.7 Дискретный шаг регулировки съемных полок отсутствует, регулировка достигается перемещением полкодержателей вдоль направляющих алюминиевого профиля с дальнейшим закреплением на требуемой высоте.

2.8 Влажность деталей из древесных материалов в пределах от 2 до 10 %.

2.9 Допустимая удельная активность цезия-137 в древесно-содержащих материалах не превышает 300 Бк/кг

2.10 Зазор между одной из опор и горизонтальной плоскостью пола не более 3 мм.

2.11 Минимальный радиус разворота – не более 352 мм.

2.12 При эксплуатации тумбочка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.13 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Столешница изготовлена из влагостойкой ЛДСП. Под столешницей тумбочки расположен выдвижной ящик, глубина которого составляет 367 мм. Под ящиком - секция с 2-мя полками. Верхняя полка регулируется по высоте путем перемещения полкодержателей вдоль направляющих алюминиевого профиля с дальнейшим закреплением на требуемой высоте. Нижняя полка не имеет возможности регулировки по высоте и является дном секции. Секция закрывается дверцей с фиксацией магнитом. Тумбочка устанавливается на 4 двухколесные опоры с винтом и стопором. Опоры имеют возможность регулировки по высоте не более 15 мм. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942810.112 ТУ вариант исполнения: тумбочка медицинская лабораторная (мод.1) в составе: тумбочка на 4-х двухколесных опорах с 2-мя полками, 1-м ящиком	1
- Р	1
- ООО ЦПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	1
- Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тумбочка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тумбочка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения тумбочки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности тумбочки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тумбочки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тумбочки проверьте следующее:

- выдвижение ящиков обеспечивается без дополнительных усилий, отсутствие перекосов ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок тумбочки;
- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют своё функциональное назначение;
- крепёжные элементы тумбочки выполняют своё функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тумбочки

Во избежание преждевременного выхода из строя тумбочки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скопление жидкости на поверхностях тумбочки, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности тумбочки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.3 По механической безопасности тумбочка соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тумбочки включает в себя:

- поддержание технического состояния тумбочки в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек ящиков не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей тумбочки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей тумбочки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СанПиН 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт тумбочки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тумбочки.

10. Утилизация

Тумбочка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тумбочка по правилам, предусмотренным в 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Тумбочка медицинская лабораторная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.112 ТУ и признана годной для эксплуатации.

- ☐ Код 00000000 Тумбочка медицинская лабораторная (мод.2)
вар. пост. 1 – столешница - влагостойкая ЛДСП
- ☐ Код 00000000 Тумбочка медицинская лабораторная (мод.2)
вар. пост. 2 – столешница - HPL панель

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____



Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com



инное удостоверение

Нижнянско Р.И. 13.12.2021

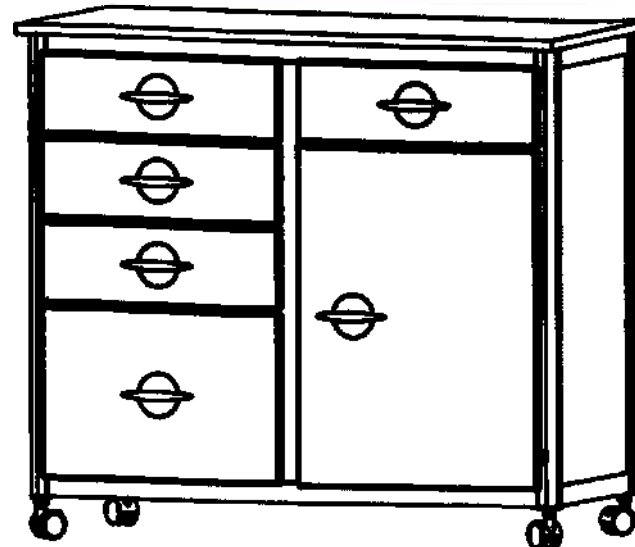

ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПО ГИКС.942810.112 ТУ

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.2) в вариантах поставки 1,2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.236 РЭ

Тумбочка медицинская лабораторная (мод.2) в вариантах поставки 1, 2 (в дальнейшем тумбочка) предназначена для применения в специальном медицинском помещении для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека и подвергается дезинфекционной обработке.

Показания к применению: устанавливается в процедурном кабинете или лаборатории для проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! Перед использованием тумбочки проверьте её устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор.

! При значительной загрузке ящика не следует выдвигать ящик полностью, необходимо придерживать ящик снизу для предупреждения опрокидывания тумбочки!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани открытых дверей и выдвинутых ящиков!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия:

вариант поставки 1: 23±2,3 кг;

вариант поставки 2: 27±2,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (910х515х831)±4.

Габаритный размер изделия по высоте указан при полностью вкрученных колёсных опорах.

1.3 Размеры поверхности сабоднолежащих полок (длина х ширина х высота), мм: (426х397х20)±4, масса, кг – 0,8±0,08.

1.4 Размеры рабочей поверхности выдвижных ящиков (длина х ширина х высота), мм: (348х353х92)±4, масса ящика малого, кг - 1,5±0,15, масса ящика большого, кг - 1,8±0,18.

1.5 Размеры двухколесной опоры, мм, не более: (длина х ширина х высота), мм – 60х45х72, диаметр – 40; масса, кг, не более – 0,07; допустимая нагрузка на каждую опору, даН, не более – 50.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики тумбочки при равномерном распределении нагрузки:

- на столешницу из HPL панели – 35 кг;

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на полку полимерную – 10 кг;

- на два ящика полимерного – 7 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм.

2.4 Угол открывания дверей тумбочки не менее 110°.

2.5 Усилие выдвижения ящика не более 5 даН. Ящик имеет устройство для предотвращения выпадения при выдвижении.

2.6 Высота регулировки опор не более 15 мм.

2.7 Дискретный шаг регулировки съемных полок отсутствует, регулировка достигается перемещением полкодержателей вдоль направляющих алюминиевого профиля с дальнейшим закреплением на требуемой высоте.

2.8 Влажность деталей из древесных материалов в пределах от 2 до 10 %.

2.9 Допустимая удельная активность цезия-137 в древесно-содержащих материалах не превышает 300 Бк/кг

2.10 Зазор между одной из опор и горизонтальной плоскостью пола не более 3 мм.

2.11 Минимальный радиус разворота – не более 522 мм.

2.12 При эксплуатации тумбочка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.13 Изделие изготовлено из алюминиевого профиля с заполнением стенок сэндвич-панелью. Тумбочка разделена на левую и правую секции. Левая секция состоит из 3-х малых и 1-го большого выдвижных ящиков, глубина каждого из которых составляет 367 мм. Правая секция состоит из малого выдвижного ящика глубиной 367 мм и секции с двумя полками. Верхняя полка имеет возможность регулировки по высоте путем перемещения полкодержателей вдоль направляющих алюминиевого профиля, с дальнейшим закреплением на требуемой высоте. Нижняя полка - без возможности регулировки по высоте, является дном секции. Секция закрывается дверцей с фиксацией магнитом. Тумбочка устанавливается на 4 двухколесные опоры с винтом и стопором, с диапазоном регулировки высоты не более 15 мм. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя. Вариант поставки 1 комплектуется столешницей из влагостойкой ЛДСП, вариант поставки 2 комплектуется столешницей из HPL панели, представляющей собой бумажно-слоистый пластик с поверхностью, обеспечивающей высокую влагостойкость и стойкость к химическому воздействию различных дезинфицирующих средств.

Наименование	Количество, шт
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942810.112 ТУ вариант исполнения: тумбочка медицинская лабораторная (мод.2) в вариантах поставки 1,2* в составе: тумбочка на 4-х двухколесных опорах с 2-мя полками, 5-ю ящиками	1
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

* вариант поставки определяет заказчик.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тумбочка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тумбочка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения тумбочки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности тумбочки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлораминна по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тумбочки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тумбочки проверьте следующее:

- выдвижение ящиков обеспечивается без дополнительных усилий, отсутствие перекосов ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок тумбочки;

- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение;

- крепежные элементы тумбочки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тумбочки

Во избежание преждевременного выхода из строя тумбочки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях тумбочки, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности тумбочки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.3 По механической безопасности тумбочка соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеназванных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.