

**Инструкция по применению
ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ «ЖР-1»**

НАЗНАЧЕНИЕ

Стоматологический материал «ЖР-1» предназначен для обработки (обезжиривания, обезвоживания) корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием зубов, отпрепарированных под искусственную коронку перед фиксацией протезов.

СВОЙСТВА

Материал «ЖР-1» - современное обезжиривающее и обезвоживающее средство, не содержит ацетона, хлороформа, легко удаляется, обладает бактерицидными свойствами. Материал «ЖР-1» может применяться при пломбировании независимо от цемента, используемого для пломбирования. «ЖР-1» экономичен и удобен в употреблении.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Пропитать жидкостью ватные турунды для каналов, обработать канал и подождать несколько секунд до полного испарения жидкости.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость «ЖР-1» выпускается во флаконах-капельницах по 15 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Жидкость «ЖР-1» следует хранить в сухом месте при температуре + 4...25°C.

Внимание! Жидкость «ЖР-1» содержит легколетучие компоненты. После применения флакон плотно закрыть.

Срок годности 1 год.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Радуга Р», Россия, г. Воронеж,
тел./факс.: (4732) 78-50-45, 72-89-98

Зам. Директора



*Радуга Р
Исключительные права*

Инструкция по применению ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ «ЖР-2»

НАЗНАЧЕНИЕ

Стоматологический материал «ЖР-2» предназначен для химического расширения каналов.

СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стоматологический материал «ЖР-2» - нейтральный раствор, содержащий вещество, которое, соединяясь с минеральными компонентами зубной ткани, образует рыхлую структуру, оказывающую лишь слабое сопротивление механическому воздействию. В состав материала входит триоксан, обладающий сильным бактерицидным действием. Материал легко проникает в самые узкие каналы и размягчает их стенки.

Материал не токсичен, не является каустиком, абсолютно безвреден для слизистых оболочек полости рта, прост в употреблении, позволяет осуществлять удаление остаточной девитализированной пульпы и дентина стенок канала таким образом, что механическое расширение с использованием эндодонтических инструментов выполняется без труда даже в самых узких каналах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

С помощью тонкой пипетки ввести материал в полость зуба, а затем в канал, но уже используя для этого корневую иглу. Сразу после этого можно начать механическое расширение канала. Процедуру повторить несколько раз, затем промыть водой.

ФОРМА ВЫПУСКА

«ЖР-2» выпускается в флаконах по 15 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить «ЖР-2» следует в сухом месте при температуре + 4...25°C, избегать прямых солнечных лучей.

Срок годности 1 год.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**ООО «Радуга-Р», Россия, г. Воронеж,
тел./факс: (4732) 78-50-45, 72-89-98**



Зам. директора

Инструкция по применению ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ «ЖР-3»

НАЗНАЧЕНИЕ

Стоматологический материал «ЖР-3» предназначен для антисептической обработки каналов во время подготовки их к пломбированию.

СОСТАВ И СВОЙСТВА

Материал «ЖР-3» - современное антисептическое средство, действующее на все грамм - положительные и грамм - отрицательные бактерии, а также грибки и вирусы. Материал обладает высокой проникающей способностью. Благодаря содержанию сильного антисептика происходит глубокая стерилизация макро- и микроканалов в кратчайшее время.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Пропитать жидкостью ватные турунды для каналов и обработать канал.

ФОРМА ВЫПУСКА

«ЖР-3» выпускается в флаконах по 15 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Жидкость «ЖР-3» следует хранить в сухом месте при температуре $+4...25^{\circ}\text{C}$.

Внимание! При температуре ниже $+18^{\circ}\text{C}$ возможно выпадение кристаллического осадка. Для его растворения следует поместить материал в теплое место с температурой более $+20^{\circ}\text{C}$.

Срок годности 1 год.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Радуга-Р», 394026, Россия,
г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 24
тел./факс: (4732) 78-50-45, 72-89-98



Р⁴
Вешняков

4

Инструкция по применению ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ «ЖР-4»

НАЗНАЧЕНИЕ

Стоматологический материал «ЖР-4» применяется при капиллярном кровотечении, при просачивании крови из десны в пришеечной области зуба, а также для ретракции десны перед снятием слепков.

СВОЙСТВА

Терапевтический эффект материала «ЖР-4», содержащий хлористый алюминий, связан с его вяжуще - сокращающим действием. Это гемостатическое средство останавливает апикальное кровотечение почти моментально, что позволяет успешно закончить механическую обработку каналов и сразу же приступить к их пломбированию без риска последующего окрашивания зуба.

Применение «ЖР-4» делает возможным немедленную и имеющую временный характер сжатия и открепления десны остановку кровотечения во время хирургического вмешательства или при протезировании.

Во время препарирования полостей, расположенных в пришеечной или поддесневой области, материал «ЖР-4» ставят на место матрицы или других приспособлений, вставляемых вдоль зуба в межзубный промежуток или заполняющих его.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При кровотечении из десны используют раствор для тампонирования и слегка сжимают десну.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость «ЖР-4» выпускается в флаконах по 15 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Жидкость «ЖР-4» следует хранить в сухом месте при температуре +4...25°C.

*Срок годности 1 год.
Примечание: на этикетке индивидуальной тары
первый ряд цифр обозначает № партии,
второй ряд цифр – годен до: месяц, год.*

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**ООО «Радуга-Р», Россия, г. Воронеж,
тел./факс: (4732) 78-50-45, 72-89-98**

