



Инструкция на программное обеспечение, необходимое для работы со стетоскопом электронным eKuore Pro

1. Операционная система ANDROID

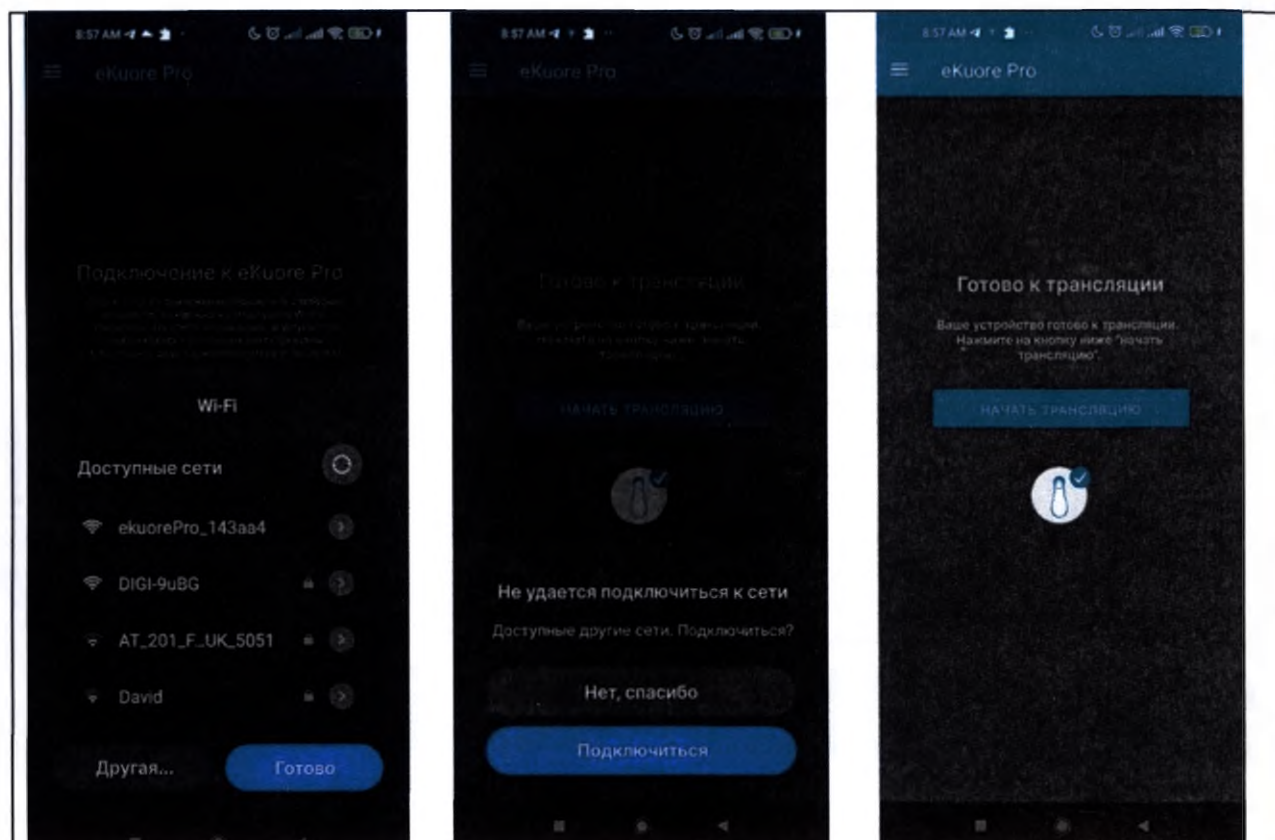

После запуска приложения подключите стетоскоп eKuore Pro, нажав кнопку «Настроить Wi-Fi». Убедитесь, что стетоскоп включен, и устройство отображается в доступных сетях (указаны 6 последних цифр серийного номера устройства). Нажмите на сеть Wi-Fi и выберите опцию «Нет, спасибо», т.к устройство не имеет доступа к сети Интернет.

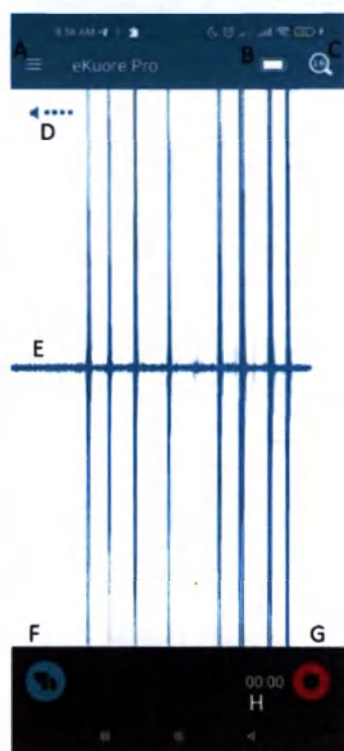

В режиме записи (состояние устройства, при котором приложение получает звук от стетоскопа) показаны следующие возможности:


- A) Опции
- B) Уровень заряда батареи
- C) Режим масштабирования, нажмите, чтобы изменить (16,8,4,2,1)
- D) Громкость устройства (от 1 до 5)
- E) Фонограмма
- F) Фильтр устройства, нажмите, чтобы изменить (сердечный, легочный, расширенный)
- G) Кнопка записи/остановки записи, нажмите, чтобы начать/остановить запись
- H) Время записи



Расширенный фильтр




Сердечный фильтр

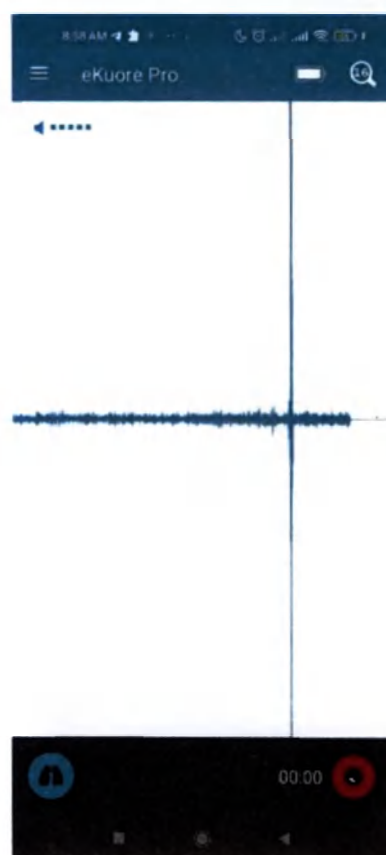


Легочный фильтр


Возможности фильтров

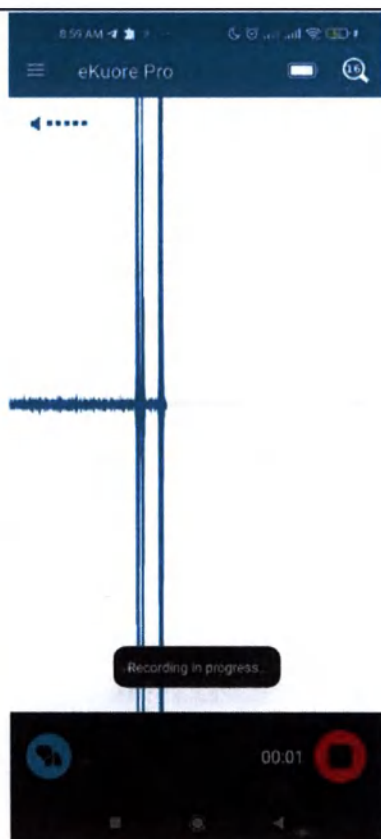



Начало записи

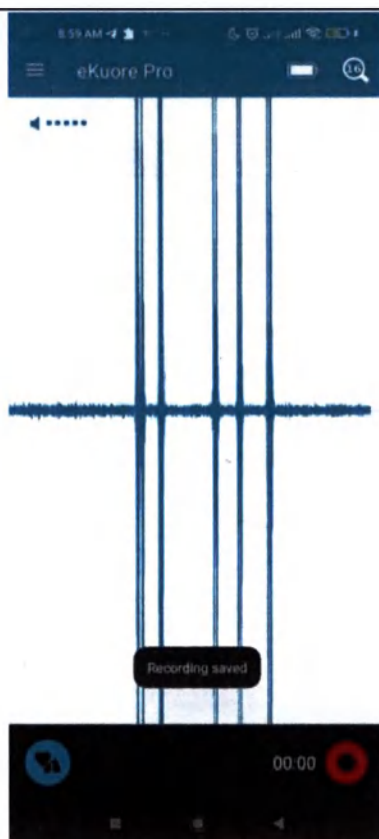

Сохраненная запись

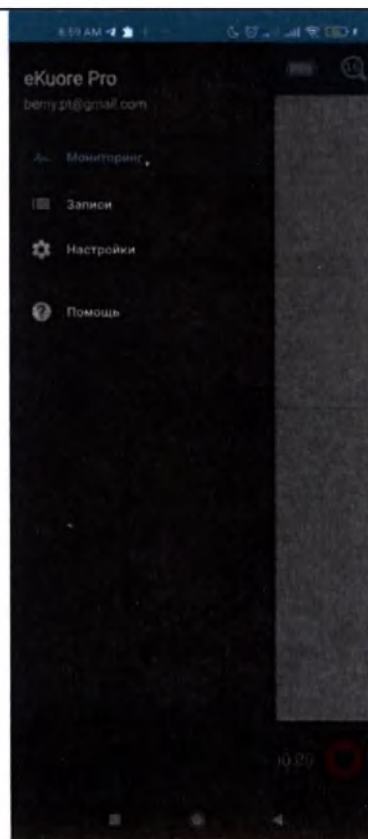

Для получения доступа к сохраненным записям необходимо нажать «Опции» и перейти к записям

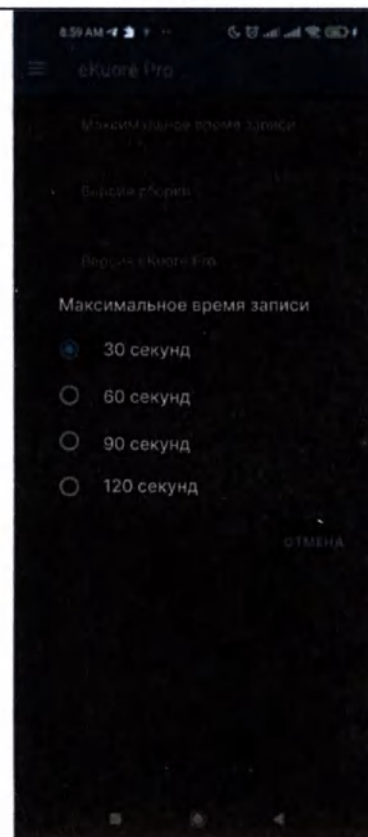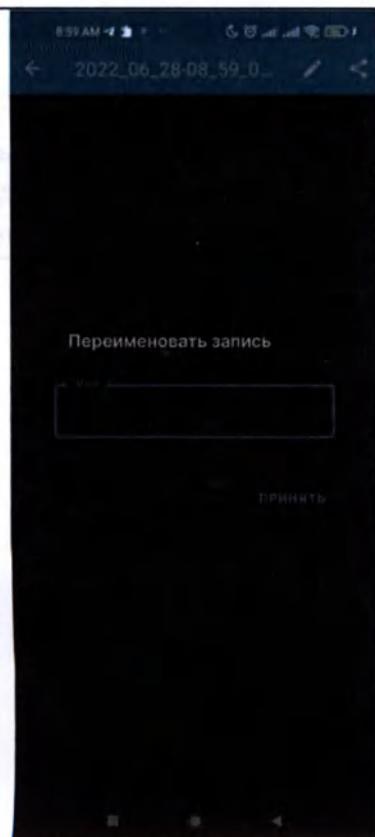


Пользователь может переименовывать записи


В разделе «Настройки» пользователь может увидеть серийный номер подключенного устройства

Максимальное время записи можно изменить (от 30 до 120 сек)


2. Операционная система iOS

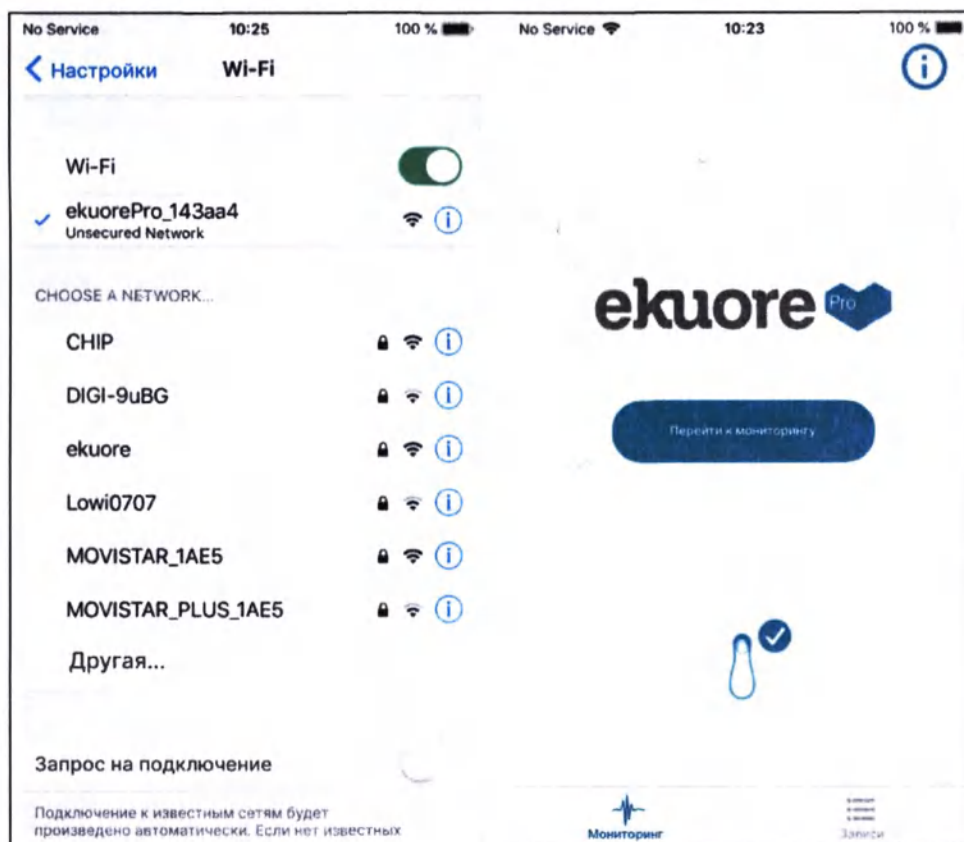

Перед запуском приложения подключите стетоскоп eKuore Pro к устройству для настройки Wi-Fi. Убедитесь, что стетоскоп включен, и устройство отображается в доступных сетях (указаны 6 последних цифр серийного номера устройства). Запустите приложением, оно будет готово к использованию.

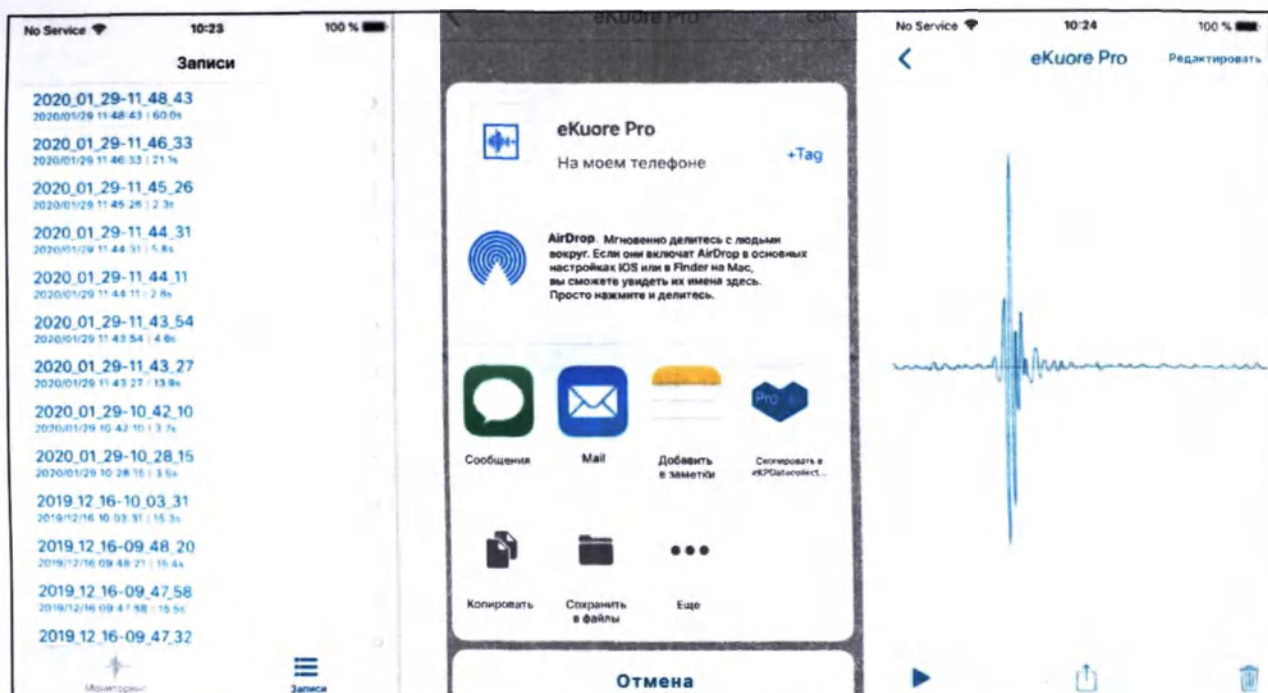


В приложении есть две основные области: Мониторинг и Запись. Можно просматривать сохраненные записи, делиться аудиофайлами и переименовывать их.

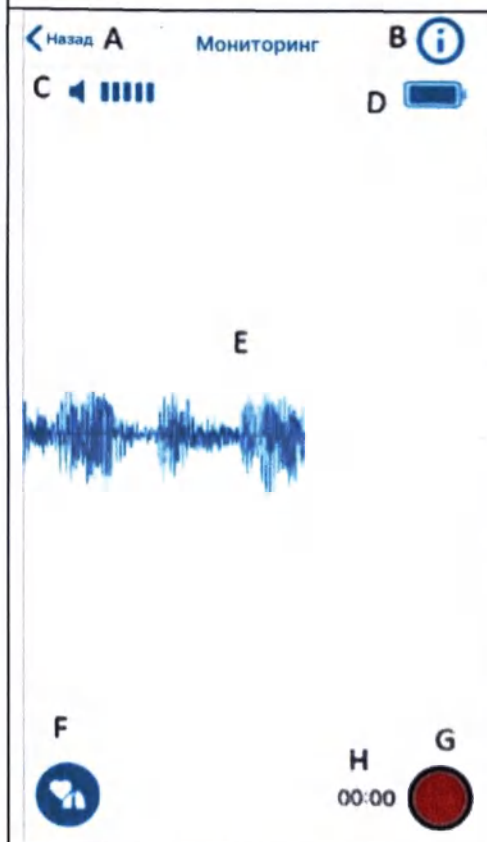


В режиме записи (состояние устройства, при котором приложение получает звук от стетоскопа) показаны следующие возможности:

- A) Опции
- B) Уровень заряда батареи
- C) Режим масштабирования, нажмите, чтобы изменить (16,8,4,2,1)
- D) Громкость устройства (от 1 до 5)
- E) Фонограмма
- F) Фильтр устройства, нажмите, чтобы изменить (сердечный, легочный, расширенный)
- G) Кнопка записи/остановки записи, нажмите, чтобы начать/остановить запись
- H) Время записи

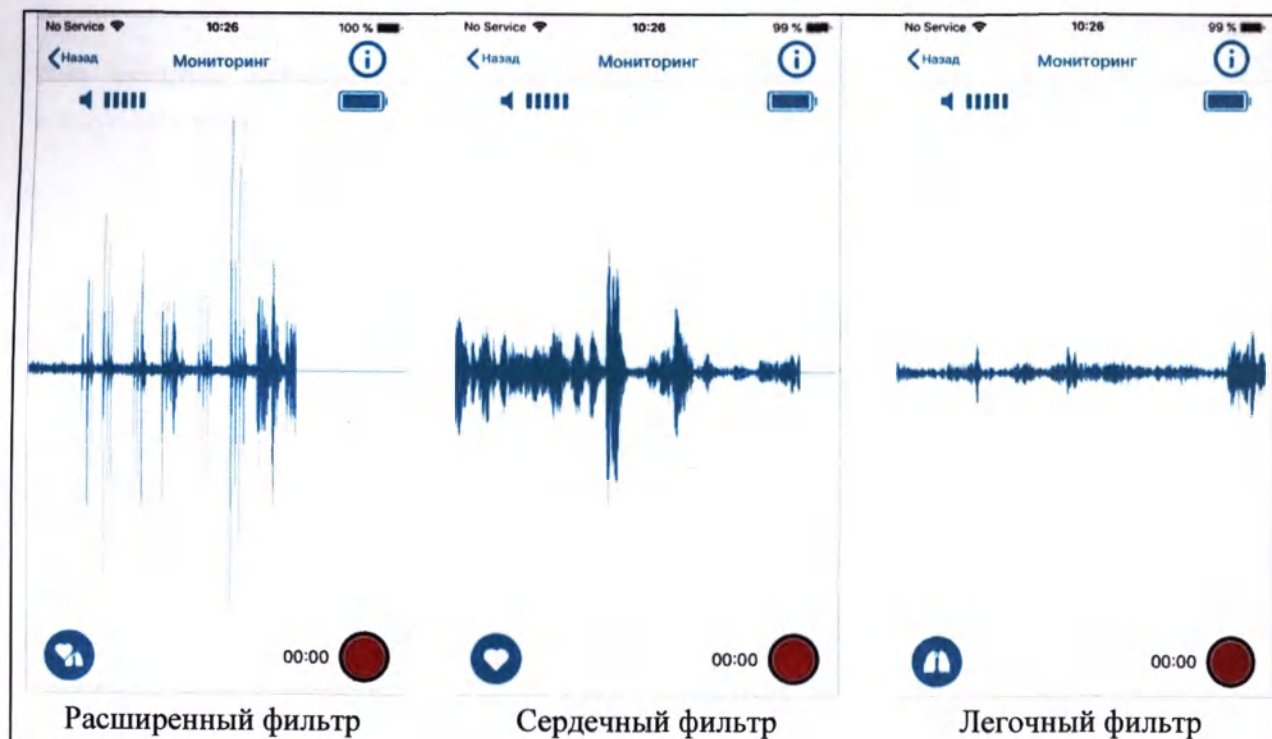

Возможности фильтров

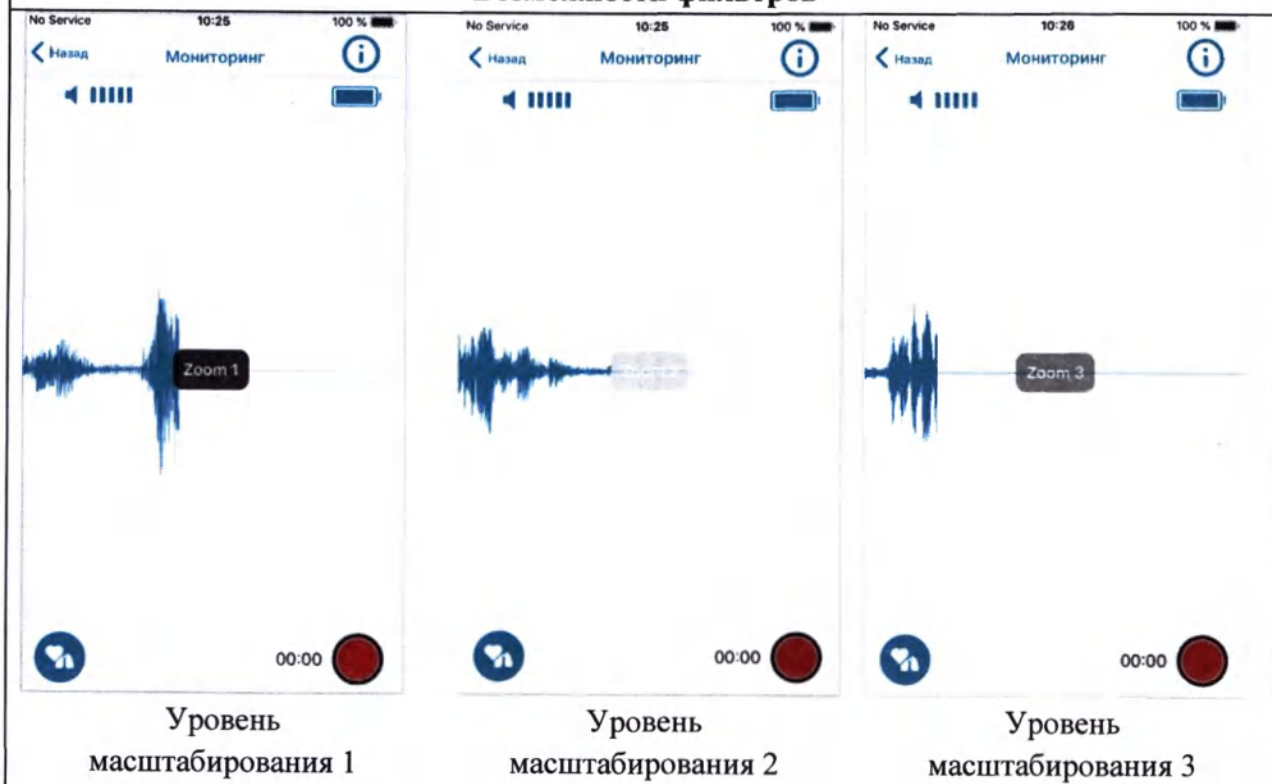

Имеются разные уровни масштабирования, для изменения масштаба нажмите на фонограмму

При нажатии кнопки информация отображается
следующая информация:

No Service

10:29

98 %

Мониторинг

Пользователя



email: berny.pt@gmail.com

App

Версия приложения: 1.2.2

WIFI

Текущая точка доступа WIFI: ekuorePro_143aa4

eKuore Pro

Версия: 01.10.07.00.00.08

Серийный номер: 66143AA4

No Service

10:26

100 %

Назад

Мониторинг



00:02



Начало записи

No Service

10:25

100 %

Назад

Мониторинг



00:00



Сохраненная запись

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов.

Генеральный директор
ООО «АВИВИР»

Куркин Ф.Г.



Вариант исполнения 1

Стетоскоп электронный Basic Kit eKuore Pro



ЧИП АЙДИАС ЭЛЕКТРОНИКС С.Л. (CHIP IDEAS ELECTRONICS, S.L.)
улица Альфарерия, 3, первый этаж, Бурхасот, 46100, Валенсия, Испания

Представитель производителя в РФ:

ООО «Авивир»
141401, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7
Тел. +7 (495) 740-99-20

Состав:

- 1) Стетоскоп электронный eKuore Pro – 1 шт.,
- 2) Проводные наушники – 1 шт.,
- 3) Микро USB-кабель – 1 шт.,
- 4) Насадка для аускультации размер L (44 мм) – 1 шт.,
- 5) Краткое руководство – 1 шт.
- 6) Руководство пользователя – 1 шт.

REF

EP0002

SN




ММ.ГГГГ

45°C
-20°C

РУ

Дата регистрации

CE

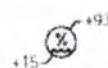

Вариант исполнения 2

Стетоскоп электронный Premium Kit eKuore Pro



ЧИП АЙДИАС ЭЛЕКТРОНИКС С.Л. (CHIP IDEAS ELECTRONICS, S.L.)
улица Альфарерия, 3, первый этаж, Бурхасот, 46100, Валенсия, Испания

Представитель производителя в РФ:

ООО «Авивир»

141401, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7

Тел. +7 (495) 740-99-20

Состав:

- 1) Стетоскоп электронный eKuore Pro – 1 шт.,
- 2) Проводные наушники – 1 шт.,
- 3) Накладные наушники – 1 шт.,
- 4) Микро USB-кабель – 1 шт.,
- 5) Насадка для аускультации (размер S, M, L) – 3 шт.,
- 6) Беспроводной динамик – 1 шт.,
- 7) Краткое руководство – 1 шт.,
- 8) Руководство пользователя – 1 шт.,
- 9) Кейс для хранения – 1 шт.

REF

EP0000

SN




ММ.ГГГГ

45°C
-20 °C

РУ

Дата регистрации

CE

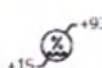

**Итоговый вариант этикетки может быть изменен по усмотрению производителя.*




Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.


Генеральный директор

ООО «АВИВИР»

Куркин Ф.Г.



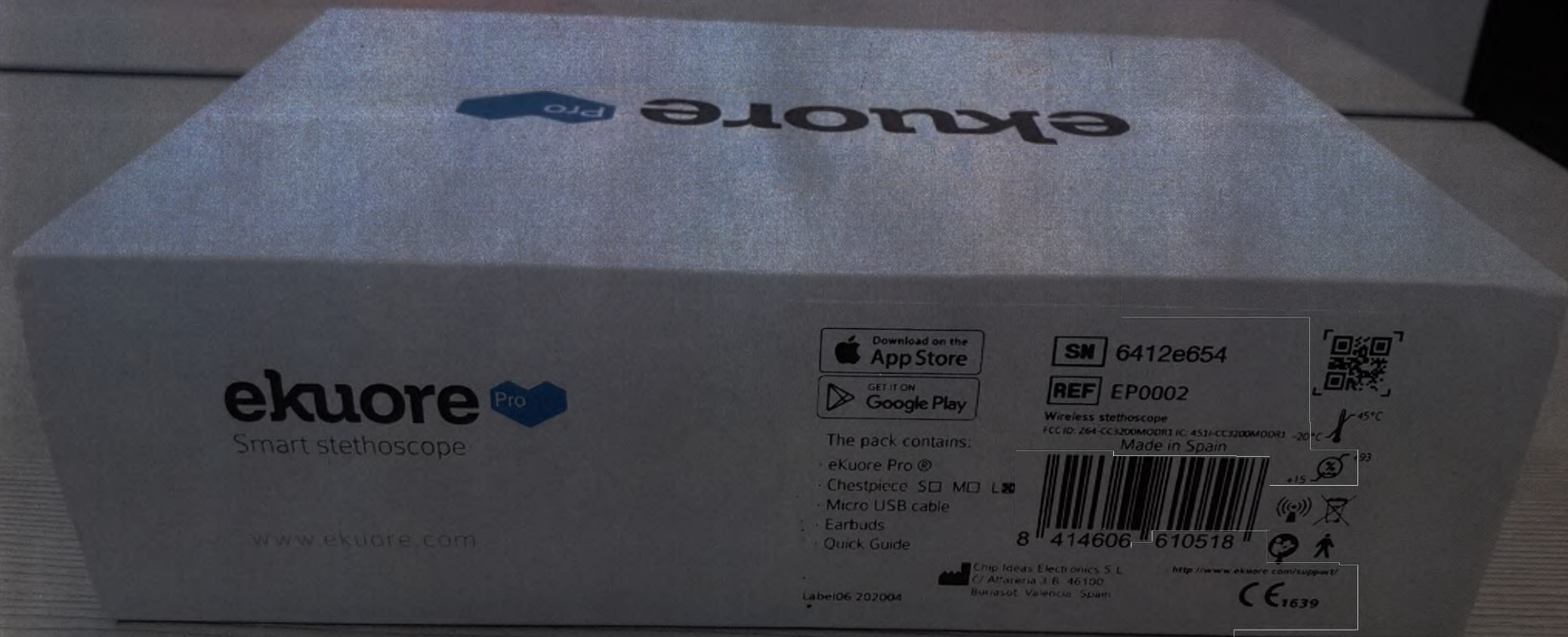

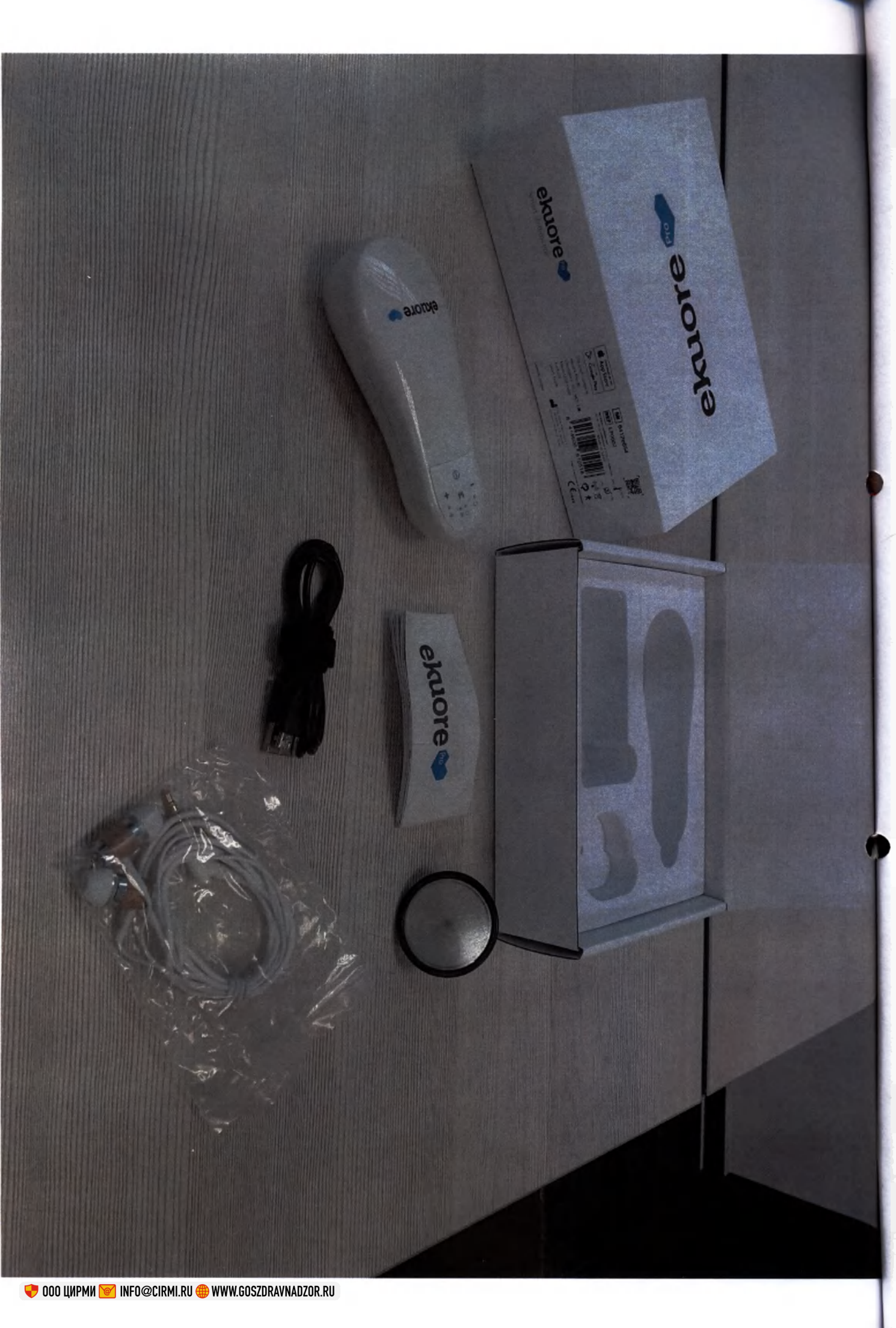












Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов.

Генеральный директор
ООО «АВИВИР»

 Куркин Ф.Г.



ekmore

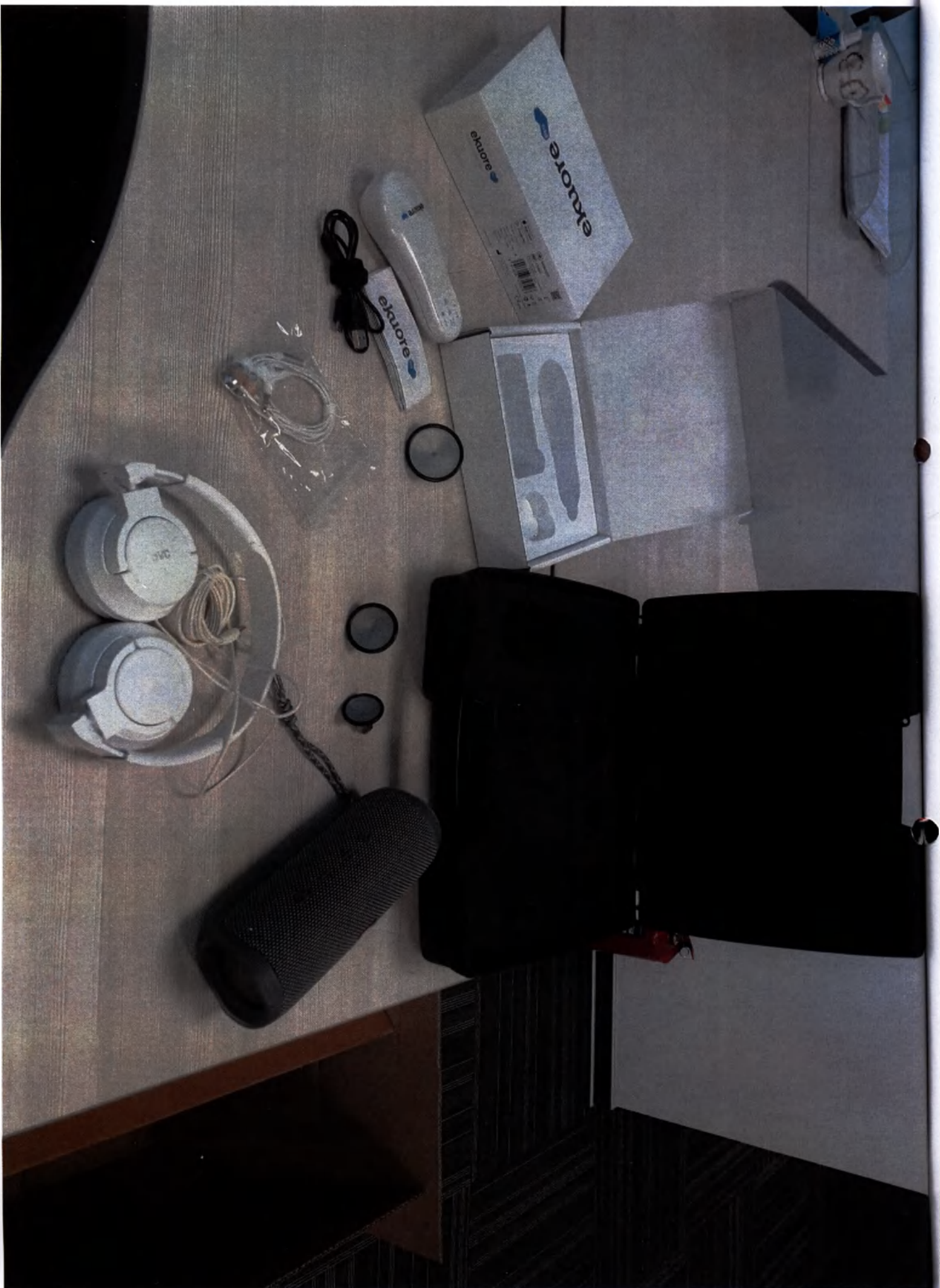














Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.

Генеральный директор

ООО «АВИВИР»

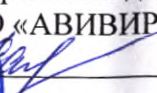 Куркин Ф.Г.